

Инструкция по применению

Ходунки шагающие складные Х-1С, предназначены для опоры при ходьбе людей массой до 120 кг и ростом от 165 см до 190 см, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, а также инвалидов и престарелых.

Ходунки состоят из двух "П" -образных опор (1), шарнирно скрепленных между собой перекладинами (2, 3). Каждая опора имеет две ножки (5) с отверстиями и фиксирующими кнопками (7), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки передней и задней опор оснащены резиновыми наконечниками (6), с внутренним диаметром 28 мм. (См. рис.1) Принцип действия ходунков состоит в попеременной перестановке опор и отображен на рис.2.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующих кнопок. При складывании необходимо одновременно нажать фиксирующую кнопку (8) и одну из кнопок (4), затем повернуть соответствующую опору. Подробнее написано ниже.

Для регулирования высоты ходунков необходимо: последовательно на каждой из 4-х ножек ходунка нажать фиксирующую кнопку (7). Сдвинуть трубки ножки (5) относительно друг друга на нужную длину, и при совмещении отверстий зафиксировать положение кнопкой. Шаг регулировки высоты ходунка - 25 мм.

Для складывания ходунков необходимо: нажать фиксирующую кнопку (8) на малой перекладине (2), и одновременно одну из кнопок (4) расположенных на большой перекладине (3) в передней части ходунка, затем повернуть соответствующую опору вплотную к большой перекладине, далее повторить действие с другой опорой.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми опорами!

Соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех 4-х опор с поверхностью, по которой происходит передвижение!

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Х-1С

Высота, мм	Min	Max
	790	960
Шаг перестановки по высоте		25
Ширина		505
Глубина		500
Длина шага		450
Нагрузка, кг		120
Вес ходунков		2,4

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ С ХОДУНКАМИ

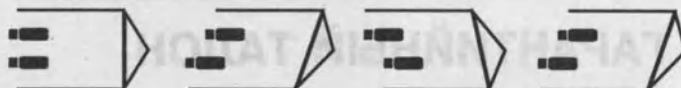


РИС.2

Хранить ходунки в сухом, закрытом помещении при Т от 0°C до 20°C и относительной влажности воздуха 65% вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.


Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Производитель: ООО "АВЕРСУС"

Юр. адрес: Россия, 113461, г.Москва, ул.Каховка, д.20, стр.2

Почтовый адрес: Россия, 129347, Югорский пр-д, д.2, стр.3

Тел.: (495) 637-93-00, 188-65-83; info@aversus.ru; www.aversus.ru

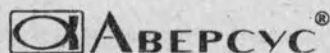

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ



ИМО 2

сертификат соответствия № РОСС RU.ИМО2.В11453

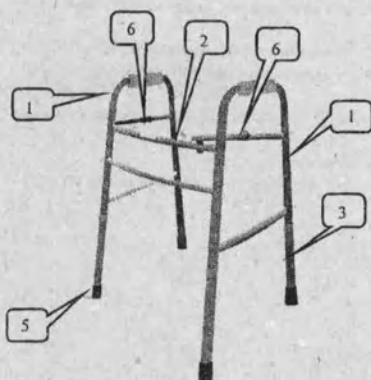


РИС. 1

ХОДУНКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (СКЛАДНЫЕ) Х-ЗС

Дата выпуска _____
Сборщик № _____
ОТК _____
Партия № _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки складные Х-ЗС изготовлены по
ГОСТ Р 51080-97 (ИСО 11199-1-96)
Гарантийный срок - 1 год со дня продажи при соблюдении правил
эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой
о дате выпуска, и товарного чека торговой организации.

Изготовитель ООО "Аверсус" Россия г. Москва

Инструкция по применению

Ходунки для взрослых складные Х-ЗС, предназначены для опоры при ходьбе людей массой до 120 кг и ростом от 165 см до 190 см, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, а также инвалидов и престарелых. Ходунки состоят из двух "П"-образных опор (1), скрепленных между собой перекладиной (2). Каждая опора имеет две стойки с отверстиями и фиксирующими кнопками, позволяющими регулировать высоту ходунков (3). Стойки передней и задней опор оснащены резиновыми наконечниками (5) с внутренним диаметром 28 мм. (См. Рис. 1) Принцип действия ходунков состоит в перестановке ходунков по формуле: шаг - перестановка - шаг.

Для регулирования высоты ходунков необходимо: последовательно на каждой из 4-х ножек ходунка нажать фиксирующую кнопку. Сдвинуть трубки ножки относительно друг друга на нужную длину, и при совмещении отверстий зафиксировать положение кнопкой. Шаг регулировки высоты ходунка - 25 мм.

Для складывания ходунков необходимо: нажать фиксирующие кнопки на малых перекладинах (6), затем последовательно повернуть опоры (1) вплотную к большой перекладине.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми опорами!

Соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех 4-х опор с поверхностью, по которой происходит передвижение!

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Х-ЗС

Высота, мм	Min	Max
	790	960
Шаг перестановки по высоте		25
Ширина		505
Глубина		500
Нагрузка, кг		120
Вес ходунков, кг		2,4

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при T от 0С до 20С и относительной влажности воздуха 65% вдали от нагревательных приборов.

Изготовитель: ООО "Аверсус" Юр. адрес: Россия 113461 г. Москва, ул. Каховка, д.20, стр.2.

Почтовый адрес: 129334 г. Москва, ул. Енисейская, д. 1, тел. факс: (095)184-12-27, info@aversus.ru www.aversus.ru

Зарегистрированный товарный знак



АВЕРСУС®



сертификат соответствия

№ РОСС RU.ИМО2.В14630

ХОДУНКИ ДЕТСКИЕ ШАГАЮЩИЕ (СКЛАДНЫЕ) ХД-1С

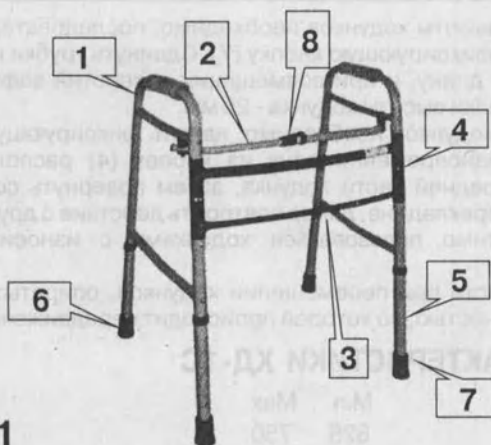


РИС.1

Дата выпуска _____

Сборщик № _____

ОТК _____

Партия № _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки детские шагающие складные ХД-1С изготовлены по ГОСТ Р 51078-97 (ИСО 11199-1-96) Гарантийный срок - 1 год со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Изготовитель ООО "Аверсус" Россия, г.Москва

Рег. удостов. Минздравсоцразвития № ФС 03012005/1250-05 от 28.03.2005г.

Инструкция по применению

Ходунки детские шагающие складные ХД-1С, предназначены для опоры при ходьбе людей массой до 60 кг и ростом до 165 см, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей.

Ходунки состоят из двух "П" -образных опор (1), шарнирно скрепленных между собой перекладинами (2, 3). Каждая опора имеет две ножки (5) с отверстиями и фиксирующими кнопками (7), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки опор оснащены резиновыми наконечниками (6), с внутренним диаметром 28 мм. (См. рис.1) Принцип действия ходунков состоит в попеременной перестановке опор и отображен на рис.2.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующих кнопок. При складывании необходимо одновременно нажать фиксирующую кнопку (8) и одну из кнопок (4), затем повернуть соответствующую опору. Подробнее написано ниже.

Для регулирования высоты ходунков необходимо: последовательно на каждой из 4-х ножек ходунка нажать фиксирующую кнопку (7). Сдвинуть трубки ножки (5) относительно друг друга на нужную длину, и при совмещении отверстий зафиксировать положение кнопкой. Шаг регулировки высоты ходунка - 25 мм.

Для складывания ходунков необходимо: нажать фиксирующую кнопку (8) на малой перекладине (2), и одновременно одну из кнопок (4) расположенных на большой перекладине (3) в передней части ходунка, затем повернуть соответствующую опору вплотную к большой перекладине, далее повторить действие с другой опорой.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми опорами!

Соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех 4-х опор с поверхностью, по которой происходит передвижение!

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХД-1С

Высота, мм	Min	Max
	625	750
Шаг перестановки по высоте		25
Ширина		480
Глубина		460
Нагрузка, кг		60
Вес ходунков		2,1

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ С ХОДУНКАМИ

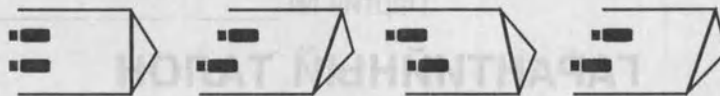


РИС.2

Хранить ходунки в сухом, закрытом помещении при Т от 0°C до 20°C и относительной влажности воздуха 65% вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Производитель: ООО "АВЕРСУС"

Юр. адрес: Россия, 113461, г.Москва, ул.Каховка, д.20, стр.2

Почтовый адрес: Россия, 129347, Югорский пр-д, д.2, стр.3

Тел.: (495) 637-93-00, 188-65-83; info@aversus.ru; www.aversus.ru