

Инструкция

по применению изделия медицинского назначения для потребителя

(аннотация-вкладыш)

1. Название изделия медицинского назначения

«Салфетка спиртовая для инъекций»

2. Состав и описание изделия

Салфетка спиртовая для инъекций изготовлена из нетканого полотна размером 65х30 мм пропитана раствором 70% этилового спирта и упакована в трехслойный индивидуальный пакет.

3. Область применения:

Предназначена для обработки инъекционного поля до и после инъекции в лечебных учреждениях, в детских школьных и дошкольных учреждениях, учреждениях соц. обеспечения, скорой помощи и экстремальной медицине. Так же возможно использовать для обработки рук, поверхностей инструментов.

4. Способ применения:

Извлеченной из упаковки (извлекать салфетку непосредственно перед самой процедурой проведения инъекции) спиртовой салфеткой обрабатывается кожный покров поля инъекции в радиусе 3-7 см. до и после инъекции. Не протирать слизистые оболочки и открытые раны.

Побочное действие: индивидуальная непереносимость пропитывающего состава.

После применения уничтожить согласно СанПин 2.1.7.7.28-99

5 Условия хранения:

Хранить при температуре от -20 до + 40гр.С. При данных температурах салфетка сохраняет свои свойства в течение всего срока годности.

Хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня.

Срок годности салфетки три года, с даты изготовления, указанной на упаковке.

Производитель гарантирует в течение всего срока годности соответствие качества салфетки спиртовой общим требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Не применять для обработки открытых ран и слизистых оболочек.

Не применять после истечения срока годности.

Указания по методам стерилизации: **стерильно.**

6. Наименование, юридический адрес организации-производителя изделия медицинского назначения, адрес местонахождения производства

ТОО «ФАИЗ» Казахстан г.Алматы ул. Толе би 282-10 Казахстан г.Астана ул. Дулатова 182/2

Официальный представитель в России

ООО «ДУЧИмед» Россия Алтайский край 656021 г. Барнаул ул. Кузнецова 133

Тел. 89039477943, 89050845604

v.d. 150553@gmail.com

Директор ТОО «ФАИЗ»

И.М. Чукобаев



Директор

ООО «ДУЧИмед»

Н.В. Дубровская

