

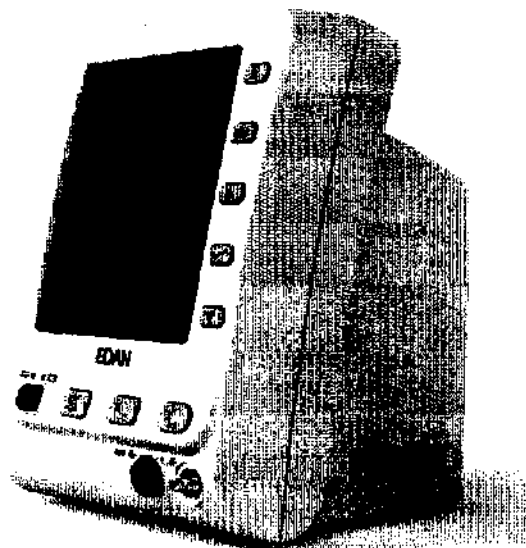


Рисунок 1-1 M3 Монитор показателей жизнедеятельности пациента

M3 Монитор показателей жизнедеятельности пациента может мониторировать следующие показатели:

- НИАД (NIBP):** Систolicкое давление (SYS);
 Диastolicкое давление (DIA);
 Среднее давление (MAP);
- SpO₂:** Сатурация (SpO₂);
 Частота пульса (PR);
 SpO₂ PLETH плетизмограмма (Plethysmogram)

Монитор M3 обладает расширенным набором функций, такими как сигнал тревоги (сообщение на экране или звуковой сигнал), запись и хранение кривых, обзор измерений SpO₂/НИАД, возможность подключения к сети, вызов медсестры, комплекс мер в случае сигнала тревоги и другие. Дополнительными возможностями монитора являются наличие самописца, беспроводное подключение к сети и возможность перевозки.

1.2 Экран монитора

Монитор M3 оснащен ЖК-экраном, на котором отображаются такие характеристики как параметры пациента, графики, сообщения тревоги, номер койки, время, статус монитора и другие.

Экран разделен на три области:

1. Область параметров (1)
2. Графики / Таблица динамики / Список тревожных событий (2)