



1. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Подготовка пациента к измерениям

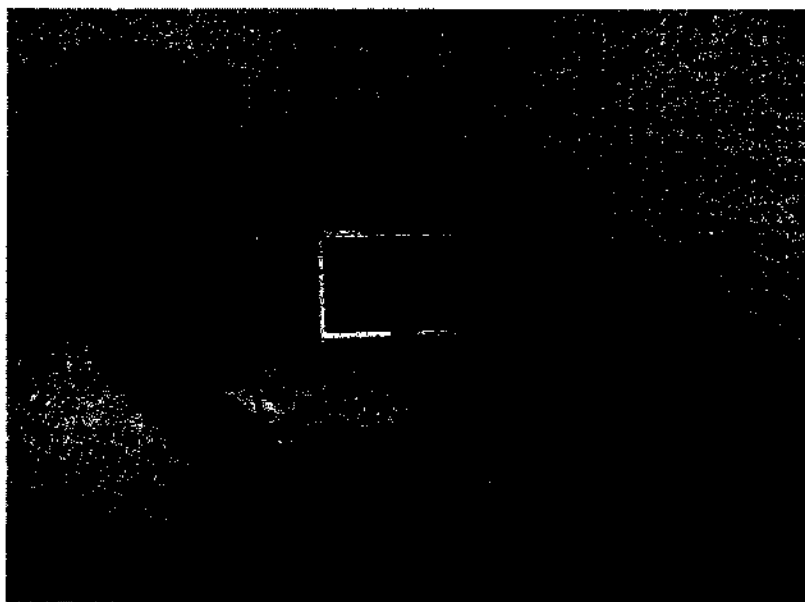

При проведении измерений пациент должен сидеть на стуле, не касаясь посторонних металлических предметов и конструкций. Обратите внимание на электростатические эффекты: при необходимости перед измерением предложите пациенту избавиться от заряда статического электричества путём кратковременного прикосновения к любому заземлённому проводнику (батарея отопления, смеситель и т.п.).

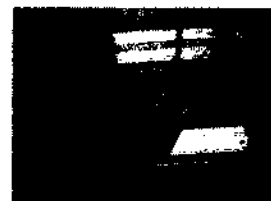

Перед обследованием необходимо протереть электроды спиртом, а затем — салфеткой, пропитанной формальдегидом (бактерицидной, фунгицидной и противовирусной). Пациент должен оголить ступни ног и снять все металлические предметы (часы, браслет, кольцо, очки) перед подсоединением электродов. Удалите со лба пациента крем, пудру и прочие косметические средства. Измерения обычно проводятся при сухой коже и сухих электродах. Исключение составляют мягкие многоразовые электроды: их необходимо слегка смочить водой перед измерениями. При очень сухой коже участки лба, рук и ног, находящиеся в контакте с электродами, могут быть обработаны физиологическим раствором, а затем слегка просушены (т.е. быть не мокрыми, а слегка влажными). Чрезмерное потоготделение не позволяет получить верные результаты