



УТВЕРЖДАЮ  
Франсис КЕССУС  
Генеральный директор  
«5 » марта 2019 г

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению медицинского изделия**

Оправы корректирующих очков с транспортировочными вставками металлические,  
пластмассовые, комбинированные с принадлежностями  
(с учетом замечаний, указанный в запросе ФС Росздравнадзора № 04-9184/19 от 28.02.2019)

Je soussigné, M<sup>e</sup> COMTE,  
Notaire à Lyon, certifie  
sincère et véritable la  
signature apposée ci-dessous.



2019 г.

**SEAFORT S.A.S.**  
8 chemin des Hirondelles  
69570 DARDILLY  
Tel. 04 72 52 01 70 - Fax 04 78 35 91 70  
RCS LYON 493 421 051

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Оправы корректирующих очков с транспортировочными вставками металлические, пластмассовые, комбинированные с принадлежностями (далее по тексту – оправы, оправа корректирующих очков) предназначены для фиксации линз и правильного положения линз относительно глаз.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ


Оправы корректирующих очков с транспортировочными вставками металлические, пластмассовые, комбинированные с принадлежностями изготовлены из материалов, которые не вызывают раздражение, аллергические или токсические реакции в процессе их эксплуатации при контакте с кожей человека.

Оправы корректирующих очков состоят из рамки, заушников, носовых упоров, шарниров. Шарниры могут быть простыми и пружинными.



Оправы корректирующих очков характеризуют пять основных геометрических параметров:

- Расстояние между вертикальными касательными к ободку (а)
- Минимальное расстояние между вертикальными касательными к основанию фасетной канавки ободков (б)
- длина заушников (L),
- масса оправы без линз (г),
- Длина заушника до изгиба наконечника (N).

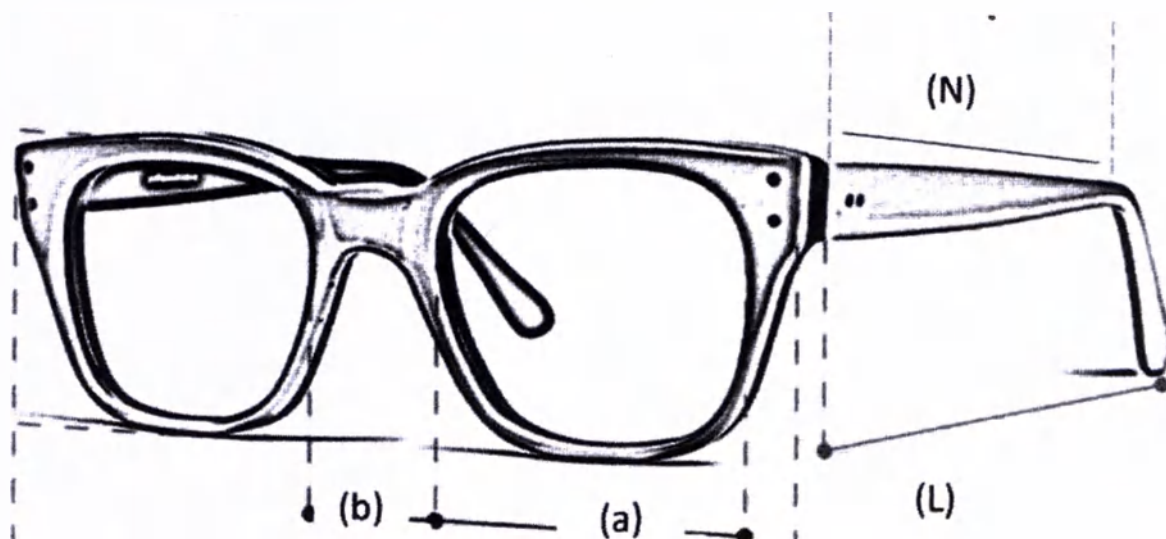

- Соответствующие размеры оправ фирмы SEAPORT SAS приведены в таблице:

| Материал / тип оправы               | Мужские/Женские /детские | Расстояние между вертикальными касательными к ободку (а, мм) | Минимальное расстояние между вертикальными касательными к основанию фасетной канавки ободков (Ь, мм) | Длина заушника (L, мм) | Масса оправы без линз (г) | Длина заушника (N, мм) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Легкопластмассовые ободковые оправы | Женские                  | 50±0,2 mm                                                    | 17±0,2 mm                                                                                            | 135±1,0 mm             | 24,00 ±1,0                | 95±1                   |
|                                     |                          | 47±0,2 mm                                                    | 16±0,2 mm                                                                                            | 135±1,0 mm             | 24,00 ±1,0                | 90±1                   |
|                                     |                          | 47±0,2 mm                                                    | 18±0,2 mm                                                                                            | 135±1,0 mm             | 24,00 ±1,0                | 90±1                   |
|                                     |                          | 48±0,2 mm                                                    | 17±0,2 mm                                                                                            | 135±1,0 mm             | 24,00 ±1,0                | 90±1                   |
|                                     |                          | 53±0,2 mm                                                    | 15±0,2 mm                                                                                            | 135±1,0 mm             | 24,00 ±1,0                | 90±1                   |
|                                     |                          | 51±0,2 mm                                                    | 17±0,2 mm                                                                                            | 135±1,0                | 24,00 ±1,0                | 90±1                   |

|           |           | mm *       |            |          |
|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| 52±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 93±1     |
| 53±0,2 mm | 14±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 93±1     |
| 51±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
| 49±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
| 49±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
| 49±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
| 49±0,2 mm | 19±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
| 52±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 94±1     |
| 49±0,2 mm | 17±0,2 mm | 140±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 10C<br>n |
| 48±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1     |
| 52±0,2 mm | 15±0,2 mm | 137±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1     |
| 49±0,2 mm | 18±0,2 mm | 137±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 92±1     |
| 51±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1     |
| 49±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1     |
| 48±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1     |
| 46±0,2 mm | 19±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1     |
| 49±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1     |
| 51±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1     |
| 47±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1     |
| 48±0,2 mm | 19±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1     |
| 51±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1     |
| 49±0,2 mm | 19±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
| 50±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
| 47±0,2 mm | 18±0,2 mm | 140±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 10C<br>n |
| 50±0,2 mm | 17±0,2 mm | 140±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 10C<br>n |

|           |           |            |            |      |
|-----------|-----------|------------|------------|------|
| 51±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |
| 50±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |
| 50±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |
| 48±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |
| 53±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 93±1 |
| 50±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 93±1 |
| 49±0,2 mm | 20±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 97±1 |
| 49±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 96±1 |
| 52±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 96±1 |
| 48±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 96±1 |
| 47±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 93±1 |
| 52±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 93±1 |
| 51±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 93±1 |
| 50±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 93±1 |
| 51±0,2 mm | 16±0,2 mm | 130±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1 |
| 52±0,2 mm | 15±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |
| 50±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |
| 52±0,2 mm | 15±0,2 mm | 130±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1 |
| 52±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |
| 51±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |
| 50±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |
| 49±0,2 mm | 19±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |
| 52±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |
| 51±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |
| 50±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |
| 49±0,2 mm | 19±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1 |

|         |           |           |            |            |       |
|---------|-----------|-----------|------------|------------|-------|
|         |           |           | mm         |            |       |
|         | 53±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|         | 53±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|         | 52±0,2 mm | 17±0,2 mm | 130±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1  |
| Мужские | 47±0,2 mm | 20±0,2 mm | 145±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 100 n |
|         | 50±0,2 mm | 20±0,2 mm | 145±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 100 n |
|         | 53±0,2 mm | 18±0,2 mm | 145±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 100 n |
|         | 54±0,2 mm | 20±0,2 mm | 145±1,0 mm | 24,00 ±1,1 | 100 n |
|         | 49±0,2 mm | 20±0,2 mm | 145±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 105 n |
|         | 54±0,2 mm | 19±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|         | 53±0,2 mm | 17±0,2 mm | 140±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 100 n |
|         | 55±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|         | 49±0,2 mm | 20±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|         | 46±0,2 mm | 20±0,2 mm | 145±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 100 n |
|         | 45±0,2 mm | 20±0,2 mm | 145±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 100 n |
|         | 50±0,2 mm | 20±0,2 mm | 145±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 100 n |
|         | 52±0,2 mm | 18±0,2 mm | 145±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 100 n |
|         | 48±0,2 mm | 20±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|         | 48±0,2 mm | 20±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|         | 55±0,2 mm | 15±0,2 mm | 140±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 100 n |
| детские | 49±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|         | 48±0,2 mm | 16±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|         | 48±0,2 mm | 15±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|         | 47±0,2 mm | 18±0,2 mm | 130±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1  |
|         | 48±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|         | 46±0,2 mm | 18±0,2 mm | 130±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1  |

|                                   |         |           |           |               |            |          |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|------------|----------|
| Металлические<br>ободковые оправы |         | 42±0,2 mm | 18±0,2 mm | 125±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 85±1     |
|                                   |         | 44±0,2 mm | 18±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   |         | 47±0,2 mm | 14±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 80±1     |
|                                   |         | 44±0,2 mm | 16±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   |         | 43±0,2 mm | 17±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   |         | 45±0,2 mm | 17±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   |         | 46±0,2 mm | 16±0,2 mm | 125±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 85±1     |
|                                   |         | 48±0,2 mm | 15±0,2 mm | 125±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 85±1     |
|                                   |         | 46±0,2 mm | 17±0,2 mm | 125±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 85±1     |
|                                   |         | 47±0,2 mm | 16±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   |         | 43±0,2 mm | 15±0,2 mm | 125±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 85±1     |
|                                   |         | 44±0,2 mm | 16±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   |         | 46±0,2 mm | 17±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   |         | 45±0,2 mm | 17±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   | Женские | 48±0,2 mm | 19±0,2 mm | 132±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 92±1     |
|                                   |         | 52±0,2 mm | 16±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   |         | 51±0,2 mm | 17±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 18,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   |         | 52±0,2 mm | 17±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   |         | 51±0,2 mm | 18±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   |         | 48±0,2 mm | 20±0,2 mm | 135±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 95±1     |
|                                   |         | 50±0,2 mm | 18±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   |         | 50±0,2 mm | 17±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   |         | 52±0,2 mm | 17±0,2 mm | 130±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 90±1     |
|                                   | Мужские | 53±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 95±1     |
|                                   |         | 48±0,2 mm | 21±0,2 mm | 147±1,0<br>mm | 24,00 ±1,0 | 105<br>n |
|                                   |         | 47±0,2 mm | 21±0,2 mm | 147±1,0       | 24,00 ±1,0 | 105      |

|                                  |         |           |           |            |            |       |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|-------|
|                                  |         |           |           | mm         |            | n     |
|                                  |         | 49±0,2 mm | 20±0,2 mm | 145±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 105 n |
|                                  |         | 52±0,2 mm | 19±0,2 mm | 145±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 105 n |
|                                  |         | 54±0,2 mm | 16±0,2 mm | 140±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 100 n |
|                                  |         | 53±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|                                  |         | 54±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
| Комбинированные ободковые оправы | Женские | 52±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1  |
|                                  |         | 48±0,2 mm | 20±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1  |
|                                  |         | 46±0,2 mm | 20±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1  |
|                                  |         | 46±0,2 mm | 21±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1  |
|                                  |         | 50±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|                                  |         | 49±0,2 mm | 20±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|                                  |         | 48±0,2 mm | 20±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|                                  | Мужские | 50±0,2 mm | 21±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|                                  |         | 52±0,2 mm | 21±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|                                  |         | 53±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|                                  |         | 48±0,2 mm | 22±0,2 mm | 145±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 105 n |
|                                  |         | 47±0,2 mm | 22±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
| Полуободковые оправы             | Женские | 51±0,2 mm | 18±0,2 mm | 130±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1  |
|                                  |         | 50±0,2 mm | 18±0,2 mm | 130±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1  |
|                                  |         | 48±0,2 mm | 20±0,2 mm | 130±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1  |
|                                  | Мужские | 53±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |
|                                  |         | 52±0,2 mm | 17±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 90±1  |
|                                  |         | 53±0,2 mm | 18±0,2 mm | 135±1,0 mm | 24,00 ±1,0 | 95±1  |

На поверхности оправ не должно быть острых кромок и заусенцев, видимых невооруженным глазом раковин, царапин, пузырей, наплывов припоя.

Заушники должны поворачиваться на оси плавно, без заеданий.

Оправы корректирующих очков соответствуют стандартам: EN ISO 12870:2004

Оправы корректирующих очков подбираются с учетом антропометрических данных пациента. Для принятия решения о применении данного способа коррекции зрения необходимо проконсультироваться с медицинским работником.

3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Коррекция дефектов оптики глаз:

- миопии (myopia)- близорукость,
- пресбиопия (presbyopia) - дальнозоркость
- астигматизм (astigmatismus)
- гиперметропия (hypermetropia) слабый вид клинической рефракции
- анизометропия(разница в рефракциях на глазах)
- кератоконус и др.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ можно считать:

- индивидуальная непереносимость коррекции зрения с помощью очков;
- невозможность коррекции зрения с помощью очков.

5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Оправы изготовлены из материалов, которые не могут вызвать раздражение, аллергические или токсические реакции в процессе их эксплуатации при контакте с кожей человека.

| Наименование изделия/элемента |                        | Материал                                                                                                        |                  |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Пластмассовые оправы          | Пластмассовые оправы   | Ацетилцеллюлоза<br>RHODOID/XELOX-S                                                                              |                  |
|                               |                        | Ацетилцеллюлоза M49                                                                                             |                  |
|                               |                        | Ацетилцеллюлоза                                                                                                 | XELOX-T/OPTIROID |
|                               |                        | Ацетилцеллюлоза<br>CEBLOX/TECBLOC                                                                               |                  |
|                               | Наконечники заушников  | Ацетилцеллюлоза                                                                                                 | XELOX-T/OPTIROID |
|                               |                        | Ацетилцеллюлоза<br>CEBLOX/TECBLOC                                                                               |                  |
| Комбинированные оправы        | Комбинированные оправы | Stainless steel – нержавеющая сталь<br>Fe 70-71%, C 0.08% Si 0.75% Mn 1.76% P 0.025% S 0.09% Ni 8.02% Cr 18.35% |                  |
|                               |                        | Ацетилцеллюлоза<br>RHODOID/XELOX-S                                                                              |                  |
|                               |                        | Ацетилцеллюлоза M49                                                                                             |                  |
|                               | Наконечники заушников  | Ацетилцеллюлоза                                                                                                 | XELOX-T/OPTIROID |

| Наименование изделия/элемента |                                        | Материал                                                                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Металлические оправы          |                                        | Ацетилцеллюлоза<br>CEBLOX/TECBLOC                                                                      |
|                               | Носоупоры                              | 100% Силикон GYO YUAN<br>производство компании GARBO                                                   |
|                               | Полубодковые оправы                    | Stainless steel – нержавеющая сталь<br>C 0.08% Si 0.75% Mn 1.76% P 0.025%<br>S0.09% Ni 8.02% Cr 18.35% |
|                               |                                        | Ацетилцеллюлоза<br>RHODOID/XELOX-S                                                                     |
|                               | Наконечники заушников                  | Ацетилцеллюлоза M49                                                                                    |
|                               |                                        |                                                                                                        |
|                               | Носоупоры                              | 100% Силикон GYO YUAN                                                                                  |
|                               | Фиксирующая нить из нержавеющей стали. | stainless steel нержавеющая сталь C<br>0.08% Si 0.75% Mn 1.76% P 0.025%<br>S0.09% Ni 8.02% Cr 18.35%   |

## Материалы, используемые для изготовления футляров

### Футляр Джунгли (Jungle),

**Состав:** 72,38%(железо)+5,72%(полиуретан) + 1,69% (древесная крошка) + 4,61% (полиэстер) + 5,16% (карбонат кальция) + 2,20% (хлопок) + 6,17% (полиэтилен).

### Футляр ЧЕРНЫЙ Бархат (Velours),

**Состав:** 61,41% (железо) + 7,15% (нейлон) + 1,79%(вискоза) + 6,03% (полиуретан) + 3,57% (кальций) + 7,51% (полиэстер) + 1,03% (нейлон) + 5,56% (клей)

### Футляр БЕЛЫЙ,

#### Состав:

66,41% (железо) + 3,03% (алюминий) + 6,59% (полиуретан) + 1,95% (древесная крошка) + 5,98% (полиэстер) + 1,80% (карбонат кальция) + 3,02% (хлопок) + 6,40% (полистиреновая смола) + 0,57% (вискозное волокно) + 1,09% (нейлон) + 3,06% (клей).

### Футляр для детской линии,

#### Состав:

ПВХ PVC801, производства компании Kunshan Achilles

Внутренняя повехность – Полиакриловая пенка EVA, полиэтилентерфталат Terylene.

### Футляр МЯГКИЙ,

**Состав:** внешняя повехность - ПВХ PVC801, внутренняя поверхность - полиамид FTC2016080.

**Материал, используемый для изготовления Салфетки.**


Салфетка из микрофибры (для всех типов оправ),

**Состав:** микрофибра MICRO-STAR : 80% полиэстер, 20% полиамид

Материалы соответствуют требованиям биологической безопасности.

**6. МАРКИРОВКА:**

Левый заушник – название модели, цветовой код, размеры а, b и L

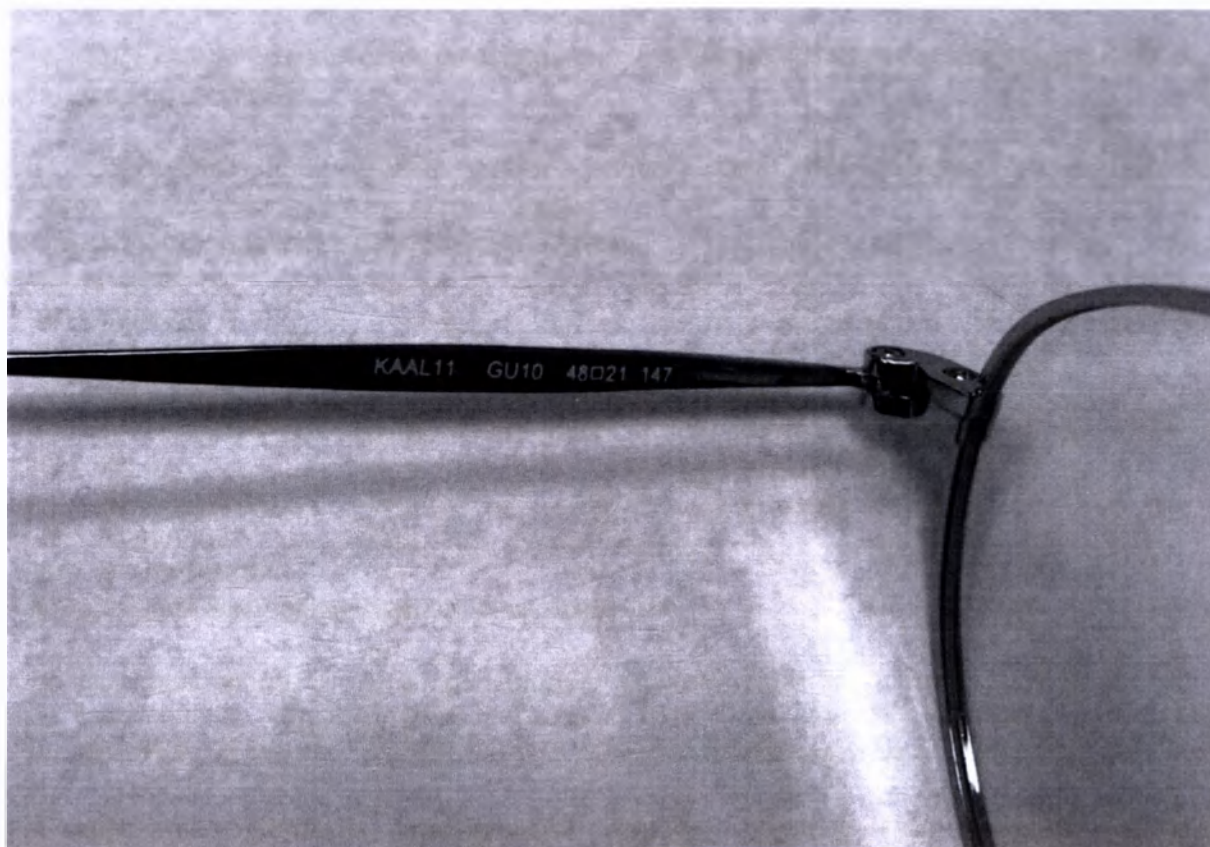

Правый заушник – брэнд модели, знак соответствия нормам CE и название компании



Маркировка потребительской упаковки: на розничную упаковку (полиэтиленовый пакет) наносится знак соответствия.

На полиэтиленовой упаковке каждой оправы или на этикетке, вкладываемой в полиэтиленовую упаковку, должны быть указаны:

- номинальные значения основных размеров;
- номер модели;
- цвет модели;
- наименование продукта;
- производитель;
- организация, ответственная за принятие претензий (уполномоченный представитель производителя);
- дата производства;
- срок годности;
- знак соответствия;
- номер и дата Регистрационного удостоверения.

Оправы, упакованные в полиэтиленовую упаковку, должны быть плотно уложены в групповые упаковочные коробки. В групповую упаковочную коробку должны быть уложены оправы одного типа с одинаковыми основными размерами, в количестве 8 - 10 шт.

На каждую групповую упаковочную коробку должна быть наклеена этикетка предприятия-изготовителя, на которой должны быть надписи:

- номер модели;
- цвет модели;
- номинальные значения основных размеров;
- количество оправ

Максимальная нагрузка на групповую упаковочную коробку 10 кг.

Транспортная тара по согласованию с заказчиком.

Оправы, упакованные в транспортную тару, должны быть устойчивы к воздействию транспортной тряски с максимальным ускорением 30 м/с<sup>2</sup> и частотой от 2 до 3 Гц.

Маркировка транспортной тары с нанесением манипуляционного знака «Осторожно, хрупкое».

Комплект поставки: транспортировочные вставки, оправа.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ: Очковая оправа после вставки в нее линз не должна терять первоначальной формы. Ободки должны быть симметричны. Сколы, царапины, зазоры между очковыми линзами и ободками рамки оправы, а также другие дефекты сборки очков не допускаются.

Очковые линзы, вставленные в оправу, не должны смещаться и выпадать из световых проемов оправы при нормальной эксплуатации очков.

#### 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- не рекомендуется оставлять оправы на прямом солнечном свете при высоких температурах (например, на панели управления автомобилем);
- необходимо избегать падения оправы на твердые поверхности, а также механических нагрузок, способных повредить оправу;
- для хранения оправы необходимо использовать чехол или футляр, не допускается ношение оправы в карманах одежды или сумках во избежание появления царапин на покрытии и механических повреждений;
- надевать и снимать очки необходимо двумя руками — это предотвратит их деформацию;
- необходимо избегать ношения оправы во время сна;
- не допускается прикладывать к оправе значительные механические усилия;
- следует соблюдать осторожность при занятиях спортом и производстве работ, предполагающих резкие движения головой, наклоны, прыжки и удары.
- Не допускается прикладывать к оправе значительные механические усилия;
- Оправу следует хранить в футляре либо в иной упаковке, исключающей возможность механического повреждения;
- Полный средний срок службы оправы составляет не менее 3-х лет;
- Условия хранения: в отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от + 5°C до + 50°C, относительной влажности воздуха 80%; атмосферное давление – 700-1060 гПа
- Во время хранения не допускается воздействие агрессивных веществ (кислот, щелочей) и органических растворителей или их паров.

#### 9. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Оправы корректирующих очков применяются во всех климатических зонах, в любое время суток.

#### 10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

При применении оправ очковых следует соблюдать осторожность при занятиях спортом и производстве работ, предполагающих резкие движения головой, наклоны, прыжки и удары.

#### 11. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Возможны аллергические реакции при индивидуальной непереносимости материалов оправ.

#### 12. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ

Водителям, имеющим проблемы со зрением, оправы корректирующих очков обеспечивают возможность управления транспортными средствами и механизмами (при изготовлении из оправ очков корректирующих).

### 13. СТЕРИЛЬНОСТЬ

Нестерильно.

### 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Оправы корректирующих очков должны ремонтироваться в специальных лабораториях, имеющих лицензию на производство, техническое обслуживание и ремонт.

### 15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок хранения оправ: пластмассовых и комбинированных – 5 лет; металлических – 10 лет.

Полный срок службы оправ – не менее 3 лет при количестве качаний заушника не более 30 000.

### 16. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка оправ корректирующих очков производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

Температура от - 45°C до + 50°C

Относительная влажность до 98%

Атмосферное давление 700-1060 гПа

### 17. УТИЛИЗАЦИЯ

Оправы не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации. Оправы корректирующих очков подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами.

### 18. СЕРТИФИКАТЫ

Производитель использует внутреннюю систему качества, которая ежегодно проверяется и актуализируется.

### 19. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

SEAPORT SAS

(СИПОРТ САС)

Адреса производства:

8 chemin des Hirondelles 69570 Dardilly, France

(8 шемин дез Иронделль 69570 Дардильи, Франция)

20. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

(Организация, принимающая претензии от потребителей)

ООО "Пионер-Оптик" 27254, Москва, Огородный пр-д. 20А, стр. 3,

Тел. +7 (495) 363-69-49

info@pioneer-optic.ru

Франсис КЕССУС

Генеральный директор «СИПОРТ» САС

Francis KESSOUS

Печать

**SEAPORT S.A.S.**  
8 Chemin des Hirondelles  
69570 DARDILLY  
Tél. 04 72 52 01 70 - Fax 04 78 35 91 70  
RCS LYON 493 421 051

Дата 5 марта 2019

Je soussigné, M<sup>e</sup> COMTE,  
Notaire à Lyon, certifie  
sincère et véritable la  
signature apposée ci-dessus.



1 страница

*Штамп:*

СИПОРТ САС  
(SEAPORT SAS)

8 шемин дез Иронделль

69570 ДАРДИЛЬИ

Тел.: 04 72 51 01 70

Факс 04 78 35 91 70

№ в Торгово-промышленном реестре ЛИОНА 493 421 051

Я, нижеподписавшийся, мэтр Конт, нотариус в г. Лион, свидетельствую подлинность подписи, поставленной выше.

*(подпись)*

*Гербовая печать:*

Мэтр Николя Конт

Член объединения общества нотариусов

ЛИОН (Рона)

15 страница

*Штамп:*

СИПОРТ САС  
(SEAPORT SAS)

8 шемин дез Иронделль

69570 ДАРДИЛЬИ

Тел.: 04 72 51 01 70

Факс 04 78 35 91 70

№ в Торгово-промышленном реестре ЛИОНА 493 421 051

Я, нижеподписавшийся, мэтр Конт, нотариус в г. Лион, свидетельствую подлинность подписи, поставленной выше.

*(подпись)*

*Гербовая печать:*

Мэтр Николя Конт

Член объединения общества нотариусов

ЛИОН (Рона)

Перевела



Соколова Людмила Вячеславовна



**Российская Федерация**

**Город Москва.**

**Двадцатого марта две тысячи девятнадцатого года.**

Я, Мозгунова Наталья Сергеевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Соколовой Людмилы Вячеславовны. Подпись сделана в моем присутствии.

Личность, подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 77/381-н/77-2019-4-2228

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового  
и технического характера: 200 руб.00 коп.



Н.С. Мозгунова

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 14 лист 08

Нотариус