

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «МедИнформ-Инновации»

Макарова О.Е.

20__ г

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Изделия для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов

производства

«Мерит Медикал Систэмз, Инк.», США

Организации-изготовители

- Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah, 84095, USA.
- Merit Medical Ireland, Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland.

Наименование и состав изделия медицинского назначения:

Изделия для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов:

- Контейнер для медицинских отходов «BackStop+»;
- Контейнер для медицинских отходов «BackStop»;
- Контейнер для медицинских отходов «DugOut»;
- Контейнер для медицинских отходов «MiniStop+»;
- Контейнер для медицинских отходов «MiniStop»;
- Мешок для сбора жидкости «Merit Disposal Depot Bag».

Назначение изделия медицинского назначения

Изделия для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов производства «Мерит Медикал Систэмз, Инк.», США были разработаны для обеспечения комфорта и безопасности врачей и пациента во время различных клинических процедур.

Сфера применения изделия медицинского назначения

Данные изделия предназначены для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов в любых областях медицины.

Внимание

- Использовать только врачам.
- Содержимое стерильно, если пакет не открыт или не поврежден.
- Только одноразового использования.
- Для снижения уровня риска заражением СПИДом или другими инфекционными заболеваниями медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами.

Показания для применения:

Данные изделия предназначены для сбора и утилизации крови и других жидкостей, собранные в ходе инвазивных процедур. Устройство также может включать съемный держатель для временного хранения игл и скальпелей.

Противопоказания:

Отсутствуют.

Инструкция по применению:

1. Извлеките изделие из упаковки;
2. надежно установит устройство в стерильной рабочей зоне.
4. Используйте устройство, в соответствии с устройством, как указано.
5. При необходимости стабилизации тщательно разместите острые предметы.
6. После использования тщательно удалять острые предметы из контейнера.
7. Утилизировать острые предметы в соответствии с установленными руководящими принципами для утилизации загрязненных медицинских острых предметов.
8. Поместите крышку на контейнер.

9. Утилизация жидких отходов производится в соответствии с установленными руководящие принципы для утилизации загрязненных отходов жизнедеятельности человека.

Упаковка: полиэтилен, бумага.

Стерилизация: оксид этилена.

Срок хранения: 2 года, **Срок годности:** указан на упаковке.

Утилизация: совместно с другими расходными материалами, контактировавшими с кровью, согласно принятого в клинике протокола.

Прошито и
пронумеровано 3 листов

