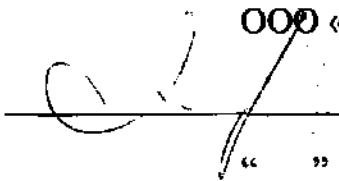


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Концептгрупп»

 Хафизова М.В.

“ ” 2011 г.

М.П.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Перчатки медицинские хирургические латексные стерильные
неопудренные Gammex Podwer-Free with AMT Antimicrobial Technology**

2011

НАЗНАЧЕНИЕ

Данные изделия используют для защиты от вирусов, инфекций и заражения медицинского персонала и пациентов при проведении хирургических вмешательств в стерильных условиях, прочих манипуляциях, при которых возможен контакт с телесными жидкостями пациента, опасными химическими веществами и просто при уходе за пациентами

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принцип действия

Данные изделия используют в качестве средства защиты медперсонала и пациентов от инфекций, вирусов, заражения при различных видах манипуляций и уходе за больными в нестерильной среде.

Перчатки являются барьерной защитой от проникновения вредоносных организмов от пациента к медицинскому персоналу и наоборот. Поэтому являются необходимой и неотъемлемой частью любой хирургической операции. Перчатки так же предохраняют от опасных химикатов и должны обязательно применяться для защиты медперсонала при работе с такими веществами.

Технические характеристики

Gammex непудренные перчатки с применением АМТ антимикробной технологии, хирургические перчатки с антибактериальным покрытием, дружественным коже, встречающимся в таких продуктах, как антисептики и жидкости для полоскания рта. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты для хирургического персонала от вирусов и бактерий во время операции. Согласно исследованиям, покрытие убивает более 99 процентов от гепатита С1 и 99 процентов ВИЧ-1, инфекционных бактерий, включая грам-положительных, грам-отрицательных, и лекарственно-устойчивых бактерий (например, MRSA, VRE) в течение 60 секунд воздействия.



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: белый

Форма: на обе руки

Манжета: гладкая

Наружная поверхность: текстурированная

Внутренняя поверхность: покрыта антимикробным компонентом, 0,1 %

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (мм)

На пальце: 0,220

На ладони: 0,200

Манжеты 0,200

Удлинение при разрыве (%) 700

Минимальная длина (мм) 270

Упаковка 4 x 50 пар / 200 пар

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень низкое

Типичные результаты <30 г / г для модифицированных Лоури и КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

СЕ-классификации класса I стерильный

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантированная стерильность
- Комфорт и простота в использовании
- Безопасность и низкая аллергенность.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТКАМИ

Перчатки следует извлечь из диспенсера, надеть на чистые руки и использовать при работе с одним пациентом или с одним химикатом. При переходе к следующему пациенту перчатки необходимо заменить. Так же следует немедленно сменить перчатку в случае повреждения ее острым инструментом или каким-либо другим способом. Использованные перчатки следует утилизировать как любые другие медицинские отходы, зараженные телесными жидкостями пациента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Продукт содержит натуральный латекс, способный вызвать аллергическую реакцию. Находиться в перчатках не более двух часов. Не хранить вблизи от озона. Использовать только один раз.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте при температуре от 0 до 25 С, вдали от солнечных лучей.

Генеральный директор

ООО «Концептгрупп»

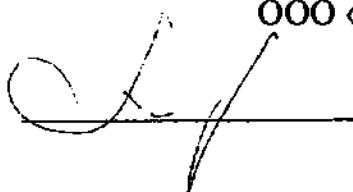

Хафизова М.В.

СПРАВКА

ОБ ИЗДЕЛИИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Наименование изделия

**Перчатки медицинские хирургические латексные стерильные
неопудренные Gammex Podwer-Free with AMT Antimicrobial Technology**

2. Описание изделия

2.1 Назначение:

Данные изделия используют в качестве средства защиты медперсонала и пациентов от инфекций, вирусов, заражения при различных видах манипуляций и уходе за больными в нестерильной среде.

Перчатки являются барьерной защитой от проникновения вредоносных организмов от пациента к медицинскому персоналу и наоборот. Поэтому являются необходимой и неременной частью любой хирургической операции. Перчатки так же предохраняют от опасных химикатов и должны обязательно применяться для защиты медперсонала при работе с такими веществами.

2.2 Основные технические характеристики

Gammex непудренные перчатки с применением AMT антимикробной технологии, хирургические перчатки с антибактериальным покрытием, дружелюбным коже, встречающимся в таких продуктах, как антисептики и жидкости для полоскания рта. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты для хирургического персонала от вирусов и бактерий во время операции. Согласно исследованиям, покрытие убивает более 99 процентов от гепатита С1 и 99 процентов ВИЧ-1, инфекционных бактерий, включая грам-положительных, грам-отрицательных, и лекарственно-устойчивых бактерий (например, MRSA, VRE) в течение 60 секунд воздействия.



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: белый

Форма: на обе руки

Манжета: гладкая

Наружная поверхность: текстурированная

Внутренняя поверхность: покрыта антимикробным компонентом, 0,1 %

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (мм)

На пальце: 0,220

На ладони: 0,200

Манжеты 0,200

Удлинение при разрыве (%) 700

Минимальная длина (мм) 270

Упаковка 4 x 50 пар / 200 пар

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень низкое

Типичные результаты <30 г / г для модифицированных Лоури и КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

СЕ-классификации класса I стерильный

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантированная стерильность

- Комфорт и простота в использовании

- Безопасность и низкая аллергенность.

3. Описание принципа действия

Перчатки извлекаются из диспенсера и одеваются на продезинфицированные руки медицинского работника.

4. Используемые материалы

Латекс натуральный, каучуковый.

5. Информация о сферах применения изделия

Изделие применяется во избежание заражения пациента и медицинского персонала при проведении хирургических операций, работе в нестерильной среде.

Генеральный директор

ООО «Концептгрупп»

“ ____ ” _____ 2011



М.В. Хафизова