


Утверждаю

Директор ЗАО СЗМУ «Медупак»:

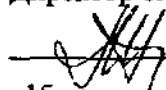

Полянская Л.В.

«15» августа 2007 г.

Руководство по эксплуатации
«Устройства полимерного с пористым наконечником
для хранения и нанесения жидких препаратов
«Фармограф» по ТУ 9398-002-43736088-2007

Руководство распространяется на устройство полимерное «Фармограф», предназначенное для заполнения лекарственными жидкими препаратами на кожные покровы.

Устройство должно заполняться лекарственными препаратами на предприятии, имеющем соответствующую лицензию и дополнительно упаковываться в коробку с данным лекарственным препаратом.

Храниться изделие должно с плотно закрытым колпачком и не подвергаться механическому воздействию на пластмассовый корпус.

Сняв колпачок, наносят на кожный покров линию препарата штриховыми движениями, стараясь не подвергать рану необоснованному травмированию. На ненарушенный кожный покров наносят препарат точечно или линиями без особых усилий.

Следует учесть, что препарату требуется короткое время – 2-3 секунды для поступления в наконечник из накопителя.

Не следует «Фармограф» подвергать нагреванию ни прямыми солнечными лучами, ни огнем, для предотвращения самопроизвольного вытекания.