


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «Техстрой»

 А.Н. Кабикин

«14» июня 2019 г.

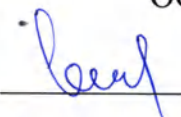

Столы медицинские для клинко-диагностических лабораторий

по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

**Стол медицинский островной для клинко-диагностических лабораторий
в вариантах исполнения**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2018

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения (далее – стол):

1. Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий СЛО-ТС 01.01, модели: СЛО-ТС 01.01-01, СЛО-ТС 01.01-02;
2. Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий СЛО-ТС 01.02, модели: СЛО-ТС-01.02-01, СЛО-ТС-01.02-02;
3. Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий СЛО-ТС 02.01, модели: СЛО-ТС 02.01-01, СЛО-ТС 02.01-02;
4. Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий СЛО-ТС 02.02, модели: СЛО-ТС 02.02-01, СЛО-ТС 02.02-02.

2. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения.

Потенциальным потребителем медицинского изделия является обученный медицинский персонал, по назначению и под наблюдением врача.

Показания к применению:

Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019:

- для работы нескольким медицинским работникам с лабораторной посудой, реактивами и приборами, с целью экономии полезного пространства в любых лабораторных отделениях и лечебно-профилактических учреждениях


Противопоказания к применению отсутствуют.

Возможные побочные действия отсутствуют.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения

№	Наименование исполнения	Технические характеристики		
Столы медицинские островные для клинико-диагностических лабораторий				
1	Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий СЛО-ТС 01.01	Габаритные размеры	СЛО-ТС 01.01-01	СЛО-ТС 01.01-02
		A, мм (±4)	1300	1500
		B, мм (±4)	1200	1200
		C, мм (±4)	1500	1500
		D, мм (±4)	650	650
		E, мм (±4)	600	600
		F, мм (±4)	850	850
		G, мм (±4)	100	100
		H, мм (±4)	1246	1446
		I, мм (±4)	300	300
		J, мм (±4)	123	123
		K, мм (±4)	295	295
		L, мм (±4)	298	298
		M, мм (±4)	1033	1233
		N, мм (±4)	1192	1392
		O, мм (±4)	27	27
		P, мм (±4)	30	30
		Q, мм (±4)	36	36


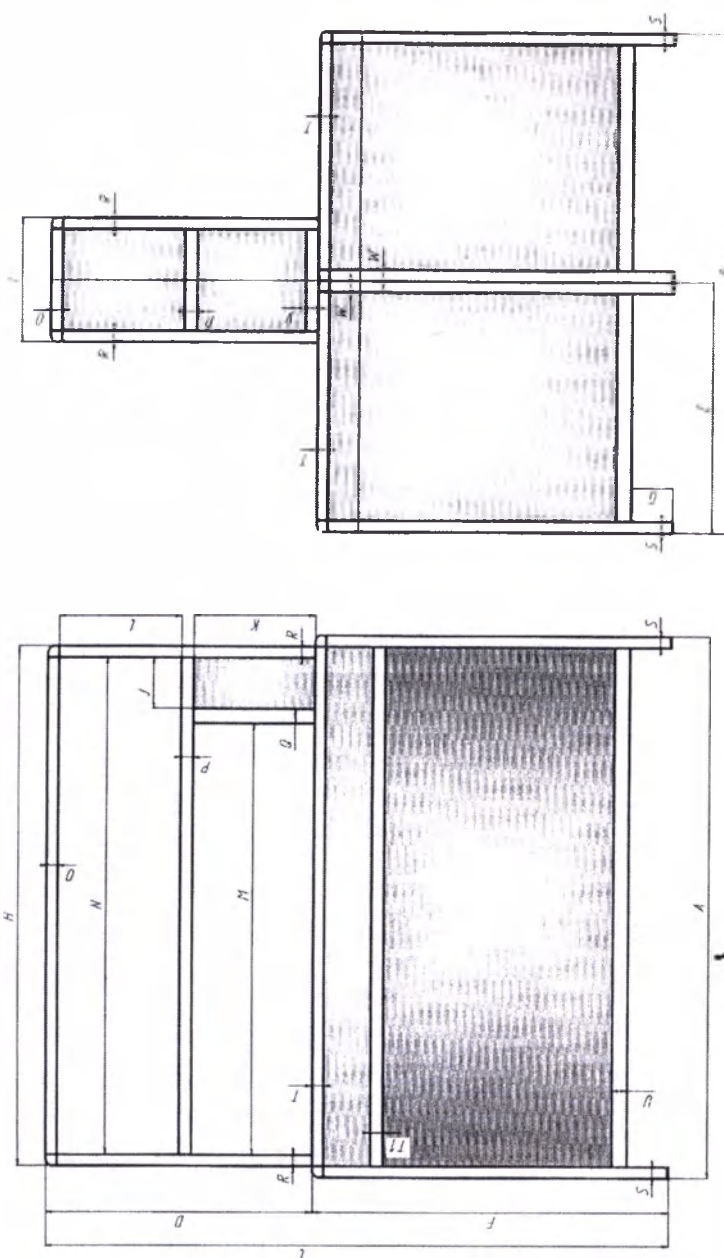


R, мм (±4)	27	27
S, мм (±4)	27	27
T, мм (±4)	27	27
Tl, мм (±4)	30	30
W, мм (±4)	27	27
U, мм (±4)	36	36

Масса: 74 кг (±3)
 Стол медицинский островной комплектуется надстройкой с двумя полками.

Стол медицинский островной для клиничко-диагностических лабораторий
 СЛО-ТС 01.02

Габаритные размеры	СЛО-ТС 01.02-01	СЛО-ТС 01.02-02
A, мм (±4)	1300	1500
B, мм (±4)	1200	1200
C, мм (±4)	1500	1500
D, мм (±4)	650	650
E, мм (±4)	600	600
F, мм (±4)	850	850
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	1246	1446
I, мм (±4)	300	300
J, мм (±4)	16	16
K, мм (±4)	295	295
L, мм (±4)	298	298
M, мм (±4)	1033	1233
N, мм (±4)	1192	1392
O, мм (±4)	123	123
P, мм (±4)	682	682
Q, мм (±4)	432	432

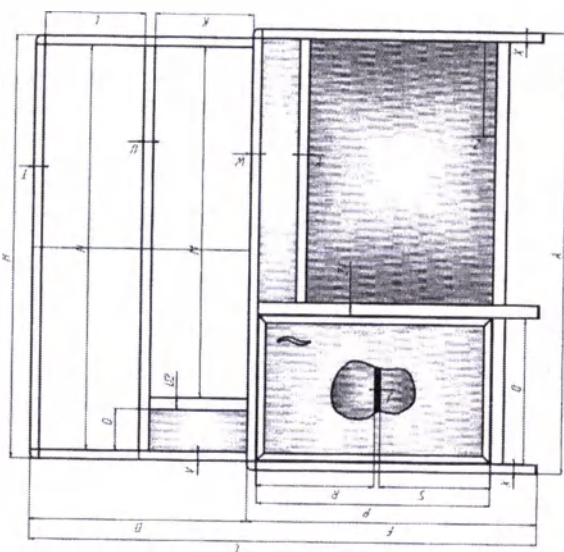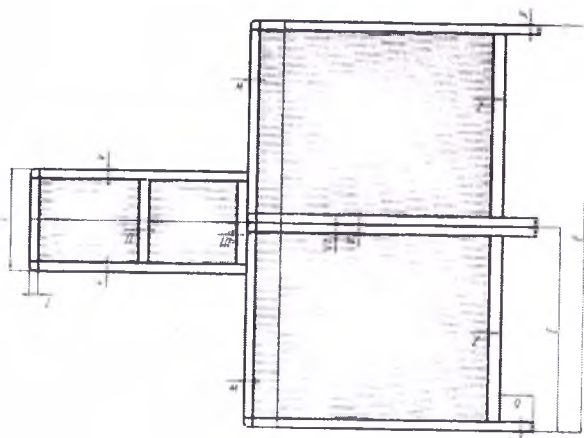


R, мм (±4)	350	350
S, мм (±4)	321	321
T, мм (±4)	27	27
U, мм (±4)	30	30
U1, мм (±4)	30	30
U2, мм (±4)	36	36
V, мм (±4)	27	27
V1, мм (±4)	27	27
V2, мм (±4)	27	27
W, мм (±4)	27	27
X, мм (±4)	27	27
Y, мм (±4)	30	30
Z, мм (±4)	36	36
Z1, мм (±4)	36	36


Масса: 78 кг (±3)

Стол медицинский островной комплектуется надстройкой с двумя полками, одной тумбой с открывающейся дверкой и одной полкой внутри.

Стол медицинский островной для клиничко-диагностических лабораторий СЛО-ТС 02.01

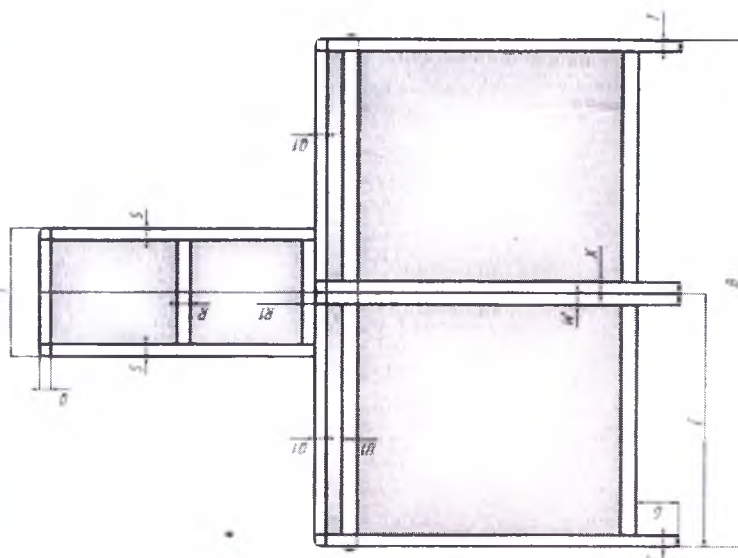

Габаритные размеры	СЛО-ТС 02.01-01	СЛО-ТС 02.01-02
A, мм (±4)	1300	1500
B, мм (±4)	1200	1200
C, мм (±4)	1500	1500
D, мм (±4)	650	650
E, мм (±4)	600	600
F, мм (±4)	850	850
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	1246	1446
I, мм (±4)	300	300
J, мм (±4)	108	108
K, мм (±4)	295	295
L, мм (±4)	298	298
M, мм (±4)	1033	1233
N, мм (±4)	1192	1392
O, мм (±4)	123	123
P, мм (±4)	600	700
Q, мм (±4)	27	27
Q1, мм (±4)	27	27
R, мм (±4)	30	30
R1, мм (±4)	30	30
R2, мм (±4)	36	36
R3, мм (±4)	36	36
S, мм (±4)	27	27
T, мм (±4)	27	27
U, мм (±4)	36	36
U1, мм (±4)	36	36
V, мм (±4)	30	30
W, мм (±4)	27	27
X, мм (±4)	27	27

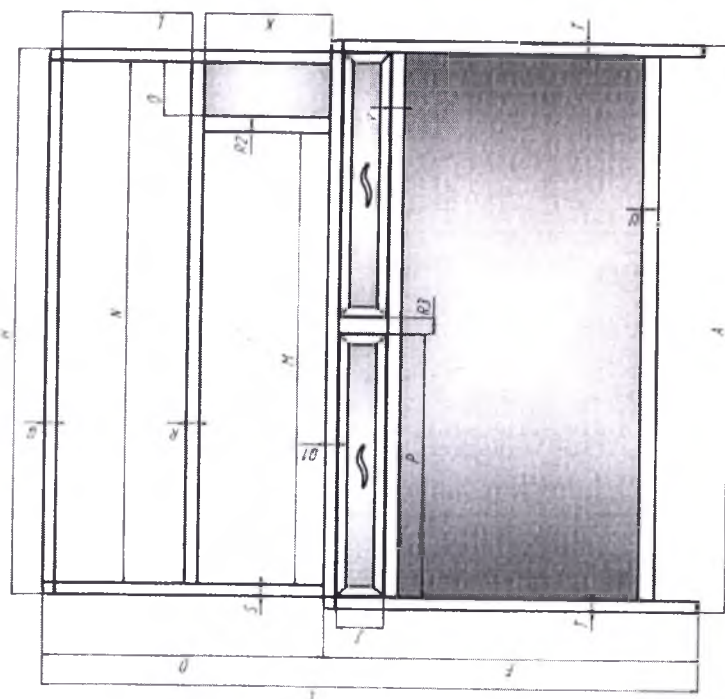

Масса: 75 кг (± 3)



Стол медицинский островной комплектуется надстройкой с двумя полками, двумя выдвижными ящиками, расположенными под столешницей.

Стол медицинский островной для клиничко-диагностических лабораторий
СЛО-ТС 02.02

Габаритные размеры	СЛО-ТС 02.02-01	СЛО-ТС 02.02-02
A, мм (± 4)	1300	1500
B, мм (± 4)	1200	1200
C, мм (± 4)	1500	1500
D, мм (± 4)	650	650
E, мм (± 4)	600	600
F, мм (± 4)	850	850
G, мм (± 4)	100	100
H, мм (± 4)	1246	1446
I, мм (± 4)	300	300
J, мм (± 4)	138	138
K, мм (± 4)	295	295
L, мм (± 4)	298	298
M, мм (± 4)	1033	1233
N, мм (± 4)	1192	1392
O, мм (± 4)	123	123
P, мм (± 4)	168	168
Q, мм (± 4)	432	432
R, мм (± 4)	768	968
S, мм (± 4)	27	27
S1, мм (± 4)	27	27
S2, мм (± 4)	36	36
S3, мм (± 4)	30	30
S4, мм (± 4)	27	27
T, мм (± 4)	27	27
U, мм (± 4)	30	30
V, мм (± 4)	36	36
V1, мм (± 4)	36	36
V2, мм (± 4)	36	36
V3, мм (± 4)	36	36
V4, мм (± 4)	36	36
V5, мм (± 4)	36	36
V6, мм (± 4)	36	36
V7, мм (± 4)	36	36
V8, мм (± 4)	36	36
V9, мм (± 4)	36	36
W, мм (± 4)	30	30
X, мм (± 4)	27	27
X1, мм (± 4)	27	27

Масса: 76 кг (± 3)

Стол медицинский островной комплектуется надстройкой с двумя полками, одним выдвижным ящиком, расположенным под столешницей и одной тумбой с выдвижными ящиками в количестве четырех штук.

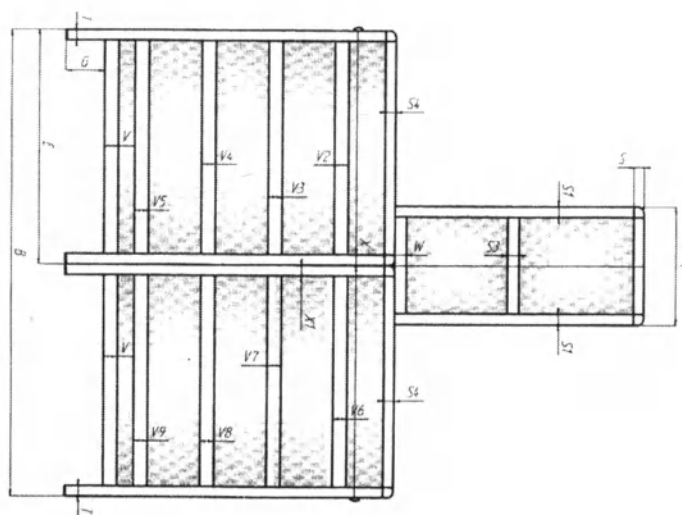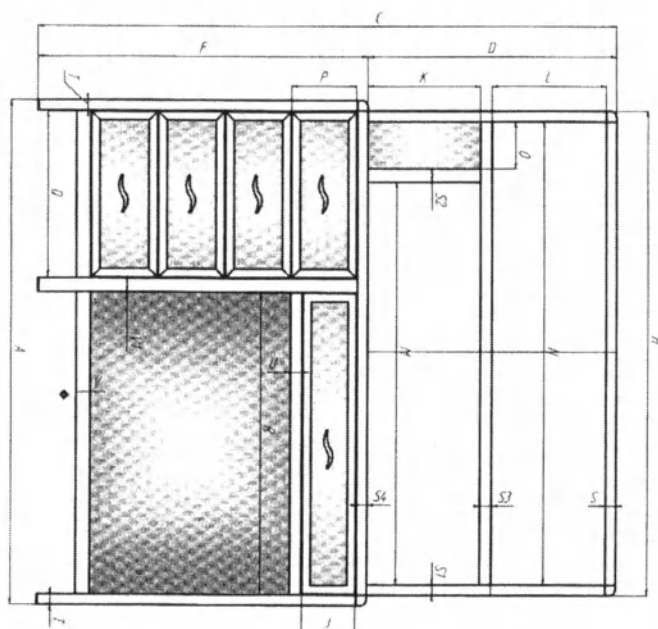

18

Дверь и ящик (в разрезе)

Габаритный размер	Значение габаритного параметра
A	20 мм(+4мм)
B	22 мм(+4мм)
C	3 мм
D	20 мм(+4мм)
E	22 мм(+4мм)
F	3 мм

Максимальная допустимая нагрузка на столы - 30кг.
Максимальная допустимая нагрузка на полки - 10кг.
Максимальная допустимая нагрузка на ящики - 6кг.

Замки магнитные неподвижно и прочно закреплены на дверях столов (СЛО-ТС 01.02-01; СЛО-ТС 01.02-02) и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий СЛО-ТС XX.XX, модель: СЛО-ТС XX.XX-XX	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом использования стола убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения.

После транспортирования продукции в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать её при комнатной температуре (+15⁰С до +25⁰С) не менее 2 часов.

Убедитесь, что комплект поставки соответствует заявленному в упаковочном

листе. В случае расхождений, пожалуйста, обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

Подготовка к эксплуатации изделия:

- распаковать изделие (поставляется в собранном виде);
- с помощью крестовой отвертки установить ручки на лицевую сторону фасада, если они предусмотрены;
- выполнить санитарную обработку изделия.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом и при эксплуатации, с периодичностью раз в год, заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене при необходимости поломанных или изношенных деталей.

Техническое обслуживание и ремонт осуществляется лицами из числа технического персонала с соблюдением правил техники безопасности.

Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации столов медицинских для клинко-диагностических лабораторий, проводится в соответствии технических характеристик и комплектности паспорта и настоящего руководства по эксплуатации, при этом проверяется отсутствие изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. В пределах одного населенного пункта столы допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования – при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность столов от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя хранится на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, влажности – не более 75 %.

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха – не более 75%.

8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЕГО ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Очищение производить посредством влажной тряпки (салфетки) и любого универсального чистящего средства. Рабочие и фасадные поверхности изделия необходимо протирать салфеткой, смоченной в дезинфицирующие и моющие средства (1%-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода в комплексе с 1%-ным раствором моющих средств), салфетку предварительно отжать.

9. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления столов для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ

17.2.3.02, а также соблюдаться нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования столов не должно происходить разложения и выделения вредных веществ, а также должны выполняться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7 ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении столов (при наличии) следует проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

10. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие столов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации столов составляет 18 (восемнадцать) месяцев.

Средний срок службы - 7 лет со дня его продажи.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений столов, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: *ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).*

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Наименование	Артикул
	Стол медицинский островной	СЛО-ТС 01.01
	Стол медицинский островной	СЛО-ТС 01.02
	Стол медицинский островной	СЛО-ТС 02.01
	Стол медицинский островной	СЛО-ТС 02.02

Соответствует ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Техстрой»,
603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10.
Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Место производства:

ООО «Техстрой», 606440, Россия, Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д.1.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru


Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на
(10 / десяти) листах

Директор ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «Техстрой»

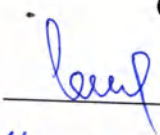
А.Н. Кабикин

«14»  2019 г.



Столы медицинские для клинико-диагностических лабораторий
по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий
в вариантах исполнения

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2018

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения (далее – стол):

1. Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 00.01, модели: СЛМ-ТС 00.01-01, СЛМ-ТС 00.01-02;
2. Стол лабораторный с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 01.01, модели: СЛМ-ТС 01.01-01, СЛМ-ТС 01.01-02;
3. Стол лабораторный с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 02.01, модели: СЛМ-ТС 02.01-01, СЛМ-ТС 02.01-02;
4. Стол лабораторный с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 02.02, модели: СЛМ-ТС 02.02-01, СЛМ-ТС 02.02-02;
5. Стол лабораторный с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 02.03, модели: СЛМ-ТС 02.03-01, СЛМ-ТС 02.03-02;
6. Стол лабораторный с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 03.01, модели: СЛМ-ТС 03.01-01, СЛМ-ТС 03.01-02;
7. Стол лабораторный с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 03.03, модели: СЛМ-ТС 03.03-01, СЛМ-ТС 03.03-02.

2. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения.

Потенциальным потребителем медицинского изделия является обученный медицинский персонал, по назначению и под наблюдением врача.

Показания к применению:

1. Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019:
 - для мытья лабораторной посуды после использования химических средств, удаления реагентов с поверхности, а также для обязательного мытья рук в любых лабораторных отделениях и лечебно-профилактических учреждениях







Противопоказания к применению отсутствуют.

Возможные побочные действия отсутствуют.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения:



1	Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 01.01			
		Габаритные размеры	СЛМ-ТС 01.01-01	СЛМ-ТС 01.01-02
		А, мм (±4)	835	835
		В, мм (±4)	500	595
		С, мм (±4)	850	850
		Д, мм (±4)	457	457
		Е, мм (±4)	688	688

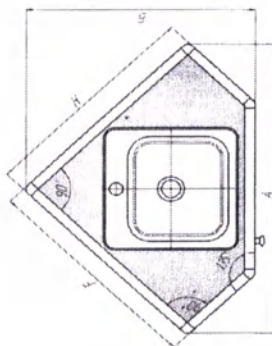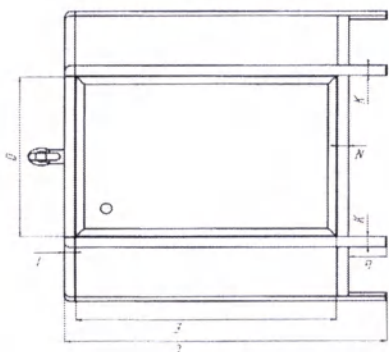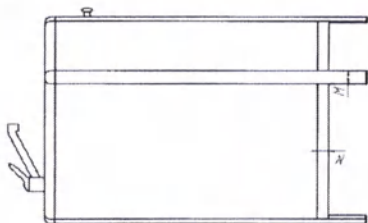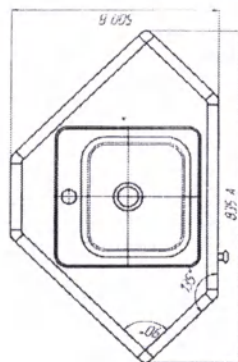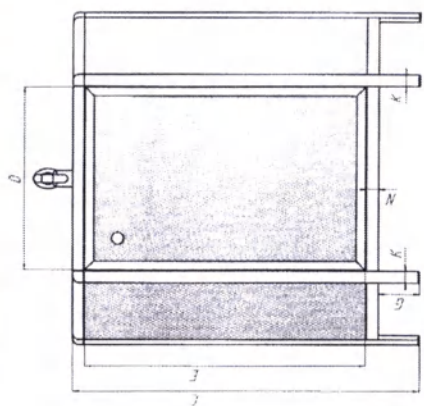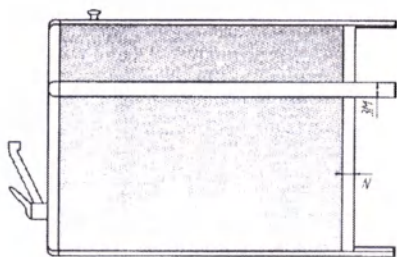

F, мм (±4)	100	600
G, мм (±4)	-	100
H, мм (±4)	-	600
K, мм (±4)	29.56	29.56
3M, мм (±4)	38.18	38.18
N, мм (±4)	30	30

Масса: 20 кг (±3)
 Стол медицинский с мойкой комплектуется
 одночашевой мойкой со смесителем,
 отделение закрыто дверью.

Габаритные размеры	СЛМ-ТС 02.01-01	СЛМ-ТС 02.01-02
A, мм (±4)	845	855
B, мм (±4)	555	655
C, мм (±4)	850	850

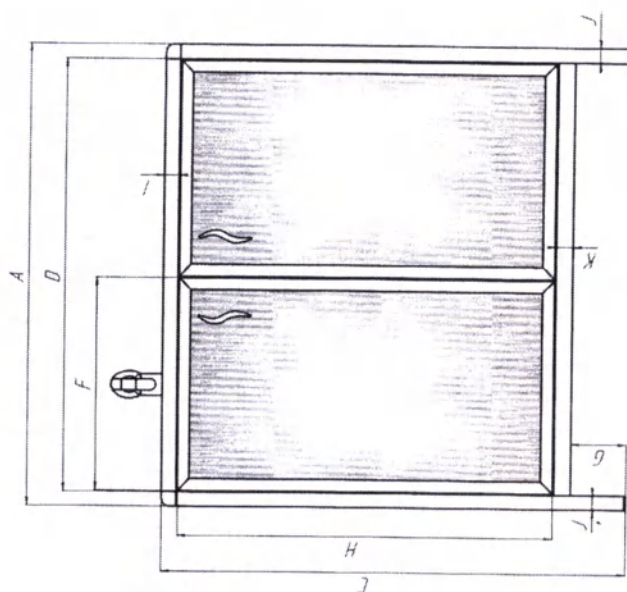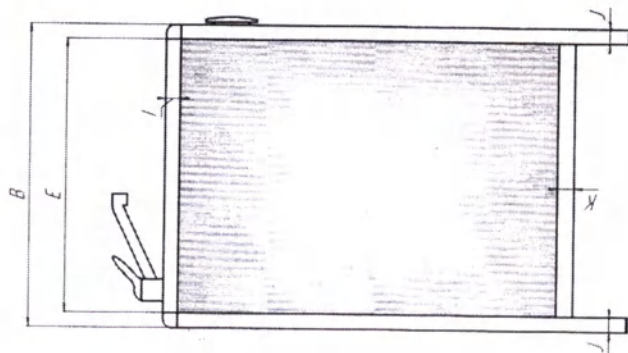

D, мм (±4)	791	801
E, мм (±4)	501	601
F, мм (±4)	391	396
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	688	688
I, мм (±4)	27	27
J, мм (±4)	27	27
K, мм (±4)	30	30

Масса: 22 кг (±3)


Стол медицинский с мойкой комплектуется двухкашевой мойкой со смесителем или мойкой с сушилкой со смесителем, отделение закрыто двумя дверьми.

Стол медицинский с мойкой для клиничко-диагностических лабораторий
СЛМ-ТС 02.02

Габаритные размеры	СЛМ-ТС 02.02-01	СЛМ-ТС 02.02-02
A, мм (±4)	845	855
B, мм (±4)	555	655
C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	791	801
E, мм (±4)	501	601
F, мм (±4)	391	396
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	688	688
I, мм (±4)	27	27
J, мм (±4)	27	27
K, мм (±4)	30	30

Масса: 23 кг (±3)

Стол медицинский с мойкой комплектуется двухкашевой мойкой с двумя смесителями, отделение закрыто двумя дверьми.

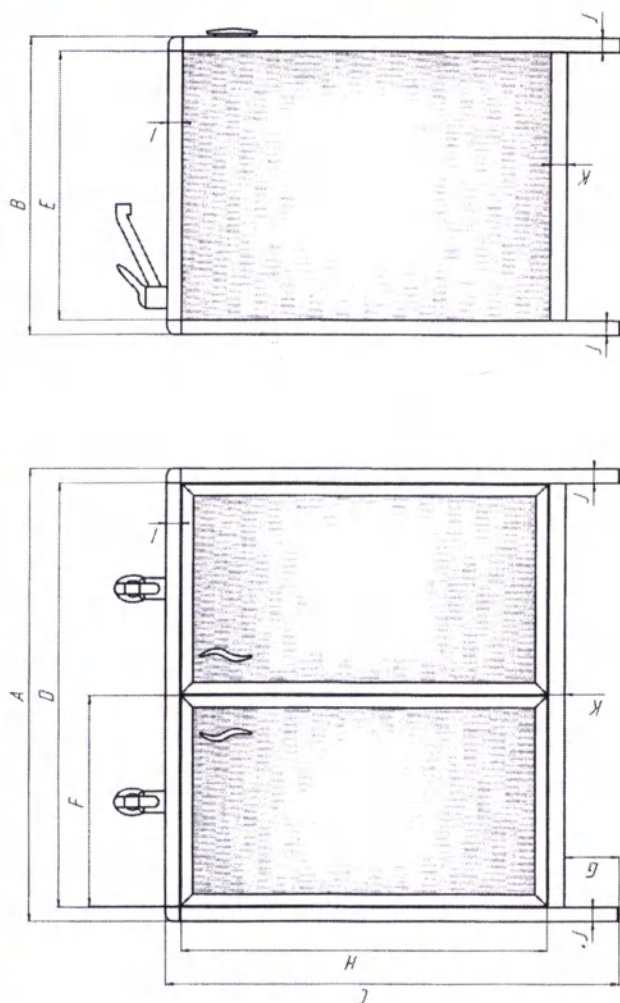


Стол медицинский с мойкой для клиничко-диагностических лабораторий
СЛМ-ТС 02.03

Габаритные размеры	СЛМ-ТС 02.03-01	СЛМ-ТС 02.03-02
A, мм (±4)	845	855
B, мм (±4)	555	655
C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	791	801
E, мм (±4)	501	601
F, мм (±4)	391	396
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	688	688
I, мм (±4)	353	358
J, мм (±4)	170	170
K, мм (±4)	27	27
L, мм (±4)	36	36
M, мм (±4)	27	27
N, мм (±4)	30	30

Масса: 23 кг (±3)

Стол медицинский с мойкой комплектуется мойкой с сушилкой со смесителем, одно отделение закрыто дверью, второе отделение с выдвигаемыми ящиками в количестве четырех штук.

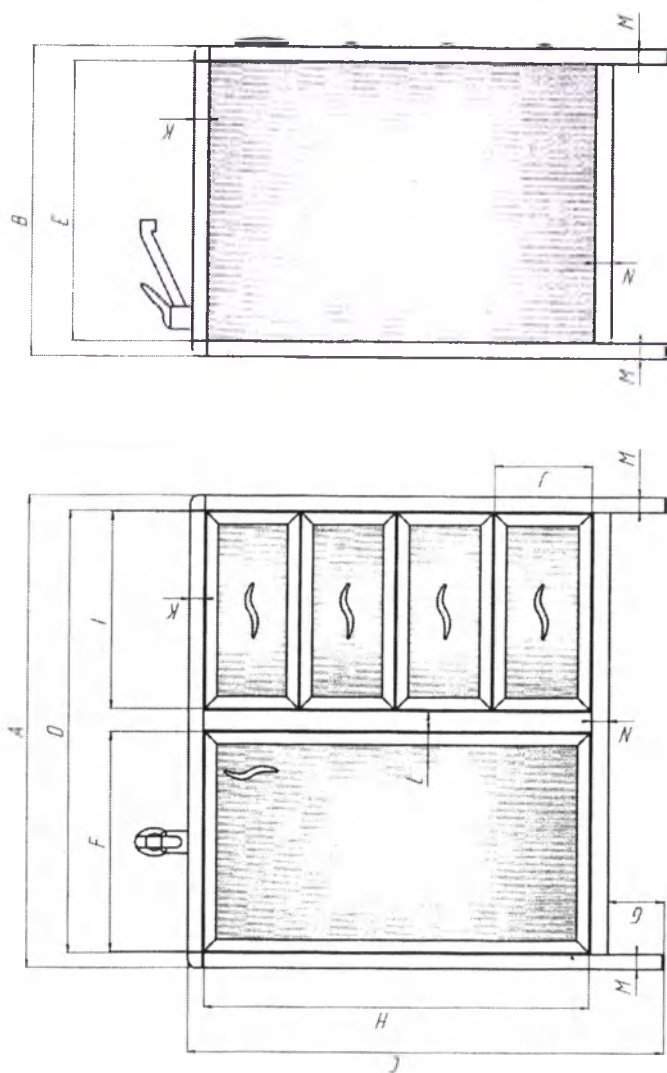


Стол медицинский с мойкой для клиничко-диагностических лабораторий
СЛМ-ТС 03.01

Габаритные размеры	СЛМ-ТС 03.01-01	СЛМ-ТС 03.01-02
A, мм (±4)	1200	1277
B, мм (±4)	655	555
C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	1146	1223
E, мм (±4)	601	501
F, мм (±4)	365	391
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	688	688
I, мм (±4)	740	791
J, мм (±4)	16	16
K, мм (±4)	370	396
L, мм (±4)	338.5	338.5
M, мм (±4)	338.5	338.5
N, мм (±4)	27	27
O, мм (±4)	27	27
P, мм (±4)	36	36
Q, мм (±4)	30	30


Масса: 37 кг (±3)

Стол медицинский с мойкой комплектуется двухчашевой мойкой со смесителем или мойкой с сушилкой со смесителем, одно отделение без полок закрыто двумя дверьми, второе отделение с одной полкой закрыто одной дверью.

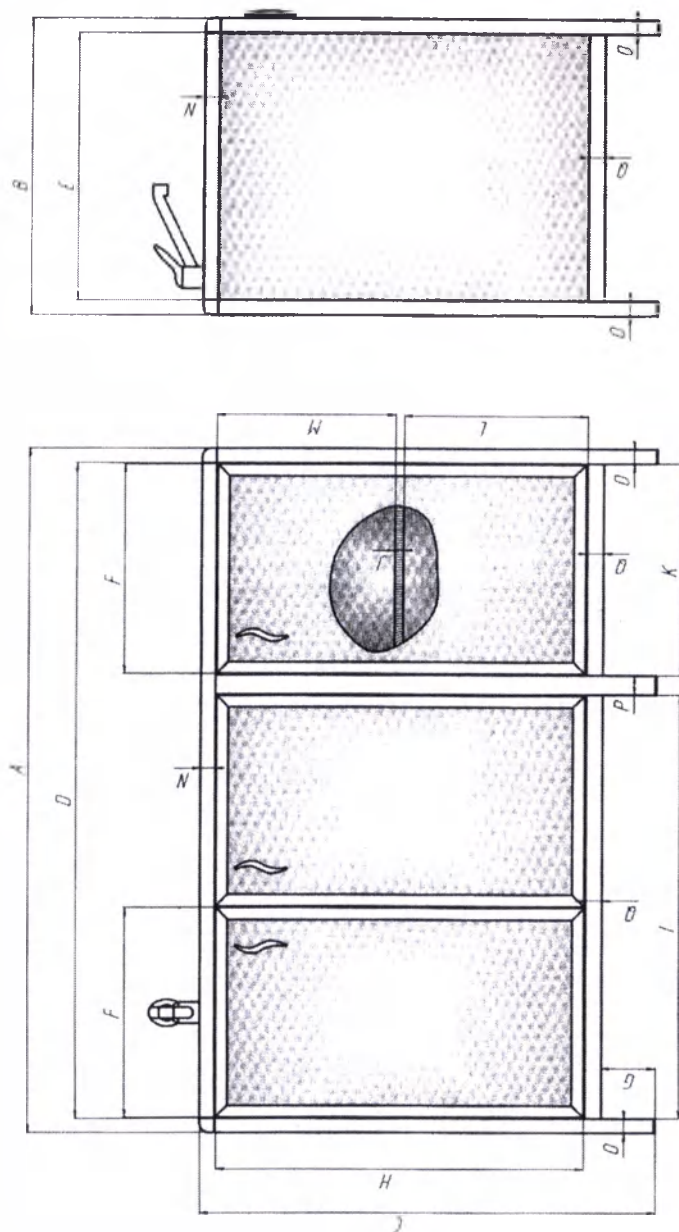



Стол медицинский с мойкой для клиничко-диагностических лабораторий
СЛМ-ТС 03.03

Габаритные размеры	СЛМ-ТС 03.03-01	СЛМ-ТС 03.03-02
A, мм (±4)	1200	1277
B, мм (±4)	655	555
C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	1146	1223
E, мм (±4)	601	501
F, мм (±4)	391	391
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	688	688
I, мм (±4)	396	396
J, мм (±4)	16	16
K, мм (±4)	396	396
L, мм (±4)	281	358
M, мм (±4)	338,5	338,5
N, мм (±4)	338,5	338,5
O, мм (±4)	391	391
P, мм (±4)	170	170
Q, мм (±4)	27	27
R, мм (±4)	36	36
S, мм (±4)	30	30
T, мм (±4)	27	27

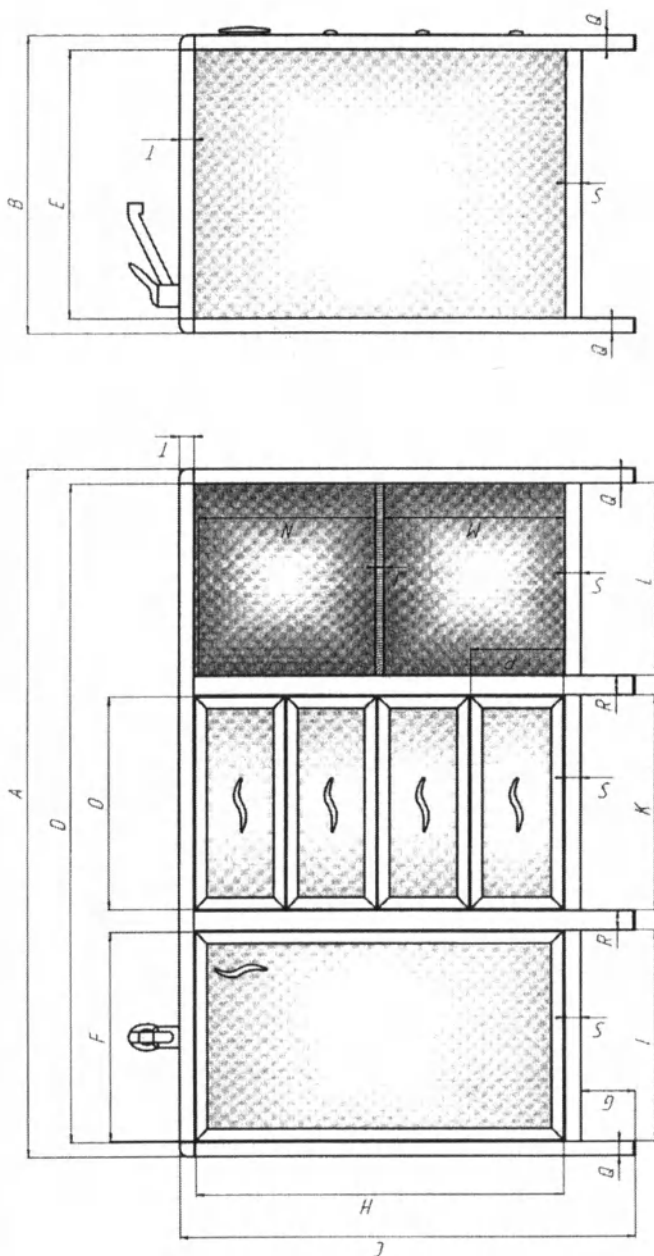

Масса: 37 кг (± 3)

Стол медицинский с мойкой комплектуется
одночашевой мойкой со смесителем, одно
отделение без полок закрыто одной дверью,
второе отделение с выдвижными ящиками в
количестве четырех штук, открытое
отделение с одной полкой.

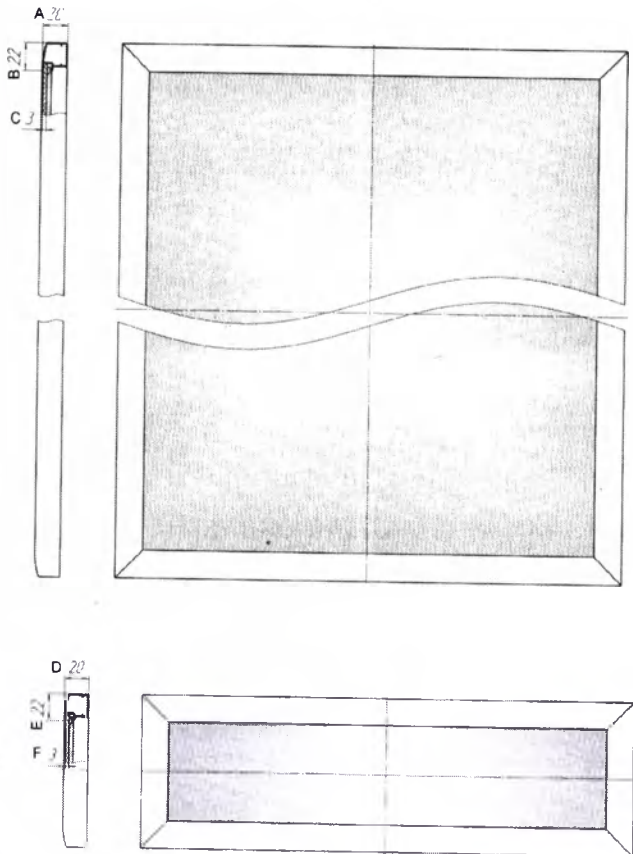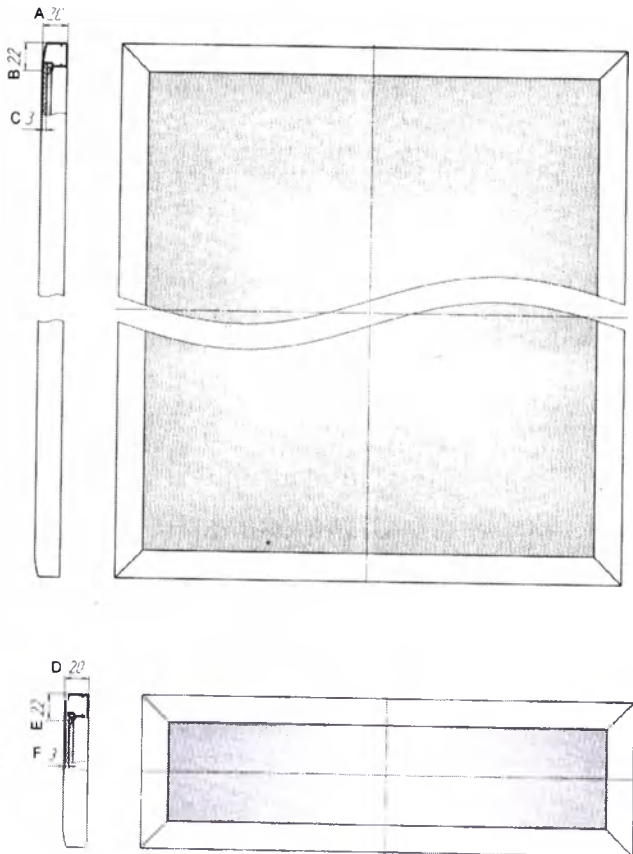Дверь и ящик (в разрезе)			
7		Габаритный размер	Значение габаритного параметра
		A	20 мм(+4мм)
		B	22 мм(+4мм)
		C	3 мм
		D	20 мм(+4мм)
		E	22 мм(+4мм)
		F	3 мм

Максимальная допустимая нагрузка на столы - 30кг.

Максимальная допустимая нагрузка на полки - 10кг.

Максимальная допустимая нагрузка на ящики - 6кг.

Присоединительные размеры мойки (для подключения и вывода используемой воды):

Для подключения: 40мм, 50мм, 72мм, 76мм;*

Для вывода используемой воды: 40мм, 50мм.*

*по согласованию между заказчиком и изготовителем

Замки магнитные неподвижно и прочно закреплены на дверях столов (СЛМ-ТС 00.01-01; СЛМ-ТС 00.01-02; СЛМ-ТС 01.01-01; СЛМ-ТС 01.01-02; СЛМ-ТС 02.01-01; СЛМ-ТС 02.01-02; СЛМ-ТС 02.02-01; СЛМ-ТС 02.02-02; СЛМ-ТС 02.03-01; СЛМ-ТС 02.03-02; СЛМ-ТС 03.01-01; СЛМ-ТС 03.01-02; СЛМ-ТС 03.03-01; СЛМ-ТС 03.03-02) и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС XX.XX, модель: СЛМ-ТС XX.XX-XX	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом использования стола убедитесь, что в результате транспортировки

упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения.

После транспортирования продукции в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать её при комнатной температуре ($+15^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$) не менее 2 часов.

Убедитесь, что комплект поставки соответствует заявленному в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста, обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

Подготовка к эксплуатации изделия:

- распаковать изделие (поставляется в собранном виде);
- с помощью крестовой отвертки установить ручки на лицевую сторону фасада, если они предусмотрены;
- выполнить санитарную обработку изделия.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом и при эксплуатации, с периодичностью раз в год, заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене при необходимости поломанных или изношенных деталей.

Техническое обслуживание и ремонт осуществляется лицами из числа технического персонала с соблюдением правил техники безопасности.

Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации столов медицинской для клиничко-диагностических лабораторий, проводится в соответствии технических характеристик и комплектности паспорта и настоящего руководства по эксплуатации, при этом проверяется отсутствие изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. В пределах одного населенного пункта столы допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования – при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность столов от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, влажности – не более 75 %.

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха – не более 75%.

8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЕГО ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Очищение производить посредством влажной тряпки (салфетки) и любого универсального чистящего средства. Рабочие и фасадные поверхности изделия необходимо протирать салфеткой, смоченной в дезинфицирующие и моющие средства (1%-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода в комплексе с

1%-ным раствором моющих средств), салфетку предварительно отжать.

9. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления столов для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02, а также соблюдаться нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования столов не должно происходить разложения и выделения вредных веществ, а также должны выполняться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7 ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении столов (при наличии) следует проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

10. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие столов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации столов составляет 18 (восемнадцать) месяцев.

Средний срок службы - 7 лет со дня его продажи.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений столов, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Наименование	Артикул
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 00.01
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 01.01
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 02.01
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 02.02
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 02.03
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 03.01
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 03.03

Соответствует ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Техстрой»,

603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Место производства:

ООО «Техстрой», 606440, Россия, Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д.1.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru


Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на
(12/двенадцати) листах

Директор ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «Техстрой»

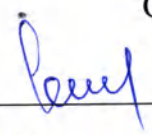
А.Н. Кабикин
«14» июня 2019 г.
М.П.



Стол медицинские для клинко-диагностических лабораторий
по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

**Стол медицинский для клинко-диагностических лабораторий
в вариантах исполнения**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2018

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения (далее – стол):

1. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 00.00 модели: СЛ-ТС 00.00-01, СЛ-ТС 00.00-02;
2. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 00.01 модели: СЛ-ТС 00.01-01, СЛ-ТС 00.01-02;
3. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 00, модели: СЛ-ТС-00.02-01, СЛ-ТС-00.02-02;
4. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 00., модели: СЛ-ТС-00.03-01, СЛ-ТС 00.03-02;
5. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 01., модели: СЛ-ТС 01.00-01, СЛ-ТС 01.00-02;
6. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 01.01, модели: СЛ-ТС 01.01-01, СЛ-ТС 01.01-02;
7. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 01., модели: СЛ-ТС 01.02-01, СЛ-ТС 01.02-02;
8. Стол лабораторный для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 01., модели: СЛ-ТС 01.03-01, СЛ-ТС 01.03-02;
9. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 02.00;
10. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 02.01;
11. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 02.02;
12. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 03.;
13. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 03.02;
14. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 03;
15. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 03.04;
16. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 03.05.

2. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения.

Потенциальным потребителем медицинского изделия является обученный медицинский персонал, по назначению и под наблюдением врача.

Показания к применению:

1. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019:

- для работы с лабораторной посудой, реактивами и приборами в любых лабораторных отделениях и лечебно-профилактических учреждениях



Противопоказания к применению отсутствуют.

Возможные побочные действия отсутствуют.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения



Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 00.00

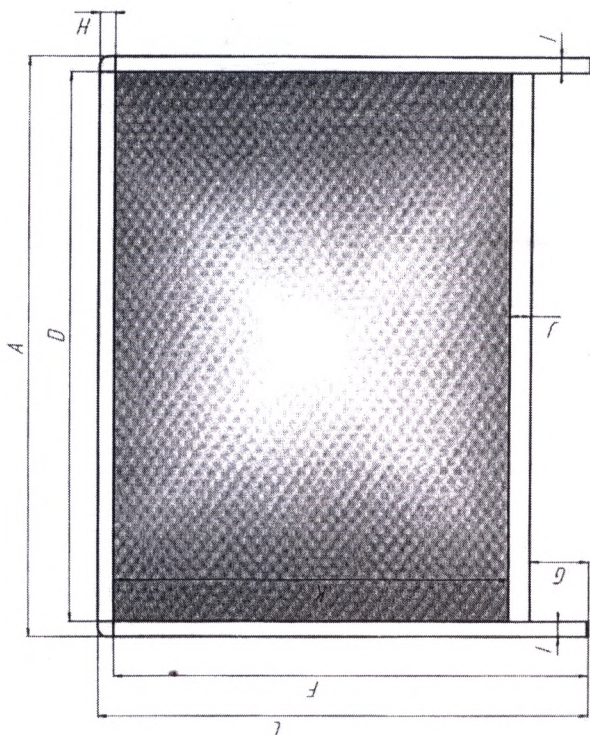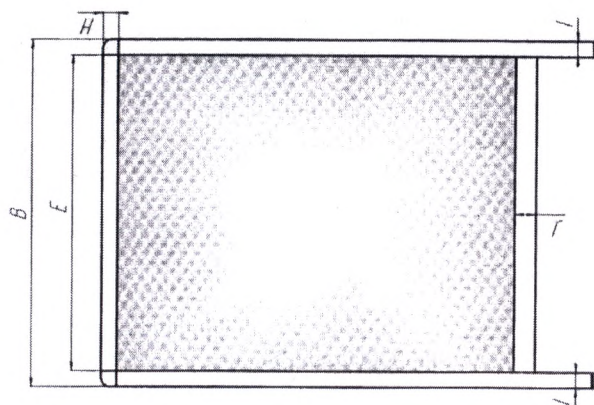

Габаритные размеры	СЛ-ТС 00.00-01	СЛ-ТС 00.00-02
A, мм (±4)	1000	1200
B, мм (±4)	600	600
C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	946	1146
E, мм (±4)	546	546
F, мм (±4)	823	823
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	27	27
I, мм (±4)	27	27
J, мм (±4)	36	36
K, мм (±4)	687	687

Масса: 23 кг (±3)

Стол медицинский с открытым отделением.

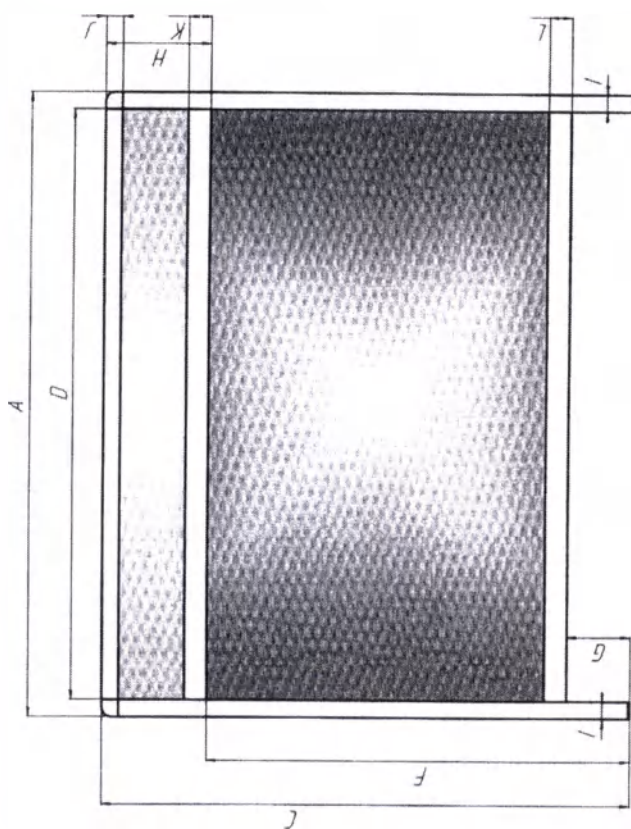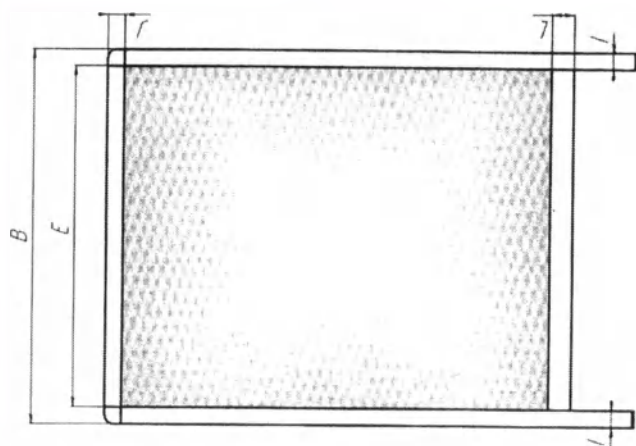

Стол медицинский для клинко-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 00.01


Габаритные размеры	СЛ-ТС 00.01-01	СЛ-ТС 00.01-02
A, мм (±4)	1000	1200
B, мм (±4)	600	600
C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	946	1146
E, мм (±4)	546	546
F, мм (±4)	680	680
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	170	170
I, мм (±4)	27	27
J, мм (±4)	27	27
K, мм (±4)	36	36
L, мм (±4)	36	36

Масса: 24 кг (±3)

Стол медицинский с открытым отделением.

Стол медицинский для клинко-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 00.02

Габаритные размеры	СЛ-ТС 00.02-01	СЛ-ТС 00.02-02
A, мм (±4)	1000	1200
B, мм (±4)	600	600
C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	946	1146
E, мм (±4)	546	546
F, мм (±4)	680	680
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	447	547
I, мм (±4)	127	127
J, мм (±4)	107	107
K, мм (±4)	473	573
L, мм (±4)	27	27
M, мм (±4)	16	16
N, мм (±4)	16	16
O, мм (±4)	36	36
P, мм (±4)	27	27

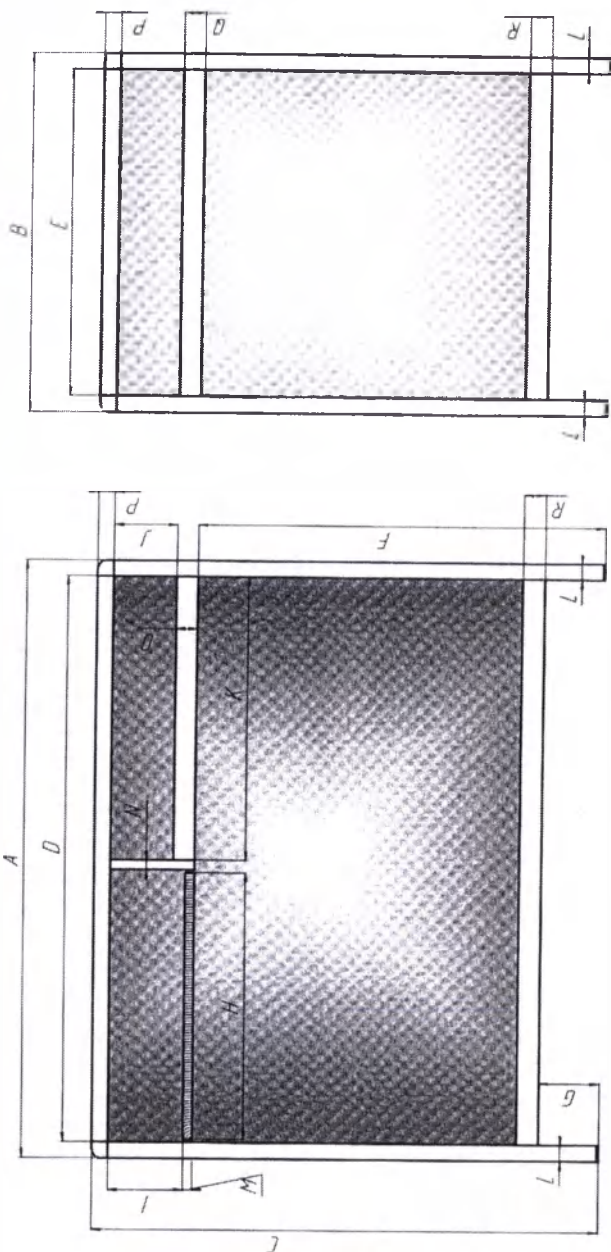

Q, мм (±4)	36	36
R, мм (±4)	36	36

Масса: 24 кг (±3)



Стол медицинский комплектуется одной выдвигной полкой, располагающейся под столешницей.

Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 00.03

Габаритные размеры	СЛ-ТС 00.03-01	СЛ-ТС 00.03-02
A, мм (±4)	1000	1200
B, мм (±4)	600	600
C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	946	1146
E, мм (±4)	546	546
F, мм (±4)	680	680
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	450	530
I, мм (±4)	102	102
J, мм (±4)	27	27
K, мм (±4)	36	36
L, мм (±4)	36	36
M, мм (±4)	27	27
N, мм (±4)	36	36
O, мм (±4)	36	36


Масса: 32 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется двумя выдвигными ящиками располагающимися под столешницей.

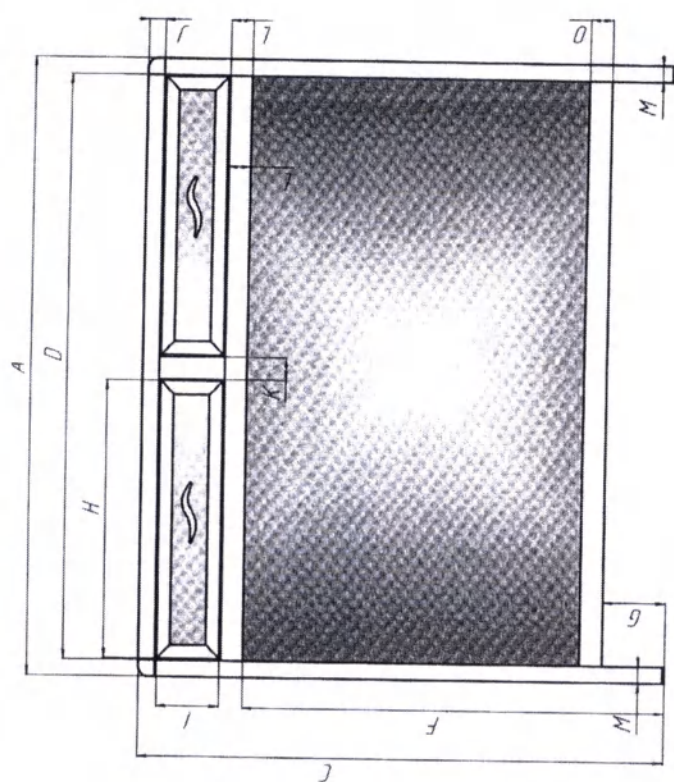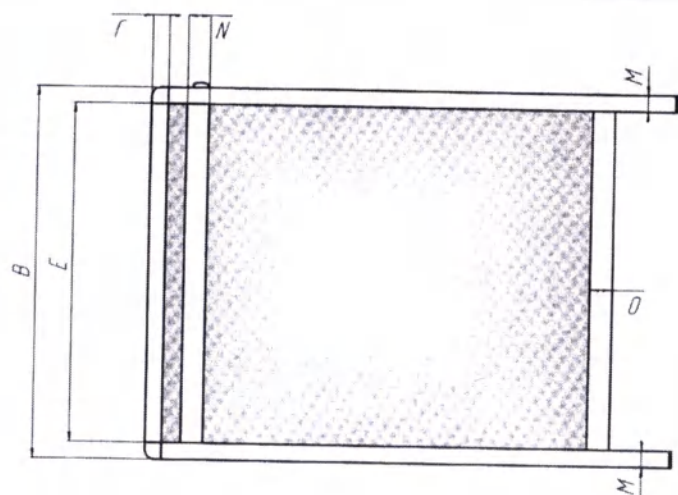

Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 01.00

Габаритные размеры	СЛ-ТС 01.00-01	СЛ-ТС 01.00-02
A, мм (±4)	1000	1200
B, мм (±4)	600	600
C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	946	1146
E, мм (±4)	546	546
F, мм (±4)	680	680
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	170	170
I, мм (±4)	473	573
J, мм (±4)	16	16
K, мм (±4)	437	537
L, мм (±4)	432	573
M, мм (±4)	682	682
N, мм (±4)	335,5	335,5
O, мм (±4)	335,5	335,5
P, мм (±4)	27	27
Q, мм (±4)	36	36
R, мм (±4)	27	27
S, мм (±4)	36	36

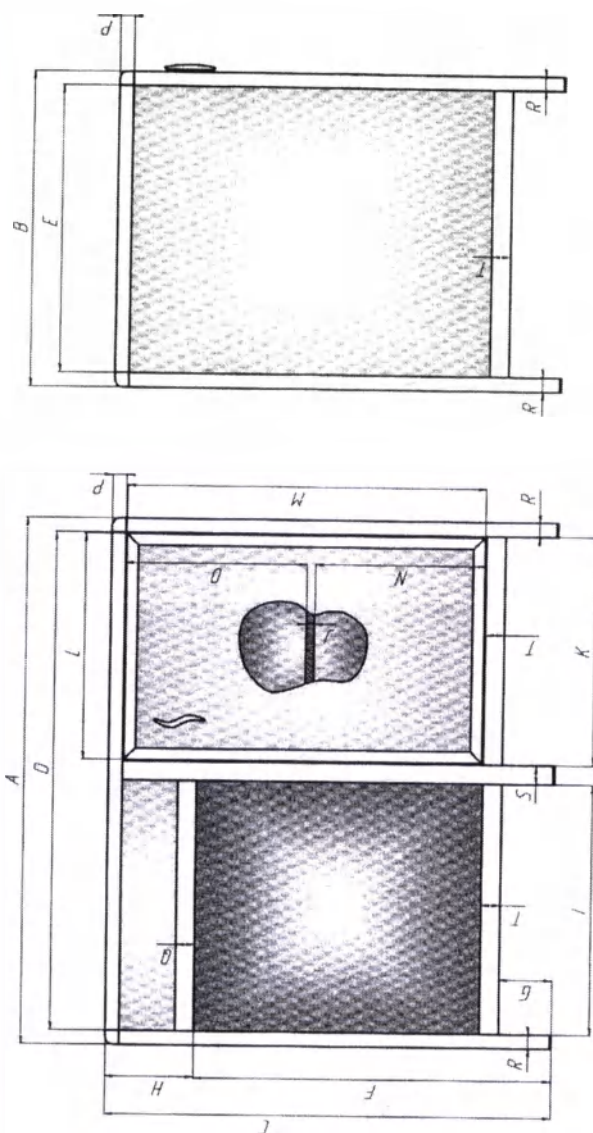

Т, мм (±4)

36

36

Масса: 33 кг (±3)


Стол медицинский комплектуется одним отделением с одной полкой, закрытым одной дверью, и одним открытым отделением.

Стол медицинский для клинко-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 01.01

Габаритные размеры	СЛ-ТС 01.01-01	СЛ-ТС 01.01-02
А, мм (±4)	1000	1200
В, мм (±4)	600	600
С, мм (±4)	850	850
Д, мм (±4)	946	1146
Е, мм (±4)	546	546
Ф, мм (±4)	680	680
Г, мм (±4)	100	100
Н, мм (±4)	170	170
И, мм (±4)	473	573
Ј, мм (±4)	432	532
К, мм (±4)	437	537
Л, мм (±4)	169	169
М, мм (±4)	341	341
Н, мм (±4)	36	36
О, мм (±4)	27	27
Р, мм (±4)	36	36
Q, мм (±4)	27	27
Р, мм (±4)	36	36

Масса: 38 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется одним отделением с выдвижными ящиками в количестве трех штук и одним открытым отделением.

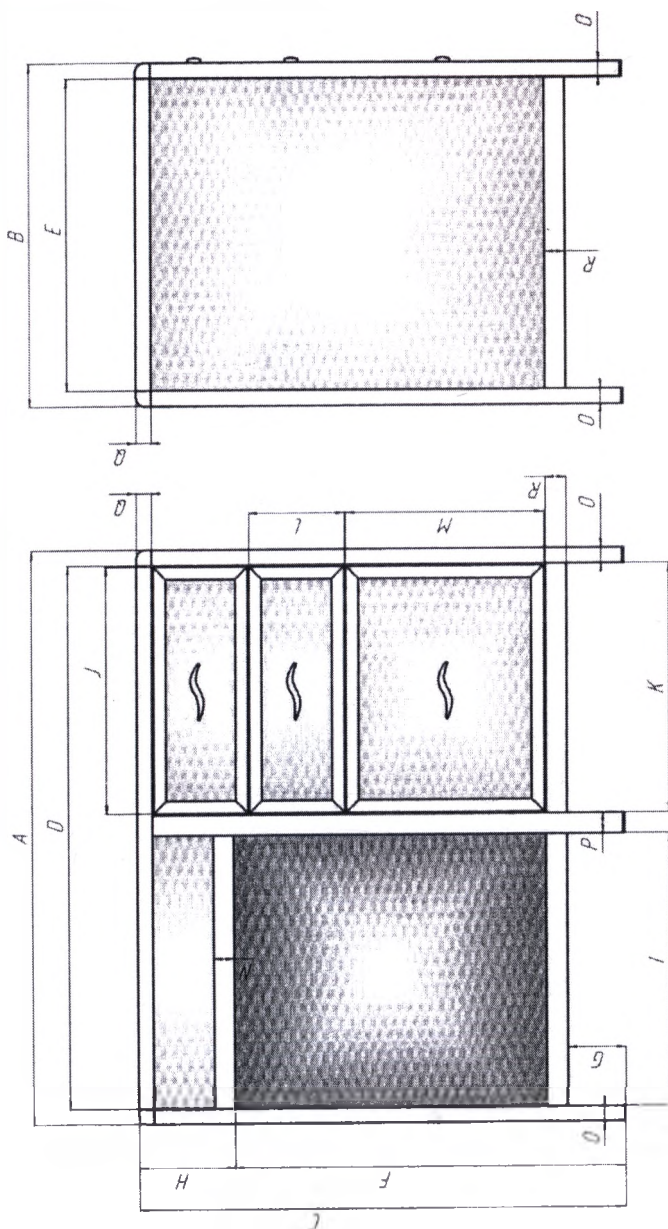


Стол медицинский для клинко-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 01.02

Габаритные размеры	СЛ-ТС 01.02-01	СЛ-ТС 01.02-02
A, мм (±4)	1000	1200
B, мм (±4)	600	600
C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	946	1146
E, мм (±4)	546	546
F, мм (±4)	672	672
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	468	568
I, мм (±4)	473	573
J, мм (±4)	16	16
K, мм (±4)	437	537
L, мм (±4)	110	110
M, мм (±4)	682	682
N, мм (±4)	432	532
O, мм (±4)	335,5	335,5
P, мм (±4)	335,5	335,5
Q, мм (±4)	36	36
R, мм (±4)	27	27
S, мм (±4)	36	36
T, мм (±4)	27	27
U, мм (±4)	36	36
V, мм (±4)	36	36


Масса: 38 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется одним отделением с одной полкой, закрытым одной дверью, и одним выдвижным ящиком, располагающимся под столешницей.

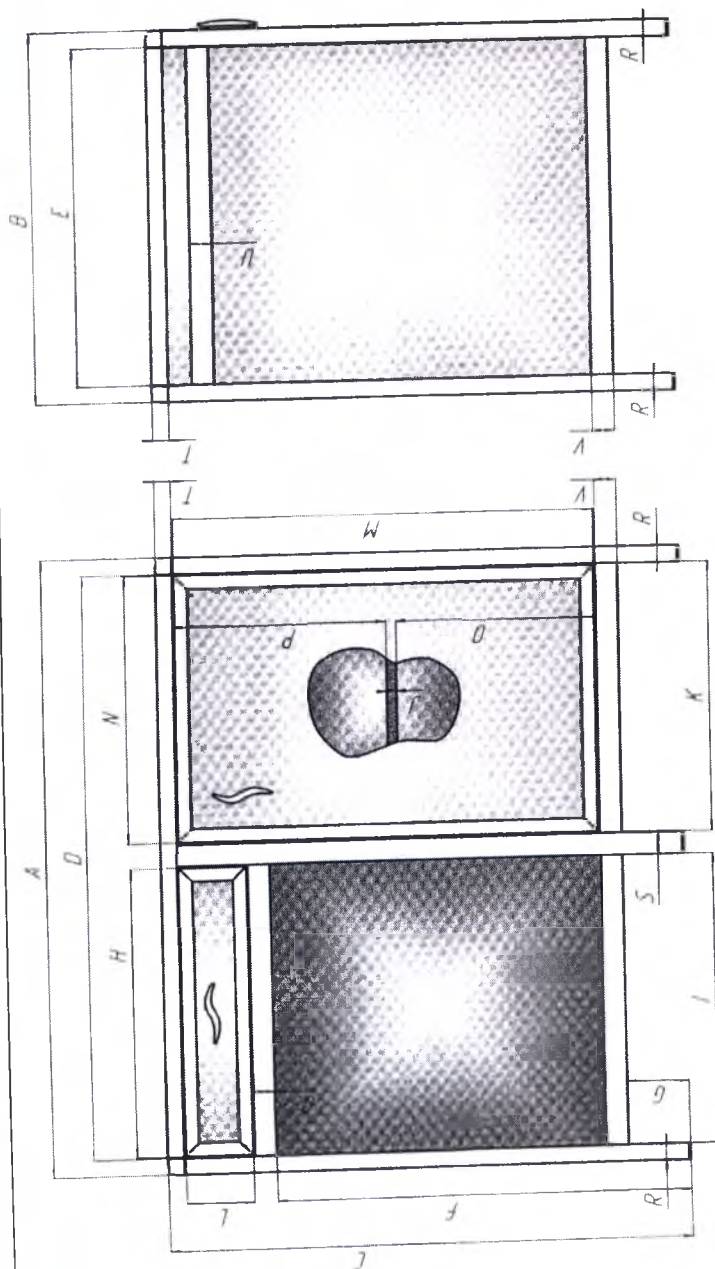

Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 01.03

Габаритные размеры	СЛ-ТС 01.03-01	СЛ-ТС 01.03-02
A, мм (±4)	1000	1200
B, мм (±4)	600	600
C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	946	1146
E, мм (±4)	546	546
F, мм (±4)	672	672
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	468	568
I, мм (±4)	473	573
J, мм (±4)	110	110
K, мм (±4)	437	537
L, мм (±4)	432	532
M, мм (±4)	341	341
N, мм (±4)	169	169
O, мм (±4)	36	36
P, мм (±4)	27	27
Q, мм (±4)	36	36
R, мм (±4)	27	27
S, мм (±4)	36	36

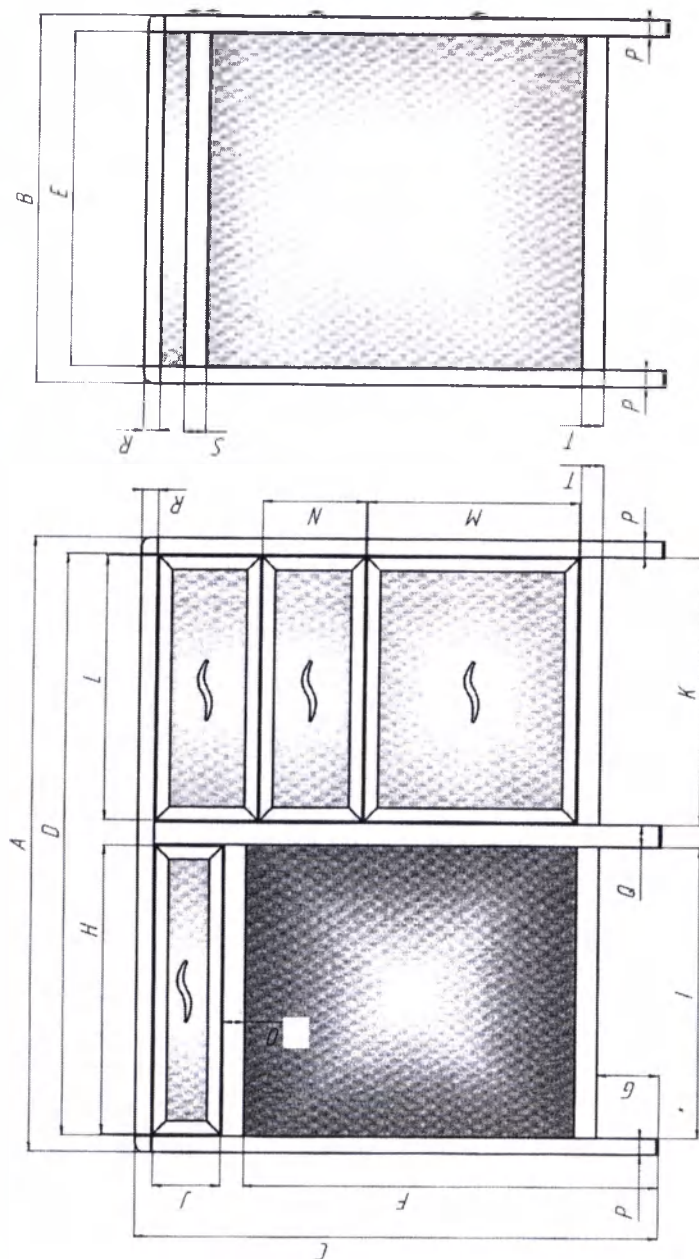

Т, мм (±4)

36


36

Масса: 38 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется одним отделением с выдвигаемыми ящиками в количестве трех штук и одним выдвигаемым ящиком, располагающимся под столешницей.

Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 02.00

Габаритные размеры	СЛ-ТС 02.00
А, мм (±4)	1500
В, мм (±4)	600
С, мм (±4)	850
Д, мм (±4)	1446
Е, мм (±4)	546
Г, мм (±4)	680
Н, мм (±4)	100
И, мм (±4)	170
К, мм (±4)	437
Л, мм (±4)	16
М, мм (±4)	500
О, мм (±4)	169
Р, мм (±4)	682
Q, мм (±4)	432
U, мм (±4)	335,5
W, мм (±4)	335,5
X, мм (±4)	341
Y, мм (±4)	27
Z1, мм (±4)	36
Z2, мм (±4)	36

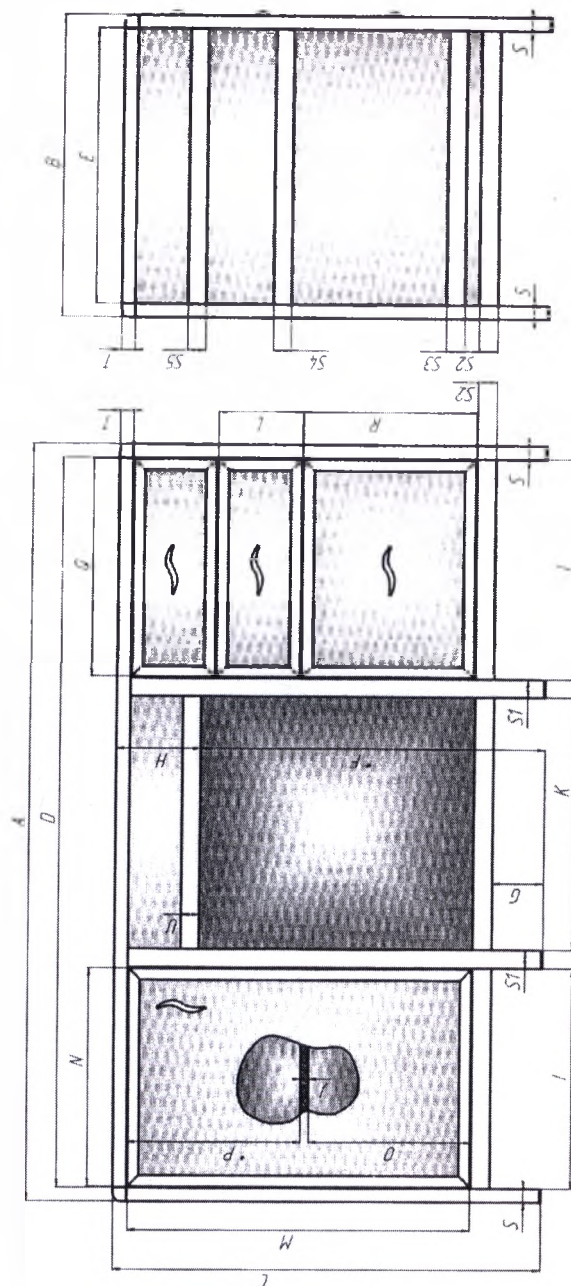

S3, мм (±4)	36
S4, мм (±4)	36
S5, мм (±4)	36
T, мм (±4)	27
U, мм (±4)	36


Масса: 51 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется одним отделением с выдвижными ящиками в количестве трех штук и одним отделением с одной полкой, закрытым одной дверью.

Стол медицинский для клинко-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 02.01

Габаритные размеры	СЛ-ТС 02.01
A, мм (±4)	1500
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	1446
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	680
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	170
I, мм (±4)	437
J, мм (±4)	16
K, мм (±4)	500
L, мм (±4)	437
M, мм (±4)	432
N, мм (±4)	682
O, мм (±4)	335,5
P, мм (±4)	335,5
R, мм (±4)	27
S, мм (±4)	27
T, мм (±4)	36
U, мм (±4)	36
V, мм (±4)	36

Масса: 51 кг (±3)

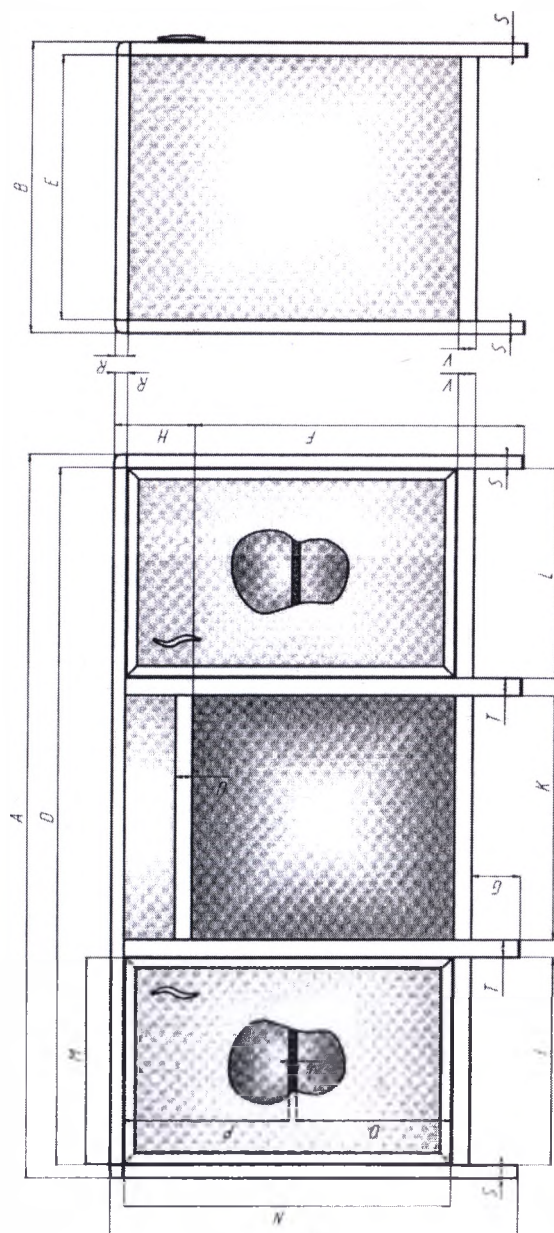


Стол медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью.

Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 02.02


Габаритные размеры	СЛ-ТС 02.02
A, мм (±4)	1500
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	1446
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	680
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	341
I, мм (±4)	437
J, мм (±4)	432
K, мм (±4)	500
L, мм (±4)	169
M, мм (±4)	27
N, мм (±4)	27
O, мм (±4)	36
P, мм (±4)	36
P1, мм (±4)	36
Q, мм (±4)	36
R, мм (±4)	36
S, мм (±4)	36

Масса: 51 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых выдвижные

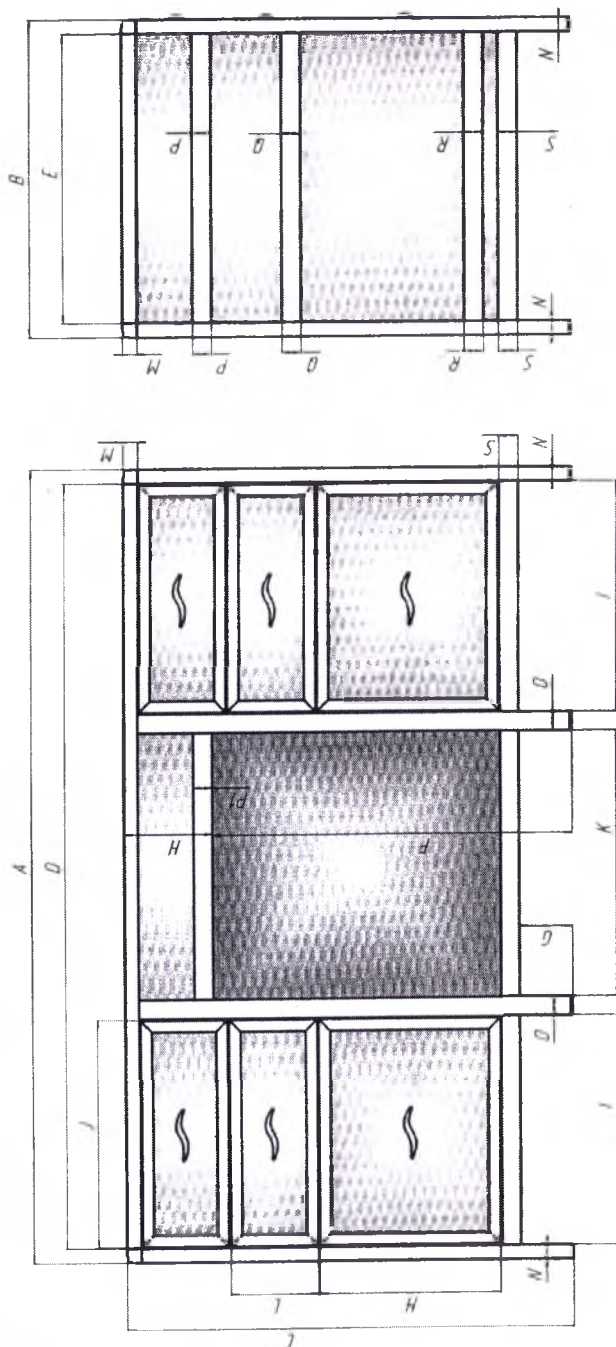

ящики в количестве трех штук.

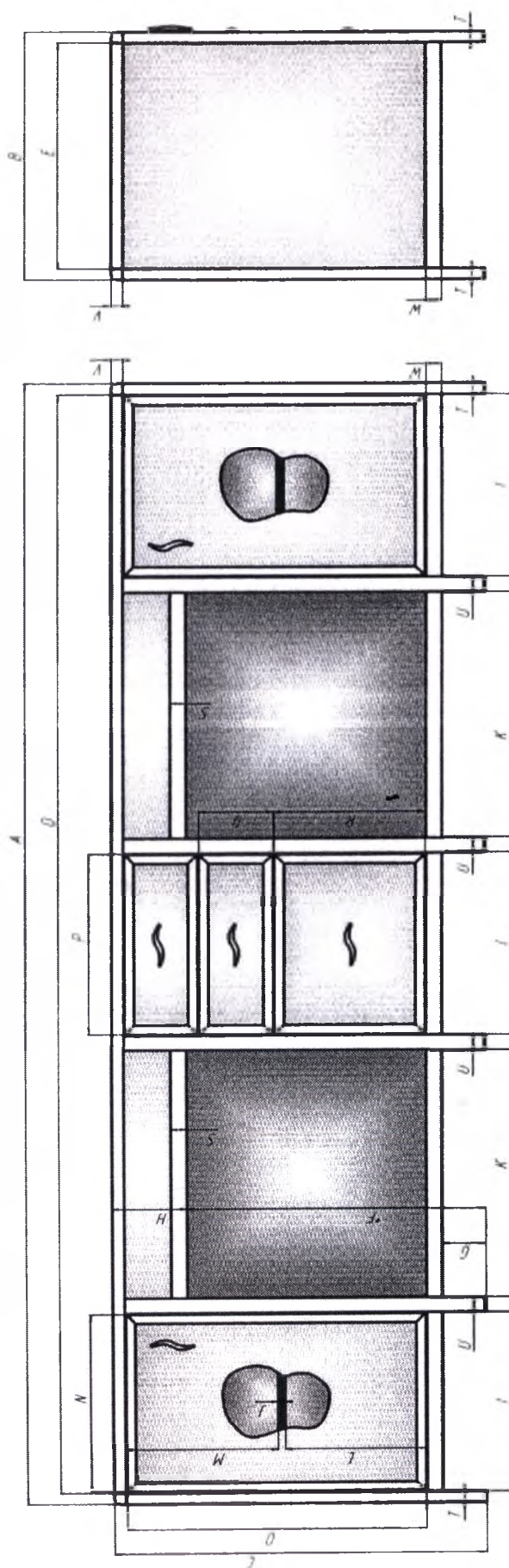


Габаритные размеры	A, мм (±4)	B, мм (±4)	C, мм (±4)	D, мм (±4)	E, мм (±4)	F, мм (±4)	G, мм (±4)	H, мм (±4)	I, мм (±4)	J, мм (±4)	K, мм (±4)
СЛ-ТС 03.01	2700	600	850	2682	546	680	100	170	437	16	595.5

Габаритные размеры	L, мм (±4)	M, мм (±4)	N, мм (±4)	O, мм (±4)	P, мм (±4)	Q, мм (±4)	R, мм (±4)	S, мм (±4)	T, мм (±4)	U, мм (±4)	V, мм (±4)	W, мм (±4)
СЛ-ТС 03.01	335.5	335.5	432	682	432	169	342	36	27	36	27	36

Масса: 80 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью и третье отделение с выдвигаемыми ящиками в количестве трех штук.

Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 03.02

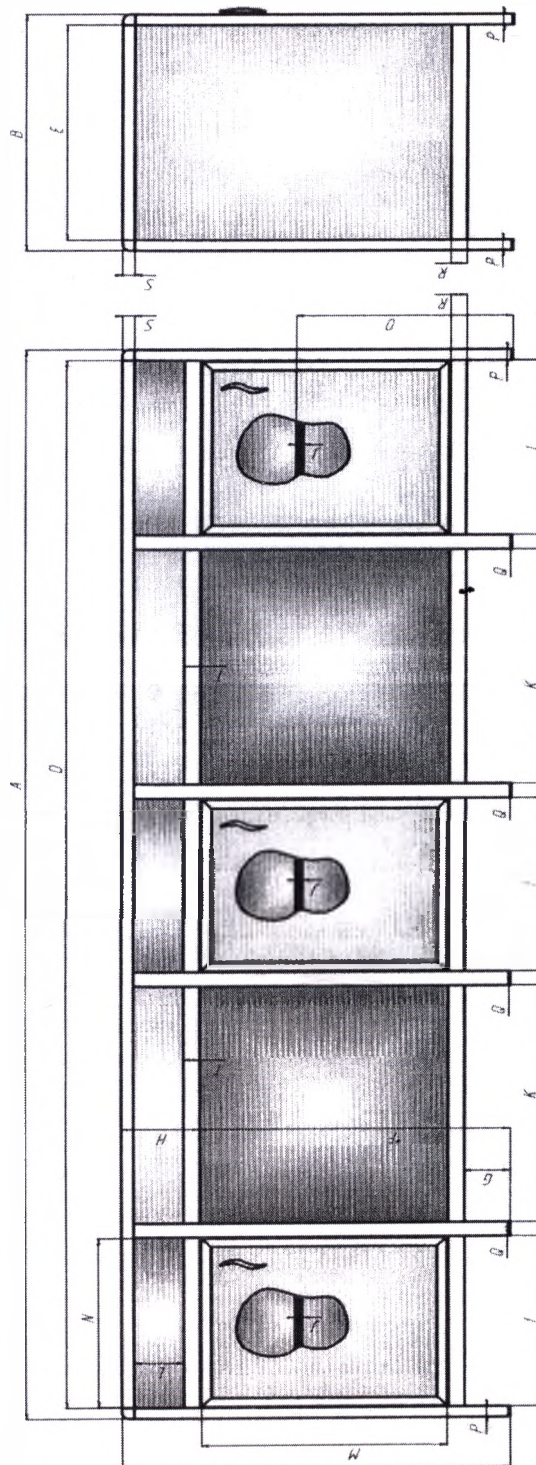


Габаритные размеры	A, мм (±4)	B, мм (±4)	C, мм (±4)	D, мм (±4)	E, мм (±4)	F, мм (±4)	G, мм (±4)	H, мм (±4)	I, мм (±4)	J, мм (±4)	K, мм (±4)
СЛ-ТС 03.02	2700	600	850	2646	546	680	100	170	437	16	595,5

Габаритные размеры	L, мм (±4)	M, мм (±4)	N, мм (±4)	O, мм (±4)	P, мм (±4)	Q, мм (±4)	R, мм (±4)	S, мм (±4)	T, мм (±4)
СЛ-ТС 03.02	107	539	432	473	27	36	36	27	36

Масса: 80 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется тремя отделениями, каждое из которых имеет нишу, одну полку и закрыто одной дверью.

Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 03.03

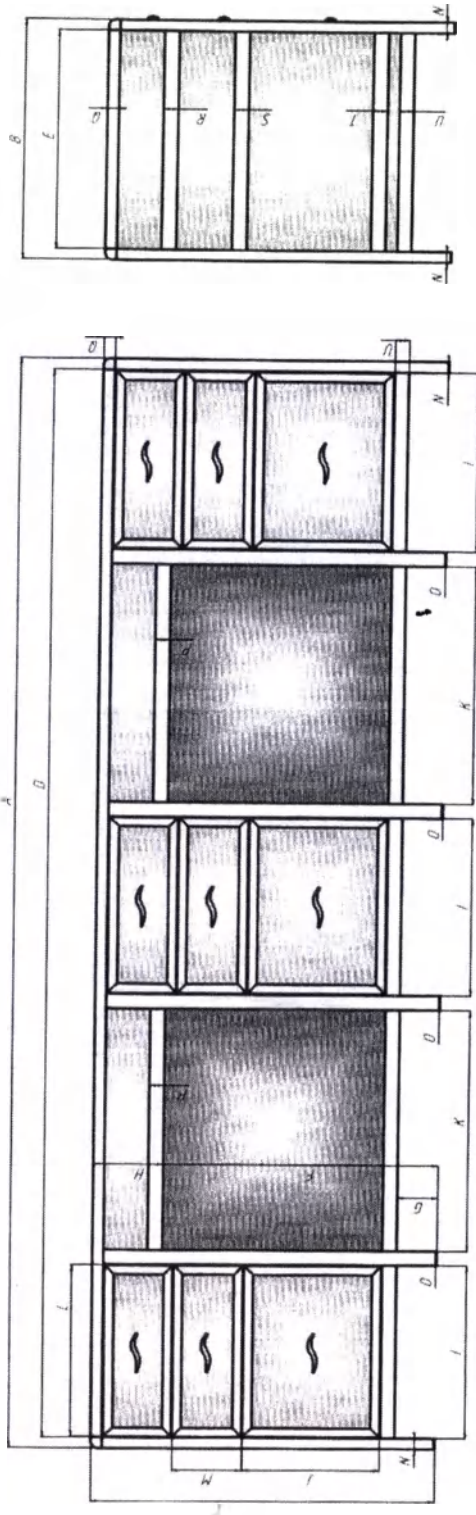


Габаритные размеры	A, мм (±4)	B, мм (±4)	C, мм (±4)	D, мм (±4)	E, мм (±4)	F, мм (±4)	G, мм (±4)	H, мм (±4)	I, мм (±4)	J, мм (±4)	K, мм (±4)
СЛ-ТС 03.03	2700	600	850	2646	546	680	100	170	437	347	595.5

Габаритные размеры	L, мм (±4)	M, мм (±4)	N, мм (±4)	O, мм (±4)	P, мм (±4)	Q, мм (±4)	R, мм (±4)	S, мм (±4)	T, мм (±4)	U, мм (±4)
СЛ-ТС 03.03	432	169	27	36	36	27	36	36	36	36

Масса: 80 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется тремя отделениями, каждое из которых имеет выдвижные ящики в количестве трех штук.

Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 03.04

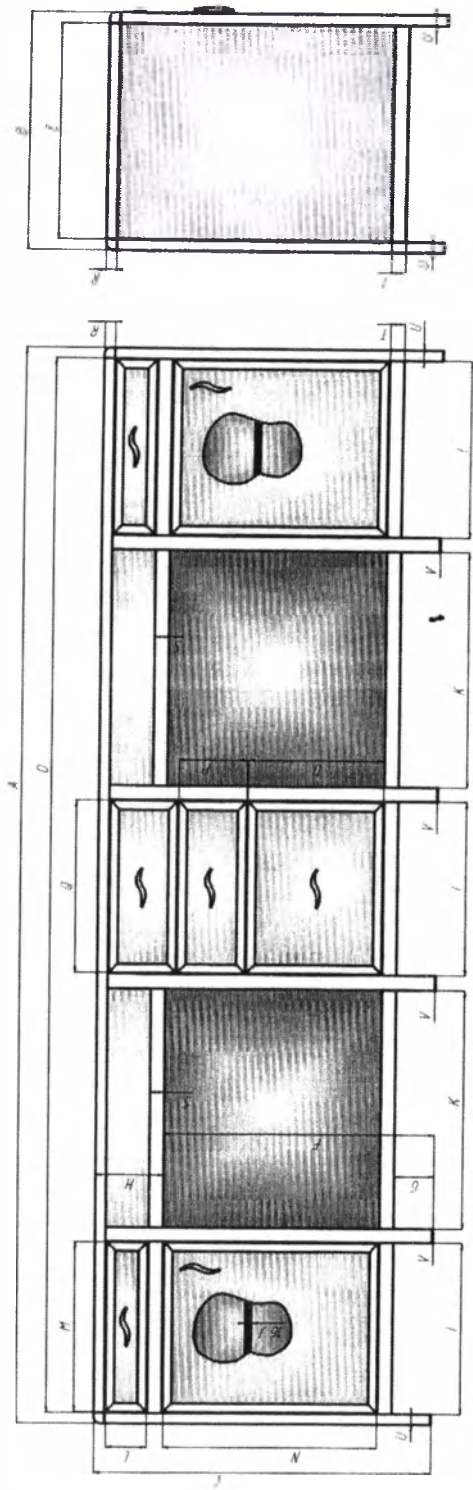


Габаритные размеры	A, мм (±4)	B, мм (±4)	C, мм (±4)	D, мм (±4)	E, мм (±4)	F, мм (±4)	G, мм (±4)	H, мм (±4)	I, мм (±4)	J, мм (±4)	K, мм (±4)
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

СЛ-ТС 03.04	2700	600	850	2646	546	680	100	170	437	16	595.5
Габаритные размеры	L, мм (±4)	M, мм (±4)	N, мм (±4)	O, мм (±4)	P, мм (±4)	Q, мм (±4)	R, мм (±4)	S, мм (±4)	T, мм (±4)	U, мм (±4)	V, мм (±4)
СЛ-ТС 03.04	102	432	539	342	169	432	27	36	36	27	36

Масса: 80 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет один выдвижной ящик, одну полку и закрыто одной дверью и третье отделение с выдвижными ящиками в количестве трех штук.

Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 03.05

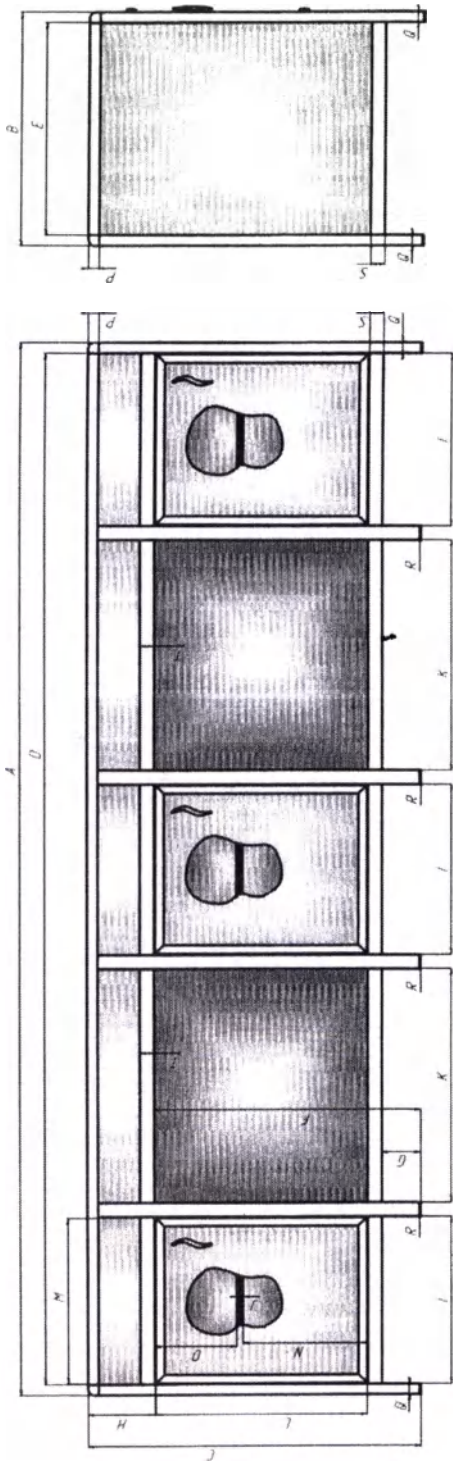


Габаритные размеры	A, мм (±4)	B, мм (±4)	C, мм (±4)	D, мм (±4)	E, мм (±4)	F, мм (±4)	G, мм (±4)	H, мм (±4)	I, мм (±4)	J, мм (±4)	K, мм (±4)
СЛ-ТС 03.05	2700	600	850	2646	546	680	100	170	437	16	595.5

Габаритные размеры	L, мм (±4)	M, мм (±4)	N, мм (±4)	O, мм (±4)	P, мм (±4)	Q, мм (±4)	R, мм (±4)	S, мм (±4)	T, мм (±4)
СЛ-ТС 03.05	539	432	321.5	206.5	27	27	36	36	36

Масса: 80 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется тремя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью.

Дверь и ящик (в разрезе)

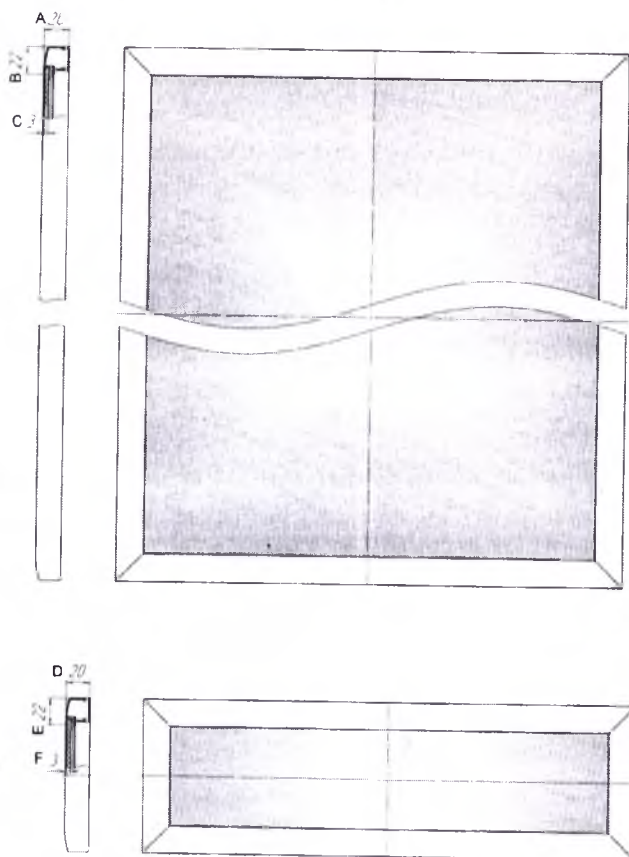

Габаритный размер	Значение габаритного параметра
A	20 мм(±4мм)
B	22 мм(±4мм)
C	3 мм
D	20 мм(±4мм)
E	22 мм(±4мм)
F	3 мм

Максимальная допустимая нагрузка на столы - 30кг.
Максимальная допустимая нагрузка на полки - 10кг.
Максимальная допустимая нагрузка на ящики - 6кг.

Замки магнитные неподвижно и прочно закреплены на дверях столов (СЛ-ТС 01.00-01; СЛ-ТС 01.00-02; СЛ-ТС 01.02-01; СЛ-ТС 01.02-02; СЛ-ТС 02.00; СЛ-ТС 02.01; СЛ-ТС 03.01; СЛ-ТС 03.02; СЛ-ТС 03.04; СЛ-ТС 03.05) и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СЛ-ТС ХХ.ХХ, модель: СЛ-ТС ХХ.ХХ-ХХ (или б/н)	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом использования стола убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения.

После транспортирования продукции в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать её при комнатной температуре (+15⁰С до +25⁰С) не менее 2 часов.

Убедитесь, что комплект поставки соответствует заявленному в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста, обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

Подготовка к эксплуатации изделия:

- распаковать изделие (поставляется в собранном виде);
- с помощью крестовой отвертки установить ручки на лицевую сторону фасада, если они предусмотрены;
- выполнить санитарную обработку изделия.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом и при эксплуатации, с периодичностью раз в год, заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене при необходимости поломанных или изношенных деталей.

Техническое обслуживание и ремонт осуществляется лицами из числа технического персонала с соблюдением правил техники безопасности.

Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации столов медицинской для клиничко-диагностических лабораторий, проводится в соответствии технических характеристик и комплектности паспорта и настоящего руководства по эксплуатации, при этом проверяется отсутствие изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. В пределах одного населенного пункта столы допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования – при температуре от -50 ⁰С до +50 ⁰С, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность столов от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50 ⁰С до +40 ⁰С, влажности – не более 75 %.

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от +10 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха – не более 75%.

8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЕГО ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Очищение производить посредством влажной тряпки (салфетки) и любого универсального чистящего средства. Рабочие и фасадные поверхности изделия необходимо протирать салфеткой, смоченной в дезинфицирующие и моющие средства (1%-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода в комплексе с 1%-ным раствором моющих средств), салфетку предварительно отжать.

9. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления столов для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02, а также соблюдаться нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования столов не должно происходить разложения и выделения вредных веществ, а также должны выполняться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7 ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении столов (при наличии) следует проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

10. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие столов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации столов составляет 18 (восемнадцать) месяцев.

Средний срок службы - 7 лет со дня его продажи.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений столов, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: *ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).*

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Наименование	Артикул
	Стол медицинский	СЛ-ТС 00.00
	Стол медицинский	СЛ-ТС 00.01
	Стол медицинский	СЛ-ТС 00.02
	Стол медицинский	СЛ-ТС 00.03
	Стол медицинский	СЛ-ТС 01.00
	Стол медицинский	СЛ-ТС 01.01
	Стол медицинский	СЛ-ТС 01.02
	Стол медицинский	СЛ-ТС 01.03
	Стол медицинский	СЛ-ТС 02.00
	Стол медицинский	СЛ-ТС 02.01
	Стол медицинский	СЛ-ТС 02.03
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.01
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.02
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.03
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.04
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.05

Соответствует ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК _____

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Техстрой»,

603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Место производства:

ООО «Техстрой», 606440, Россия, Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д.1.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru


Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на
(22/двадцати двух) листах

Директор ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «Техстрой»

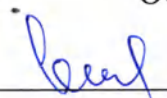 А.Н. Кабикин

«14» июня

2019 г.



Стол� медицинские для клинико-диагностических лабораторий
по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

**Столик медицинский подкатной для клинико-диагностических лабораторий
в вариантах исполнения**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2018

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Столик медицинский подкатной для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения (далее – столик):

1. Столик медицинский подкатной для клинико-диагностических лабораторий СЛп-ТС 00.00;

2. Столик медицинский подкатной для клинико-диагностических лабораторий СЛп-ТС 01.00.

2. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

Показания к применению:

Столик медицинский подкатной для клинико-диагностических лабораторий в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019:

- для работы с лабораторной посудой, реактивами и приборами с возможностью перемещать стол в удобное место в любых лабораторных отделениях и лечебно-профилактических учреждениях

Область применения – лечебно-профилактические учреждения.

Потенциальным потребителем медицинского изделия является обученный медицинский персонал, по назначению и под наблюдением врача.


Противопоказания к применению отсутствуют.

Возможные побочные действия отсутствуют.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столик медицинский подкатной для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения

1	Столик медицинский подкатной для клинико-диагностических лабораторий СЛп-ТС 00.00	Габаритные размеры	СЛп-ТС 00.00
		А, мм (±4)	600
		В, мм (±4)	450
		С, мм (±4)	850
		Д, мм (±4)	223
		Е, мм (±4)	503
		F, мм (±4)	783
		G, мм (±4)	60
		H, мм (±4)	27
		I, мм (±4)	27
		J, мм (±4)	30
		J1, мм (±4)	30
		J2, мм (±4)	30
		Масса: 7 кг (±3) Столик медицинский подкатной комплектуется тремя стеклянными полками и колесами в количестве четырех штук (без тормозов).	

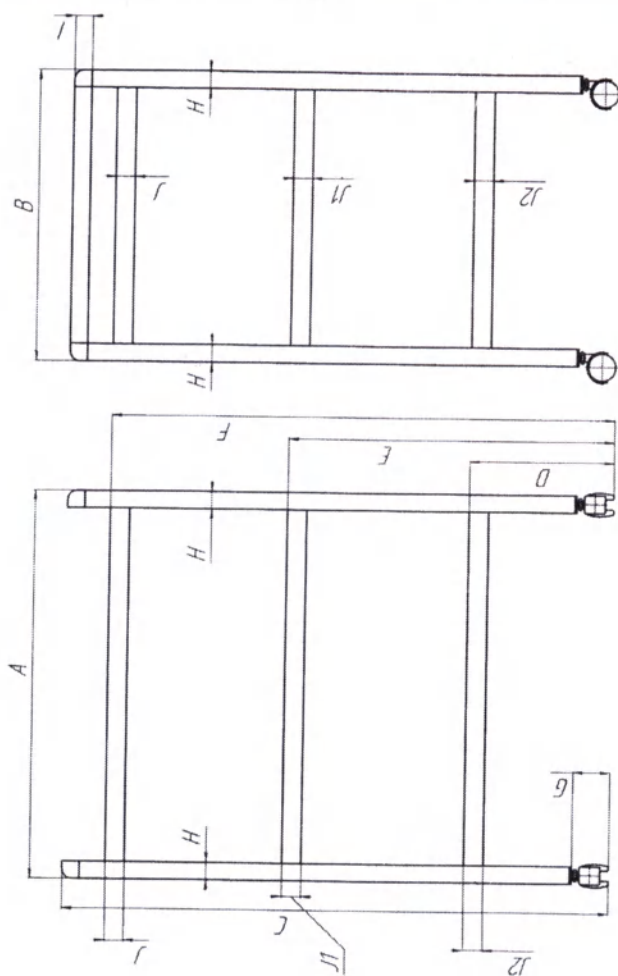

2

Столик медицинский подкатной для клиничко-диагностических лабораторий
СЛп-ТС 01.00


Габаритные размеры

СЛп-ТС 01.00


A, мм (±4)	600
B, мм (±4)	450
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	223
E, мм (±4)	350
F, мм (±4)	783
G, мм (±4)	60
H, мм (±4)	145
I, мм (±4)	541
J, мм (±4)	27
K, мм (±4)	27
L, мм (±4)	30
L1, мм (±4)	30
L2, мм (±4)	30

Масса: 13 кг (±3)

Столик медицинский подкатной комплектуется одной стеклянной полкой, одним выдвижным ящиком и колесами в количестве четырех штук (без тормозов).

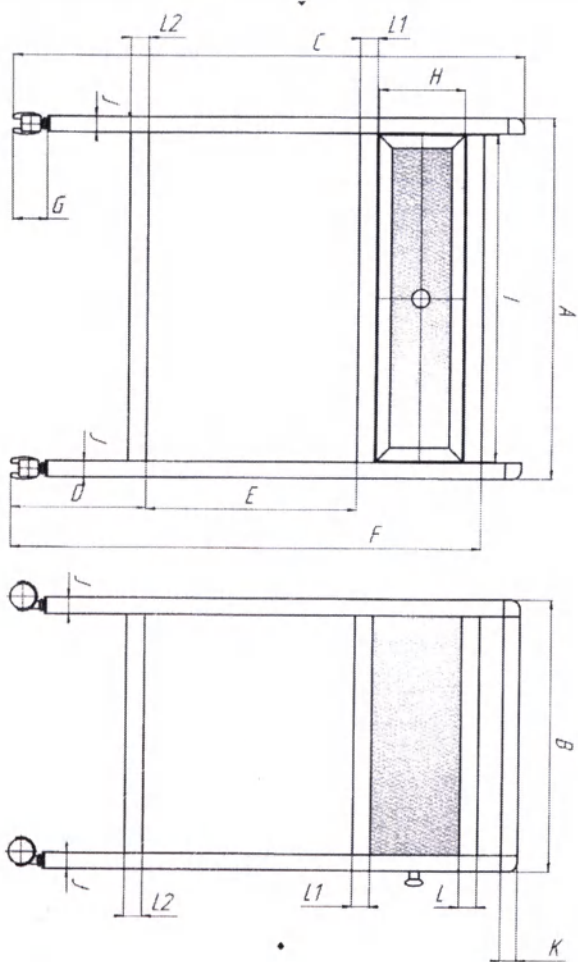

Дверь и ящик (в разрезе)

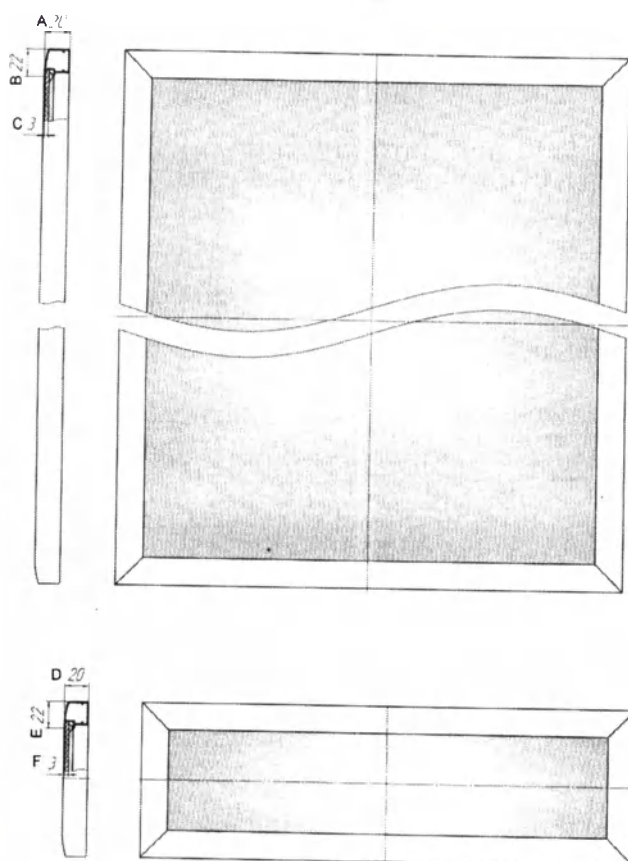

Габаритный размер	Значение габаритного параметра
A	20 мм(+4мм)
B	22 мм(+4мм)
C	3 мм
D	20 мм(+4мм)
E	22 мм(+4мм)
F	3 мм

Максимальная допустимая нагрузка на столы - 30кг.
 Максимальная допустимая нагрузка на полки - 10кг.
 Максимальная допустимая нагрузка на ящики - 6кг.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Столик медицинский подкатной для клиничко-диагностических лабораторий СЛп-ТС ХХ.ХХ	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом использования столика убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения.

После транспортирования продукции в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать её при комнатной температуре (+15°C до +25°C) не менее 2 часов.

Убедитесь, что комплект поставки соответствует заявленному в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста, обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

Подготовка к эксплуатации изделия:

- распаковать изделие (поставляется в собранном виде);

- с помощью крестовой отвертки установить ручки на лицевую сторону фасада, если они предусмотрены;
- выполнить санитарную обработку изделия.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом и при эксплуатации, с периодичностью раз в год, заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене при необходимости поломанных или изношенных деталей.

Техническое обслуживание и ремонт осуществляется лицами из числа технического персонала с соблюдением правил техники безопасности.

Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации столов медицинской для клиничко-диагностических лабораторий, проводится в соответствии технических характеристик и комплектности паспорта и настоящего руководства по эксплуатации, при этом проверяется отсутствие изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. В пределах одного населенного пункта столы допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования – при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность столов от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, влажности – не более 75 %.

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха – не более 75%.

8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЕГО ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Очищение производить посредством влажной тряпки (салфетки) и любого универсального чистящего средства. Рабочие и фасадные поверхности изделия необходимо протирать салфеткой, смоченной в дезинфицирующие и моющие средства (1%-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода в комплексе с 1%-ным раствором моющих средств), салфетку предварительно отжать.

9. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления столов для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02, а также соблюдаться нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования столов не должно происходить разложения и выделения вредных веществ, а также должны выполняться

требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7 ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении столов (при наличии) следует проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

10. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие столов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации столов составляет 18 (восемнадцать) месяцев.

Средний срок службы - 7 лет со дня его продажи.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений столов, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Наименование	Артикул
	Столик медицинский подкатной	СЛп-ТС 00.00
	Столик медицинский подкатной	СЛп-ТС 01.00

Соответствует ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Техстрой»,
603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10.
Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Место производства:

ООО «Техстрой», 606440, Россия, Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д.1.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru


Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на
(7 / семи) листах

Директор ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «Техстрой»

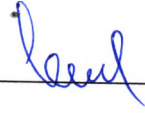
«14» июня 2019 г.
М.П. 

Столы медицинские для клинико-диагностических лабораторий
по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

**Стол медицинский угловой для клинико-диагностических лабораторий
в вариантах исполнения**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2018

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стол медицинский угловой для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения (далее – стол, столик):

1. Стол медицинский угловой для клинико-диагностических лабораторий СЛУ-ТС 01.02, модели: СЛУ-ТС 01.02-01, СЛУ-ТС 01.02-02.

2. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения.

Потенциальным потребителем медицинского изделия является обученный медицинский персонал, по назначению и под наблюдением врача.

Показания к применению:

Стол медицинский угловой для клинико-диагностических лабораторий в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019:

- для работы с лабораторной посудой, реактивами и приборами, с целью рационального использования пространства, используя как угловое соединение в любых лабораторных отделениях и лечебно-профилактических учреждениях




Противопоказания к применению отсутствуют.

Возможные побочные действия отсутствуют.




3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол медицинский угловой для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения


1	Стол медицинский угловой для клинико-диагностических лабораторий СЛУ-ТС 01.02 Модель СЛУ-ТС 01.02-01:	Габаритные размеры	СЛУ-ТС 01.02-01	СЛУ-ТС 01.02-02
		A, мм (±4)	835	835
		B, мм (±4)	500	595
		C, мм (±4)	850	850
		D, мм (±4)	457	457
		E, мм (±4)	688	688
		F, мм (±4)	484	600
		G, мм (±4)	100	100
		H, мм (±4)	16	600
		I, мм (±4)	-	484
		J, мм (±4)	-	16
		K, мм (±4)	27	27
		M, мм (±4)	29.56	29.56
		N, мм (±4)	38.18	38.18
		O, мм (±4)	30	30
		Масса: 20 кг (±3) Стол медицинский угловой комплектуется отделением с одной полкой, которое закрыто дверью.		

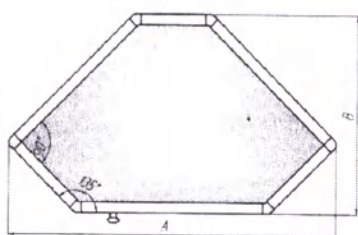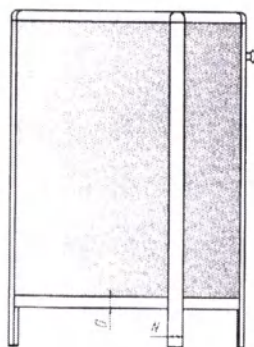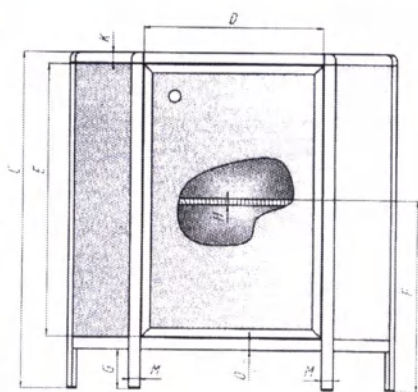

Модель СЛТУ-ТС 01.02-01:

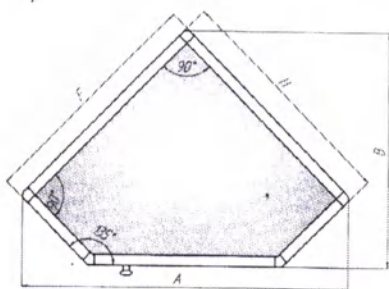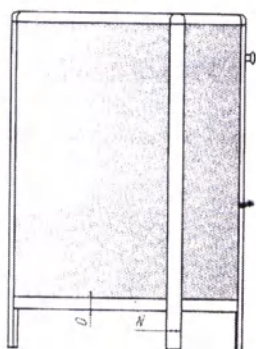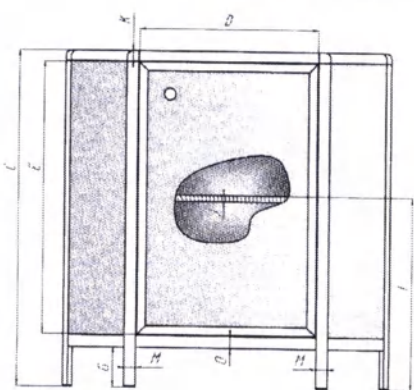

Дверь и ящик (в разрезе)

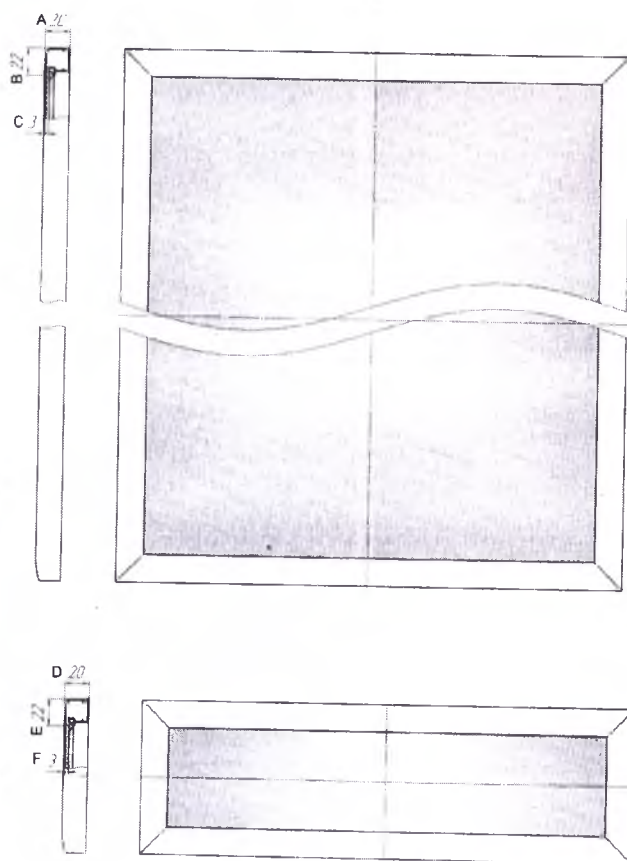

Габаритный размер	Значение габаритного параметра
A	20 мм(±4мм)
B	22 мм(±4мм)
C	3 мм
D	20 мм(±4мм)
E	22 мм(±4мм)
F	3 мм

Максимальная допустимая нагрузка на столы - 30кг.
 Максимальная допустимая нагрузка на полки - 10кг.
 Максимальная допустимая нагрузка на ящики - 6кг.

Замки магнитные неподвижно и прочно закреплены на дверях столов (СЛУ-ТС 01.02-01; СЛУ-ТС 01.02-02) и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Стол медицинский угловой для клинико-диагностических лабораторий СЛУ-ТС XX.XX, модель: СЛУ-ТС XX.XX-XX	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом использования столика убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения.

После транспортирования продукции в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать её при комнатной температуре (+15⁰С до +25⁰С) не менее 2 часов.

Убедитесь, что комплект поставки соответствует заявленному в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста, обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

Подготовка к эксплуатации изделия:

- распаковать изделие (поставляется в собранном виде);
- с помощью крестовой отвертки установить ручки на лицевую сторону фасада, если они предусмотрены;
- выполнить санитарную обработку изделия.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом и при эксплуатации, с периодичностью раз в год, заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене при необходимости поломанных или изношенных деталей.

Техническое обслуживание и ремонт осуществляется лицами из числа технического персонала с соблюдением правил техники безопасности.

Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации столов медицинских для клиничко-диагностических лабораторий, проводится в соответствии технических характеристик и комплектности паспорта и настоящего руководства по эксплуатации, при этом проверяется отсутствие изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. В пределах одного населенного пункта столы допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования – при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность столов от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, влажности – не более 75 %.

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха – не более 75%.

8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЕГО ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Очищение производить посредством влажной тряпки (салфетки) и любого универсального чистящего средства. Рабочие и фасадные поверхности изделия необходимо протирать салфеткой, смоченной в дезинфицирующие и моющие средства (1%-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода в комплексе с 1%-ным раствором моющих средств), салфетку предварительно отжать.

9. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления столов для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02, а также соблюдаться нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования столов не должно происходить разложения и выделения вредных веществ, а также должны выполняться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7 ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении столов (при наличии) следует проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

10. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие столов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации столов составляет 18 (восемнадцать) месяцев.

Средний срок службы - 7 лет со дня его продажи.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений столов, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Наименование	Артикул
	Стол лабораторный угловой	СЛУ-ТС 01.02

Соответствует ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Техстрой»,

603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Место производства:

ООО «Техстрой», 606440, Россия, Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д.1.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru


Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на
(6 / шести) листах




Директор ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «Техстрой»

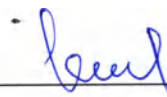 А.Н. Кабикин

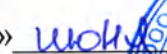«14»  2019 г.



Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий

по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

**Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий
в вариантах исполнения**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2018

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения (далее – стол-тумба, стол):

1. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 00.00;
2. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 00.01;
3. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 01.00;
4. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 01.01;
5. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 01.02;
6. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.00;
7. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.01;
8. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.02;
9. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.03;
10. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.04;
11. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.05;
12. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 03.00;
13. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 03.01;
14. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 03.02;
15. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 03.03;
16. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 04.00;
17. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 04.01.

2. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения.

Потенциальным потребителем медицинского изделия является обученный медицинский персонал, по назначению и под наблюдением врача.

Показания к применению:

Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019:

- для расположения лабораторной посуды, реактивов и оборудования, рационально используя рабочее пространство и разгружая основной рабочий стол в любых лабораторных отделениях и лечебно-профилактических учреждениях



Противопоказания к применению отсутствуют.

Возможные побочные действия отсутствуют.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения

1	Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 00.00	Габаритные размеры	СТ-ТС 00.00
		А, мм (±4)	1000
		В, мм (±4)	600
		С, мм (±4)	850
		Д, мм (±4)	941
		Е, мм (±4)	546
		Г, мм (±4)	225
		И, мм (±4)	100
		Н, мм (±4)	27
		Л, мм (±4)	27

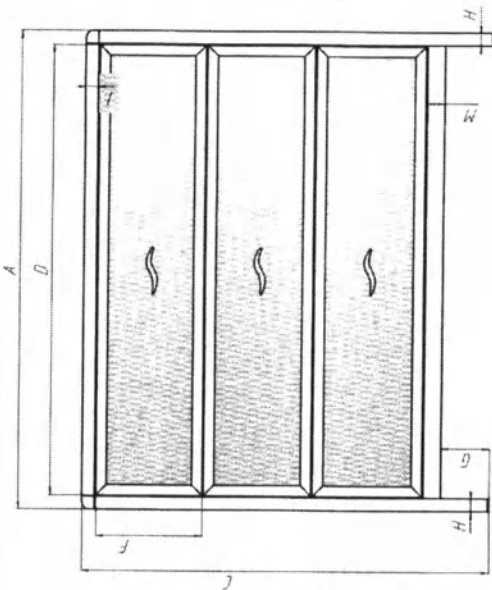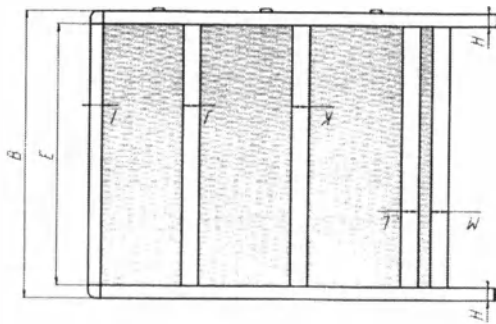


J, мм (±4)	36
K, мм (±4)	36
L, мм (±4)	36
M, мм (±4)	36

Масса: 41 кг (±3)
 Стол-тумба медицинский комплектуется
 тремя выдвижными ящиками.

Габаритные размеры	СТ-ТС 00.01
A, мм (±4)	1000
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	941
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	168
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	27
I, мм (±4)	27
J, мм (±4)	36
K, мм (±4)	36
L, мм (±4)	36
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	36

Масса: 47 кг (±3)
 Стол-тумба медицинский комплектуется
 выдвижными ящиками в количестве
 четырех штук.

Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
 СТ-ТС 00.01

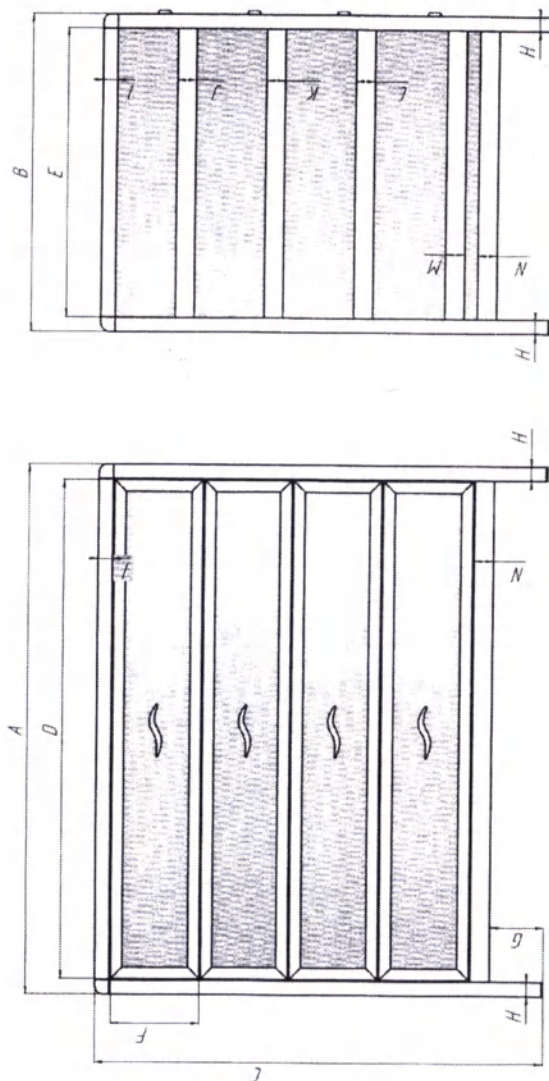


Стол-тумба медицинский для клинко-диагностических лабораторий
СТ-ТС 01.00

Габаритные размеры	СТ-ТС 01.00
A, мм (±4)	1000
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	487
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	450
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	681
I, мм (±4)	946
J, мм (±4)	16
K, мм (±4)	27
L, мм (±4)	27
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	36

Масса: 41 кг (±3)

Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью.

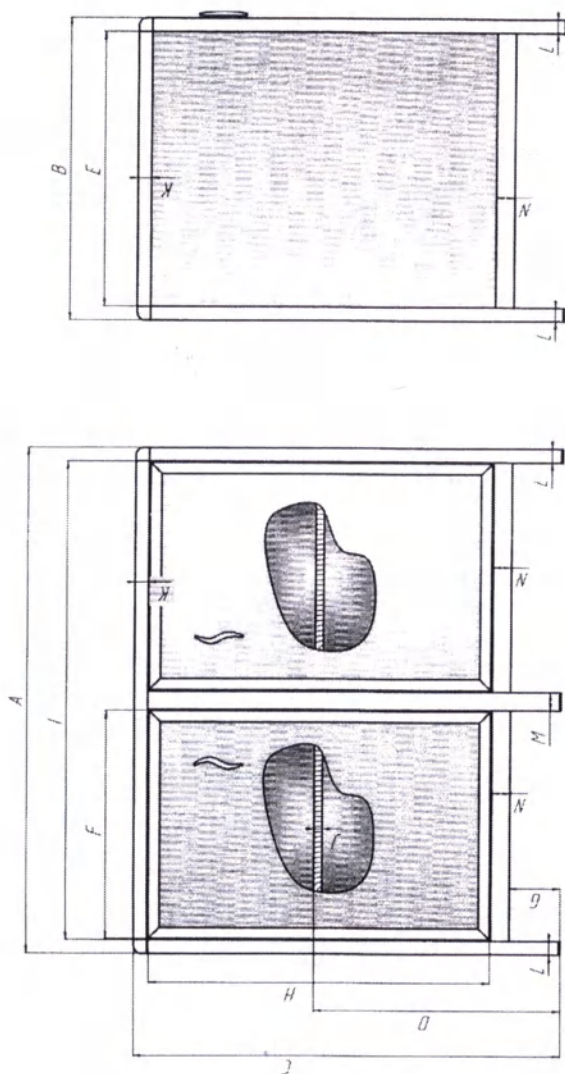

Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
СТ-ТС 01.01


Габаритные размеры

СТ-ТС 01.01

A, мм (±4)	1000
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	487
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	450
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	681
I, мм (±4)	450
J, мм (±4)	16
K, мм (±4)	168
L, мм (±4)	27
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	27
O, мм (±4)	36

Масса: 45 кг (±3)


Стол-тумба медицинский комплектуется одним отделением с одной полкой и закрытым одной дверью и вторым отделением с выдвигаемыми ящиками в количестве четырех штук.

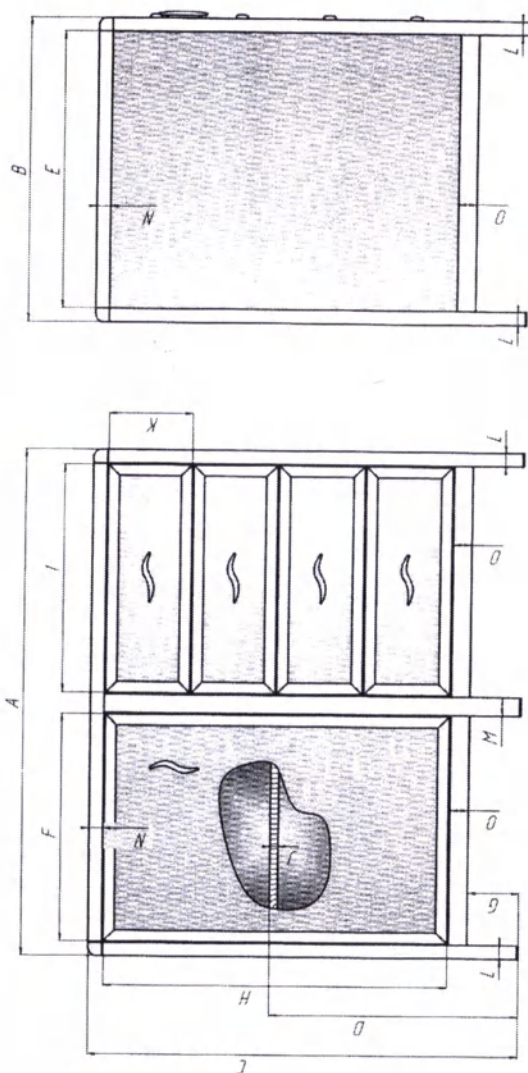

5 Стол-тумба медицинский для клинко-диагностических лабораторий
СТ-ТС 01.02

Габаритные размеры	СТ-ТС 01.02
A, мм (±4)	1000
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	168
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	450
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	27
I, мм (±4)	36
J, мм (±4)	27
K, мм (±4)	36
L, мм (±4)	36
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	36
O, мм (±4)	36


Масса: 52 кг (±3)
Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет выдвижные ящики в количестве четырех штук.

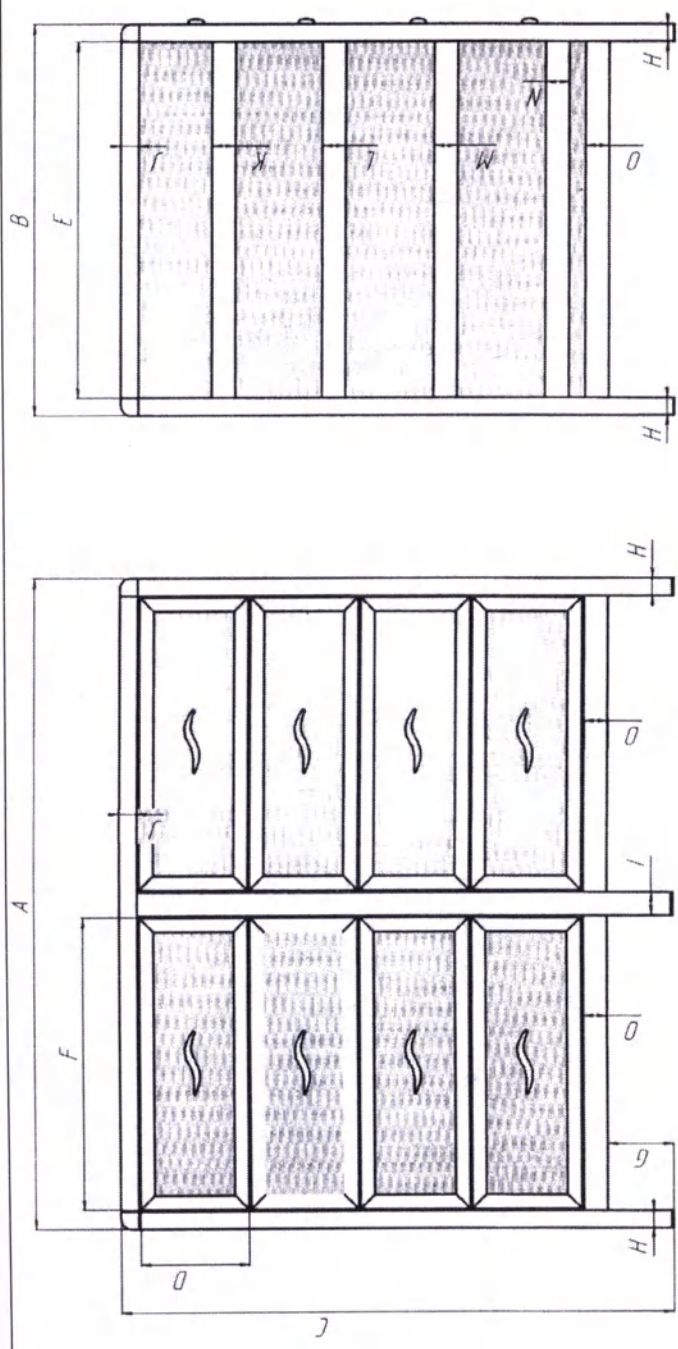

Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
СТ-ТС 02.00

Габаритные размеры	СТ-ТС 02.00
A, мм (±4)	1000
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	135
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	450
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	510
I, мм (±4)	688
J, мм (±4)	16
K, мм (±4)	946
L, мм (±4)	382
M, мм (±4)	27
N, мм (±4)	36
O, мм (±4)	27
P, мм (±4)	36
Q, мм (±4)	36

Масса: 45 кг (±3)

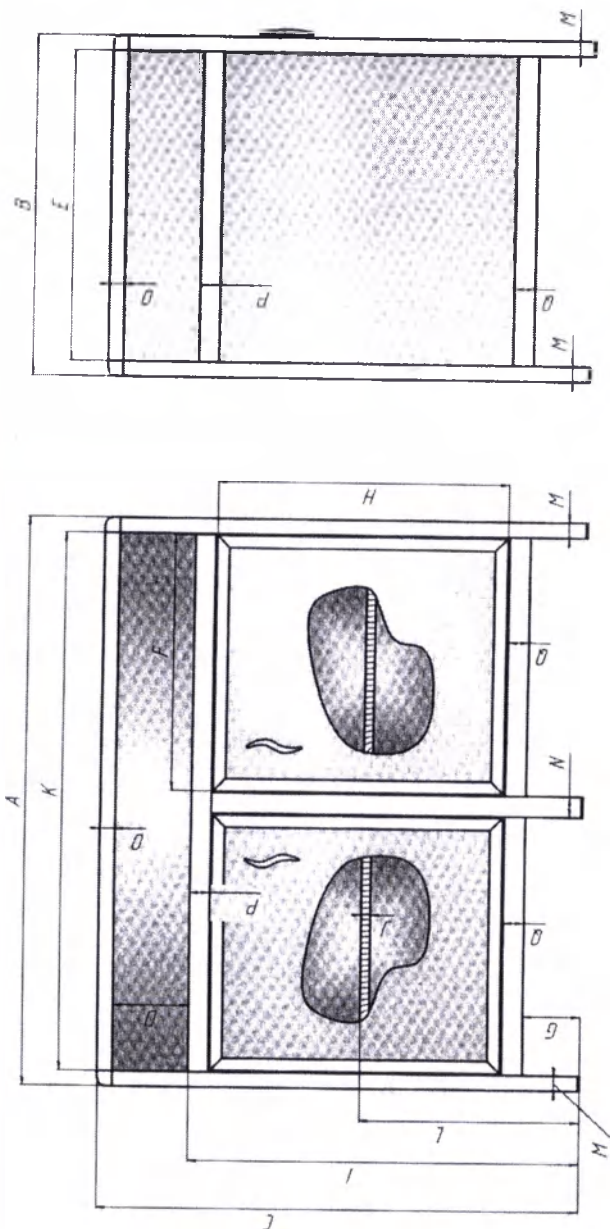


Стол-тумба медицинский комплектуется открытой нишей и двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью.

Стол-тумба медицинский для клинко-диагностических лабораторий
СТ-ТС 02.01

Габаритные размеры	СТ-ТС 02.01
A, мм (± 4)	1000
B, мм (± 4)	600
C, мм (± 4)	850
D, мм (± 4)	135
E, мм (± 4)	546
F, мм (± 4)	450
G, мм (± 4)	100
H, мм (± 4)	510
I, мм (± 4)	688
J, мм (± 4)	16
K, мм (± 4)	168
L, мм (± 4)	450
M, мм (± 4)	382
N, мм (± 4)	27
O, мм (± 4)	36
P, мм (± 4)	27
Q, мм (± 4)	36
R, мм (± 4)	36

Масса: 45 кг (± 3)

Стол-тумба медицинский комплектуется открытой нишей и двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и

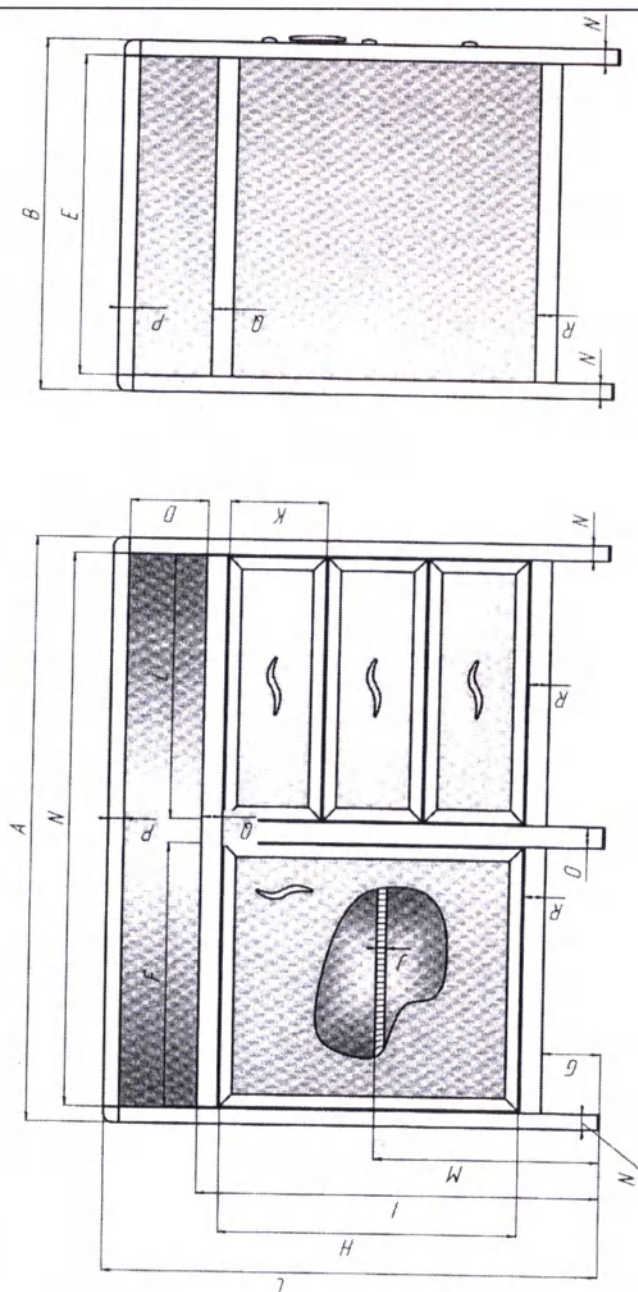


закрыто одной дверью.

Стол-тумба медицинский для клинично-диагностических лабораторий
СТ-ТС 02.02

Габаритные размеры	СТ-ТС 02.02
A, мм (±4)	1000
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	135
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	450
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	168
I, мм (±4)	688
J, мм (±4)	946
K, мм (±4)	27
L, мм (±4)	36
M, мм (±4)	27
N, мм (±4)	36
O, мм (±4)	36
P, мм (±4)	36
Q, мм (±4)	36
R, мм (±4)	36

Масса: 45 кг (±3)

Стол-тумба медицинский комплектуется открытой нишей и двумя отделениями, каждое из которых имеет выдвижные ящики в количестве трех штук.

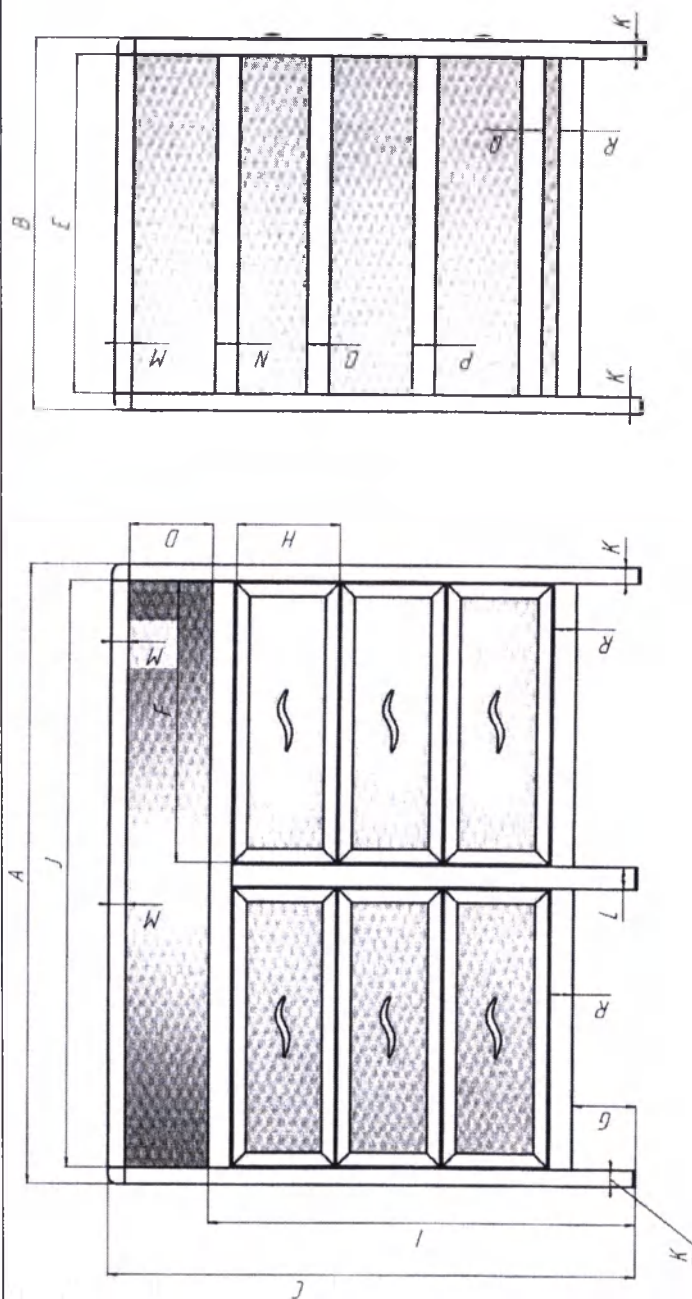


Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
СТ-ТС 02.03

Габаритные размеры	СТ-ТС 02.03
A, мм (±4)	1000
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	382
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	450
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	471
J, мм (±4)	16
L, мм (±4)	27
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	27
O, мм (±4)	36
P, мм (±4)	36
Q, мм (±4)	36
I, мм (±4)	168

Масса: 45 кг (±3)


Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет один выдвижной ящик и одну полку,

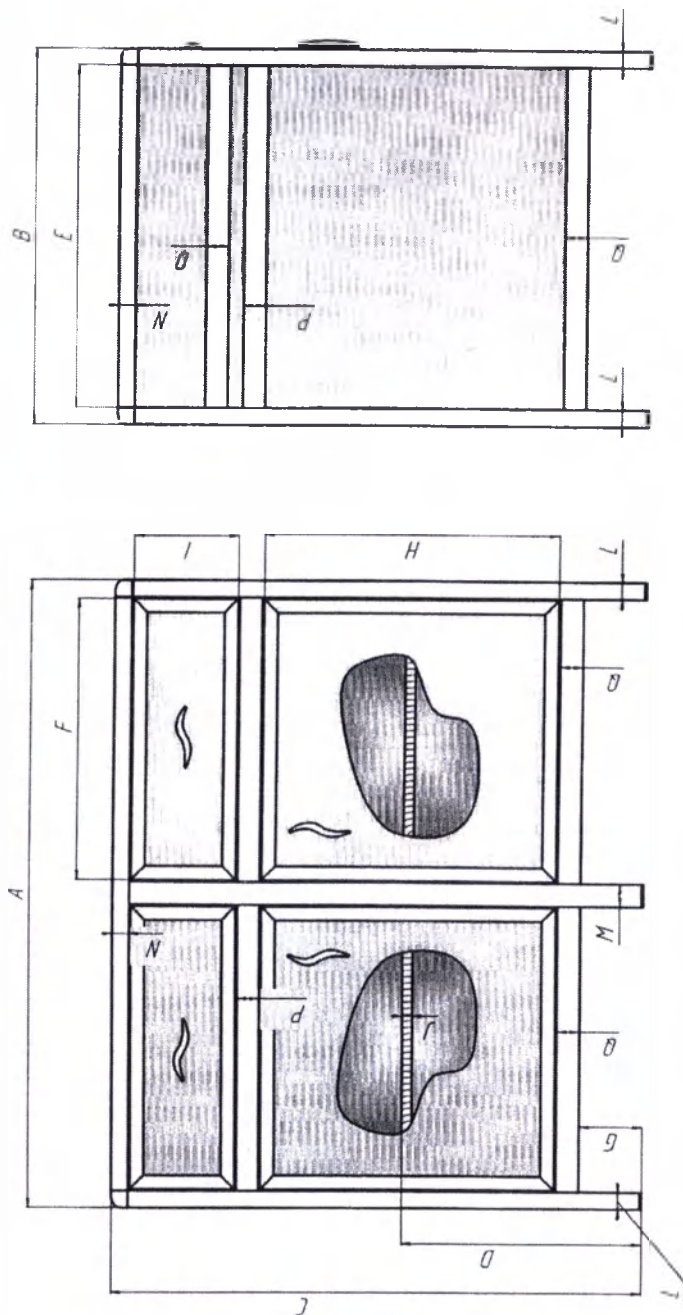

отделение закрыто одной дверью.

Стол-тумба медицинский для клинко-диагностических лабораторий
СТ-ТС 02.04

Габаритные размеры	СТ-ТС 02.04
A, мм (±4)	1500
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	947
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	453
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	681
I, мм (±4)	487
J, мм (±4)	16
K, мм (±4)	168
L, мм (±4)	27
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	27
O, мм (±4)	36
P, мм (±4)	36
Q, мм (±4)	36
R, мм (±4)	36

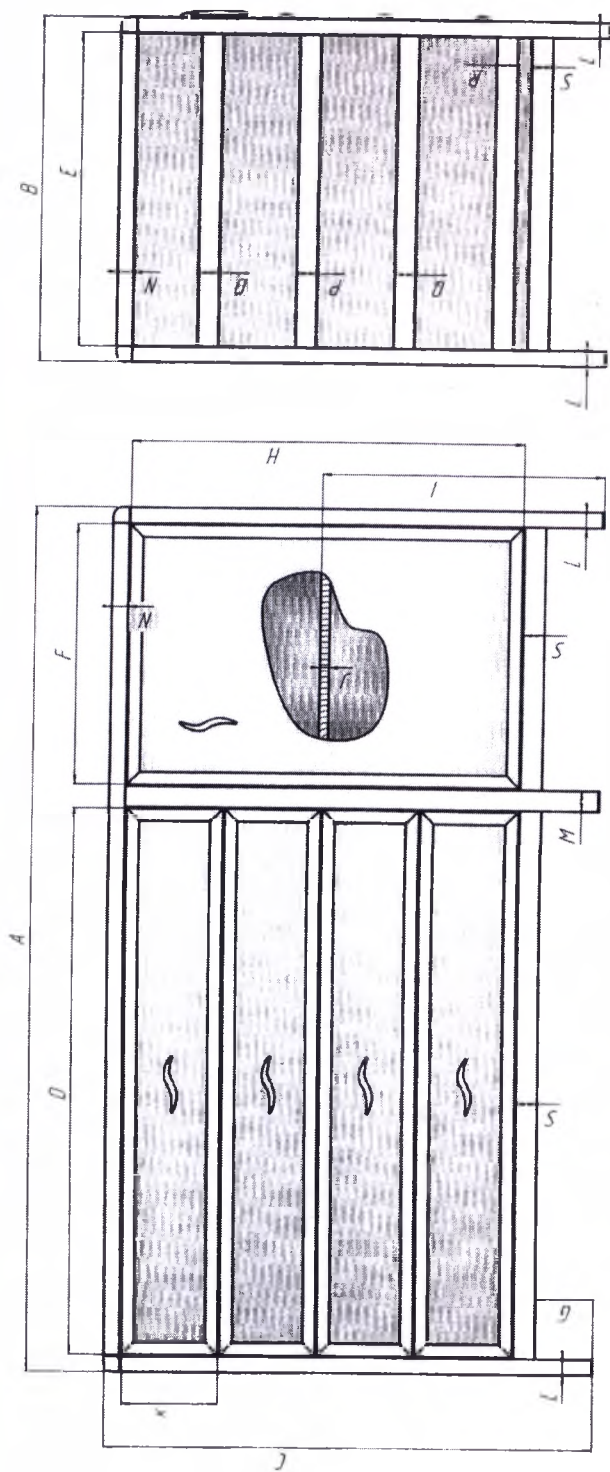

S, мм (±4)

36

Масса: 61 кг (±3)



Стол-тумба медицинский комплектуется одним отделением с выдвигаемыми ящиками в количестве четырех штук и одним отделением с одной полкой закрытым одной дверью.

Стол-тумба медицинский для клинко-диагностических лабораторий
СТ-ТС 02.05

Габаритные размеры СТ-ТС 02.05

A, мм (±4)	1500
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	947
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	453
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	168
I, мм (±4)	27
J, мм (±4)	36
K, мм (±4)	27
L, мм (±4)	36
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	36
O, мм (±4)	36
P, мм (±4)	36



Масса: 66 кг (±3)

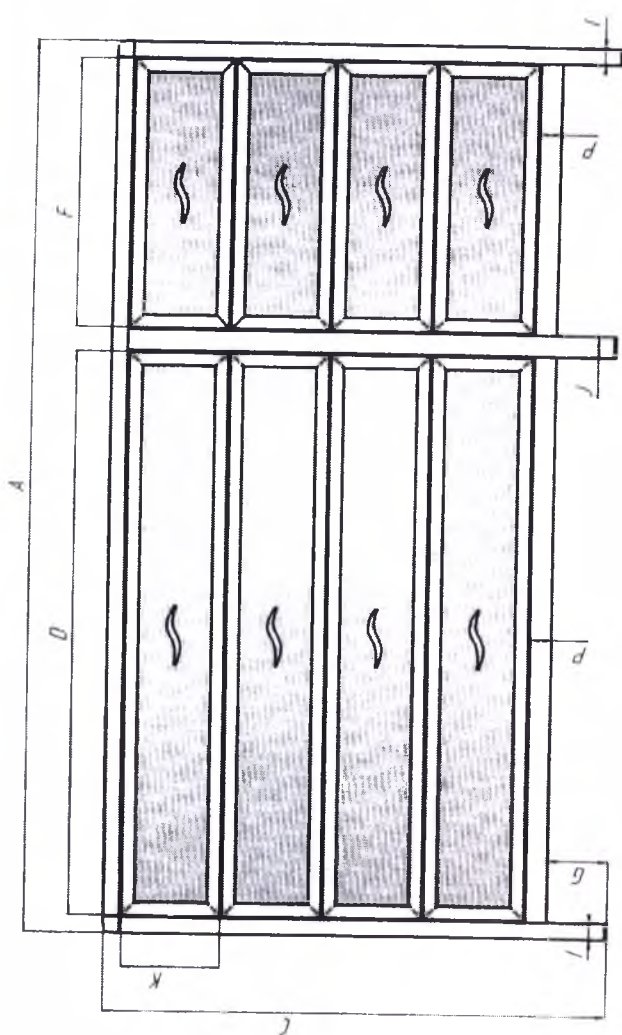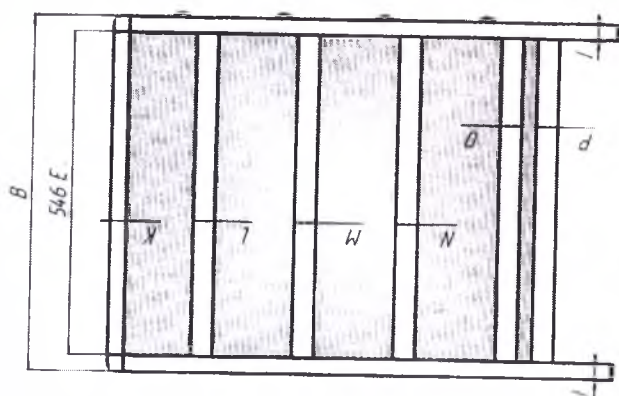

Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет выдвижные ящики в количестве четырех штук.

Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
СТ-ТС 03.00

Габаритные размеры	СТ-ТС 03.00
A, мм (±4)	1500
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	487
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	453
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	681
I, мм (±4)	16
J, мм (±4)	27
K, мм (±4)	36
L, мм (±4)	27

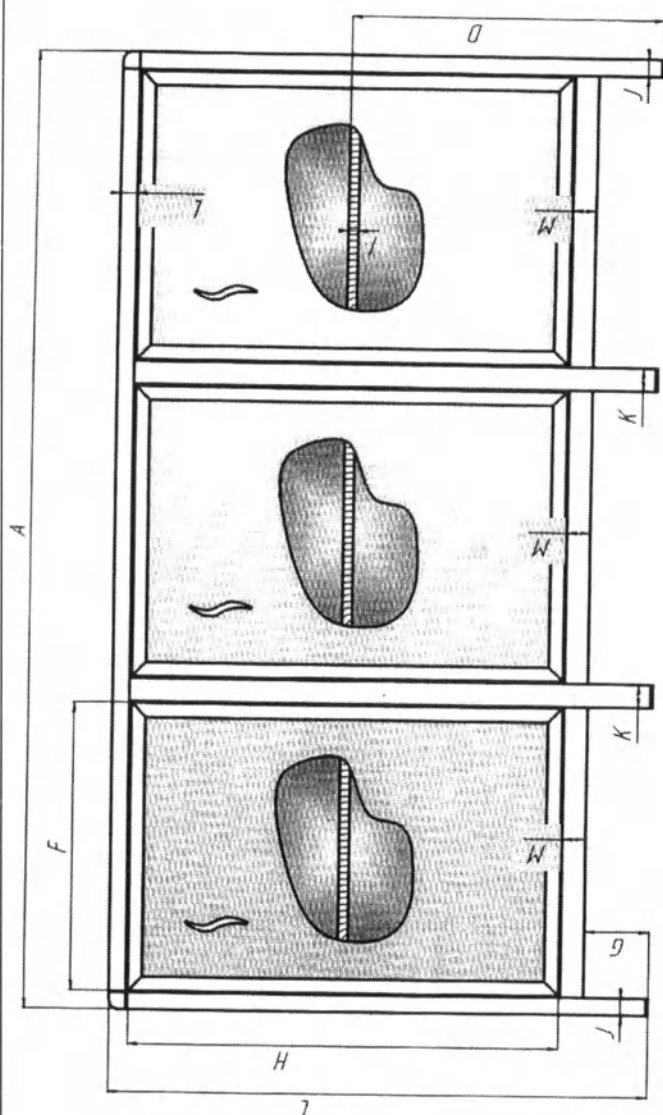
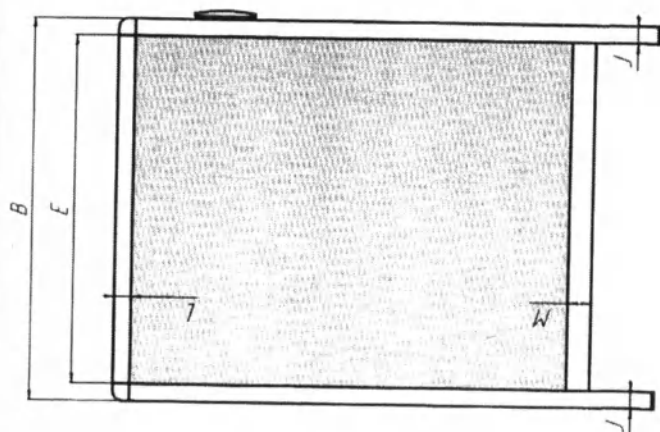


М, мм (± 4)

36

Масса: 58 кг (± 3)

Стол-тумба медицинский комплектуется тремя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью.

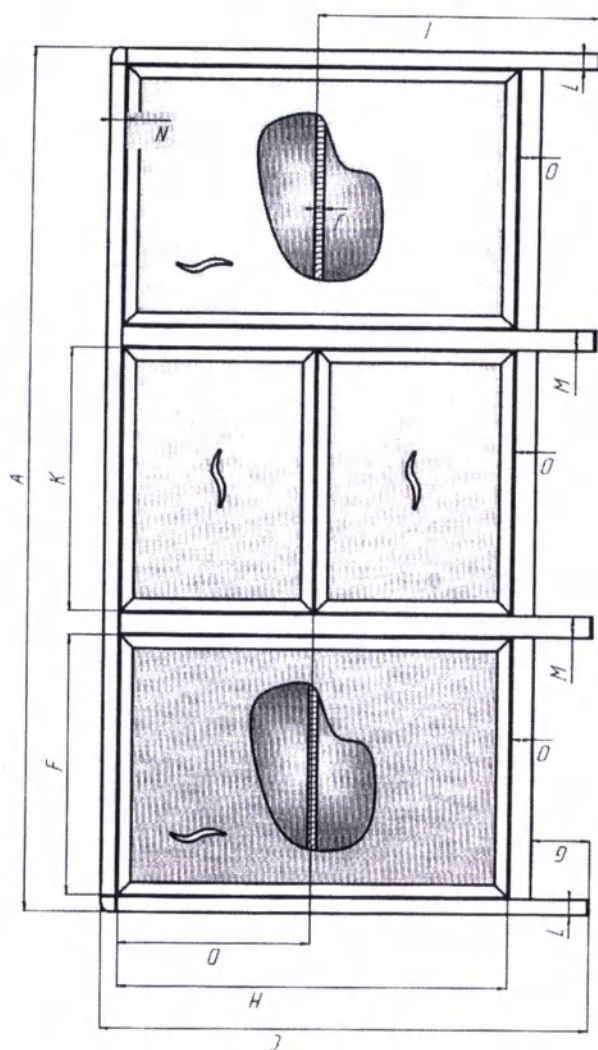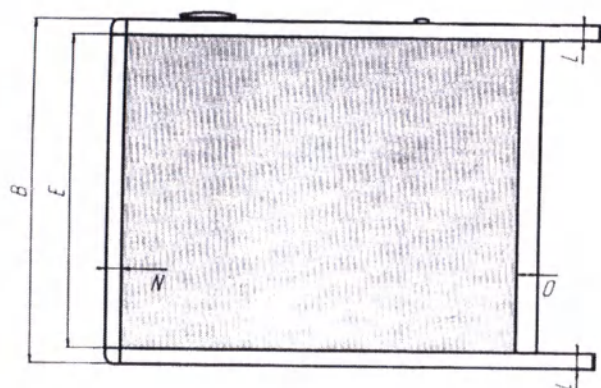


B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	339
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	453
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	681
I, мм (±4)	487
J, мм (±4)	16
K, мм (±4)	453
L, мм (±4)	27
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	27
O, мм (±4)	36

Масса: 60 кг (±3)

Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью и одним отделением с двумя выдвижными ящиками.

Габаритные размеры	СТ-ТС 03.02
A, мм (±4)	1500
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	168
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	453
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	681
I, мм (±4)	487
J, мм (±4)	16
K, мм (±4)	453

Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
СТ-ТС 03.02

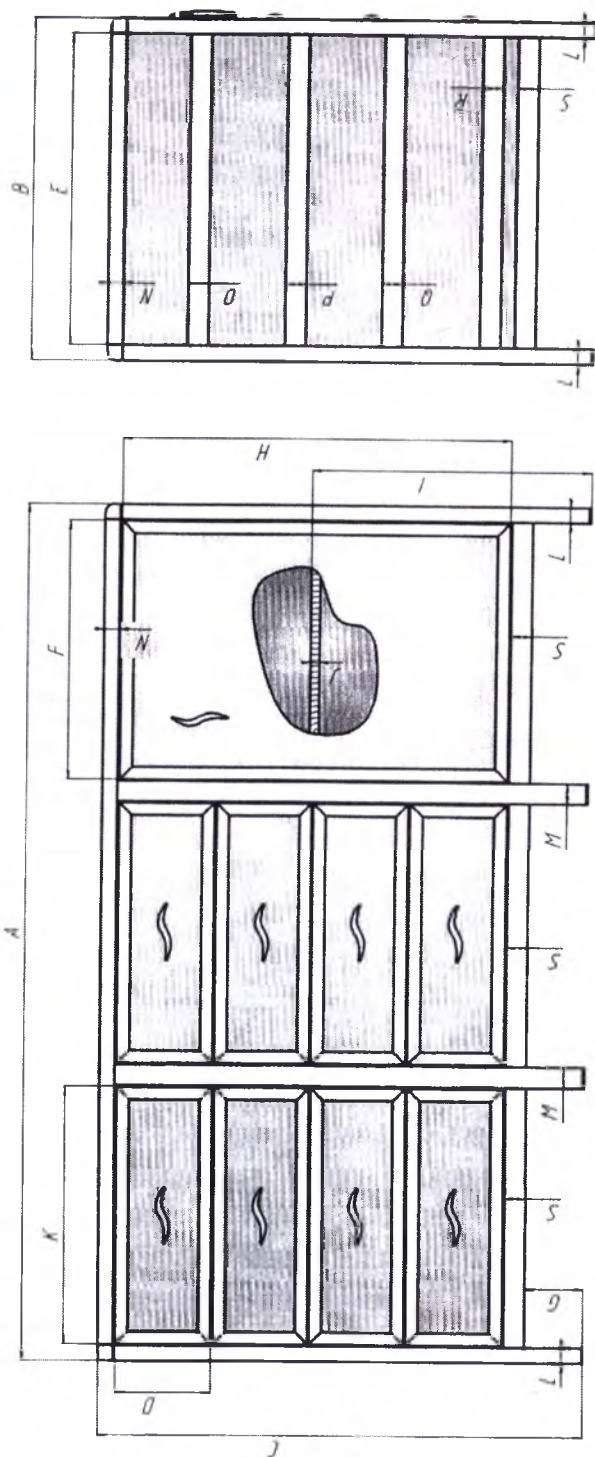


L, мм (±4)	27
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	27
O, мм (±4)	36
P, мм (±4)	36
Q, мм (±4)	36
R, мм (±4)	36
S, мм (±4)	36

Масса: 73 кг (±3)

Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет по четыре выдвижных ящика и одним отделением с одной полкой, закрытым одной дверью.

Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
СТ-ТС 03.03

Габаритные размеры	СТ-ТС 03.03
A, мм (±4)	1500
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	168
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	453
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	681
I, мм (±4)	487
J, мм (±4)	16
K, мм (±4)	453
L, мм (±4)	27
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	27
O, мм (±4)	36


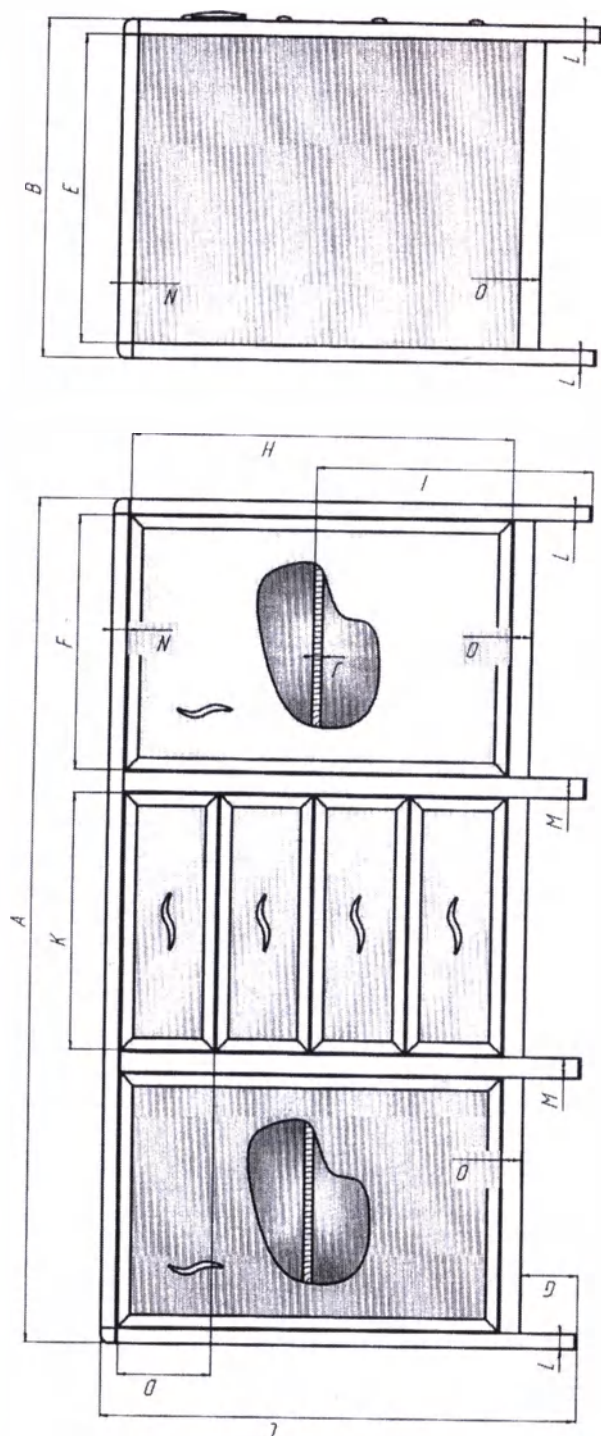


Масса: 66 кг (± 3)
 Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью и одним отделением с выдвижными ящиками в количестве четырех штук.

Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
 СТ-ТС 04.00

Габаритные размеры	СТ-ТС04.00
A, мм (± 4)	1500
B, мм (± 4)	600
C, мм (± 4)	850
D, мм (± 4)	339
E, мм (± 4)	546
F, мм (± 4)	453
G, мм (± 4)	100
H, мм (± 4)	168
I, мм (± 4)	27
J, мм (± 4)	36
K, мм (± 4)	27
L, мм (± 4)	36
M, мм (± 4)	36
N, мм (± 4)	36
O, мм (± 4)	36

Масса: 71 кг (± 3)
 Стол-тумба медицинский комплектуется

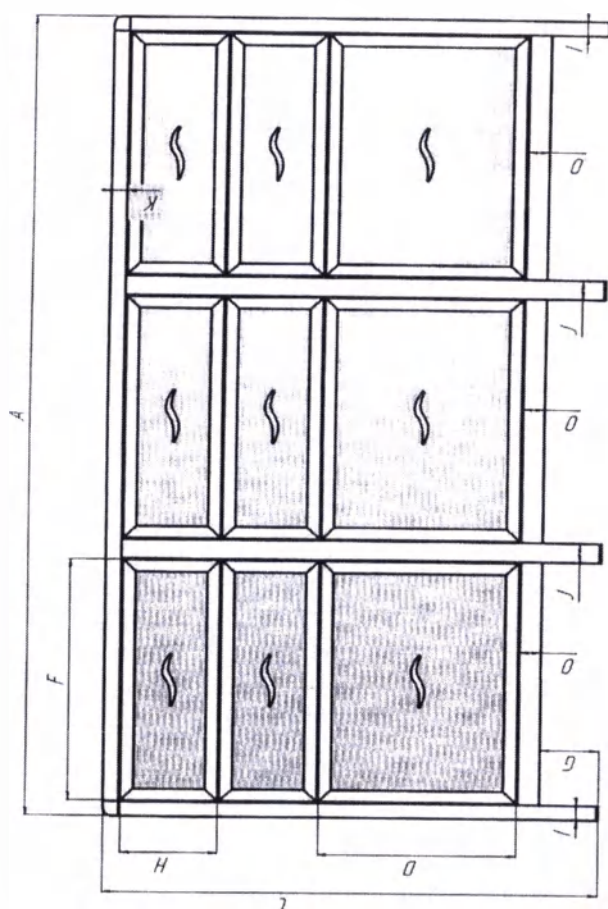
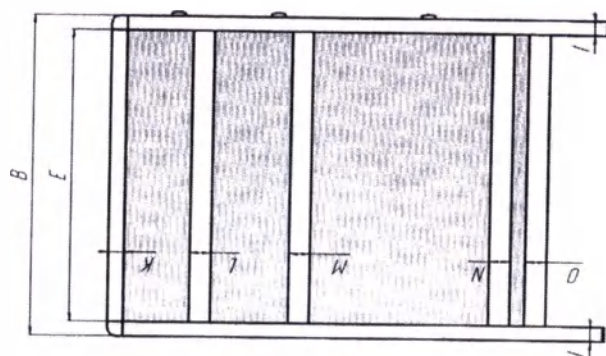


три отделениями, каждое из которых имеет по три выдвижных ящика.

Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
СТ-ТС 04.01


Габаритные размеры	СТ-ТС 04.01
A, мм (±4)	1500
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	168
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	453
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	27
I, мм (±4)	36
J, мм (±4)	27
K, мм (±4)	36
L, мм (±4)	36
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	36
O, мм (±4)	36

Масса: 81 кг (±3)
Стол-тумба медицинский комплектуется
три отделениями, каждое из которых

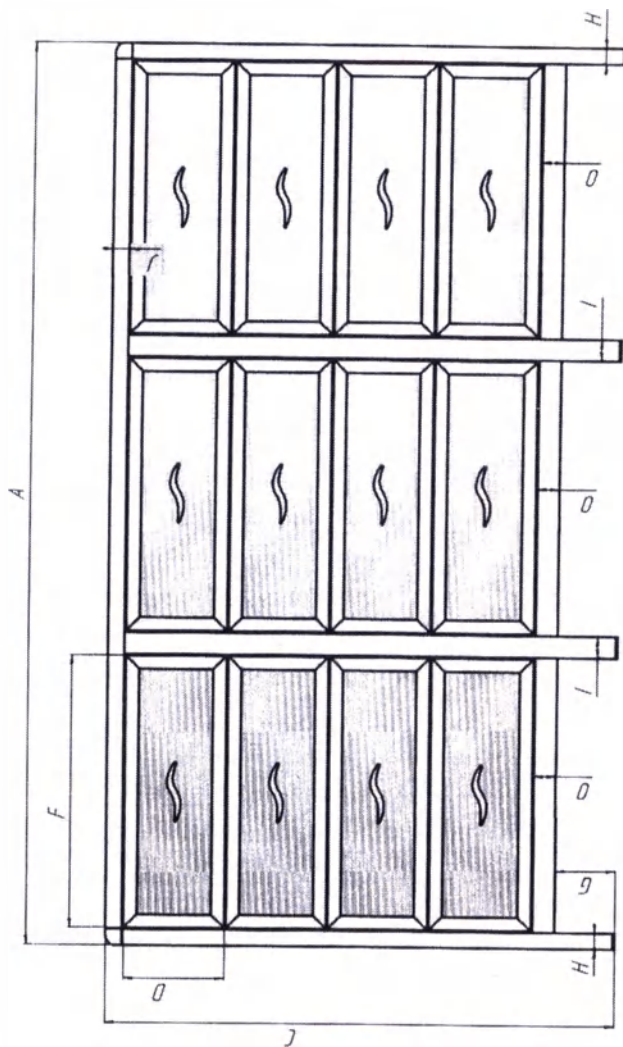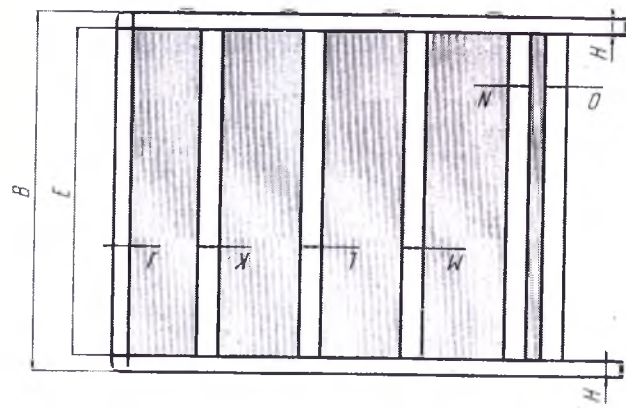

имеет по четыре выдвижных ящика.

Дверь и ящик (в разрезе)

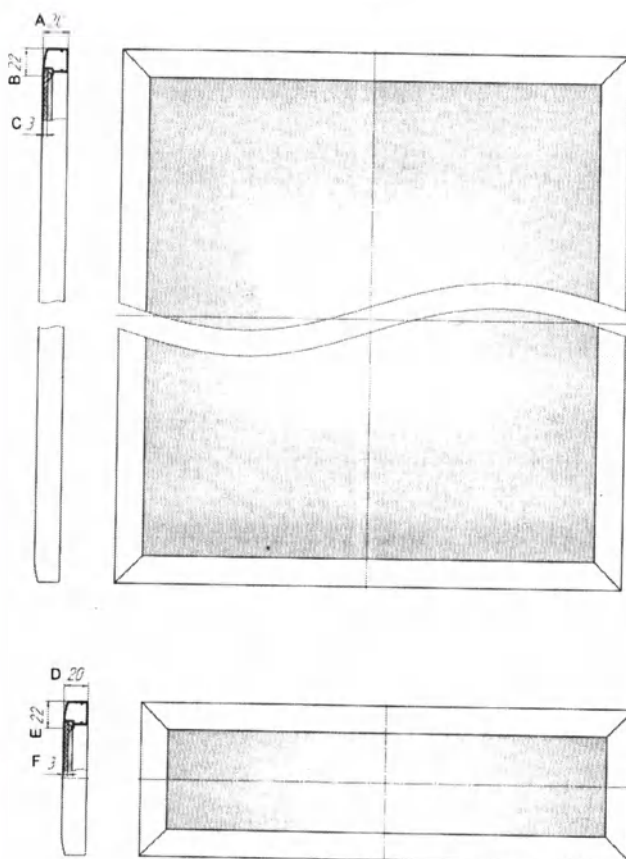

Габаритный размер	Значение габаритного параметра
A	20 мм(±4мм)
B	22 мм(±4мм)
C	3 мм
D	20 мм(±4мм)
E	22 мм(±4мм)
F	3 мм

Максимальная допустимая нагрузка на столы - 30кг.
 Максимальная допустимая нагрузка на полки - 10кг.
 Максимальная допустимая нагрузка на ящики - 6кг.

Замки магнитные должны быть неподвижно и прочно закреплены на дверях столов (СТ-ТС 01.00; СТ-ТС 01.01; СТ-ТС 02.00; СТ-ТС 02.01; СТ-ТС 02.03; СТ-ТС 02.04; СТ-ТС 03.00; СТ-ТС 03.01; СТ-ТС 03.02; СТ-ТС 03.03) и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС XX.XX	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом использования стола-тумбы убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения.

После транспортирования продукции в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать её при комнатной температуре (+15⁰С до +25⁰С) не менее 2 часов.

Убедитесь, что комплект поставки соответствует заявленному в упаковочном

листе. В случае расхождений, пожалуйста, обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

Подготовка к эксплуатации изделия:

- распаковать изделие (поставляется в собранном виде);
- с помощью крестовой отвертки установить ручки на лицевую сторону фасада, если они предусмотрены;
- выполнить санитарную обработку изделия.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом и при эксплуатации, с периодичностью раз в год, заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене при необходимости поломанных или изношенных деталей.

Техническое обслуживание и ремонт осуществляется лицами из числа технического персонала с соблюдением правил техники безопасности.

Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации столов медицинских для клиничко-диагностических лабораторий, проводится в соответствии технических характеристик и комплектности паспорта и настоящего руководства по эксплуатации, при этом проверяется отсутствие изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. В пределах одного населенного пункта столы допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования – при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность столов от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, влажности – не более 75 %.

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха – не более 75%.

8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЕГО ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Очищение производить посредством влажной тряпки (салфетки) и любого универсального чистящего средства. Рабочие и фасадные поверхности изделия необходимо протирать салфеткой, смоченной в дезинфицирующие и моющие средства (1%-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода в комплексе с 1%-ным раствором моющих средств), салфетку предварительно отжать.

9. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления столов для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ

17.2.3.02, а также соблюдаться нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования столов не должно происходить разложения и выделения вредных веществ, а также должны выполняться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7 ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении столов (при наличии) следует проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

10. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие столов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации столов составляет 18 (восемнадцать) месяцев.

Средний срок службы - 7 лет со дня его продажи.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений столов, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Наименование	Артикул
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 00.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 00.01
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 01.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 01.01
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 01.02
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.01
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.02
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.03
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.04
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.05
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 03.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 03.01
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 03.02
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 03.03

	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 04.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 04.01

Соответствует ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Техстрой»,
603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10.
Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Место производства:

ООО «Техстрой», 606440, Россия, Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д.1.
Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на
(24 / двадцати четырех) листах

Директор ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.





ПАСПОРТ

Столы медицинские для клинико-диагностических лабораторий
по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

**Стол медицинский островной
для клинико-диагностических лабораторий
в вариантах исполнения**

	Наименование	Артикул
	Стол медицинский островной	СЛО-ТС 01.01
	Стол медицинский островной	СЛО-ТС 01.02
	Стол медицинский островной	СЛО-ТС 02.01
	Стол медицинский островной	СЛО-ТС 02.02

ООО «Техстрой»

г. Нижний Новгород

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения.

Потенциальным потребителем медицинского изделия является обученный медицинский персонал, по назначению и под наблюдением врача.

Показания к применению:

Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019:

- для работы несколькими медицинскими работниками с лабораторной посудой, реактивами и приборами, с целью экономии полезного пространства в любых лабораторных отделениях и лечебно-профилактических учреждениях


Противопоказания к применению отсутствуют.

Возможные побочные действия отсутствуют.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения

1	Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий СЛО-ТС 01.01	Габаритные размеры	СЛО-ТС 01.01-01	СЛО-ТС 01.01-02
		A, мм (±4)	1300	1500
		B, мм (±4)	1200	1200
		C, мм (±4)	1500	1500
		D, мм (±4)	650	650
		E, мм (±4)	600	600
		F, мм (±4)	850	850
		G, мм (±4)	100	100
		H, мм (±4)	1246	1446
		I, мм (±4)	300	300
		J, мм (±4)	123	123
		K, мм (±4)	295	295
		L, мм (±4)	298	298
		M, мм (±4)	1033	1233

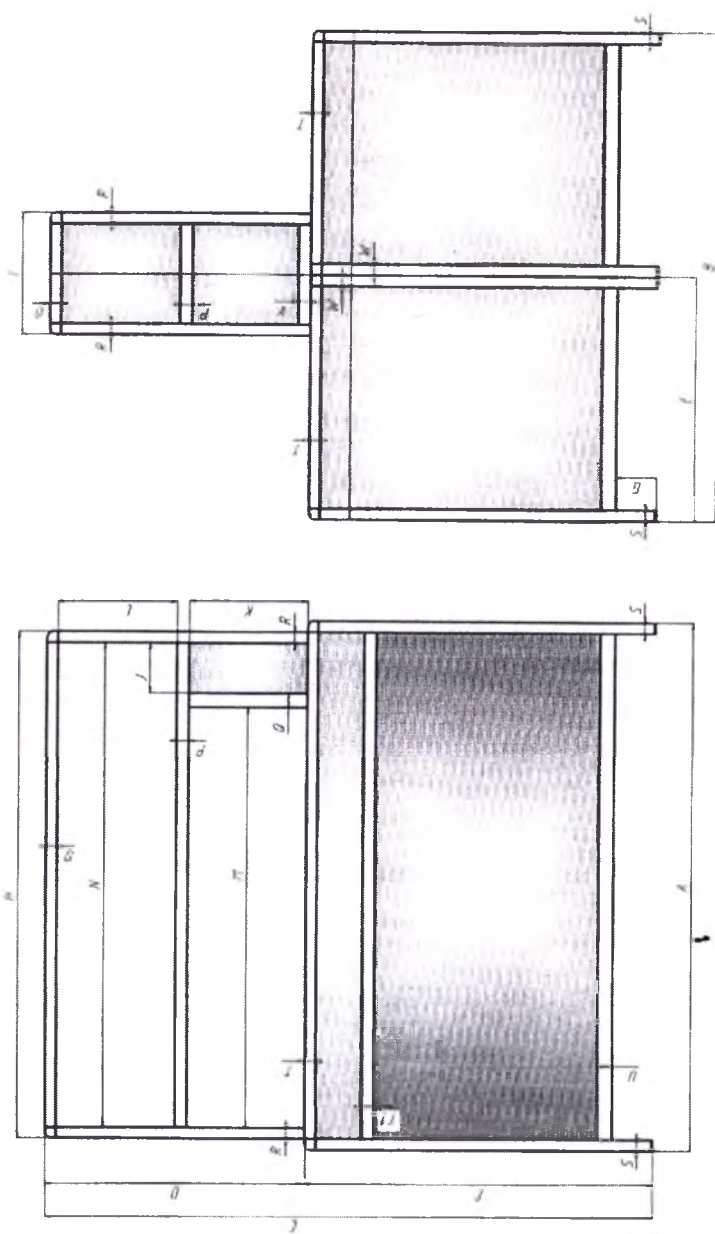



<i>N, мм (±4)</i>	1192	1392
<i>O, мм (±4)</i>	27	27
<i>P, мм (±4)</i>	30	30
<i>Q, мм (±4)</i>	36	36
<i>R, мм (±4)</i>	27	27
<i>S, мм (±4)</i>	27	27
<i>T, мм (±4)</i>	27	27
<i>Tl, мм (±4)</i>	30	30
<i>W, мм (±4)</i>	27	27
<i>U, мм (±4)</i>	36	36

Масса: 74 кг (±3)

Стол медицинский островной комплектуется надстройкой с двумя полками.



Стол медицинский островной для клиническо-
диагностических лабораторий

СЛО-ТС 01.02

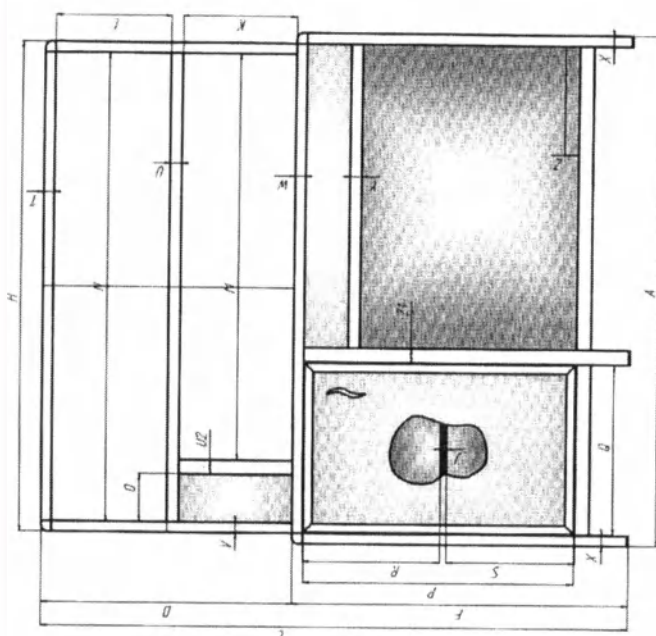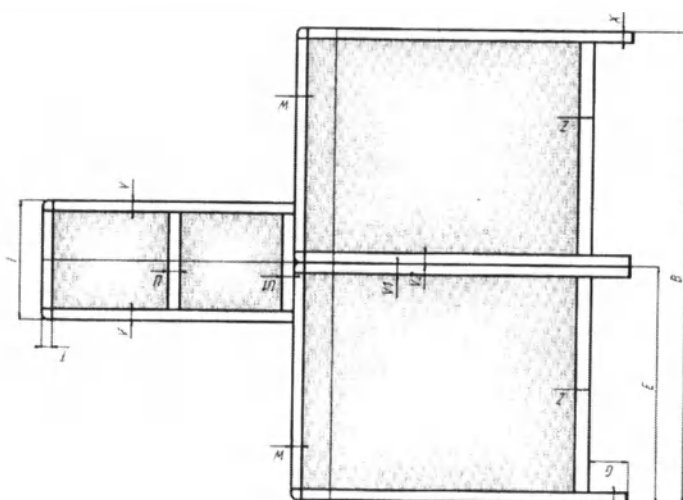


Габаритные размеры	СЛО-ТС 01.02-01	СЛО-ТС 01.02-02
A, мм (± 4)	1300	1500
B, мм (± 4)	1200	1200
C, мм (± 4)	1500	1500
D, мм (± 4)	650	650
E, мм (± 4)	600	600
F, мм (± 4)	850	850
G, мм (± 4)	100	100
H, мм (± 4)	1246	1446
I, мм (± 4)	300	300
J, мм (± 4)	16	16
K, мм (± 4)	295	295
L, мм (± 4)	298	298
M, мм (± 4)	1033	1233
N, мм (± 4)	1192	1392
O, мм (± 4)	123	123
P, мм (± 4)	682	682
Q, мм (± 4)	432	432
R, мм (± 4)	350	350
S, мм (± 4)	321	321
T, мм (± 4)	27	27
U, мм (± 4)	30	30
UI, мм (± 4)	30	30

		<i>U2, мм (±4)</i>	36	36
		<i>V, мм (±4)</i>	27	27
		<i>V1, мм (±4)</i>	27	27
		<i>V2, мм (±4)</i>	27	27
		<i>W, мм (±4)</i>	27	27
		<i>X, мм (±4)</i>	27	27
		<i>Y, мм (±4)</i>	30	30
		<i>Z, мм (±4)</i>	36	36
		<i>Z1, мм (±4)</i>	36	36
		Масса: 78 кг (±3) Стол медицинский островной комплектуется надстройкой с двумя полками, одной тумбой с открывающейся дверкой и одной полкой внутри.		
3	Стол медицинский островной для клиничко-диагностических лабораторий СЛО-ТС 02.01	<i>Габаритные размеры</i>	<i>СЛО-ТС 02.01-01</i>	<i>СЛО-ТС 02.01-02</i>
		<i>A, мм (±4)</i>	1300	1500
		<i>B, мм (±4)</i>	1200	1200
		<i>C, мм (±4)</i>	1500	1500
		<i>D, мм (±4)</i>	650	650
		<i>E, мм (±4)</i>	600	600

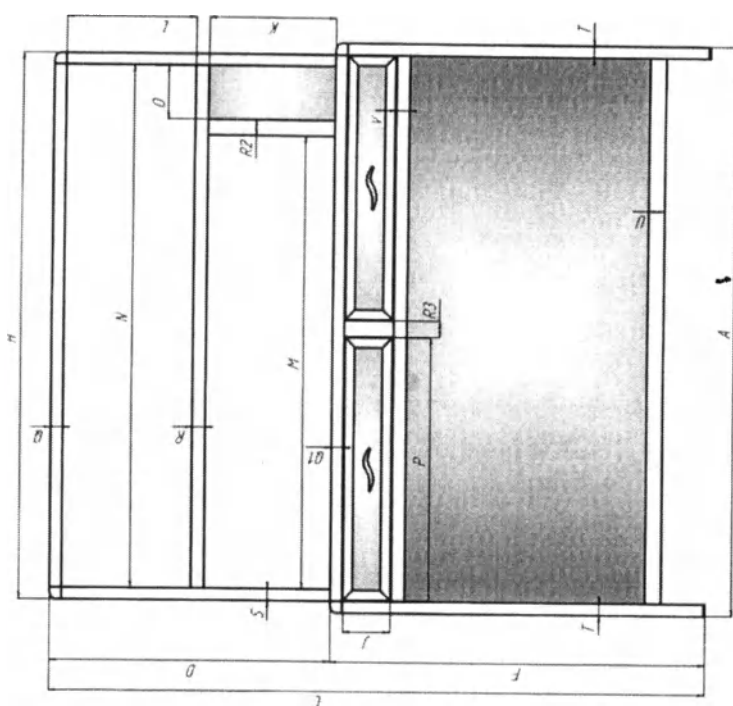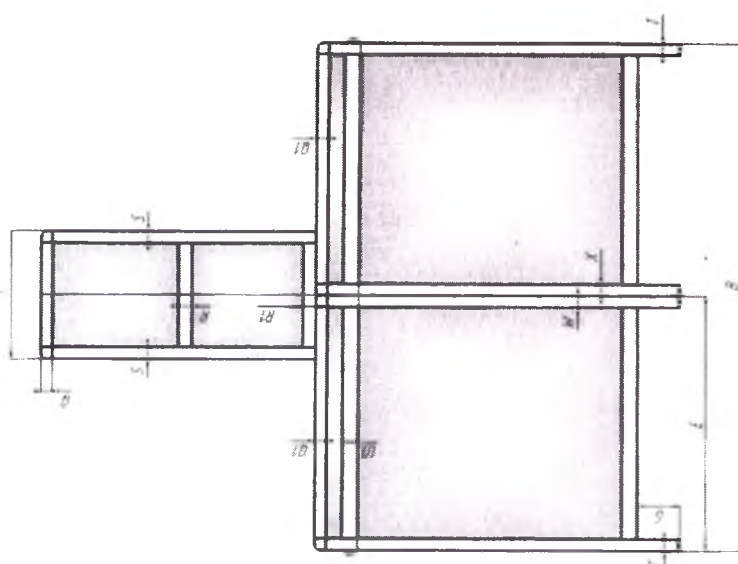

$F, \text{ мм } (\pm 4)$	850	850
$G, \text{ мм } (\pm 4)$	100	100
$H, \text{ мм } (\pm 4)$	1246	1446
$I, \text{ мм } (\pm 4)$	300	300
$J, \text{ мм } (\pm 4)$	108	108
$K, \text{ мм } (\pm 4)$	295	295
$L, \text{ мм } (\pm 4)$	298	298
$M, \text{ мм } (\pm 4)$	1033	1233
$N, \text{ мм } (\pm 4)$	1192	1392
$O, \text{ мм } (\pm 4)$	123	123
$P, \text{ мм } (\pm 4)$	600	700
$Q, \text{ мм } (\pm 4)$	27	27
$Q1, \text{ мм } (\pm 4)$	27	27
$R, \text{ мм } (\pm 4)$	30	30
$R1, \text{ мм } (\pm 4)$	30	30
$R2, \text{ мм } (\pm 4)$	36	36
$R3, \text{ мм } (\pm 4)$	36	36
$S, \text{ мм } (\pm 4)$	27	27
$T, \text{ мм } (\pm 4)$	27	27
$U, \text{ мм } (\pm 4)$	36	36
$U1, \text{ мм } (\pm 4)$	36	36
$V, \text{ мм } (\pm 4)$	30	30
$W, \text{ мм } (\pm 4)$	27	27

		<i>X, мм (±4)</i>	27	27
		Масса: 75 кг (±3) Стол медицинский островной комплектуется надстройкой с двумя полками, двумя выдвижными ящиками, расположенными под столешницей.		
4	Стол медицинский островной для клиничко-диагностических лабораторий СЛО-ТС 02.02	<i>Габаритные размеры</i>	СЛО-ТС 02.02-01	СЛО-ТС 02.02-02
		<i>A, мм (±4)</i>	1300	1500
		<i>B, мм (±4)</i>	1200	1200
		<i>C, мм (±4)</i>	1500	1500
		<i>D, мм (±4)</i>	650	650
		<i>E, мм (±4)</i>	600	600
		<i>F, мм (±4)</i>	850	850
		<i>G, мм (±4)</i>	100	100
		<i>H, мм (±4)</i>	1246	1446
		<i>I, мм (±4)</i>	300	300
		<i>J, мм (±4)</i>	138	138
		<i>K, мм (±4)</i>	295	295
		<i>L, мм (±4)</i>	298	298
		<i>M, мм (±4)</i>	1033	1233
		<i>N, мм (±4)</i>	1192	1392
		<i>O, мм (±4)</i>	123	123
		<i>P, мм (±4)</i>	168	168
		<i>Q, мм (±4)</i>	432	432

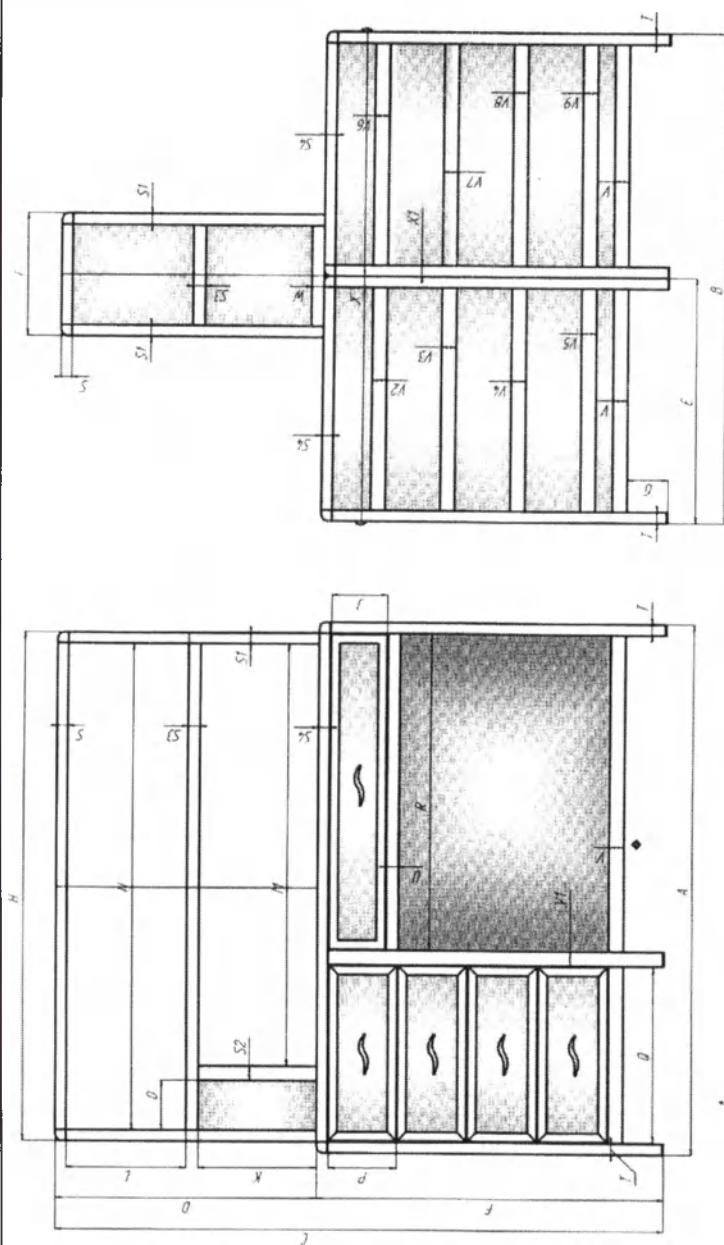

R, мм (±4)	768	968
S, мм (±4)	27	27
S1, мм (±4)	27	27
S2, мм (±4)	36	36
S3, мм (±4)	30	30
S4, мм (±4)	27	27
T, мм (±4)	27	27
U, мм (±4)	30	30
V, мм (±4)	36	36
V1, мм (±4)	36	36
V2, мм (±4)	36	36
V3, мм (±4)	36	36
V4, мм (±4)	36	36
V5, мм (±4)	36	36
V6, мм (±4)	36	36
V7, мм (±4)	36	36
V8, мм (±4)	36	36
V9, мм (±4)	36	36
W, мм (±4)	30	30

	<i>X, мм (±4)</i>	27	27
	<i>X1, мм (±4)</i>	27	27

Масса: 76 кг (±3)

Стол медицинский островной комплектуется надстройкой с двумя полками, одним выдвижным ящиком, располагающимся под столешницей и одной тумбой с выдвижными ящиками в количестве четырех штук.

Дверь и ящик (в разрезе)

Technical drawing showing the cross-section of a door edge. Dimension A is the total width, B is the thickness of the door leaf, and C is the thickness of the door frame.

Technical drawing showing the main cross-section of a door. The door is divided into two panels by a vertical line. Dimension A is the total width, B is the thickness of the door leaf, and C is the thickness of the door frame.

Technical drawing showing the cross-section of a drawer edge. Dimension D is the total width, E is the thickness of the drawer front, and F is the thickness of the drawer frame.

Technical drawing showing the main cross-section of a drawer. The drawer is divided into two panels by a vertical line. Dimension D is the total width, E is the thickness of the drawer front, and F is the thickness of the drawer frame.

Габаритный размер	Значение габаритного параметра
A	20 мм (+4мм)
B	22 мм (+4мм)
C	3 мм
D	20 мм (+4мм)
E	22 мм (+4мм)
F	3 мм

Максимальная допустимая нагрузка на столы - 30кг.

Максимальная допустимая нагрузка на полки - 10кг.

Максимальная допустимая нагрузка на ящики - 6кг.

Замки магнитные неподвижно и прочно закреплены на дверях столов (СЛО-ТС 01.02-01; СЛО-ТС 01.02-02) и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запираение.

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Стол лабораторный островной для клинико-диагностических лабораторий СЛО-ТС XX.XX, модель: СЛО-ТС XX.XX-XX	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

4.ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие столов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации столов составляет 18 (восемнадцать) месяцев.

Средний срок службы - 7 лет со дня его продажи.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений столов, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).

5.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. В пределах одного населенного пункта столы допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования – при температуре от -50 °С до +50 °С, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность столов от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50 °С до +40 °С, влажности – не более 75 %.

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от +10 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха – не более 75%.

6.УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления столов для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02, а также соблюдаться нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования столов не должно происходить разложения и выделения вредных веществ, а также должны выполняться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7 ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении столов (при наличии) следует проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Наименование	Артикул
	Стол медицинский островной	СЛО-ТС 01.01
	Стол медицинский островной	СЛО-ТС 01.02
	Стол медицинский островной	СЛО-ТС 02.01
	Стол медицинский островной	СЛО-ТС 02.02

Соответствует ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

Предприятие-изготовитель: ООО «Техстрой»

Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.

Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,

Стеклозаводское ш., д.1.

Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский островной
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский островной
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

Предприятие-изготовитель: **ООО «Техстрой»**
Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.
Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское шоссе, д.1.
Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12
E-mail: tehstroi-nn@tehstroi-nn.ru

www.tehstroi-nn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Стол медицинский островной
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 4
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Стол медицинский островной
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

Предприятие-изготовитель: **ООО «Техстрой»**

Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.

Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское ш., д.1.

Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на
(14 / четырнадцать) листах

Директор ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.





ПАСПОРТ

Столы медицинские для клинико-диагностических лабораторий
по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

**Стол медицинский с мойкой
для клинико-диагностических лабораторий
в вариантах исполнения**

	Наименование	Артикул
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 00.01
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 01.01
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 02.01
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 02.02
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 02.03
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 03.01
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 03.03

ООО «Техстрой»

г. Нижний Новгород

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения.

Потенциальным потребителем медицинского изделия является обученный медицинский персонал, по назначению и под наблюдением врача.

1. Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019:

- для мытья лабораторной посуды после использования химических средств, удаления реагентов с поверхности, а также для обязательного мытья рук в любых лабораторных отделениях и лечебно-профилактических учреждениях

Противопоказания к применению отсутствуют.




Возможные побочные действия отсутствуют.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Столы медицинские с мойкой для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

*Стол медицинский с мойкой для клинико-
диагностических лабораторий*



СЛМ-ТС 01.01

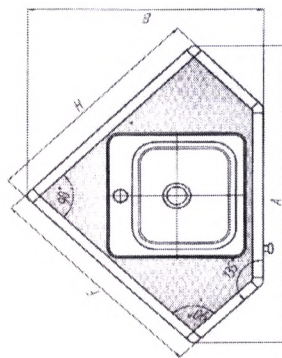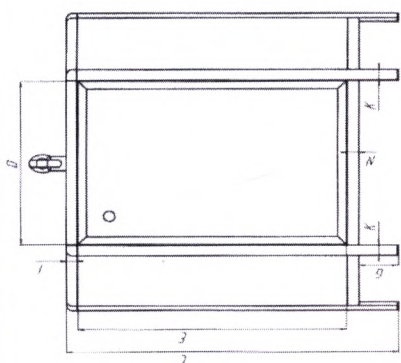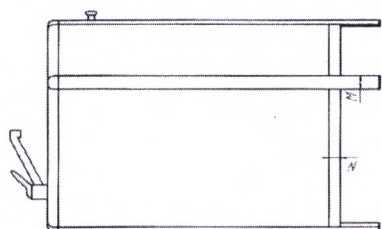

Габаритные размеры	СЛМ- ТС 01.01- 01	СЛМ- ТС 01.01-02
А, мм (± 4)	835	835
В, мм (± 4)	500	595
С, мм (± 4)	850	850
Д, мм (± 4)	457	457
Е, мм (± 4)	688	688
F, мм (± 4)	100	600
G, мм (± 4)	-	100
Н, мм (± 4)	-	600
К, мм (± 4)	29.56	29.56

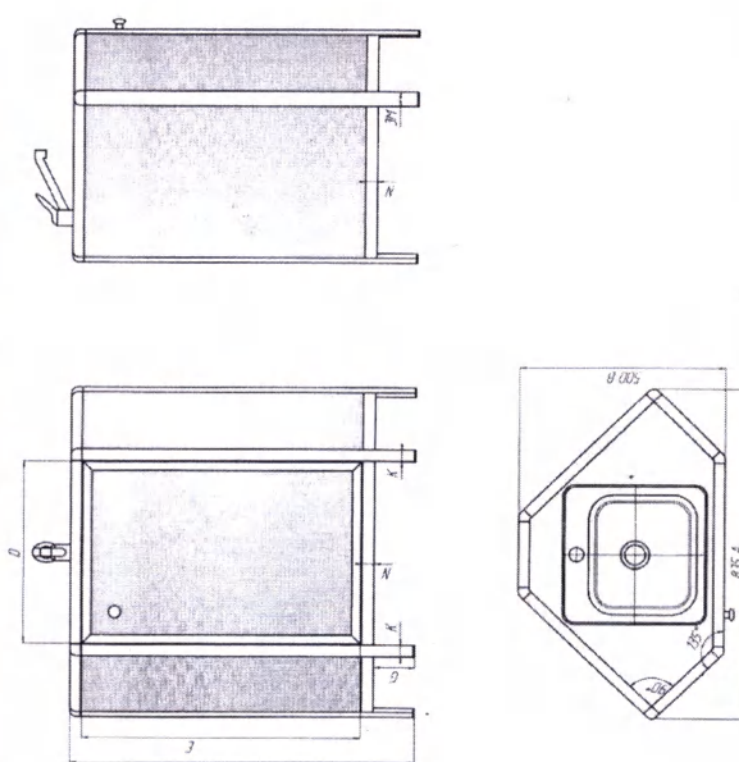	ЗМ, мм (±4)	38.18	38.18
	N, мм (±4)	30	30
Масса: 20 кг (±3) Стол медицинский с мойкой комплектуется одночашевой мойкой со смесителем, отделение закрыто дверью.			

2	Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 02.01	Габаритные размеры	СЛМ-ТС 02.01-01	СЛМ-ТС 02.01-02
		A, мм (±4)	845	855
		B, мм (±4)	555	655
		C, мм (±4)	850	850
		D, мм (±4)	791	801
		E, мм (±4)	501	601
		F, мм (±4)	391	396
		G, мм (±4)	100	100
		H, мм (±4)	688	688
		I, мм (±4)	27	27
		J, мм (±4)	27	27
		K, мм (±4)	30	30

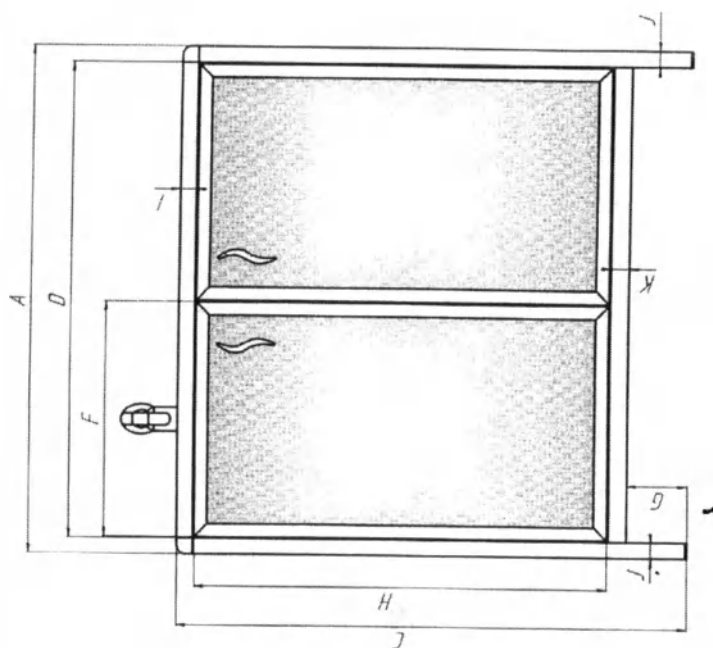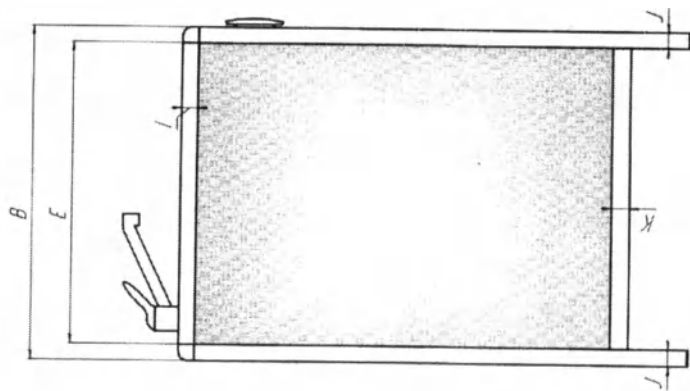



Масса: 22 кг (± 3)

Стол медицинский с мойкой комплектуется двухчашевой мойкой со смесителем или мойкой с сушилкой со смесителем, отделение закрыто двумя дверьми.

Стол медицинский с мойкой для клиничко-диагностических лабораторий

СЛМ-ТС 02.02

Габаритные размеры	СЛМ-ТС 02.02-01	СЛМ-ТС 02.02-02
А, мм (± 4)	845	855
В, мм (± 4)	555	655
С, мм (± 4)	850	850
Д, мм (± 4)	791	801
Е, мм (± 4)	501	601

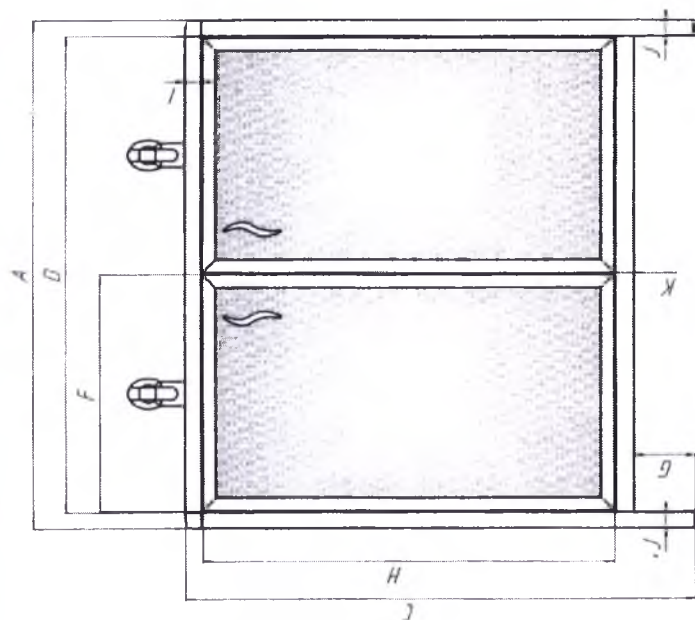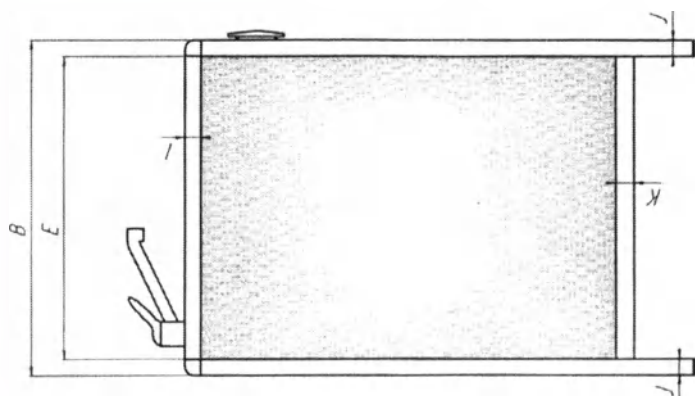

F, мм (±4)	391	396
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	688	688
I, мм (±4)	27	27
J, мм (±4)	27	27
K, мм (±4)	30	30


Масса: 23 кг (±3)

Стол медицинский с мойкой комплектуется двухчашевой мойкой с двумя смесителями, отделение закрыто двумя дверьми.

Стол медицинский с мойкой для клиничко-диагностических лабораторий

СЛМ-ТС 02.03

Габаритные размеры	СЛМ-ТС 02.03-01	СЛМ-ТС 02.03-02
A, мм (±4)	845	855
B, мм (±4)	555	655
C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	791	801
E, мм (±4)	501	601

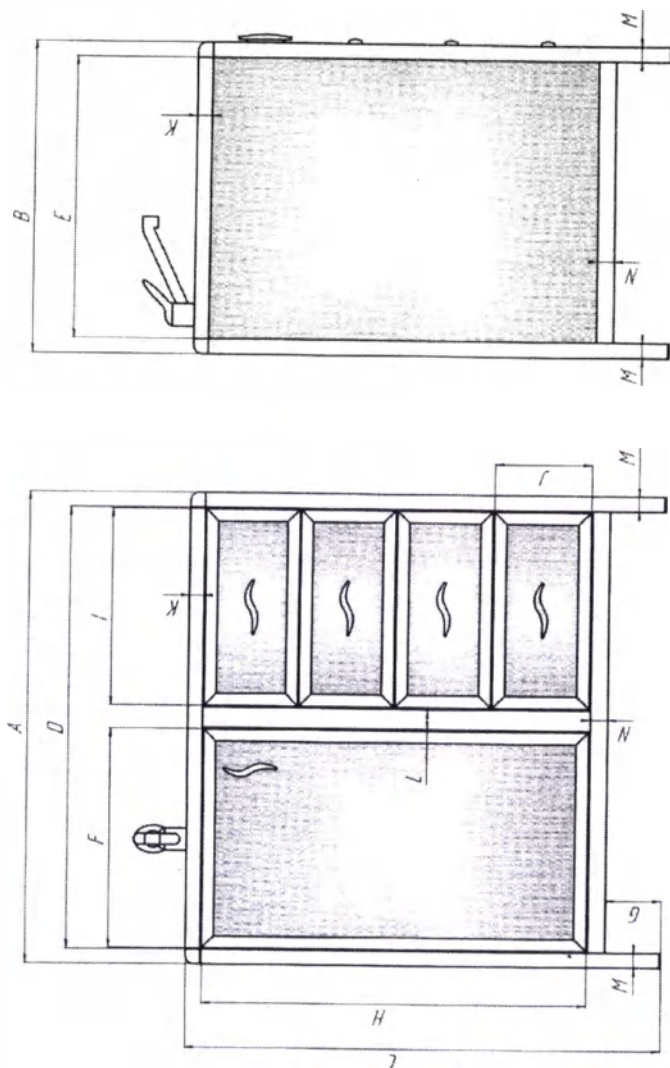

<i>F, мм (±4)</i>	391	396
<i>G, мм (±4)</i>	100	100
<i>H, мм (±4)</i>	688	688
<i>I, мм (±4)</i>	353	358
<i>J, мм (±4)</i>	170	170
<i>K, мм (±4)</i>	27	27
<i>L, мм (±4)</i>	36	36
<i>M, мм (±4)</i>	27	27
<i>N, мм (±4)</i>	30	30


Масса: 23 кг (±3)

Стол медицинский с мойкой комплектуется мойкой с сушилкой со смесителем, одно отделение закрыто дверью, второе отделение с выдвижными ящиками в количестве четырех штук.

Стол медицинский с мойкой для клиническо-диагностических лабораторий

СЛМ-ТС 03.01

Габаритны е размеры	СЛМ- ТС 03.01-01	СЛМ- ТС 03.01-02
<i>A, мм (±4)</i>	1200	1277
<i>B, мм (±4)</i>	655	555
<i>C, мм (±4)</i>	850	850
<i>D, мм (±4)</i>	1146	1223
<i>E, мм (±4)</i>	601	501
<i>F, мм (±4)</i>	365	391

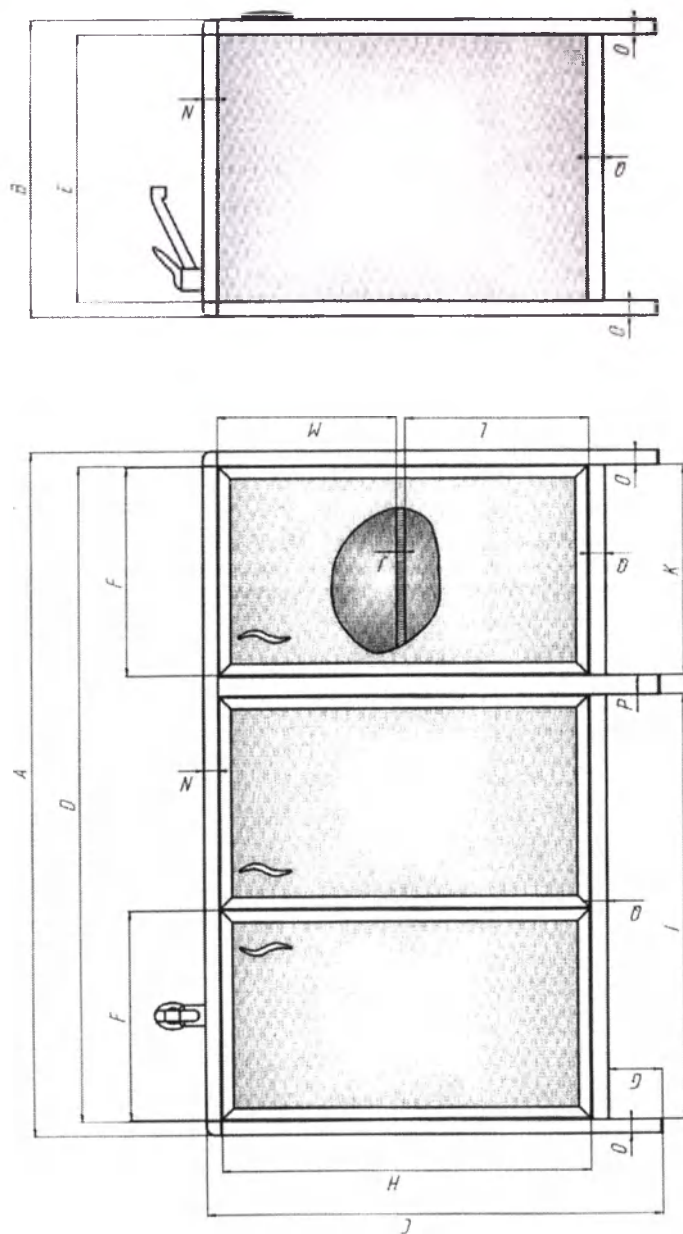

G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	688	688
I, мм (±4)	740	791
J, мм (±4)	16	16
K, мм (±4)	370	396
L, мм (±4)	338.5	338.5
M, мм (±4)	338.5	338.5
N, мм (±4)	27	27
O, мм (±4)	27	27
P, мм (±4)	36	36
Q, мм (±4)	30	30


Масса: 37 кг (±3)

Стол медицинский с мойкой комплектуется двухчашевой мойкой со смесителем или мойкой с сушилкой со смесителем, одно отделение без полок закрыто двумя дверьми, второе отделение с одной полкой закрыто одной дверью.

Стол медицинский с мойкой для клиничко-диагностических лабораторий

СЛМ-ТС 03.03

Габаритные размеры	СЛМ-ТС 03.03-01	СЛМ-ТС 03.03-02
A, мм (±4)	1200	1277
B, мм (±4)	655	555
C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	1146	1223

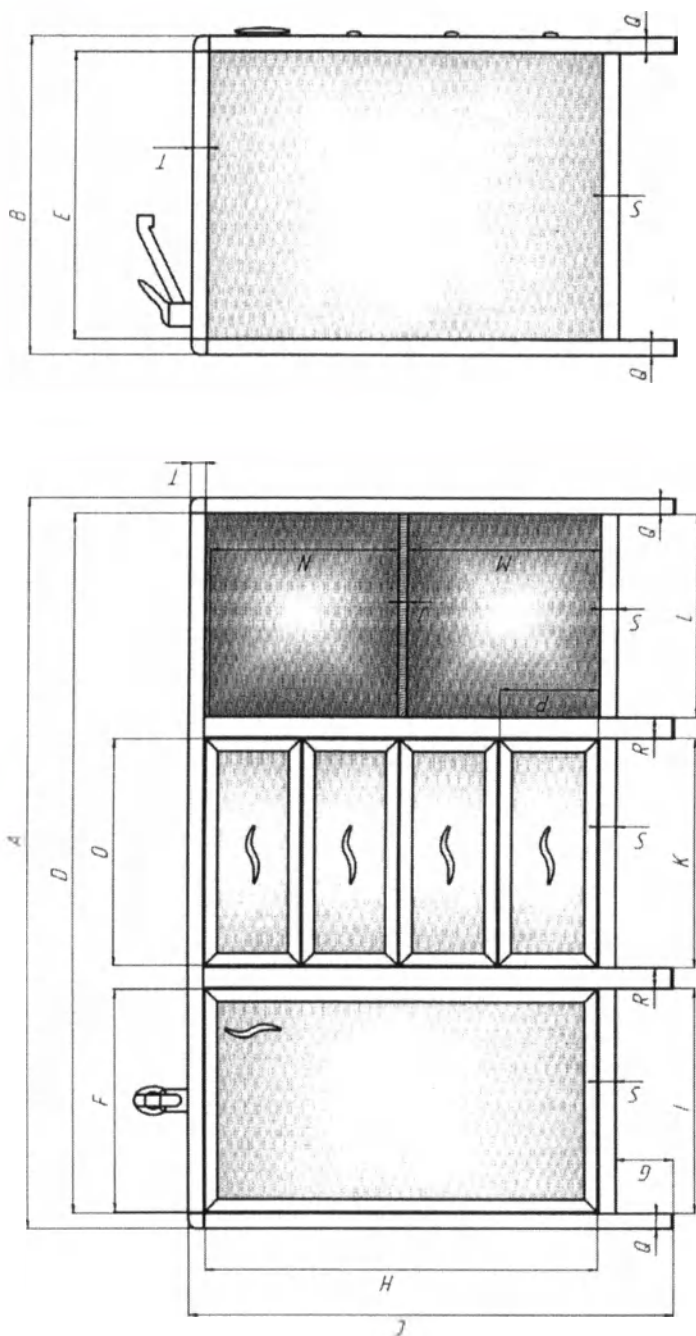


E, мм (±4)	601	501
F, мм (±4)	391	391
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	688	688
I, мм (±4)	396	396
J, мм (±4)	16	16
K, мм (±4)	396	396
L, мм (±4)	281	358
M, мм (±4)	338.5	338,5
N, мм (±4)	338.5	338,5
O, мм (±4)	391	391
P, мм (±4)	170	170
Q, мм (±4)	27	27
R, мм (±4)	36	36
S, мм (±4)	30	30
T, мм (±4)	27	27

Масса: 37 кг (±3)

Стол медицинский с мойкой комплектуется одночашевой мойкой со смесителем, одно отделение без полок закрыто одной дверью, второе отделение с выдвижными ящиками в количестве четырех штук, открытое отделение с одной полкой.

Дверь и ящик (в разрезе)

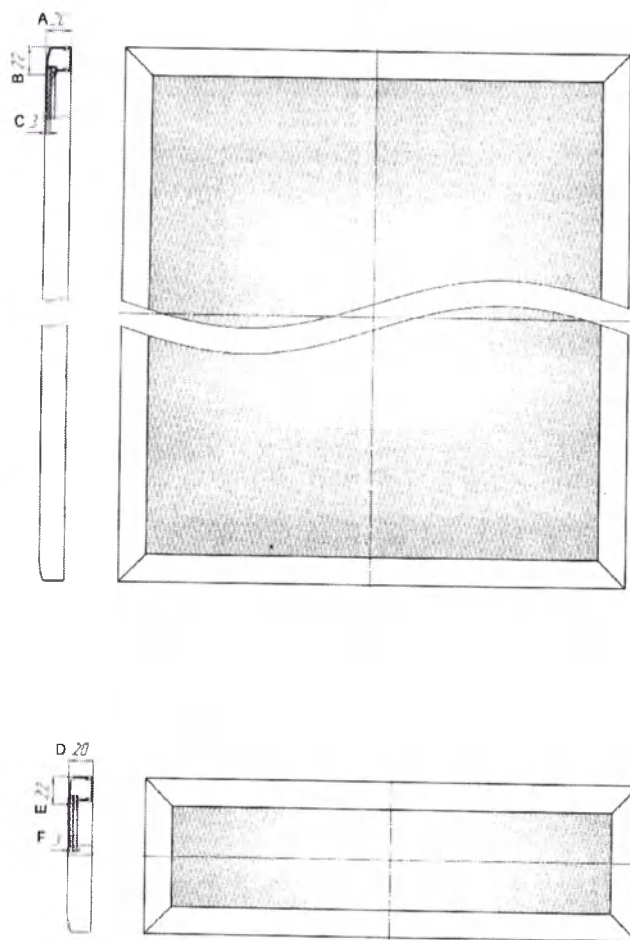

Габаритный размер	Значение габаритного параметра
A	20 мм (+4мм)
B	22 мм (+4мм)
C	3 мм
D	20 мм (+4мм)
E	22 мм (+4мм)
F	3 мм

Максимальная допустимая нагрузка на столы - 30кг.

Максимальная допустимая нагрузка на полки - 10кг.

Максимальная допустимая нагрузка на ящики - 6кг.

Присоединительные размеры мойки (для подключения и вывода используемой воды):

Для подключения: 40мм, 50мм, 72мм, 76мм;*

Для вывода используемой воды: 40мм, 50мм.*

*по согласованию между заказчиком и изготовителем

Замки магнитные должны быть неподвижно и прочно закреплены на дверях столов (СЛМ-ТС 00.01-01; СЛМ-ТС 00.01-02; СЛМ-ТС 01.01-01; СЛМ-ТС 01.01-02; СЛМ-ТС 02.01-01; СЛМ-ТС 02.01-02; СЛМ-ТС 02.02-01; СЛМ-ТС 02.02-02; СЛМ-ТС 02.03-01; СЛМ-ТС 02.03-02; СЛМ-ТС 03.01-01; СЛМ-ТС 03.01-02; СЛМ-ТС 03.03-01; СЛМ-ТС 03.03-02) и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Стол лабораторный с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС XX.XX, модель: СЛМ-ТС XX.XX-XX	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

4. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие столов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации столов составляет 18 (восемнадцать) месяцев.

Средний срок службы - 7 лет со дня его продажи.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений столов, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. В пределах одного населенного пункта столы допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования – при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность столов от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, влажности – не более 75 %.

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха – не более 75%.

6. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления столов для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02, а также соблюдаться нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования столов не должно происходить разложения и выделения вредных веществ, а также должны выполняться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7 ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении столов (при наличии) следует проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Наименование	Артикул
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 00.01
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 01.01
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 02.01
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 02.02
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 02.03
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 03.01
	Стол медицинский с мойкой	СЛМ-ТС 03.03

Соответствует ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

Предприятие-изготовитель: ООО «Техстрой»

Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.

Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское ш., д.1.

Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский с мойкой
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский с мойкой
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

Предприятие-изготовитель: **ООО «Техстрой»**
Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.
Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское шоссе, д.1.
Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12
E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский с мойкой _____
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 4
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский с мойкой _____
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

Предприятие-изготовитель: ООО «Техстрой»
Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.
Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское ш., д.1.
Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12
E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru
www.tehstroj-nn.ru

Прошито, пронумеровано и склеплено
печатью на
(13 тринадцати) листах

Директор ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.





ПАСПОРТ
Столы медицинские для клинико-диагностических лабораторий
по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

**Стол медицинский
для клинико-диагностических лабораторий
в вариантах исполнения**

	Наименование	Артикул
	Стол медицинский	СЛ-ТС 00.00
	Стол медицинский	СЛ-ТС 00.01
	Стол медицинский	СЛ-ТС 00.02
	Стол медицинский	СЛ-ТС 00.03
	Стол медицинский	СЛ-ТС 01.00
	Стол медицинский	СЛ-ТС 01.01
	Стол медицинский	СЛ-ТС 01.02
	Стол медицинский	СЛ-ТС 01.03
	Стол медицинский	СЛ-ТС 02.00
	Стол медицинский	СЛ-ТС 02.01
	Стол медицинский	СЛ-ТС 02.03
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.01
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.02
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.03
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.04
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.05

ООО «Техстрой»

г. Нижний Новгород

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения.

Потенциальным потребителем медицинского изделия является обученный медицинский персонал, по назначению и под наблюдением врача.

Показания к применению:

1. Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019:

- для работы с лабораторной посудой, реактивами и приборами в любых лабораторных отделениях и лечебно-профилактических учреждениях



Противопоказания к применению отсутствуют.

Возможные побочные действия отсутствуют.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения

I	Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СЛ-ТС 00.00	Габаритные размеры	СЛ-ТС 00.00- 01	СЛ-ТС 00.00- 02
		А, мм (±4)	1000	1200
		В, мм (±4)	600	600
		С, мм (±4)	850	850
		Д, мм (±4)	946	1146
		Е, мм (±4)	546	546
		F, мм (±4)	823	823
		G, мм (±4)	100	100
		Н, мм (±4)	27	27
		I, мм (±4)	27	27
		J, мм (±4)	36	36
		K, мм (±4)	687	687
		Масса: 23 кг (±3) Стол медицинский с открытым отделением.		

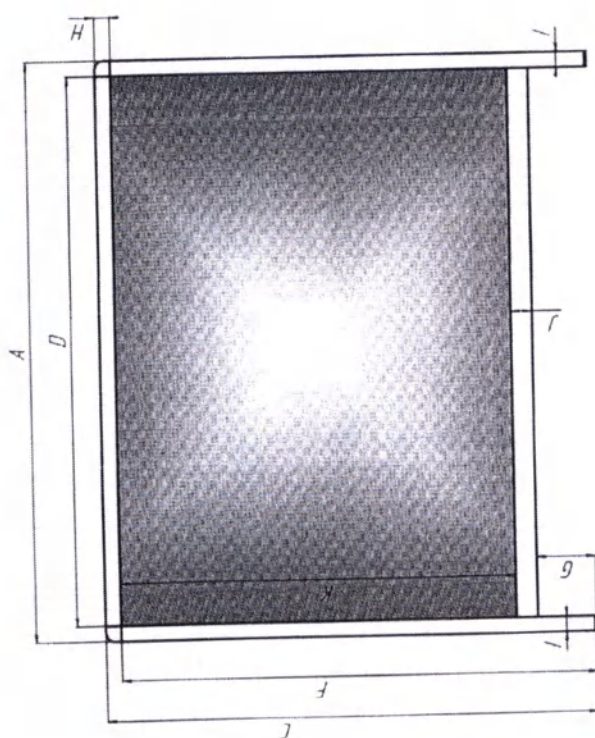
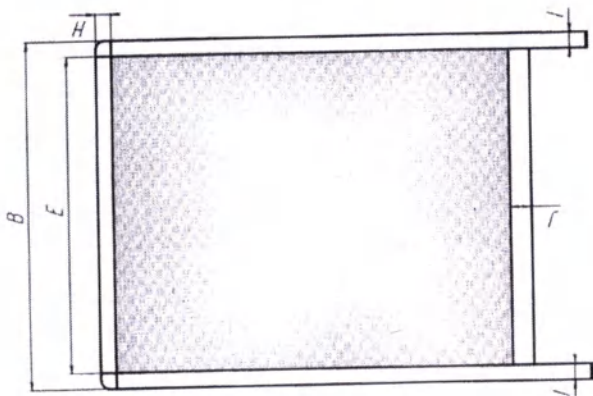


2

Стол медицинский для клинко-диагностических лабораторий

СЛ-ТС 00.01

Габаритные размеры	СЛ-ТС 00.01- 01	СЛ-ТС 00.01- 02
А, мм (± 4)	1000	1200
В, мм (± 4)	600	600
С, мм (± 4)	850	850
Д, мм (± 4)	946	1146

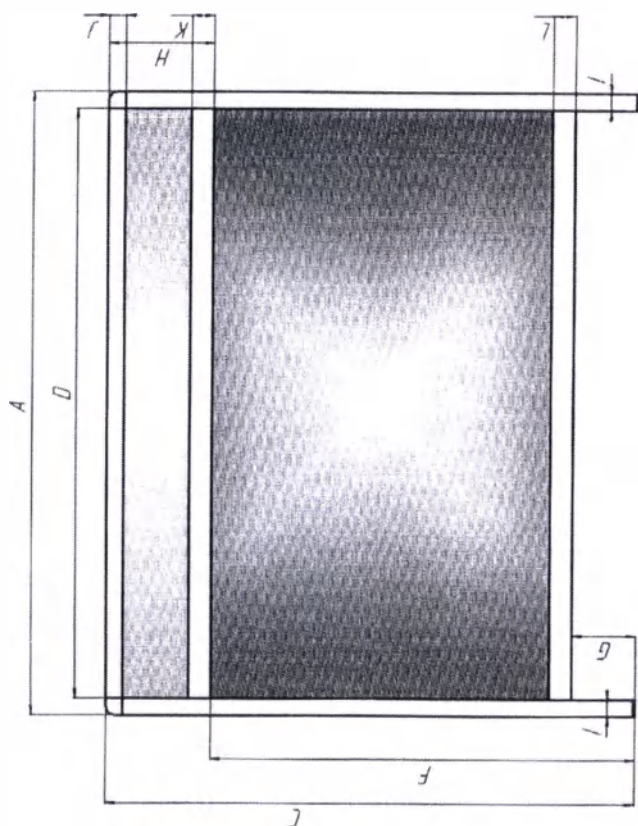
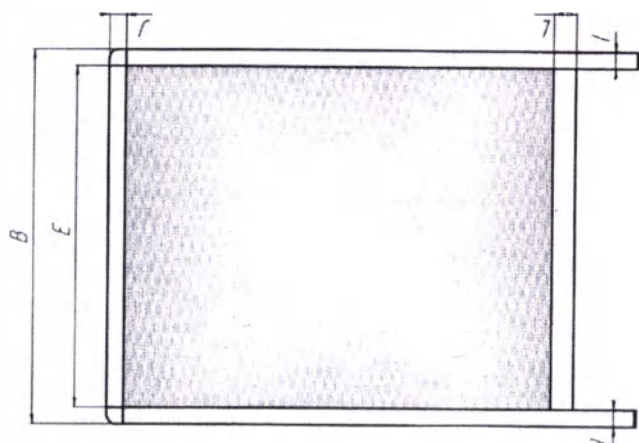


Е, мм (±4)	546	546
Е, мм (±4)	680	680
Г, мм (±4)	100	100
Н, мм (±4)	170	170
І, мм (±4)	27	27
Ј, мм (±4)	27	27
К, мм (±4)	36	36
Л, мм (±4)	36	36

Масса: 24 кг (±3)

Стол медицинский с
открытым отделением.

3	Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СЛ-ТС 00.02	Габаритные размеры	СЛ-ТС 00.02-01	СЛ-ТС 00.02-02
		А, мм (±4)	1000	1200
		В, мм (±4)	600	600

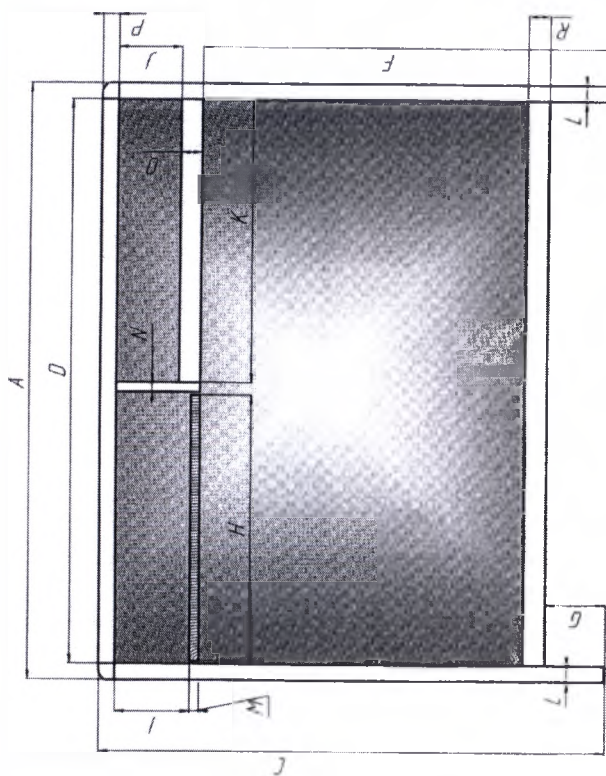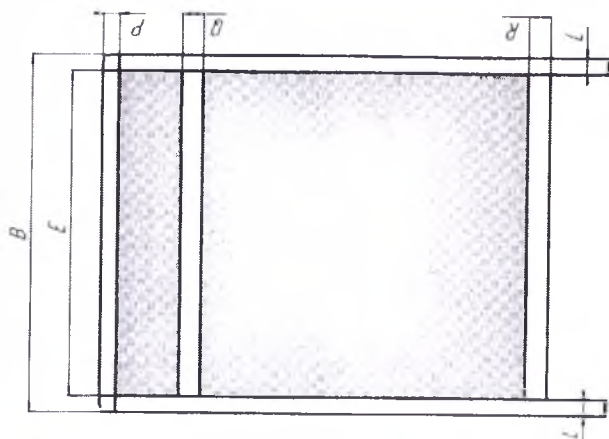

C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	946	1146
E, мм (±4)	546	546
F, мм (±4)	680	680
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	447	547
I, мм (±4)	127	127
J, мм (±4)	107	107
K, мм (±4)	473	573
L, мм (±4)	27	27
M, мм (±4)	16	16
N, мм (±4)	16	16
O, мм (±4)	36	36
P, мм (±4)	27	27
Q, мм (±4)	36	36
R, мм (±4)	36	36

Масса: 24 кг (±3)



Стол медицинский комплектуется одной выдвижной полкой, располагающейся под столешницей.

Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий

СЛ-ТС 00.03

4

Габаритные размеры	СЛ-ТС 00.03-01	СЛ-ТС 00.03-02
A, мм (±4)	1000	1200
B, мм (±4)	600	600
C, мм (±4)	850	850

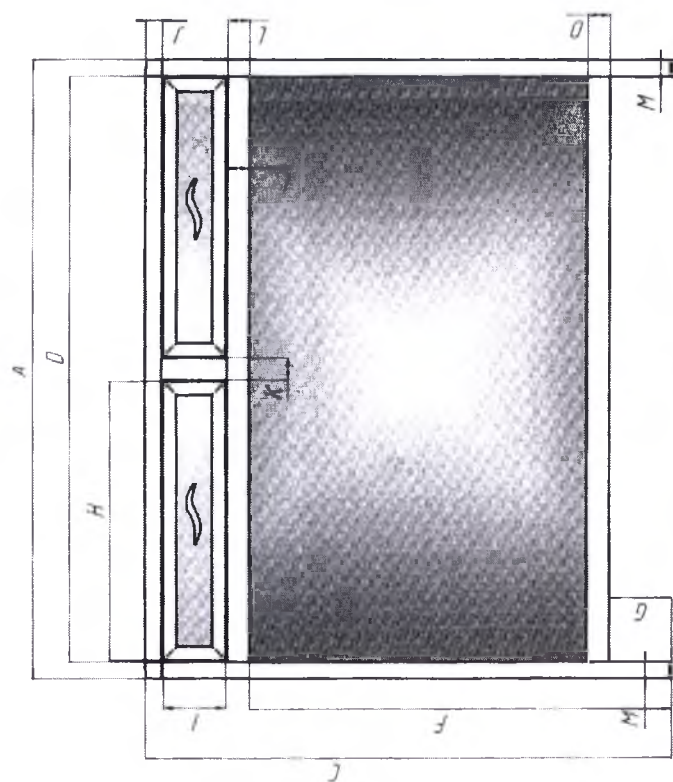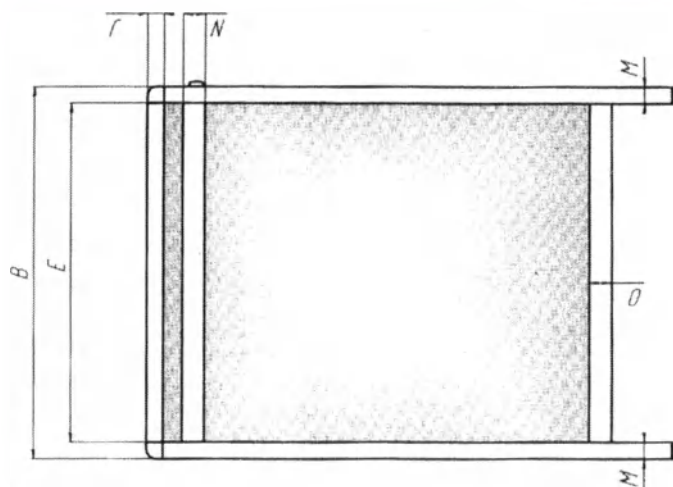

D, мм (± 4)	946	1146
E, мм (± 4)	546	546
F, мм (± 4)	680	680
G, мм (± 4)	100	100
H, мм (± 4)	450	530
I, мм (± 4)	102	102
J, мм (± 4)	27	27
K, мм (± 4)	36	36
L, мм (± 4)	36	36
M, мм (± 4)	27	27
N, мм (± 4)	36	36
O, мм (± 4)	36	36


Масса: 32 кг (± 3)

Стол медицинский комплектуется двумя выдвигаемыми ящиками располагающимися под столешницей.

5

Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 01.00

Габаритные размеры	СЛ-ТС 01.00-01	СЛ-ТС 01.00-02
A, мм (± 4)	1000	1200
B, мм (± 4)	600	600
C, мм (± 4)	850	850

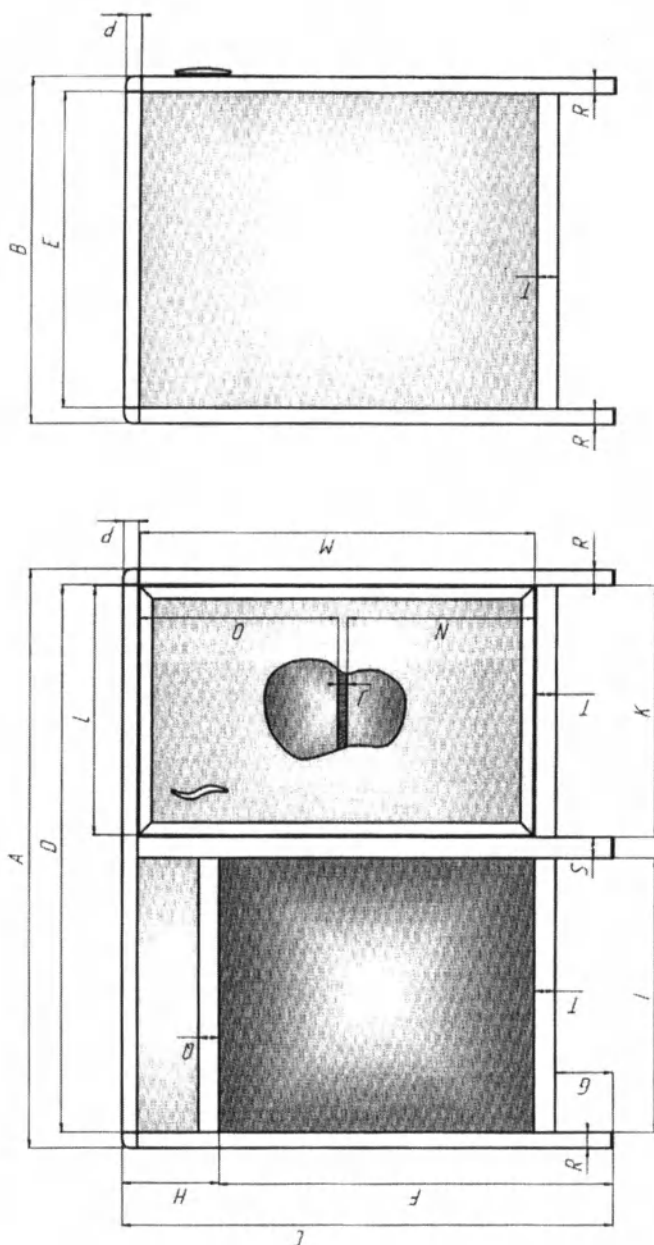


D, мм (±4)	946	1146
E, мм (±4)	546	546
F, мм (±4)	680	680
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	170	170
I, мм (±4)	473	573
J, мм (±4)	16	16
K, мм (±4)	437	537
L, мм (±4)	432	573
M, мм (±4)	682	682
N, мм (±4)	335,5	335,5
O, мм (±4)	335,5	335,5
P, мм (±4)	27	27
Q, мм (±4)	36	36
R, мм (±4)	27	27
S, мм (±4)	36	36
T, мм (±4)	36	36

Масса: 33 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется одним отделением с одной полкой, закрытым одной дверью, и одним открытым отделением.

6	Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СЛ-ТС 01.01	Габаритные размеры	СЛ-ТС 01.01-01	СЛ-ТС 01.01-02
		A, мм (±4)	1000	1200
		B, мм (±4)	600	600

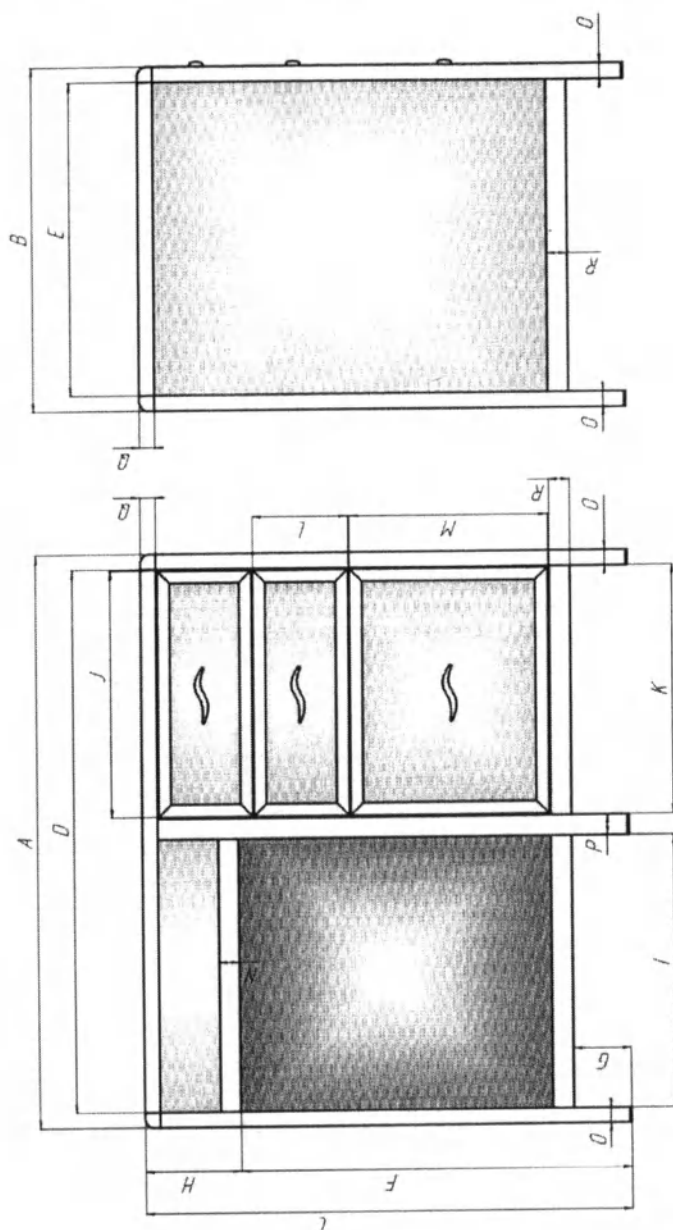

C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	946	1146
E, мм (±4)	546	546
F, мм (±4)	680	680
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	170	170
I, мм (±4)	473	573
J, мм (±4)	432	532
K, мм (±4)	437	537
L, мм (±4)	169	169
M, мм (±4)	341	341
N, мм (±4)	36	36
O, мм (±4)	27	27
P, мм (±4)	36	36
Q, мм (±4)	27	27
R, мм (±4)	36	36


Масса: 38 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется одним отделением с выдвигаемыми ящиками в количестве трех штук и одним открытым отделением.

Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий

СЛ-ТС 01.02

Габаритные размеры	СЛ-ТС 01.02-01	СЛ-ТС 01.02-02
A, мм (±4)	1000	1200
B, мм (±4)	600	600

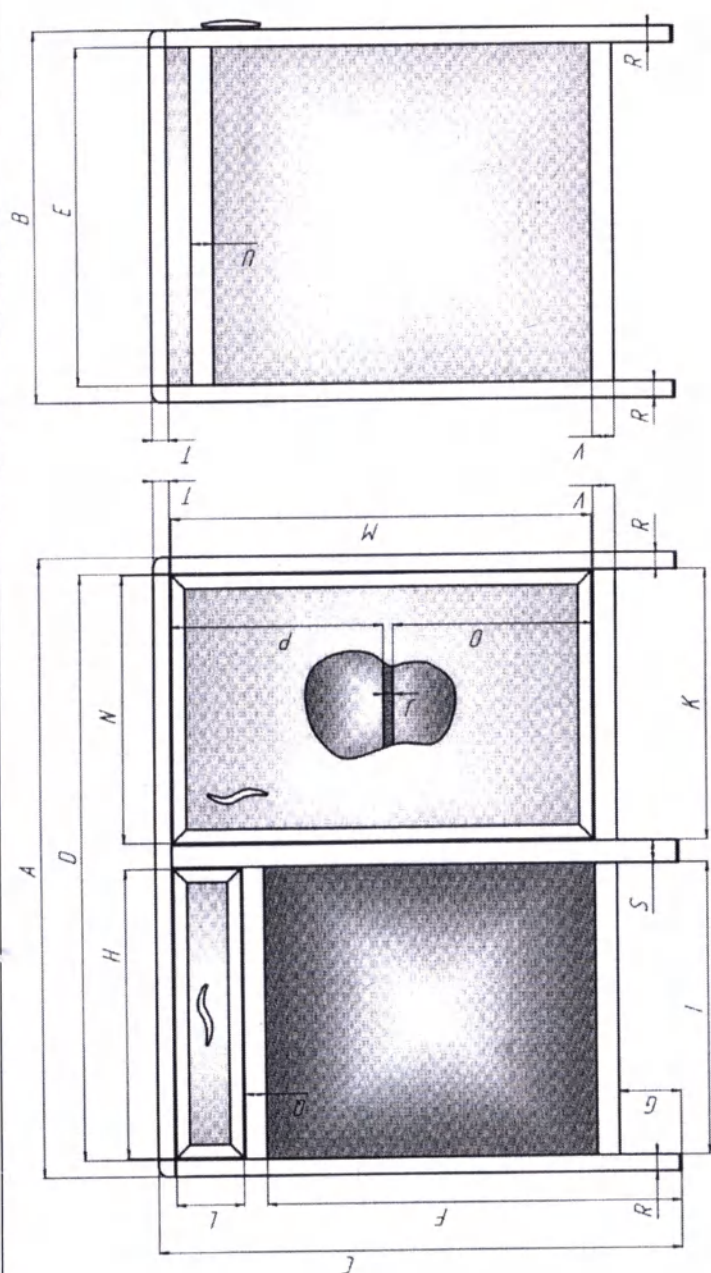


C, мм (±4)	850	850
D, мм (±4)	946	1146
E, мм (±4)	546	546
F, мм (±4)	672	672
G, мм (±4)	100	100
H, мм (±4)	468	568
I, мм (±4)	473	573
J, мм (±4)	16	16
K, мм (±4)	437	537
L, мм (±4)	110	110
M, мм (±4)	682	682
N, мм (±4)	432	532
O, мм (±4)	335,5	335,5
P, мм (±4)	335,5	335,5
Q, мм (±4)	36	36
R, мм (±4)	27	27
S, мм (±4)	36	36
T, мм (±4)	27	27
U, мм (±4)	36	36
V, мм (±4)	36	36

Масса: 38 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется одним отделением с одной полкой, закрытым одной дверью, и одним выдвижным ящиком, располагающимся под столешницей.

Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий

СЛ-ТС 01.03

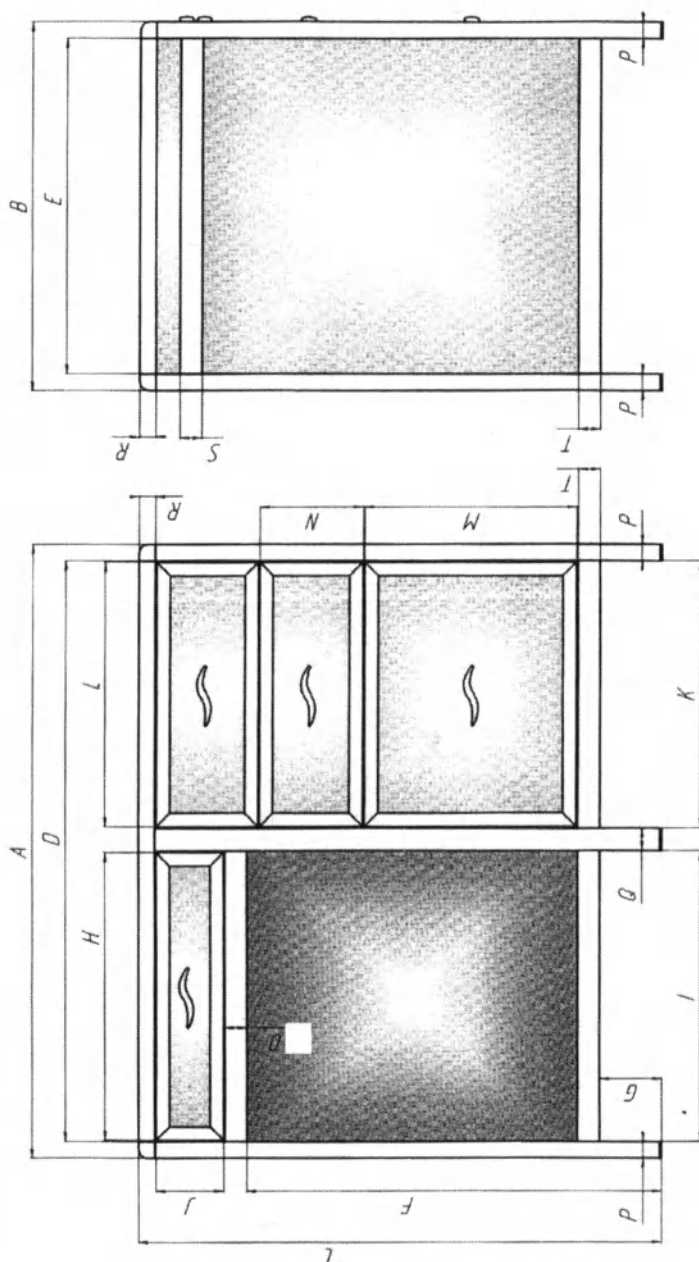


Габаритные размеры	СЛ- ТС 01.03- 01	СЛ-ТС 01.03- 02
A, мм (± 4)	1000	1200
B, мм (± 4)	600	600
C, мм (± 4)	850	850
D, мм (± 4)	946	1146
E, мм (± 4)	546	546
F, мм (± 4)	672	672
G, мм (± 4)	100	100
H, мм (± 4)	468	568
I, мм (± 4)	473	573
J, мм (± 4)	110	110
K, мм (± 4)	437	537
L, мм (± 4)	432	532
M, мм (± 4)	341	341
N, мм (± 4)	169	169
O, мм (± 4)	36	36
P, мм (± 4)	27	27
Q, мм (± 4)	36	36
R, мм (± 4)	27	27
S, мм (± 4)	36	36
T, мм (± 4)	36	36

Масса: 38 кг (± 3)

Стол медицинский
комплектуется одним
отделением с выдвижными
ящиками в количестве трех


штук и одним выдвижным ящиком, располагающимся под столешницей.

Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий
СЛ-ТС 02.00

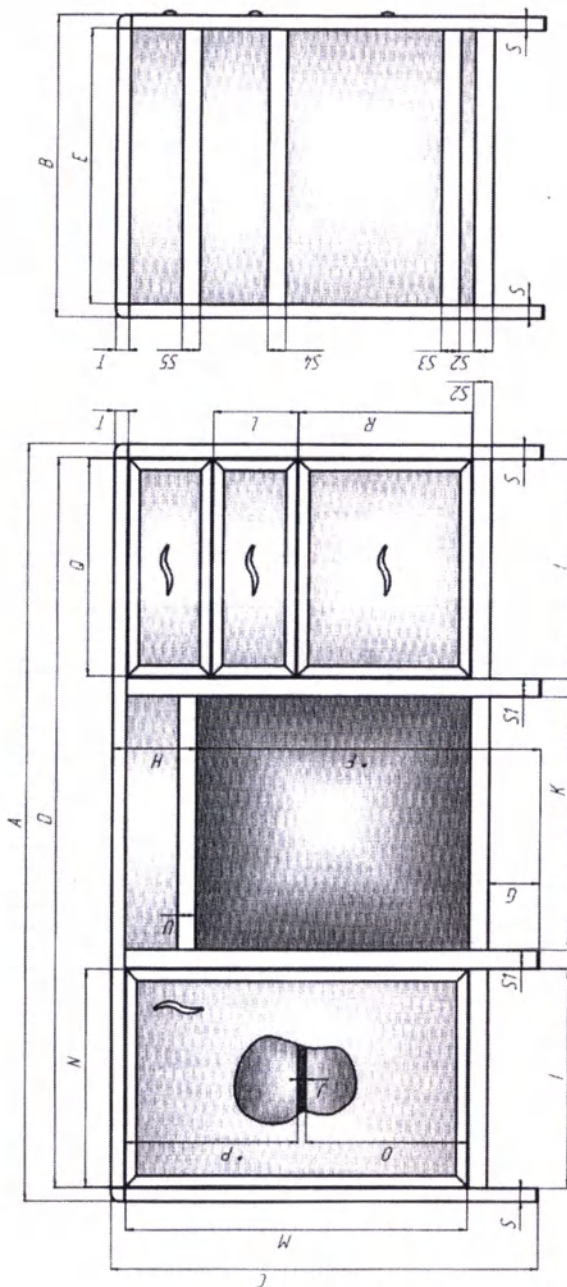

Габаритные размеры	СЛ-ТС 02.00
A, мм (±4)	1500
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	1446
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	680
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	170
I, мм (±4)	437
J, мм (±4)	16
K, мм (±4)	500
L, мм (±4)	169
M, мм (±4)	682
N, мм (±4)	432
O, мм (±4)	335,5
P, мм (±4)	335,5
R, мм (±4)	341
S, мм (±4)	27
S1, мм (±4)	36
S2, мм (±4)	36

		<table><tr><td>S3,мм (±4)</td><td>36</td></tr><tr><td>S4,мм (±4)</td><td>36</td></tr><tr><td>S5,мм (±4)</td><td>36</td></tr><tr><td>T, мм (±4)</td><td>27</td></tr><tr><td>U, мм (±4)</td><td>36</td></tr></table>	S3,мм (±4)	36	S4,мм (±4)	36	S5,мм (±4)	36	T, мм (±4)	27	U, мм (±4)	36														
S3,мм (±4)	36																									
S4,мм (±4)	36																									
S5,мм (±4)	36																									
T, мм (±4)	27																									
U, мм (±4)	36																									
		Масса: 51 кг (±3)																								
		Стол медицинский комплектуется одним отделением с выдвижными ящиками в количестве трех штук и одним отделением с одной полкой, закрытым одной дверью.																								
1 0	Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 02.01	<table><tr><td>Габаритные размеры</td><td>СЛ-ТС 02.01</td></tr><tr><td>A, мм (±4)</td><td>1500</td></tr><tr><td>B, мм (±4)</td><td>600</td></tr><tr><td>C, мм (±4)</td><td>850</td></tr><tr><td>D, мм (±4)</td><td>1446</td></tr><tr><td>E, мм (±4)</td><td>546</td></tr><tr><td>F, мм (±4)</td><td>680</td></tr><tr><td>G, мм (±4)</td><td>100</td></tr><tr><td>H, мм (±4)</td><td>170</td></tr><tr><td>I, мм (±4)</td><td>437</td></tr><tr><td>J, мм (±4)</td><td>16</td></tr><tr><td>K, мм (±4)</td><td>500</td></tr></table>	Габаритные размеры	СЛ-ТС 02.01	A, мм (±4)	1500	B, мм (±4)	600	C, мм (±4)	850	D, мм (±4)	1446	E, мм (±4)	546	F, мм (±4)	680	G, мм (±4)	100	H, мм (±4)	170	I, мм (±4)	437	J, мм (±4)	16	K, мм (±4)	500
		Габаритные размеры	СЛ-ТС 02.01																							
		A, мм (±4)	1500																							
		B, мм (±4)	600																							
		C, мм (±4)	850																							
		D, мм (±4)	1446																							
		E, мм (±4)	546																							
		F, мм (±4)	680																							
		G, мм (±4)	100																							
		H, мм (±4)	170																							
		I, мм (±4)	437																							
		J, мм (±4)	16																							
		K, мм (±4)	500																							

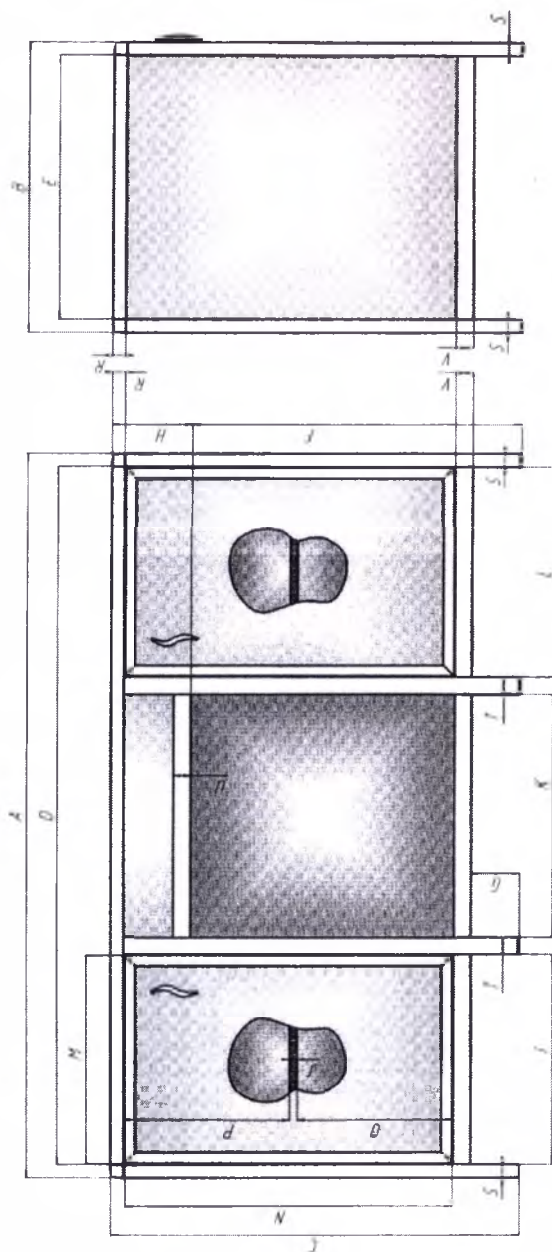


L, мм (± 4)	437
M, мм (± 4)	432
N, мм (± 4)	682
O, мм (± 4)	335,5
P, мм (± 4)	335.5
R, мм (± 4)	27
S, мм (± 4)	27
T, мм (± 4)	36
U, мм (± 4)	36
V, мм (± 4)	36

Масса: 51 кг (± 3)

Стол медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью.

Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий

СЛ-ТС 02.02

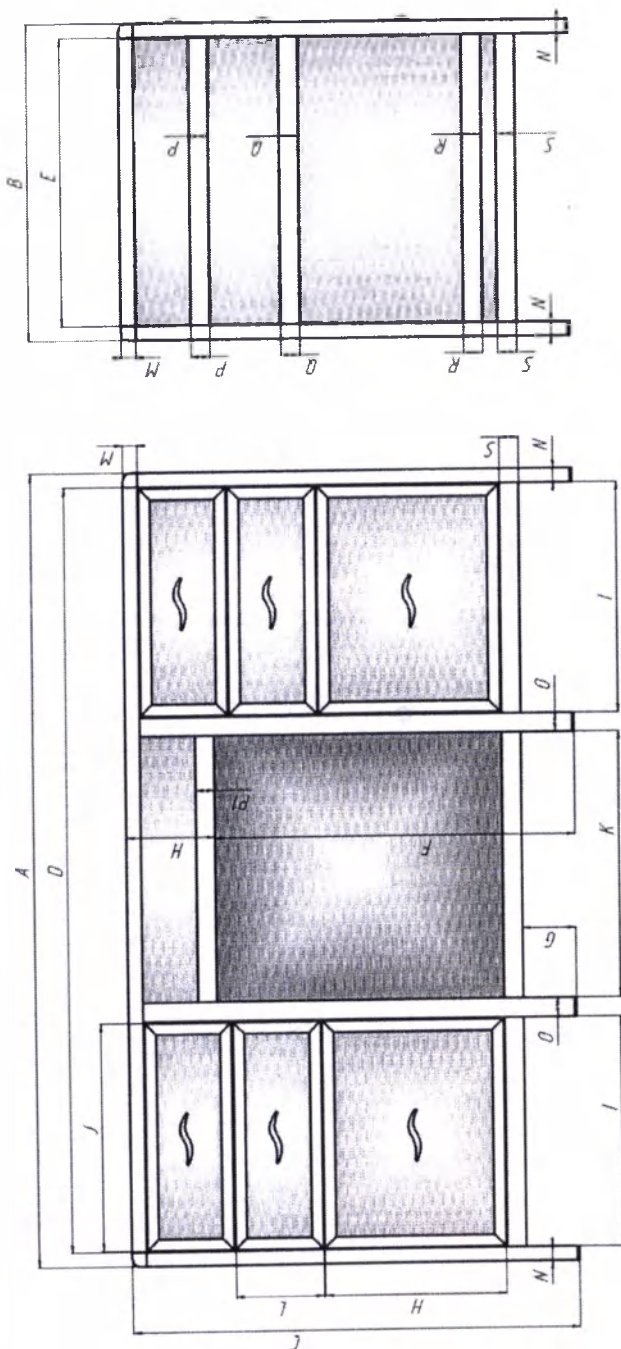



Габаритные размеры	СЛ-ТС 02.02
A, мм (± 4)	1500
B, мм (± 4)	600
C, мм (± 4)	850
D, мм (± 4)	1446
E, мм (± 4)	546
F, мм (± 4)	680
G, мм (± 4)	100
H, мм (± 4)	341
I, мм (± 4)	437
J, мм (± 4)	432
K, мм (± 4)	500
L, мм (± 4)	169
M, мм (± 4)	27
N, мм (± 4)	27
O, мм (± 4)	36
P, мм (± 4)	36
P1, мм (± 4)	36
Q, мм (± 4)	36
R, мм (± 4)	36
S, мм (± 4)	36

Масса: 51 кг (± 3)

Стол медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых выдвижные ящики в количестве трех штук.


Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий

СЛ-ТС 03.01

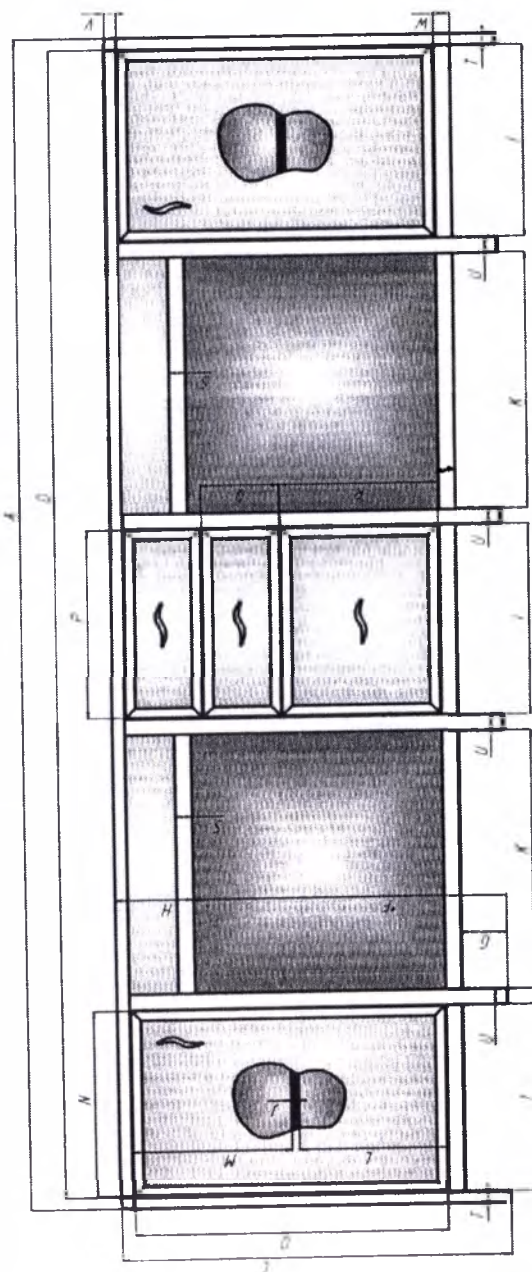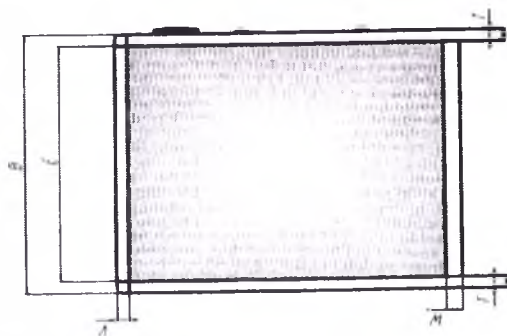


1
2

	Габаритные размеры	A, мм (±4)	B, мм (±4)	C, мм (±4)	D, мм (±4)	E, мм (±4)	F, мм (±4)	G, мм (±4)	H, мм (±4)	I, мм (±4)	J, мм (±4)	K, мм (±4)	
	СЛ-ТС 03.01	2700	600	850	2682	546	680	100	170	437	16	595. 5	
	Габаритные размеры	L, мм (±4)	M, мм (±4)	N, мм (±4)	O, мм (±4)	P, мм (±4)	Q, мм (±4)	R, мм (±4)	S, мм (±4)	T, мм (±4)	U, мм (±4)	V, мм (±4)	W, мм (±4)
	СЛ-ТС 03.01	335. 5	335. 5	43 2	68 2	432	169	342	36	27	36	27	36
	Масса: 80 кг (±3)												
	Стол медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью и третье отделение с выдвижными ящиками в количестве трех штук.												
1 3	Стол медицинский для клинко-диагностических лабораторий СЛ-ТС 03.02												

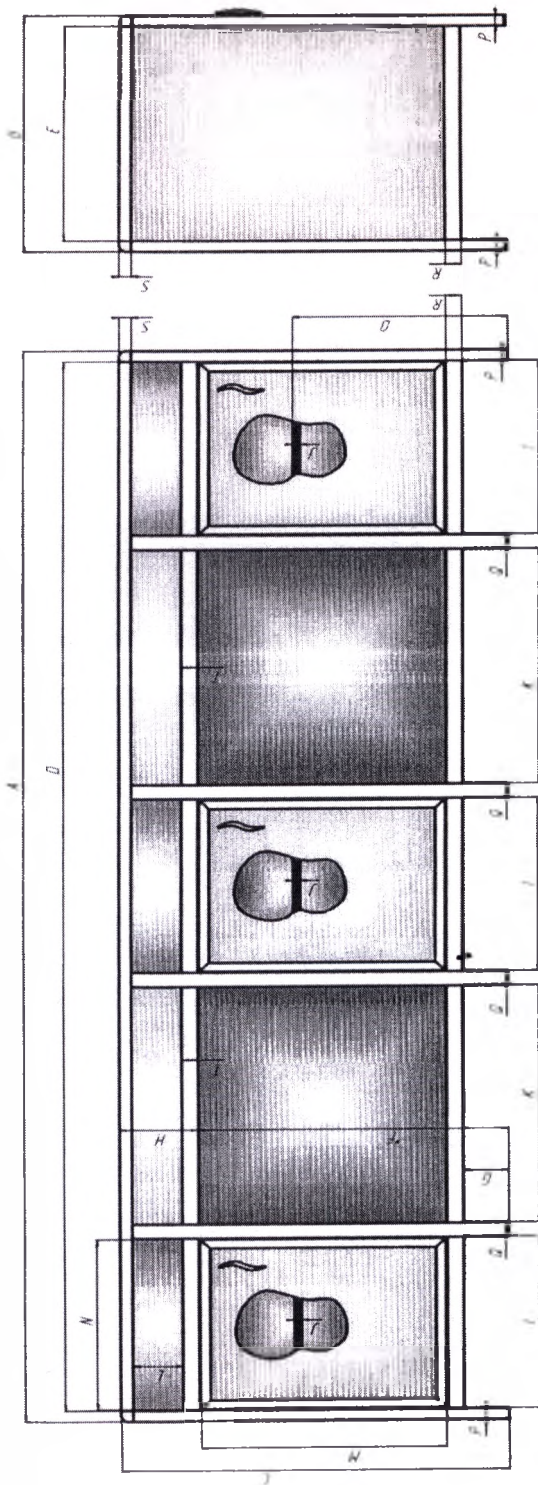


	Габаритные размеры	A, мм (±4)	B, мм (±4)	C, мм (±4)	D, мм (±4)	E, мм (±4)	F, мм (±4)	G, мм (±4)	H, мм (±4)	I, мм (±4)	J, мм (±4)	K, мм (±4)
	СЛ-ТС 03.02	2700	600	850	2646	546	680	100	170	437	16	595. 5
	Габаритные размеры	L, мм (±4)	M, мм (±4)	N, мм (±4)	O, мм (±4)	P, мм (±4)	Q, мм (±4)	R, мм (±4)	S, мм (±4)	T, мм (±4)		
	СЛ-ТС 03.02	107	539	432	473	27	36	36	27	36		
	Масса: 80 кг (±3)											
	Стол медицинский комплектуется тремя отделениями, каждое из которых имеет нишу, одну полку и закрыто одной дверью.											
1 4	Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 03.03 -											

	Габаритные размеры	A, мм (±4)	B, мм (±4)	C, мм (±4)	D, мм (±4)	E, мм (±4)	F, мм (±4)	G, мм (±4)	H, мм (±4)	I, мм (±4)	J, мм (±4)	K, мм (±4)
	СЛ-ТС 03.03	2700	600	850	2646	546	680	100	170	437	347	595. 5
	Габаритные размеры	L, мм (±4)	M, мм (±4)	N, мм (±4)	O, мм (±4)	P, мм (±4)	Q, мм (±4)	R, мм (±4)	S, мм (±4)	T, мм (±4)	U, мм (±4)	
	СЛ-ТС 03.03	432	169	27	36	36	27	36	36	36	36	
	Масса: 80 кг (±3)											
	Стол медицинский комплектуется тремя отделениями, каждое из которых имеет выдвижные ящики в количестве трех штук.											
1 5	Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СЛ-ТС 03.04											

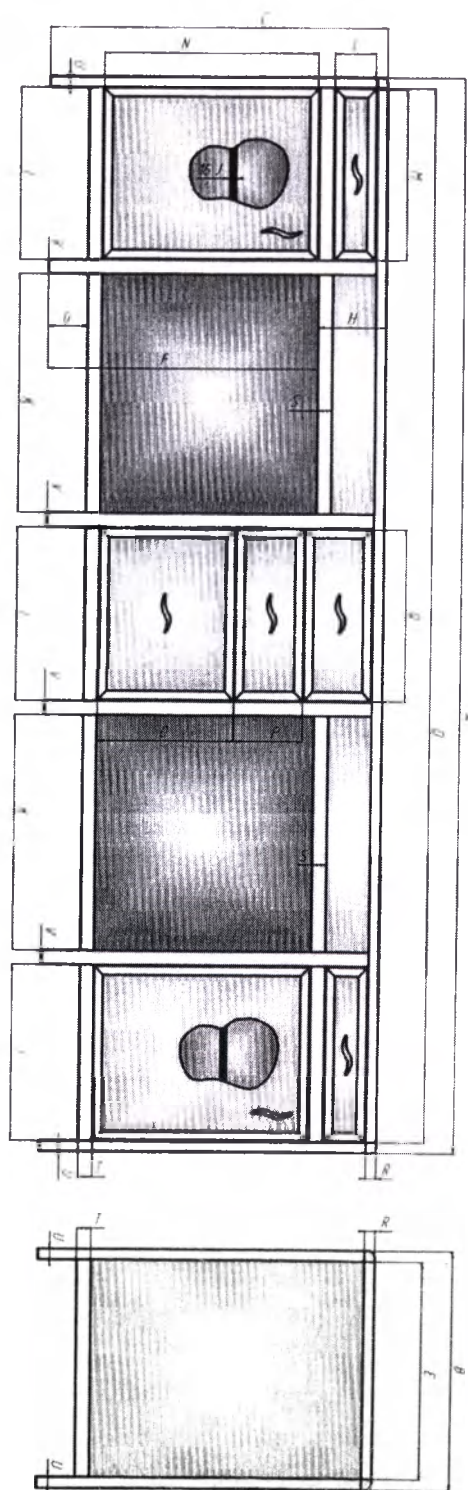

	Габаритные размеры	A, мм (±4)	B, мм (±4)	C, мм (±4)	D, мм (±4)	E, мм (±4)	F, мм (±4)	G, мм (±4)	H, мм (±4)	I, мм (±4)	J, мм (±4)	K, мм (±4)
	СЛ-ТС 03.04	2700	600	850	2646	546	680	100	170	437	16	595. 5
	Габаритные размеры	L, мм (±4)	M, мм (±4)	N, мм (±4)	O, мм (±4)	P, мм (±4)	Q, мм (±4)	R, мм (±4)	S, мм (±4)	T, мм (±4)	U, мм (±4)	V, мм (±4)
	СЛ-ТС 03.04	102	432	539	342	169	432	27	36	36	27	36
	Масса: 80 кг (±3) Стол медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет один выдвижной ящик, одну полку и закрыто одной дверью и третье отделение с выдвижными ящиками в количестве трех штук.											
1 6	Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 03.05											

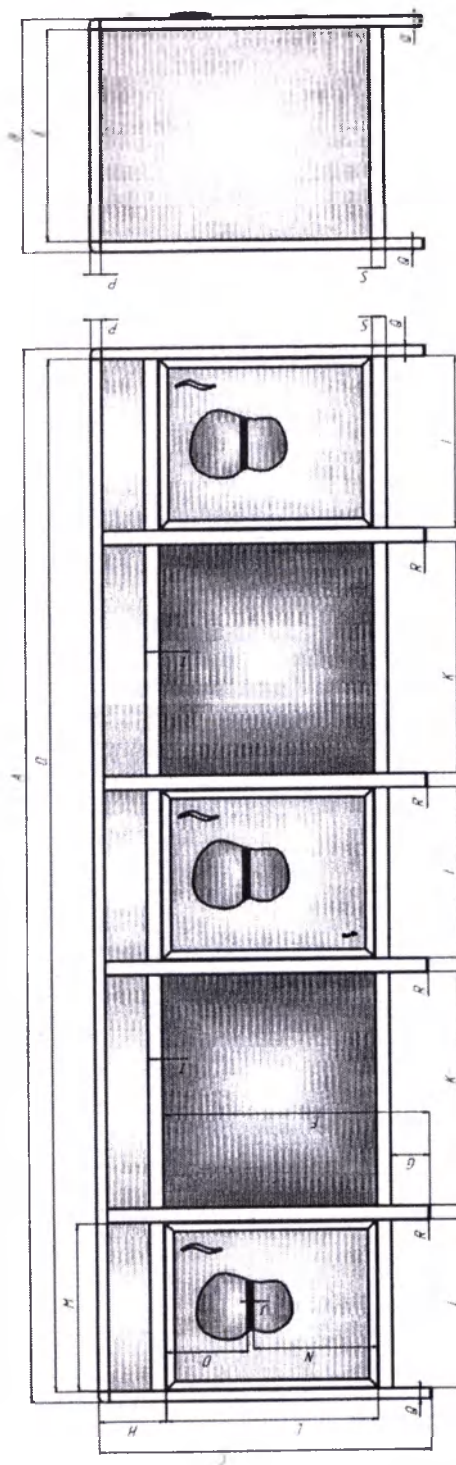


Габаритные размеры	A, мм (±4)	B, мм (±4)	C, мм (±4)	D, мм (±4)	E, мм (±4)	F, мм (±4)	G, мм (±4)	H, мм (±4)	I, мм (±4)	J, мм (±4)	K, мм (±4)
СЛ-ТС 03.05	2700	600	850	2646	546	680	100	170	437	16	595. 5

Габаритные размеры	L, мм (±4)	M, мм (±4)	N, мм (±4)	O, мм (±4)	P, мм (±4)	Q, мм (±4)	R, мм (±4)	S, мм (±4)	T, мм (±4)
СЛ-ТС 03.05	539	432	321. 5	206. 5	27	27	36	36	36

Масса: 80 кг (±3)

Стол медицинский комплектуется тремя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью.

Дверь и ящик (в разрезе)

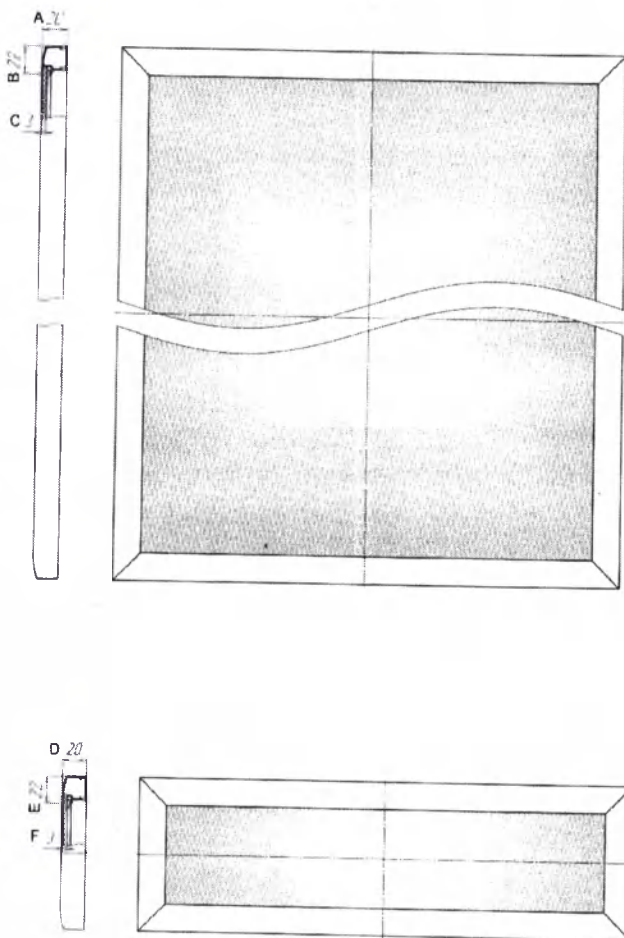

Габаритный размер	Значение габаритного параметра
A	20 мм (± 4 мм)
B	22 мм (± 4 мм)
C	3 мм
D	20 мм (± 4 мм)
E	22 мм (± 4 мм)
F	3 мм

Максимальная допустимая нагрузка на столы - 30кг.

Максимальная допустимая нагрузка на полки - 10кг.

Максимальная допустимая нагрузка на ящики - 6кг.

Замки магнитные неподвижно и прочно закреплены на дверях столов (СЛ-ТС 01.00-01; СЛ-ТС 01.00-02; СЛ-ТС 01.02-01; СЛ-ТС 01.02-02; СЛ-ТС 02.00; СЛ-ТС 02.01; СЛ-ТС 03.01; СЛ-ТС 03.02; СЛ-ТС 03.04; СЛ-ТС 03.05) и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Стол медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СЛ-ТС XX.XX, модель: СЛ-ТС XX.XX-XX (или б/н)	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

4. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие столов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации столов составляет 18 (восемнадцать) месяцев.

Средний срок службы - 7 лет со дня его продажи.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений столов, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroy-nn@tehstroy-nn.ru).

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. В пределах одного населенного пункта столы допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования – при температуре от -50 °С до +50 °С, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность столов от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50 °С до +40 °С, влажности – не более 75 %.

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от +10 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха – не более 75%.

6. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления столов для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02, а также соблюдаться нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования столов не должно происходить разложения и выделения вредных веществ, а также должны выполняться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7 ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении столов (при наличии) следует проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Наименование	Артикул
	Стол медицинский	СЛ-ТС 00.00
	Стол медицинский	СЛ-ТС 00.01
	Стол медицинский	СЛ-ТС 00.02
	Стол медицинский	СЛ-ТС 00.03
	Стол медицинский	СЛ-ТС 01.00
	Стол медицинский	СЛ-ТС 01.01
	Стол медицинский	СЛ-ТС 01.02
	Стол медицинский	СЛ-ТС 01.03
	Стол медицинский	СЛ-ТС 02.00
	Стол медицинский	СЛ-ТС 02.01
	Стол медицинский	СЛ-ТС 02.03
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.01
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.02
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.03
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.04
	Стол медицинский	СЛ-ТС 03.05

Соответствует ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

Предприятие-изготовитель: ООО «Техстрой»

Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.

Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское ш., д.1.

Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____

(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____

(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____

(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____

(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

Предприятие-изготовитель: ООО «Техстрой»
Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.
Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское шоссе, д.1.
Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12
E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru
www.tehstroj-nn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 4
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____


М.П.

Предприятие-изготовитель: **ООО «Техстрой»**
Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.
Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское ш., д.1.
Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12
E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru
www.tehstroj-nn.ru

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на
(29 двадцати девяти) листах

Директор ООО «Техстрой»

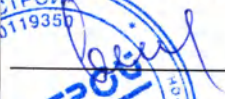


Кабикин А.Н.





ПАСПОРТ

**Столы медицинские для клинико-диагностических лабораторий
по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019**

**Столик медицинский подкатной
для клинико-диагностических лабораторий
в вариантах исполнения**

	Наименование	Артикул
	Столик медицинский подкатной	СЛп-ТС 00.00
	Столик медицинский подкатной	СЛп-ТС 01.00

ООО «Техстрой»

г. Нижний Новгород

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения.

Потенциальным потребителем медицинского изделия является обученный медицинский персонал, по назначению и под наблюдением врача.

Показания к применению:

Столик медицинский подкатной для клинико-диагностических лабораторий в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019:

- для работы с лабораторной посудой, реактивами и приборами с возможностью перемещать стол в удобное место в любых лабораторных отделениях и лечебно-профилактических учреждениях


Противопоказания к применению отсутствуют.

Возможные побочные действия отсутствуют.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столик медицинский подкатной для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения

1	<i>Столик медицинский подкатной для клинико- диагностических лабораторий</i> <i>СЛп-ТС 00.00</i>	Габаритные размеры	СЛп-ТС 00.00
		А, мм (±4)	600
		В, мм (±4)	450
		С, мм (±4)	850
		Д, мм (±4)	223
		Е, мм (±4)	503
		F, мм (±4)	783
		G, мм (±4)	60
		Н, мм (±4)	27
		I, мм (±4)	27
		J, мм (±4)	30
		J1, мм (±4)	30
		J2, мм (±4)	30
		Масса: 7 кг (±3)	

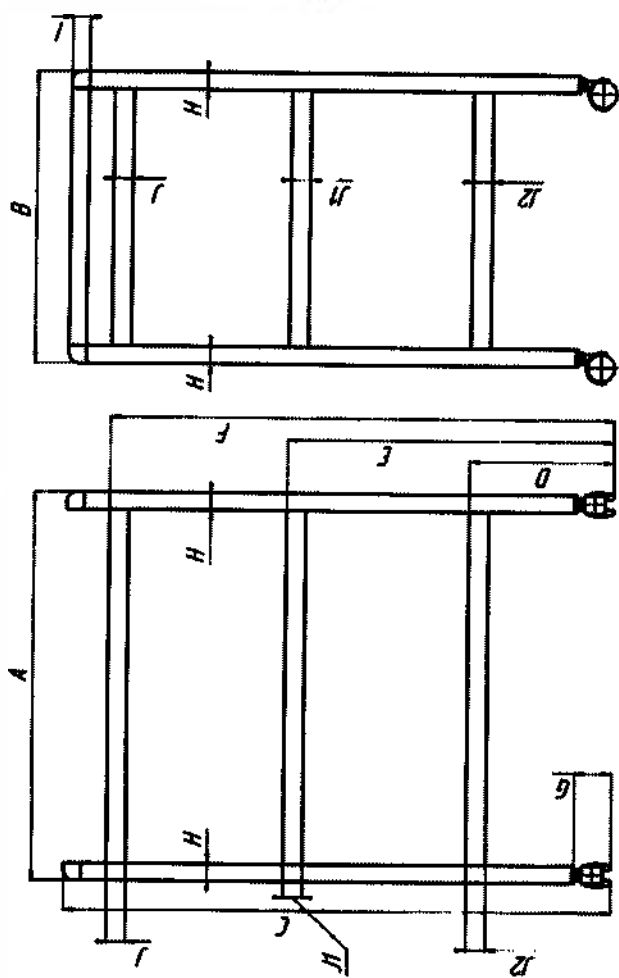


Столик медицинский подкатной комплектуется тремя стеклянными полками и колесами в количестве четырех штук (без тормозов).

2

Столик медицинский подкатной для клиничко-диагностических лабораторий
СЛп-ТС 01.00

Габаритные размеры	СЛп-ТС 01.00
А, мм (±4)	600
В, мм (±4)	450
С, мм (±4)	850
Д, мм (±4)	223
Е, мм (±4)	350
F, мм (±4)	783
Г, мм (±4)	60
Н, мм (±4)	145
І, мм (±4)	541
Ј, мм (±4)	27

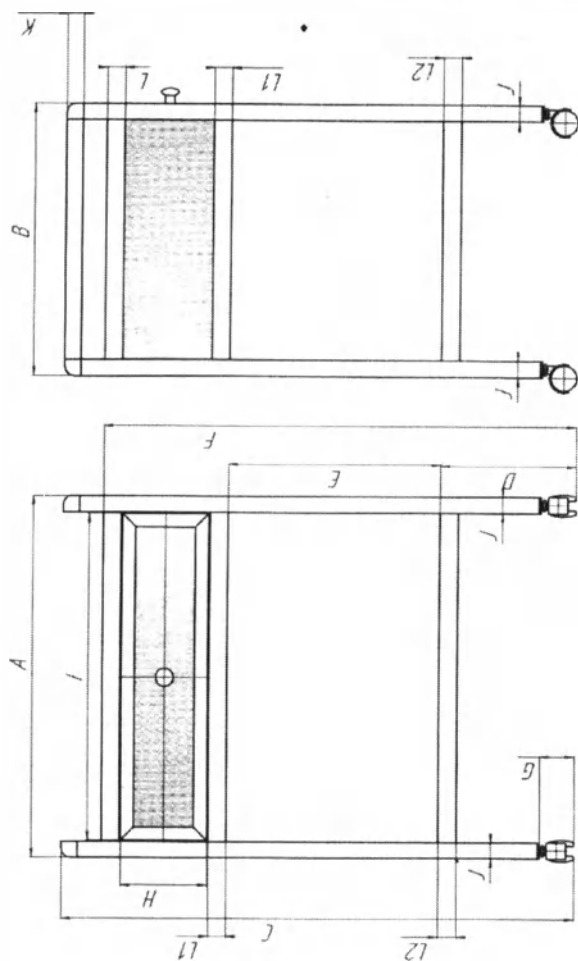


K, мм (± 4)	27
L, мм (± 4)	30
L1, мм (± 4)	30
L2, мм (± 4)	30

Масса: 13 кг (± 3)

*Столик медицинский
подкатной комплектуется
одной стеклянной полкой,
одним выдвижным ящиком и
колесами в количестве
четырёх штук (без тормозов).*

Дверь и ящик (в разрезе)

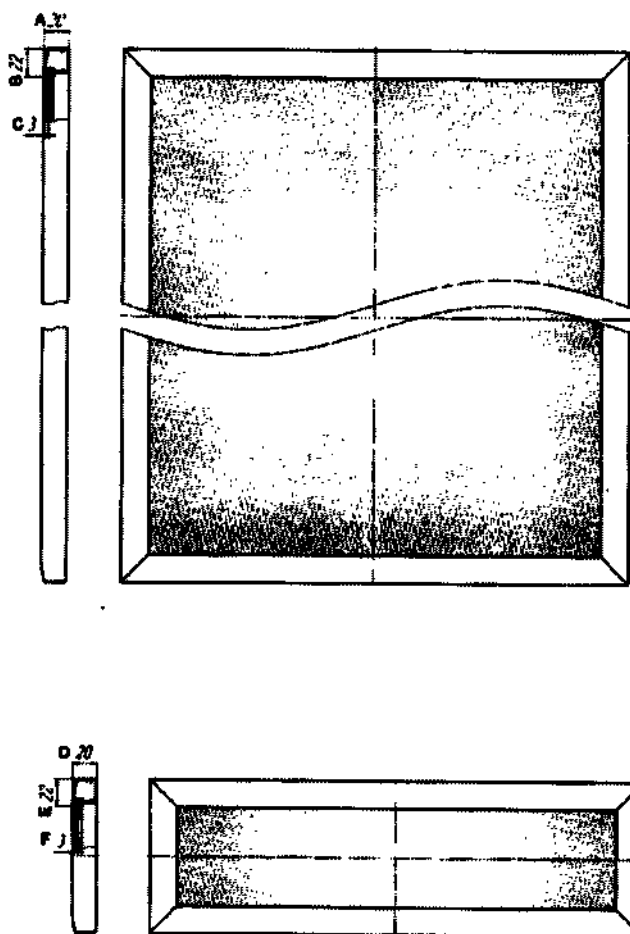

Габаритный размер	Значение габаритного параметра
A	20 мм (+4мм)
B	22 мм (+4мм)
C	3 мм
D	20 мм (+4мм)
E	22 мм (+4мм)
F	3 мм

Максимальная допустимая нагрузка на столы - 30кг.

Максимальная допустимая нагрузка на полки - 10кг.

Максимальная допустимая нагрузка на ящики - 6кг.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Столик лабораторный подкатной для клинико-диагностических лабораторий СЛп-ТС XX.XX	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

4. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие столов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации столов составляет 18 (восемнадцать) месяцев.

Средний срок службы - 7 лет со дня его продажи.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений столов, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. В пределах одного населенного пункта столы допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования – при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность столов от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, влажности – не более 75 %.

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха – не более 75%.

6. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления столов для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02, а также соблюдаться нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования столов не должно происходить разложения и выделения вредных веществ, а также должны выполняться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7 ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении столов (при наличии) следует проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Наименование	Артикул
	Столик медицинский подкатной	СЛп-ТС 00.00
	Столик медицинский подкатной	СЛп-ТС 01.00

Соответствует ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

Предприятие-изготовитель: ООО «Техстрой»

Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.

Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское ш., д.1.

Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Столик медицинский подкатной
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Столик медицинский подкатной
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

Предприятие-изготовитель: **ООО «Техстрой»**
Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.
Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское шоссе, д.1.
Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12
E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Столик медицинский подкатной
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 4
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Столик медицинский подкатной
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

Предприятие-изготовитель: ООО «Техстрой»
Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.
Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское ш., д.1.
Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12
E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru
www.tehstroj-nn.ru

117

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на
(9 девяти) листах

Директор ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.





ПАСПОРТ

Стол� медицинские для клинико-диагностических лабораторий
по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

**Стол медицинский угловой
для клинико-диагностических лабораторий
в вариантах исполнения**

	Наименование	Артикул
	Стол лабораторный угловой	СЛУ-ТС 01.02

ООО «Техстрой»

г. Нижний Новгород

1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения.

Потенциальным потребителем медицинского изделия является обученный медицинский персонал, по назначению и под наблюдением врача.

Показания к применению:

Стол медицинский угловой для клинко-диагностических лабораторий в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019:


- для работы с лабораторной посудой, реактивами и приборами, с целью рационального использования пространства, используя как угловое соединение в любых лабораторных отделениях и лечебно-профилактических учреждениях

Противопоказания к применению отсутствуют.




Возможные побочные действия отсутствуют.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол медицинский угловой для клинко-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения

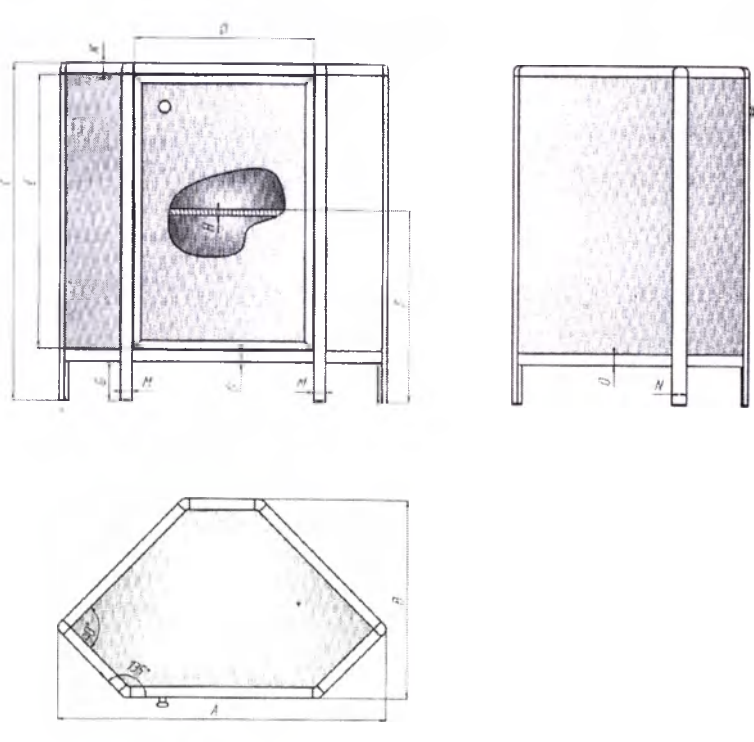Стол медицинский угловой для клинко- диагностических лабораторий СЛУ-ТС 01.02 Модель СЛУ-ТС 01.02-01: 		Габаритн ые размеры	СЛУ- ТС 01.02- 01	СЛУ- ТС 01.02- 02
		A, мм (±4)	835	835
		B, мм (±4)	500	595
		C, мм (±4)	850	850
		D, мм (±4)	457	457
		E, мм (±4)	688	688
		F, мм (±4)	484	600
		G, мм (±4)	100	100
		H, мм (±4)	16	600
		I, мм (±4)	-	484
		J, мм (±4)	-	16
		K, мм (±4)	27	27
		M, мм (±4)	29.56	29.56

Модель СЛУ-ТС 01.02-01:

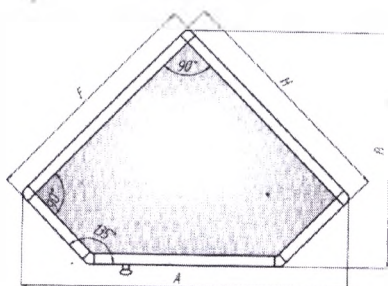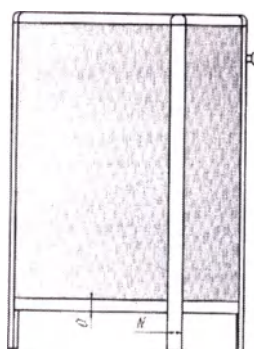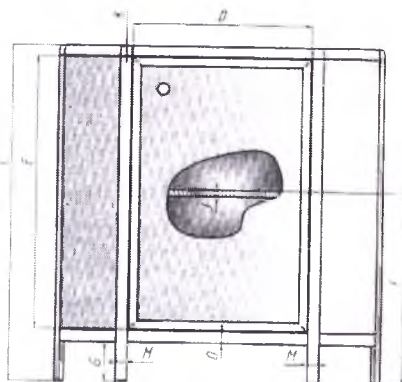

N, мм (±4)	38.18	38.18
O, мм (±4)	30	30

Масса: 20 кг (±3)

Стол медицинский угловой комплектуется отделением с одной полкой, которое закрыто дверью.

Дверь и ящик (в разрезе)

The image contains two sets of technical drawings. The top set shows a door in cross-section with dimensions A (thickness), B (height), and C (width of the inner panel). The bottom set shows a drawer in cross-section with dimensions D (thickness), E (height), and F (width of the inner panel). Both drawings show the internal structure and the outer frame.

Габаритны й размер	Значение габаритног о параметра
A	20 мм (+4мм)
B	22 мм (+4мм)
C	3 мм
D	20 мм (+4мм)
E	22 мм (+4мм)
F	3 мм

Максимальная допустимая нагрузка на столы - 30кг.

Максимальная допустимая нагрузка на полки - 10кг.

Максимальная допустимая нагрузка на ящики - 6кг.

Замки магнитные неподвижно и прочно закреплены на дверях столов (СЛУ-ТС 01.02-01; СЛУ-ТС 01.02-02) и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание.

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Стол лабораторный угловой для клинико-диагностических лабораторий СЛУ-ТС XX.XX, модель: СЛУ-ТС XX.XX-XX	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

4.ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие столов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации столов составляет 18 (восемнадцать) месяцев.

Средний срок службы - 7 лет со дня его продажи.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений столов, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П110 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).

5.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. В пределах одного населенного пункта столы допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования – при температуре от -50 °С до +50 °С, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность столов от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50 °С до +40 °С, влажности – не более 75 %.

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от +10 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха – не более 75%.

6.УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления столы для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02, а также соблюдаться нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования столов не должно происходить разложения и выделения вредных веществ, а также должны выполняться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7 ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении столов (при наличии) следует проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Наименование	Артикул
	Стол медицинский угловой	СЛУ-ТС 01.02

Соответствует ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

Предприятие-изготовитель: ООО «Техстрой»

Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.

Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское ш., д.1.

Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский угловой
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский угловой
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

Предприятие-изготовитель: ООО «Техстрой»
Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.
Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское шоссе, д.1.
Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12
E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru
www.tehstroj-nn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский угловой
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 4
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол медицинский угловой
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

Предприятие-изготовитель: ООО «Техстрой»
Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.
Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское ш., д. 1.
Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12
E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru
www.tehstroj-nn.ru

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на
(8 / восьми) листах

Директор ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.





ПАСПОРТ

Столы медицинские для клинико-диагностических лабораторий
по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

**Стол-тумба медицинский
для клинико-диагностических лабораторий
в вариантах исполнения**

	Наименование	Артикул
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 00.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 00.01
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 01.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 01.01
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 01.02
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.01
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.02
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.03
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.04
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.05
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 03.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 03.01
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 03.02
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 03.03
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 04.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 04.01

ООО «Техстрой»

г. Нижний Новгород

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

Область применения – лечебно-профилактические учреждения.

Потенциальным потребителем медицинского изделия является обученный медицинский персонал, по назначению и под наблюдением врача.

Показания к применению:

Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019:

- для расположения лабораторной посуды, реактивов и оборудования, рационально используя рабочее пространство и разгружая основной рабочий стол в любых лабораторных отделениях и лечебно-профилактических учреждениях



Противопоказания к применению отсутствуют.

Возможные побочные действия отсутствуют.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения

1	Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СТ-ТС 00.00	Габаритные размеры	СТ-ТС 00.00	
		A, мм (±4)	1000	
		B, мм (±4)	600	
		C, мм (±4)	850	
		D, мм (±4)	941	
		E, мм (±4)	546	
		F, мм (±4)	225	
		G, мм (±4)	100	
		H, мм (±4)	27	
		I, мм (±4)	27	
		J, мм (±4)	36	
		K, мм (±4)	36	
		L, мм (±4)	36	
		M, мм (±4)	36	
		Масса: 41 кг (±3)		

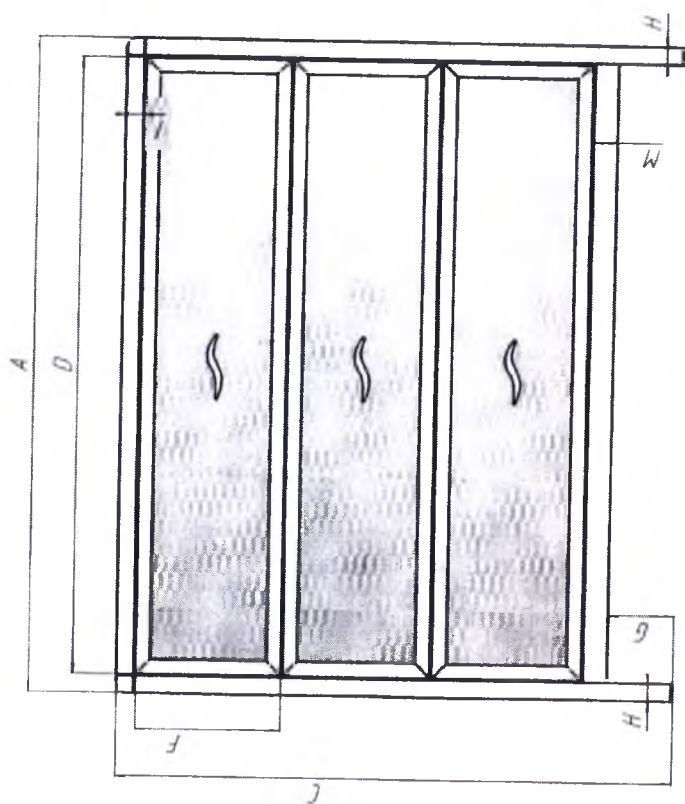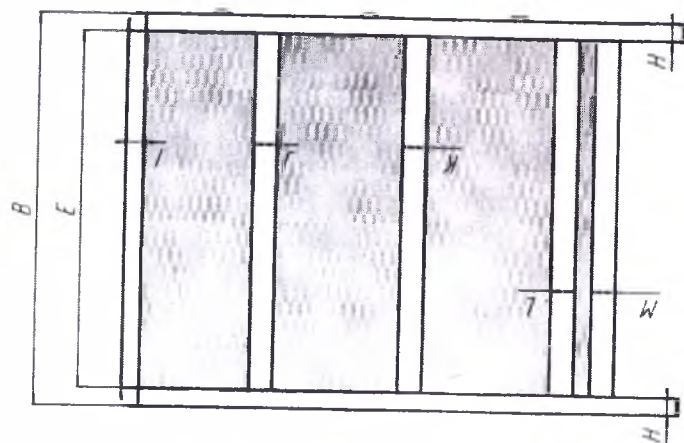

Стол-тумба медицинский комплектуется тремя выдвижными ящиками.

2	Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СТ-ТС 00.01	Габаритные размеры	СТ-ТС 00.01
		А, мм (±4)	1000
		В, мм (±4)	600
		С, мм (±4)	850
		Д, мм (±4)	941
		Е, мм (±4)	546

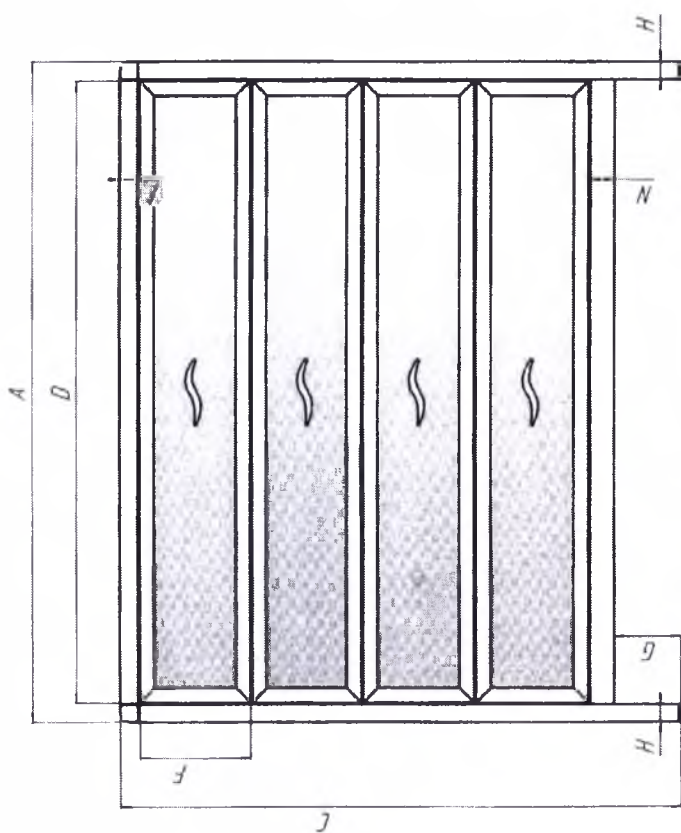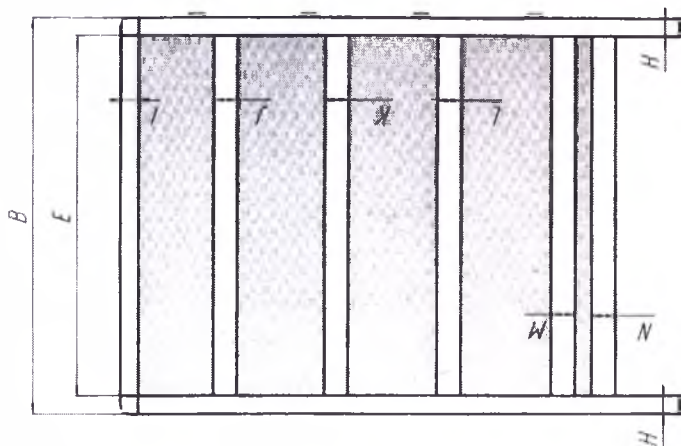

F, мм (± 4) 168

G, мм (± 4) 100

H, мм (± 4) 27

I, мм (± 4) 27

J, мм (± 4) 36

K, мм (± 4) 36

L, мм (± 4) 36

M, мм (± 4) 36

N, мм (± 4) 36

Масса: 47 кг (± 3)

Стол-тумба медицинский комплектуется выдвижными ящиками в количестве четырех штук.

Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий

СТ-ТС 01.00



Габаритные размеры СТ-ТС 01.00

A, мм (± 4) 1000

B, мм (± 4) 600

C, мм (± 4) 850

D, мм (± 4) 487

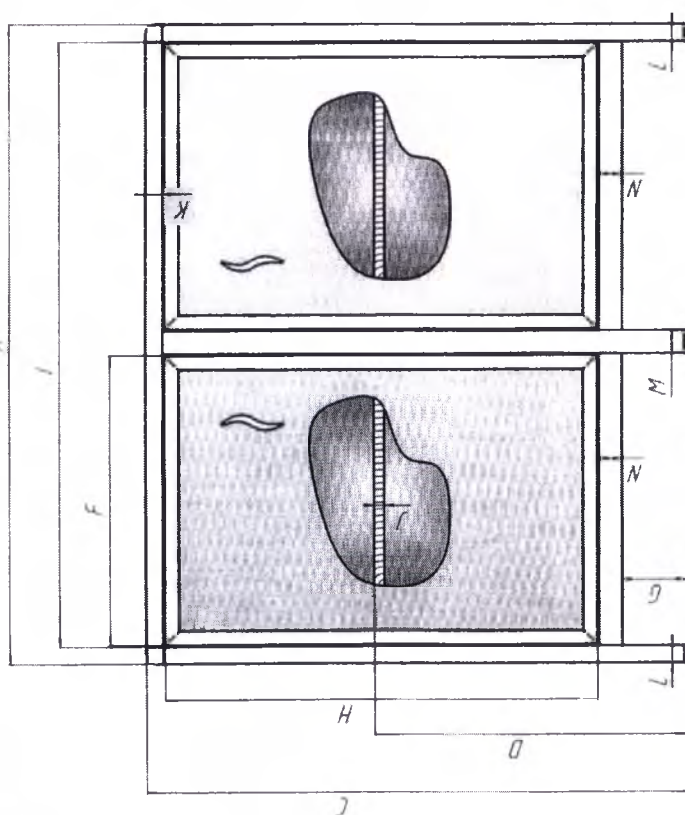
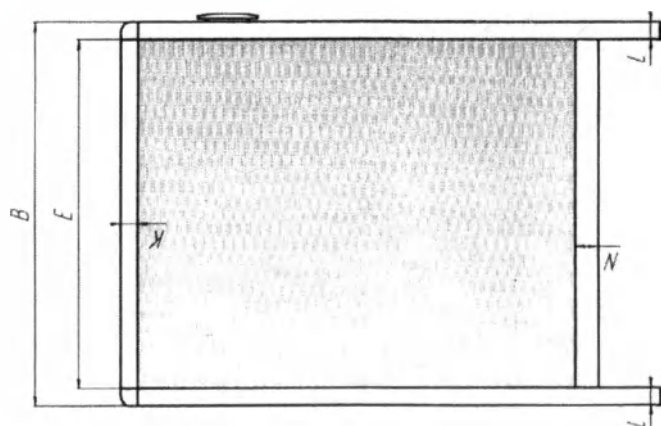


E, мм (± 4)	546
F, мм (± 4)	450
G, мм (± 4)	100
H, мм (± 4)	681
I, мм (± 4)	946
J, мм (± 4)	16
K, мм (± 4)	27
L, мм (± 4)	27
M, мм (± 4)	36
N, мм (± 4)	36

Масса: 41 кг (± 3)

Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью.

4	Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СТ-ТС 01.01	Габаритные размеры	СТ-ТС 01.01
		A, мм (± 4)	1000
		B, мм (± 4)	600
		C, мм (± 4)	850
		D, мм (± 4)	487

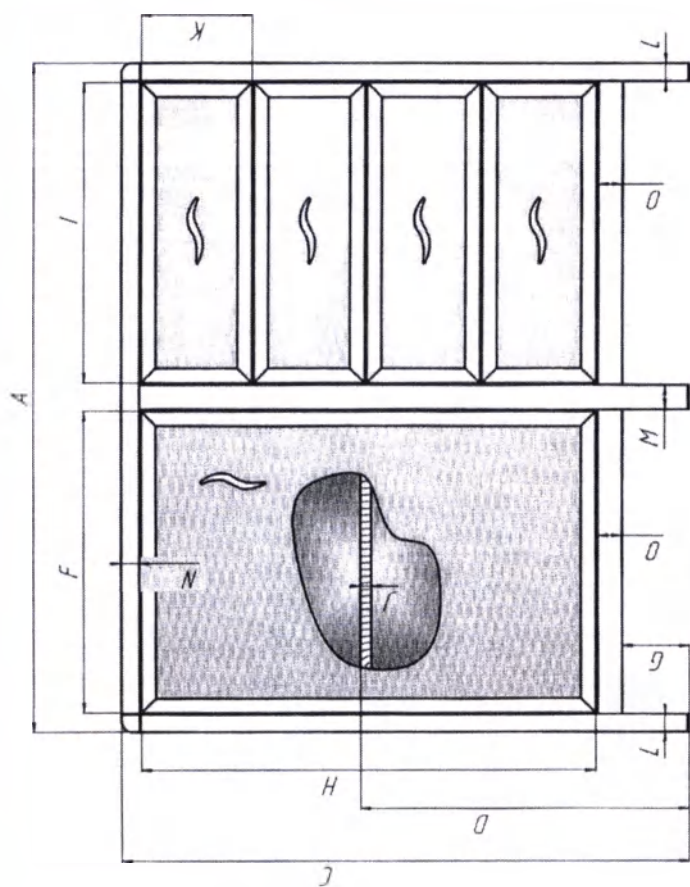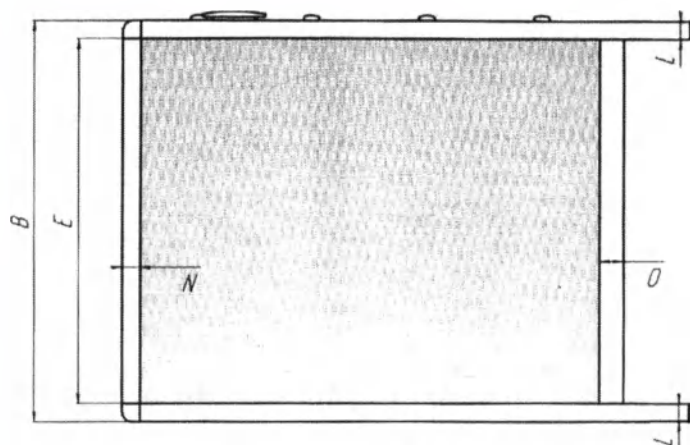

E, мм (± 4)	546
F, мм (± 4)	450
G, мм (± 4)	100
H, мм (± 4)	681
I, мм (± 4)	450
J, мм (± 4)	16
K, мм (± 4)	168
L, мм (± 4)	27
M, мм (± 4)	36
N, мм (± 4)	27
O, мм (± 4)	36


Масса: 45 кг (± 3)

Стол-тумба медицинский комплектуется одним отделением с одной полкой и закрытым одной дверью и вторым отделением с выдвижными ящиками в количестве четырех штук.

Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий

СТ-ТС 01.02

Габаритные размеры	СТ-ТС 01.02
A, мм (± 4)	1000
B, мм (± 4)	600
C, мм (± 4)	850
D, мм (± 4)	168

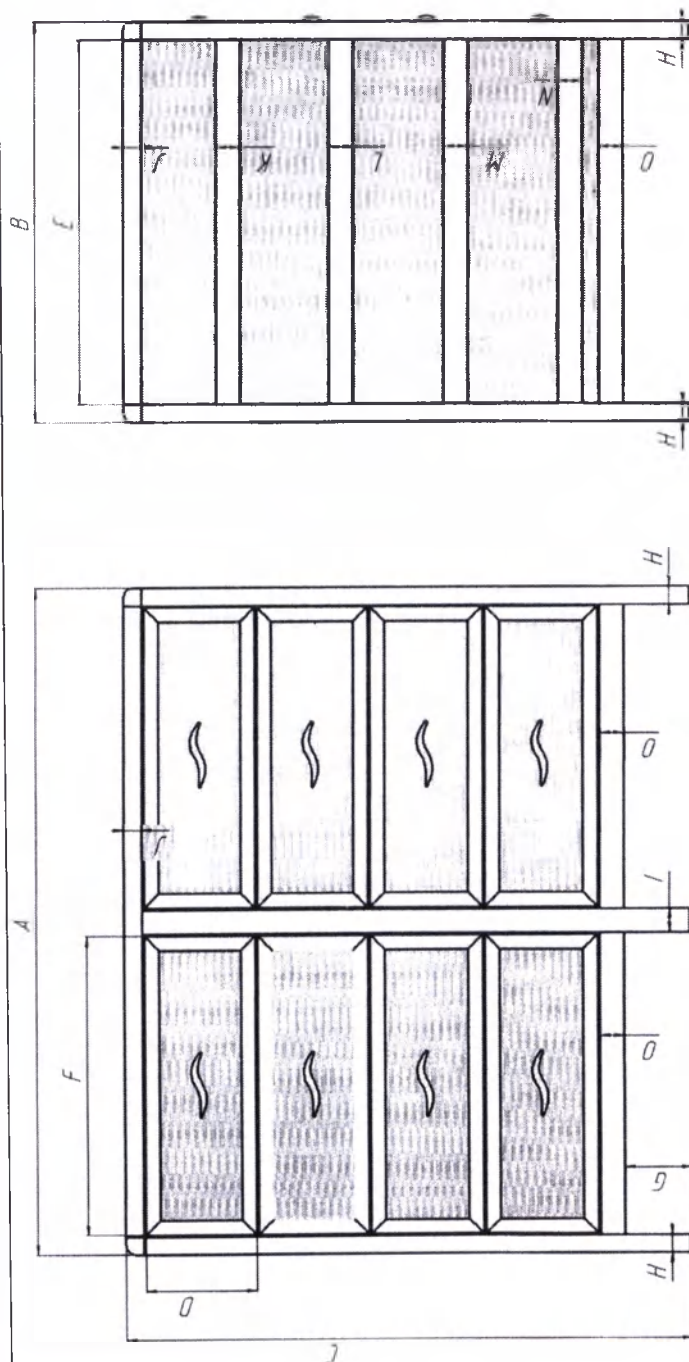


E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	450
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	27
I, мм (±4)	36
J, мм (±4)	27
K, мм (±4)	36
L, мм (±4)	36
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	36
O, мм (±4)	36

Масса: 52 кг (±3)

Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет выдвижные ящики в количестве четырех штук.

6	Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.00	Габаритные размеры	СТ-ТС 02.00
		A, мм (±4)	1000
		B, мм (±4)	600
		C, мм (±4)	850
		D, мм (±4)	135


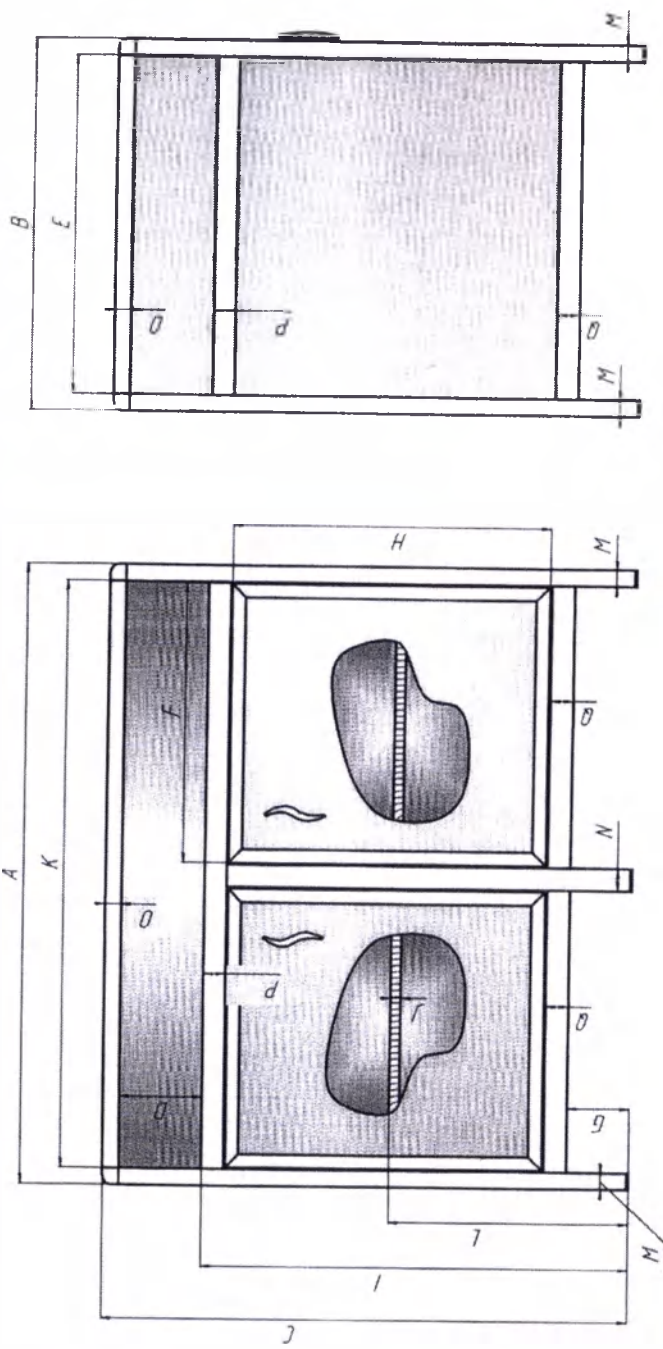


E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	450
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	510
I, мм (±4)	688
J, мм (±4)	16
K, мм (±4)	946
L, мм (±4)	382
M, мм (±4)	27
N, мм (±4)	36
O, мм (±4)	27
P, мм (±4)	36
Q, мм (±4)	36

Масса: 45 кг (±3)

Стол-тумба медицинский комплектуется открытой нишей и двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью.

7	Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.01	Габаритные размеры	СТ-ТС 02.01
		A, мм (±4)	1000
		B, мм (±4)	600
		C, мм (±4)	850

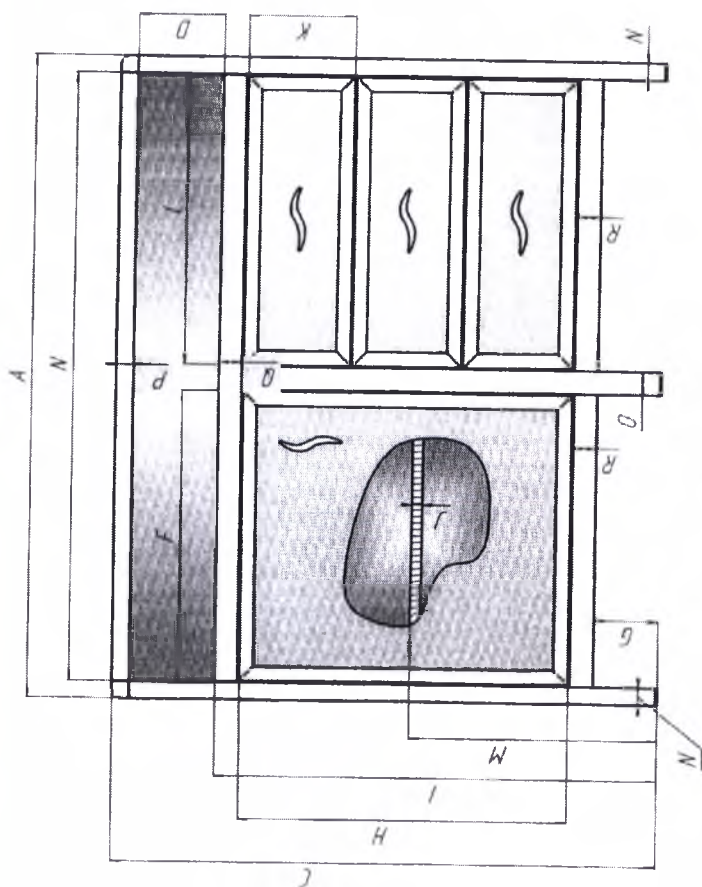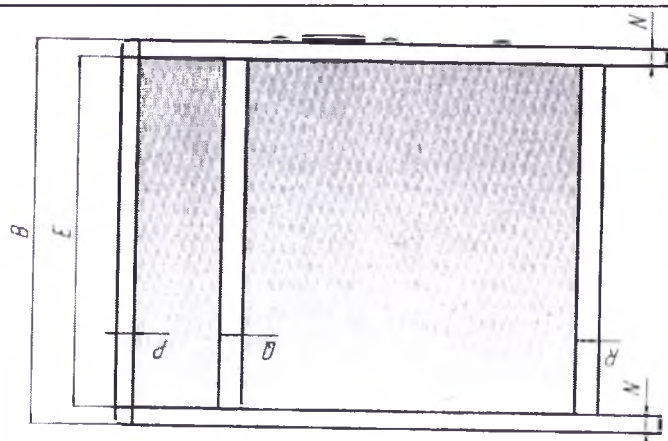


D, мм (±4)	135
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	450
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	510
I, мм (±4)	688
J, мм (±4)	16
K, мм (±4)	168
L, мм (±4)	450
M, мм (±4)	382
N, мм (±4)	27
O, мм (±4)	36
P, мм (±4)	27
Q, мм (±4)	36
R, мм (±4)	36

Масса: 45 кг (±3)

Стол-тумба медицинский комплектуется открытой нишей и двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью.

8	Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.02	Габаритные размеры	СТ-ТС 02.02
		A, мм (±4)	1000
		B, мм (±4)	600
		C, мм (±4)	850
		D, мм (±4)	135

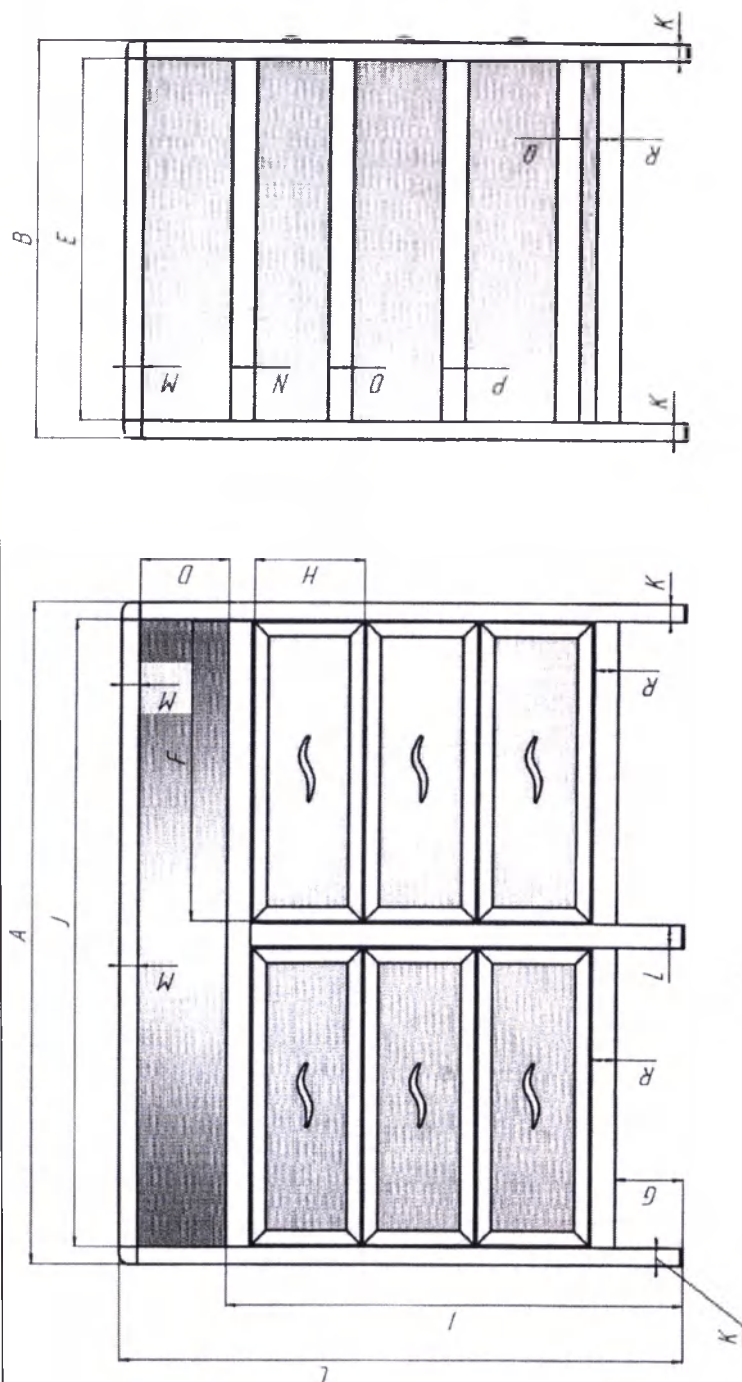

E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	450
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	168
I, мм (±4)	688
J, мм (±4)	946
K, мм (±4)	27
L, мм (±4)	36
M, мм (±4)	27
N, мм (±4)	36
O, мм (±4)	36
P, мм (±4)	36
Q, мм (±4)	36
R, мм (±4)	36



Масса: 45 кг (±3)

Стол-тумба медицинский комплектуется открытой нишей и двумя отделениями, каждое из которых имеет выдвижные ящики в количестве трех штук.

Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий

СТ-ТС 02.03

Габаритные размеры	СТ-ТС 02.03
A, мм (±4)	1000
B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850

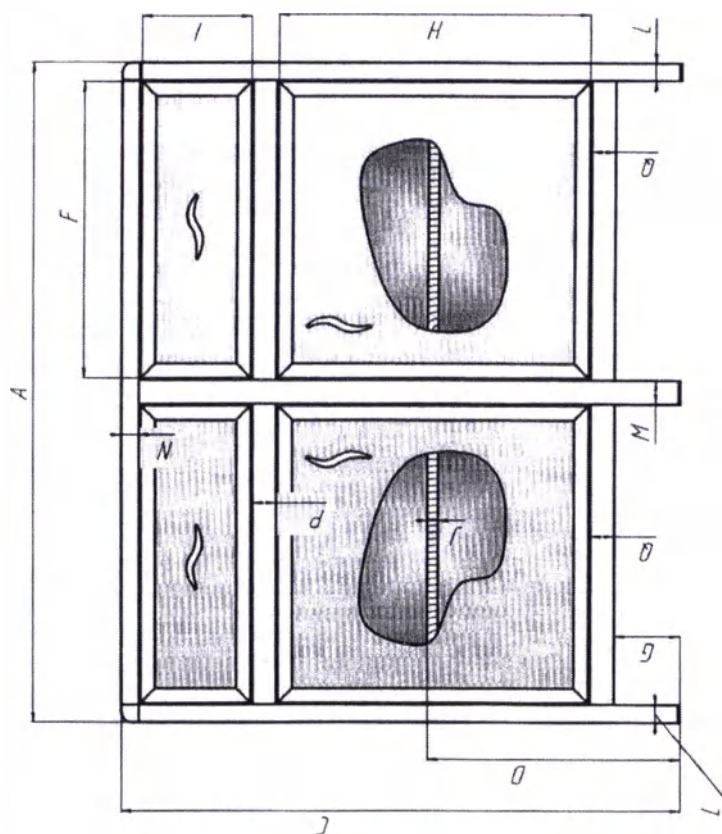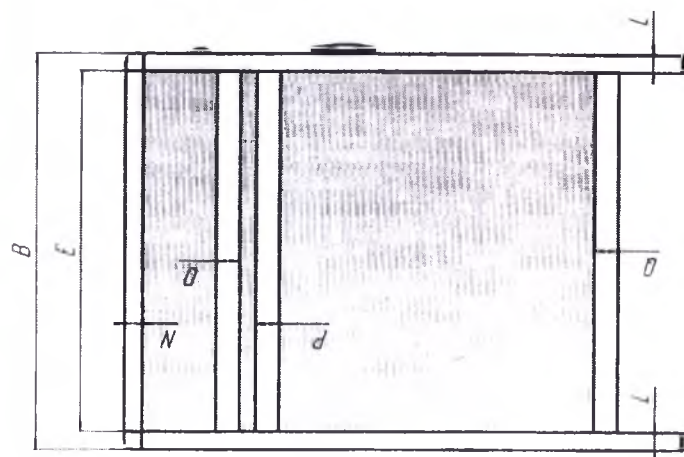

D, мм (± 4)	382
E, мм (± 4)	546
F, мм (± 4)	450
G, мм (± 4)	100
H, мм (± 4)	471
J, мм (± 4)	16
L, мм (± 4)	27
M, мм (± 4)	36
N, мм (± 4)	27
O, мм (± 4)	36
P, мм (± 4)	36
Q, мм (± 4)	36
I, мм (± 4)	168


Масса: 45 кг (± 3)

Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет один выдвижной ящик и одну полку, отделение закрыто одной дверью.

Стол-тумба медицинский для клинко-диагностических лабораторий

СТ-ТС 02.04

Габаритные размеры	СТ-ТС 02.04
A, мм (± 4)	1500
B, мм (± 4)	600
C, мм (± 4)	850


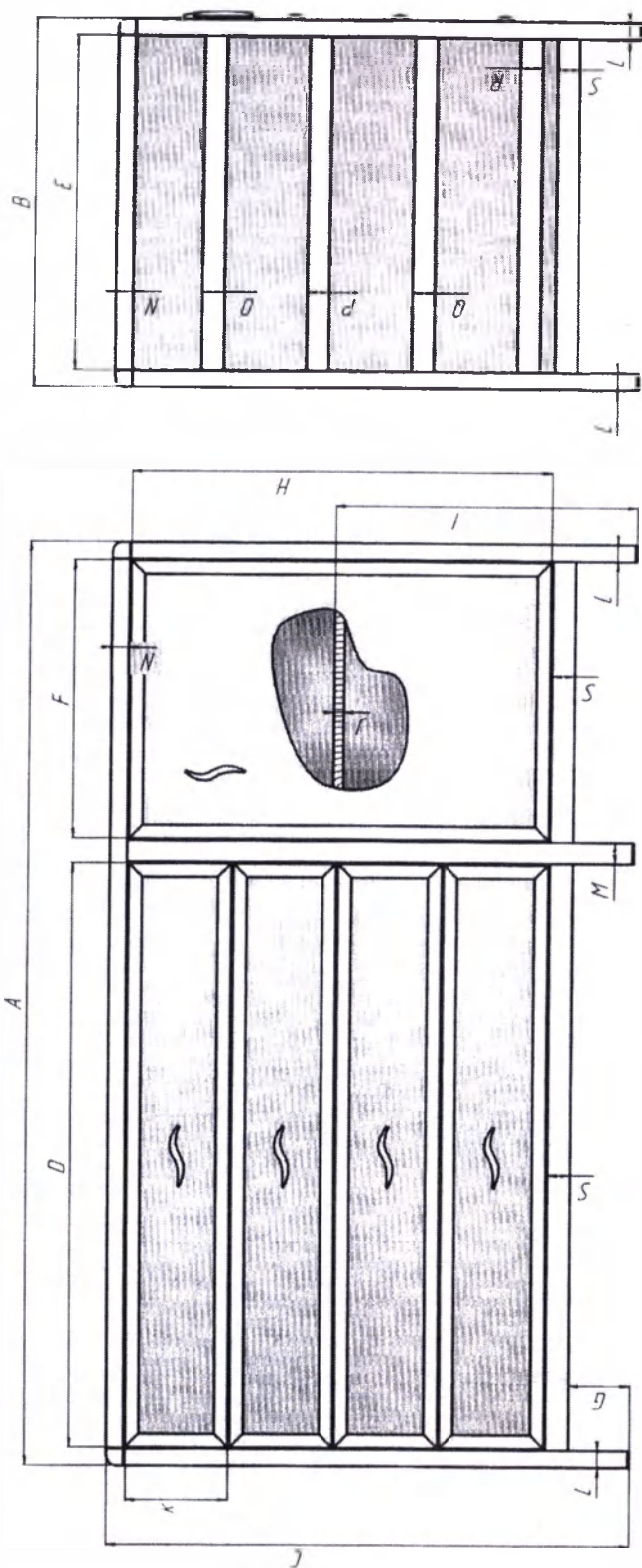


D, мм (±4)	947
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	453
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	681
I, мм (±4)	487
J, мм (±4)	16
K, мм (±4)	168
L, мм (±4)	27
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	27
O, мм (±4)	36
P, мм (±4)	36
Q, мм (±4)	36
R, мм (±4)	36
S, мм (±4)	36

Масса: 61 кг (±3)

Стол-тумба медицинский комплектуется одним отделением с выдвижными ящиками в количестве четырех штук и одним отделением с одной полкой закрытым одной дверью.

1 1	Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.05	Габаритные размеры	СТ-ТС 02.05
		A, мм (±4)	1500

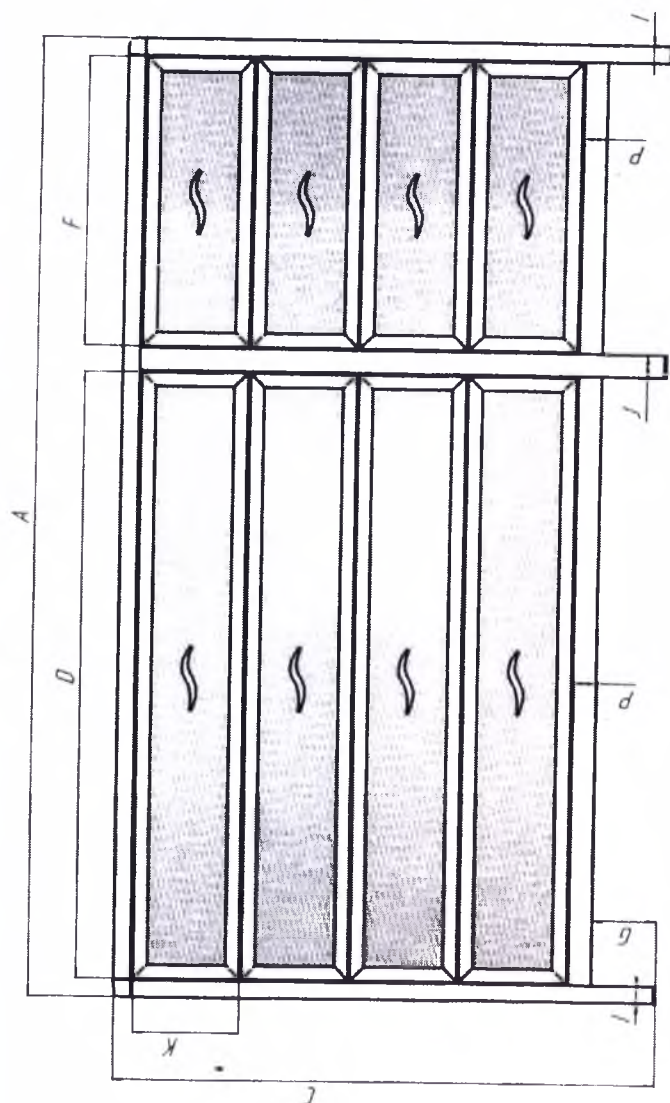
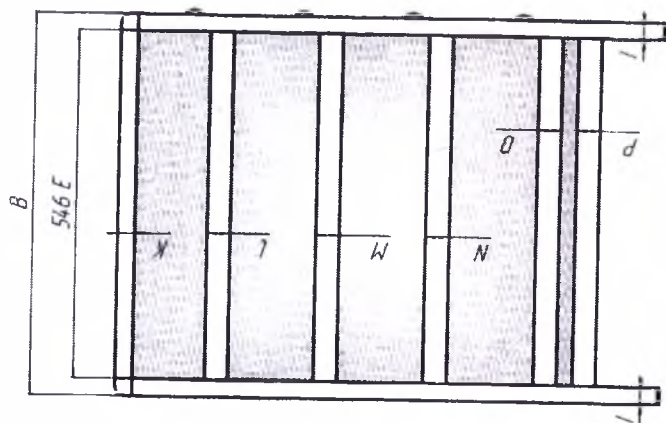


B, мм (±4)	600
C, мм (±4)	850
D, мм (±4)	947
E, мм (±4)	546
F, мм (±4)	453
G, мм (±4)	100
H, мм (±4)	168
I, мм (±4)	27
J, мм (±4)	36
K, мм (±4)	27
L, мм (±4)	36
M, мм (±4)	36
N, мм (±4)	36
O, мм (±4)	36
P, мм (±4)	36


Масса: 66 кг (±3)

Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет выдвижные ящики в количестве четырех штук.

1 2	Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СТ-ТС 03.00	Габаритные размеры	СТ-ТС 03.00
		А, мм (± 4)	1500
		В, мм (± 4)	600
		С, мм (± 4)	850
		Д, мм (± 4)	487
		Е, мм (± 4)	546
		F, мм (± 4)	453
		G, мм (± 4)	100
		H, мм (± 4)	681
		I, мм (± 4)	16
		J, мм (± 4)	27
		K, мм (± 4)	36
		L, мм (± 4)	27
		M, мм (± 4)	36
		Масса: 58 кг (± 3) Стол-тумба медицинский комплектуется тремя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью.	

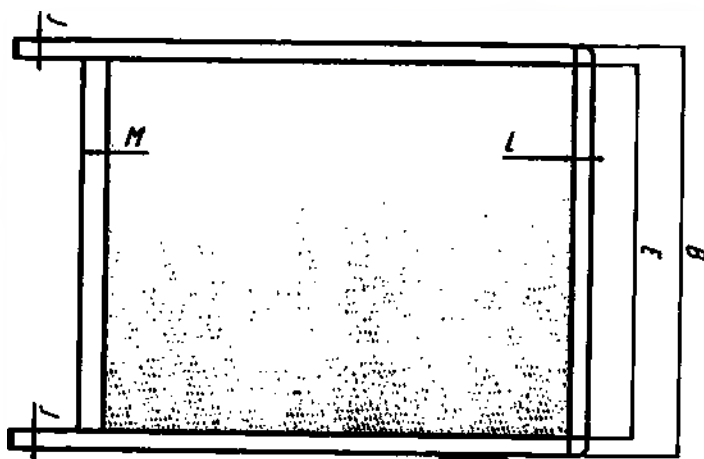
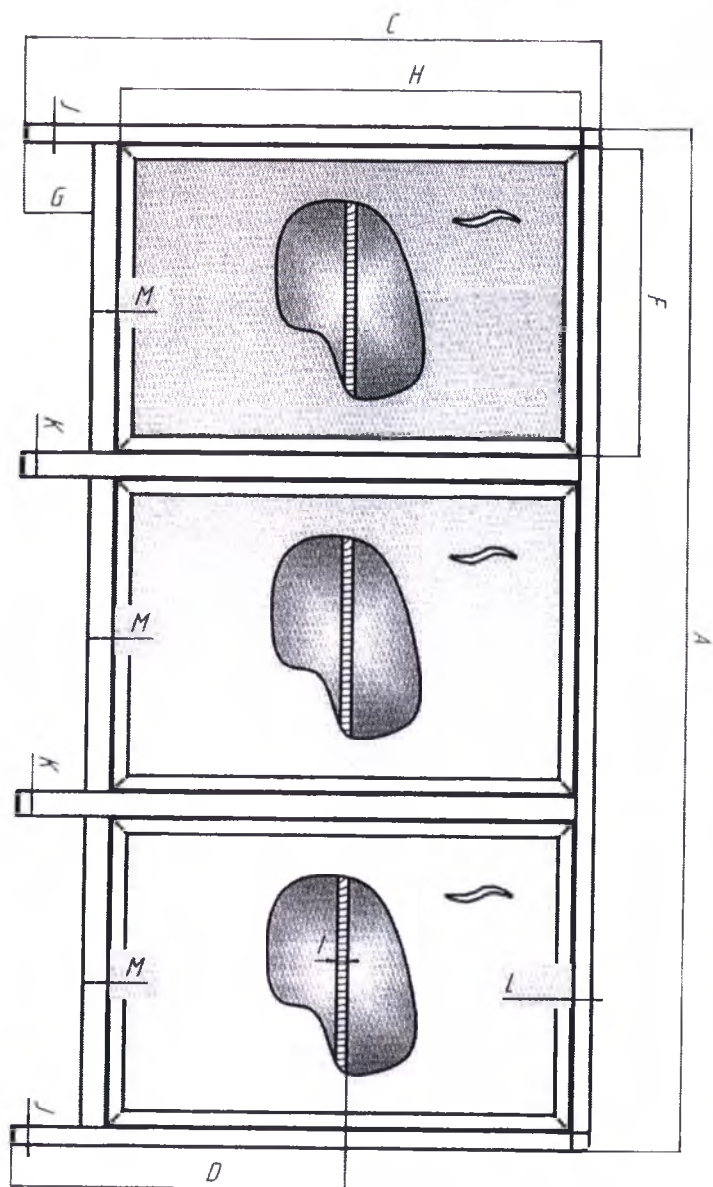


1 3	Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 03.01	Габаритные размеры	СТ-ТС 03.01
		A, мм (±4)	1500
		B, мм (±4)	600
		C, мм (±4)	850
		D, мм (±4)	339
		E, мм (±4)	546
		F, мм (±4)	453
		G, мм (±4)	100
		H, мм (±4)	681
		I, мм (±4)	487
		J, мм (±4)	16
		K, мм (±4)	453
		L, мм (±4)	27
		M, мм (±4)	36
		N, мм (±4)	27
		O, мм (±4)	36
Масса: 60 кг (±3) Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью и одним отделением с двумя выдвижными ящиками.			

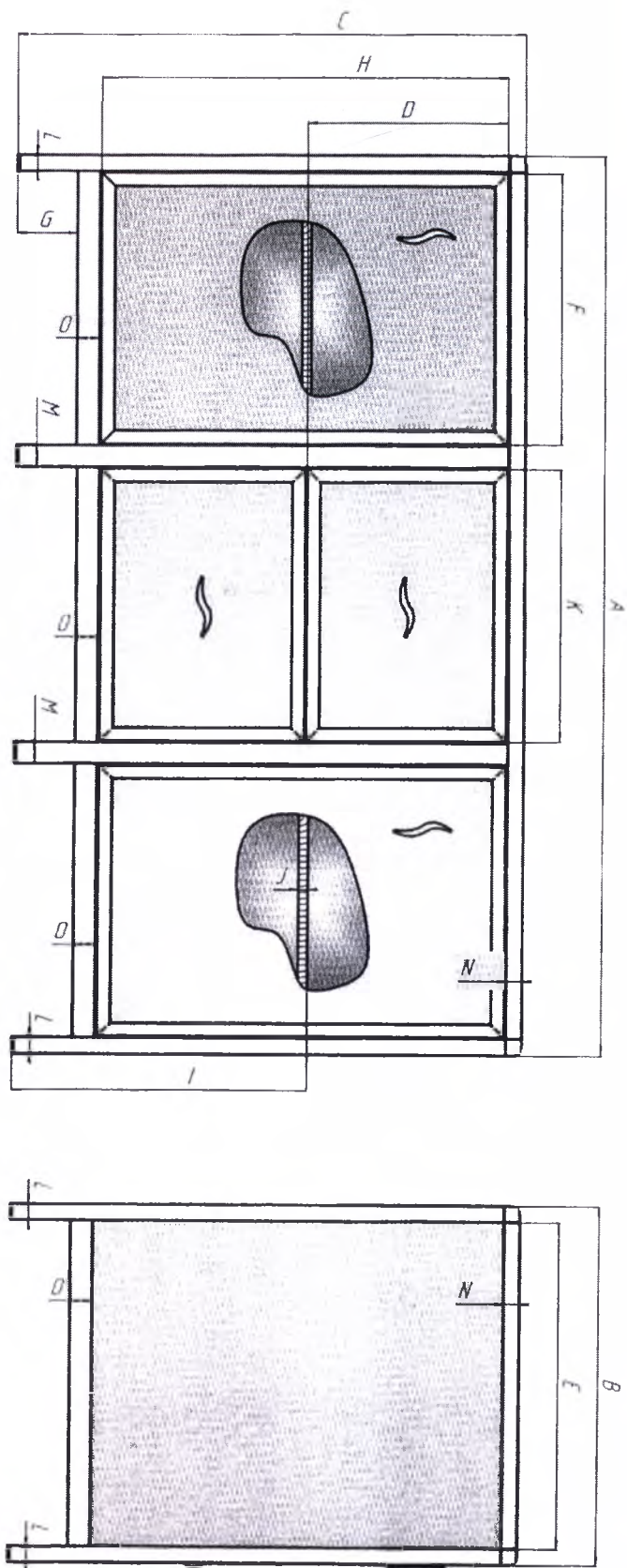

Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий

СТ-ТС 03.02

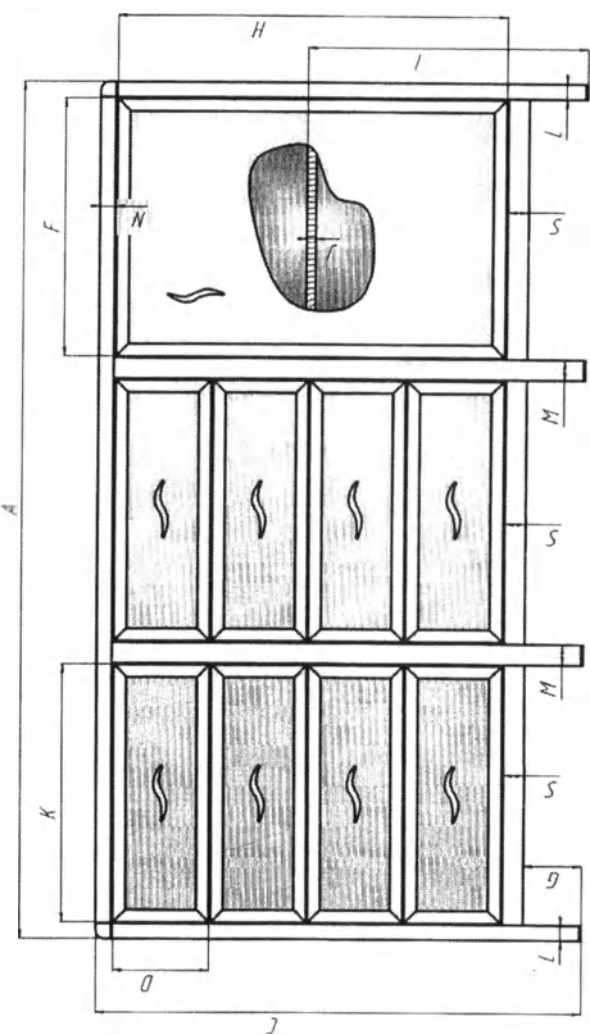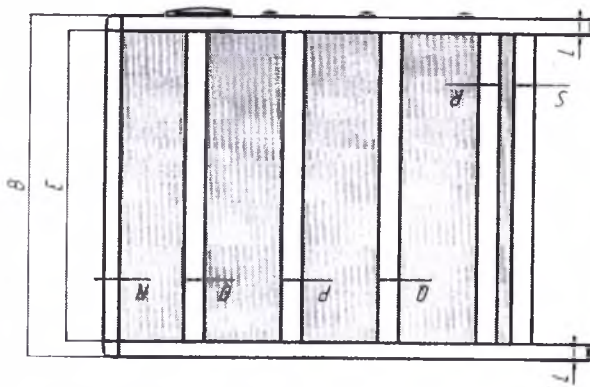

Габаритные
размеры

СТ-ТС 03.02



A, мм (± 4)	1500
B, мм (± 4)	600
C, мм (± 4)	850
D, мм (± 4)	168
E, мм (± 4)	546
F, мм (± 4)	453
G, мм (± 4)	100
H, мм (± 4)	681
I, мм (± 4)	487
J, мм (± 4)	16
K, мм (± 4)	453
L, мм (± 4)	27
M, мм (± 4)	36
N, мм (± 4)	27
O, мм (± 4)	36
P, мм (± 4)	36
Q, мм (± 4)	36
R, мм (± 4)	36
S, мм (± 4)	36

Масса: 73 кг (± 3)

Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет по четыре выдвигаемых ящика и одним

Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий

СТ-ТС 03.03

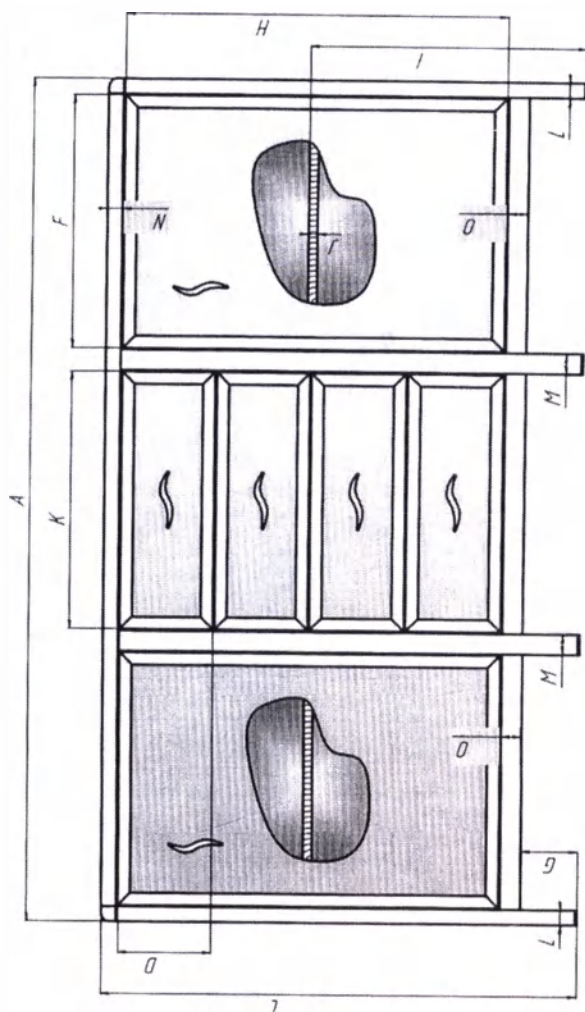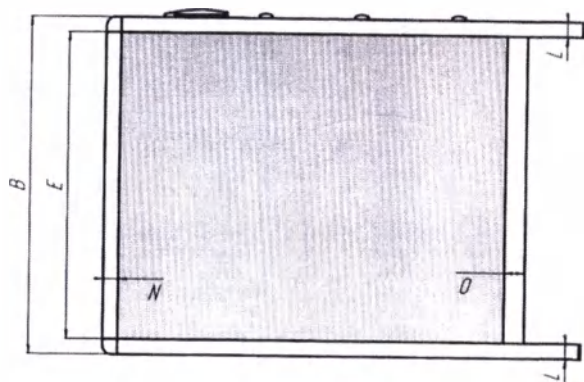

отделением с одной полкой,
закрытым одной дверью.

Габаритные
размеры

СТ-ТС 03.03

A, мм (± 4)

1500

B, мм (± 4)

600

C, мм (± 4)

850

D, мм (± 4)

168

E, мм (± 4)

546

F, мм (± 4)

453

G, мм (± 4)

100

H, мм (± 4)

681

I, мм (± 4)

487

J, мм (± 4)

16

K, мм (± 4)

453

L, мм (± 4)

27

M, мм (± 4)

36

N, мм (± 4)

27

O, мм (± 4)

36



Масса: 66 кг (± 3)

Стол-тумба медицинский комплектуется двумя отделениями, каждое из которых имеет одну полку и закрыто одной дверью и одним отделением с выдвижными ящиками в количестве четырех штук.

Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий
СТ-ТС 04.00



**Габаритные
размеры****СТ-ТС04.00**А, мм (± 4) 1500В, мм (± 4) 600С, мм (± 4) 850D, мм (± 4) 339Е, мм (± 4) 546F, мм (± 4) 453G, мм (± 4) 100H, мм (± 4) 168I, мм (± 4) 27J, мм (± 4) 36K, мм (± 4) 27L, мм (± 4) 36M, мм (± 4) 36N, мм (± 4) 36O, мм (± 4) 36**Масса: 71 кг (± 3)**

*Стол-тумба медицинский
комплектуется тремя
отделениями, каждое из
которых имеет по три
выдвижных ящика.*

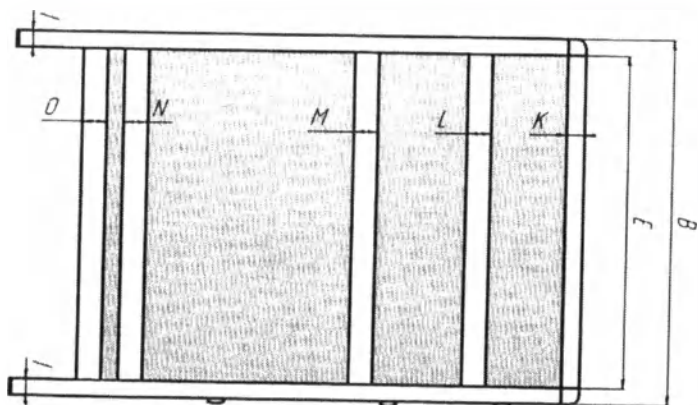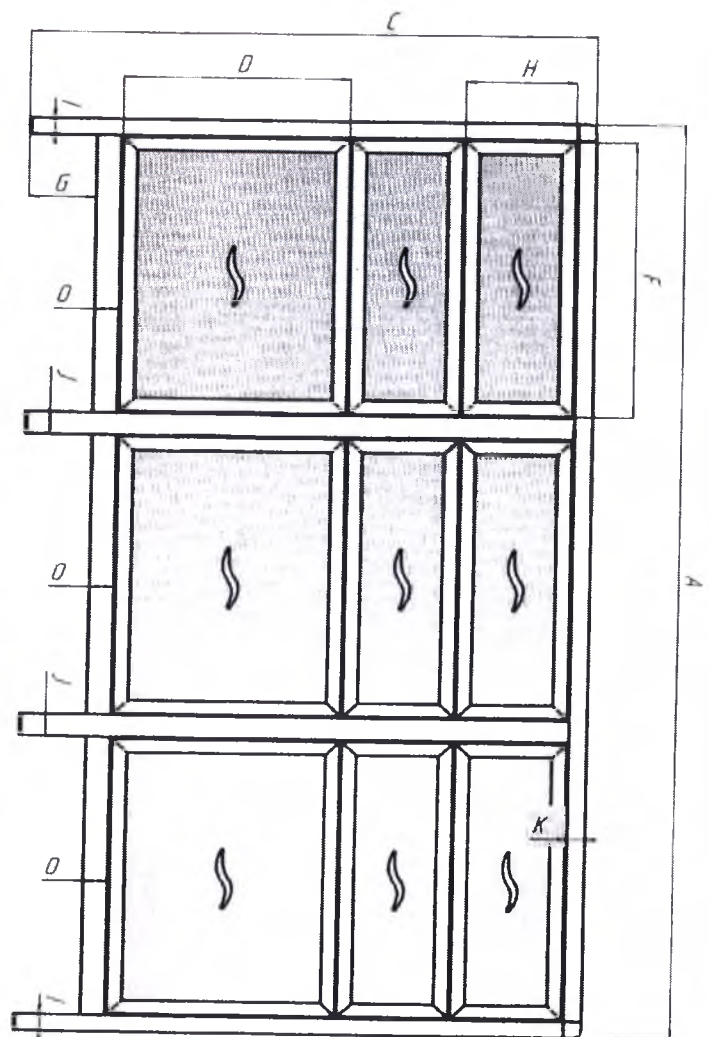

Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий

СТ-ТС 04.01

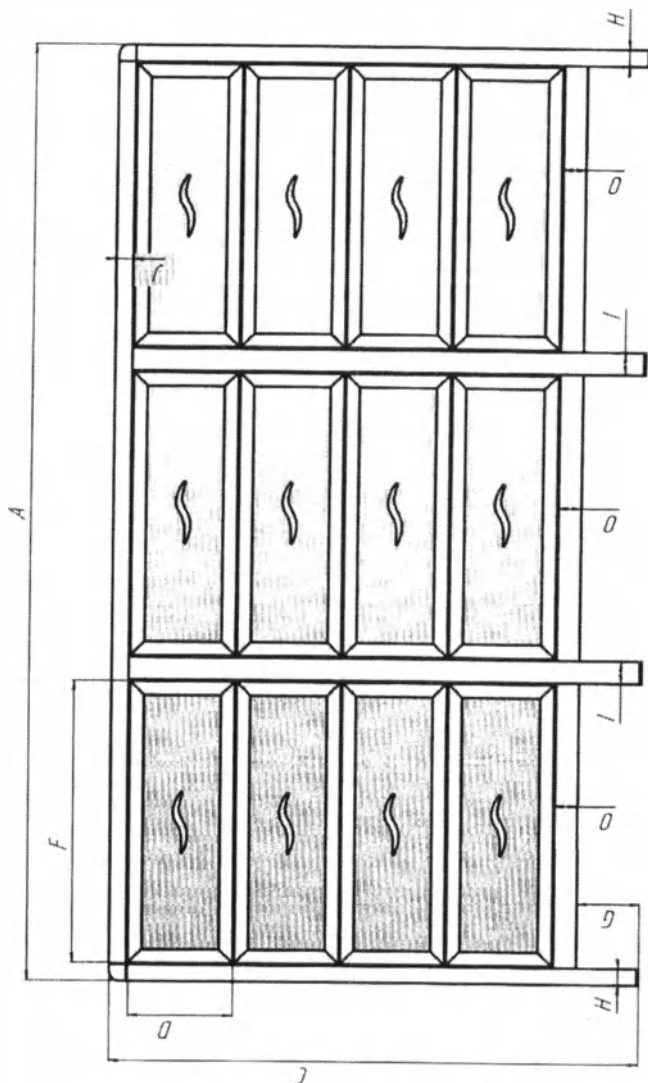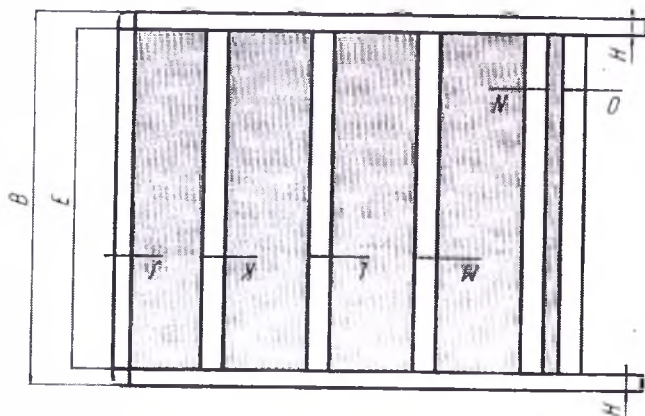

Габаритные
размеры

СТ-ТС 04.01

A, мм (± 4)

1500

B, мм (± 4)

600

C, мм (± 4)

850

D, мм (± 4)

168

E, мм (± 4)

546

F, мм (± 4)

453

G, мм (± 4)

100

H, мм (± 4)

27

I, мм (± 4)

36

J, мм (± 4)

27

K, мм (± 4)

36

L, мм (± 4)

36

M, мм (± 4)

36

N, мм (± 4)

36


O, мм (± 4)

36

Масса: 81 кг (± 3)

Стол-тумба медицинский комплектуется тремя отделениями, каждое из которых имеет по четыре выдвижных ящика.

Дверь и ящик (в разрезе)

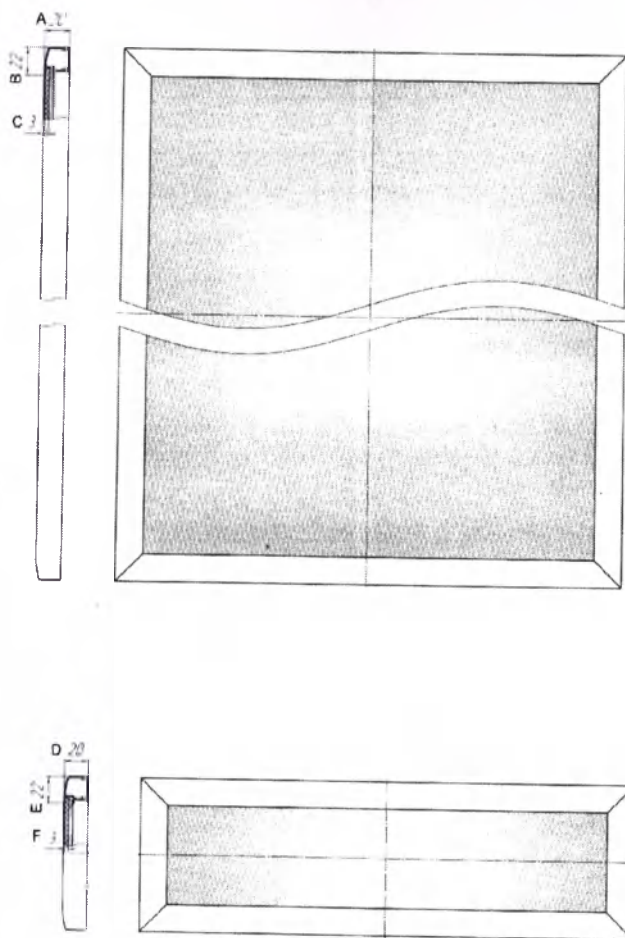

Габаритный размер	Значение габаритного параметра
A	20 мм (± 4 мм)
B	22 мм (± 4 мм)
C	3 мм
D	20 мм (± 4 мм)
E	22 мм (± 4 мм)
F	3 мм

1
8

Максимальная допустимая нагрузка на столы - 30кг.

Максимальная допустимая нагрузка на полки - 10кг.

Максимальная допустимая нагрузка на ящики - 6кг.

Замки магнитные должны быть неподвижно и прочно закреплены на дверях столов (СТ-ТС 01.00; СТ-ТС 01.01; СТ-ТС 02.00; СТ-ТС 02.01; СТ-ТС 02.03; СТ-ТС 02.04; СТ-ТС 03.00; СТ-ТС 03.01; СТ-ТС 03.02; СТ-ТС 03.03) и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Стол-тумба лабораторный для клиничко-диагностических лабораторий СТ-ТС XX.XX	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

4. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие столов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации столов составляет 18 (восемнадцать) месяцев.

Средний срок службы - 7 лет со дня его продажи.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений столов, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. В пределах одного населенного пункта столы допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования – при температуре от -50 °С до +50 °С, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность столов от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50 °С до +40 °С, влажности – не более 75 %.

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от +10 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха – не более 75%.

6. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления столы для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02, а также соблюдаться нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования столы не должно происходить разложения и выделения вредных веществ, а также должны выполняться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7 ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении столов (при наличии) следует проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы столов должна быть утилизирована в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Наименование	Артикул
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 00.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 00.01
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 01.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 01.01
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 01.02
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.01
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.02
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.03
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.04
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 02.05
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 03.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 03.01
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 03.02
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 03.03
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 04.00
	Стол-тумба медицинский	СТ-ТС 04.01

Соответствует ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

Предприятие-изготовитель: ООО «Техстрой»

Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.

Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское ш., д.1.

Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Стол-тумба медицинский

(наименование и тип изделия)

ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____

(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____

(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Стол-тумба медицинский

(наименование и тип изделия)

ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____

(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____

(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

Предприятие-изготовитель: **ООО «Техстрой»**

Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.

Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское шоссе, д.1.

Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол-тумба медицинский
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 4
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Стол-тумба медицинский
(наименование и тип изделия)
ТУ 32.50.30-006-14692415-2019
(номер ГОСТ или ТУ)

Заводской номер _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Дата выпуска _____
(месяц, год)

Дата продажи со склада предприятия-изготовителя _____

М.П.

Предприятие-изготовитель: **ООО «Техстрой»**

Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 193, П 10.

Место производства: ООО «Техстрой», 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
Стеклозаводское ш., д.1.


Тел.: (83159)2-11-71, 2-20-36, 2-20-12

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

www.tehstroj-nn.ru

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на
(27 двадцати семи) листах

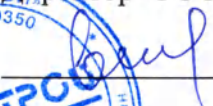

Директор ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.