

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**Контейнеры полимерные для биоматериала АНПУ.942844.001ТУ**

**1. Назначение.**

Контейнер полимерный для биоматериала (далее – изделие), предназначенный для сбора и транспортировки на общеклинические исследования проб: мочи и кала.

Изделие применяется в медицинских учреждениях (больницы, поликлиники), в лабораториях, научно-исследовательских учреждениях фельдшером лаборантом или в быту пациентом самостоятельно.

**2. Описание изделия**

Контейнеры представляют собой полые цилиндрические емкости, с завинчивающейся крышкой и плоским дном. Некоторые контейнеры с внутренней стороны крышки имеют вмонтированный шпатель для заполнения твердым или полужидким материалом. Контейнеры имеют градуировку для удобного контроля объема взятой пробы.

Контейнеры выпускаются нестерильными и предназначены для однократного применения.

Контейнеры изготавливают из полипропилена. Полипропилен – механически прочный ригидный материал, плотность 0,91 г/см<sup>3</sup>, высоко устойчив к температурным воздействиям (от -196°С до +121°С), устойчив к действию химических агентов (кроме ароматических и галоген содержащих углеводородов).

**3. Варианты исполнения**

| Наименование                                                                                                                     | Артикул   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Контейнер полимерный для сбора биоматериала (контейнер и крышка раздельно), номинальная вместимость 60 мл, 42,5х64 мм.           | КП-60-01  |
| Контейнер полимерный для сбора биоматериала (контейнер и крышка в сборе), номинальная вместимость 60 мл, 42,5х64 мм.             | КП-60-02  |
| Контейнер полимерный для сбора биоматериала (в индивидуальной упаковке), номинальная вместимость 60 мл, 42,5х64 мм.              | КП-60-03  |
| Контейнер полимерный для сбора биоматериала (в индивидуальной упаковке со шпателем), номинальная вместимость 60 мл, 42,5х64 мм.  | КП-60-06  |
| Контейнер полимерный для сбора биоматериала (контейнер и крышка в сборе со шпателем), номинальная вместимость 60 мл, 42,5х64 мм. | КП-60-07  |
| Контейнер полимерный для сбора биоматериала (контейнер и крышка раздельно), номинальная вместимость 120 мл, 60х71 мм.            | КП-120-01 |
| Контейнер полимерный для сбора биоматериала (контейнер и крышка в сборе), номинальная вместимость 120 мл, 60х71 мм.              | КП-120-02 |
| Контейнер полимерный для сбора биоматериала (в индивидуальной упаковке), номинальная вместимость 120 мл, 60х71 мм.               | КП-120-03 |

**4. Технические характеристики**

- Номинальная вместимость в зависимости от варианта исполнения - 60 или 120 мл.;
- Масса изделия в сборе, г:
  - для контейнеров номинальной вместимостью 60 мл - 7±1,5;
  - для контейнеров номинальной вместимостью 120 мл - 11±2.
- Размеры изделия в сборе, мм:

- для контейнеров номинальной вместимостью 60 мл - 42,5±2х64±3;
- для контейнеров номинальной вместимостью 120 мл - 60±3х71±3.

**5. Противопоказания к применению.**

При использовании изделий по назначению и в соответствии с данным руководством противопоказаний и ограничений в применении нет.

**6. Подготовка изделия к работе.**

Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

**7. Меры предосторожности.**

Хранить вдали от огня и источников тепла.

Не использовать после истечения срока годности или если упаковка повреждена.

Не применять повторно.

Не использовать не по назначению.

**8. Порядок работы изделия.**

- Изделие использовать при отборе материала на лабораторное исследование, не требующее соблюдения стерильных или асептических условий;
- Выбрать контейнер в соответствии с объемом образца и целью исследования;
- Вскрыть крышку контейнера и поместить пробу внутрь (для твердых и полужидких образцов использовать ложку-шпатель);
- Тщательно закрыть крышку, поместить контейнер в переноску и транспортировать в лабораторию.
- При сборе мочи на анализ по Нечипоренко:
  - Собирают утреннюю мочу у подготовленного соответствующим образом пациента
  - Вскрыть контейнер, начать мочеиспускание в унитаз и через 2-3 сек. подставить контейнер для сбора анализа;
  - Наполнить контейнер примерно на ¾
  - Плотно закрыть контейнер с пробой и промаркировать образец.

**9. Правила хранения**

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухих проветриваемых помещениях при температуре от -50°С до +40°С и относительной влажности не более 80 %, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

В процессе хранения изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий, не должно подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ.

**10. Утилизация**

После окончания эксплуатации изделия подлежат утилизации по правилам, предусмотренным в СанПин 2.1.7.2790-10 для отходов класса "Б".


**11. Гарантии изготовителя**

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок хранения изделия составляет 36 месяцев с даты производства.

Дата упаковывания: \_\_\_\_\_

Регистрационное удостоверение № ФСР 2019/\*\*\*\*\* от \*\*.\*.\*\*\*\*г.

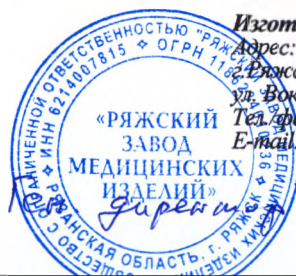

Изготовитель: ООО «Рязжский завод медицинских изделий»

Адрес: Россия, 391962, Россия, Рязанская обл., Рязжский р-н,

г. Рязжск,

ул. Вокзальная, 1Б, лит. Б2, каб. 1

Тел./факс (495) 199-35-23.

E-mail: [ovodov@kmpus.com](mailto:ovodov@kmpus.com)