

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «НПО АСТА»



**Контейнеры и кровопроводящие магистрали с иглами, для сбора,
разделения, хранения крови и компонентов крови, пустые и с
антикоагулянтами**

Инструкция пользователя

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АСТА"

107014, г. Москва, ул. Барболина 3, корп. 5, а/я 453

Тел.: (495) 781-04-08

e-mail: blood@asta.ru <http://www.asta.ru>



Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd.

Контейнеры и кровопроводящие магистрали с иглами, для сбора, разделения, хранения крови и компонентов крови, пустые и с антикоагулянтами.

Предназначены для сбора цельной крови человека, разделения ее на компоненты и хранения компонентов крови.

Предупреждения:

- Не использовать при наличии любых видимых признаков повреждения первичной упаковки и контейнера.
- Не использовать при помутнении антикоагулянта.

Инструкция по применению:

1. Установить на донорских весах величину объема цельной крови, планируемой для сбора.
2. Контейнер для сбора крови разместить на весах ниже руки донора и пережать донорскую магистраль зажимом.
3. Наложить манжету и продезинфицировать место венепункции.
4. Накачать манжету до значения давления 60 мм ртутного столба.
5. Удалить защитный колпачок с иглы как описано ниже:
 - 5.1. Защитный колпачок повернуть круговым движением для того, чтобы сломался замок.
 - 5.2. Удалить защитный колпачок с иглы, двигая его параллельно игле, не задевая кончик и срез иглы.
6. Выполнить венепункцию, удалить зажим.

Предонационный сбор образца крови (при использовании дополнительного контейнера):

- Убедитесь, что основная линия донации закрыта, а зажим перед контейнером для сбора первой порции крови открыт.
- Заполните контейнер для сбора первой порции крови (достаточное количество крови для проведения исследований).
- Закройте зажим на магистрали для сбора первой порции крови.
- Откройте зажим на магистрали донора и начните процесс донации. Убедитесь, что кровь начала перемешиваться с антикоагулянтом сразу после попадания ее в первичный контейнер.
- Соберите образцы крови, используя адаптер для вакуумных пробирок и промаркируйте собранные образцы.

7. Перемешивать кровь с антикоагулянтом во время процедуры донации и сразу после нее.
8. После сбора соответствующего количества цельной крови наложить зажим на донорскую магистраль. Пережать донорскую магистраль клипсой при помощи ручного запаивателя между зажимом и первичным контейнером.
9. Перерезать магистраль между зажимом и клипсой, взять необходимое количество крови донора для исследований.
10. Снизить давление в манжете и удалить иглу.
11. Выдавить кровь из донорской магистрали в контейнер, перемешать и дать магистрали снова заполниться.
12. Запаять донорскую магистраль в нескольких местах для получения образцов для исследований.
13. Контейнер с цельной кровью хранить при температуре +1+6°C.
14. Эритроцитарную массу хранить при температуре +1+4°C не более 35 дней.
15. Эритроцитарную взвесь хранить при температуре +1+4°C не более 42 дней.
16. Плазму хранить при температуре -20⁰-40⁰ C в соответствии с действующими нормативными документами.
17. Концентрат тромбоцитов хранить при температуре +22⁰C в течение 5 дней.

Производитель:

SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO.,LTD.

NO.312 SHICHANG ROAD, WEIHAI, CHINA

Tel: 0086-631-562256

Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ – ЗАО «НПО АСТА»

107014 г. Москва ул. Барболина д.3 корпус 5

Телефон: 8-495-781-04-08

