

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БОЛЕАР МЕДИКА»



О.И.Шабров

2008 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе

**Производства YOUNG CHEMICAL CO., LTD,
Корея**

Лейкопластыри медицинские на тканевой, нетканой, шелковой и полимерной основе в виде лент или на роликах, а также в виде лент и полосок, производства YOUNG CHEMICAL CO., LTD, Корея, эффективен в случаях, когда необходимо закрепить перевязочный материал в хирургии, катетеры, дренажные трубки и внутривенные капельницы, а также защитить мелкие раны от факторов внешней среды.

Рекомендации к применению:

- наносить на чистую и сухую поверхность кожи;
- снять защитную пленку с липкой поверхности пластыря;
- приложить пластырь абсорбирующей поверхностью к поврежденному участку кожи и зафиксировать.

Рекомендуется менять ежедневно или по мере загрязнения.

Противопоказания : индивидуальная непереносимость ингредиентов и материалов.

Хранить пластырь перцовый следует при температуре от 1 до 30⁰ С, в сухом, защищенном от света месте.

Беречь от детей.

Генеральный директор
ООО «БОЛЕАР МЕДИКА»



О.И.Шабров