

135
«УТВЕРЖДАЮ»

Наньтун Хайлунь Био-Медикал
Аппаратусез Мануфактуринг Ко..
ЛТД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Наименование изделия:

Контейнер для биопроб:

Контейнер для биопроб универсальный, 60 мл.

Контейнер для биопроб универсальный, 120 мл.

Контейнер для биопроб с ложкой-шпателем, 60 мл.

Назначение:

Предназначен для сбора и транспортировки на исследования общеклинических анализов кала, мочи, мокроты и прочих биоматериалов в медицинских учреждениях (больницы, поликлиники) и в быту.

Основные технические характеристики:

Состав:

Контейнер с герметично закручивающейся крышкой, изготовленной из полиэтилена повышенной плотности с градуировкой, полем для маркировки, изготовленный из прочного полипропилена, для хранения и транспортировки образцов биоматериалов. Контейнеры для сбора кала также содержат ложку-шпатель. При комнатной температуре химически устойчив ко всем, часто используемым, лабораторным реагентам. Использование такой специализированной тары для анализов при сдаче мочи, кала, мокроты и прочих биоматериалов сводит к минимуму шансы попадания в пробу посторонних веществ, а также значительно увеличивает срок, приемлемый для качественного проведения анализа. На прозрачной стенке контейнера имеется этикетка или для записи информации о пробе и пациенте.

Условия хранения и транспортировки:

Хранение изделий - в закрытых сухих помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги при температуре от -10°C до +35°C. Упаковку необходимо предохранять от загрязнения, запыления, попадания влаги и от разрыва. Упаковочные единицы пакуются в картонные коробки, которые предназначены для перевозок всеми типами транспорта. В одну транспортную тару упаковывают изделия одной партии. Транспортировка изделия любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Относятся к I классу в соответствии с «Директивой ЕС 93/42 – медицинские приспособления и изделия».

Способ применения:

1. Перед извлечением контейнера из упаковки, обязательно одеть медицинские перчатки.
 2. Извлечь контейнер из упаковки
 3. Открыть крышку и заполнить контейнер биоматериалом.
 4. Сразу после сбора биоматериала, контейнер плотно закройте закручивающейся крышкой и подпишите в поле маркировки.
 5. Доставьте контейнер с биоматериалом по назначенному для Вас адресу, в течение дня. Если нет возможности сразу доставить биоматериал, то хранить его следует при 1 - 2-8 C
- Внимание! После однократного применения контейнер утилизируется.

Срок годности: - пять лет

Круглая печать:

НАНЬТУН ХАЙЛУНЬ БИО-МЕДИКАЛ
АППАРАТУСЕЗ МАНУФАКТУРИНГ КО.. ЛТД
3206840004473

Иероглифы