

ЗАО НПП «ИНКАР – М»

**КРЕСЛО-КОЛЯСКА «ФЛАГМАН-3»
«ФЛАГМАН-М»**

ПАСПОРТ

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕН. ДИРЕКТОР

ДАШКО О.Г.




2010 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кресло-коляски «Флагман-3» и «Флагман-М» (далее коляски) предназначена для самостоятельного передвижения в помещениях и на дорогах с твердым покрытием, исключая проезжую часть, инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей. Коляска также может приводиться в движение сопровождающим лицом.

Коляска может использоваться в домашних условиях, а также в лечебных учреждениях.

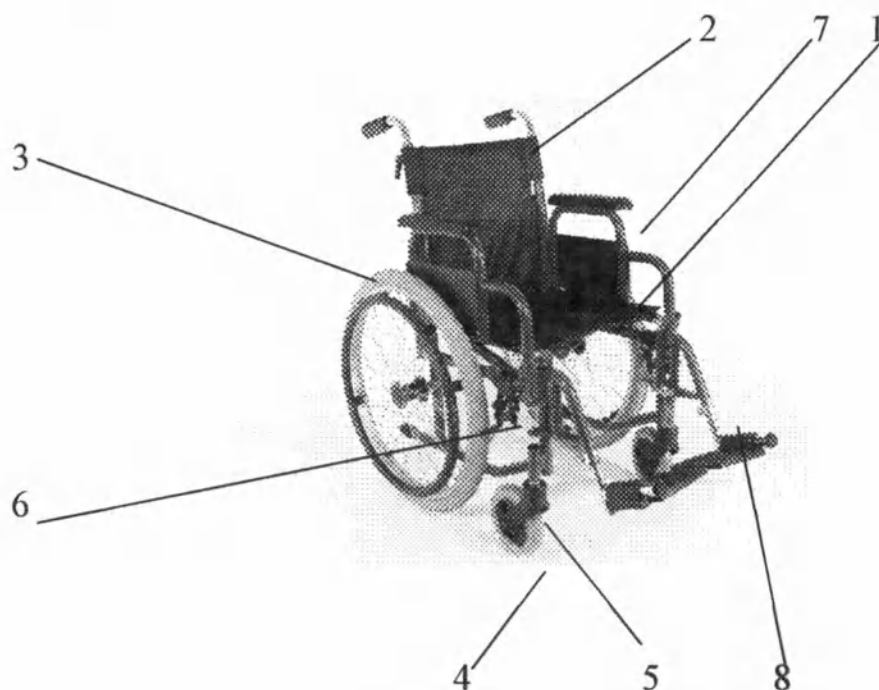

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Размеры, масса и максимальная грузоподъемность коляски должны соответствовать таблице.

Изделие	Ширина сиденья, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Ширина в сложенном состоянии, мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
Флагман-3	400, 420, 440, 460, 500	600, 620, 640, 660, 700	1080	930(в стандартном положении)	280	19,0	125
Флагман-М	400, 420, 460, 480	550, 570, 610, 630	1020	910(в стандартном положении)	280	19.5	125

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло-коляска «Флагман-3» «Флагман-М» - 1 шт. (нужное подчеркнуть)

Паспорт – 1 шт.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При посадке в коляску и высадке из нее колеса должны быть зафиксированы тормозами.

4.2. Во избежание поломки или опрокидывания коляски запрещается становиться на педали подножек, если они находятся в горизонтальном положении.

4.3. Запрещается использовать коляску с неисправными тормозами.

4.4. **ВНИМАНИЕ!**

Тормозные механизмы являются стояночными, не предназначены для торможения в движении.

4.5. Препятствия (пороги, ступеньки и др.) необходимо преодолевать с подъемом передних колес. Запрещается толкать коляску на препятствие высотой более 40 мм без подъема передних колес.

4.6. Во всех сложных ситуациях при преодолении препятствий необходима помощь сопровождающего.

4.7. Требования стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресло – коляски по ИСО 7176-16.

5. УСТРОЙСТВО

Рама коляски изготовлена из стальных тонкостенных труб и имеет складную конструкцию, которая состоит из двух полурам, связанных между собой распорками механизма складывания. Механизм складывания обеспечивает компактное складывание коляски. На раме с помощью крепежных элементов установлены: сиденье (1), спинка (2), большие приводные колеса (3) и малые поворотные колеса (4) на поворотных вилках (5). Большие приводные колеса имеют приводные облучи, используемые для самостоятельного передвижения. Коляска снабжена тормозными механизмами (6), закрепленными на раме, предназначенными для фиксации больших приводных колес в неподвижном положении.

Коляска «Флагман-3» оснащена откидными подлокотниками (7) и съемными, откидными подножками (8).

6. ПОДГОТОВКА КОЛЯСКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1. Коляска складывается и раскладывается без инструмента:
для приведения коляски в рабочее состояние необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья.
- 6.2. Разложить верхнюю часть спинки до окончательной ее фиксации.
- 6.3. Высота педалей подножек регулируется индивидуально.
- 6.4. Проверить давление в колесах, для нормальной эксплуатации давление должно составлять 0,25 МПа.(только для пневматической резины)
- 6.5. Коляска готова к эксплуатации.
- 6.6. Для складывания коляски необходимо поднять педали подножек в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.
- 7.2. Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.
- 7.3. Один раз в месяц необходимо произвести:
- проверку исправности тормозных механизмов;
 - проверку затяжки резьбовых соединений;
 - проверку давления в шинах.(только для пневматической резины)

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коляски требованиям ГОСТ Р 51083-97 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации коляски – в течение двенадцати месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 8.3. Гарантийный срок хранения – двадцать четыре месяца со дня изготовления.
- 8.4. В случае обнаружения неисправностей по вине изготовителя и при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения коляски, покупатель имеет право на бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.
- 8.5. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникающих не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате ударов о другие предметы;
- наезд на препятствия, высотой не более 6 см;
- езда на спущенных колесах; (только для пневматической резины)
- прокол камеры в шинах колес и т.п.(только для пневматической резины)

8.6. Адрес завода-изготовителя:

141070, г. Королев, ул. Ленина, дом 4а, ЗАО НПП "ИНКАР-М".

Тел. 8(495) 513-66-49; 513-69-02. e-mail: 5136991@mail.ru

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло-коляска «Флагман-3» «Флагман-М» (нужное подчеркнуть)

№ _____

соответствует ГОСТ Р 51083-97, признано годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска

Личные подписи или оттиски клейм лиц, ответственных за приемку.

Корешок талона № 1

На гарантийный ремонт

(техническое обслуживание)

(наименование изделия)

Изъят «

»

20 г.

Гл. механик цеха (ателье)

(личная подпись)

Линия отрыва

(наименование завода-изготовителя)

ТАЛОН № 1

На гарантийный ремонт
(техническое обслуживание)

изготовленного
(изделия)

(дата изготовления)

Заводской №

Продан (а) магазином №

(наименование торгового)

« » 200 г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес

(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей

Механик цеха
(ателье)

Владелец

(дата)

(личная подпись)

(личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. цеха «

(наименование ремонтного или бытового предприятия)

Штамп цеха « » 20 г.

(личная подпись)

Примечание

Корешок талона № 2

На гарантийный ремонт

(техническое обслуживание)

(наименование изделия)

Изъят « ____ »

20 ____ г.

Гл. механик цеха (ателье)

(личная подпись)

Линия отрыва

(наименование завода-изготовителя)

ТАЛОН № 2

На гарантийный ремонт
(техническое обслуживание)

изготовленного
(изделия)

(дата изготовления)

Заводской №

Продан (а) магазином №

(наименование торгового)

« ____ » ____ 20 ____ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес

(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей

Механик цеха
(ателье)

Владелец

(дата)

(личная подпись)

(личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. цеха «

(наименование ремонтного или бытового предприятия)

Штамп цеха « ____ » ____ 20 ____ г.

(личная подпись)

Примечание

Пронумеровано и прошнуровано

на 7 страницах

Генеральный директор

О.Г. Дашко



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕН. ДИРЕКТОР

ДАШКО О.Г.



ЗАО НПП «Инкар – М»

КРЕСЛО-КОЛЯСКА «ФЛАГМАН-9»

ПАСПОРТ

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ДАШКО О.Б.



2010 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кресло-коляска «Флагман-9» (далее коляска) предназначена для самостоятельного передвижения в помещениях и вне помещений на дорогах с твердым покрытием, исключая проезжую часть, инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей. Перемещение инвалидов может осуществляться также обслуживающим персоналом. Коляска имеет откидывающуюся спинку, регулируемую по углу наклона от вертикального положения до горизонтального.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Габаритные размеры сиденья (мм):

- глубина сиденья – 410;
- ширина сиденья – 400, 425, 450;
- высота сиденья – 520.

2.2. Габаритные размеры коляски, массу см. табл.

Ширина в сложенном состоянии (мм)	280
Длина, мм	1180
Ширина, мм	680
Высота, мм	1000
Масса, кг	19

2.3. Грузоподъемность, кг – 120.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло-коляска «Флагман-9» - 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Примечание: коляска может быть укомплектована насосом – 1 шт.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При посадке в коляску и высадке из нее колеса должны быть зафиксированы тормозами.

4.2. Не разрешается становиться на педали подножек, если они находятся в горизонтальном положении.

4.3. Запрещается пользоваться коляской с неисправными тормозами.

4.4. Запрещается использовать тормоза для торможения при движении.

4.5. При изменении угла наклона спинки, колеса коляски должны быть заторможены. При углах наклона спинки, близких к горизонтальному положению, чтобы избежать опрокидывания, коляска оснащена контрпорами, предотвращающими опрокидывание. Тем не менее,

обслуживание коляски при максимально откинутой спинки требует особой осторожности.

4.6. Требования стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла – коляски по ИСО 7176-16.

5. УСТРОЙСТВО

Коляска изготовлена из стальных тонкостенных труб и имеет складную конструкцию, которая состоит из двух полурам, связанных между собой распорками механизма складывания. Механизм складывания обеспечивает компактное складывание коляски. На каждой полураме с помощью крепежных элементов установлены большие приводные колеса и малые поворотные колеса на поворотных вилках. Большие приводные колеса имеют приводные обручи, используемые для самостоятельного передвижения. Коляска снабжена тормозными механизмами, закрепленными на полурамах, предназначенными для фиксации больших приводных колес в неподвижном положении.

ВНИМАНИЕ!

Тормозные механизмы являются стояночными и не предназначены для торможения при движении.

Откидывающаяся спинка и механизм регулировки угла наклона размещены на шарнирах полурам. Имеется распорная планка, обеспечивающая натяжение полотна спинки и синхронизацию угла наклона частей спинки.

Высота съемных подножек регулируется, педали подножек поворачиваются вверх, это облегчает посадку и высадку из нее.

КАР – 9

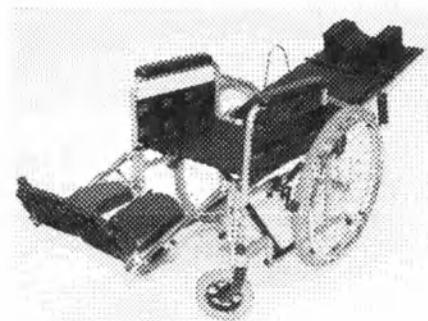
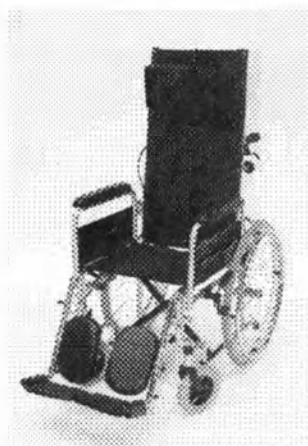


Рис.1

6. ПОДГОТОВКА КОЛЯСКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Коляска складывается и раскладывается без инструмента:

- для приведения коляски в рабочее состояние необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья;
- закрепить распорную планку спинки с помощью маховичков, затянув их до упора.

6.2. Высота педалей регулируется индивидуально.

6.3. Проверить давление в колесах, для нормальной эксплуатации давление должно составлять 0,25 МПа.

6.4. Коляска готова к эксплуатации.

6.5. Для складывания коляски необходимо отсоединить распорную планку спинки, поднять педали подножки в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания. Спинка при этом должна быть поднята в вертикальное положение.

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.

7.2. Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.

7.3. Один раз в месяц необходимо произвести:

- проверку исправности тормозных механизмов;
- проверку затяжки резьбовых соединений;
- проверку давления в шинах.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коляски требованиям ГОСТ Р 51083-97 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации коляски – в течение двенадцати месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8.3. Гарантийный срок хранения – двадцать четыре месяца со дня изготовления.

8.4. В случае обнаружения неисправностей по вине изготовителя и при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения коляски, покупатель имеет право на бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.

8.5. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникающих не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате ударов о другие предметы;
- наезд на препятствия, высотой более 6 см;
- езда на спущенных колесах;
- прокол камеры в шинах колес и т.п.

8.6. Адрес завода-изготовителя:

141070, г. Королев, ул. Ленина, дом 4а, ЗАО НПП "ИНКАР-М".

8(495) 513-66-49; 513-69-02; e-mail: 5136991@mail.ru

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло-коляска «Флагман-9»

№ _____

соответствует ГОСТ Р 51083-97, признано годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска

Личные подписи или оттиски клейм лиц, ответственных за приемку.

корешок талона № 1			
На гарантийный ремонт (техническое обслуживание)	(наименование изделия)		
Изъят « » 200 г.	Гл. механик цеха (ателье)	(личная подпись)	
Линия отрыва			
		(наименование завода-изготовителя)	
		ТАЛОН № 1	
		На гарантийный ремонт _____ (техническое обслуживание)	
		_____ изготовленного _____ (изделия) (дата изготовления)	
		Заводской № _____ Продан (а) магазином № _____ (наименование торгового предприятия)	
		« » 200 г.	
		Штамп магазина _____	
		Владелец и его адрес _____ _____ (личная подпись)	
		Выполнены работы по устранению неисправностей _____ _____ _____	
		Механик цеха (ателье)	Владелец
		_____ (дата)	_____ (личная подпись)
		(личная подпись)	
		УТВЕРЖДАЮ	
		Зав. цеха « _____ (наименование ремонтного или бытового предприятия)	
		Штамп цеха « » 200 г. _____ (личная подпись)	
		Примечание _____	


корешок талона № 2 (наименование изделия) Гл. механик цеха (ателье) _____ (личная подпись) Изъят « ____ » 200 ____ г.	(наименование завода-изготовителя) ТАЛОН № 2 На гарантийный ремонт _____ (техническое обслуживание) _____ изготовленного _____ (изделия) (дата изготовления) Заводской № _____ Продан (а) магазином № _____ (наименование торгового предприятия) « ____ » _____ 200 ____ г. Штамп магазина _____ Владелец и его адрес _____ _____ _____ (личная подпись) Выполнены работы по устранению неисправностей _____ _____ _____ <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Механик цеха (ателье)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Владелец</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(дата)</td> <td style="text-align: center;">(личная подпись)</td> </tr> </table> УТВЕРЖДАЮ Зав. цеха « _____ » (наименование ремонтного или бытового предприятия) Штамп цеха « ____ » _____ 200 ____ г. (личная подпись) Примечание _____	Механик цеха (ателье)	Владелец	_____	_____	(дата)	(личная подпись)
Механик цеха (ателье)	Владелец						
_____	_____						
(дата)	(личная подпись)						

Пронумеровано и прошнуровано

на 7 страницах

Генеральный директор

О.Г. Дашко

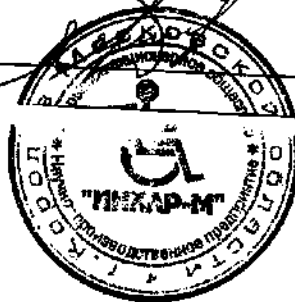

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ДАШКО О.Г.



ЗАО НПП "Инкар-М"


**КРЕСЛО-КОЛЯСКА
МАЛОГАБАРИТНОЕ
«ФЛАГМАН-П»**

ПАСПОРТ

КОПИЯ ВЕРНА

Ген. Директор

Дашко О.Г.

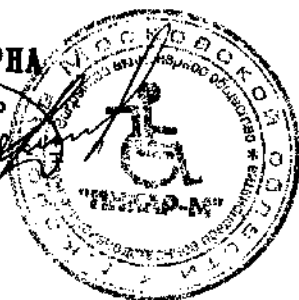


2010 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кресло-коляска малогабаритная «Флагман-П» (далее коляска) для самостоятельного передвижения в помещениях и на дорогах с твердым покрытием инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей. Коляска также может приводиться в движение сопровождающим лицом. Специальная конструкция позволяет при стандартной ширине сидения использовать ее в помещениях с узкими дверными проемами в условиях малогабаритных квартир.

Коляска может использоваться в домашних условиях, а также в лечебных учреждениях.

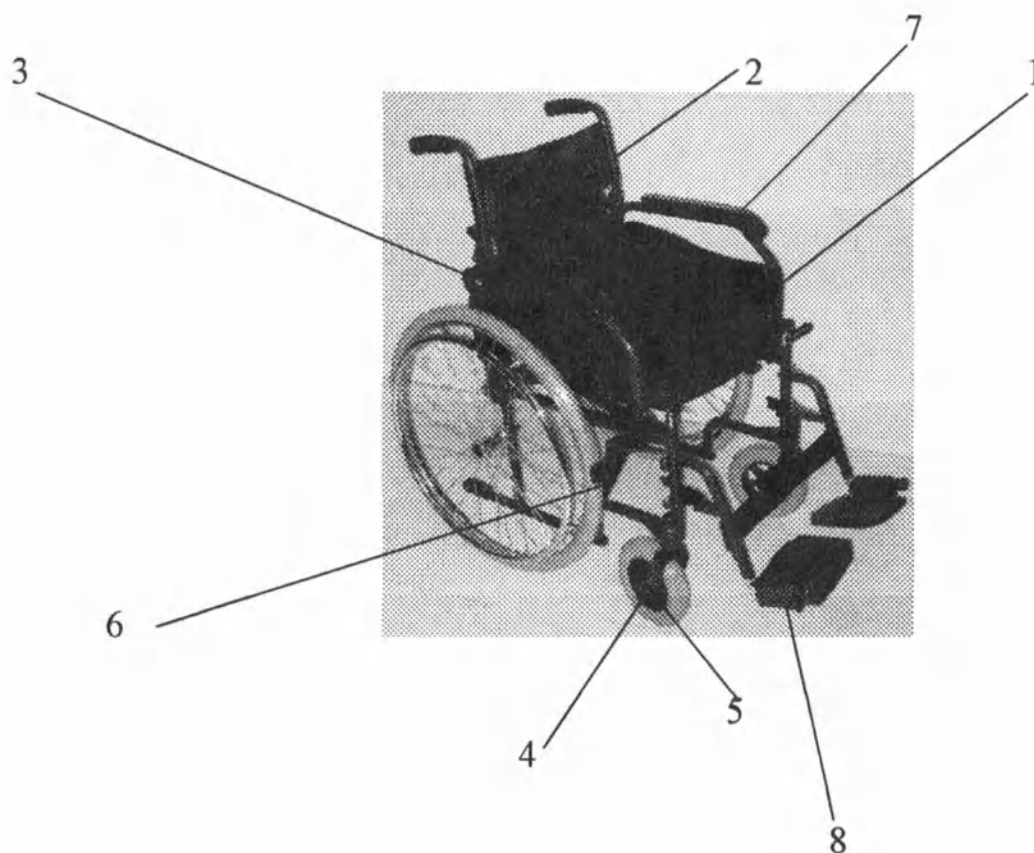

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Размеры, масса и максимальная грузоподъемность коляски должны соответствовать таблице.

Модель	Ширина сиденья, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Ширина в сложенном состоянии, мм	Масса, кг	Максимальная нагрузка, кг
1	360-380	510-530	1040	890	280	17,0	90

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло-коляска «Флагман-П» - 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При посадке в коляску и высадке из нее колеса должны быть зафиксированы тормозами.

4.2. Во избежание поломки или опрокидывания коляски запрещается становиться на педали подножек, если они находятся в горизонтальном положении.

4.3. Запрещается использовать коляску с неисправными тормозами.

4.4. **ВНИМАНИЕ!**

Тормозные механизмы являются стояночными не предназначены для торможения в движении.

4.5. Препятствия (пороги, ступеньки и др.) необходимо преодолевать с подъемом передних колес. Запрещается толкать коляску на препятствие высотой более 40 мм без подъема передних колес.

4.6. Во всех сложных ситуациях при преодолении препятствий необходима помощь сопровождающего.

4.7. Требование стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски, по ИСО 7176-16.

5. УСТРОЙСТВО

Рама коляски изготовлена из стальных тонкостенных труб и имеет складную конструкцию по вертикальной оси, которая состоит из двух полурам, связанных между собой распорками механизма складывания. Механизм складывания обеспечивает компактное складывание коляски. На раме с помощью крепежных элементов установлены: сиденье (1), складная по горизонтали спинка (2), большие приводные колеса (3) и малые поворотные колеса (4) на поворотных вилках (5). Большие приводные колеса имеют приводные обручи, используемые для самостоятельного передвижения. Коляска снабжена тормозными механизмами (6),

закрепленными на раме, предназначенными для фиксации больших приводных колес в неподвижном положении.

Коляска «Флагман-П» оснащена съемными подлокотниками (7) и съемными, откидными подножками (8).

6. ПОДГОТОВКА КОЛЯСКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Коляска складывается и раскладывается без инструмента:
для приведения коляски в рабочее состояние необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья.

6.2. Высота педалей регулируется индивидуально.

6.3. Проверить давление в колесах, для нормальной эксплуатации давление должно составлять 0,25 МПа.

6.4. Коляска готова к эксплуатации.

6.5. Для складывания коляски необходимо поднять педали в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи.
Металлические поверхности протирать насухо.

7.2. Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.

7.3. Один раз в месяц необходимо произвести:

- проверку исправности тормозных механизмов;
- проверку затяжки резьбовых соединений;
- проверку давления в шинах.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коляски требованиям ГОСТ Р 51083-97 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации коляски – в течение двенадцати месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8.3. Гарантийный срок хранения – двенадцать месяцев.

8.4. В случае обнаружения неисправностей по вине изготовителя и при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения коляски, покупатель имеет право на бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.

8.5. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникающих не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате ударов о другие предметы;
- наезд на препятствия, высотой не более 6 см;
- езда на спущенных колесах;
- прокол камеры в шинах колес и т.п.

8.6. Адрес завода-изготовителя:

141070, г.Королев, ул. Ленина, д. 4а

Тел. (495) 513-6649, 513-6902

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло-коляска «Флагман-П»

№ _____

соответствует ГОСТ Р 51083-97, признано годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска

Личные подписи или оттиски клейм лиц, ответственных за приемку.

корешок талона № 1

На гарантийный ремонт

(техническое обслуживание)

(наименование изделия)

Изъят « ____ » 200 ____ г.

Гл. механик цеха (ателье)

(личная подпись)

Линия отрыва

(наименование завода-изготовителя)

ТАЛОН № 1

На гарантийный ремонт
(техническое обслуживание)

изготовленного

(изделия)

(дата изготовления)

Заводской №

Продан (а) магазином №

(наименование торгового предприятия)

« ____ » 200 ____ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес

(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей

Механик цеха
(ателье)

Владелец

(дата)

(личная подпись)

(личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. цеха «

(наименование ремонтного или бытового предприятия)

Штамп цеха « ____ » 200 ____ г.

(личная подпись)

Примечание

корешок талона № 2

На гарантийный ремонт

(техническое обслуживание)

(наименование изделия)

Изъят « » 200 г.

Гл. механик цеха (ателье)

(личная подпись)

Линия отрыва

(наименование завода-изготовителя)

ТАЛОН № 2

На гарантийный ремонт
(техническое обслуживание)

изготовленного
(изделия) (дата изготовления)

Заводской №

Продан (а) магазином №

(наименование торго)

« » 200 г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес

(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей

Механик цеха
(ателье)

Владелец

(дата)

(личная подпись)

(личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. цеха «

(наименование ремонтного или бытового предприятия)

Штамп цеха « » 200 г.

(личная подпись)

Примечание

Пронумеровано и прошнуровано

на 7 страницах

Генеральный директор

О.Г. Дашко



КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ДАШКО О.Г.



ЗАО НПП "ИНКАР-М"

**КРЕСЛО-КОЛЯСКА
«ФЛАГМАН-К»**

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕН. ДИРЕКТОР


ДАШКО О.Г.



**Московская область, г. Королев
2010 г.**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кресло-коляска «ФЛАГМАН-К» (далее коляска) предназначена для самостоятельного передвижения в помещениях и на дорогах с твердым покрытием инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей. Коляска также может приводиться в движение сопровождающим лицом.

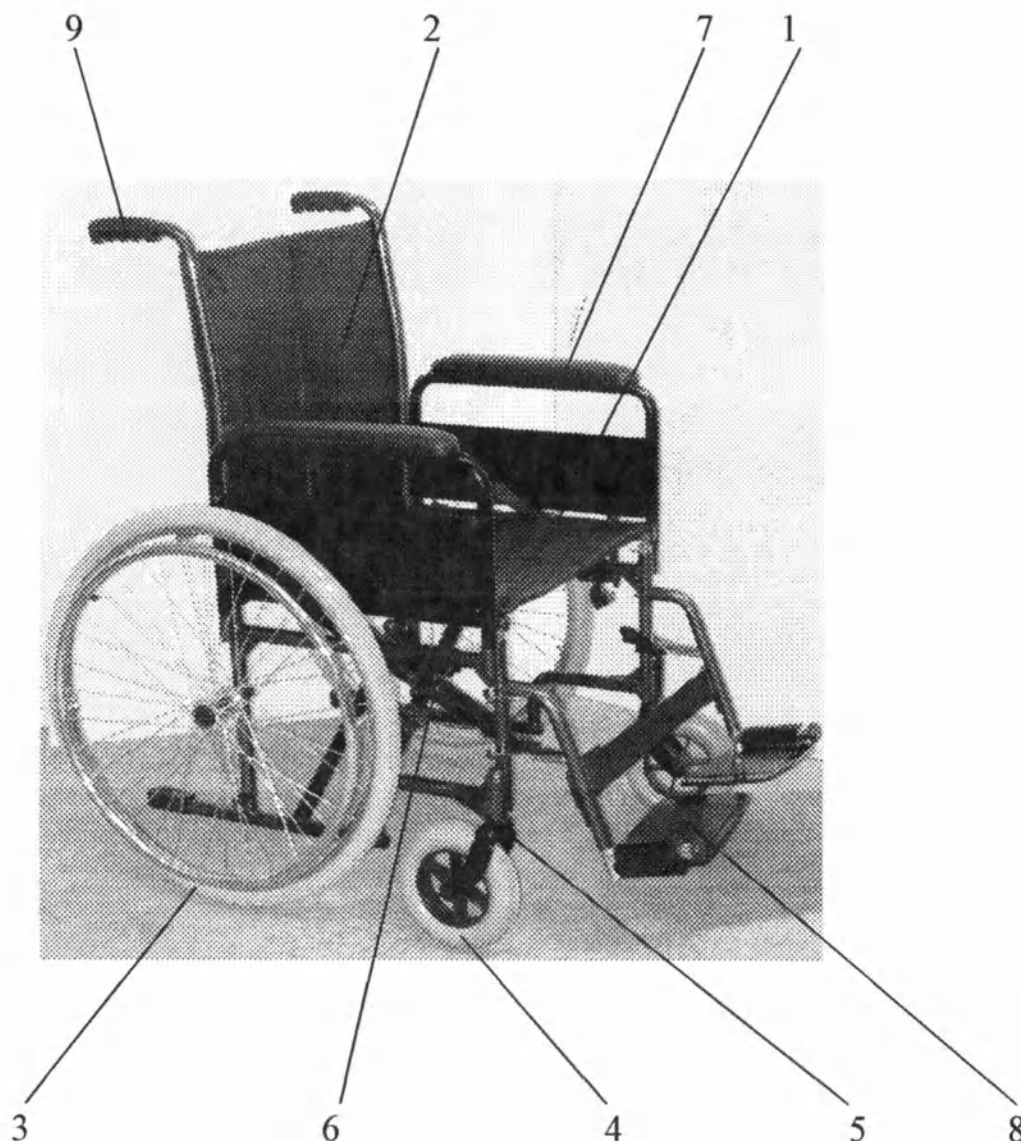

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ширина – 73, 75, 78 см;
- длина – 108 см;
- высота – 90-105 см (регулируется).
- ширина сидения – 50, 52, 55 см;
- глубина сидения – 46 см;
- высота спинки – 42,5, 45, 47,5 см;
- высота сидения над уровнем пола регулируется в пределах от 45 до 54 см;
- ширина в сложенном состоянии 31 см;
- передние колеса диаметром 17 см;
- грузоподъемность для ширины сидения 50 и 55 см составляет 150 кг;
- вес коляски, изготовленной из стальных труб, составляет 28 кг;
- вес коляски, изготовленной из алюминиевых труб, составляет 19,5 кг.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- кресло-коляска оснащено усиленным механизмом складывания;
- подножки отводятся (откидываются) в стороны, съемные и регулируемые по высоте;
- платформа подножки регулируется по углу установки $\pm 30^\circ$;
- задние колеса быстросъемные;
- подлокотники отводятся (откидываются) назад;
- ручки для сопровождающего лица регулируются по высоте;
- кресло-коляска складывается с уменьшением габаритной ширины до 31 см;
- регулируемый центр тяжести коляски (сидение) путем смещения задних колес в продольном направлении;
- регулируемые стояночные тормоза;
- прогулочный вариант оснащен «Катафотами» (предупредительный светоотражающий знак);
- оснащена боковыми щитками и подкрылками;
- сидение и спинка выполнены из экологически чистой ткани с прокладкой из пенополиуретана;
- сборка и разборка коляски осуществляется без инструмента.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло-коляска «ФЛАГМАН-К» - 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При посадке в коляску и высадке из нее колеса должны быть зафиксированы тормозами.

5.2. Во избежание поломки или опрокидывания коляски запрещается становиться на педали подножек, если они находятся в горизонтальном положении.

5.3. Запрещается использовать коляску с неисправными тормозами.

5.4. **ВНИМАНИЕ!**

Тормозные механизмы являются стояночными, не предназначены для торможения в движении.

5.5. Препятствия (пороги, ступеньки и др.) необходимо преодолевать с подъемом передних колес. Запрещается толкать коляску на препятствие высотой более 40 мм без подъема передних колес.

5.6. Во всех сложных ситуациях при преодолении препятствий необходима помощь сопровождающего.

5.7. Требование стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски, по ИСО 7176-16.

6. УСТРОЙСТВО

Рама коляски изготовлена из стальных тонкостенных труб и имеет складную конструкцию, которая состоит из двух полурам, связанных между собой распорками с двойным механизмом складывания. Механизм складывания обеспечивает компактное складывание коляски. На раме с помощью крепежных элементов установлены: сиденье (1), спинка (2), большие приводные колеса (3) и малые поворотные колеса (4) на поворотных вилках (5). Большие приводные колеса имеют приводные обручи, используемые для самостоятельного передвижения. Коляска снабжена тормозными механизмами (6), закрепленными на раме, предназначенными для фиксации больших приводных колес в неподвижном положении.

Коляска «ФЛАГМАН-К» оснащена откидывающимися подлокотниками (7); съемными, откидными подножками (8) и складывающимися ручками (9).

7. ПОДГОТОВКА КОЛЯСКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Коляска складывается и раскладывается без инструмента: для приведения коляски в рабочее состояние необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья.

7.2. Высота педалей регулируется индивидуально.

7.3. Проверить давление в колесах, для нормальной эксплуатации давление должно составлять 0,25 МПа (если коляска оснащена пневматическими шинами).

7.4. Коляска готова к эксплуатации.

7.5. Для складывания коляски необходимо поднять педали в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

8. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.

8.2. Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.

8.3. Один раз в месяц необходимо произвести:

- проверку исправности тормозных механизмов;
- проверку затяжки резьбовых соединений;
- проверку давления в шинах.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коляски требованиям ГОСТ Р 51083-97 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски – в течение двенадцати месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

9.3. Гарантийный срок хранения – двадцать четыре месяца со дня изготовления.

9.4. В случае обнаружения неисправностей по вине изготовителя и при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения кресла-коляски, покупатель имеет право на бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.

9.5. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникающих не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате ударов о другие предметы;
- наезд на препятствия высотой более 6 см;

- езда на спущенных колесах;
- прокол камеры в шинах колес и т.д.

9.6. Адрес завода-изготовителя:

ЗАО НПП "ИНКАР-М"

141070, г. Королев, ул. Ленина, дом 4а

Тел.: (495) 513-66-49, 513-69-02

e-mail: 5136991@mail.ru

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло-коляска «ФЛАГМАН»

№ _____

соответствует ГОСТ Р 51083-97 , признано годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска

Личные подписи или оттиски клейм лиц, ответственных за приемку.

Корешок талона № 1

На гарантийный ремонт

(техническое обслуживание)

(наименование изделия)

Изъят « » 200 г.

Гл. механик цеха (ателье)

(личная подпись)

Линия отрыва

(наименование завода-изготовителя)

ТАЛОН

На гарантийный ремонт
(техническое обслуживание)

изготовленного

(изделия)

(дата изготовления)

Заводской №

Продан (а) магазином №

(наименование торго)

« » 200 г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес

(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей

Механик цеха
(ателье)

Владелец

(дата)

(личная подпись)

(личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. цеха «

(наименование ремонтного или бытового предприятия)

Штамп цеха « » 200 г.

(личная подпись)


Примечание

Пронумеровано и прошнуровано

на 7 страницах

Генеральный директор

О.Г. Дашко

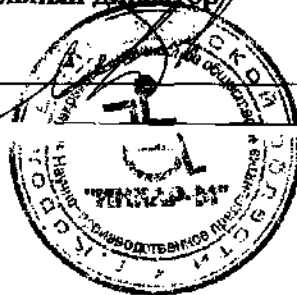

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕН. ДИРЕКТОР

ДАШКО О.Г.



ЗАО НПП «Инкар – М»

КРЕСЛО-КОЛЯСКИ «КАР - СА», «КАР – СП»
ПАСПОРТ

КОПИЯ ВЕРНА
Ген. Директор
ДАШКО О.Г.



2010 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кресло-коляски «КАР-СП» и «КАР-СА» (далее коляски) предназначена как для самостоятельного передвижения в помещениях и вне помещений на дорогах с твердым покрытием, исключая проезжую часть, так и только для передвижения с помощью сопровождающего лица, людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с различной степенью инвалидности инвалидов, имеющих санитарное оснащение.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Габаритные размеры, массу колясок см. табл.

Параметры	КАР-СП	КАР-СА
Длина, мм	860	1050
Ширина, мм	570	650
Высота, мм	970	950
Глубина сидения, мм	380	400
Ширина сидения, мм	480	460
Масса, кг	17	19.5
Грузоподъемность, кг	110	110

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло-коляска «КАР-СП», «КАР-СА» - 1 шт. (нужное подчеркнуть)
Паспорт – 1 шт.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При посадки в коляску и высадки из нее стояночные тормоза должны быть надежно зафиксированы. (Следует периодически проверять затяжку резьбовых соединений тормозной системы)

4.2. Не следует становиться на опоры для ног (подножки) во избежание опрокидывания и поломки пластмассовых деталей.

4.3. Запрещается использовать коляску с неисправной тормозной системой.

ВНИМАНИЕ: тормозные механизмы являются стояночными, не предназначены для торможения в движении.

4.4. Препятствия (пороги, ступеньки и др.) необходимо преодолевать с подъемом передних колес. Запрещается толкать коляску на препятствие высотой более 40мм, без подъема передних колес.

4.5. Во всех сложных ситуациях при преодолении препятствия необходима помощь сопровождающего.

4.6. Требования стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресло – колясок по ИСО 7176 – 16.

5. УСТРОЙСТВО

5.1. Коляски поставляются в собранном виде. Дополнительная сборка не требуется.

5.2. Высота опор для ног регулируется индивидуально.

5.3. Используя коляску как туалет, необходимо установить судно и снять крышку сидения.

КАР – СА



КАР – СП



Рис. 1

6. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. После использования кресло – коляски на улице необходимо очистить поверхности от пыли и грязи и насухо протереть.

6.2. Периодически проверять плавность вращения колес и очищать их от грязи.

6.3. Сидение рекомендуется периодически протирать 5% мыльным раствором.

6.4. Один раз в месяц необходимо произвести:

- проверку исправности тормозных механизмов;
- проверку затяжки резьбовых соединений;
- проверку давления в шинах (КАР-СА).

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коляски требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации коляски – в течение двенадцати месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8.3. Гарантийный срок хранения – двадцать четыре месяца со дня изготовления.

8.4. В случае обнаружения неисправностей по вине изготовителя и при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения коляски, покупатель имеет право на бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.

8.5. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникающих не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате ударов о другие предметы и

т.п.;

8.6. Адрес завода-изготовителя:

141070, г. Королев, ул. Ленина, дом 4а, ЗАО НПП "ИНКАР-М".

8(495) 513-66-49; 513-69-02, e-mail: 5136991@mail.ru

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло-коляски «КАР-СП», «КАР-СА» (нужное подчеркнуть)

№ _____

соответствует, признано годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска

Личные подписи или оттиски клейм лиц, ответственных за приемку.

корешок талона № 1 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изъят « ____ » ____ 200 ____ г. Гл. механик цеха (ателье) (личная подпись) Линия отрыва		_____ (наименование завода-изготовителя)	
		ТАЛОН № 1	
		На гарантийный ремонт _____ (техническое обслуживание)	
		_____ (изделия)	_____ (дата изготовления)
		Заводской № _____ Продан (а) магазином № _____ (наименование торгового предприятия)	
		« ____ » ____ 200 ____ г.	
		Штамп магазина _____	
		Владелец и его адрес _____ _____ (личная подпись)	
		Выполнены работы по устранению неисправностей _____ _____ _____	
		Механик цеха (ателье) _____ (дата)	Владелец _____ (личная подпись)
		_____ (личная подпись)	_____ (личная подпись)
		УТВЕРЖДАЮ Зав. цеха « _____ (наименование ремонтного или бытового предприятия)	
		Штамп цеха « ____ » ____ 200 ____ г. _____ (личная подпись)	
		Примечание	


На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изыят « » 200 г. Гл. механик цеха (ателье) Линия отрыва корешок талона № 2 (наименование изделия) (личная подпись)	(наименование завода-изготовителя) ТАЛОН № 2 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) изготовленного (изделия) (дата изготовления) Заводской № Продан (а) магазином № (наименование торго) « » 200 г. Штамп магазина Владелец и его адрес (личная подпись) Выполнены работы по устранению неисправностей Механик цеха Владелец (ателье) (дата) (личная подпись) (личная подпись) УТВЕРЖДАЮ Зав. цеха « (наименование ремонтного или бытового предприятия) Штамп цеха « » 200 г. (личная подпись) Примечание
--	---

Пронумеровано и прошнуровано

на 6 страницах

Генеральный директор

О.Г. Дашко

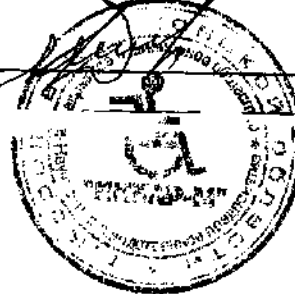

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕН. ДИРЕКТОР

ДАШКО О.Г.

