

Многоразовый биопсийный пистолет GT GUN

Инструкция по эксплуатации

Многоразовый биопсийный пистолет **GT GUN** предназначен для режущего забора гистологических проб из любых мягких тканей (простата, почки, печень, и другие внутренние органы).

Внимание: Система должна использоваться только специалистом, владеющим навыками проведения забора гистологических проб или под его непосредственным надзором. Чрезкожные манипуляции должны проводиться под контролем УЗИ, рентгенконтролем или компьютерной томографии для достижения наиболее точного положения биопсийной иглы.

Предварительные инструкции: Перед использованием, внимательно осмотрите биопсийный пистолет на предмет обнаружения внутренних или внешних повреждений, проверьте его работоспособность. Игла должна быть полностью совместима с биопсийным пистолетом.

Подготовка и использование пистолета.

Внимание: Из соображений безопасности никогда не проверяйте работоспособность пистолета с находящейся внутри него биопсийной иглой.

1. Откройте верхнюю крышку пистолета и установите биопсийную иглу в соответствующие пазы.
2. Закройте крышку и оттяните рукоятку до упора (раздастся щелчок), пистолет взведен. При этом короткая штанга, расположенная на рукоятке, должна быть **полностью** погружена в отверстие на корпусе пистолета.
3. После наведения иглы на место предполагаемого забора пробы, нажмите боковую кнопку для спуска механизма.
4. После извлечения иглы из места забора пробы, потяните за рукоятку до момента появления короткой штанги и, повернув рукоятку в любом направлении, уприте короткую штангу в корпус. При этом конец иглы с биоптатом откроется для легкого и атравматичного снятия гистологического образца.

Иглу не нужно вынимать из пистолета для проведения нескольких заборов проб у одного пациента.

5. После снятия столбика биоптата, потяните рукоятку пистолета до упора (раздастся щелчок). При этом короткая штанга, расположенная на рукоятке, должна быть **полностью** погружена в отверстие на корпусе пистолета. Пистолет готов для повторной процедуры взятия биопсии.

Внимание: Биопсийные иглы поставляются в стерильной упаковке и являются одноразовыми!

