

Генеральный директор
ООО «Фармэль»



Иванов К.И.

26 июля 2013 г.

Инструкция по применению **салфеток спиртовых из нетканого материала, стерильных**

1. Салфетки спиртовые из нетканого материала различных типоразмеров применяются в больницах, клиниках, лечебно-профилактических учреждениях, в машинах скорой помощи, а также в бытовых условиях для проведения санации кожи до и после проведения инъекций, дезинфекционной обработки инструментов, мелких травм, рук медицинского персонала.
2. Салфетки спиртовые из нетканого материала изготавливаются в соответствии с ТУ 9393-002-68845281-2013.

Основой для изготовления салфеток спиртовых является нетканое полотно типа «спанлейс», которое не оставляет на поверхности кожи волокон и не вызывает аллергических или местно-раздражающих реакций.

В качестве пропиточного раствора используется спирт этиловый ректификационный ГОСТ Р 51652 – 2000.

Каждая спиртовая салфетка упакована в герметичный пакетик с нанесенной боковой перфорацией для удобства вскрытия перед использованием.

В качестве упаковочного материала используется трехслойный комбинированный материал «триплекс», который обеспечивает сохранение свойств продукции в течение всего срока годности.

3. Салфетки спиртовые обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, фунгицидной активностью в отношении патогенных грибов.
4. Раздражающее и аллергическое воздействие на кожу человека отсутствует. Не обрабатывать спиртовыми салфетками слизистые оболочки.
5. Для использования салфетки спиртовой следует :
вскрыть упаковку в месте нанесения перфорации , вынуть сложенную салфетку, пропитанную спиртовым раствором , и обработать дезинфицирующую поверхность.
6. Транспортировка , хранение.
- 6.1. Транспортировка салфеток спиртовых возможна всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность салфеток и тары.
- 6.2. Хранить салфетки следует в хорошо вентилируемом сухом прохладном помещении вдали от источников тепла при температуре не ниже минус 5° и не выше плюс 40°С.

Срок годности салфеток спиртовых , стерильных – 5 лет.