

Техническое обслуживание и контроль

1. Компоненты оборудования, которые контролируются и обслуживаются назначенным представителем

В целях безопасности пациентов, пользователей и третьих лиц необходимо проводить периодическую проверку. Периодическая проверка выполняется нашим официальным представителем. По поводу периодического осмотра и регулировки устройства обращайтесь в официальное представительство нашей компании.

Периодическое обслуживание

Проследите за тем, чтобы периодическое обслуживание и контроль, за которые отвечает официальный представитель нашей компании, выполнялись согласно инструкциям.

Компоненты оборудования, которые контролируются и обслуживаются официальным представителем

Процедура проверки и обслуживания	Периодичность
Проверка сведений об эксплуатации и журнала ошибок	Ежегодно
Проверка изображений	Ежегодно
Проверка функций защитной блокировки	Ежегодно
Проверка работы вентилятора	Ежегодно
Проверка определения магазинов	Ежегодно
Проверка прижимного валика, валика в прорези блока выдачи и очистного валика	Ежегодно
Чистка воздушного фильтра	Ежегодно
Чистка блока хранения пленки	Ежегодно
Чистка внутренних компонентов устройства	Ежегодно
Измерение сопротивления термоголовки	Ежегодно
Чистка блока накопления и блока выдачи	Ежегодно
Чистка резинового ремня	Ежегодно
Проверка даты и времени	Ежегодно
Чистка кожуха	Ежегодно
Проверка провода защитного заземления	Ежегодно

Основные расходные материалы

Название расходного материала	Периодичность
Резак для пленки	Каждые 2 года
Очистной валик	Каждые 3 года

Интервалы сервисного обслуживания могут различаться в зависимости от условий эксплуатации.

За подробными сведениями об осмотре и обслуживании устройства обратитесь в нашу компанию или в ее официальное представительство.