

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора
от _____ № _____

КОПИЯ ВЕРНА
Н.А. Семина
Зам. директора
ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального государственного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-



В.И. Покровский
2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита А (HAV)

в клиническом материале и объектах окружающей среды

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле

«АмплиСенс® HAV»

Набор реагентов состоит из 4 комплектов:

- «РИБО-сорб» вариант 50 – комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала;
- «РЕВЕРТА-L» вариант 50 – комплект реагентов для получения кДНК на матрице РНК;
- «АмплиСенс» вариант 50 R – комплект реагентов для ПЦР-амплификации кДНК HAV;
- «ЭФ» вариант 200 – комплект реагентов для электрофоретической детекции продуктов амплификации в агарозном геле.

ФОРМА ВЫПУСКА.

Комплект реагентов «РИБО-сорб» вариант 50 включает:

Реактивы	Описание	Объем (мл)	Упаковка
Лизирующий раствор	Прозрачная бесцветная жидкость	22,5	1 флакон
Раствор для отмывки 1	Прозрачная бесцветная жидкость	20	1 флакон
Раствор для отмывки 3	Прозрачная бесцветная жидкость	50	1 флакон
Раствор для отмывки 4	Прозрачная бесцветная жидкость	20	1 флакон
Сорбент	Суспензия белого цвета	1,25	1 пробирка
РНК-элюент	Прозрачная бесцветная жидкость	0,5	5 пробирок