

**Инструкции по применению
Средства для стомированных больных,
производства «Б.Браун Медикал С.А.С.»
(B.Braun Medical S.A.S.), Франция**

1. Наименование: Абсорбент для превращения жидкого стула в гель при использовании калоприемников «Б.Браун Илео гель».

- Превращает жидкий стул в гелеобразный
- Повышает комфорт пациента
- Продлевает срок работы фильтра

Способ применения: поместить 1 таблетку геля в калоприемник перед использованием.

Характеристики: 30 таблеток в водонепроницаемой упаковке.



Абсорбент для превращения жидкого стула в гель при использовании калоприемников «Б.Браун Илео Гель».

Абсорбент для превращения жидкого стула в гель при использовании калоприемников «Б.Браун Илео Гель» представляет собой таблетки, состоящие из специального спрессованного порошка, содержащего 2 г полиакрилата натрия. Абсорбент «Б.Браун Илео Гель» - это таблетки белого цвета, без запаха, без покрытия. Благодаря содержанию полиакрилата натрия, происходит быстрая абсорбция жидких выделений из стомы. «Б.Браун Илео Гель» особенно рекомендуется при илеостомии, поскольку преобразует жидкий стул в желеобразную массу. После абсорбции жидкости опустошение мешка для пациента значительно упростится, увеличивая срок службы фильтра и мешка, удобен в применении.

Основные характеристики:

Абсорбент «Б.Браун Илео Гель» представлен специальным спрессованным порошком в таблетках, без специфического запаха, белого цвета, без покрытия. Таблетки абсорбента упакованы в специальную фольгу, предохраняющую абсорбент от действия света и температурных перепадов. .



Состав:

2 г полиакрилата натрия для загустения жидких выделений из стомы, содержащийся в таблетках.

Поглощающая способность абсорбента «Б.Браун Илео Гель» позволяет связывать около 500 мл (500 см^3) жидких выделений.

2. Абсорбент для превращения жидкого стула в гель при использовании калоприемников «Илео Гель +».

Представляет собой специальные доз-пакетики, изготовленные из фольги, в которые упакованы гранулы абсорбента. Гранулы содержат 2 г полиакрилата натрия, способного впитывать и удерживать воду и водосодержащие массы в количестве, в несколько десятков раз превышающем его собственный вес.

Основные характеристики:

Гранулы абсорбента, содержащиеся в доз-пакетиках, белого цвета, не имеют запаха, без покрытия.

Поглощающая способность абсорбента «Илео Гель +» позволяет связывать около 500 мл (500 см^3) жидких выделений.

Состав:


2 г полиакрилата натрия для загустения жидких выделений из стомы.

Свойства: рекомендован для пациентов с илеостомами, обеспечивает загустение жидких выделений, благодаря чему опорожнение мешка становится более удобным и контролируемым, а также повышается эффективность фильтра.

3. Наименование: капсулы для нейтрализации запаха в калоприемниках Биотроль С 60 – деодорирующие капсулы для калоприемника.

- Устраняют запах в калоприемнике
- **Способ применения:** поместить в калоприемник перед использованием.
- **Характеристики:** таблетки 60 шт. в пластиковом флаконе



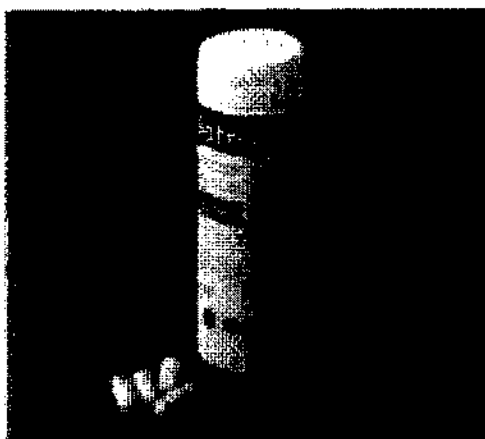

4. Нейтрализатор запаха в калоприемнике «ДеОдор» предназначен для устранения запаха в калоприемнике.

- **Способ применения:** поместить в калоприемник перед использованием.


И капсулы «Биотроль С60» и нейтрализатор запаха «ДеОдор» обладают уникальной способностью нейтрализовать неприятный запах посредством процесса оксидации (устраняет запах при его образовании) благодаря уникальной формуле.

Состав: пропиленгликоль, изопропиловый спирт, стирен/поливинилпиралидон сополимер, гриллоцин, вода


5. Наименование: Фильтр для калоприемников «Биотроль Фильтр» не контактирует с одеждой, интегрируется в мешок и используется для нейтрализации запаха.

6. Наименование: салфетки для ухода за кожей вокруг стомы Биотроль сервис сольвант и Биотроль сервис протектор – салфетки для очищения и защиты кожи вокруг стомы.

- Салфетки предназначены для очищения кожи вокруг стомы и для нанесения защитного слоя перед использованием калоприемника.
- **Способ применения:** вскрыть упаковку, протереть кожу вокруг стомы.
- **Характеристики:** 30 индивидуально упакованных салфеток

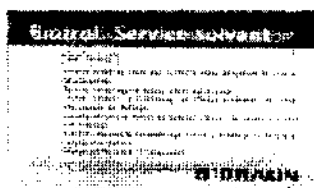


КОИИЯ ВЕРИЯ
Генеральный директор
[Подпись]
Петухов М.М./

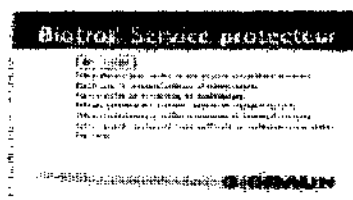

Салфетки «Биотроль сервис сольвант» содержат в своем составе нефтяной бензин.

Салфетки «Биотроль сервис протектор» имеют следующий состав - мягкая тканая основа салфетки приписана нефтяным бензином, стирол и альфа-метил стирол канифоли.

Салфетки являются эффективными средствами, заменяющими мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, и используются для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи или каловых масс при недержании. Они очищают кожу от каловых масс, мочи, гноя, слизи, дезинфицируют, смягчают ее. Также эти салфетки можно применять для удаления адгезива базовых пластин.

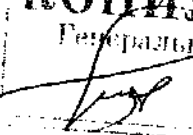КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор

Петухов М.М.