

Инструкция по применению
Калоприемники, базовые пластины липкие для калоприемников, приспособления для
стомированных больных, производства «Б.Браун Медикал С.А.С.» (B.Braun Medical
S.A.S.), Франция

Калоприемники, базовые пластины липкие для калоприемников, приспособления для стомированных больных имеют следующее предназначение:

Различные варианты исполнения калоприемников Алмарис и Алмарис Твин + используются в качестве изделий для сбора кала в течение суток у стомированных больных с коло- или илеостомой, а также в послеоперационный период.

Калоприемники «Драйана С мини», калоприемники «Драйана С медиум», калоприемники «Драйана С лардж», калоприемники «Драйана С вижн 50», калоприемники «Драйана С вижн 75», калоприемники «Драйана С вижн 100» предназначены для сбора кала у стомированных больных.

Мини-калоприемник «Биотроль Петит» представляет собой небольшой пластиковый мешок для сбора каловых масс у пациентов, страдающих недержанием стула.

Калоприемники «Проксима» и «Проксима 2» также предназначены для сбора кала у стомированных больных.

Калоприемников Флексима в зависимости от основных характеристик используются в качестве изделий, предназначенных для круглосуточного сбора кала у пациентов с илео-колоостомами.

Различные базовые пластины липкие необходимо для надежной установки определенных моделей калоприемников.

Приспособления для стомированных больных позволяют проводить ирригацию толстой кишки, закреплять сами калоприемники (например, зажим для дренируемых калоприемников) или закреплять базовые пластины (например, пояс для базовой пластины к калоприемникам «Алмарис Твин + Белт»), а также осуществлять процесс утилизации использованных калоприемников (например, мешки для использованных аксессуаров).

Система Флоу Коллектор (мочеприемники «Алмарис Твин + Флоу коллектор Систем») является оптимальной и достаточной для сбора отделяемого в течение суток, имеет большой объем, длинную выпускную трубку и надежный выпускной клапан.

Калоприемники «Проксима 2», «Алмарис Оптима мини», «Алмарис Оптима», «Алмарис Квайет», «Алмарис Протект», «Алмарис Преференс», «Алмарис Твин + Коло», «Алмарис Твин + Хай Флоу», «Алмарис Твин + Илео», «Алмарис Твин + Илео Флоу Контрол» с фильтром, «Алмарис Твин + Флоу Коллектор Систем», «Флексима Коло», «Флексима Коло мини», «Флексима Илео», «Флексима Илео Флоу Контрол», «Флексима Ки Коло», «Флексима Ки Илео Флоу Контрол», Калоприемники дренируемые «Флексима Ки Ролл-ап», дренируемые калоприемники «Флексима Ролл-ап», калоприемники закрытые «Флексима Коло Конвекс», а также базовые пластины липкие для калоприемников «Проксима 2», «Алмарис Твин +», «Алмарис Твин + Микст», «Конвекс Алмарис Твин +», «Флексима Ки конвексные», «Флексима Ки бэйз плейт» клеятся липким слоем на кожу вокруг стомы у пациентов с коло- или илеостомой (к базовым пластинам присоединяются соответствующие калоприемники).

Характеристики изделий:

- Калоприемники Алмарис Оптима мини, Калоприемники Алмарис Оптима, Калоприемники Алмарис Квайет, Калоприемники Алмарис Протект, Калоприемники Алмарис Преференс, Калоприемники Алмарис Твин + Коло, Калоприемники Алмарис Твин + Хай Флоу, Калоприемники Алмарис Твин + Илео, Калоприемники Алмарис Твин + Илео Флоу Контрол, Калоприемники Алмарис Твин + Флоу Коллектор Систем, Калоприемники Флексима Коло, Калоприемники Флексима Коло мини, Калоприемники Флексима Илео, Калоприемники Флексима Илео Флоу Контрол, Калоприемники Флексима Ки Коло, Калоприемники Флексима Ки Илео Флоу Контрол, Калоприемники дренируемые Флексима Ки Ролл-ап, дренируемые калоприемники Флексима Ролл-ап, калоприемники закрытые Флексима Коло Конвекс, а также базовые пластины липкие для калоприемников Проксима 2, Алмарис Твин +, Алмарис Твин + Микст, Конвекс Алмарис Твин +, Флексима Ки конвексные, Флексима Ки бэйз плейт клеятся липким слоем на кожу вокруг стомы у пациентов с коло- или илеостомой (к базовым пластинам присоединяются соответствующие калоприемники).

Твин + Хай Флоу», Калоприемники «Алмарис Твин + Илео», Калоприемники «Алмарис Твин + Илео Флоу Контрол», «Алмарис Твин + Флоу Коллектор Систем»), а также Проксима 2 - имеют размеры по диаметру базовой пластины 40 мм, 50 мм, 60 мм и 80 мм. Объем 400 мл. Цвета- прозрачный, телесный.

- Калоприемники Проксима - имеют размеры по диаметру 10-70 мм (отверстие пластины). Объем 400 мл. Цвета- прозрачный, телесный.
- Калоприемники Флексима (Калоприемники «Флексима Коло», Мини-калоприемники «Флексима Коло мини», Калоприемники «Флексима Илео», Калоприемники «Флексима Илео Флоу Контрол», Калоприемники «Флексима Ки Коло», Калоприемники «Флексима Ки Илео Флоу Контрол», Калоприемники дренируемые «Флексима Ки Ролл-ап», Калоприемники дренируемые «Флексима Ролл-ап», Калоприемники закрытые «Флексима Коло Конвекс») - имеют размеры по диаметру 15-60 мм (отверстие пластины), с трафаретом. Объем 400 мл. Цвета- прозрачный, телесный.
- Базовые пластины липкие для мочеприемников «Алмарис Твин+Микст, Конвекс Алмарис Твин +, Проксима 2» размеры по диаметру 40 мм, 50мм, 60 мм.

Далее каждое из упомянутых изделий будет рассмотрено в отдельности с учетом их особенностей.

I. Калоприемники для стомированных больных, варианты исполнения:

1. Калоприемники «Проксима»:

Калоприемники Проксима. Представляют собой однокомпонентную систему.

Назначение, сфера применения. Изделия по уходу за стомированными больными.

Мешки для круглосуточного сбора кала у стомированных больных.

Не требует специальных условий хранения.

Характеристики системы:

- Объем 0,4 литра
- В наборе 30 мешков
- Антирефлюксный клапан предотвращает обратный ток кала.
- Безопасный и эластичный крестообразный выпуск снижает риск протечки.
- Мешок покрыт тканевой материал для обеспечения комфорта для пациента.

Цвет: телесный, прозрачный

Размеры: d – 10-70 мм – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)


Объем: 0,4 л

Применение: Калоприемники «Проксима»

1-компонентные калоприемники для пациентов с колостомой.

Применение: после операции по наложению стомы выбирается калоприемник, максимально соответствующий типу проведенной операции и наложенной стомы. После операции диаметр стомы будет незначительно уменьшаться. Необходимо выбирать тот диаметр отверстия в калоприемнике, который максимально соответствует диаметру наложенной стомы.

Подготовка кожи:

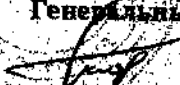КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор

/Петухов М.М./

- вымойте руки
- аккуратно очистите кожу вокруг стомы теплой водой и протрите мягкой тканью.
- Не используйте для очистки спиртосодержащие растворы и любые растворы, которые могут повредить хорошей адгезии калоприемника.

Использование калоприемника

- Приоткройте калоприемник, чтобы немного воздуха попало внутрь мешка
- Отделите защитную пленку от пленки, защищающей кожу.
- Начинайте приклеивать калоприемник снизу вверх (от основания стомы).
- Аккуратно прижмите калоприемник к коже (также снизу вверх).
- Убедитесь в хорошей адгезии калоприемника.

Удаление калоприемника.

- Аккуратно отсоединяйте калоприемник от кожи сверху вниз, рукой придерживая кожу.

Использование пластыря для защиты фильтра.

При необходимости инактивировать фильтр (в ванной или душе), наклейте адгезивный пластырь на отверстие для эвакуации газов, таким образом фильтр будет заблокирован.

Условия хранения: хранить в сухом месте при комнатной температуре.

1-компонентные калоприемники Проксима для пациентов с илеостомой имеют следующее применение:

Использование

- Средства по уходу за стомой должны подбираться в соответствии с проведенной операцией и наложенной стомой. После операции диаметр стомы может незначительно уменьшиться.

Подготовка кожи:

- вымойте руки
- аккуратно очистите кожу вокруг стомы теплой водой и протрите мягкой тканью.
- Не используйте для очистки спиртосодержащие растворы и любые растворы, которые могут повредить хорошей адгезии мочеприемника.

Использование калоприемника

- Разделите стенки калоприемника, для того чтобы впустить немного воздуха.
- Зафиксируйте выпускающее отверстие калоприемника (с помощью обычного зажима или с помощью системы Флоу Контрол)
- Начинайте приклеивать калоприемник снизу вверх (от основания стомы).
- Аккуратно прижмите калоприемник к коже (также снизу вверх).
- Убедитесь в хорошей адгезии калоприемника.

Удаление калоприемника.

- Аккуратно отсоединяйте мочеприемник от кожи сверху вниз, рукой придерживая кожу.

Опорожнение калоприемника.

- открытые мешки со стандартным зажимом или с системой High Flow. Соединяющийся с системой Flow collector

КОПИЯ ВЕРНА
 [Подпись]
 [Печать]
 [Подпись] Петухов М.М.

- Перед присоединением мешка к пластине, закройте мешок с помощью зажима.
- Если необходимо опорожнить мешок, поместите мешок над туалетом и откройте зажим.

Открытые мешки с классическим зажимом:

- Перед использованием убедитесь, что мешок закрыт
- Используйте зажим. Который поставляется в упаковке вместе с мешком.

Открытые мешки с системой Флоу Контрол.

- Подготовьте мешок в соответствии с инструкцией к применению.
- При необходимости опорожнить мешок, отсоедините язычок и аккуратно опорожните мешок.

При повторном использовании, затяните язычок как можно выше, сверните 3 раза и соедините с закрывающим устройством до щелчка.

Использование пластыря для блокирования фильтра.

- Если необходимо инактивировать фильтр (в ванной или душе), наклейте специальный пластырь на отверстие для эвакуации газов, таким образом заблокировав фильтр.

Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте при комнатной температуре.

Срок хранения 5 лет.

1.1. Калоприемники «Проксима 2»

Представляют собой 2-компонентную систему «Проксима 2» (2-компонентные калоприемники включают мешок и базовую пластину липкую).

Назначение, сфера применения. Изделия по уходу за стомированными больными. Мешки для круглосуточного сбора кала у стомированных больных. Не требует специальных условий хранения.

Характеристики системы:

- Объем 0,4 литра
- В наборе 30 мешков
- Антирефлюксный клапан предотвращает обратный ток кала.
- Безопасный и эластичный крестообразный выпуск снижает риск протечки.
- Мешок покрыт тканевой материал для обеспечения комфорта для пациента.
- Регулируемая выводная трубка (100 см)
- Абсолютно гладкая внутренняя поверхность трубки предотвращает застой мочи и кала.
- Возможность закрепить мешок у кровати или кресле-каталке.
- Базовые пластины в комплекте.

Цвет: телесный, прозрачный

Размеры: d – 40/50/60/80 мм – диаметр фланцевого соединения (вырезаемое отверстие пластины) (с трафаретом)


Объем: 0,4 л



Применение: Калоприемники «Проксима 2» открытые и закрытые:

Калоприемники «Проксима 2» представляет собой закрытый мешок состоит многослойного полиэтилена – не пропускает запах и звук.

Интегрированный в него угольно-ламинарный фильтр имеет длину 4 см, не контактирует с одеждой и не требует специальной активации.

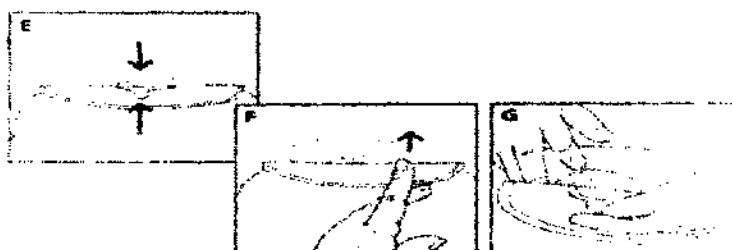

Использование системы

Перед использованием калоприемника

1. Удалите бумажную пленку, защищающую адгезивную часть пластины, и поместите ее на кожу. Аккуратно прижмите нижнюю часть пластины к коже, затем приклеивайте боковые и верхние ее части, избегая при этом образования складок (см. рис. B).
1. Убедитесь в том, что замочное устройство открыто для этого приподнимите немного его рычажок – не форсировав при этом (см. рис. C).
1. Возьмите стома-мешок и аккуратным нажатием закрепите его фланцевую часть на фланцевом кольце адгезивной пластины, начиная при этом снизу. Продолжайте соединение двух фланцевых частей, осуществляя осторожные нажатия и продвигаясь к верху пластины. Вы услышите характерный слабый звук «клака», который означает, что мешок надежно закреплен на фланцевом кольце пластины (см. рис. D).
1. Нажмите на рычажок, как показано на рис. E.
1. Проверьте надежность закрепления стома-мешка на пластине, потянув его.

Отсоединение мешка

1. Убедитесь в том, что пластмассовый язычок мешка строго ориентирован по отношению к замковому устройству, как показано на рисунке B. Откройте замковое устройство, немного приподняв его рычажок.
1. Потяните одной рукой за язычок мешка вниз, таким образом медленно отсоединяя мешок от пластины (см. рис. G).


Проксима 2 двухкомпонентная система

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
[Подпись]
Петухов М.М.

Калоприемники «Проксима 2» открытые мешки, состоящие из многослойного полиэтилена – не пропускает запах и звук, имеет широкий эвакуационный рукав длиной 70 мм и мягкий зажим.

Использование системы

Для освобождения мешка от его содержимого от-
кройте зажим, направив при этом конец каловыводя-
щего рукава в унитаз. После опустошения калоприем-
ника очистите нижнюю часть рукава с помощью
мягкой ткани и вновь закрепите зажим

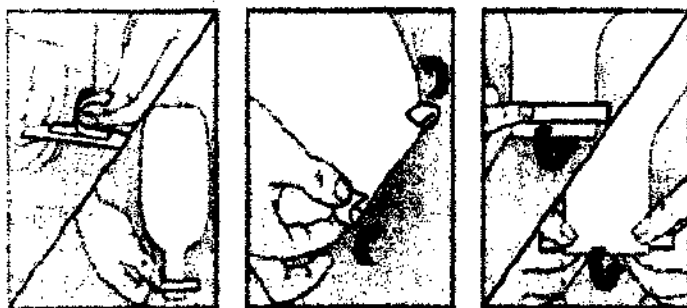

Применение: после операции по наложению стомы выбирается калоприемник, максимально соответствующий типу проведенной операции и наложенной стомы. После операции диаметр стомы будет незначительно уменьшаться. Необходимо выбирать тот диаметр отверстия в калоприемнике, который максимально соответствует диаметру наложенной стомы.

Подготовка кожи:

- вымойте руки
- аккуратно очистите кожу вокруг стомы теплой водой и протрите мягкой тканью;
- Не используйте для очистки спирто- и йодосодержащие растворы, которые могут повредить хорошую адгезию калоприемника.

КОНИА ВЕРНА
Директор
Петухов М.М.

Использование калоприемника

- Приоткройте калоприемник, чтобы немного воздуха попало внутрь мешка
- Отделите защитную пленку от пленки, защищающей кожу.
- Начинайте приклеивать калоприемник снизу вверх (от основания стомы).
- Аккуратно прижмите калоприемник к коже (также снизу вверх).
- Убедитесь в хорошей адгезии калоприемника.

Удаление калоприемника.

- Аккуратно отсоединяйте калоприемник от кожи сверху вниз, рукой придерживая кожу.

Использование пластыря для защиты фильтра.

При необходимости инактивировать фильтр (в ванной или душе), наклейте адгезивный пластырь на отверстие для эвакуации газов, таким образом фильтр будет заблокирован.

Условия хранения: хранить в сухом месте при комнатной температуре.

2. Калоприемники Алмарис Твин + и Алмарис

Мини-калоприемники «Алмарис Оптима мини», Калоприемники «Алмарис Оптима», Калоприемники «Алмарис Квайт», Калоприемники «Алмарис Протект», Калоприемники «Алмарис Преференс», Калоприемники «Алмарис Твин + Коло», Калоприемники «Алмарис Твин + Хай Флоу», Калоприемники «Алмарис Твин + Илео», Калоприемники «Алмарис Твин + Илео Флоу Контрол», «Алмарис Твин + Флоу Коллектор Систем».

Описание изделия

Изделия представляют собой специальные закрытые калоприемники с базовыми устройствами, широкий выбор которых позволяет надежно защищать кожу. Размеры указанных базовых устройств (пластин) варьируются от 40, 50, 60 до 80 мм. Для максимального комфорта пациента мешок имеет эргономичную форму.

Мягкий нетканый материал, контактирующий с кожей обеспечивает комфорт для пациентов, бесшумная пластиковая пленка делает мешки незаметными, нейтрализующий фильтр полностью интегрирован в мешок и не контактирует с одеждой пациента.

Калоприемники со стандартными зажимами (с фильтром и без фильтра), удобный пластиковый зажим телесного цвета может использоваться многократно. Система Хай Флоу обеспечивает простоту опорожнения мешка, кроме того, благодаря системе Хай Флоу (калоприемники «Алмарис Твин + Хай Флоу») мешок не перекручивается. Система Флоу Коллектор обеспечивает достаточный объем сбора отделяемого в течение суток и надежный выпускной клапан, имеет большой объем камеры и длинную трубку.

Закрытые калоприемники Алмарис Твин + имеют эргономичную форму мешка, благодаря мягкому нетканому материалу, контактирующему с кожей обеспечивается комфорт пациента, а бесшумная пластиковая пленка делает изделие незаметным (рис. 1).

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

/Петухов М.М./



Рис. 1

Эргономичный дизайн мешка имеет нейтрализующий фильтр, который полностью интегрирован в калоприемник (фильтр не контактирует с одеждой) (рис. 2). Данный ламинарный фильтр позволяет свободно выходить газам и предотвращает проникновение запаха.

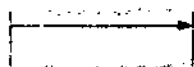


Рис. 2

Almarys Twin + High Flow

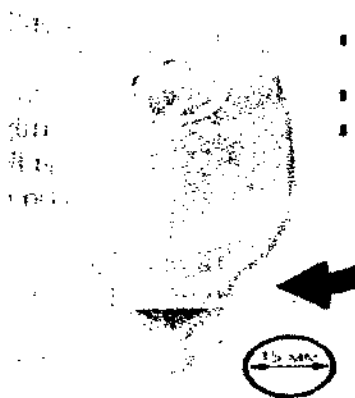


Рис. 3

На рис. 3 представлено устройство Алмарис Твин + Хай Флоу, имеющее широкий клапан, диаметром 15 мм и позволяет устройству не перекручиваться, что в свою очередь обеспечивает простоту опорожнения.

Система Флоу Коллектор (рис. 4) является оптимальной и достаточной для сбора отделяемого в течение суток, имеет большой объем, длинную выпускную трубку и надежный выпускной клапан.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
[Подпись]
Перухов М.М.

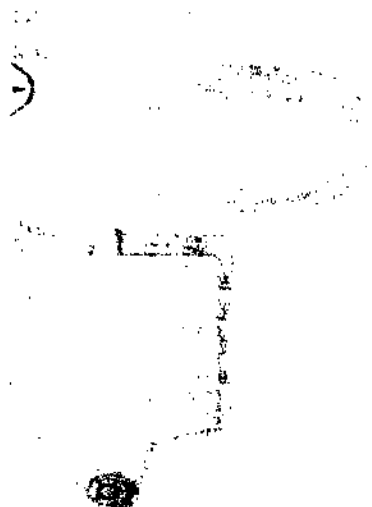


Рис. 4

Дренируемые калоприемники Алмарис Твин + могут быть с фильтром и без него, а также могут быть снабжены удобным пластиковым зажимом телесного цвета для многократного использования (рис. 5).



Рис. 5

Назначение

Все модификации калоприемников Алмарис Твин + используются в качестве изделий для сбора кала в течение суток у стомированных больных с коло- или илеостомой, а также в постоперационный период.

Используемые материалы

- пластик, полимерные материалы;
- мягкий нетканый материал;
- бесшумная пластиковая пленка.

Цвет: телесный, прозрачный

Размеры: $d - 40/50/60/80$ мм – диаметр фланцевого соединения (вырезаемое отверстие пластины)

Объем: 0,4 л

Применение: калоприемники Алмарис Твин +:



Алмарис Твин + Коло, Алмарис Твин + Илео, Алмарис твин + Илео Флоу Контрол, Алмарис Твин + Хай Флоу, Алмарис Твин + Флоу Коллектор Систем



2-компонентные мочеприемники для пациентов со стомами:

- Базовая пластина с защитным для кожи слоем и держащим кольцом для мешка с закрывающим замком.
- Мешки: с мягким, защитным материалом для защиты кожи от раздражения.
- эргономичная форма,
- бесшумная пластиковая пленка, предотвращающая проникновение запаха.
- встроенный ламинарный фильтр (для закрытых и открытых мешков), позволяющий свободно выходить газам и предотвращающим проникновение запаха.

1. Использование.

Измерьте диаметр своей стомы и выберите пластину с соответствующим размером. Вырежьте отверстие по диаметру своей стомы, прибавив примерно 5 мм.

Диаметр фланца

40 мм

50мм

60мм

80мм

Максимальный размер кольца

30мм

40мм

50мм

70мм

2. Подготовка кожи:

- аккуратно очистите кожу вокруг стомы теплой водой. и протрите мягкой тканью. Не используйте для очистки спиртосодержащие растворы и лосьоны, которые могут повредить хорошей адгезии мочеприемника.
- Протрите мягкой тканью кожу вокруг стомы.

3. Использование пластины

- Отделите защитную пленку на базовой пластине от пленки, защищающей кожу.
- Начинайте приклеивать пластину снизу вверх (от основания стомы). Аккуратно прижмите пластину к коже.

4. Использование мешка.

- Убедитесь, что закрывающий замок находится в открытом положении, приподнимите рычаг фланца вверх без усилий (B)
- Прижмите кольцо мешка к кольцу пластины снизу вверх и соедините с пластиной. Щелчок при присоединении означает, что мешок надежно соединен с пластиной. (C)
- Опустите рычаг фланца. (D)
- Убедитесь, что мешок надежно соединен с пластиной.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Петухов М.М.

5. Удаление мешка.

- Убедитесь, что пластиковая петля мешка находится на уровне пластины.(I)
- Откройте закрывающий механизм путем поднятия пластикового рычага вверх.(F)
- Отсоедините мешок от кольца сверху вниз.(G)

6. Открытые мешки со стандартным зажимом или с системой Хай Флоу (High Flow).

- Перед присоединением мешка к пластине, закройте мешок с помощью зажима.(H-I-J).
- Если необходимо опорожнить мешок, поместите мешок над туалетом и откройте зажим. После этого протрите мешок и снова используйте зажим.

7. Открытые мешки со встроенным клапаном Флоу Контрол (Flow Control).

- Подготовьте мешок в соответствии с инструкцией к применению.
- При необходимости опорожнить мешок, отсоедините язычок клапана и аккуратно опорожните мешок.
- Аккуратно опорожните мешок.
- После освобождения мешка оставшееся содержимое удалите надавливая на мешок сверху вниз.
- При повторном использовании, затяните язычок как можно выше и протрите мешок.
- Закройте клапан в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

8. Использование пластыря для блокирования фильтра.

- Если необходимо инактивировать фильтр (в ванной или душе), наклейте специальный пластырь на отверстие для эвакуации газов, таким образом заблокировав фильтр.(K)

3. Калоприемники Флексима:

Калоприемники «Флексима Коло», Мини-калоприемники «Флексима Коло мини», Калоприемники «Флексима Илео», Калоприемники «Флексима Илео Флоу Контрол», Калоприемники «Флексима Ки Коло», Калоприемники «Флексима Ки Илео Флоу Контрол», Калоприемники дренажные «Флексима Ки Ролл-ап», Калоприемники дренажные «Флексима Ролл-ап», Калоприемники закрытые «Флексима Коло Конвекс».

Описание изделий:

В Российской Федерации с 2004 г. были зарегистрированы (ФС № 2004/1672 от 23 декабря 2004 г.) устройства по уходу за стомой, в том числе, включающие такие общие торговые названия, как, например, Флексима Ки (Flexima Key) и Флексима (Flexima), в частности в РУ ФСЗ № 2004/1672 от 23.12.04 были прописаны следующие модели: калоприемники Флексима Коло (1 piece Colo Flexima), мини-калоприемники Флексима (1 piece Flexima Colo mini), калоприемники Флексима Илео (1 piece Ileo Flexima) и калоприемники Флексима Илео-флоу-контрол (1 piece Ileo Flexima Flowcontrol). Однако в связи с перерегистрацией, обусловленной окончанием срока действия РУ ФС № 2004/1672, а также в связи с необходимостью разделения и отнесения изделий согласно виду регистрируемой продукции (т.е. необходимость разделения моче- и калоприемников на две изолированные группы изделий) и по причине расширения модельного ряда изделий, было решено уточнить при перерегистрации следующие новые названия моделей Флексима: калоприемники дренажные: «Флексима Ки Ролл-ап», «Флексима Ролл-ап», а также калоприемники закрытые «Флексима Коло Конвекс», используемыми для круглосуточного сбора кала у стомированных больных.

Изделия представляют собой специальные калоприемники с базовыми устройствами, широкий выбор которых позволяет надежно защищать кожу. Размеры

КОПИЯ ВЕРНА

/Петухов М.М./

указанных базовых устройств (пластин) варьируются от 40, 50, 60 до 80 мм. Для максимального комфорта пациента мешок имеет эргономичную форму.

Мягкий нетканый материал, контактирующий с кожей обеспечивает комфорт для пациентов, бесшумная пластиковая пленка делает мешки незаметными, нейтрализующий фильтр полностью интегрирован в мешок и не контактирует с одеждой пациента.

Калоприемники со стандартными зажимами (с фильтром и без фильтра), удобный пластиковый зажим телесного цвета может использоваться многократно. Система Хай Флоу обеспечивает простоту опорожнения мешка, кроме того, мешок не перекручивается. Система Флоу Коллектор обеспечивает достаточный объем сбора отделяемого в течение суток и надежный выпускной клапан, большой объем камеры и длинную трубку.

Закрытые калоприемники Флексима (рис. 6) комфортны и безопасны при использовании. Фильтр полностью интегрирован в мешок, не контактирует с одеждой. Комфорт обеспечивается благодаря наличию мягкого нетканого материала, контактирующего с кожей и препятствующему раздражению. Непосредственно сам мешок имеет эргономичную форму, а бесшумная пластиковая пленка делает его незаметным. Безопасность калоприемников связана с наличием гидроколлоидного адгезива в форме «цветка», не ограничивающего движения. Высокое расположение стартового отверстия обеспечивает длительную защиту и усиленный адгезивный слой под стомой.

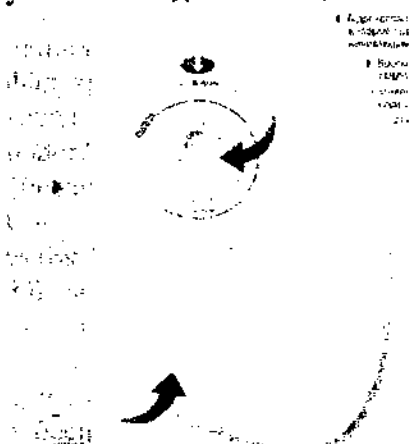


Рис. 6

Дренируемые калоприемники с зажимом Флексима снабжены удобным в применении пластиковым зажимом телесного цвета для многократного использования (рис. 7).

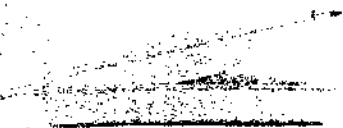


Рис. 7

Эргономичная форма мешка предназначена для максимального комфорта пациентов, фильтр полностью интегрирован в калоприемник и не контактирует с одеждой пациентов. Базовые устройства для установки приемников изготовлены в форме «цветка», на базовое устройство нанесен бумажный трафарет, позволяющий вырезать отверстие нужного диаметра. Благодаря нетканому материалу и бесшумной пластиковой пленке изделие незаметно.

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

/Петухов М.М./



Рис. 8

Назначение

Калоприемники Флексима (в различных вариантах исполнения) в зависимости от основных характеристик используются в качестве изделий, предназначенных для круглосуточного сбора кала у пациентов с илео-, колостомами.

Используемые материалы

- пластик, полимерные материалы;
- мягкий нетканый материал;
- бесшумная пластиковая пленка.


Цвет: телесный, прозрачный

Размеры: d – 15-60 мм – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

Объем: 0.4 л

Применение: калоприемники «Флексима Коло», калоприемники «Флексима Коло Мини», калоприемники закрытые «Флексима Коло Конвекс»

Указанные изделия представляют собой 1-компонентные калоприемники для пациентов с колостомой.

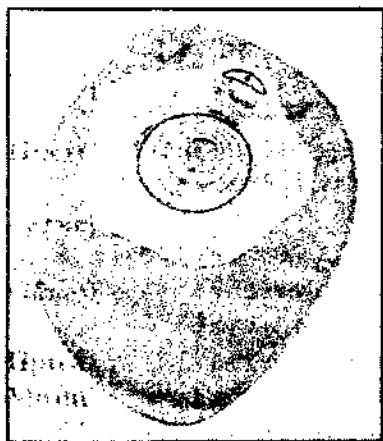

2. **Применение:** после операции по наложению стомы выбирается калоприемник, максимально соответствующий типу проведенной операции и наложенной стомы. После операции диаметр стомы будет незначительно уменьшаться. Необходимо выбирать тот диаметр отверстия в калоприемнике, который максимально соответствует диаметру наложенной стомы.

ЮРИЙ ВЕРНА
Генеральный директор
Петухов М.М.

3. Подготовка кожи:

- вымойте руки
- аккуратно очистите кожу вокруг стомы теплой водой и протрите мягкой тканью.
- Не используйте для очистки спиртосодержащие растворы и любые растворы, которые могут повредить хорошей адгезии калоприемника.

4. Использование калоприемника

- Приоткройте калоприемник, чтобы немного воздуха попало внутрь мешка
- Отделите защитную пленку от пленки, защищающей кожу.
- Начинайте приклеивать калоприемник снизу вверх (от основания стомы).
- Аккуратно прижмите калоприемник к коже (также снизу вверх).
- Убедитесь в хорошей адгезии калоприемника.

5. Удаление калоприемника.

- Аккуратно отсоединяйте калоприемник от кожи сверху вниз, рукой придерживая кожу.

6. Использование пластыря для защиты фильтра.

При необходимости инактивировать фильтр (в ванной или душе), наклейте адгезивный пластырь на отверстие для эвакуации газов, таким образом фильтр будет заблокирован.

6. Условия хранения: хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Применение: Калоприемники «Флексима Илео», калоприемники «Флексима Илео Флоу Контрол», калоприемники дренируемые «Флексима Ролл-ап»

Указанные калоприемники предназначены для пациентов с илеостомой.

7. Использование

- Средства по уходу за стомой должны подбираться в соответствии с проведенной операцией и наложенной стомой. После операции диаметр стомы может незначительно уменьшиться.

8. Подготовка кожи


- вымойте руки
- аккуратно очистите кожу вокруг стомы теплой водой и протрите мягкой тканью.
- Не используйте для очистки спиртосодержащие растворы и любые растворы, которые могут повредить хорошей адгезии калоприемника.

9. Использование калоприемника

- Разделите стенки калоприемника, для того чтобы впустить немного воздуха.
- Зафиксируйте выпускающее отверстие калоприемника (с помощью обычного зажима или с помощью системы Flow control)
- Начинайте приклеивать калоприемник снизу вверх (от основания стомы).
- Аккуратно прижмите калоприемник к коже (также снизу вверх).
- Убедитесь в хорошей адгезии калоприемника.

10. Удаление калоприемника.

- Аккуратно отсоединяйте калоприемник от кожи сверху вниз, рукой придерживая кожу.

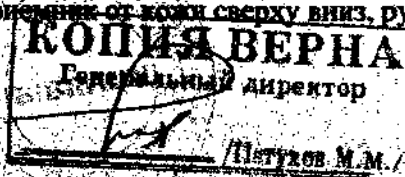

11. Опорожнение калоприемника.

- открытые мешки со стандартным зажимом или с системой Хай Флоу, соединяющейся с системой Флоу Контрол.
- Перед присоединением мешка к пластине, закройте мешок с помощью зажима.
- Если необходимо опорожнить мешок, поместите мешок над туалетом и откройте зажим.

12. Открытые мешки с классическим зажимом:

- Перед использованием убедитесь, что мешок закрыт
- Используйте зажим, который поставляется в упаковке вместе с мешком.

7. Открытые мешки с системой Flow control.

- Подготовьте мешок в соответствии с инструкцией к применению.
- При необходимости опорожнить мешок, отсоедините язычок и аккуратно опорожните мешок.

При повторном использовании, затяните язычок как можно выше, сверните 3 раза и соедините с закрывающим устройством до щелчка.

8. Использование пластыря для блокирования фильтра.

- Если необходимо инактивировать фильтр (в ванной или душе), наклейте специальный пластырь на отверстие для эвакуации газов, таким образом заблокировав фильтр.

9. Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте при комнатной температуре.

10. Срок хранения 5 лет.

Применение: Калоприемники «Флексима Ки Коло», калоприемники дренируемые «Флексима Ки Ролл-ап»

Представляют собой 2-компонентные системы для коло- и илеостомы:


- Базовая пластина с протектором кожи и мягким фланцем для присоединения мешка.
- Мешок для сбора отделяемого:
 - Мягкий материал, позволяющий избежать контакта кожи с пластиковой пленкой и обеспечивающий незаметность.
 - Эргономичная форма, обеспечивающая сочетание максимальной вместимости и незаметности.
 - Бесшумная пластиковая пленка, обеспечивающая защиту от запаха.
 - Встроенный ламинарный фильтр (для закрытых и дренируемых мешков). Обеспечивающий эвакуацию газов и устраняющий запах.

Отличительной особенностью системы является простое присоединение мешка с адгезивным слоем к гибкой базовой пластине.

1) Перед присоединением

- Отсоедините картон от базовой пластины
- Необходимо вырезать кольцо в базовой пластине по размеру стомы, прибавив дополнительно 5 мм- стома не должна перекрывать протектором кожи. (А).

2) Подготовка кожи

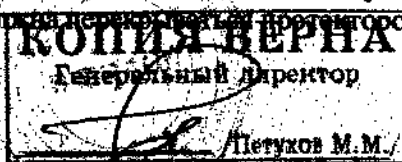

- Промойте кожу вокруг стомы прохладной водой. Не используйте спиртосодержащие растворы для обработки кожи. Это может повлиять на адгезивные свойства мешка.
- Аккуратно высушите кожу с помощью мягкой ткани.

3) Приклеивание базовой пластины

- Удалите защитную пленку с базовой пластины.
- Приклейте базовую пластину вокруг стомы, начиная с основания.
- Аккуратно прижмите пластину к коже и разгладьте, избегая формирования складок.

4) Присоединение мешка

- Разъедините стенки мешка.
- Удалите пленку, защищающую адгезивный слой.
- Поместите петлю мешка в прорезь на базовой пластине до упора (D) и (E). Избегайте контакта с адгезивным слоем.
- Приклейте мешок к пластине, избегая формирования складок (F) и (G).
- Прижмите мешок к пластине для более надежного соединения (H).
- Убедитесь, что мешок надежно прикреплен.

Заметки:

- Возможен визуальный контроль положения мешка. Белая отметка должна быть видна при правильном положении мешка на базовой пластине (см. F).

В случае, если необходимо другое положение мешка- возможно его присоединение без соблюдения вышеуказанных инструкций.

5) Удаление мешка.

- Придерживая одной рукой базовую пластину, второй рукой осторожно отсоединить мешок, начиная с верха. После полного отсоединения мешка, вытащить петлю мешка из прорези на пластине.
- При присоединении к данной базовой пластине другого мешка, необходимо полностью очистить пластину.

6) Мешок со встроенной системой Флоу Контрол.


- Подготовьте мешок в соответствии с инструкцией.
- При необходимости эвакуировать содержимое мешка, откройте мешок, потянув за клапан.
- Очистите мешок.
- Убедитесь в полной эвакуации содержимого мешка.
- Очистите клапан мешка.

Закройте мешок в соответствии с инструкцией.

7) Используйте специальный пластырь для защиты фильтра.

Если необходима инактивация фильтра (в ванной, душе), необходимо наклеить защитный адгезивный пластырь для защиты фильтра.

Калоприемники Драгана:

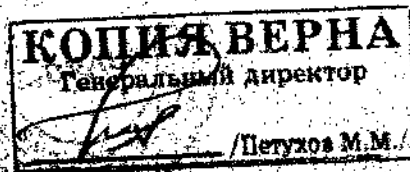

Калоприемники «Драйана С мини», калоприемники «Драйана С медиум», калоприемники «Драйана С лардж», калоприемники «Драйана С вижн 50», калоприемники «Драйана С вижн 75», калоприемники «Драйана С вижн 100»



Рис. 9

Калоприемники Драйана С (рис. 9) представлены в трех размерах: мини (макс. на 75 мл), медиум (макс. на 150 мл) и лардж (макс. на 300 мл). В частности, Драйана С мини имеют маленький размер, идеальна для дренирования в трудно доступных местах, для небольших фистул, а также могут использоваться в послеоперационном периоде у детей со стомой. Драйана С медиум предназначена для дренирования фистул, обеспечивает немедленную послеоперационную защиту стомы. Драйана С лардж обладает оптимальными размерами для максимального времени ношения приемника, также как и описанные выше изделия используется для дренирования фистулы. Наличие гибкого защелкивающейся системы, состоящей из универсальной трубки, выпускное отверстие может быть вырезано и закрыто колпачком.

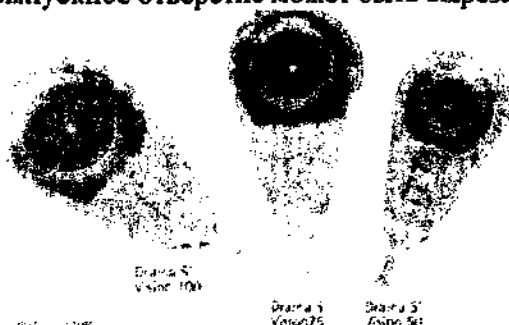


Рис. 10

Цвет: прозрачный

Размеры:

d – 10-30 мм (Драйана С мини) – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

d – 10-50 мм (Драйана С медиум) – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

d – 10-88 мм (Драйана С лардж) – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

Объемы: Калоприемники Драйана С представлены в трех размерах: мини (макс. на 75 мл), медиум (макс. на 150 мл) и лардж (макс. на 300 мл).



Калоприемники Драйана С вижн (рис. 10) имеют следующие модификации: Драйана С вижн 50 (на макс. объем 150 мл), Драйана С вижн 75 (на макс. объем 250 мл), Драйана С вижн 100 (на макс. объем 300 мл) – позволяют проверить заполнение мешка в любое время, обеспечивают легкую медицинскую помощь и непосредственный доступ к стоме, протектор кожи позволяет ношение приемника в течение длительного времени (рис. 11).



Рис. 11. Протектор кожи

Назначение

Калоприемники «Драйана С мини», калоприемники «Драйана С медиум», калоприемники «Драйана С лардж», калоприемники «Драйана С вижн 50», калоприемники «Драйана С вижн 75», калоприемники «Драйана С вижн 100» предназначены для сбора кала у стомированных больных.

Используемые материалы

- пластик;
- полиэтиленовая пленка.

Цвет: прозрачный

Размеры:

d – 10-50 мм (Драйана С вижн 50) – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

d – 10-88 мм (Драйана С вижн 75) – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

d – 10-100 мм (Драйана С вижн 100) – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

Объемы: Калоприемники Драйана С вижн имеют следующие модификации: Драйана С вижн 50 (на макс. объем 150 мл), Драйана С вижн 75 (на макс. объем 250 мл), Драйана С вижн 100 (на макс. объем 300 мл)

Применение: Калоприемники Драйана предназначены для пациентов с илеостомой:

Использование

- Средства по уходу за стомой должны подбираться в соответствии с проведенной операцией и наложенной стомой. После операции диаметр стомы может незначительно уменьшиться.

Подготовка кожи:

- вымойте руки
- аккуратно очистите кожу вокруг стомы теплой водой и протрите мягкой тканью.
- Не используйте для очистки спиртовые растворы, антисептики, другие растворы, которые могут повредить хорошей адгезии калоприемника.

ПОДПИСЬ НА
Генеральный директор

Петухов М.М.

Использование калоприемника

- Разделите стенки калоприемника, для того чтобы впустить немного воздуха.
- Зафиксируйте выпускающее отверстие калоприемника (с помощью обычного зажима или с помощью системы Флоу Контрол)
- Начинайте приклеивать калоприемник снизу вверх (от основания стомы).
- Аккуратно прижмите калоприемник к коже (также снизу вверх).
- Убедитесь в хорошей адгезии калоприемника.

Удаление калоприемника.

- Аккуратно отсоединяйте мочеприемник от кожи сверху вниз, рукой придерживая кожу.
-

Опорожнение калоприемника.

Мини-калоприемник «Биотроль Петит».

Назначение, сфера применения: Мини-калоприемник «Биотроль Петит» представляет собой небольшой пластиковый мешок для сбора каловых масс у пациентов, страдающих недержанием стула.

Характеристики изделия:

- Изделие представляет из себя пластиковый мешок с адгезивной пластиной, крепящейся вокруг ануса, сливным отверстием с пробкой и коннектором.
- Обеспечивает полную защиту кожи с учетом анатомических особенностей пациента.
- Предотвращаетмокнутие и раздражение кожи фекальными массами.
- Применяется в течение всего дня.
- Обеспечивает защиту от неприятного запаха и инфекции.
- В упаковке содержится 10 калоприемников.


Используемые материалы

- пластик;
- полиэтиленовая пленка.

Последовательность операций при применении изделия:

- Тщательно вымыть руки
- Вскрыть упаковку
- Закрепить вокруг ануса адгезивную часть мешка
- Дождаться отделения кала
- Извлечь калоприемник

Калоприемник «Фекал Коллектор I.F.» представляет собой пластиковый мешок для сбора каловых масс у пациентов, страдающих недержанием стула.

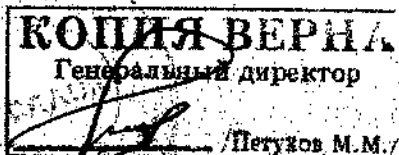



Характеристики изделия:

- Изделие представляет из себя пластиковый мешок с адгезивной пластиной, крепящейся вокруг ануса, сливным отверстием с пробкой и коннектором.
- Обеспечивает полную защиту кожи с учетом анатомических особенностей пациента.
- Предотвращаетмокнущие и раздражение кожи фекальными массами.
- Применяется в течение всего дня.
- Обеспечивает защиту от неприятного запаха и инфекции.
- В упаковке содержится 10 калоприемников.

Используемые материалы

- пластик;
- полиэтиленовая пленка.

Объем: 0,4 л

Последовательность операций при применении изделия:

- Тщательно вымыть руки
- Вскрыть защитную упаковку
- Закрепить вокруг ануса адгезивную пластину калоприемника
- Дождаться отделения кала
- Извлечь калоприемник

II. Базовые пластины липкие для калоприемников для стомированных больных, варианты исполнения:

- 1.Базовые пластины липкие «Проксима 2».
- 2.Базовые пластины липкие «Алмарис Твин +».
- 3.Базовые пластины липкие «Алмарис Твин + Микст».
- 4.Базовые пластины липкие «Конвекс Алмарис Твин + ».
- 6.Базовые пластины липкие «Флексима Ки конвексные».
- 7.Базовые пластины липкие «Флексима Ки бэйз плэйт».

Так, например, *базовые пластины липкие «Проксима 2»* для 2-компонентных калоприемников Проксима 2 являются изделиями по уходу за стомированными больными. Пластины сменные для закрепления мешков для круглосуточного сбора мочи и кала у стомированных больных. Не требует специальных условий хранения.

Характеристики системы:

- В наборе 10 пластин
- Изготовлены из ПВХ



- Не раздражает кожу и свободно отсоединяется после использования.

Базовые пластины липкие «Алмарис Твин +», базовые пластины липкие «Алмарис Твин + Микст», базовые пластины липкие «Конвекс Алмарис Твин +», базовые пластины липкие «Флексима Ки конвексные», базовые пластины липкие «Флексима Ки бэйз плэйт».

В Российской Федерации с 2004 г. были зарегистрированы (ФС № 2004/1672 от 23 декабря 2004 г.) базовые пластины Алмарис Твин +, Алмарис Твин + Микст, Конвекс Алмарис Твин + Микст, а также базовые пластины стерильные постоперационные АГ+, а также в указанном выше РУ ФС № 2004/1672 были прописаны базовые устройства Флексима Ки бэйз плэйт (Flexima Key base plate). В частности, под названием устройство подразумевалось именно то, что изделия представляют собой специальные базовые пластины, имеющие адгезивный (липкий слой), необходимый для крепления самой пластины на место вокруг стомы. В связи с чем, при перерегистрации было решено конкретизировать (указать более точное название) перечисленных базовых устройств и изменить их название на базовые пластины липкие, что и объясняет основной принцип их использования у стомированных больных. Кроме того, расширение модельного ряда изделий и появление базовых пластин липких под названием «Флексима Ки конвексные», предназначенных для установки различных модификаций мочеприемников «Флексима» и являющихся аналогами ранее зарегистрированных Флексима Ки бэйз плэйт, также способствовало внесению новых моделей базовых пластин в перечень регистрируемых изделий.

Описание изделия

Широкий выбор базовых устройств Алмарис Твин + обеспечивает надежную защиту кожи пациента:

Базовые пластины «Алмарис Твин +» (рис. 12) – широкий выбор различных диаметров (40, 50, 60 и 80 мм) (стерильные и нестерильные), состоящие из толстого гидроколлоида по всему диаметру, вырезаемому по размеру стомы, для защиты кожи и тонкого слоя по всему диаметру для адгезии (крепления самого базового пластины).



Рис. 12

Базовые пластины «Алмарис Твин + Микст» – представлен толстым слоем гидроколлоида в центре с акриловым слоем по всему диаметру базового пластины для немедленной адгезии. Диаметр: 40, 60 и 80 мм.



Рис. 13

Базовые пластины «Конвекс Алмарис Твин +» (рис. 14) – состоит из двойного гидроколлоида с держащим выпуклым кольцом для стомы с углублением. Диаметр: 40, 50, 60 и 80 мм.



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Петухов М.М.

Рис. 14

Базовые пластины имеют превосходный закрывающий замок, способствующий минимальному приложению давления на брюшную полость пациента.

Назначение

Базовые пластины липкие используются для установки калоприемников у стомированных больных.

Используемые материалы для всех перечисленных выше базовых пластин:

- мягкий пластичный материал (ПВХ);
- адгезивный и гидроколлоидный слой.

Применение: - Базовые пластины липкие «Проксима 2», базовые пластины липкие «Алмарис Твин +», базовые пластины липкие «Алмарис Твин + Микст», базовые пластины липкие «Конвекс Алмарис Твин +», базовые пластины липкие «Флексима Ки конвексные», базовые пластины липкие «Флексима Ки бэйз шэйт»

1. Подготовка для выведения кишечной петли.

А- латеральная стома на петле накладывается на выходе толстой кишки или на выходе подвздошной кишки через кожу с помощью сегмента силиконовой трубки, которая не входит в набор (трубка для абдоминального дренажа). Один из концов трубки представляет из себя первую часть петли.

NB: одним из необходимых условий для формирования петли является сохранение всех функций без перерезания тонкой кишки. Трубка должна выступать таким образом, чтобы не было излишнего натяжения кишки.

В- перед введением первой половины петли необходимо нанести кольцо протектора на кожу (на рисунке отмечено затемнением). Затем необходимо вырезать по размеру стомы. Затем аккуратно передвигать вдоль обеих частей силиконовой трубки, которую при этом необходимо приподнять.

С- после присоединения протектора, расположить петлю так, как это удобно.

Д- свободная часть петли частично введена в один из концов силиконовой трубки.

Необходимо аккуратно потянуть за трубку таким образом, чтобы центральная часть петли переместилась под толстую кишку. Необходимо избежать отсоединения трубки и петли при расположении петли.

Е- После того, как первая часть трубки правильно установлена, отделите силиконовую трубку при настраивании положения петли между большим и указательным пальцами

III. Приспособления для стомированных больных, варианты исполнения:

1. Пластиковый рукав для слива отделяемого после ирригации «Ирифлекс Сливс».
2. Резервуар для воды при проведении ирригации «Ирифлекс Резервуар».
3. Пластиковый регулятор скорости потока жидкости «Ирифлекс Регулятор».
4. Пластиковый конус для кишки для проведения ирригации «Ирифлекс конус».
5. Набор для проведения ирригации толстой кишки «Ирифлекс Сет» в составе:
 - 5.1. Пластиковый рукав для слива отделяемого после ирригации «Ирифлекс Сливс» - не более 5 штук.
 - 5.2. Резервуар для воды при проведении ирригации «Ирифлекс Резервуар».
 - 5.3. Пластиковый регулятор скорости потока жидкости «Ирифлекс Регулятор».
 - 5.4. Пластиковый конус для кишки для проведения ирригации «Ирифлекс конус».
6. Колпачок для стомы Ирифлекс.
7. Зажим для дренируемых калоприемников



8. Пояс для базовой пластины к калоприемникам «Алмарис Твин + Бельт».

Набор для проведения ирригации толстой кишки «Ирифлекс Сет», включая пластиковый рукав для слива отделяемого после ирригации «Ирифлекс Сливс», резервуар для воды при проведении ирригации «Ирифлекс Резервуар», пластиковый регулятор скорости потока жидкости «Ирифлекс Регулятор», пластиковый конус для кишки для проведения ирригации «Ирифлекс конус», колпачок для стомы «Ирифлекс»




Состав:

- Резервуар для воды - Резервуар для воды при проведении ирригации «Ирифлекс Резервуар».

- Наконечник для стомы - Пластиковый конус для кишки для проведения ирригации «Ирифлекс конус».

- регулятор потока жидкости - Пластиковый регулятор скорости потока жидкости «Ирифлекс Регулятор».

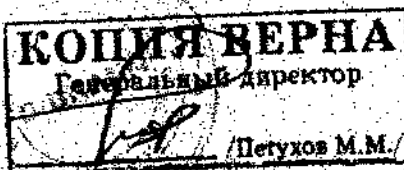

- рукав для слива жидкости - Пластиковый рукав для слива отделяемого после ирригации «Ирифлекс Сливе».

- пробка для стомы - Колпачок для стомы «Ирифлекс».

- мини-калоприемники для стомы.

Применение:

1. ввести наконечник в стому,
2. присоединить резервуар для воды
3. наклеить вокруг стомы рукав для слива жидкости.
4. Ввести в резервуар для жидкости чистую воду (до 1,5 л)
5. подождать, пока вся жидкость перетечет в наконечник
6. извлечь наконечник для стомы
7. рукав для слива жидкости поместить в унитаз,
8. дождаться полного опорожнения кишечника

КОШЕЯ ВЕРНА
Генеральный директор

Петухов М.М.

9. наклеить пробку для стомы или мини-калоприемник
10. промыть все составляющие ирригационной системы

Срок годности изделия: 5 лет

Используемые материалы:

Все перечисленные выше составные части набора изготовлены из пластика, за исключением колпачка для стомы Ирификс.

Колпачок для стомы «Ирификс» – выполнен из пластика, нетканевого материала.

Зажим для дренируемых калоприемников - предназначен для закрытия калоприемника.

- **Способ применения:** наложить на выходное отверстие калоприемника.
- **Характеристики системы:** 10 штук в упаковке

Используемые материалы зажима для дренируемых калоприемников:


- пластик

Пояс для базовой пластины к калоприемникам «Алмарис Твин + Белт» – предназначен для крепления базовой пластины.

- **Способ применения:** продеть в ушки базовой пластины и разместить на поясе.
- **Характеристики системы:** 1 штука в упаковке.

Используемые материалы в поясе для базовой пластины к калоприемникам «Алмарис Твин+ Белт»:

- полиэтилен
- тянущийся тканевой материал

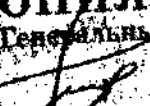КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор

Петухов М.М.

Справка об изделиях медицинского назначения
Калоприемники, базовые пластины липкие для калоприемников,
приспособления для стомированных больных, производства «Б.Браун
Медикал С.А.С.» (B.Braun Medical S.A.S.), Франция

Калоприемники, базовые пластины липкие для калоприемников, приспособления для стомированных больных имеют следующее предназначение:

Различные варианты исполнения калоприемников Алмарис и Алмарис Твин + используются в качестве изделий для сбора кала в течение суток у стомированных больных с коло- или илеостомой, а также в послеоперационный период.

Калоприемники «Драйана С мини», калоприемники «Драйана С медиум», калоприемники «Драйана С лардж», калоприемники «Драйана С вижн 50», калоприемники «Драйана С вижн 75», калоприемники «Драйана С вижн 100» предназначены для сбора кала у стомированных больных.

Мини-калоприемник «Биотроль Петит» представляет собой небольшой пластиковый мешок для сбора каловых масс у пациентов, страдающих недержанием стула.

Калоприемники «Проксима» и «Проксима 2» также предназначены для сбора кала у стомированных больных.


Калоприемников Флексима в зависимости от основных характеристик используются в качестве изделий, предназначенных для круглосуточного сбора кала у пациентов с илео-, колостомами.

Различные базовые пластины липкие необходимо для надежной установки определенных моделей калоприемников.

Приспособления для стомированных больных позволяют проводить ирригацию толстой кишки, закреплять сами калоприемники (например, зажим для дренируемых калоприемников) или закреплять базовые пластины (например, пояс для базовой пластины к калоприемникам «Алмарис Твин + Белт»), а также осуществлять процесс утилизации использованных калоприемников (например, мешки для использованных аксессуаров).

Система Флоу Коллектор (мочеприемники «Алмарис Твин + Флоу коллектор Систем») является оптимальной и достаточной для сбора отделяемого в течение суток, имеет большой объем, длинную выпускную трубку и надежный выпускной клапан.

Калоприемники «Проксима 2», «Алмарис Оптима мини», «Алмарис Оптима», «Алмарис Квайет», «Алмарис Протект», «Алмарис Преференс», «Алмарис Твин + Коло», «Алмарис Твин + Хай Флоу», «Алмарис Твин + Илео», «Алмарис Твин + Илео Флоу Коллектор» с фильтром, «Алмарис Твин +

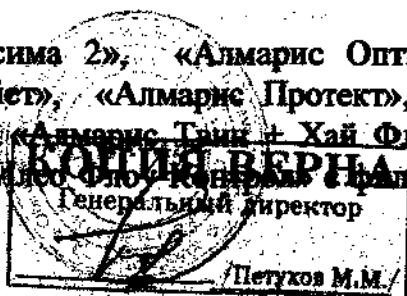

Флоу Коллектор Систем», «Флексима Коло», «Флексима Коло мини», «Флексима Илео», «Флексима Илео Флоу Контрол», «Флексима Ки Коло», «Флексима Ки Илео Флоу Контрол», Калоприемники дренируемые «Флексима Ки Ролл-ап», дренируемые калоприемники «Флексима Ролл-ап», калоприемники закрытые «Флексима Коло Конвекс», а также базовые пластины липкие для калоприемников «Проксима 2», «Алмарис Твин +», «Алмарис Твин + Микст», «Конвекс Алмарис Твин +», «Флексима Ки конвексные», «Флексима Ки бэйз плэйт» клеятся липким слоем на кожу вокруг стомы у пациентов с коло- или илеостомой (к базовым пластинам присоединяются соответствующие калоприемники).


Характеристики изделий:

- Калоприемники Алмарис и Алмарис Твин+ (Мини-калоприемники «Алмарис Оптима мини», Калоприемники «Алмарис Оптима», Калоприемники «Алмарис Квайет», Калоприемники «Алмарис Протект», Калоприемники «Алмарис Преференс», Калоприемники «Алмарис Твин + Коло», Калоприемники «Алмарис Твин + Хай Флоу», Калоприемники «Алмарис Твин + Илео», Калоприемники «Алмарис Твин + Илео Флоу Контрол», «Алмарис Твин + Флоу Коллектор Систем»), а также Проксима 2 - имеют размеры по диаметру базовой пластины 40 мм, 50 мм, 60 мм и 80 мм. Объем 400 мл. Цвета-прозрачный, телесный.
- Калоприемники Проксима - имеют размеры по диаметру 10-70 мм (отверстие пластины). Объем 400 мл. Цвета-прозрачный, телесный.
- Калоприемники Флексима (Калоприемники «Флексима Коло», Мини-калоприемники «Флексима Коло мини», Калоприемники «Флексима Илео», Калоприемники «Флексима Илео Флоу Контрол», Калоприемники «Флексима Ки Коло», Калоприемники «Флексима Ки Илео Флоу Контрол», Калоприемники дренируемые «Флексима Ки Ролл-ап», Калоприемники дренируемые «Флексима Ролл-ап», Калоприемники закрытые «Флексима Коло Конвекс») - имеют размеры по диаметру 15-60 мм (отверстие пластины), с трафаретом. Объем 400 мл. Цвета-прозрачный, телесный.
- Базовые пластины липкие для мочеприемников «Алмарис Твин+Микст, Конвекс Алмарис Твин +, Проксима 2» размеры по диаметру 40 мм, 50мм, 60 мм.

Далее каждое из упомянутых изделий будет рассмотрено в отдельности с учетом их особенностей.

I. Калоприемники для стомированных больных, варианты исполнения:

1. Калоприемники «Проксима»

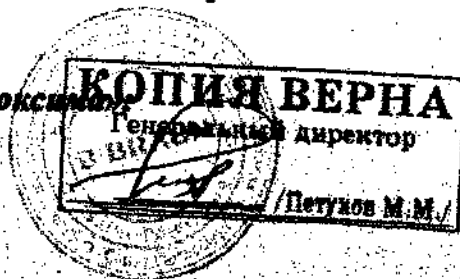

Калоприемники Проксима. Представляют собой однокомпонентную систему.

Назначение, сфера применения. Изделия по уходу за стомированными больными.

Мешки для круглосуточного сбора кала у стомированных больных.
Не требует специальных условий хранения.

Характеристики системы:

- Объем 0,4 литра
- В наборе 30 мешков
- Антирефлюксный клапан предотвращает обратный ток кала.
- Безопасный и эластичный крестообразный выпуск снижает риск протечки.
- Мешок покрыт тканевой материал для обеспечения комфорта для пациента.

Цвет: телесный, прозрачный

Размеры: d – 10-70 мм – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

Объем: 0.4 л

Сведения о сроках разработки. Разработка и промышленное производство началось в 2003 году. Изделие имеет Декларацию соответствия и ISO сертификат 9001:2000.

Государства, на рынки которых поставляется:

Изделия поставляется во все страны Европейского союза, Африки, Канаду и США.

1.1. Калоприемники «Проксима 2»

Представляют собой 2-компонентную систему «Проксима 2» (2-компонентные калоприемники включают мешок и базовую пластину липкую).

Назначение, сфера применения. Изделия по уходу за стомированными больными. Мешки для круглосуточного сбора кала у стомированных больных.

Не требует специальных условий хранения.

Характеристики системы:

- Объем 0,4 литра
- В наборе 30 мешков



- Антирефлюксный клапан предотвращает обратный ток кала.
- Безопасный и эластичный крестообразный выпуск снижает риск протечки.
- Мешок покрыт тканевой материал для обеспечения комфорта для пациента.
- Регулируемая выводная трубка (100 см)
- Абсолютно гладкая внутренняя поверхность трубки предотвращает застой мочи и кала.
- Возможность закрепить мешок у кровати или кресле-каталке.
- Базовые пластины в комплекте.

Цвет: телесный, прозрачный

Размеры: d – 40/50/60/80 мм – диаметр фланцевого соединения (вырезаемое отверстие пластины) (с трафаретом)

Объем: 0.4 л

Сведения о сроках разработки. Разработка и промышленное производство началось в 2003 году. Изделие имеет Декларацию соответствия и ISO сертификат 9001:2000.

Государства, на рынки которых поставляется:

Поставляется во все страны Европейского союза, Африки, Канаду и США.

2. Калоприемники Алмарис Твин + и Алмарис

Мини-калоприемники «Алмарис Оптима мини», Калоприемники «Алмарис Оптима», Калоприемники «Алмарис Квайт», Калоприемники «Алмарис Протект», Калоприемники «Алмарис Преференс», Калоприемники «Алмарис Твин + Коло», Калоприемники «Алмарис Твин + Хай Флоу», Калоприемники «Алмарис Твин + Илео», Калоприемники «Алмарис Твин + Илео Флоу Контрол», «Алмарис Твин + Флоу Коллектор Систем».

Описание изделия

Изделия представляют собой специальные закрытые калоприемники с базовыми устройствами, широкий выбор которых позволяет надежно защищать кожу. Размеры указанных базовых устройств (пластин) варьируются от 40, 50, 60 до 80 мм. Для максимального комфорта пациента мешок имеет эргономичную форму.

Мягкий нетканый материал, контактирующий с кожей обеспечивает комфорт для пациентов, бесшумная пластиковая пленка делает мешки незаметными, нейтрализующий фильтр полностью интегрирован в мешок и не контактирует с одеждой пациента.

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

/Петухов М.М./

Калоприемники со стандартными зажимами (с фильтром и без фильтра), удобный пластиковый зажим телесного цвета может использоваться многократно. Система Хай Флоу обеспечивает простоту опорожнения мешка, кроме того, благодаря системе Хай Флоу (калоприемники «Алмарис Твин + Хай Флоу») мешок не перекручивается. Система Флоу Коллектор обеспечивает достаточной объем сбора отделяемого в течение суток и надежный выпускной клапан, имеет большой объем камеры и длинную трубку.

Закрытые калоприемники Алмарис Твин + имеют эргономичную форму мешка, благодаря мягкому нетканому материалу, контактирующему с кожей обеспечивается комфорт пациента, а бесшумная пластиковая пленка делает изделие незаметным (рис. 1).

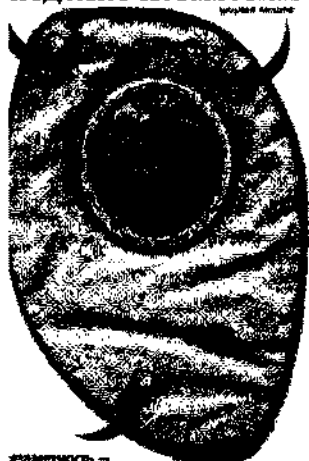


Рис. 1

Эргономичный дизайн мешка имеет нейтрализующий фильтр, который полностью интегрирован в калоприемник (фильтр не контактирует с одеждой) (рис. 2).

Данный ламинарный фильтр позволяет свободно выходить газам и предотвращает проникновение запаха.

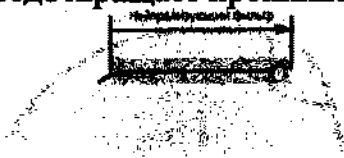


Рис. 2

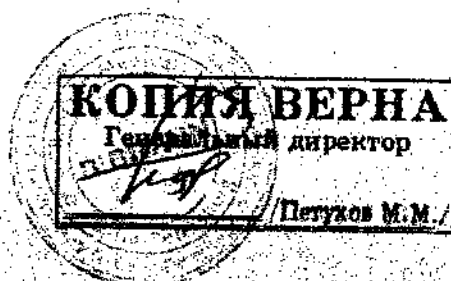




Рис. 3

На рис. 3 представлено устройство Алмарис Твин + Хай Флоу, имеющее широкий клапан, диаметром 15 мм и позволяет устройству не перекручиваться, что в свою очередь обеспечивает простоту опорожнения.

Система Флоу Коллектор (рис. 4) является оптимальной и достаточной для сбора отделяемого в течение суток, имеет большой объем, длинную выпускную трубку и надежный выпускной клапан.

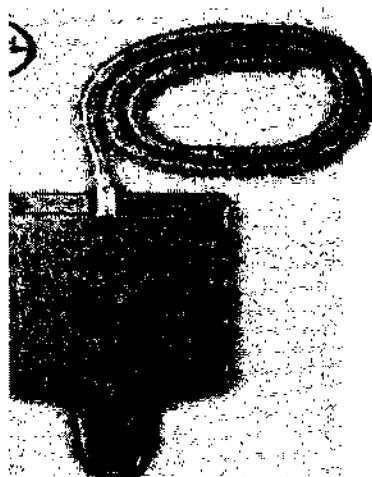


Рис. 4

Дренируемые калоприменики Алмарис Твин + могут быть с фильтром и без него, а также могут быть снабжены удобным пластиковым зажимом телесного цвета для многократного использования (рис. 5).





Рис. 5

Назначение

Все модификации калоприемников Алмарис Твин + используются в качестве изделий для сбора кала в течение суток у стомированных больных с коло- или илеостомой, а также в послеоперационный период.

Используемые материалы

- пластик, полимерные материалы;
- мягкий нетканый материал;
- бесшумная пластиковая пленка.

Цвет: телесный, прозрачный

Размеры: d – 40/50/60/80 мм – диаметр фланцевого соединения (вырезаемое отверстие пластины)

Объем: 0.4 л


Статус регистрации и дата начала производства

Изделия производятся с 2001 г. и поставляются в Германию, Францию, Великобританию, Голландию, Италию, Испанию, Португалию.

3. Калоприемники Флексима:

Калоприемники «Флексима Коло», Мини-калоприемники «Флексима Коло мини», Калоприемники «Флексима Илео», Калоприемники «Флексима Илео Флоу Контрол», Калоприемники «Флексима Ки Коло», Калоприемники «Флексима Ки Илео Флоу Контрол», Калоприемники дренируемые «Флексима Ки Ролл-ап», Калоприемники дренируемые «Флексима Ролл-ап», Калоприемники закрытые «Флексима Коло-Конвекс».

Описание изделий:

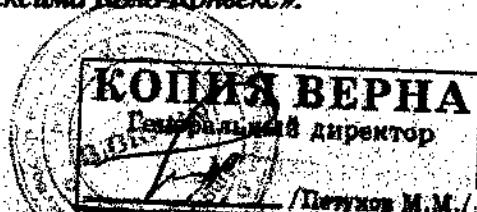

В Российской Федерации с 2004 г. были зарегистрированы (ФС № 2004/1672 от 23 декабря 2004 г.) устройства по уходу за стомой, в том числе, включающие такие общие торговые названия, как, например, Флексима Ки (Flexima Key) и Флексима (Flexima), в частности в РУ ФСЗ № 2004/1672 от 23.12.04 были прописаны следующие модели: калоприемники Флексима Коло (1 piece Colo Flexima), мини-калоприемники Флексима (1 piece Flexima Colo mini), калоприемники Флексима Илео (1 piece Ileo Flexima) и калоприемники Флексима Илео-флоу-контрол (1 piece Ileo Flexima Flowcontrol). Однако в связи с перерегистрацией, обусловленной окончанием срока действия РУ ФС № 2004/1672, а также в связи с необходимостью разделения и отнесения изделий согласно виду регистрируемой продукции (т.е. необходимость разделения моче- и калоприемников на две изолированные группы изделий) и по причине расширения модельного ряда изделий, было решено уточнить при перерегистрации следующие новые названия моделей Флексима: калоприемники дренируемые: «Флексима Ки Ролл-ап», «Флексима Ролл-ап», а также калоприемники закрытые «Флексима Коло Конвекс», используемыми для круглосуточного сбора кала у стомированных больных.

Изделия представляют собой специальные закрытые калоприемники с базовыми устройствами, широкий выбор которых позволяет надежно защищать кожу. Размеры указанных базовых устройств (пластин) варьируются от 40, 50, 60 до 80 мм. Для максимального комфорта пациента мешок имеет эргономичную форму.

Мягкий нетканый материал, контактирующий с кожей обеспечивает комфорт для пациентов, бесшумная пластиковая пленка делает мешки незаметными, нейтрализующий фильтр полностью интегрирован в мешок и не контактирует с одеждой пациента.

Калоприемники со стандартными зажимами (с фильтром и без фильтра), удобный пластиковый зажим телесного цвета может использоваться многократно. Система Хай Флоу обеспечивает простоту опорожнения мешка, кроме того, мешок не перекручивается. Система Флоу Коллектор обеспечивает достаточной объем сбора отделяемого в течение суток и надежный выпускной клапан, большой объем камеры и длинную трубку.

Закрытые калоприемники Флексима (рис. 6) комфортны и безопасны при использовании. Фильтр полностью интегрирован в мешок, не контактирует с одеждой. Комфорт обеспечивается благодаря наличию мягкого нетканого материала, контактирующего с кожей и препятствующему раздражению. Непосредственно сам мешок имеет эргономичную форму, а бесшумная пластиковая пленка делает его незаметным. Безопасность калоприемников связана с наличием гидроколлоидного адгезива в форме «цветка», не ограничивающего движения. Высокое расположение стартового отверстия обеспечивает длительную защиту и усиленный адгезивный слой под стомой.





Рис. 6

Дренируемые калоприемники с зажимом Флексима снабжены удобным в применении пластиковым зажимом телесного цвета для многократного использования (рис. 7).

Рис. 7

Эргономичная форма мешка предназначена для максимального комфорта пациентов, фильтр полностью интегрирован в калоприемник и не контактирует с одеждой пациентов. Базовые устройства для установки приемников изготовлены в форме «цветка», на базовое устройство нанесен бумажный трафарет, позволяющий вырезать отверстие нужного диаметра. Благодаря нетканому материалу и бесшумной пластиковой пленке изделие незаметны.



Рис. 8

Назначение

Калоприемники Флексима (в различных вариантах исполнения) в зависимости от основных характеристик используются в качестве изделий, предназначенных для круглосуточного сбора кала у пациентов с илео-, колостомами.

КОШЕВ ВЕРНА
Генеральный директор

Петухов В.М.

Используемые материалы

- пластик, полимерные материалы;
- мягкий нетканый материал;
- бесшумная пластиковая пленка.

Цвет: телесный, прозрачный

Размеры: d – 15-60 мм – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

Объем: 0.4 л

Статус регистрации и дата начала производства

Изделия производятся с 2001 г. и поставляются в Германию, Францию, Великобританию, Голландию, Италию, Испанию, Португалию.

4. Калоприемники Драйана:

Калоприемники «Драйана С мини», калоприемники «Драйана С медиум», калоприемники «Драйана С лардж», калоприемники «Драйана С вижн 50», калоприемники «Драйана С вижн 75», калоприемники «Драйана С вижн 100»

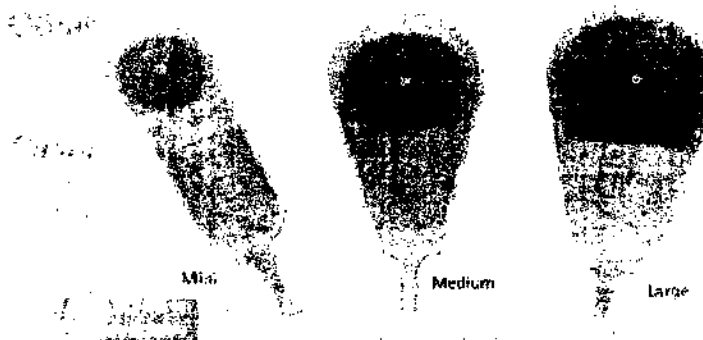


Рис. 9

Калоприемники Драйана С (рис. 9) представлены в трех размерах: мини (макс. на 75 мл), медиум (макс. на 150 мл) и лардж (макс. на 300 мл). В частности, Драйана С мини имеют маленький размер, идеальна для дренирования в трудно доступных местах, для небольших фистул, а также могут использоваться в послеоперационном периоде у детей со стомой. Драйана С медиум предназначена для дренирования фистул, обеспечивает немедленную послеоперационную запитку стомы. Драйана С лардж обладает оптимальными размерами для максимального времени ношения приемника, также как и описанные выше изделия используется для дренирования фистулы. Написано: Драйана С вижн 50, Драйана С вижн 75, Драйана С вижн 100.

КОПЕИ ВЕРНА
Генеральный директор
/Петухов М.М./

состоящей из универсальной трубки, выпускное отверстие может быть вырезано и закрыто колпачком.

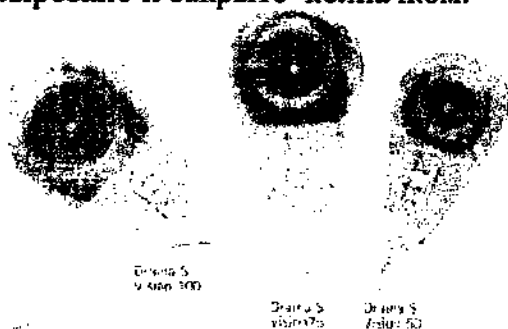


Рис. 10

Цвет: прозрачный

Размеры:

d – 10-30 мм (Драйана С мини) – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

d – 10-50 мм (Драйана С медиум) – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

d – 10-88 мм (Драйана С лардж) – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

Объемы: Калоприемники Драйана С представлены в трех размерах: мини (макс. на 75 мл), медиум (макс. на 150 мл) и лардж (макс. на 300 мл).

Калопремники Драйана С вижн (рис. 10) имеют следующие модификации: Драйана С вижн 50 (на макс. объем 150 мл), Драйана С вижн 75 (на макс. объем 250 мл), Драйана С вижн 100 (на макс. объем 300 мл) – позволяют проверить заполнение мешка в любое время, обеспечивают легкую медицинскую помощь и непосредственный доступ к стоме, протектор кожи позволяет ношение приемника в течение длительного времени (рис. 11).



Рис. 11. Протектор кожи

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

/Петухов М.М./

Назначение

Калоприемники «Драйана С мини», калоприемники «Драйана С медиум», калоприемники «Драйана С лардж», калоприемники «Драйана С вижн 50», калоприемники «Драйана С вижн 75», калоприемники «Драйана С вижн 100» предназначены для сбора кала у стомированных больных.

Используемые материалы

- пластик;
- полиэтиленовая пленка.

Цвет: прозрачный

Размеры:

d – 10-50 мм (Драйана С вижн 50) – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

d – 10-88 мм (Драйана С вижн 75) – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

d – 10-100 мм (Драйана С вижн 100) – вырезаемое отверстие пластины (с трафаретом)

Объемы: Калоприемники Драйана С вижн имеют следующие модификации: Драйана С вижн 50 (на макс. объем 150 мл), Драйана С вижн 75 (на макс. объем 250 мл), Драйана С вижн 100 (на макс. объем 300 мл)

Статус регистрации и дата начала производства


Изделия производятся с 2001 г. и поставляются в Германию, Францию, Великобританию, Голландию, Италию, Испанию, Португалию.

Мини-калоприемник «Биотроль Петит».

Назначение, сфера применения: Мини-калоприемник «Биотроль Петит» представляет собой небольшой пластиковый мешок для сбора каловых масс у пациентов, страдающих недержанием стула.

Характеристики изделия:

- Изделие представляет из себя пластиковый мешок с адгезивной пластиной, крепящейся вокруг ануса, сливным отверстием с пробкой и коннектором.
- Обеспечивает полную защиту кожи с учетом анатомических особенностей пациента.
- Предотвращаетмокнутие и раздражение кожи фекальными массами.

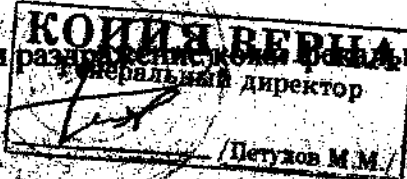

- Применяется в течение всего дня.
- Обеспечивает защиту от неприятного запаха и инфекции.
- В упаковке содержится 10 калоприемников.

Используемые материалы


- пластик;
- полиэтиленовая пленка.

Сведения о сроках разработки. Разработка и промышленное производство началось в 2000 году. Изделие имеет Декларацию соответствия и ISO сертификат 9001:2000.

Последовательность операций при применении изделия:


- Тщательно вымыть руки
- Вскрыть упаковку
- Закрепить вокруг ануса адгезивную часть мешка
- Дождаться отделения кала
- Извлечь калоприемник

Калоприемник «Фекал Коллектор I.F.» представляет собой пластиковый мешок для сбора каловых масс у пациентов, страдающих недержанием стула.

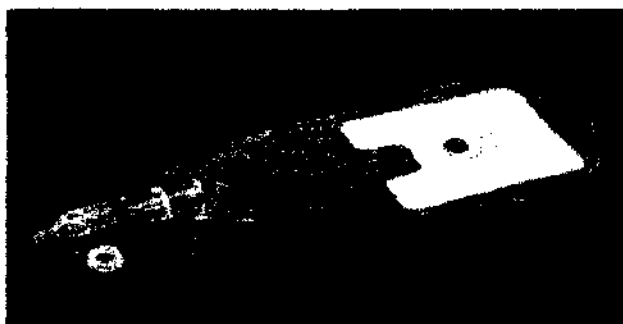

Характеристики изделия:

- Изделие представляет из себя пластиковый мешок с адгезивной пластиной, крепящейся вокруг ануса, сливным отверстием с пробкой и коннектором.
- Обеспечивает полную защиту кожи с учетом анатомических особенностей пациента.
- Предотвращаетмокнущее и раздражение кожи фекальными массами.
- Применяется в течение всего дня.
- Обеспечивает защиту от неприятного запаха и инфекции.
- В упаковке содержится 10 калоприемников.

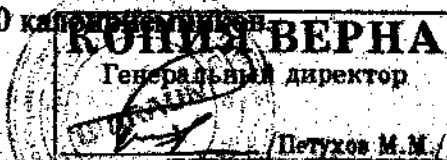

Используемые материалы

- пластик;
- полиэтиленовая пленка.

Объем: 0,4 л

Сведения о сроках разработки. Разработка и промышленное производство началось в 2000 году. Изделие имеет Декларацию соответствия и ISO сертификат 9001:2000.

Государства, на рынки которых поставляется изделие:

Калоприемник «Фекал Коллектор I.F.» поставляется во все страны Европейского союза, Африки, Канаду и США.

II. Базовые пластины липкие для калоприемников для стомированных больных, варианты исполнения:

- 1.Базовые пластины липкие «Проксима 2».
- 2.Базовые пластины липкие «Алмарис Твин +».
- 3.Базовые пластины липкие «Алмарис Твин + Микст».
- 4.Базовые пластины липкие «Конвекс Алмарис Твин +».
- 6.Базовые пластины липкие «Флексима Ки конвексные».
- 7.Базовые пластины липкие «Флексима Ки бэйз плэйт».

Так, например, *базовые пластины липкие «Проксима 2»* для 2-компонентных калоприемников Проксима 2 являются изделиями по уходу за стомированными больными. Пластины сменные для закрепления мешков для круглосуточного сбора мочи и кала у стомированных больных. Не требует специальных условий хранения.

Характеристики системы:

- В наборе 10 пластин
- Изготовлены из ПВХ
- Не раздражает кожу и свободно отсоединяется после использования.

Сведения о сроках разработки. Разработка и промышленное производство началось в 2003 году. Изделия имеют Декларацию соответствия и ISO сертификат 9001:2000.

Государства, на рынки которых поставляются:

Поставляются во все страны Европейского союза, Африки, Канаду и США.

Базовые пластины липкие «Алмарис Твин +», базовые пластины липкие «Алмарис Твин + Микст», базовые пластины липкие «Конвекс Алмарис Твин +», базовые пластины липкие «Флексима Ки конвексные», базовые пластины липкие «Флексима Ки бэйз плэйт».

КОПИИ ВЕРНА
Генеральный директор

Петухов М.М.

В Российской Федерации с 2004 г. были зарегистрированы (ФС № 2004/1672 от 23 декабря 2004 г.) базовые пластины Алмарис Твин +, Алмарис Твин + Микст, Конвекс Алмарис Твин + Микст, а также базовые пластины стерильные постоперационные АТ+, а также в указанном выше РУ ФС № 2004/1672 были прописаны базовые устройства Флексима Ки бэйз плэйт (Flexima Key base plate). В частности, под названием устройство подразумевалось именно то, что изделия представляют собой специальные базовые пластины, имеющие адгезивный (липкий слой), необходимый для крепления самой пластины на место вокруг стомы. В связи с чем, при перерегистрации было решено конкретизировать (указать более точное название) перечисленных базовых устройств и изменить их название на базовые пластины липкие, что и объясняет основной принцип их использования у стомированных больных. Кроме того, расширение модельного ряда изделий и появление базовых пластин липких под названием «Флексима Ки конвексные», предназначенных для установки различных модификаций мочеприемников «Флексима» и являющихся аналогами ранее зарегистрированных Флексима Ки бэйз плэйт, также способствовало внесению новых моделей базовых пластин в перечень регистрируемых изделий.

Описание изделия

Широкий выбор базовых устройств Алмарис Твин + обеспечивает надежную защиту кожи пациента:

Базовые пластины «Алмарис Твин +» (рис. 12) – широкий выбор различных диаметров (40, 50, 60 и 80 мм) (стерильные и нестерильные), состоящие из толстого гидроколлоида по всему диаметру, вырезаемому по размеру стомы, для защиты кожи и тонкого слоя по всему диаметру для адгезии (крепления самого базового пластины).



Рис. 12

Базовые пластины «Алмарис Твин + Микст» – представлен толстым слоем гидроколлоида в центре с акриловым слоем по всему диаметру базового пластины для немедленной адгезии. Диаметр: 40, 60 и 80 мм.



Рис. 13

Базовые пластины «Конвекс Алмарис Твин +» (рис. 14) – состоит из двойного гидроколлоида с держащим выпуклым кольцом для стомы с углублением. Диаметр: 40, 50, 60 и 80 мм.

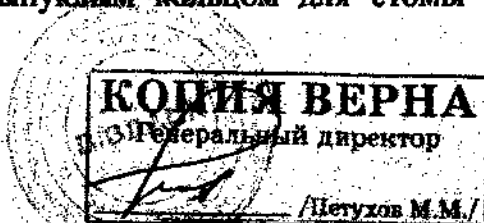




Рис. 14

Базовые пластины имеют превосходный закрывающий замок, способствующий минимальному приложению давления на брюшную полость пациента.

Назначение

Базовые пластины липкие используются для установки калоприемников у стомированных больных.

Используемые материалы для всех перечисленных выше базовых пластин:

- мягкий пластичный материал (ПВХ);
- адгезивный и гидроколлоидный слой.

Статус регистрации и дата начала производства

Изделия производятся с 2001 г. и поставляются в Германию, Францию, Великобританию, Голландию, Италию, Испанию, Португалию.

III. Приспособления для стомированных больных, варианты исполнения:

1. Пластиковый рукав для слива отделяемого после ирригации «Ирифлекс Сливс».
2. Резервуар для воды при проведении ирригации «Ирифлекс Резервуар».
3. Пластиковый регулятор скорости потока жидкости «Ирифлекс Регулятор».
4. Пластиковый конус для кишки для проведения ирригации «Ирифлекс конус».
5. Набор для проведения ирригации толстой кишки «Ирифлекс Сет» в составе:
 - 5.1. Пластиковый рукав для слива отделяемого после ирригации «Ирифлекс Сливс» - не более 5 штук.
 - 5.2. Резервуар для воды при проведении ирригации «Ирифлекс Резервуар».
 - 5.3. Пластиковый регулятор скорости потока жидкости «Ирифлекс Регулятор».
 - 5.4. Пластиковый конус для кишки для проведения ирригации «Ирифлекс конус».
6. Колпачок для стомы Ирифлекс.
7. Зажим для дренируемых калоприемников.
8. Пояс для базовой пластины к калоприемникам «Алмарис Твин+ Бельт».

Набор для проведения ирригации толстой кишки «Ирифлекс Сет», включая пластиковый рукав для слива отделяемого после ирригации «Ирифлекс Сливс», резервуар для воды при проведении ирригации «Ирифлекс Резервуар», пластиковый регулятор скорости потока жидкости «Ирифлекс Регулятор», пластиковый конус для кишки для проведения ирригации «Ирифлекс конус», колпачок для стомы «Ирифлекс»



Состав:

- Резервуар для воды - Резервуар для воды при проведении ирригации «Ирифлекс Резервуар».

- Наконечник для стомы - Пластиковый конус для кишки для проведения ирригации «Ирифлекс конус».

- регулятор потока жидкости - Пластиковый регулятор скорости потока жидкости «Ирифлекс Регулятор».




- рукав для слива жидкости - Пластиковый рукав для слива отделяемого после ирригации «Ирифлекс Сливс».

- пробка для стомы - Колпачок для стомы «Ирифлекс».

- мини-калоприемники для стомы.

Применение:

1. ввести наконечник в стому,
2. присоединить резервуар для воды
3. наклеить вокруг стомы рукав для слива жидкости.
4. Ввести в резервуар для жидкости наконечник (до 15 см)
5. подождать, пока вся жидкость перейдет в калле-чник

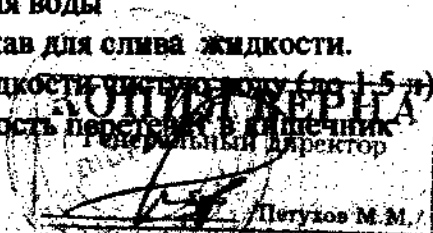

6. извлечь наконечник для стомы
7. рукав для слива жидкости поместить в унитаз,
8. дождаться полного опорожнения кишечника
9. наклеить пробку для стомы или мини-калоприемник
10. промыть все составляющие ирригационной системы

Срок годности изделия: 5 лет

Используемые материалы:

Все перечисленные выше составные части набора изготовлены из пластика, за исключением колпачка для стомы Ирификс.

Колпачок для стомы «Ирификс» – выполнен из пластика, нетканевого материала.

Зажим для дренируемых калоприемников - предназначен для закрытия калоприемника.

- **Способ применения:** наложить на выходное отверстие калоприемника.
- **Характеристики системы:** 10 штук в упаковке

Используемые материалы зажима для дренируемых калоприемников:

- пластик

Пояс для базовой пластины к калоприемникам «Алмарис Твин + Белт» – предназначен для крепления базовой пластины.

- **Способ применения:** продеть в ушки базовой пластины и разместить на поясе.
- **Характеристики системы:** 1 штука в упаковке.

Используемые материалы в поясе для базовой пластины к калоприемникам «Алмарис Твин+ Белт»:

- полиэтилен
- тянущийся тканевой материал

