



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

**Комплекты индивидуальной медицинской гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи (Комплекты КИМГЗ) по ТУ 9398-023-85535470-2014 производства ЗАО «Виталфарм»:**

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для обеспечения населения (взрослое население и дети в возрасте старше 12 лет), проживающего или находящегося в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения)

ИМЮЕ.939.890-006И

**Назначение медицинского изделия:** предназначены для обеспечения: личного состава сил гражданской обороны и населения в целях самостоятельного выполнения ими назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) поражений в мирное и военное время; личного состава формирований в целях выполнения ими мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим.

**Область применения медицинского изделия:** для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи.

**Показания:** профилактика поражений в мирное и военное время.

**Потенциальные потребители:** личный состав сил гражданской обороны; лица, оказывающие первую помощь.

**Риски применения:**

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

**Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:**

Перед применением изделий из состава вложения необходима консультация специалиста. Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

**Назначение вложений, входящих в состав аптечки  
(краткая инструкция):**

**Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для обеспечения населения (взрослое население и дети в возрасте старше 12 лет), проживающего или находящегося в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения)**

**Инструкция по применению**



Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»  
одноразовое пленочное  
Жгут кровоостанавливающий материал-эластичный

Пакет перевязочный медицинский стерильный  
Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода  
Средство перевязочное гидрогелевое противожоговое стерильное  
с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см)

Лейкопластырь рулонный не менее 2 см x 5 м  
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые  
Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого  
материала с резинками или с завязками

Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая  
Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой  
кислотой (не менее 6 см x 10 см)  
Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе целлюлозы  
или алюминосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г)  
Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное  
с антимикробным и обезболивающим действием  
Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака  
Капли йодид, таблетки 125 мг

Капль-железо гексоцианоферрат, таблетки 500 мг

Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг

для проведения сердечно-легочной реанимации  
для остановки кровотечения из магистральных сосудов методом  
сдавления конечности  
перевязочное средство  
дезинфицирующее средство

перевязочное средство, для первичного закрытия и лечения ран и  
ожогов  
фиксирующее средство  
для защиты рук при обработке грязных ран

для защиты от инфекций передающихся воздушно-капельным  
путем  
дезинфицирующее средство

перевязочное, кровоостанавливающее средство  
перевязочное, кровоостанавливающее средство

антимикробное средство, для первичного покрытия и лечения ран  
применять при обмороке и коллапсе  
восполняющее дефицит йода, муколитическое,  
радиопротективное средство  
применяется при интоксикации радиоизотопами щелочных металлов и  
таблица (в т.ч. продуктами деления урана)  
противорвотное средство

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста.  
Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.

**ИМЮЕ.939.890-006И**

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

### Комплектность:

| Наименование                                                                              | Количество                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Сумка                                                                                     | 1 шт.                     |
| Лекарственные средства и медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений           | Согласно перечню вложений |
| Этикетка                                                                                  | 1 шт.                     |
| Инструкция по применению                                                                  | 1 шт.                     |
| Подробные инструкции вложений (указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их) | Согласно перечню вложений |

### ПЕРЕЧЕНЬ

вложений, входящих в изделие «Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для обеспечения населения (взрослое население и дети в возрасте старше 12 лет), проживающего или находящегося в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения)»

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения                                                                                                  | Ед. изм. | Количество |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                            | 3        | 4          |
| 1 Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое пленочное<br><br>(Устройство полимерное с односторонним воздушным клапаном одноразовое для проведения искусственного дыхания рот-устройство-рот на догоспитальном этапе оказания экстренной реанимационной помощи Р-У-Р-«АППОЛО» по ТУ 9398-016-42965160-2004)<br>или<br>(Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот – Устройство - Рот» одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047-85535470-2017) | Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2008/03530 от 22.10.2008<br><br>Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2018/6705 от 22.01.2018 | Шт.      | 1          |
| 2 Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный<br><br>(Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10)<br>или<br>(Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Производства ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ ФСР 2010/07432 от 25.08.2016<br><br>Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733 от 19.02.2016            | Шт.      | 1          |

ИМЮЕ.939.890-006И

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| использования «Виталфарм» по ТУ 9398-032-85535470-2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |
| 3 Пакет перевязочный медицинский стерильный<br><br>(Пакеты перевязочные медицинские стерильные по ГОСТ 1179-93)<br>или<br>(Пакеты перевязочные медицинские по ГОСТ 1179-93)<br><br>или<br>(Пакеты перевязочные медицинские стерильные по ГОСТ 1179-93)<br>или<br>(Пакеты перевязочные медицинские стерильные по ГОСТ 1179-93)<br>или<br>(Пакеты перевязочные медицинские, стерильные по ГОСТ 1179-93)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производства ООО «Ингакамф», Россия, РУ ФСР 2008/03791 от 03.09.2015<br><br>Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2010/07563 от 04.05.2010<br><br>Производства ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/07445 от 22.04.2010<br><br>Производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2010/09827 от 30.12.2010<br><br>Производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2010/07910 от 31.05.2010 | Шт. | 1 |
| 4 Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода<br><br>(Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода по ТУ 9393-053-42965160-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ РЗН 2013/716 от 31.05.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт. | 1 |
| 5 Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20 см х 24 см)<br><br>(Средства перевязочные гидрогелевые, противоожоговые, стерильные по ТУ 21.20.24-002-18152288-2015)<br>или<br>(Покрывания атравматические с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов, стерильные «Фармитекс» по ТУ 9393-003-59132234-2008)<br>или<br>(Повязка гелевая на текстильной основе для лечения ожогов и инфицированных ран стерильная «АППОЛО-ПГ-ПАК-АИ» на основе поликрилатного гидрогеля с включением анилокаина и йодовидона по ТУ 9393-002-42965160-2009)<br>или<br>(Салфетки стерильные «Колетекс-АДЛ» по ТУ 9393-013-26943035-2003) | Производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия, РУ ФСР 2010/08888 от 10.07.2017<br><br>Производства ООО НПЦ «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2009/04116 от 02.02.2009<br><br>Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2009/05056 от 10.06.2009<br><br>Производства ООО «КОЛТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01068 от 11.11.2013                                                                  | Шт. | 1 |
| 6 Лейкопластырь рулонный не менее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Шт. | 1 |

ИМЮЕ.939.890-006И

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| <p>2 см х 5 м</p> <p>(Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский) или<br/>(Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip) или<br/>(Лейкопластырь медицинский фиксирующий) или<br/>(Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах) или<br/>(Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед») или<br/>(Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009) или<br/>(Лейкопластырь медицинский фиксирующий) или<br/>(Лейкопластырь «Унипласт фиксирующий» по ТУ 9393-010-45961725-2010)</p> | <p>Производства фирмы «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017<br/>Производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252</p> <p>Производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2007/01017 от 25.10.2007</p> <p>Производства «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959 от 23.06.2008</p> <p>Производства «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807 от 20.10.2008</p> <p>Производства АО "ВЕРОФАРМ", Россия, РУ ФСР 2009/05363 от 15.06.2015</p> <p>Производства "Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.", Китай, РУ ФСЗ 2011/09593 от 20.04.2011<br/>Производства АО "ВЕРОФАРМ", Россия, РУ ФСР 2008/03212 от 15.06.2015</p> |      |   |
| <p>7 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые</p> <p>(Перчатки медицинские нестерильные и стерильные) или<br/>(Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные) или<br/>(Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные) или<br/>(Перчатки диагностические медицинские SF Gloves различных типоразмеров) или<br/>(Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые "Benovy" стерильные и нестерильные) или<br/>(Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY»)</p>              | <p>Производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» Германия, РУ ФСЗ 2010/07368 от 05.07.2010<br/>Производства фирмы Топ Глав Сдн Бхд, Малайзия, РУ ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009</p> <p>Производства фирмы «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэа Продактс Ко., ЛТД.», Китай, РУ ФСЗ 2012/13220 от 02.11.2012</p> <p>Производства «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07717 от 21.04.2014</p> <p>Производства «ТГ МЕДИКАЛ Сдн. Бхд.», Малайзия, РУ ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018</p> <p>Производства «ТОП ГЛАВ СДН. БХД.», Малайзия, РУ РЗН 2017/5747 от 22.05.2017</p>                                                                                                                                            | пара | 1 |

ИМЮЕ.939.890-006И

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| или<br>(Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производства «Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.», Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932 от 11.01.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |
| 8 Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками<br><br>(Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010)<br>или<br>(Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010)<br>или<br>(Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012)<br>или<br>(Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010)<br>или<br>(Маска медицинская защитная для лица из нетканых материалов по ТУ 9398-009-56334457-2010)<br>или<br>(Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ТЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010)<br>или<br>(Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов)<br>или<br>(Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015)<br>или<br>(Одежда одноразовая медицинская из нетканого и полимерного материалов) | Производства ООО «МАСКА», Россия, РУ ФСР 2010/08512 от 03.08.2010<br><br>Производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР 2010/07908 от 06.06.2018<br><br>Производства ООО «УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158 от 23.01.2017<br><br>Производства ООО «КИТ», Россия, РУ ФСР 2010/09673 от 28.06.2018<br><br>Производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2010/07707 от 11.05.2010<br><br>Производства ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ ФСР 2010/09436 от 15.12.2010<br><br>Производства Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ 2011/10740 от 29.09.2011<br><br>Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ РЗН 2016/4118 от 17.05.2016<br><br>Производства ООО «Кэрстон Медикал энд Протектив Продактс, ЛТД», КНР, РУ РЗН 2013/668 от 20.05.2013 | Шт. | 1 |
| 9 Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая<br><br>(Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00)<br>или<br>(Салфетка спиртовая АРЕХМЕД)<br><br>или<br>(Салфетки медицинские проспиртованные «SOYUZ»)<br>или<br>(Салфетки спиртовые стерильные по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Производства ООО «М.К. Асептика», Россия, РУ ФСР 2009/05438 от 26.07.2016<br><br>Производства фирмы «Тайчжоу Канлин Хеалс Протекшн Продактс Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2009/05782 от 21.12.2009<br>Производства «Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2009/04575 от 18.06.2018<br>Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Шт. | 1 |

ИМЮЕ.939.890-006И

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| <p>ТУ 9393-004-52707619-2006)<br/>или<br/>(Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013)<br/>или<br/>(Салфетка антисептическая спиртовая стерильная по ТУ 9393-001-56176857-2015)<br/>или<br/>(Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные, одноразовые по ТУ 21.20.24-001-35196086-2015)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>РУ ФСР 2007/01592 от 15.10.2014</p> <p>Производства ООО «Фармэль», Россия, РУ РЗН 2014/1695 от 09.06.2014</p> <p>Производства ООО «Авангард», Россия, РУ РЗН 2016/4620 от 21.11.2016</p> <p>Производства ООО «Грани», Россия, РУ РЗН 2016/4491 от 10.05.2018</p> |     |   |
| <p>10 Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокaproновой кислотой (не менее 6 см x 10 см)</p> <p>(Покрытия атравматические с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов стерильные «Фармитекс» по ТУ 9393-003-59132234-2008)<br/>или<br/>(Салфетки гемостатические с альгинатом натрия и ε-аминокапроновой кислотой «Колетекс-АК» и с альгинатом натрия, ε-аминокапроновой кислотой и лидокаином «Колетекс-АКЛ» по ТУ 9393-019-58223785-2011)<br/>или<br/>(Повязка атравматичная нетканая с аминокaproновой кислотой гемостатическая стерильная ПАГ "АППОЛО-Гем" по ТУ 9393-021-42965160-2009)</p> | <p>Производства ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2009/04116 от 02.02.2009</p> <p>Производства ООО «Колетекс», Россия, РУ ФСР 2011/11523 от 18.03.2014</p> <p>Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2009/05054 от 10.06.2009</p>              | Шт. | 1 |
| <p>11 Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г)</p> <p>(Средство перевязочное гемостатическое, «ГЕМОСТОП», стерильное по ТУ 9393-001-8152288-2009)<br/>или<br/>(Средство перевязочное гемостатическое "ГЕМОСПАС" стерильное по ТУ 9393-001-40086098-2015, в индивидуальных упаковках по 2, 5, 10, 50, 75 и 100 г)</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Производства ФГУП НПЦ Фармзащита ФМБА России, Россия, РУ ФСР 2010/07420 от 13.01.2015</p> <p>Производства ООО «МДК Медика», Россия, РУ РЗН 2016/4680 от 05.09.2016</p>                                                                                           | Шт. | 1 |
| <p>12 Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Шт. | 1 |

ИМЮЕ.939.890-006И

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| обезболивающим действием<br><br>(Покрывтия атравматические с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов, стерильные «Фармитекс» по ТУ 9393-003-59132234-2008)<br>или<br>(Салфетки стерильные «Колетекс-АДЛ» по ТУ 9393-013-26943035-2003)<br>или<br>(Повязка гелевая на текстильной основе для лечения ожогов и инфицированных ран стерильная "АППОЛО-ПГ-ПАК-АИ" на основе поликрилатного гидрогеля с включением анилокаина и йодовидона по ТУ 9393-002-42965160-2009) | Производства ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2009/04116 от 02.02.2009<br><br>Производства ООО «КОЛТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01068 от 11.11.2013<br><br>Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2009/05056 от 10.06.2009 |     |   |
| 13 Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака<br><br>(Салфетка для стимуляции дыхания «ЭВТЕКС» по ТУ 9393-006-14959781-2012)<br>или<br>(Салфетка для стимуляции дыхания «РАДИАН» по ТУ 9398-001-86566053-20-09)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ РЗН 2013/847 от 23.10.2014<br><br>Производства ООО «РАДИАН», Россия, РУ ФСР 2009/06146 от 30.10.2014                                                                                                     | Шт. | 1 |
| 14 Калия йодид, таблетки 125 мг<br><br>(Калия йодид таблетки 125 мг 1 шт., 2 шт., 4 шт., 10 шт. - упаковки ячейковые контурные)<br>или<br>(Калия йодид, 125мг 10 шт., 20 шт., 30 шт. - упаковки ячейковые контурные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия, РУ № Р N003432/01 от 09.06.2009<br><br>Производства ЗАО «Медисорб», Россия, РУ № ЛСР-002519/07 от 31.08.2007                                                                           | Таб | 1 |
| 15 Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг<br><br>(Ферроцин таблетки 500 мг 2 шт., 10 шт. – упаковки ячейковые контурные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия, РУ № ЛСР-010485 от 24.12.2008                                                                                                                                                          | Таб | 2 |
| 16 Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг<br><br>(Ондансетрон-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг 10 шт. - блистеры)<br>или<br>(Латран, таблетки, покрытые оболочкой 4мг 2 шт., 4 шт., 10 шт. - упаковки ячейковые контурные)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Производства Тева Фармасьютикал Воркс Прайвэт Лимитед Компани, Венгрия, РУ № ЛСР-001138/10 от 18.02.2010<br>Производства ФГУП НПЦ ФМБА, «Фармзащита», Россия, РУ № ЛС-001889 от 10.11.2011                                                     | Таб | 2 |
| 17 Инструкция по применению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ИМЮЕ.939.890-006 И                                                                                                                                                                                                                             | Шт. | 1 |
| 18 Сумка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ИМЮЕ.939.890                                                                                                                                                                                                                                   | Шт. | 1 |

ИМЮЕ.939.890-006И

### **Характеристики:**

Габаритные размеры сумки для хранения вложений комплектов КИМГЗ должны соответствовать:

- Длина, мм -  $160 \pm 5,0$
- Ширина, мм -  $160 \pm 5,0$
- Высота, мм -  $55 \pm 5,0$
- Ремень, регулируемый по длине, мм
- Длина минимальная -  $460 \pm 10,0$
- Длина максимальная -  $820 \pm 10,0$

Масса пустой сумки должна быть не более, кг. ( $0,20 \pm 0,03$ )

Сумка должна быть изготовлена из следующих материалов: ткань, дублированная ПВХ или с покрытием производства фирмы «GUANGZHOUYWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Застежка текстильная «Контакт» К50, 25Н ГОСТ 30019.1. Ремень должен быть изготовлен из тканевой плетеной ленты синтетических полиэфирных волокон.

### **Требования к дезинфекции:**

Сумка должна быть устойчива к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

### **Хранение и транспортирование:**

Условия хранения и транспортирования при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+20^{\circ}\text{C}$ .

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

### **Утилизация:**

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790.

Сумки, вышедшие из строя комплектов КИМГЗ, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790.

### **Срок годности:**

Срок годности вложений комплектов КИМГЗ должен быть не менее 18 месяцев.

**ИМЮЕ.939.890-006И**

**Гарантийный срок:**

Гарантийный срок службы сумки – 12 месяцев с даты продажи.

**Дата изготовления и номер партии:**

Указываются на упаковке.

**Производитель/уполномоченная организация:**

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, [www.vitalfarm.ru](http://www.vitalfarm.ru)

ИМЮЕ.939.890-006И

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью  
\_\_\_\_\_ листа (ов)  
Генеральный директор  
ЗАО «Виталфарм»

\_\_\_\_\_  
Андросов В.И.





www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

**Комплекты индивидуальной медицинской гражданской защиты для  
оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи  
(Комплекты КИМГЗ) по ТУ 9398-023-85535470-2014  
производства ЗАО «Виталфарм»:**

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для  
обеспечения населения (взрослое население и дети в возрасте старше 12 лет),  
проживающего или находящегося в районах возможного биологического  
загрязнения (заражения)

ИМЮЕ.939.890-010И

**Назначение медицинского изделия:** предназначены для обеспечения личного состава сил гражданской обороны и населения в целях самостоятельного выполнения ими назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) поражений в мирное и военное время; личного состава формирований в целях выполнения ими мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим.

**Область применения медицинского изделия:** для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи.

**Показания:** профилактика поражений в мирное и военное время.

**Потенциальные потребители:** личный состав сил гражданской обороны; лица, оказывающие первую помощь.

**Риски применения:**

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

**Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:**

Перед применением изделий из состава вложения необходима консультация специалиста. Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

**Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая инструкция):**

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для обеспечения населения (взрослое население и дети в возрасте старше 12 лет), проживающего или находящегося в районах возможного биологического загрязнения (заражения)

**Витал**

**Инструкция по применению**

Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» однократное пленочное  
Жгут кровоостанавливающий матерчатый-эластичный  
Пакет перевязочный медицинский стерильный  
Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода  
Средство перевязочное гидрогелевое противоскользящее стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см)

Лейкопластырь рулонный не менее 2 см x 5 м  
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые  
Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками  
Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая  
Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокaproнонoвой кислотой (не менее 6 см x 10 см)  
Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе пеолигов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г)  
Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием  
Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака  
Доксициклин, капсулы 100 мг

для проведения сердечно-легочной реанимации для временной остановки кровотечения перевязочное средство

дезинфицирующее средство

перевязочное средство, для первичного закрытия и лечения ран и ожогов  
фиксирующее средство для защиты рук при обработке грязных ран

для защиты от инфекций передающихся воздушно-капельным путем дезинфицирующее средство

перевязочное, кровоостанавливающее средство

перевязочное, кровоостанавливающее средство

антимикробное средство, для первичного покрытия и лечения ран применять при обмороке и коллапсе  
антибиотик широкого спектра действия

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста.  
Подробные инструкции на индивидуальных упаковках изделий.

ИМЮЕ.939.890-010И

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

### Комплектность:

| Наименование                                                                              | Количество                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Сумка                                                                                     | 1 шт.                     |
| Лекарственные средства и медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений           | Согласно перечню вложений |
| Этикетка                                                                                  | 1 шт.                     |
| Инструкция по применению                                                                  | 1 шт.                     |
| Подробные инструкции вложений (указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их) | Согласно перечню вложений |

### ПЕРЕЧЕНЬ

вложений, входящих в изделие «Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для обеспечения населения (взрослое население и дети в возрасте старше 12 лет), проживающего или находящегося в районах возможного биологического загрязнения (заражения)»

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения                                                                                                  | Ед. изм. | Количество |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                            | 3        | 4          |
| 1 Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое пленочное<br><br>(Устройство полимерное с односторонним воздушным клапаном одноразовое для проведения искусственного дыхания рот-устройство-рот на догоспитальном этапе оказания экстренной реанимационной помощи Р-У-Р-«АППОЛО» по ТУ 9398-016-42965160-2004)<br>или<br>(Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот – Устройство - Рот» одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047-85535470-2017) | Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2008/03530 от 22.10.2008<br><br>Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2018/6705 от 22.01.2018 | Шт.      | 1          |
| 2 Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный<br><br>(Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10)<br>или<br>(Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Производства ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ ФСР 2010/07432 от 25.08.2016<br><br>Производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733 от 19.02.2016            | Шт.      | 1          |

ИМЮЕ.939.890-010И

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| использования «Виталфарм» по ТУ 9398-032-85535470-2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |
| <p>3 Пакет перевязочный медицинский стерильный</p> <p>(Пакеты перевязочные медицинские стерильные по ГОСТ 1179-93)<br/>или<br/>(Пакеты перевязочные медицинские по ГОСТ 1179-93)<br/>или<br/>(Пакеты перевязочные медицинские стерильные по ГОСТ 1179-93)<br/>или<br/>(Пакеты перевязочные медицинские стерильные по ГОСТ 1179-93)<br/>или<br/>(Пакеты перевязочные медицинские, стерильные по ГОСТ 1179-93)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Производства ООО «Ингакамф», Россия, РУ ФСР 2008/03791 от 03.09.2015</p> <p>Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2010/07563 от 04.05.2010</p> <p>Производства ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/07445 от 22.04.2010</p> <p>Производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2010/09827 от 30.12.2010</p> <p>Производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2010/07910 от 31.05.2010</p> | Шт. | 1 |
| <p>4 Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода</p> <p>(Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода по ТУ 9393-053-42965160-2012)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ РЗН 2013/716 от 31.05.2013</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт. | 1 |
| <p>5 Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20 см х 24 см)</p> <p>(Средства перевязочные гидрогелевые, противоожоговые, стерильные по ТУ 21.20.24-002-18152288-2015)<br/>или<br/>(Покрывания атравматические с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов, стерильные «Фармитекс» по ТУ 9393-003-59132234-2008)<br/>или<br/>(Повязка гелевая на текстильной основе для лечения ожогов и инфицированных ран стерильная «АППОЛО-ПГ-ПАК-АИ» на основе поликрилатного гидрогеля с включением анилокаина и йодовидона по ТУ 9393-002-42965160-2009)<br/>или<br/>(Салфетки стерильные «Колетекс-АДЛ» по ТУ 9393-013-26943035-2003)</p> | <p>Производства ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия, РУ ФСР 2010/08888 от 10.07.2017</p> <p>Производства ООО НПЦ «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2009/04116 от 02.02.2009</p> <p>Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2009/05056 от 10.06.2009</p> <p>Производства ООО «КОЛТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01068 от 11.11.2013</p>                                                                  | Шт. | 1 |
| 6 Лейкопластырь рулонный не менее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Шт. | 1 |

ИМЮЕ.939.890-010И

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| <p>2 см x 5 м</p> <p>(Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский) или<br/>(Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip) или<br/>(Лейкопластырь медицинский фиксирующий) или<br/>(Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах) или<br/>(Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед») или<br/>(Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009) или<br/>(Лейкопластырь медицинский фиксирующий) или<br/>(Лейкопластырь «Унипласт фиксирующий» по ТУ 9393-010-45961725-2010)</p> | <p>Производства фирмы «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017<br/>Производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252</p> <p>Производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2007/01017 от 25.10.2007</p> <p>Производства «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959 от 23.06.2008</p> <p>Производства «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807 от 20.10.2008</p> <p>Производства АО "ВЕРОФАРМ", Россия, РУ ФСР 2009/05363 от 15.06.2015</p> <p>Производства "Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.", Китай, РУ ФСЗ 2011/09593 от 20.04.2011<br/>Производства АО "ВЕРОФАРМ", Россия, РУ ФСР 2008/03212 от 15.06.2015</p> |      |   |
| <p>7 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые</p> <p>(Перчатки медицинские нестерильные и стерильные) или<br/>(Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные) или<br/>(Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные) или<br/>(Перчатки диагностические медицинские SF Gloves различных типоразмеров) или<br/>(Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые "Benovy" стерильные и нестерильные) или<br/>(Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY»)</p>              | <p>Производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» Германия, РУ ФСЗ 2010/07368 от 05.07.2010<br/>Производства фирмы Топ Глав Сдн Бхд, Малайзия, РУ ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009</p> <p>Производства фирмы «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэ Продактс Ко., ЛТД.», Китай, РУ ФСЗ 2012/13220 от 02.11.2012</p> <p>Производства «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07717 от 21.04.2014</p> <p>Производства «ТГ МЕДИКАЛ Сдн. Бхд.», Малайзия, РУ ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018</p> <p>Производства «ТОП ГЛАВ СДН. БХД.», Малайзия, РУ РЗН 2017/5747 от 22.05.2017</p>                                                                                                                                             | пара | 1 |

ИМЮЕ.939.890-010И

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| или<br>(Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производства «Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.», Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932 от 11.01.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |
| 8 Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками<br><br>(Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010)<br>или<br>(Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010)<br>или<br>(Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012)<br>или<br>(Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010)<br>или<br>(Маска медицинская защитная для лица из нетканых материалов по ТУ 9398-009-56334457-2010)<br>или<br>(Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ГЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010)<br>или<br>(Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов)<br>или<br>(Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015)<br>или<br>(Одежда одноразовая медицинская из нетканого и полимерного материалов) | Производства ООО «МАСКА», Россия, РУ ФСР 2010/08512 от 03.08.2010<br><br>Производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР 2010/07908 от 06.06.2018<br><br>Производства ООО «УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158 от 23.01.2017<br><br>Производства ООО «КИТ», Россия, РУ ФСР 2010/09673 от 28.06.2018<br><br>Производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2010/07707 от 11.05.2010<br><br>Производства ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ ФСР 2010/09436 от 15.12.2010<br><br>Производства Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ 2011/10740 от 29.09.2011<br><br>Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ РЗН 2016/4118 от 17.05.2016<br><br>Производства ООО «Кэрстон Медикал энд Протектив Продактс, ЛТД», КНР, РУ РЗН 2013/668 от 20.05.2013 | Шт. | 1 |
| 9 Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая<br><br>(Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00)<br>или<br>(Салфетка спиртовая АРЕХМЕД)<br><br>или<br>(Салфетки медицинские проспиртованные «SOYUZ»)<br>или<br>(Салфетки спиртовые стерильные по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Производства ООО «М.К. Асептика», Россия, РУ ФСР 2009/05438 от 26.07.2016<br><br>Производства фирмы «Тайчжоу Канлин Хеалс Протекшн Продактс Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2009/05782 от 21.12.2009<br>Производства «Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2009/04575 от 18.06.2018<br>Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Шт. | 1 |

ИМЮЕ.939.890-010И

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| <p>ТУ 9393-004-52707619-2006)<br/>или<br/>(Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013)<br/>или<br/>(Салфетка антисептическая спиртовая стерильная по ТУ 9393-001-56176857-2015)<br/>или<br/>(Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные, одноразовые по ТУ 21.20.24-001-35196086-2015)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>РУ ФСР 2007/01592 от 15.10.2014</p> <p>Производства ООО «Фармэль», Россия, РУ РЗН 2014/1695 от 09.06.2014</p> <p>Производства ООО «Авангард», Россия, РУ РЗН 2016/4620 от 21.11.2016</p> <p>Производства ООО «Грани», Россия, РУ РЗН 2016/4491 от 10.05.2018</p> |     |   |
| <p>10 Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокaproновой кислотой (не менее 6 см x 10 см)</p> <p>(Покрытия атравматические с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов стерильные «Фармитекс» по ТУ 9393-003-59132234-2008)<br/>или<br/>(Салфетки гемостатические с альгинатом натрия и ε-аминокaproновой кислотой «Колетекс-АК» и с альгинатом натрия, ε-аминокaproновой кислотой и лидокаином «Колетекс-АКЛ» по ТУ 9393-019-58223785-2011)<br/>или<br/>(Повязка атравматичная нетканая с аминокaproновой кислотой гемостатическая стерильная ПАГ "АППОЛО-Гем" по ТУ 9393-021-42965160-2009)</p> | <p>Производства ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2009/04116 от 02.02.2009</p> <p>Производства ООО «Колетекс», Россия, РУ ФСР 2011/11523 от 18.03.2014</p> <p>Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2009/05054 от 10.06.2009</p>              | Шт. | 1 |
| <p>11 Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г)</p> <p>(Средство перевязочное гемостатическое, «ГЕМОСТОП», стерильное по ТУ 9393-001-8152288-2009)<br/>или<br/>(Средство перевязочное гемостатическое "ГЕМОСПАС" стерильное по ТУ 9393-001-40086098-2015, в индивидуальных упаковках по 2, 5, 10, 50, 75 и 100 г)</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Производства ФГУП НПЦ Фармзащита ФМБА России, Россия, РУ ФСР 2010/07420 от 13.01.2015</p> <p>Производства ООО «МДК Медика», Россия, РУ РЗН 2016/4680 от 05.09.2016</p>                                                                                           | Шт. | 1 |
| <p>12 Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Шт. | 1 |

ИМЮЕ.939.890-010И

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| обезболивающим действием<br><br>(Покрывтия атравматические с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов, стерильные «Фармитекс» по ТУ 9393-003-59132234-2008)<br>или<br>(Салфетки стерильные «Колетекс-АДЛ» по ТУ 9393-013-26943035-2003)<br>или<br>(Повязка гелевая на текстильной основе для лечения ожогов и инфицированных ран стерильная "АППОЛО-ПГ-ПАК-АИ" на основе поликрилатного гидрогеля с включением анилокаина и йодовидона по ТУ 9393-002-42965160-2009) | Производства ООО «НПЦ"Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2009/04116 от 02.02.2009<br><br>Производства ООО «КОЛТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01068 от 11.11.2013<br><br>Производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2009/05056 от 10.06.2009 |          |   |
| 13 Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака<br><br>(Салфетка для стимуляции дыхания «ЭВТЕКС» по ТУ 9393-006-14959781-2012)<br>или<br>(Салфетка для стимуляции дыхания «РАДИАН» по ТУ 9398-001-86566053-20-09)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ РЗН 2013/847 от 23.10.2014<br><br>Производства ООО «РАДИАН», Россия, РУ ФСР 2009/06146 от 30.10.2014                                                                                                    | Шт.      | 1 |
| 14 Доксициклин, капсулы 100 мг<br><br>Доксициклин капсулы 100 мг 10 шт., 18 шт., 20 шт. упаковки ячейковые контурные)<br>или<br>(Доксициклин капсулы 100 мг 10 шт., 20 шт. упаковки ячейковые контурные)<br>или<br>(Доксициклин капсулы 100 мг 10 шт., 20 шт. упаковки ячейковые контурные)                                                                                                                                                                                                                         | Производства ОАО «Синтез», Россия, РУ № Р N000801/01 от 07.09.2007<br><br>Производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь, РУ ЛС-000756 от 07.05.2010<br><br>Производства ООО «Озон», Россия, РУ ЛС-000168 от 17.05.2010              | Кап<br>с | 2 |
| 15 Инструкция по применению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ИМЮЕ.939.890-010 И                                                                                                                                                                                                                            | Шт.      | 1 |
| 16 Сумка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ИМЮЕ.939.890                                                                                                                                                                                                                                  | Шт.      | 1 |

### Характеристики:

Габаритные размеры сумки для хранения вложений комплектов КИМГЗ должны соответствовать:

- Длина, мм                      - 160 ±5,0
- Ширина, мм                   - 160±5,0
- Высота, мм                    - 55 ±5,0

**ИМЮЕ.939.890-010И**

Ремень, регулируемый по длине, мм

-Длина минимальная -  $460 \pm 10,0$

-Длина максимальная -  $820 \pm 10,0$

Масса пустой сумки должна быть не более, кг. ( $0,20 \pm 0,03$ )

Сумка должна быть изготовлена из следующих материалов: ткань, дублированная ПВХ или с покрытием производства фирмы «GUANGZHOUYWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Застежка текстильная «Контакт» К50, 25Н ГОСТ 30019.1. Ремень должен быть изготовлен из тканевой плетеной ленты синтетических полиэфирных волокон.

#### **Требования к дезинфекции:**

Сумка должна быть устойчива к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

#### **Хранение и транспортирование:**

Условия хранения и транспортирования при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+20^{\circ}\text{C}$ . Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

#### **Утилизация:**

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790.

Сумки, вышедшие из строя комплектов КИМГЗ, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790.

#### **Срок годности:**

Срок годности вложений комплектов КИМГЗ должен быть не менее 18 месяцев.

#### **Гарантийный срок:**

Гарантийный срок службы сумки – 12 месяцев с даты продажи.

**Дата изготовления и номер партии:** Указываются на упаковке.

#### **Производитель/уполномоченная организация:**

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, [www.vitalfarm.ru](http://www.vitalfarm.ru)

**ИМЮЕ.939.890-010И**

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью  
\_\_\_\_\_ листа (ов)  
Генеральный директор  
ЗАО «Витафарм»

Андросов В.В.

