

линия разрыва

СТЕРИЛЬНО

Средство перевязочное гемостатическое

ГЕМ+СПАС М

Остановка артерио-венозных
и капиллярных кровотечений
при повреждении кожи и мягких тканей

Масса нетто: 50 г

TU-9393-002-40086098-2015

ООО «МДК Медика»

РФ, 115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д.25
тел./факс: 8(495)130-04-63
mdk_medical@mail.ru

Номер партии: 0001

Дата стерилизации: 0215

Годен до: 0317



линия разрыва
СТЕРИЛЬНО

ГЕМОСТАТ — средство на основе крупнозернистого порошка гидросиликата кальция, обладающего адсорбирующей способностью.

Меры предосторожности:

- применять только после ознакомления с инструкцией;
- беречь от попадания в глаза, в нос, в рот, на влажную кожу;
- при попадании промыть обильным количеством воды;
- при попадании внутрь немедленно выпить два или более стакана воды;
- при нарушении герметичности упаковки для использования не годен;
- для однократного применения.

Инструкция по применению

1. Очистить рану от инородных тел и крови бинтом (рис. 1).
2. Вскрыть пакет, засыпать порошок как можно ближе к источнику кровотечения (рис. 2).
3. Поверх засыпанного порошка наложить ватно-марлевую повязку или тампон, при отсутствии - плотную ткань (рис. 3).
4. Осуществить ручную компрессию 5-7 мин (рис. 4).
5. Не извлекая порошка, наложить давящую повязку.
6. При повреждении крупных сосудов конечностей выполнить транспортную иммобилизацию.
7. Наложить кровоостанавливающий жгут выше раны, не затягивая его.
8. Эвакуировать пострадавшего в стационар.
9. При возобновлении кровотечения затянуть жгут.
10. Упаковку после использования доставить с раненым (пострадавшим) в стационар.

Хранить в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре не выше 40°C.

Утилизация: образующиеся отходы и использованные изделия складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с п. 2.1.2.790-10.

