

Фотографические изображения  
медицинского изделия

«Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОСПАС», стерильное» по ТУ 9393-001-40086098-2015, в индивидуальных упаковках по 2, 5, 10, 50, 75 и 100 г., производства ООО «МДК Медика», Россия



линия разрыва

**СТЕРИЛЬНО**


**ГЕМОСПАС** – изделие – основа порошка алюмосиликатов кальция и натрия из подкласса каркасных силикатов (архидолевые цеолиты), обладающих сочетанной адсорбирующей и теплотворной способностью.

**Меры предосторожности:**

- применять только после ознакомления с инструкцией;
- при контакте с кровью возможно нагревание;
- при нарушении герметичности вакуумной упаковки для использования не годен (возможно увеличение объема пакета при увеличении температуры, при этом герметичность не нарушается, качество изделия не ухудшается);
- беречь от попадания в глаза, в нос, в рот, на влажную кожу, при попадании промыть обильным количеством воды;
- при попадании внутрь немедленно выпить два или более стакана воды;
- для однократного применения.

**Инструкция по применению**

1. Очистить рану от инородных тел и крови бинтом (рис. 1).
2. Вскрыть пакет, засыпать порошок как можно ближе к источнику кровотечения (рис. 2).
3. Поверх засыпанного порошка наложить ватно-марлевую повязку или тампон, при отсутствии – плотную ткань (рис. 3).
4. Осуществить ручную компрессию 5-7 мин (рис. 4).
5. Не извлекая порошка, наложить давящую повязку.
6. При повреждении крупных сосудов конечностей выполнить транспортную иммобилизацию.
7. Наложить кровоостанавливающий жгут выше раны, не затягивая его.
8. Эвакуировать пострадавшего в стационар.
9. При возобновлении кровотечения затянуть жгут.
10. Упаковку после использования доставить с раненым (пострадавшим) в стационар.

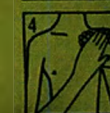

Хранить в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре не выше 40°C.  
Утилизация: образующиеся отходы и отработанное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 1.7.2.290-10.