



DESIGNS FOR VISION, INC.

Дорогой Доктор:

Данный прецизионный хирургический инструмент был изготовлен специально по Вашим параметрам, и перед отправкой он был внимательно проверен нашим отделом контроля качества. Уведомляем Вас, что эти Бинокулярные лупы произведены в соответствии с Правилами Применения Продуктов и Медикаментов (США) от 15 мая 1971г. для ударопрочных линз № 801.410 (с) (1).

Мы уверены, что Вы будете довольны нашим изделием. Если у Вас появятся какие-то вопросы или трудности с данным изделием, пожалуйста, звоните в наш Отдел Обслуживания Покупателей по указанным ниже номерам телефонов (звонок бесплатный). Один из представителей Отдела Обслуживания Покупателей о необходимых процедурах настройки или возврата инструмента.

Сердечно Ваши,

Отдел Обслуживания Покупателей

Дизайнс фор Вижион, Инк (DESIGNS FOR VISION, INC)

Тел. 1-800/345-4009 или 516/585-3300 (звонок бесплатный)

Инструкция по обслуживанию Бинокулярной Лупы.

1. Для очистки линз используйте ткань или ватную палочку, смоченную изопропиловым спиртом.
2. Не погружайте лупы в воду, так как она просочится внутрь и это приведет к образованию паров (тумана) внутри лупы.
3. Не используйте автоклав - они могут расплавиться.
4. Избегайте экстремальных температур.
5. Для хранения луп используйте прилагаемую коробочку.