

ИННОВАЦИОННО-
ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ
ФИРМА

**МЕД
ФАРМ
СЕРВИС**

ЭТИКЕТКА

УСТРОЙСТВО ИЗ ОРГСТЕКЛА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
УКЛАДОК С ЭНДОСКОПИЧЕСКИМИ
ХИРУРГИЧЕСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
УХЭИ-01-«МЕДФАРМСЕРВИС»

ЕАКЛ.942810.001 ЭТ



1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Устройство из оргстекла для хранения упаковок с эндоскопическими хирургическими инструментами УХЭИ-01-«МЕДФАРМСЕРВИС» (в дальнейшем – Устройство), предназначена для хранения инструментов для эндоскопической хирургии в лечебных учреждениях.

1.2. Устройство предназначено для эксплуатации в операционных отделениях лечебных учреждений при температуре окружающего воздуха от плюс 10°C до 35°C и атмосферном давлении 84,0-106, 7 кПа (630-800 мм рт.ст.)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные параметры и характеристики Устройства:

2.1.1. Габаритные размеры Устройства, не более 650х420х380 мм.

2.1.2. Масса Устройства, не более 26 кг.

2.2. Характеристики

2.2.1. Основные детали Устройства изготовлены из органического листового стекла, марки СО-133-К ГОСТ 10667.

2.2.2. Дверца Устройства должна закрываться плотно, без перекосов и открываться на угол не менее 90 градусов.

Зазор между дверцей и корпусом не более 3 мм.

2.2.3. Устройство на ровной горизонтальной поверхности стоит устойчиво, без качки.

2.2.4. Средний срок службы Устройства до списания, не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки Устройства соответствует указанному в Таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1. Устройство из оргстекла для хранения упаковок с эндоскопическими инструментами УХЭИ-01-«МЕДФАРМСЕРВИС»	ЕАКЛ.942819.001	1
2. Полка	ЕАКЛ.301319.001	3
Эксплуатационная документация		
Этикетка	ЕАКЛ.942810.001 ЭТ	1

4. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

4.1. Устройство следует дезинфицировать по МУ-287-113 методом 2-х кратного протирания салфеткой из бязи по ГОСТ 29298, смоченной 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства типа "Лотос" по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 с интервалом между протираниями 15 минут.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Прибор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 не более одного года.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

6.1. Транспортирование приборов в упаковке предприятия изготовителя может производиться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах на любое расстояние. Условия транспортирования по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.2. Расстановка и крепление тары с упакованным прибором в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение тары и отсутствие ее перемещения во время транспортирования.



7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

- 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- 7.3. Гарантийный срок хранения прибора- 6 месяцев с момента изготовления.
- 7.4. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель ремонтирует или заменяет Устройство и его части по предъявлению претензий.
- 7.5. В случае отказа Устройства или неисправности его в период действия гарантийных обязательств владелец Устройства должен направить по адресу 420036, г.Казань, ул.Дементьева, 2в, следующие документы:
- заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, по которому должен прибыть представитель - предприятия-изготовителя;
 - номер телефона;
 - дефектную ведомость.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ.

8.1. Устройство из оргстекла для хранения упаковок с эндоскопическими инструментами УХЭИ-01-«МЕДФАРМСЕРВИС» заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-43790314-99 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска "___" _____ 200 г.

_____ (подпись лица ответственного за приемку)

8.2. Устройство из оргстекла для хранения упаковок с эндоскопическими инструментами УХЭИ-01-«МЕДФАРМСЕРВИС» заводской № _____ упаковано _____ согласно требованиям, (наименование предприятия производившего упаковку)

предусмотренным техническими условиями

Дата упаковки "___" _____ 200 г.

Упаковку произвел _____

