

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Пожалуйста, внимательно
ознакомьтесь!

СТЕРИЛЬНО! АПИРОГЕННО!
ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Назначение: Стент коронарный Корофлекс Плиз (Coroflex Please) предназначен для проведения чрезкожной транслюминальной коронарной ангиопластики – операции по механическому восстановлению коронарного кровообращения.

Стент коронарный Корофлекс Плиз (Coroflex Please) представляет собой перфорированную металлическую конструкцию из нержавеющей стали, покрытую лекарственным препаратом Паклитоксель, предварительно устанавливаемый на катетер с раздувающимся баллоном СеКвент.

Характеристики:

Характеристики Стента коронарного Корофлекс Плиз (Coroflex Please) в точности соответствуют определенному размеру катетера СеКвент и инструментам для проведения ЧТКА (длина баллона, диаметр баллона, профиль баллона и т.п.), что обеспечивает успех доставки и установки стента во время операции.

Диаметр стентов: от 2,5 мм до 4 мм

Длина стентов: от 8 мм до 32 мм

Предупреждения:

- не рестирилизовать!
- не использовать при повреждении упаковки

Преимущества:

Стент покрыт лекарственным препаратом Паклитоксель, что увеличивает его терапевтическую значимость.

Инструкция по применению

1. Распечатайте картонную коробку.
2. В условиях операционной (асептические условия) достаньте стент из стерильной упаковки.
3. Используйте совместно с принадлежностями для проведения Чрезкожной Транслюминальной кардиоангиопластики соответствующих размеров (длина, диаметр).

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25 °С и относительной влажности не более 60%.

Срок годности: 2 года

Фирма производитель: Б.Браун Мельзунген АГ, Германия.

**Адрес представительства в России: ООО «Б.Браун Медикал», 196128,
г.Санкт-Петербург а/я 34, т.(812)320-40-04**

