



ТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

410080, г. Саратов, ул. пр-т Строителей, д. 33, ИНН 6453142195, КПП 645301001,
р/сч. № 40702810500000005190 в ЗАО «Банк» Агророс» г. Саратов, кор/сч. № 301018110600000000772,
БИК 046311772, ОКПО 37778504, ОКОНХ 14174, тел.: +7(8452) 75-31-32, +7(8452) 25-38-46, e-mail: tehceramics@mail.ru
www.tehceramica.ru.

Инструкция по эксплуатации

медицинского изделия

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-003-26899771-2018

Назначение: «Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-003-26899771-2018» (далее – бахилы) предназначены для препятствия проникновения грязи и влаги, а с ними и болезнетворных микроорганизмов, с обуви персонала и пациентов во внешнюю среду.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения, а также другие учреждения, требующие обязательное пользование медицинскими бахилами, как одним из средств личной гигиены медицинского персонала и пациента.

Показания к применению: бахилы надеваются на обувь сразу при входе в различные медицинские учреждения для поддержания чистоты и соблюдения санитарных норм в больницах, роддомах, медицинских центрах, поликлиниках, клинично-лабораторных отделениях, стоматологических клиниках.

Противопоказания к применению и побочные эффекты: не выявлены.

Меры предосторожности: Запрещено повторное использование. Запрещено использование не по назначению.

Порядок и условия применения: извлечь бахилы из первичной упаковки, растянуть резинку по ширине и надеть на уличную обувь, начиная с носка.

Применять в любых медицинских учреждениях и быту.

Использованные бахилы следует выбросить в емкость для отходов.

Потенциальные потребители: бахилы применяются персоналом и пациентами любых возрастных категорий, без ограничения по состоянию здоровья для поддержания чистоты и соблюдения требований гигиены в условиях медицинских лечебно-профилактических учреждений.

Описание: Бахилы по внешнему виду представляют собой чехлы, изготовленные из полиэтилена различной плотности марки 293-285Д, производства ПАО «Казаньоргсинтез», Россия (ТУ 2243-127-00203335-2000) с припаянной сверху резинкой (нить латексная оплетенная), производства ООО «ИнкомТэкс», Россия (ТУ 2514-001-05838883-2016), ИП

Рябов.Е.А, Россия (ТУ 2514-001-0171317890-2015). Бахилы должны быть прямоугольной формы и фиксируются при помощи резинок. Крепление резинок осуществляется машинным способом, путем впаивания резинки в подвернутые края бахилы по всей длине термосваркой (тепла и давления), пропайка осуществляется поперек подворота по всей длине паечными швами 1 мм на 13 мм с шагом 2 мм. Торец бахилы запаиваются термосваркой по всей высоте, ширина шва с каждой стороны 1 мм, расстояние от края бахилы 5 мм (+2 мм). Рез бахилы осуществляется холодной резкой.

Внешний вид бахил должен соответствовать рисунку 1.

Бахилы выпускаются в следующих вариантах исполнения по цвету:

- синий;
- белый;
- зеленый;
- красный;
- желтый.

При изготовлении используются следующие марки суперконцентратов красителей:

- синий, марки ПФ 1507/08-ПЭ (ТУ 2243-001-231242650-2000);
- белый, марки ПФ 1001/110-ПЭ (ТУ 2243-001-231242650-2000);
- зеленый, марки ПФ 1407/06-ЛП (ТУ 2243-001-231242650-2000);
- красный, марки ПФ 1107/08-ПЭ (ТУ 2243-001-231242650-2000);

Изготовитель: ООО НПФ «БАРС-2», Россия;

- желтый, марки СКТИ-301 ПОЗ1102 (ТУ 2243-001-79683189-2015);

Изготовитель: ЗАО «ГЛОБАЛ КОЛОРС», Россия.

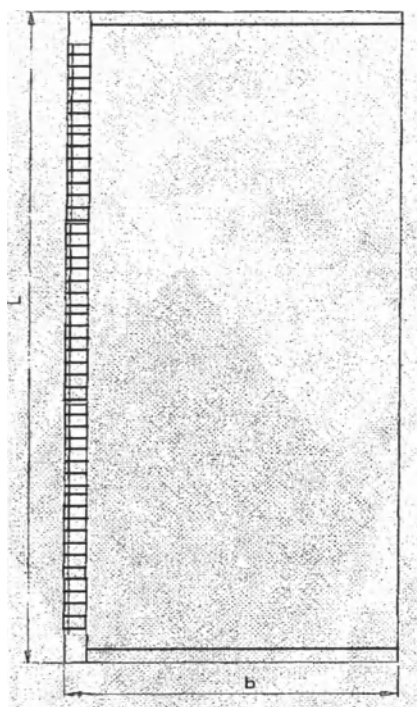


Рисунок 1.

Бахилы в количестве 1 пара, 5 пар, 10 пар, 50 пар или 100 пар, должны быть упакованы в произвольной форме в пакеты полимерных материалов по ГОСТ 12302. Края должны быть запаяны.

При покупке важно учитывать размер и предполагаемое время ношения, в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

Параметры Обозначение артикулов	Толщина материала, мкм	Время ношения, не менее, час
1	20±3	1,0
2	30±3	1,0
3	35±3	1,5
4	40±3	2,0
5	20±3	1,0
6	30±3	1,0
7	35±3	1,5
8	40±3	2,0
9	50±3	2,5
10	20±3	1,0
11	30±3	1,0
12	35±3	1,5
13	40±3	2,0
14	50±3	2,5
15	20±3	1,0
16	30±3	1,0
17	35±3	1,5
18	40±3	2,0
19	50±3	2,5
20	20±3	1,0
21	30±3	1,0
22	35±3	1,5
23	40±3	2,0
24	50±3	2,5
25	20±3	1,0
26	30±3	1,0
27	35±3	1,5
28	40±3	2,0
29	20±3	1,0
30	20±3	1,0
31	20±3	1,0
32	30±3	1,0
33	35±3	1,5
34	40±3	2,0
35	50±3	2,5
36	20±3	1,0
37	20±3	1,0
38	30±3	1,0
39	35±3	1,5
40	40±3	2,0
41	20±3	1,0
42	20±3	1,0
43	20±3	1,0
44	30±3	1,0
45	35±3	1,5
46	40±3	2,0
47	50±3	2,5
48	20±3	1,0
49	20±3	1,0
50	30±3	1,0
51	35±3	1,5
52	40±3	2,0

Параметры Обозначение артикулов	Толщина материала, мкм	Время ношения, не менее, час
53	20±3	1,0
54	20±3	1,0
55	20±3	1,0
56	30±3	1,0
57	35±3	1,5
58	40±3	2,0
59	50±3	2,5
60	20±3	1,0
61	20±3	1,0
62	30±3	1,0
63	35±3	1,5
64	40±3	2,0
65	20±3	1,0
66	20±3	1,0
67	20±3	1,0
68	30±3	1,0
69	35±3	1,5
70	40±3	2,0
71	50±3	2,5
72	20±3	1,0

Размеры, масса: Габаритные размеры и масса бахил должны соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Параметры Обозначение артикулов	Длина (L), мм	Ширина (b), мм	Масса, 1 пара., г
1	290±10	120±10	1,5±0,5
2	290±10	120±10	2,2±0,5
3	290±10	120±10	2,6±0,5
4	290±10	120±10	2,9±0,5
5	390±10	140±10	2,3±0,5
6	390±10	140±10	3,5±0,5
7	390±10	140±10	4,0±0,5
8	390±10	140±10	4,6±0,5
9	390±10	140±10	5,8±0,5
10	390±10	150±10	2,5±0,5
11	390±10	150±10	3,7±0,5
12	390±10	150±10	4,3±0,5
13	390±10	150±10	5,0±0,5
14	390±10	150±10	6,2±0,5
15	400±10	140±10	2,4±0,5
16	400±10	140±10	3,6±0,5

Параметры Обозначение артикулов	Длина (L), мм	Ширина (b), мм	Масса, 1 пара., г
17	400±10	140±10	4,2±0,5
18	400±10	140±10	4,8±0,5
19	400±10	140±10	6,0±0,5
20	400±10	150±10	2,5±0,5
21	400±10	150±10	3,8±0,5
22	400±10	150±10	4,5±0,5
23	400±10	150±10	5,0±0,5
24	400±10	150±10	6,4±0,5
25	290±10	120±10	1,5±0,5
26	290±10	120±10	2,2±0,5
27	290±10	120±10	2,6±0,5
28	290±10	120±10	2,9±0,5
29	390±10	140±10	2,5±0,5
30	390±10	150±10	2,5±0,5
31	400±10	140±10	2,4±0,5
32	400±10	140±10	3,6±0,5
33	400±10	140±10	4,2±0,5
34	400±10	140±10	4,8±0,5
35	400±10	140±10	6,0±0,5
36	400±10	150±10	2,5±0,5
37	290±10	120±10	1,5±0,5
38	290±10	120±10	2,2±0,5
39	290±10	120±10	2,6±0,5
40	290±10	120±10	2,9±0,5
41	390±10	140±10	2,5±0,5
42	390±10	150±10	2,5±0,5
43	400±10	140±10	2,4±0,5
44	400±10	140±10	3,6±0,5
45	400±10	140±10	4,2±0,5
46	400±10	140±10	4,8±0,5
47	400±10	140±10	6,0±0,5
48	400±10	150±10	2,5±0,5
49	290±10	120±10	1,5±0,5

Параметры Обозначение артикулов	Длина (L), мм	Ширина (b), мм	Масса, 1 пара., г
50	290±10	120±10	2,2±0,5
51	290±10	120±10	2,6±0,5
52	290±10	120±10	2,9±0,5
53	390±10	140±10	2,5±0,5
54	390±10	150±10	2,5±0,5
55	400±10	140±10	2,4±0,5
56	400±10	140±10	3,6±0,5
57	400±10	140±10	4,2±0,5
58	400±10	140±10	4,8±0,5
59	400±10	140±10	6,0±0,5
60	400±10	150±10	2,5±0,5
61	290±10	120±10	1,5±0,5
62	290±10	120±10	2,2±0,5
63	290±10	120±10	2,6±0,5
64	290±10	120±10	2,9±0,5
65	390±10	140±10	2,5±0,5
66	390±10	150±10	2,5±0,5
67	400±10	140±10	2,4±0,5
68	400±10	140±10	3,6±0,5
69	400±10	140±10	4,2±0,5
70	400±10	140±10	4,8±0,5
71	400±10	140±10	6,0±0,5
72	400±10	150±10	2,5±0,5

Комплектность:

В комплект поставки должно входить:

- Бахилы медицинские одноразовые, полиэтиленовые в индивидуальной упаковке, с этикеткой (одного артикула):

- 1 пара (2 шт.);

или

- Бахилы медицинские одноразовые, полиэтиленовые в групповой упаковке, с этикеткой (одного артикула):

- 5 пар (10 шт.);

- 10 пар (20 шт.);

- 50 пар (100 шт.);

- 100 пар (200 шт.);

или

- Бахилы медицинские одноразовые, полиэтиленовые в транспортной упаковке, с этикеткой (одного артикула):

- 2000 пар (4000 шт.);

- Инструкция по применению – 1 экз. на групповую/транспортную упаковку.

Хранение и транспортирование: Транспортирование изделий должно производиться любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования изделий вида климатического исполнения УХЛ 4.2 - по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

Изделия в упаковке предприятия должны храниться на складах поставщика по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Запрещено хранить и транспортировать бахилы рядом с нагревательными приборами, в местах с повышенной температурой и рядом с предметами обладающими сильным запахом (бытовая химия).

Не рекомендуется подвергать изделия воздействию прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению.

Утилизация: Использованные бахилы утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б.

Упаковку, а так же не использованные или с истекшим сроком годности бахилы утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.

Гарантия изготовителя: ООО ПК «Техническая керамика»
ИНН 6453142195, КПП 645301001, ОГРН 1156451017898,
410080, Саратовская обл., г. Саратов, пр-т Строителей, д.33, офис 6
Тел.: +7(8452) 75-31-32, 25-38-46
E-mail: tehceramics@mail.ru

Изготовитель гарантирует соответствие Бахил медицинских одноразовых полиэтиленовых по ТУ 32.50.50-003-26899771-2018 заявленным свойствам в течение срока годности, при условии соблюдения правил хранения, применения и транспортирования.

Срок годности бахил - 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

Не использовать по истечении срока годности.

Гарантийный срок хранения составляет 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

Бахилы применяют одноразово, не требуется сервисное, техническое обслуживание и ремонт.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
7 (два) листа(ов)
Иванов И.И.
Ф.И.О.
личная подпись

