

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»



С.М. Хардина С.М. Хардина

2 2019 г.

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01 «МЕДИНТ-М» в сумке
универсальной СМУ-03 по ТУ 32.50.13-012-18585567-2005

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942431.001 РЭ



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 32.50.13-012-18585567-2005
Рег. уд. № ФСР 2010/08890 от __. __. 201__ г.

НАБОР ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

НВОП-01-«МЕДИНТ-М»

в сумке универсальной СМУ-03

Руководство по эксплуатации

ЛКЯМ.942431.001 РЭ



*Перед началом работы с набором
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России

1 из 10

Назначение: набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М» в сумке универсальной СМУ-03 предназначенный для оказания первичной медико-санитарной помощи в объеме, оказываемом врачом общей практики на дому.

Область применения: амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому.

Основные технические характеристики набора:

Габаритные размеры: 400±40 x 260±25 x 260±25 мм.

Масса набора с вложениями при поставке: не более 4,5 кг.

Максимальная загрузка сумки СМУ-03: не более 10 кг.

Комплект поставки:

1. Комплект вложений согласно Приложению.
2. Сумка универсальная СМУ-03.
3. Руководство по эксплуатации

Описание изделия:

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М» представляет собой комплект медицинских изделий, позволяющий оказывать врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами) первичную медико-санитарную помощь пациентам всех возрастов. Набор упакован в сумку универсальную СМУ-03.

Сумка СМУ-03 – эргономичная, легкая, прочная и вместительная. Для повышения уровня безопасности передвижения в темное время суток на передней и задней стенках набор имеет светоотражающую полосу. Благодаря использованию внутри сумки специального вкладыша с ячейками, доступ к вложениям происходит быстро и удобно.

На задней стенке сумки СМУ-03 предусмотрен карман на молнии для документов.

Правила эксплуатации:

- 1) Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки и хранения. Перед началом работы с набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.
- 2) Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских вложений, входящих в состав набора.
- 3) Сумка набора имеет жёсткий каркас и защищает элементы набора от повреждений. Однако, при транспортировке набора и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов набора и нарушению стерильности вложений. Бережное отношение и аккуратная работа с набором продлевает срок его службы.
- 4) После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в чистые отсеки. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в верхний отсек сумки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий в соответствии с РЭ на это изделие. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. Своевременно пополняйте состав расходных материалов, помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат.
- 5) При открывании и закрывании застежек-молний необходимо пользоваться каждым замком отдельно, а на закруглениях корпуса и карманов движение замков осуществлять плавно, без резких дерганий.
- 6) Сумку в процессе эксплуатации и хранения следует содержать чистой и сухой. Сумка изготовлена из моющейся водоотталкивающей ткани. Мыть сумку следует в теплом слабом водном растворе перекиси водорода и стирального порошка типа «Лотос» или аналогичного. В случае сильного локального загрязнения (например, кровь) после 30-ти минутного замачивания загрязненного фрагмента в растворе следует аккуратно почистить загрязнения щеткой с синтетическим жестким ворсом. После первого мытья допускается небольшое изменение цвета моющего раствора, при последующих обработках

изменения цвета раствора происходить не должно. Внутренний каркас стенок сумки следует вынимать и мыть отдельно, после просушки вставить обратно. Внутреннюю поверхность сумки также необходимо мыть щеткой с тем же раствором. Раствор следует менять по мере его загрязнения. Обработка спиртосодержащими растворами и термическим способом (кипячение, автоклавирование и т.п.) не допускается.

Хранить набор следует при температуре от +5°C до +40°C

Транспортировать набор допускается при температуре от -50°C до +50°C

Эксплуатировать набор допускается при температуре от -25°C до +40°C

Набор должен находиться вдали от источников энергии, батарей и горючих веществ.

Указания по утилизации:

Сумка относится к медицинским отходам класса «А». Она утилизируется стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения набора утилизируются согласно их инструкциям по эксплуатации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу набора при условии соблюдения рекомендаций по эксплуатации, транспортировке и хранению.

Гарантийный срок службы набора – 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на вложения (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия производства сторонних организаций).

Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности вложения с наименьшим сроком хранения, но не менее 6 мес.

Контактная информация производителя:

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт. 2, пом. I, ком. 296-318

Телефон: +7(495) 223-6016

e-mail: medplant@medplant.ru

Свидетельство о приёмке:

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М» в сумке универсальной СМУ-03 соответствует ТУ 32.50.13-012-18585567-2005 и признан годным для эксплуатации.

Артикул:

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Любые пожелания, замечания и рекламации касательно набора просьба присылать на наш e-mail: – medplant@medplant.ru

**Перечень вложений, входящих в набор изделий
для врача общей практики НВОП-01 «Мединт-М»**

№	Наименование комплектующей	Производитель	Обозначение документации	Кол-во
1	<i>Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см</i>	АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика». (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2010/07468	2 шт.
		ООО "Фарм-Глобал". (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2011/12237	
		ООО "ЭВТЕКС". (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2007/01317	
		ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2007/00081	
		ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА". (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2010/08705	
		ООО "НЬЮФАРМ". (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2010/06612	
		ООО "ХБК Навтекс". (Россия)	ТУ 9393-004-10715071-2014, РУ № РЗН 2015/2558	
		ООО "ХБК Навтекс". (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2012/13510	
		ООО "ХБК Навтекс". (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № РЗН 2015/2552	
2	<i>Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см</i>	АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика». (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2010/07468	2 шт.
		ООО "Фарм-Глобал". (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2011/12237	
		ООО "ЭВТЕКС". (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2007/01317	
		ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2007/00081	
		ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА". (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2010/08705	
		ООО "НЬЮФАРМ". (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2010/06612	
		ООО "ХБК Навтекс". (Россия)	ТУ 9393-004-10715071-2014, РУ № РЗН 2015/2558	
		ООО "ХБК Навтекс". (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № ФСР 2012/13510	
		ООО "ХБК Навтекс". (Россия)	ГОСТ 1172-93, РУ № РЗН 2015/2552	
3	<i>Вата хирургическая, 50 г.</i>	ООО "ЕМЕЛЬЯНЪ САВОСТИНЪ. ВАТНАЯ ФАБРИКА". (Россия)	ГОСТ 5556-81, РУ № ФСР 2010/06930	1 шт.
		ООО "НЬЮФАРМ". (Россия)	ГОСТ 5556-81, РУ № ФСР 2010/07841	
		ЗАО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика". (Россия)	ГОСТ 5556-81, РУ № ФСР 2010/08703	
		ООО "Предприятие "ФЭСТ". (Россия)	ГОСТ 5556-81, РУ № ФСР 2008/03338	
		ООО "Лейко". (Россия)	ГОСТ 5556-81, РУ № ФСР 2009/04702	
4	<i>Лейкопластырь ленточный (рулонный)</i>	"Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", (КНР)	РУ № ФСЗ 2008/01442	1 шт.
		АО "ВЕРОФАРМ". (Россия)	ТУ 9393-015-45961725-2009, РУ № ФСР 2009/05363	
		"ФармЛайн Лимитед", (Великобритания)	РУ № ФСЗ 2008/01959	
		"Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.", (КНР)	РУ № ФСЗ 2011/09593	
5	<i>Повязка гемостатическая</i>	ООО "Группа компаний "Альтекс", (Россия)	ТУ 9393-004-40383494-2002, РУ № ФСР 2008/03411	2 шт.
		ООО "АЛЬТЕКС". (Россия)	ТУ 9393-004-40383494-2002, РУ № ФСР 2009/06480	
		ООО "КОЛЕТЕКС". (Россия)	ТУ 9393-008-58223785-2005, РУ № ФСР 2010/08240	

		ФГУП НПЦ Фармзащита ФМБА. (Россия)	ГУ 9393-001-8152288-2009, РУ № ФСР 2010/07420	
		"МЕДТРОЙД ПРОДАКТС ЛТД". (Великобритания)	РУ № ФСЗ 2012/12039	
		ООО "МДК Медика", (Россия)	ГУ 9393-001-40086098-2015, РУ № РЗН 2016/4680	
		ООО "МДК Медика", (Россия)	ГУ 9393-002-40086098-2015, РУ № РЗН 2017/6201	
6	Салфетка марлевая медицинская стерильная 16см x14см	АО "Кинешемская пряильно-ткацкая фабрика", (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2010/07469	1 уп.
		ООО "АПСАНА", (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2008/03219	
		ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2009/05213	
		ООО "ПКФ ВераМед", (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2008/03225	
		ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2010/08939	
		ООО "НЬЮФАРМ", (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2011/11141	
		ООО ПКФ "Ахгамар", (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2011/12069	
7	Пакет гипотермический	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО", (Россия)	ГУ 9398-014-42965160-2011, РУ № ФСР 2011/12263	1 шт.
		ООО "Предприятие "ФЭСТ", (Россия)	ГУ 9398-003-10973749-2016, РУ № ФСР 2007/01584	
8	Жгут (трубка) для внутривенных инъекций	"МЕРИДИАН МЕДИКАЛ ПРОДАКТС ЛТД", (Великобритания)	РУ № ФСЗ 2010/06464	1 шт.
		ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)	ГУ 9398-026-42965160-2004, РУ № ФСР 2009/06312	
		Гуанчжоу Имприв Медикал Инструментс Ко., Лтд., (Китай)	РУ № ФСЗ 2010/06621	
		ООО "Предприятие "ФЭСТ", (Россия)	ГУ 9398-057-10973749-2006, РУ № ФСР 2011/10332	
		ООО "Объединение Альфапластик", (Россия)	ГУ 9398-002-00149535-2007, РУ № ФСР 2007/00032	
		ООО "Киевгума", (Украина)	РУ № ФСЗ 2012/12991	
9	Жгут кровоостанавливающий	"Вэйхай Хоний Медикал Девайсез Ко., Лтд.", (Китай)	РУ № ФСЗ 2009/05720	1 шт.
		ООО "Объединение Альфапластик", (Россия)	ГУ 9398-041-00149535- 2006, РУ № ФСР 2012/13201	
		ООО НПФ "МИРАЛ", (Россия)	ГУ 2545-008-26528997-10, РУ № ФСР 2010/07432	
10	Шприцы инъекц. однократного применения с иглами 2, 5, 10 и 20 мл	ООО "МЕДИЛАНТ", (Россия)	ГУ 32.50.13-012-52777873- 2014, РУ № РЗН 2014/2113	по 2 шт.
		ПАО "Гемопласт", (Украина)	РУ № ФСЗ 2011/11225	
		АО "Медполимер ЛТД", (Россия)	ГУ 9398-001-25597097- 2005, РУ № ФСР 2010/07477	
		ООО "Стерин", (Россия)	ГУ 9398-004-11701993- 2008, РУ № ФСР 2008/03253	
		"СФ Медикал Продакте ГмбХ", (Германия)	РУ № ФСЗ 2009/05672	
		АО Ракетно-космический центр "Прогресс", (Россия)	ГУ 9398-093-43892776- 2005, РУ № ФСР 2010/08648	
11	Салфетка дезинфицирующая для обработки рук	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды), "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)	РУ № ФСЗ 2008/02859	10 шт.
		ООО "М.К. Асептика", (Россия)	ГУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСР 2009/05438	
		ООО Фармэль, (Россия)	ГУ 9393-002-68845281- 2013, РУ № РЗН 2014/1695	

		ООО "ЭВТЕКС", (Россия)	ГУ 9393-004-52707619-2006, РУ № ФСР 2007/01592	
12	<i>Салфетка дезинфицирующая для инъекций</i>	ООО "Лейко", (Россия)	ГУ 9393-006-56334457-2008, РУ № ФСР 2008/03704	10 шт.
		ООО "НПФ "Мелтехмаркет", (Россия)	ГУ 9393-001-58716163-2003, РУ № ФСР 2008/02512	
		ООО "М.К. Асептика", (Россия)	ГУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСР 2009/05438	
		ООО Фармэль, (Россия)	ГУ 9393-002-68845281-2013, РУ № РЗН 2014/1695	
		ООО "ЭВТЕКС", (Россия)	ГУ 9393-004-52707619-2006, РУ № ФСР 2007/01592	
13	<i>Устройство для сливания инфузионных растворов однократного применения</i>	СФ Медикал Продакте ГмбХ", (Германия)	РУ № ФСЗ 2009/05662	2 шт.
		"Хуайань Сити Хэнчунь Медикал Продакт Ко., Лтд.", (Китай)	РУ № ФСЗ 2010/07086	
		"Веньчжоу Бэйну Сайене энд Технолоджи Ко., Лтд.", (Китай)	РУ № ФСЗ 2009/05610	
		ООО "Группа Цзянсийских Медицинских Оборудований Хунда", (Китай)	РУ № ФСЗ 2011/09652	
		ООО "Виробан", (Россия)	ГУ 9398-001-70440344-2004, РУ № ФСР 2010/07486	
		ОАО "ГЗМОИ", (Россия)	ГУ 9398-046-12517820-2003, РУ № ФСР 2010/07720	
		"Чанчжоу Тонда Медикал Эплайне Ко., Лтд.", (Китай)	РУ № РЗН 2016/3514	
14	<i>Канюля для периферических вен</i>	"КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продакте", (Германия)	РУ № ФСЗ 2010/08754	2 шт.
		"Истерн Медикит Лимитед", (Индия)	РУ № ФСЗ 2009/04165	
		"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.", (Индия)	РУ № ФСЗ 2009/05411	
		"Био-Мед Хэлскеа Продакте Прайвет Лимитед", (Индия)	РУ № РЗН 2014/1679	
		"Хельм Медикал ГмбХ", (Германия)	РУ № ФСЗ 2008/02981	
		"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды), "Цзянсу Канцин Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)	РУ № ФСЗ 2008/02866	
		ШАНЬДУН ЖИБО ШАНЧЮАНЬ МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО. ЛТД., (Китай)	РУ № ФСЗ 2007/00509	
		"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.", (Китай)	РУ № ФСЗ 2009/03691	
		"Поли Медикьюр Лимитед", (Индия)	РУ № ФСЗ 2011/09113	
		"СУРУ ИНТЕРНЭШНЛ Пивити. ЛТД.", (Индия)	РУ № РЗН 2013/182	
		"Диспозейф Хелс энд Лайф Кеа Лтд.", (Индия)	РУ № РЗН 2017/5585	
15	<i>Шпатель одноразовый деревянный</i>	АО Ракетно-космический центр "Прогресс", (Россия)	ГУ 9398-107-43892776-2010, РУ № ФСР 2010/08880	10 шт.
		ООО "Арлейл-Импэкс", (Россия)	ГУ 9434-002-83144357-2010, РУ № ФСР 2010/08671	
		ООО Общество с ограниченной ответственностью "Лейко" (ООО "Лейко"), (Россия)	ГУ 9398-008-56334457-2010, РУ № ФСР 2010/08869	
		ООО "ИРБИС", (Россия)	ГУ 9398-001-80050689-2012, РУ № ФСР 2012/13410	
		"Янгу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.", (Китай)	РУ № ФСЗ 2012/12584	

		"Далиан Ронгбанг Медикал Хелси Девайсес Ко., Лтд.", (Китай)	ру № ФСЗ 2012/12456	
		"Нинбо Грейткэ Трейдинг Ко., Лтд.", (Китай)	ру № РЗН 2017/6438	
16	Роторасширитель винтовой	Энтер Медикал Корпорейшн, (Тайвань, Китайская Республика)	ру № ФСЗ 2008/01782	1 шт.
17	Пожигицы медицинские	ОАО "МИЗ им. М.Горького", (Россия)	ТУ 9433-285-07613444-2010, ру № ФСЗ 2010/07370	1 шт.
		"Эс-Джи-Эс Экспорт Интернешнл", (Пакистан)	ру № ФСЗ 2012/12352	
		"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)	ру № ФСЗ 2008/02888	
		"ХОБРИ ИНТЕРНЕШНЛ", (Пакистан)	ру № ФСЗ 2012/13136	
		"Саммар Интернешнл", (Пакистан)	ру № ФСЗ 2012/12515	
18	Пинцет медицинский	Открытое акционерное общество "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)	ТУ 9435-215-07610776-2005, ру № ФСЗ 2010/08474	1 шт.
			ТУ 9435-296-07610776-2011, ру № ФСЗ 2007/00268	
		Открытое акционерное общество "Медико-инструментальный завод им. М.Горького", (Россия)	ТУ 9435-286-07613444-2010, ру № ФСЗ 2010/08119	
		"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)	ру № ФСЗ 2008/02889	
		"Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд.", (Китай)	ру № ФСЗ 2010/06996	
19	Молоток неврологический	"Саммар Интернешнл", (Пакистан)	ру № ФСЗ 2012/12517	1 шт.
		ОАО "Можайский медико-инструментальный завод", (Россия)	ТУ 9439-034-07613473-2005, ру № ФСЗ 2009/06065	
		"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)	ру № ФСЗ 2012/12517	
		"Саммар Интернешнл", (Пакистан)	ру № ФСЗ 2008/02887	
20	Щипцы гортанные для извлечения инородных тел	Открытое акционерное общество "Медико-инструментальный завод им. М.Горького", (Россия)	ТУ 9435-286-07613444-2010, ру № ФСЗ 2010/08119	1 шт.
		"Саммар Интернешнл", (Пакистан)	ру № ФСЗ 2012/12517	
		"Сурджикон ЛТД" (Пакистан)	ру № РЗН 2015/3121	
		"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)	ру № ФСЗ 2008/02889	
21	Спринцовка резиновая	ООО "Объединение Альфапластик", (Россия)	ТУ 9398-005-05769082-2003, ру № ФСЗ 2012/13200	1 шт.
		ООО "Альпина Пласт", (Россия)	ТУ 9398-013-17707123-2012, ру № РЗН 2015/3008	
22	Пипетка глазная стеклянная	ООО "АМГ трейд", (Россия)	ТУ 9464-001-53757884-2002, ру № ФСЗ 2009/04211	2 шт.
		ООО "Компания Солнышко", (Россия)	ТУ 9398-001-98300952-2007, ру № ФСЗ 2008/02370	
		ООО "Московское ПО "Металпластизделие", (Россия)	ТУ 9464-002-03964906-2002, ру № ФСЗ 2007/00027	
23	Измеритель артериального давления (тонометр) с фонендоскопом	ООО "МЕДТЕХНИКА", (Россия)	ТУ 9441-015-27418804-2007, ру № ФСЗ 2008/01763	1 шт.
		ООО "Тривес", (Россия)	ТУ 9441-002-33094849-2005, ру № ФСЗ 2010/08666	
		ООО МФ "МИКСТ-И", (Россия)	ТУ 9441-003-17728059-99, ру № ФСЗ 2007/01550	
		ООО "АДЬЮТОР", (Россия)	ТУ 9441-003-58286981-2014, ру № РЗН 2015/3206	
24	Медицинский термометр ртутный	ОАО "ТЕРМОПРИБОР", (Россия)	ГОСТ 302-79, ру № ФСЗ 2007/01546	1 шт.
		"Амрус Энтерпрайзис Лтд.", (США)	ру № ФСЗ 2007/00232	
		"Джоушан Тонгсин Инструментс Ко., Лтд.", (Китай)	ру № ФСЗ 2012/11805	
25	Устройство УДР для ИВЛ «рот-в-рот»	ООО НПФ "МИРАЛ", (Россия)	ТУ 9444-009-26528997-10, ру № ФСЗ 2010/07434	1 шт.
		ООО "Полимерные изделия", (Россия)	ТУ 9439-035-05519988-97, ру № ФСЗ 2008/02602	
		ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)	ТУ 9398-016-42965160-2004, ру № ФСЗ 2008/03530	
		ООО "Предприятие "ФЭСТ", (Россия)	ТУ 9393-009-0973749-2002, ру № ФСЗ 2007/00679	

		ЗАО НПКФ "МЕТОМ", (Россия)	ТУ 3-2257-90. РУ № ФСР 2007/01323	
26	Зонд желудочный питательный с воронкой	ООО "Объединение Альфапластик", (Россия)	ТУ 9398-010-05769082-2004. РУ № ФСР 2007/00073	1 шт.
		"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды). "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)	РУ № ФСЗ 2008/02867	
		ООО "Полимерные изделия", (Россия)	ТУ 9398-164-05519988-2004. РУ № ФСР 2009/05817	
		"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.", (Китай)	РУ № ФСЗ 2008/03466	
		"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)	РУ № ФСЗ 2011/10986	
		"КонваТек Инк.", (США)	РУ № ФСЗ 2008/02333	
		ООО "Ассомедика", (Республика Беларусь)	ТУ ВУ 190682947.002-2008. РУ № ФСЗ 2010/06636	
27	Перчатки смотровые нестерильные	"Ган Син Лиан Индастриз Сдн. Бхд.", (Малайзия)	РУ № ФСЗ 2010/06671	5 пар.
		"ТОП ГЛАВ СДН. БХД.", (Малайзия)	РУ № ФСЗ 2009/05162	
		"Макстер Глов Маньюфакчуринг СДН БХД (229862-Х)", (Малайзия)	РУ № ФСЗ 2011/10210	
		Top Glove Sdn.Bhd. Топ Глав Сдн Бхд. (Малайзия)	РУ № ФСЗ 2009/05130	
28	Держатель инфузионных флаконов на 200 мл с кронштейном	ООО "МЕДПЛАНТ", (Россия)	ТУ 9452-010-52777873-2013. РУ № РЗН 2014/1603	1 шт.
29	Держатель инфузионных флаконов на 400 мл с кронштейном			1 шт.
30	Футляр для ампул		EN ISO 9001:2015 № CQS 2235/2018	1 шт.
31	Сантиметровая лента	ООО «ЛерПромКомплект», (Россия)	Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия	1 шт.
		«Gamma Ltd», (Тайвань)		
32	Фонарик	«Kirchner&Wilhelm GmbH + Co KG», (Германия)	РУ № РЗН 2016/4777	1 шт.
		«Worldwide Business Network Limited», (Великобритания)	Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия	
		"Литл Доктор ИнтернэшнлПрте. Лтд." (Сингапур)	РУ № ФСЗ 2012/13398	
33	Манжеты для тонометра детская (от 6 до 10 лет)	ООО "МЕДТЕХНИКА", (Россия)	ТУ 9441-015-27418804-2007. РУ № ФСР 2008/01763	0...1 шт.
		ООО "Тривес", (Россия)	ТУ 9441-002-33094849-2005. РУ № ФСР 2010/08666	
		ООО МФ "МИКСТ-И", (Россия)	ТУ 9441-003-17728059-99. РУ № ФСР 2007/01550	
		ООО "АДЬЮТОР", (Россия)	ТУ 9441-003-58286981-2014. РУ № РЗН 2015/3206	
34	Манжеты для тонометра подростковая	ООО "МЕДТЕХНИКА", (Россия)	ТУ 9441-015-27418804-2007. РУ № ФСР 2008/01763	0...1 шт.
		ООО "Тривес", (Россия)	ТУ 9441-002-33094849-2005. РУ № ФСР 2010/08666	
		ООО МФ "МИКСТ-И", (Россия)	ТУ 9441-003-17728059-99. РУ № ФСР 2007/01550	
		ООО "АДЬЮТОР", (Россия)	ТУ 9441-003-58286981-2014. РУ № РЗН 2015/3206	
35	Диагностический набор (оторино-офтальмоскоп)	"КИРХЕР & ВИЛХЕЛМ ГмбХ + Ко. КГ", (Германия)	РУ № РЗН 2015/3215	0...1 шт.
		"Рудольф Ристер ГмбХ" (Германия)	РУ № ФСЗ 2012/12790	
36	Пикфлоуметр	"Клемент Кларк Интернэшнл Лтд.", (Великобритания)	РУ № ФСЗ 2009/04653	0...1 шт.
37	Глюкометр портативный	"Аспензия Диабитис Кеа Холдингс АГ" (Швейцария).	РУ № ФСЗ 2007/00570	0...1 шт.
		"Рош Диабете Кеа ГмбХ", (Германия)	РУ № ФСЗ 2007/00817	
		Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ЭЛТА", (Россия)	ТУ 9443-003-29149289-2001. РУ № ФСР 2011/12518	

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 8

(восемь)
прописью
) листов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР С.М. Хардина
Должность ХАРДИНА ФИО С.М.
Подпись



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»



 С.М. Хардина
«16»  2019 г.

НАБОР ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

НВОП-01-«МЕДИНТ-М»

В СУМКЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СМУ-03

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942431.001 РЭ

**НАБОР ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
НВОП-01-«МЕДИНТ-М»**

в сумке универсальной СМУ-03

Руководство по эксплуатации

ЛКЯМ.942431.001 РЭ



*Перед началом работы с набором
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России

Ver 008

Назначение: набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М» в сумке универсальной СМУ-03 предназначенный для оказания первичной медико-санитарной помощи в объеме, оказываемом врачом общей практики на дому.

Область применения: амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому.

Основные технические характеристики набора:

Габаритные размеры: 400±40 x 260±25 x 260±25 мм.

Масса набора с вложениями при поставке: не более 4,5 кг.

Максимальная загрузка сумки СМУ-03: не более 10 кг.

Комплект поставки:

1. Комплект вложений согласно Приложению.
2. Сумка универсальная СМУ-03.
3. Руководство по эксплуатации

Описание изделия:

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М» представляет собой комплект медицинских изделий, позволяющий оказывать врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами) первичную медико-санитарную помощь пациентам всех возрастов. Набор упакован в сумку универсальную СМУ-03.

Сумка СМУ-03 – эргономичная, легкая, прочная и вместительная. Для повышения уровня безопасности передвижения в темное время суток на передней и задней стенках набор имеет светоотражающую полосу. Благодаря использованию внутри сумки специального вкладыша с ячейками, доступ к вложениям происходит быстро и удобно.

На задней стенке сумки СМУ-03 предусмотрен карман на молнии для документов.

Правила эксплуатации:

- 1) Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки и хранения. Перед началом работы с набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.
- 2) Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских вложений, входящих в состав набора.
- 3) Сумка набора имеет жесткий каркас и защищает элементы набора от повреждений. Однако, при транспортировке набора и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов набора и нарушению стерильности вложений. Бережное отношение и аккуратная работа с набором продлевает срок его службы.
- 4) После окончания работы с пациентом не убирайте загрязненное имущество в чистые отсеки. Загрязненное имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в верхний отсек сумки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий в соответствии с РЭ на это изделие. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. Своевременно пополняйте состав расходных материалов, помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат.
- 5) При открывании и закрывании застежек-молний необходимо пользоваться каждым замком отдельно, а на закруглениях корпуса и карманов движение замков осуществлять плавно, без резких дерганий.
- 6) Сумку в процессе эксплуатации и хранения следует содержать чистой и сухой. Сумка изготовлена из моющейся водоотталкивающей ткани. Мыть сумку следует в теплом слабом водном растворе перекиси водорода и стирального порошка типа «Лотос» или аналогичного. В случае сильного локального загрязнения (например, кровь) после 30-ти минутного замачивания загрязненного фрагмента в растворе следует аккуратно почистить загрязнения щеткой с синтетическим жестким ворсом. После первого мытья допускается небольшое изменение цвета моющего раствора, при

последующих обработках изменения цвета раствора происходить не должно. Внутренний каркас стенок сумки следует вынимать и мыть отдельно, после просушки вставить обратно. Внутреннюю поверхность сумки также необходимо мыть щеткой с тем же раствором. Раствор следует менять по мере его загрязнения. Обработка спиртосодержащими растворами и термическим способом (кипячение, автоклавирование и т.п.) не допускается.

Хранить набор следует при температуре от +5°C до +40°C

Транспортировать набор допускается при температуре от -50°C до +50°C

Эксплуатировать набор допускается при температуре от -25°C до +40°C

Набор должен находиться вдали от источников энергии, батарей и горючих веществ.

Требования к обслуживанию и ремонту: Набор не требует технического обслуживания, а при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения – ремонта, в течении всего срока службы.

Указания по утилизации:

Сумка относится к медицинским отходам класса «А». Она утилизируется стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения набора утилизируются согласно их инструкциям по эксплуатации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу набора при условии соблюдения рекомендаций по эксплуатации, транспортировке и хранению.

Гарантийный срок службы набора – 12 месяцев со дня продажи изделия (гарантия распространяется на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ»: сумку СМУ-03 вместе с внутренними элементами конструкции (ячейка-вкладыш). Гарантия не распространяется на вложения (см. Приложение) производства сторонних организаций.

Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности вложения с наименьшим сроком хранения, но не менее 6 мес.

Контактная информация производителя:

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5., эт. 2, пом. I, ком. 296-318

Телефон: +7(495) 223-6016 (многоканальный)

e-mail: medplant@medplant.ru

Свидетельство о приёмке:

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М» в сумке универсальной СМУ-03 соответствует ТУ 32.50.13-012-18585567-2005 и признан годным для эксплуатации.

Артикул:

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Любые пожелания, замечания и рекламации касательно набора просьба присылать на наш e-mail: – medplant@medplant.ru

**Перечень вложений, входящих в набор изделий
для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М»**

№	Наименование комплектующей	Производитель	Обозначение документации	Количество
1	<i>Бинт марлевый медицинский стерильный 5м х 10см</i>	АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика». (Россия)	ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2010/07468	2 шт.
		ООО "Фарм-Глобал". (Россия)	ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2011/12237	
		ООО "ЭВТЕКС". (Россия)	ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2007/01317	
		ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО»», (Россия)	ГОСТ 1172-93 РУ № ФСР 2007/00081	
		ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА". (Россия)	ГОСТ 1172-93 РУ № ФСР 2010/08705	
		ООО "НЬЮФАРМ". (Россия)	ГОСТ 1172-93 РУ № ФСР 2010/06612	
		ООО "ХБК Навтекс". (Россия)	ТУ 9393-004-10715071-2014. РУ № РЗН 2015/2558	
		ООО "ХБК Навтекс". (Россия)	ГОСТ 1172-93 РУ № ФСР 2012/13510	
		ООО "ХБК Навтекс". (Россия)	ГОСТ 1172-93. РУ № РЗН 2015/2552	
2	<i>Бинт марлевый медицинский стерильный 7м х 14см</i>	АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика». (Россия)	ГОСТ 1172-93 РУ № ФСР 2010/07468	2 шт.
		ООО "Фарм-Глобал". (Россия)	ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2011/12237	
		ООО "ЭВТЕКС". (Россия)	ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2007/01317	
		ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО»», (Россия)	ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2007/00081	
		ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА". (Россия)	ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2010/08705	
		ООО "НЬЮФАРМ". (Россия)	ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2010/06612	
		ООО "ХБК Навтекс". (Россия)	ТУ 9393-004-10715071-2014. РУ № РЗН 2015/2558	
		ООО "ХБК Навтекс". (Россия)	ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2012/13510	
		ООО "ХБК Навтекс". (Россия)	ГОСТ 1172-93. РУ № РЗН 2015/2552	
3	<i>Вата хирургическая, 50 г.</i>	ООО "ЕМЕЛЬЯНЪ САВОСТИНЪ, ВАТНАЯ ФАБРИКА". (Россия)	ГОСТ 5556-81. РУ № ФСР 2010/06930	1 шт.
		ООО "НЬЮФАРМ". (Россия)	ГОСТ 5556-81. РУ № ФСР 2010/07841	
		ЗАО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика". (Россия)	ГОСТ 5556-81. РУ № ФСР 2010/08703	
		ООО "Предприятие "ФЭСТ". (Россия)	ГОСТ 5556-81. РУ № ФСР 2008/03338	
		ООО "Лейко". (Россия)	ГОСТ 5556-81. РУ № ФСР 2009/04702	
4	<i>Лейкопластырь ленточный (рулонный)</i>	"Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.". (КНР)	РУ № ФСЗ 2008/01442	1 шт.
		АО "ВЕРОФАРМ". (Россия)	ТУ 9393-015-45961725-2009. РУ № ФСР 2009/05363	
		"ФармЛайн Лимитед". (Великобритания)	РУ № ФСЗ 2008/01959	
		"Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.". (КНР)	РУ № ФСЗ 2011/09593	
5	<i>Повязка гемостатическая</i>	ООО "Группа компаний "Альтекс". (Россия)	ТУ 9393-004-40383494-2002. РУ № ФСР 2008/03411	2 шт.
		ООО "АЛЬТЕКС". (Россия)	ТУ 9393-004-40383494-2002. РУ № ФСР 2009/06480	

№	Наименование комплектующей	Производитель	Обозначение документации	Количество
		ООО "КОЛТЕКС", (Россия)	ТУ 9393-008-58223785-2005, РУ № ФСР 2010/08240	
		ФГУП НПЦ Фармзащита ФМБА, (Россия)	ТУ 9393-001-8152288-2009, РУ № ФСР 2010/07420	
		"МЕДТРЕЙД ПРОДАКТС ЛТД", (Великобритания)	РУ № ФСЗ 2012/12039	
		ООО "МДК Медика", (Россия)	ТУ 9393-001-40086098-2015, РУ № РЗН 2016/4680	
		ООО "МДК Медика", (Россия)	ТУ 9393-002-40086098-2015, РУ № РЗН 2017/6201	
6	Салфетка марлевая медицинская стерильная 16см x14см	АО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика", (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2010/07469	1 уп.
		ООО "АПСАНА", (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2008/03219	
		ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2009/05213	
		ООО "ПКФ ВераМед", (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2008/03225	
		ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2010/08939	
		ООО "НЬЮФАРМ", (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2011/11141	
		ООО ПКФ "Ахтамар", (Россия)	ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР 2011/12069	
7	Пакет гипотермический	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО", (Россия)	ТУ 9398-014-42965160-2011, РУ № ФСР 2011/12263	1 шт.
		ООО "Предприятие "ФЭСТ", (Россия)	ТУ 9398-003-10973749-2016, РУ № ФСР 2007/01584	
8	Жгут (трубка) для внутривенных инъекций	"МЕРИДИАН МЕДИКАЛ ПРОДАКТС ЛТД", (Великобритания)	РУ № ФСЗ 2010/06464	1 шт.
		ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)	ТУ 9398-026-42965160-2004, РУ № ФСР 2009/06312	
		Гуанчжоу Импрув Медикал Инструментс Ко., Лтд., (Китай)	РУ № ФСЗ 2010/06621	
		ООО "Предприятие "ФЭСТ", (Россия)	ТУ 9398-057-10973749-2006, РУ № ФСР 2011/10332	
		ООО "Объединение Альфапластик", (Россия)	ТУ 9398-002-00149535-2007, РУ № ФСР 2007/00032	
		ООО "Киевгума", (Украина)	РУ № ФСЗ 2012/12991	
		"Вэйхай Хонийой Медикал Девайсес Ко., Лтд.", (Китай)	РУ № ФСЗ 2009/05720	
9	Жгут кровоостанавливающий	ООО "Объединение Альфапластик", (Россия)	ТУ 9398-041-00149535-2006, РУ № ФСР 2012/13201	1 шт.
		ООО НПФ "МИРАЛ", (Россия)	ТУ 2545-008-26528997-10, РУ № ФСР 2010/07432	
		ООО "МЕДПЛАНТ", (Россия)	ТУ 32.50.13-012-52777873-2014, РУ № РЗН 2014/2113	
10	Шприцы инъекц. однократного применения с иглами 2, 5, 10 и 20 мл	ПАО "Гемопласт", (Украина)	РУ № ФСЗ 2011/11225	по 2 шт.
		АО "Медполимер ЛТД", (Россия)	ТУ 9398-001-25597097-2005, РУ № ФСР 2010/07477	
		ООО "Стерин", (Россия)	ТУ 9398-004-11701993-2008, РУ № ФСР 2008/03253	
		"СФ Медикал Продактс ГмбХ", (Германия)	РУ № ФСЗ 2009/05672	
		АО Ракетно-космический центр "Прогресс", (Россия)	ТУ 9398-093-43892776-2005, РУ № ФСР 2010/08648	
		"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды), "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)	РУ № ФСЗ 2008/02859	
11	Салфетка дезинфицирующая для обработки рук	ООО "М.К. Асептика", (Россия)	ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСР 2009/05438	10 шт.
		ООО Фармэль, (Россия)	ТУ 9393-002-68845281-2013, РУ № РЗН 2014/1695	
		ООО "ЭВТЕКС", (Россия)	ТУ 9393-004-52707619-2006, РУ № ФСР 2007/01592	

№	Наименование комплектующей	Производитель	Обозначение документации	Количество
12	Салфетка дезинфицирующая для инъекций	ООО "Лейко". (Россия)	ТУ 9393-006-56334457-2008. РУ № ФСР 2008/03704	10 шт.
		ООО "НПФ "Медтехмаркет". (Россия)	ТУ 9393-001-58716163-2003. РУ № ФСР 2008/02512	
		ООО "М.К. Асептика". (Россия)	ТУ 9393-001-51276525-00. РУ № ФСР 2009/05438	
		ООО Фармэль. (Россия)	ТУ 9393-002-68845281-2013. РУ № РЗН 2014/1695	
		ООО "ЭВТЕКС". (Россия)	ТУ 9393-004-52707619-2006. РУ № ФСР 2007/01592	
13	Устройство для вливания инфузионных растворов однократного применения	СФ Медикал Продакте ГмбХ". (Германия)	РУ № ФСЗ 2009/05662	2 шт.
		"Хуайань Сити Хэнчунь Медикал Продакт Ко., Лтд.". (Китай)	РУ № ФСЗ 2010/07086	
		"Веньчжоу Бэйпу Сайенс энд Технолоджи Ко., Лтд.". (Китай)	РУ № ФСЗ 2009/05610	
		ООО "Группа Цзянсийских Медицинских оборудований Хунда". (Китай)	РУ № ФСЗ 2011/09652	
		ООО "Виробан". (Россия)	ТУ 9398-001-70440344-2004. РУ № ФСР 2010/07486	
		ОАО "ТЗМОИ". (Россия)	ТУ 9398-046-12517820-2003. РУ № ФСР 2010/07720	
		"Чанчжоу Гонда Медикал Эплайнс Ко., Лтд.". (Китай)	РУ № РЗН 2016/3514	
14	Канюля для периферических вен	"КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продакте". (Германия)	РУ № ФСЗ 2010/08754	2 шт.
		"Истерн Медикит Лимитед". (Индия)	РУ № ФСЗ 2009/04165	
		"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.". (Индия)	РУ № ФСЗ 2009/05411	
		"Био-Мед Хэлскеа Продакте Прайвет Лимитед". (Индия)	РУ № РЗН 2014/1679	
		"Хельм Медикал ГмбХ". (Германия)	РУ № ФСЗ 2008/02981	
		"Апексмед Интернэшнл Б.В.". (Нидерланды).	РУ № ФСЗ 2008/02866	
		"Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.". (Китай)	РУ № ФСЗ 2007/00509	
		ШАНЬДУН ЖИБО ШАНЧЮАНЬ МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО. ЛТД., (Китай)	РУ № ФСЗ 2007/00509	
		"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.". (Китай)	РУ № ФСЗ 2009/03691	
		"Поли Медикьюр Лимитед". (Индия)	РУ № ФСЗ 2011/09113	
		"СУРУ ИНТЕРНЭШНЛ ПиВиТи. ЛТД.". (Индия)	РУ № РЗН 2013/182	
15	Шпатель одноразовый деревянный	АО Ракетно-космический центр "Прогресс". (Россия)	ТУ 9398-107-43892776-2010. РУ № ФСР 2010/08880	10 шт.
		ООО "Ардейл-Импэкс". (Россия)	ТУ 9434-002-83144357-2010. РУ № ФСР 2010/08671	
		ООО Общество с ограниченной ответственностью "Лейко" (ООО "Лейко"). (Россия)	ТУ 9398-008-56334457-2010. РУ № ФСР 2010/08869	
		ООО "ИРБИС". (Россия)	ТУ 9398-001-80050689-2012. РУ № ФСР 2012/13410	
		"Янгсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.". (Китай)	РУ № ФСЗ 2012/12584	
		"Далиан Ронгбанг Медикал Хелси Девайсез Ко., Лтд.". (Китай)	РУ № ФСЗ 2012/12456	
		"Нинбо Грейткэа Трейдинг Ко., Лтд.". (Китай)	РУ № РЗН 2017/6438	
16	Роторасширитель винтовой	Энтер Медикал Корпорейшн. (Тайвань, Китайская Республика)	РУ № ФСЗ 2008/01782	1 шт.
17	Ножницы медицинские	ОАО "МИЗ им. М.Горького". (Россия)	ТУ 9433-285-07613444-2010. РУ № ФСР 2010/07370	1 шт.

№	Наименование комплектующей	Производитель	Обозначение документации	Количество
		"Эс-Джи-Эс Экспорт Интернешнл". (Пакистан)	РУ № ФСЗ 2012/12352	
		"СУРДЖИВЕЛЛ". (Пакистан)	РУ № ФСЗ 2008/02888	
		"ХОБРИ ИНТЕРНЕТШЛ". (Пакистан)	РУ № ФСЗ 2012/13136	
		"Саммар Интернешнл". (Пакистан)	РУ № ФСЗ 2012/12515	
18	Пинцет медицинский	Открытое акционерное общество "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина". (Россия)	ТУ 9435-215-07610776-2005. РУ № ФСР 2010/08474 ТУ 9435-296-07610776-2011. РУ № ФСР 2007/00268	1 шт.
		Открытое акционерное общество "Медико-инструментальный завод им. М.Горького". (Россия)	ТУ 9435-286-07613444-2010. РУ № ФСР 2010/08119	
		"СУРДЖИВЕЛЛ". (Пакистан)	РУ № ФСЗ 2008/02889	
		"Цзянсу СУЮН Медикал Материалс Ко., Лтд". (Китай)	РУ № ФСЗ 2010/06996	
		"Саммар Интернешнл". (Пакистан)	РУ № ФСЗ 2012/12517	
		ОАО "Можайский медико-инструментальный завод". (Россия)	ТУ 9439-034-07613473-2005. РУ № ФСР 2009/06065	
19	Молоток неврологический	"Саммар Интернешнл". (Пакистан)	РУ № ФСЗ 2012/12517	1 шт.
		"СУРДЖИВЕЛЛ". (Пакистан)	РУ № ФСЗ 2008/02887	
		Открытое акционерное общество "Медико-инструментальный завод им. М.Горького". (Россия)	ТУ 9435-286-07613444-2010. РУ № ФСР 2010/08119	
20	Щипцы гортанные для извлечения инородных тел	"Саммар Интернешнл". (Пакистан)	РУ № ФСЗ 2012/12517	1 шт.
		"Сурджикон ЛТД" (Пакистан)	РУ № РЗН 2015/3121	
		"СУРДЖИВЕЛЛ". (Пакистан)	РУ № ФСЗ 2008/02889	
		ООО "Объединение Альфапластик". (Россия)	ТУ 9398-005-05769082-2003. РУ № ФСР 2012/13200	
21	Спринцовка резиновая	ООО "Альпина Пласт". (Россия)	ТУ 9398-013-17707123-2012. РУ № РЗН 2015/3008	1 шт.
		ООО "АМТ трейд". (Россия)	ТУ 9464-001-53757884-2002. РУ № ФСР 2009/04211	
22	Пипетка глазная стеклянная	ООО "Компания Соднышко". (Россия)	ТУ 9398-001-98300952-2007. РУ № ФСР 2008/02370	2 шт.
		ООО "Московское ПО "Металпластизделие". (Россия)	ТУ 9464-002-03964906-2002. РУ № ФСР 2007/00027	
		ООО "МЕДТЕХНИКА". (Россия)	ТУ 9441-015-27418804-2007. РУ № ФСР 2008/01763	
23	Измеритель артериального давления (тонометр) с фонендоскопом	ООО "Тривес". (Россия)	ТУ 9441-002-33094849-2005. РУ № ФСР 2010/08666	1 шт.
		ООО МФ "МИКСТ-И". (Россия)	ТУ 9441-003-17728059-99. РУ № ФСР 2007/01550	
		ООО "АДЬЮТОР". (Россия)	ТУ 9441-003-58286981-2014. РУ № РЗН 2015/3206	
		ОАО "ТЕРМОПРИБОР". (Россия)	ГОСТ 302-79. РУ № ФСР 2007/01546	
24	Медицинский термометр ртутный	"Амрус Энтерпрайзис Лтд.". (США)	РУ № ФСЗ 2007/00232	1 шт.
		"Джоушан Тонгсин Инструменте Ко., Лтд.". (Китай)	РУ № ФСЗ 2012/11805	
		ООО НПФ "МИРАЛ". (Россия)	ТУ 9444-009-26528997-10. РУ № ФСР 2010/07434	
25	Устройство УДР для ИВЛ «рот-в-рот»	ООО "Полимерные изделия". (Россия)	ТУ 9439-035-05519988-97. РУ № ФСР 2008/02602	1 шт.
		ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛЮ». (Россия)	ТУ 9398-016-42965160-2004. РУ № ФСР 2008/03530	
		ООО "Предприятие "ФЭСТ". (Россия)	ТУ 9393-009-0973749-2002. РУ № ФСР 2007/00679	
		ЗАО НПКФ "МЕТОМ". (Россия)	ТУ 3-2257-90. РУ № ФСР 2007/01323	
		ООО "Объединение Альфапластик". (Россия)	ТУ 9398-010-05769082-2004. РУ № ФСР 2007/00073	
26				1 шт.

№	Наименование комплектующей	Производитель	Обозначение документации	Количество
	Зонд желудочный питательный с воронкой	"Апексмед Интернешнл Б.В.", (Нидерланды). "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)	РУ № ФСЗ 2008/02867	
		ООО "Полимерные изделия", (Россия)	ТУ 9398-164-05519988-2004, РУ № ФСЗ 2009/05817	
		"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.", (Китай)	РУ № ФСЗ 2008/03466	
		"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)	РУ № ФСЗ 2011/10986	
		"КонваТек Инк.", (США)	РУ № ФСЗ 2008/02333	
		ООО "Ассомедика", (Республика Беларусь)	ТУ BY 190682947.002-2008, РУ № ФСЗ 2010/06636	
27	Перчатки смотровые нестерильные	"Тан Син Лиан Индастриз Сдн. Бхд.", (Малайзия)	РУ № ФСЗ 2010/06671	5 пар.
		"ТОП ГЛАВ СДН. БХД.", (Малайзия)	РУ № ФСЗ 2009/05162	
		"Макстер Глов Маньюфакчуринг СДН БХД (229862-Х)", (Малайзия)	РУ № ФСЗ 2011/10210	
		Top Glove Sdn.Bhd, Top Глав Сдн Бхд. (Малайзия)	РУ № ФСЗ 2009/05130	
28	Держатель инфузионных флаконов на 200 мл с краништейном	ООО "МЕДПЛАНТ", (Россия)	ТУ 9452-010-52777873-2013, РУ № РЗН 2014/1603	1 шт.
29	Держатель инфузионных флаконов на 400 мл с краништейном			1 шт.
30	Футляр для ампул		EN ISO 9001:2015 № CQS 2235/2018	1 шт.
31	Сантиметровая лента	ООО «ЛегПромКомплект», (Россия)	Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия	1 шт.
		«Gamma Ltd», (Тайвань)		
32	Фонарик	«Kirchner&Wilhelm GmbH + Co KG», (Германия)	РУ № РЗН 2016/4777	1 шт.
		«Worldwide Business Network Limited», (Великобритания)	Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия	
		"Литл Доктор Интернешнл Пте. Лтд." (Сингапур)	РУ № ФСЗ 2012/13398	
33	Манжеты для тонометра детская (от 6 до 10 лет)	ООО "МЕДТЕХНИКА", (Россия)	ТУ 9441-015-27418804-2007, РУ № ФСЗ 2008/01763	0...1 шт.
		ООО "Тривес", (Россия)	ТУ 9441-002-33094849-2005, РУ № ФСЗ 2010/08666	
		ООО МФ "МИКСТ-И", (Россия)	ТУ 9441-003-17728059-99, РУ № ФСЗ 2007/01550	
		ООО "АДЬЮТОР", (Россия)	ТУ 9441-003-58286981-2014, РУ № РЗН 2015/3206	
34	Манжеты для тонометра подростковая	ООО "МЕДТЕХНИКА", (Россия)	ТУ 9441-015-27418804-2007, РУ № ФСЗ 2008/01763	0...1 шт.
		ООО "Тривес", (Россия)	ТУ 9441-002-33094849-2005, РУ № ФСЗ 2010/08666	
		ООО МФ "МИКСТ-И", (Россия)	ТУ 9441-003-17728059-99, РУ № ФСЗ 2007/01550	
		ООО "АДЬЮТОР", (Россия)	ТУ 9441-003-58286981-2014, РУ № РЗН 2015/3206	
35	Диагностический набор (ото/рино/офтальмоскоп)	"КИРХЕР & ВИЛХЕЛМ ГмбХ + Ко. КГ", (Германия)	РУ № РЗН 2015/3215	0...1 шт.
		"Рудольф Ристер ГмбХ" (Германия)	РУ № ФСЗ 2012/12790	
36	Пикфлоуметр	"Клемент Кларк Интернешнл Лтд.", (Великобритания)	РУ № ФСЗ 2009/04653	0...1 шт.
37	Глюкометр портативный	"Аспензия Диабитис Кеа Холдингс АГ" (Швейцария).	РУ № ФСЗ 2007/00570	0...1 шт.
		"Рош Диабетс Кеа ГмбХ", (Германия)	РУ № ФСЗ 2007/00817	
		Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ЭЛТА", (Россия)	ТУ 9443-003-29149289-2001, РУ № ФСЗ 2011/12518	

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью -9-

Цифрами

(деветь)

прописью

) листов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Должность

ФИО

Подпись

ХАРДИНА С.М.

