

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Завод Медсинтез»



А.Б. Подкорытов

2010 __ г.

М.п.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Контейнер полимерный для растворов инфузионных
для внутривенного введения однократного применения
по ТУ 9464-002-52317999-2010**

Использование инфузионных растворов в полимерных контейнерах. (перед использованием контейнера вскрыть вторичный пакет по месту разрыва)




1. Полимерный контейнер с инфузионным раствором.
2. Отверстие для подвешивания.
3. Порт для введения дополнительных лекарственных средств.
4. Порт с внутренней мембраной для присоединения устройства для вливания инфузионных растворов.
5. Первая заглушка порта (4).
6. Вторая заглушка порта (4).
7. Пробка порта инъекционного.

- I. Обработать спиртом заглушки (5,6) порта (4).
- II. Удерживая контейнер (1) за трубку порта (4),
- III. Вращательным движением руки отломить первую заглушку (5) порта (4).



IV. Подвесить контейнер на штатив за отверстие (2) и производить инфузию, согласно инструкции на устройство для вливания инфузионных растворов.

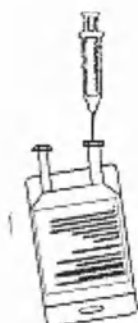

Примечание:

В полимерный контейнер могут дополнительно вводиться совместимые медикаменты через инъекционный узел (3). Для этого следует продезинфицировать поверхность пробки (7), затем ввести лекарство с помощью шприца и тщательно перемешать с раствором, путем переворачивания контейнера.

Принудительно,
присудствовало
2 (два) листа

