


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоСистемы»
Семёнов А.В.

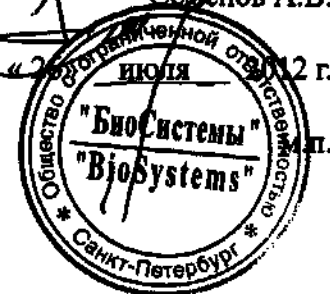

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Игл Vacutest для взятия крови (Vacutest Multidrawing Needles) с принадлежностями,
производства Vacutest KIMA s.r.l. (Вакутест КИМА с.р.л.)**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Иглы Vacutest для взятия крови предназначены для взятия венозной крови пациента в вакуумные пробирки. Универсальные иглы Vacutest для взятия крови совместимы с держателями ведущих производителей: Greiner Bio-One, Becton Dickinson, Improvacuter.

II. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ассортимент:

Варианты исполнения:

1. Иглы (Multidrawing Needles)
2. Иглы для взятия крови интегрированные в держатель (Pre-oriented needle with Holder)

Принадлежности:

1. Держатель для игл (Needle Holder).
2. Держатель с защитным устройством (Safety Holder).
3. Луэр Адаптер (Luer Adapter).

Иглы Vacutest для взятия крови имеют трёхгранную заточку, покрыты специальным силиконовым покрытием, что снижает травматичность и болезненность венепункции инъекции практически безболезненными.

III. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не выявлены.

IV. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Возьмите иглу одной рукой цветной колпачок, другой – прозрачный колпачок. Вращательным движением снимите прозрачный колпачок



2. Вкрутите иглу в держатель, как показано на рисунке.



3. Снимите защитный цветной колпачок с иглы.



4. Введите иглу, придерживая рукой держатель, в вену срезом вверх. Желательно соблюдать угол введения 15° .



5. Фиксируя одной рукой держатель, вставьте пробирку крышкой вперед в держатель до упора.



6. После проведения венопункции, извлеките пробирку из держателя. Если необходимо забрать кровь на несколько исследований, вставьте в держатель следующую пробирку.



7. После взятия проб не вынимайте иглу из держателя и не надевайте на нее защитный колпачок. Поместите использованную иглу с держателем в контейнер для использованных острых предметов.



Примечание:

После использования иглы, интегрированной в держатель с защитным чехлом, или держателя с защитным чехлом, он просто защелкивается и выбрасывается в специальный контейнер.

При проведении забора крови через катетер (используется в условиях стационара), процедура проходит следующим образом:

1. Снимите защитный колпачок с клапанной части луэр-адаптера Vacutest .
2. Вкрутите луэр-адаптер Vacutest перпендикулярно в держатель.
3. Удерживая держатель в одной руке, другой рукой наденьте иглу-бабочку или катетер на луэр-адаптер.
4. Снимите защитный колпачок с иглы-бабочки или катетера.
5. Фиксируя одной рукой держатель, вставьте пробирку крышечкой вперед в держатель до упора.
6. После проведения венопункции, извлеките пробирку из держателя. Если необходимо забрать кровь на несколько исследований, вставьте в держатель следующую пробирку.
7. После взятия крови в последнюю пробирку, осторожно извлеките иглу или катетер из вены, одновременно прижимая к месту венопункции сухой стерильный ватный тампон до прекращения кровотечения. Поместите использованную иглу с держателем в контейнер для использованных острых предметов.

VI. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Срок годности игл Vacutest для взятия крови указан на индивидуальной упаковке и коробке и составляет 5 лет с момента стерилизации игл.

Рекомендуется хранить иглы Vacutest для взятия крови в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Иглы Vacutest предназначены для одноразового применения.

Генеральный директор
ООО «БиоСистемы»
« 26 » июля 2012 г.



В настоящем документе прошито и
пронумеровано _____ листов
Генеральный директор
О.С. Семенов
Семенов А.В.

