

КОД ОКП 93 9170



ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Материал стоматологический пломбировочный Estelite, в наборах и отдельных упаковках, с принадлежностями

производства Tokuyama Dental Corporation, Япония

Соответствует требованиям международных стандартов:

Сертифицировано в соответствии с требованиями директивы 93/42 ЕЕС, соответствует директиве 96/56/ЕС и технической документации производителя.

Соответствует требованиям национальных стандартов:

ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 51830-2001, ГОСТ Р ИСО 7405-2001

Материал стоматологический пломбировочный Estelite, в наборах и отдельных упаковках, с принадлежностями

I. Материал стоматологический пломбировочный Estelite, в наборах:

1. Набор ESTELITE ASTERIA SYRINGE ESSENTIAL Kit - 7 шприцев с материалом, оттенки: A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, NE, OcE.
2. Набор ESTELITE COLOR KIT - 13 шприцев с материалом, оттенки: Clear, White, Blue, Yellow, Gray, Ochre, Dark Brown, Red, Lavender, Pink Opaque, High Chroma Opaque, Medium Chroma Opaque, Low Chroma Opaque, наконечники - 15 шт., колпачки - 15 шт., одноразовые дозировочные планшеты - 5 шт., светозащитный экран - 1 шт.

II. Материал стоматологический пломбировочный Estelite, в отдельных упаковках:

1. ESTELITE ASTERIA SYRINGE A1B.
2. ESTELITE ASTERIA SYRINGE A2B.
3. ESTELITE ASTERIA SYRINGE A3B
4. ESTELITE ASTERIA SYRINGE A3.5B
5. ESTELITE ASTERIA SYRINGE A4B
6. ESTELITE ASTERIA SYRINGE B3B
7. ESTELITE ASTERIA SYRINGE BL
8. ESTELITE ASTERIA SYRINGE NE
9. ESTELITE ASTERIA SYRINGE WE
10. ESTELITE ASTERIA SYRINGE YE
11. ESTELITE ASTERIA SYRINGE TE
12. ESTELITE ASTERIA SYRINGE OcE
13. ESTELITE COLOR Clear: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 2 шт., колпачки - 2 шт.
14. ESTELITE COLOR White: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 2 шт., колпачки - 2 шт.
15. ESTELITE COLOR Blue: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 2 шт., колпачки - 2 шт.
16. ESTELITE COLOR Yellow: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 2 шт., колпачки - 2 шт.
17. ESTELITE COLOR Gray: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 2 шт., колпачки - 2 шт.
18. ESTELITE COLOR Ochre: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 2 шт., колпачки - 2 шт.
19. ESTELITE COLOR Dark Brown: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 2 шт., колпачки - 2 шт.
20. ESTELITE COLOR Red: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 2 шт., колпачки - 2 шт.
21. ESTELITE COLOR Lavender: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 2 шт., колпачки - 2 шт.
22. ESTELITE COLOR Pink Opaque: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 2 шт., колпачки - 2 шт.
23. ESTELITE COLOR High Chroma Opaque: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 2 шт., колпачки - 2 шт.
24. ESTELITE COLOR Medium Chroma Opaque: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 2 шт., колпачки - 2 шт.
25. ESTELITE COLOR Low Chroma Opaque: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 2 шт., колпачки - 2 шт.
26. ESTELITE FLOW QUICK High Flow SYRINGE A1: шприц с материалом - 1 шт., наконечники - 15 шт.

27. ESTELITE FLOW QUICK High Flow SYRINGE A2: шприц с материалом – 1 шт.,
наконечники – 15 шт.
28. ESTELITE FLOW QUICK High Flow SYRINGE A3: шприц с материалом – 1 шт.,
наконечники – 15 шт.
29. ESTELITE FLOW QUICK High Flow SYRINGE OPA2: шприц с материалом – 1 шт.,
наконечники – 15 шт.
30. ESTELITE FLOW QUICK High Flow SYRINGE A2 Mini: шприц с материалом – 1
шт., наконечники – 5 шт.
31. ESTELITE FLOW QUICK High Flow SYRINGE A3 Mini: шприц с материалом – 1
шт., наконечники – 5 шт.

III. Принадлежности: для таможни расписала количество.

1. Набор для составления индивидуальных оттенков (ESTELITE ASTERIA CUSTOM SHADE GUIDE), в составе: шкала для составления индивидуальных оттенков с наклейкой – 1 шт., форма – 1 шт., лопатки -15шт.
2. Кисточки (Brush No.24) – 5шт.
3. Наконечники для шприцов (Palfique Estelite Syringe tip) – 50 шт.

Назначение.

ESTELITE ASTERIA - светоотверждаемый, рентгенконтрастный композитный материал, предназначенный для использования при реставрации передних и боковых зубов. Подходит для полостей всех классов, включая реставрации, требующие минимального препарирования полости или без ее препарирования. ESTELITE FLOW QUICK High Flow - светоотверждаемый, рентгеноконтрастный жидкий композитный материал, который применяется в качестве адаптивного слоя перед внесением ESTELITE ASTERIA в отпрепарированную и адгезивноподготовленную полость. ESTELITE COLOR — текучий, светоотверждаемый материал для придания индивидуальных цветовых характеристик при прямых и непрямых реставрациях. ESTELITE COLOR наносится под или между слоями композитного материала.

Показания.

ESTELITE ASTERIA:

- Прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионные поверхности
- Выполнение прямых композитных виниров
- Закрытие трем и диастем
- Починка керамических/композитных реставраций

ESTELITE FLOW QUICK High Flow:

- Выполнение адаптивного слоя в композитной реставрации
- Герметизация фиссур
- Тонельная техника реставрации полостей
- Адгезивное шинирование зубов
- Оттенок OPA2 может быть использован для маскировки дисколоритов зубов и придания дополнительной опакости реставрации

ESTELITE COLOR:

- Характеризация индивидуальных цветовых особенностей при прямой и непрямой реставрации композиционными материалами.
- Маскирование дисколоритов зубов.

Состав:

ESTELITE ASTERIA*

*Примечание: в различных шприцах ESTELITE ASTERIA материал идентичен по составу; отличается только цветом и концентрацией красителей и имеет разные оттенки

Компоненты	Действие
Кремний-циркониевый наполнитель	Наполнитель, обеспечивает прочность материала
Бисфенол А ди-(2-гидрокси пропокси) диметакрилат (Bis-GMA)	Мономер с высокой вязкостью, повышает качество соединения полимерной матрицы и наполнителя
Бисфенол А полиэтокси метакрилат (Bis-MPEPP)	Мономер, увеличивает плотность полимерной сети, улучшая механические характеристики материала
1,6-бис-(метакрил-этилоксикарбониламино)-триметил гексан (UDMA)	Длинноцепочечный мономер, обеспечивает прочность на изгиб и цветостабильность композита
Триэтиленгликоль диметакрилат (TEGDMA)	Мономер, снижающий вязкость смеси мономеров, облегчает образование полимерной сети, повышает резистентность композита к износу
Мекинол	Инициатор полимеризации
Дибутил гидроксил толуол	Стабилизатор
2-(2Н-бензотриазол-2-ил)-р-crezol	УФ-абсорбер
Красный пигмент 166	Краситель
Желтый пигмент 95	Краситель
Голубой пигмент 60	Краситель
Диоксид титана	Краситель

ESTELITE FLOW QUICK High Flow *

*Примечание: в различных шприцах ESTELITE FLOW QUICK High Flow материал идентичен по составу; отличается только цветом и концентрацией красителей и имеет разные оттенки

Компоненты	Действие
Кремний-циркониевый наполнитель	Наполнитель, обеспечивает прочность материала
Бисфенол А полиэтокси метакрилат (Bis-MPEPP)	Мономер, увеличивает плотность полимерной сети, улучшая механические характеристики материала
Бисфенол А ди-(2-гидрокси пропокси) диметакрилат (Bis-GMA)	Мономер с высокой вязкостью, повышает качество соединения полимерной матрицы и наполнителя
Триэтиленгликоль диметакрилат (TEGDMA)	Мономер, снижающий вязкость смеси мономеров, облегчает образование полимерной сети, повышает резистентность композита к износу
Камфорохинон	Инициатор полимеризации
Красный пигмент 166	Краситель
Диоксид титана	Краситель

ESTELITE COLOR*

*Примечание: в различных шприцах ESTELITE материал идентичен по составу; отличается только цветом и концентрацией красителей и имеет разные оттенки

Компоненты	Действие
Кремний-циркониевый наполнитель	Наполнитель, обеспечивает прочность материала
Бисфенол А полиэтоксид метакрилат (Bis-MPEPP)	Мономер, увеличивает плотность полимерной сети, улучшая механические характеристики материала
1,6-бис-(метакрил-этилоксикарбониламино)-триметил гексан (UDMA)	Длинноцепочечный мономер, обеспечивает прочность на изгиб и цветостабильность композита
Триэтиленгликоль диметакрилат (TEGDMA)	Мономер, снижающий вязкость смеси мономеров, облегчает образование полимерной сети, повышает резистентность композита к износу
Красный пигмент 166	Краситель
Желтый пигмент 95	Краситель
Голубой пигмент 60	Краситель
Диоксид титана	Краситель

Клиническая процедура применения:

ОТТЕНКИ ESTELITE ASTERIA

ESTELITE ASTERIA содержит 7 оттенков Body и 5 оттенков Эмали. Система оттенков ESTELITE ASTERIA разработана для воспроизведения широкой гаммы оттенков естественного зубного ряда благодаря нанесению соответствующих оттенков, выбранных из 2 категорий: Body и Эмаль.

Элемент	Оттенок	Советы
Body	A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B3B, BL	оттенки Body предназначены для восстановления дентинного слоя. Дентинные оттенки <u>должны покрывать весь край эмали</u> , за исключением режущего края.
Эмаль	Natural Enamel (NE) (Натуральная эмаль)	NE рекомендуется в основном для восстановления прозрачности режущего края зуба.
	White Enamel (WE) (Белая эмаль)	WE рекомендуется для восстановления проксимальной стенки. WE рекомендуется в качестве заменителя NE для более белых зубов.
	Yellow Enamel (YE) (Желтая эмаль)	YE предназначена для воспроизведения потемневшей эмали.
	Trans Enamel (TE) (Транспарентная эмаль)	TE - самый прозрачный оттенок шкалы ESTELITE ASTERIA. Этот оттенок рекомендуется в качестве заменителя NE для очень прозрачной эмали.
	Occlusal Enamel (OcE) (Окклюзионная эмаль)	OcE рекомендуется для окклюзионной поверхности. OcE имеет исключительные свойства моделирования для придания формы окклюзионным бугоркам и фиссурам.

ШКАЛА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ

Перед применением материала вы можете создать шкалу индивидуальных оттенков ESTELITE ASTERIA:

1. Выберите нужную форму. Предлагается два типа формы зуба. Формы слева широкие и неглубокие. Они подходят для выбора эмалевых оттенков. Формы справа узкие и глубокие. Они подходят для выбора оттенков Body.
2. Откройте крышку формы.
3. Прежде, чем вставить лопатку в нужное углубление, с помощью подходящего инструмента заполните корневую часть формы композитом ESTELITE ASTERIA, чтобы закрепить лопатку в композите.
4. Вставьте лопатку плоской стороной вверх так, чтобы она находилась на одном уровне с поверхностью формы.
5. Заполните оставшееся пространство формы зуба композитом ESTELITE ASTERIA.
6. Удалите излишки композита и подровняйте поверхность.
7. Закройте крышку и плотно прижмите ее.
8. Облучите композит в течении 10 сек. (оттенок A4B:20сек.) через крышку.
9. Откройте крышку и достаньте лопатку из формы. При необходимости, подровняйте боковые стороны композита.
10. Поместите лопатку (с персонализированным оттенком) в держатель.

ОТТЕНКИ ESTELITE FLOW QUICK High Flow

ESTELITE FLOW QUICK High Flow доступен в 4 оттенках:

A1, A2, A3 универсальной шкалы VITA и opak OPA2

ОТТЕНКИ ESTELITE COLOR

ESTELITE COLOR содержит 9 цветовых оттенков и 4 опакера.

Оттенки: Голубой (Blue), Серый (Gray), Бледно-лиловый (Lavender), Бледно-жёлтый (Ochre), Темно-коричневый (Dark Brown), Белый (White), Жёлтый (Yellow), Красный (Red), Прозрачный (Clear)

Опаkers: Розовый opak (Pink Opaque), Слабый хром opak (Low Chroma Opaque), Средний хром opak (Medium Chroma Opaque), Сильный хром opak (High Chroma Opaque)

Слабый хром opak (LCO): для шкалы оттенков A1, B1, C1 и отбеленных зубов

Средний хром opak (MCO): для шкалы оттенков A2, B2, D2 и C2

Сильный хром opak (HCO): для шкалы оттенков A3, B3, D3, C3 и темнее

РАБОТА С МАТЕРИАЛОМ

1. Очистка

Тщательно очистить поверхность зуба резиновой чашечкой с пастой без содержания фтора, а затем промыть водой.

2. Выбор оттенка

Выберите подходящий оттенок ESTELITE ASTERIA при помощи заранее подготовленной шкалы индивидуальных оттенков.

- Оттенок необходимо выбрать в течение 5 минут; сухие зубы светлее, чем увлажнённые.
- Насыщенность белого (интенсивность окраски) является наиважнейшим фактором в выборе оттенка.
- При работе с отбеленными зубами подбор оттенка следует проводить через несколько недель после процедуры отбеливания. Отбеленные зубы могут слегка потемнеть со временем.
- Обратитесь к таблице с описанием оттенков и советами (ОТТЕНКИ).

3. Изоляция

Коффердам является наилучшим методом для изоляции зуба.

4. Препарирование полости

Отпрепарируйте полость и тщательно промойте водой. Выполните скосы по краю эмали при препарировании передних зубов (класс III, IV, V), и сглаживание краев эмали при препарировании боковых зубов (класс I и II), это обеспечит отсутствие видимой границы между краем полости и реставрацией, улучшая эстетический аспект и ретенцию.

- С точки зрения эстетики и ретенции предпочтительно формирование волнистых фестончатых скосов.
- В случае отсутствия необходимости препарирования кариозной полости (некариозные дефекты пришеечной области, тремы, диастемы), очистите поверхность зуба резиновой чашечкой с пастой без содержания фтора. Тщательно промойте водой. Создайте микрошероховатость на эмали полировочным диском.
- При починке керамических/композиционных реставраций, придайте поверхности шероховатость с помощью алмазного бора для улучшения сцепления; с целью очистки протравите поверхность зуба фосфорной кислотой; тщательно промойте водой; тщательно просушите поверхность зуба и нанесите силан в соответствии с инструкцией изготовителя.

5. Защита пульпы

В случае если полость располагается в непосредственной близости к пульпе, следует защитить её прокладкой из стеклоиономера или выполнить временную диагностическую реставрацию с лечебной прокладкой на основе гидроокиси кальция. Для защиты пульпы НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЭВГЕНОЛА, так как они нарушают полимеризацию адгезива, ESTELITE FLOW QUICK High Flow и ESTELITE ASTERIA.

6. Адгезивная система

Нанесите светоотверждаемую адгезивную систему в соответствии с инструкцией изготовителя.

7. Дозирование ESTELITE FLOW QUICK High Flow

На шприц ESTELITE FLOW QUICK High Flow с подходящим оттенком, в зависимости от цвета зуба и глубины полости, закрепите одноразовый наконечник. Первую небольшую порцию материала необходимо вытереть о салфетку, т.к. она подвергалась ингибированию кислородом воздуха при хранении.

8. Адаптивный слой

Нанесите ESTELITE FLOW QUICK High Flow слоем 0,5-1мм на стенки и дно полости и равномерно распределите, не заходя на зону эмалевого скоса. Полимеризуйте ESTELITE FLOW QUICK High Flow 10 секунд.

9. Дозирование ESTELITE ASTERIA

Снимите колпачок шприца. Поворачивая рукоятку по часовой стрелке, выдавите пасту на планшет для замешивания. После этого поверните рукоятку против часовой стрелки на пол-оборота или на один оборот для высвобождения остаточного давления в шприце, а затем немедленно наденьте колпачок на шприц.

- НЕ прилагайте излишнее усилие к шприцу, если он был недавно вынут из холодильника.

10. Пломбирование и характеристика оттенка

Вносите ESTELITE ASTERIA в полость послойно. Слой материала не должен превышать указанную глубину (сверьтесь с нижеприведённой таблицей).

При необходимости характеристики оттенков следует использовать красители ESTELITE COLOR. Нанесите краситель ESTELITE COLOR в соответствии с п.п. 12-15 данной инструкции. ESTELITE COLOR следует наносить под или между слоями композиционной реставрации ESTELITE ASTERIA.

НЕ ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ ESTELITE ASTERIA с другими видами композиционных материалов во избежание неполной полимеризации или образования пузырьков воздуха.

Также во избежание образования пузырьков воздуха НЕ смешивайте различные оттенки ESTELITE ASTERIA между собой.

11. Полимеризация ESTELITE ASTERIA

Полимеризуйте каждый слой как минимум в течение рекомендованного времени (сверьтесь с нижеприведённой таблицей), держите фотополимеризатор на расстоянии 2 мм от материала.

ESTELITE ASTERIA предназначен для полимеризации галогенной, светодиодной (LED) или плазменной лампой длиной волны в диапазоне 400-500 нм. Прежде, чем приступить к пломбированию, уточните и экстраорально фотополимеризатором проверьте время, необходимое для полной полимеризации ESTELITE ASTERIA. В нижеследующей таблице показана взаимосвязь между временем отверждения и толщиной слоя материала.

Взаимосвязь времени отверждения с толщиной слоя материала:

Тип лампы	Мощность лампы (мВт/см ²)	Время отверждения (секунды)	Толщина слоя (мм) ¹⁾	
			A1B, A2B, A3B, A3.5B, B3B, BL NE, WE, YE, TE, OCE	A4B
Галоген	400	10	1,7	— ²⁾
		20	2,1	1,8
	600	10	2,0	1,7
		20	2,4	2,0
	800	10	2,1	1,8
		20	2,5	2,1
LED	400	10	1,7	— ²⁾
		20	2,0	1,7
	600	10	1,8	1,6
		20	2,2	1,9
	1000	10	2,0	1,8
		20	2,5	2,1
Плазма	950	6	1,9	1,8

1) Толщина слоя материала была установлена на основе результатов тестов, произведенных в соответствии с пунктом 7.10 «Глубина полимеризации» стандарта ISO4049: 2009

2) Время полимеризации должно быть не менее 20 секунд.

12. Дозирование ESTELITE COLOR. Выдавить небольшое количество ESTELITE COLOR на дозировочный планшет. При необходимости смешайте ESTELITE COLOR с другими оттенками ESTELITE COLOR. После выдавливания материала протрите кончик шприца марлей и немедленно наденьте колпачок.

Инструкция для выбора оттенков

- Край резца: Голубой (для молодёжи), Серый (для взрослых), Бледно-лиловый (для пожилых)
- Увеличение насыщения: Охра (область канавок), Темно-коричневый (углубления и фиссуры; затемнённая линия фиссуры)
- Пятна декальцинации: Белый
- Подбор цвета: Жёлтый, Охра, Красный (смешанные в различных пропорциях)
- Подбор насыщенности: Прозрачный (смешанный с другим оттенком)
- Нейтрализация серого оттенка: Розовый opak (смешанный с LCO, MCO или HCO)

Оттенки могут быть смешаны в различных пропорциях для достижения требуемого цвета, насыщенности и хрома. Опакры могут быть смешаны в различных пропорциях для достижения требуемой насыщенности и хрома.

В ожидании нанесения дозированного материала следует защищать его от попадания света посредством защитного экрана.

НЕ СЛЕДУЕТ перемешивать ESTELITE COLOR с препаратами других марок во избежание неполной полимеризации.

13. Нанесение и полимеризация ESTELITE COLOR

Аккуратно нанесите ESTELITE COLOR при помощи инструмента с тонким наконечником или тоненькой кисточкой. Максимальная толщина слоя - 0,5 мм (Темно-коричневый - 0,05 мм).

Используйте фотополимеризационные лампы с диапазоном длины волны от 400 до 500 нм (пик: 470 нм, интенсивность ≥ 500 мВт/см²). Фотополимеризуйте в течение минимум 30 секунд, убедившись в том, что кончик фотополимеризационной лампы находится на расстоянии, не превышающем 2 мм от поверхности зуба.

14. Композиционный материал оттенка эмали

Композиционный материал ESTELITE ASTERIA оттенка эмали наносится на окрашенную поверхность. Затем эмаль фотополимеризуется, обрабатывается и полируется. ESTELITE COLOR следует наносить под или между слоями композиционной реставрации ESTELITE ASTERIA.

15. Маскирование изменения цвета эмали зубов с помощью ESTELITE COLOR

Инструкция для выбора оттенков

- Маскирование затемнённых областей: LCO, MCO, HCO

В ожидании нанесения дозированного материала следует защищать его от попадания света посредством защитного экрана.

НЕ СЛЕДУЕТ перемешивать ESTELITE COLOR с препаратами других марок во избежание неполной полимеризации.

Не используйте самоотверждаемые адгезивные системы. Мы рекомендуем использовать светоотверждаемые адгезивные системы с ESTELITE COLOR, так как другие виды адгезивных систем, такие как самоотверждаемые или системы двойного отверждения, не гарантируют достаточную адгезию при их использовании со светоотверждаемыми композиционными материалами. Если вы предпочитаете использовать самоотверждаемые адгезивные системы или системы двойного отверждения, убедитесь в том, что эти адгезивные системы совместимы с используемыми вами светоотверждаемыми композиционными материалами.

При помощи тонкой кисточки или другого подходящего инструмента равномерно нанесите соответствующий опакер ESTELITE COLOR на область зуба с изменённым цветом эмали с целью насыщения оттенка. Максимальная толщина каждого слоя - 0,5 мм. НЕ СЛЕДУЕТ наносить ESTELITE COLOR непосредственно на зуб без предварительного нанесения бонда.

Инструкции для выбора толщины слоя опакера

Для достижения эффективного маскирования области зуба с изменением цвета эмали рекомендуемая средняя толщина слоя опакера - 0,35 мм.

Используйте фотополимеризационные лампы с диапазоном длины волны от 400 до 500 нм (пик: 470 нм, интенсивность ≥ 500 мВт/см²). Фотополимеризуйте в течение минимум 30 секунд, убедившись в том, что кончик световода фотополимеризационной лампы находится на расстоянии, не превышающем 2 мм от поверхности зуба.

Композит ESTELITE ASTERIA наносится на материал. Затем композит фотополимеризуется, обрабатывается и полируется в соответствии с п.п.9,14 данной инструкции.

16. Финишная обработка

Обработайте и отполируйте реставрацию. Для финишной обработки используйте финишные диски и/или алмазные боры мелкой зернистости. Используйте металлические или пластиковые шлифовальные полосы для обработки проксимальных поверхностей. Для полирования используйте резиновые головки или любые другие подходящие полировочные инструменты. Для завершающего полирования используйте войлочные или хлопковые диски с полировочной пастой или другие подходящие полировочные инструменты.

ХРАНЕНИЕ

- 1) Хранить при температуре 0 – 25°C (32 – 77°F).
- 2) ИЗБЕГАТЬ прямого воздействия света и высоких температур.
- 3) НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ после истечения срока годности, указанного на шприце и (или) упаковке.

Транспортировка

Материал стоматологический транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования по условиям хранения.

Использовать в течении срока годности, указанного на упаковке.

Производитель не несет ответственности за ущерб и повреждения, вызванные неправильным использованием данного продукта. Решение о применимости продукта в каждом конкретном случае несет стоматолог.

Генеральный директор
ЗАО «Протеко»



Алиев А.А.

Срок не явился,
продлеван и
судебно
исследован

