


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SURU INTERNATIONAL PVT. LTD.

The better life

Тройник для инфузионной системы SURUWAY предназначен для многоходового соединения различных инфузионных магистралей. Совместим со всеми инфузионными системами.

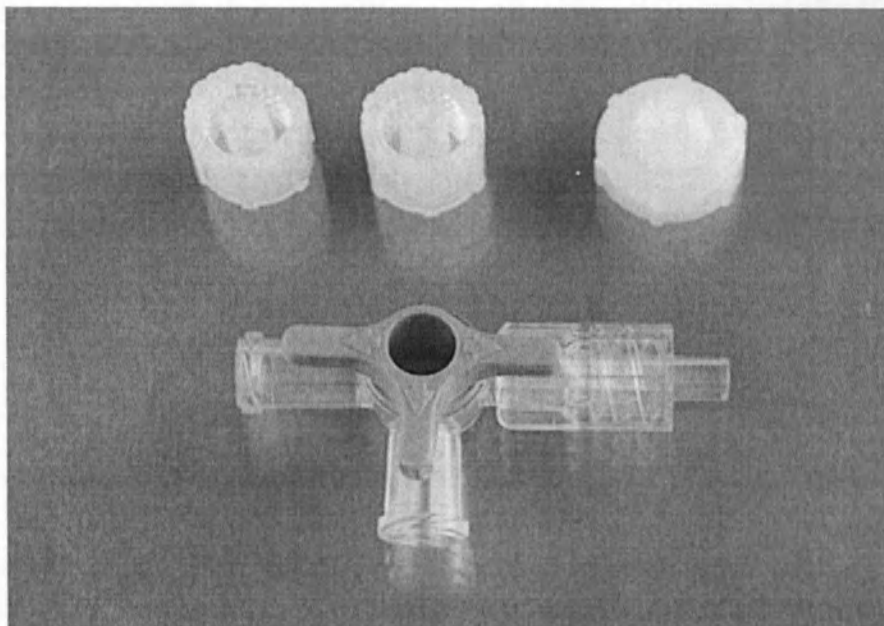

Технические характеристики:

Используемые материалы:

изготовлен из полипропилена, полиэтилена ВД

Цветовая кодировка крана:

Синий – венозная линия

Красный – артериальная линия

Желтый – линия легочной артерии

Белый – многоцелевая линия

Количество рабочих позиций регулятора: 5

Резистентность к давлению в системе: Не ниже 4 бар (2944 ммHg)

Химическая резистентность: Не ниже Class II

<u>Цветовая маркировка</u>	<u>Катал. Номер</u>	<u>Кол-во в кор. Внутренняя / Внешняя</u>
Синий	70 019	50/500
Белый	70 017	50/500
Красного	70 018	50/500

Отличительные характеристики:

- Т-образный прозрачный корпус
- соединение с краном по типу «Луер» и «Луер-Лок»
- Luer Cap- Защитный колпачок с резьбой, для блокировки краника, когда он не используется.
- Injection Stopper - заглушка с инъекционной мембраной. Для периодических внутривенных инъекций без снятия колпачка.
- надежность соединения обеспечивается винтовой муфтой, перемещаемой по оси
- подвижность в осевом и радиальном направлениях на 360 градусов для безопасной и быстрой стыковки
- прозрачный корпус крана
- цветная поворотная лопасть со стрелками, указывающими направление потока
- удлинительная линия 15 см для удобства соединения инфузионных магистралей
- стерилен, предназначен для однократного применения
- срок годности — **5 лет**

Срок гарантии: Не менее 12 месяцев с даты поставки

Область применения:

в операционных, палатах реанимации, интенсивной терапии, а так же практически везде, где осуществляется инфузионно-трансфузионная терапия. Например, для обеспечения парентерального питания, при котором возникает необходимость в одновременном и равномерном введении большого количества разнородных по свойствам ингредиентов (углеводы, белки, жиры и т.д.), что создает определенные технические затруднения. Прямое смешивание растворов во флаконах недопустимо, ибо при их разгерметизации нарушается стерильность препаратов. Поэтому смешивание производится непосредственно в инфузионной системе путем использования **специальных тройников**, смонтированных выше инъекционной иглы (катетера). Можно также объединить две (или более) одноразовые системы. При наличии перфузионных насосов-дозаторов их устанавливают ниже места объединения систем.

Следует подчеркнуть, что такой метод инфузии предпочтительнее раздельного, поочередного введения препаратов, поскольку позволяет уменьшить отрицательные последствия такой же поочередной перестройки метаболизма на каждый из вводимых ингредиентов. Это касается практически всех многокомпонентных смесей и больших по объему инфузий. В таких случаях рекомендуется смешивать все не взаимодействующие (совместимые) препараты для инфузионной терапии, особенно при проведении парентерального питания. Вливаемые смеси следует приготавливать с большой тщательностью, это могут делать только специально подготовленные фармацевты.

КОМПАНИЯ SURU INTERNATIONAL PVT. LTD. НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

*Продукт нельзя подвергать повторной обработке. Перед применением
следует визуально осмотреть и тщательно проверить продукт и упаковку.
Неправильная транспортировка и манипулирование могут привести к
структурным и/или функциональным повреждениям прибора или упаковки.

*Гарантируется, что продукт является стерильным, апиногенным и
нетоксичным, если упаковка не была вскрыта или повреждена.

*Не чистить или стерилизовать повторно. Утилизировать после
использования.

*Хранить в прохладном и сухом месте.

*Не подвергать воздействию тепла или прямых солнечных лучей.

*Применять продукт сразу после вскрытия упаковки.

REF - каталожный номер

LOT – код партии

Использовать до/ Дата истечения срока годности

Не использовать повторно

Дата производства

Производитель

STERILE EO – Стерилизовано с применением окиси этилена

Стерилизация - этиленоксид

Минимальное время: 1 час

Температура: 54 градуса по Цельсию

Не стерилизовать повторно

Не использовать в случае повреждения упаковки.

EC REP – Уполномоченный представитель в Европейском сообществе

SURU INTERNATIONAL PVT. LTD.

Plot 5, Poonamia Comp.

Saravali, Jawhar Rd.,

Dahanu 401602, Dist.

Thane, MAH, India

