

ИЗДАТЕЛЬСТВО: ООО "ФАКТОР-МЕД", 117574, Россия,
г. Москва, пр-д Огородников, д. 2а, тел.: (495) 661 70 82
e-mail: info@factor-med.ru, www.factor-med.ru

ИХА-ГОВ-ФАКТОР

Набор реактивов для лабораторного исследования
качественного выявления крови в моче

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:


1. Открыть пакет и достать тест.
2. Перед началом использования образцы
и реактивы должны быть выдержаны при комнатной
температуре (+18-25°C).
3. Поместить планшет на горизонтальную ровную
чистую сухую поверхность тестовой зоны вверх.
4. Внести реактив в каплевый образчик в пипетку.
5. Считать результат реакции в течение 5 минут,
но не позднее 10 минут.

хранить при температуре +2-30°C


Только для in vitro диагностики

Регистрационный номер ФСР 2009/00182

на основании сертификата соответствия
ТУ 6100-040-5100-2009
Только для in vitro диагностики

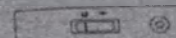

Одна линия - отрицательный результат

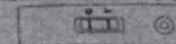

Две линии - положительный результат

Серия 4010

Срок до октября 2010г

