

Исполнитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", Москва, Россия
Тест для иммунохимического радиоанализа
выявления ДЕЗИПРАМИНА (соединения метаболитов) в моче

ИХА-ДЕЗИПРАМИН-ФАКТОР

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ


1. Вскрыть пакет и достать полоску
2. Перед началом определения образец и полоску должны быть выдержаны при комнатной температуре (+18-25 °C) не менее 10 мин
3. Опустить в порцию мочи полоску, стрелками вниз до обозначенной линии на 20-30 секунд
4. Считать результат реакции визуально через 5 минут

Упаковка для хранения: 10 шт.

Хранить в сухом прохладном месте при температуре +2-30°C

Серия: 6107
Годен до: июль 2013г
Дата изготовления: июль 2011г

Только для in vitro диагностики
ТУ 0396-001-01062356-2011

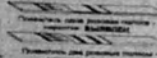

Положить для реакции полоску стрелками вниз

Положить для реакции полоску стрелками вверх

Исполнитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", Москва, Россия
Тест для иммунохимического радиоанализа
выявления ДЕЗИПРАМИНА (соединения метаболитов) в моче

ИХА-ДЕЗИПРАМИН-ФАКТОР

ТУ 0396-001-01062356-2011


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Вскрыть пакет и достать полоску
2. Перед началом определения образец и полоску должны быть выдержаны при комнатной температуре (+18-25 °C) не менее 10 мин
3. Погрузить в емкость с образцом мочи и выдержать в течение 2 минут
4. Считать результат реакции визуально через 5 минут


Упаковка для хранения: 10 шт.

Хранить в сухом прохладном месте при температуре +2-30°C

Серия: 6107
Годен до: июль 2013г
Дата изготовления: июль 2011г

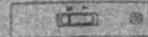

Направление реакции

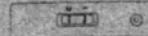

Направление реакции

ДЕЗИПРАМИН

