

И\* Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", 117574, Россия,  
г. Москва, пр-д Одоевского, д. 2а, тел.: (495) 661 70 82  
e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru

### ИХА-МИОГЛОБИН-ФАКТОР

Набор реагентов для иммунохроматографического качественного определения  
миоглобина в цельной крови, сыворотке или плазме крови


#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Вскрыть пакет и достать тест.
2. Перед началом использования образцы и планшет должны быть выдержаны при комнатной температуре (18-25°C).
3. Поместить планшет на горизонтальную ровную чистую сухую поверхность тестовой зоной вверх.
4. Внести каплей 1-4 капли образца в круглое окошко.
5. Оценить результат реакции в течении 10 минут, но не позднее 20 минут.

Хранить при температуре 2-30°C.

Только для *in vitro* диагностики

Рег.уд. № ФСР 2006/05135  
Не подлежит обязательной сертификации.  
ТУ 9.306-024-51062366-2010

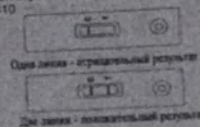

Серия: 3310  
Срок годности: октябрь 2013г.

