



Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", Россия, г. Москва,
пр-д Одоевского, д. 2а, тел.: (495) 9567585
Полоска иммунохроматографическая
для выявления метадона в моче

ИХА-МЕТАДОН-ФАКТОР

Только для ин-витро диагностики


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Покрыть плакат и достать полоску;
2. Перед началом определения образцы мочи и полоска должны быть выдержаны при комнатной температуре (18-25°C) не менее 5 мин.
3. Опустить в образец мочи полоску стрелками вниз до обозначенной линии на 20-30 секунд.
4. Оценить результат реакции визуально через 5 минут.

Рег. ул. ФС 0124337/0969-06
от 25.12.2006 г.
ТУ 9399-319-51662354-02



наркоотики **ВЫЯВЛЕН**

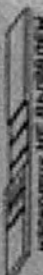


наркоотики **НЕ ВЫЯВЛЕН**

Хранить в сухом месте
при температуре 2-30°C.

Серия №

Годен до:

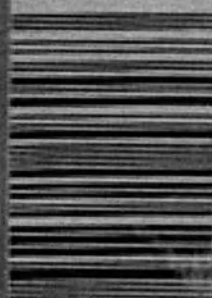

4 607024 580073



Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", Россия, г. Москва

ТЕСТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРКОТИКА МЕТАДОНА В моче человека

ИХА-МЕТАДОН-ФАКТОР