

КОПИЯ
ВЕРНА

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. директора НИИ скорой помощи

им. Н.В.Склифосовского

проф. М.М.Абакумов

«21» декабря 2007г.



Генеральный директор

ООО «Пента Мед»



Стеркина

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ПЕНТА-91»

Славин Г.С.

«24» декабря 2007г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Жидкая аэрозольная повязка «Пентазол»,
соответствующая требованиям технических условий

ТУ 93 93-167-40245042-2006

Жидкая аэрозольная повязка «ПЕНТАЗОЛЬ» для защиты ран кожи распыляется на пораженные или заживляющие участки кожи с расстояния 15 – 25 см (перед употреблением баллончик встряхивают) короткими импульсами в течение 1 – 2 сек, захватывая приблизительно 1 – 2 см окружающей здоровой кожи. При необходимости, в зависимости от характера раневого процесса производят повторное нанесение пленки.

Покрытие легко удаляется марлевым тампоном. Самостоятельно отходит от поверхности раны через 1 – 2 суток.

Состав и форма выпуска. 1 аэрозольный баллончик вместимостью 50, 100 или 350 мл для наружного применения в виде раствора в хлороформе биоэнергетного силаксанового полимера с 1 % - ным спиртовым раствором бриллиантового зеленого или без него (по согласованию с заказчиком).

Фармакологическое действие. Дерматопротектор, способствующий процессу регенерации и эпителизации кожи, обеспечивая адекватный газообмен и сохраняя влажную среду.

Показания. Раны кожи различной этиологии, в том числе порезы, ссадины, асептические операционные раны, трещины, ожоги, донорские участки кожи, трофические язвы, дерматиты.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов.

Способ применения. Перед применением встряхните

Меры безопасности. Баллон находится под давлением.

Предохранять от прямых солнечных лучей и нагревания свыше 40 °С. Не разбирать и не прокалывать. Не использовать вблизи открытого огня. Не направлять в глаза и не давать детям.

Условия хранения. В местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей при температуре не выше плюс 40°С.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Производитель. ООО «Пента-91», Россия, г. Москва.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 24/а листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Пента Мед»

Л. Ф. Стернина

