

И Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", 117574, Россия,
г. Москва, пр-д Одоевского, д. 2а, тел.: (495) 641 70 82
e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru

ИХА- КК-МВ -ФАКТОР

Набор реагентов для иммунохроматографического качественного определения антител
МВ-клетками креатинкиназы (КК-МВ) в цельной крови, сыворотке или плазме крови

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Открыть пакет и достать тест.
2. Перед использованием образцы и планшет должны быть выдержаны при комнатной температуре ($+5-25^{\circ}\text{C}$).
3. Поместить планшет на горизонтальную ровную чистую сухую поверхность тестовой зоны вверх.
4. Внести поочередно 1-4 капли образца в круглые окошки.
5. Оценить результат реакции в течение 10 минут, но не позднее 20 минут.

Хранить при температуре $2-30^{\circ}\text{C}$


Только для *in vitro* диагностики

Регула № ФСР 2009/03134

На подлежит обязательной сертификации
ТУ 8398-034-91062356-2009

Серия 3440

Год изготовления 2013г.

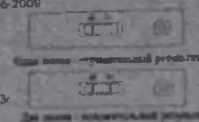

Для использования в лаборатории