

Этикетка на МИ «Аппликатор биомагнитный медицинский - «КРЕЙТ» по ТУ 9398-010-96814693-2014.

Параметры аппликатора:

- максимальная индукция магнитного поля (30-10) мТл.;
- габаритные размеры: $(50 \pm 3) \times (50 \pm 3) \times (2,0 \pm 0,5)$ мм.;
- масса: $15 \pm 2,0$ г



Предназначен для воздействия постоянным магнитным полем на организм человека с целью оказания общерегулирующего влияния на физиологические системы организма и оказания обезболивающего действия.

Показания к применению. Невриты, радикулиты, остеохондроз позвоночника, артрозы, полиартриты, атеросклероз, тромбозы, гематомы. Травматические повреждения костей и суставов.

Магнитный аппликатор необходимо разместить немаркированной стороной к телу. Изделия предназначены для индивидуального использования. Применять по назначению врача.

АППЛИКАТОР БИОМАГНИТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ - "Крейт"

Аппликатор биомагнитный медицинский - «Крейт»

ООО «Крейт», Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д 22, литер А
тел. 8 (800) 700-68-50. Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Место производства медицинского изделия: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27,
корп. 38А (лит. Щ). ТУ 9398-010-96814693-2014


Уход за изделием: Дезинфекция аппликатора производится 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора моющего средства.

Утилизация: Складываются в пакеты для сбора отходов класса А и утилизируются как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790

Хранение и транспортирование при температуре от -50 до +50 °С. Средний срок службы — 3 года. Гарантийный срок службы при соблюдении правил эксплуатации — 2 года со дня продажи.

Состав: магнитоноситель на основе смеси феррита бария и севиленна, покрыт защитной пленкой из поливинилхлорида (ПХВ). Дата изготовления: _____ 20 _____ г.



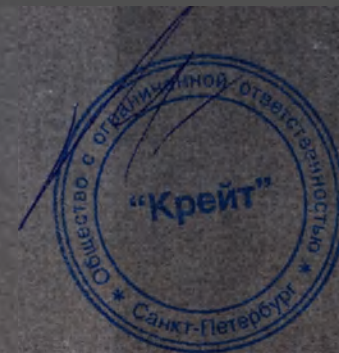

Аппликатор
биомагнитный
медицинский – «КРЕЙТ»

ООО «Крейт»
ТУ 9398-010-96814693-2014
РУ № от г.

Аппликатор биомагнитный медицинский - «КРЕЙТ» по ТУ 9398-010-96814693-2014