



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкий А.К.
15 января 2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ «АППЛИКАТОР БИОМАГНИТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ - «КРЕЙТ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. «Аппликатор биомагнитный медицинский – «Крейт», постоянного магнитного поля (далее по тексту – аппликатор) предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека постоянным магнитным полем в условиях физиотерапевтических кабинетов клиник, а также в домашних условиях по назначению врача.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Аппликатор представляет собой магнитоноситель на основе смеси феррита бария и севилен, намагниченный магнитными полосами, толщиной 2 мм., покрытый защитной пленкой из поливинилхлорида (ПХВ), толщиной 0,1-0,3 мм.

2.2. Параметры аппликатора:

- максимальная индукция магнитного поля (30-10) мТл.;
- габаритные размеры: $(50 \pm 3) \times (50 \pm 3) \times (2,0 \pm 0,5)$ мм.;
- масса: $15 \pm 2,0$ г.

2.3 Максимальное значение магнитной индукции на рабочей поверхности изделий, B_1 , должно быть (30-10) мТл. Шаг между линиями с максимальной индукцией должен быть 4 ± 1 мм

3. ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

3.1. Постоянное магнитное поле аппликатора оказывает рефлекторное действие как на весь организм, так и на его отдельные системы, а также локально на ткани, улучшая кровоснабжение, оказывая противовоспалительное, болеутоляющее, спазмолитическое и нейротропное действие. Применение аппликатора способствует эпителизации раневых поверхностей, повышает фагоцитарную активность крови, способствует

ранней и более активной васкуляризации костных отломков и формирующегося регенератора, ускоряет ретракцию кровяного сгустка.

4. ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР

4.1. Аппликатор накладывается на зону поражения при закрытых повреждениях (закрытые переломы, вывихи, ушибы, нейротрофические заболевания) рабочей (немаркированной) стороной таким образом, чтобы его края выступали за пределы очага поражения не менее, чем на 0,5 см.

4.2. Аппликатор крепится на поверхности тела с помощью трубчатого бинта соответствующего номера, марлевой повязки или лейкопластыря.

4.3. При открытом очаге поражения аппликатор накладывается поверх повязки.

4.4. Дезинфекция аппликатора производится 3 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа "Лотос" путем двукратной протирки поверхности аппликатора салфеткой из бязи или марли, смоченной в указанном растворе.

4.5. Необходимая длительность магнитотерапии определяется лечащим врачом по объективным клиническим данным и может составлять от 10-15 минут до нескольких часов в сутки в зависимости от вида и тяжести заболевания.

4.6. Лечение больных с помощью аппликатора в амбулаторных условиях, ношение аппликатора по назначению лечащего врача может быть периодическим (например, в нерабочее время).

4.7. Аппликаторы могут применяться в комплекте с поясами, повязками, бандажами и корсетами.

5. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АППЛИКАТОРА

5.1. Заболевания периферической нервной системы (невриты, радикулиты).

5.2. Заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз позвоночника, артрозы, обменные полиартриты, бурситы).

5.3. Заболевания вен (атеросклероз, подострые тромбозы).

5.4. Раневые процессы мягких тканей.

5.5. Травматические повреждения костей и суставов.

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АППЛИКАТОРА

6.1. Беременность.

6.2. Алкогольная интоксикация.

6.3. Системные заболевания крови.

6.4. Острый инфаркт, инсульт.

6.5. Во время применения методов электролечения.

6.6. Индивидуальная непереносимость.

7. Транспортирование и хранение

Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями группы 5 ГОСТ 15150-69.

Изделия при хранении и эксплуатации не должны подвергаться дополнительному магнитному воздействию. Изделие хранится при условиях хранения 5 по ГОСТ 15150-69

8. Утилизация

Использованные изделия складировуются в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-10

9. Гарантии изготовителя

Средний срок службы изделий не менее 3 лет.

Гарантийный срок службы – 2 года со дня продажи.

ООО «Крейт»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

195220, г. Санкт-Петербург, проспект Гражданский, д. 22, литер А

тел. (812) 925-1415

Электронная почта: kreite@mail.ru

Инструкцию разработал:
Врач невролог

Рожнова Е.А.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____ лист(ов)

Руководитель организации

