

Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", Москва, Россия
Тест для микрохроматографического
выявления ФЕНТАНИЛА (или его метаболитов) в моче

ИХА-ФЕНТАНИЛ-ФАКТОР

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Взорвать пакет и достать планшет
2. Перед началом определения образцы и планшет должны быть выдержаны при комнатной температуре (18-25°C) не менее 10 мин.
3. Опустить в порцию мочи полоску стрелками вниз до обозначенной линии на 20-30 секунд
4. Оценить результат реакции визуально через 5 минут, но не позднее 10 мин.

Только для *in vitro* диагностики
ТУ 9308.06.5-6106.2356-2011



Полоску для реакции помещать стрелками вниз

Серия № 6307
Годен до: июль 2013г
Дата изготовления: июль 2011г

Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", Москва, Россия
Тест для микрохроматографического
выявления ФЕНТАНИЛА (или его метаболитов) в моче


ИХА-ФЕНТАНИЛ-ФАКТОР

ТУ 9308.06.5-6106.2356-2011


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Взорвать пакет и достать планшет
2. Перед началом определения образцы и планшет должны быть выдержаны при комнатной температуре (18-25°C) не менее 10 мин.
3. Набрать в пипетку исследуемый образец мочи и внести в кружок окислы 2-3 капли.
4. Оценить результат реакции визуально через 5 минут.

Хранить в сухом прохладном месте при температуре +5-30°C
Только для *in vitro* диагностики

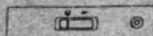

Наркотик: выявлен

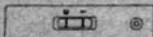

Наркотик: не выявлен

Серия № 6307
Годен до: июль 2013г
Дата изготовления: июль 2011г

ИХА-ФЕНТАНИЛ-ФАКТОР

