

И* Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", 117574, Россия,
г. Москва, ул. д. Одесского, д. 2а, тел.: (495) 641 70 82
e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru

ИХА-РЭА-ФАКТОР

Набор реагентов для иммунохроматографического качественного
определения реактоиммунных антигенов (РЭА) в цельной крови

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Открыть пакет и достать тест-полоску.
2. Перед началом использования образцы и планшет должны быть выдержаны при комнатной температуре ($+18-25^{\circ}\text{C}$).
3. Поместить планшет на горизонтальную ровную чистую сухую поверхность тестовой зоной вверх.
4. Внести пипеткой 1-4 капли образца в лунку.
5. Подождать развития реакции в течение 10 минут, но не более 20 минут.

Хранить при температуре $-2-5^{\circ}\text{C}$.

Только для in vitro диагностики

Рег. № ФСР 200906123
по заявке № 200906123
ТУ 6300.036-61082.350-2009

Срок 24 мес.
срок годности 2013

