



Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", Россия, г. Москва

**ТЕСТ для выявления
НАРКОТИКА МАРИХУАНЫ
в моче человека**

ИХА-МАРИХУАНА-ФАКТОР



Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД" 117574, Россия,
г. Москва, пр-д Одоевского, д. 2а, тел.: (495) 955-51-25, 661-79-82
e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru

Полоска для иммунохроматографического
выявления марихуаны в моче

ИХА-МАРИХУАНА-ФАКТОР

Только для ин-витро диагностики

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Вскрыть пакет и достать полоску.
2. Перед началом определения образцы мочи и полоска должны быть выдержаны при комнатной температуре (18-25°C) не менее 5 мин.
3. Опустить в образец мочи полоску стрелками вниз до обозначенной линии на 20-30 секунд.
4. Оценить результат реакции визуально через 5 минут.

Рег. уд. № ФСР 2009/04622
ТУ 9398-304-51062356-02
Не подлежит обязательной
сертификации.



4 607024 580035



наркотик **ВЫЯВЛЕН**



наркотик **НЕ ВЫЯВЛЕН**

Серия №

Годен до:

Хранить в сухом месте
при температуре 2-30°C.



Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", Россия, г. Москва

ТЕСТ для выявления НАРКОТИКА МАРИХУАНЫ в моче человека

ИХА-МАРИХУАНА-ФАКТОР



Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД" 117574, Россия,
г. Москва, пр-д Одоевского, д. 2а, тел.: (495) 955-51-25, 661-79-82
e-mail: info@faktor.ru, www.faktor.ru

Полоска для иммунохроматографического
выявления марихуаны в моче


ИХА-МАРИХУАНА-ФАКТОР

Только для им. vitro диагностики

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Вскрыть пакет и достать полоску.
2. Перед началом определения образцы мочи и полоска должны быть выдержаны при комнатной температуре (18-25°C) не менее 5 мин.
3. Опустить в образец мочи полоску стрелками вниз до обозначенной линии на 20-30 секунд.
4. Оценить результат реакции визуально через 5 минут.

Рег. уд. № ФСР 2009/04622
ТУ 9398-304-51062356-02
Не подлежит обязательной
сертификации.

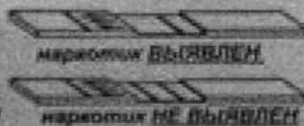

Серия №

Хранить в сухом месте
при температуре 2-30°C.

Годен до: