



Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", Россия, г. Москва

ТЕСТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРКОТИКА МОРФИНА в моче человека

ИХА-МОРФИН-ФАКТОР



Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД" 117174, Россия,
г. Москва, пр-д Оловянского, д. 2а, тел.: (495) 935-51-25, 461-70-82
e-mail: info@factor.ru, www.factor.ru

Полоска для иммунохроматографического
выявления морфина в моче

ИХА-МОРФИН-ФАКТОР

Только для им. экспер. диагностики

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Вернуть пакет и достать полоску.
2. Перед началом определения образцы мочи и полоска должны быть выдержаны при комнатной температуре (18-25°C) не менее 5 мин.
3. Опустить в образец мочи полоску стрелками вниз до обозначенной линии на 20-30 секунд.
4. Оценить результат реакции визуально через 5 минут.

Рег. уд. № ФСР 2009/04621
ТУ 9398-307-51062356-02
Не подлежит обязательной
сертификации.



наркотик **ВЫЯВЛЕН**




наркотик **НЕ ВЫЯВЛЕН**


Серия №

Годен до:

Хранить в сухом месте
при температуре 2-30°C.

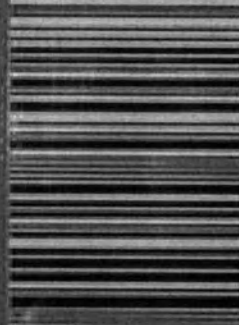

4 607024 580028

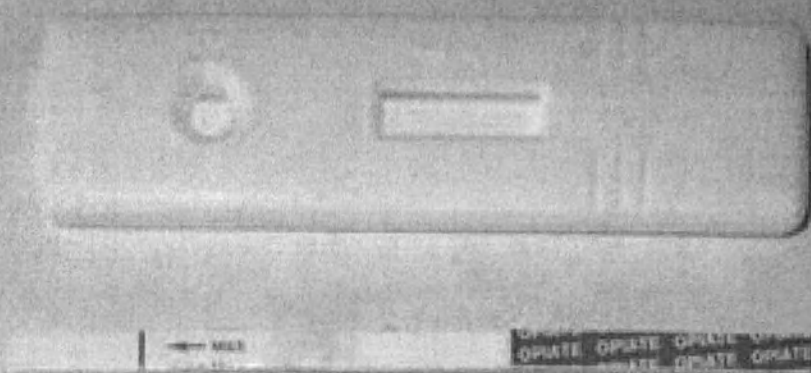



Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД", Россия, г. Москва

ТЕСТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРКОТИКА МОРФИНА

в моче человека

ИХА-МОРФИН-ФАКТОР



Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД" 117574, Россия,
г. Москва, пр-д Остоженского, д. 2а, тел.: (495) 955-51-25, 961-70-42
e-mail: info@factor.ru, www.factor.ru

Полоска для иммунохроматографического
выявления морфина в моче

ИХА-МОРФИН-ФАКТОР

Только для ин-витро диагностики

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. вскрыть пакет и достать полоску;
2. Перед началом определения образцы мочи и полоска должны быть выдержаны при комнатной температуре (18-25°C) не менее 5 мин.
3. Опустить в образец мочи полоску стрелками вниз до обозначенной линии на 20-30 секунд.
4. Оценить результат реакции визуально через 5 минут.

Рег. уд. № ФСР 2008/04621
ТУ 9398-307-51062356-02

Не подлежит обязательной
сертификации.



наркотик **ВЫЯВЛЕН**




наркотик **НЕ ВЫЯВЛЕН**

Серия №

Годен до:

Хранить в сухом месте
при температуре 2-30°C.

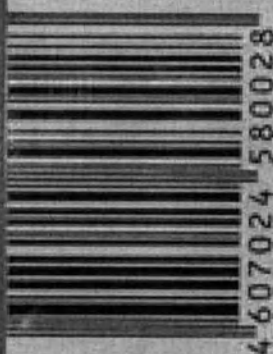

4 607024 580028

