

**Общество с ограниченной ответственностью
Многопрофильное предприятие
«ГРАНД»**

428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, оф.201
Тел: (8352) 58-18-35, факс: 58-05-18
E-mail: grandcheb@yandex.ru

ИНН 2130149083 КПП 213001001 ОКПО 24361398 ОГРН 1152130000692



**«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО МПП «ГРАНД»**

Андреев Э.Н.

М.П.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Халат медицинский мужской по ГОСТ 25194-82

Чебоксары 2017

Составлен: Обществом с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие «ГРАНД» (далее – ООО МПП «ГРАНД»), расположенным по адресу: 428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, оф.201.

Конструкция халата медицинского мужского по ГОСТ 25194-82 (далее – изделие): в соответствии с ГОСТ 25194-82 представляет собой халат типа А - с центральной бортовой застежкой, с отложным воротником, с одним внешним передним (размером 13*14 см, на уровне груди) и двумя боковыми (размером 19*22 см, на уровне бедра) карманами с обтачками на полочках. Спинка цельновыкроенная, с хлястиком на уровне талии. Рукава одношовные втачные, длинные, с манжетами, застегивающимися на пуговицы. Указанный тип изделия является основным при производстве, изменение указанного типа изделия и/или выпуск иного типа изделия при производстве – не предусмотрен.

Размерный ряд изделия по ГОСТ 25194-82, соответствует Российской системе измерения размеров и ростов и приведены в Руководстве по эксплуатации изделия (Приложение А).

Значения основных параметров изделия, измерения готовых изделий в зависимости от размеров соответствуют таблице 4 и черт. 3-4 ГОСТ 25194-82 и приведены в Руководстве по эксплуатации изделия (Приложение А).

Размерный ряд готовых изделий, в соответствии с показателями роста и обхвата груди, приведен в Руководстве по эксплуатации изделия (Приложение А):

Материал изготовления изделия подобран в соответствии с таблицей 5 ГОСТ 25194-82 и указан в Руководстве по эксплуатации изделия (Приложение А).

Назначение изделия: обеспечение безопасности лечебных/диагностических манипуляций, защиты от прямого контакта с болезнетворными организмами. Эффективное выполнение барьерной и гигиенической функций, защищая кожные покровы доктора, среднего и младшего медицинского персонала от попадания лекарственных препаратов и инфицированных биологических жидкостей.

Применение изделия не требует специального обучения персонала, кроме изучения руководства по эксплуатации (Приложение А).

Рекомендуемые климатические условия для комфортной эксплуатации изделия - температура не ниже 5 и не выше 35°C, относительная влажность воздуха 50-70%. Изделие не наносит вред жизни и здоровью человека и не наносит вред окружающей среде.

Показания к применению в соответствии с назначением изделия.

Противопоказания и возможные побочные действия изделия – отсутствуют.

Эксплуатация изделия в соответствии с показанием к применению и руководством по эксплуатации (Приложение А). Соответствие изделия эстетическим требованиям к внешнему виду изделия, обеспечению комфорта в процессе эксплуатации.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение изделия по ГОСТ 10581-91, дополнительные сведения приведены в Руководстве по эксплуатации изделия.

Маркировки готового изделия соответствует следующим параметрам:

- Этикетка на каждом изделии с полной информацией о нем и о производителе;
- Информация об изделии на русском языке, в том числе:
 - Информация об изготовителе;
 - Наименование изделия;

- Размер и рост;
- Состав сырья
- Информация о способах ухода;
- Страна-изготовитель.

Способы ухода за изделием по ГОСТ 25652-83. Указания по способам ухода оформлены символами по ГОСТ 16958-71. Символы по уходу за изделием указаны на ярлыке изделия (Приложение Б).

Рекомендации по хранению изделий:

Изделия рекомендуется хранить в крытых складских помещениях при температуре не ниже 5 и не выше 35°C, относительной влажности воздуха 50-70%, защищенных от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий, вдали от источников тепла, огня, токсичных и опасных для жизни и здоровья материалов. Изделия рекомендуется хранить в упаковке предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента реализации. Гарантия сохранения товарного внешнего вида изделия в процессе ухода в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с момента производства.

Утилизация изделий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы). Дополнительные сведения приведены в Руководстве по эксплуатации изделия.

Приложения:

Приложение А: Руководство по эксплуатации в 1 экз. на 6 л.;

Приложение Б: Эскиз вшиваемого ярлыка в 1 экз. на 1 л..




«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО МПП «ГРАНД»

Андреев Э.Н.

М.П.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Халата медицинского мужского по ГОСТ 25194-82

Конструкция халата медицинского мужского по ГОСТ 25194-82 (далее – изделие): в соответствии с ГОСТ 25194-82 представляет собой халат типа А - с центральной бортовой застежкой, с отложным воротником, с одним внешним передним (размером 13*14 см, на уровне груди) и двумя боковыми (размером 19*22 см, на уровне бедра) карманами с обтачками на полочках. Спинка цельновыкроенная, с хлястиком на уровне талии. Рукава одношовные втачные, длинные, с манжетами, застегивающимися на пуговицы. Указанный тип изделия является основным при производстве, изменение указанного типа изделия и/или выпуск иного типа изделия при производстве – не предусмотрен.

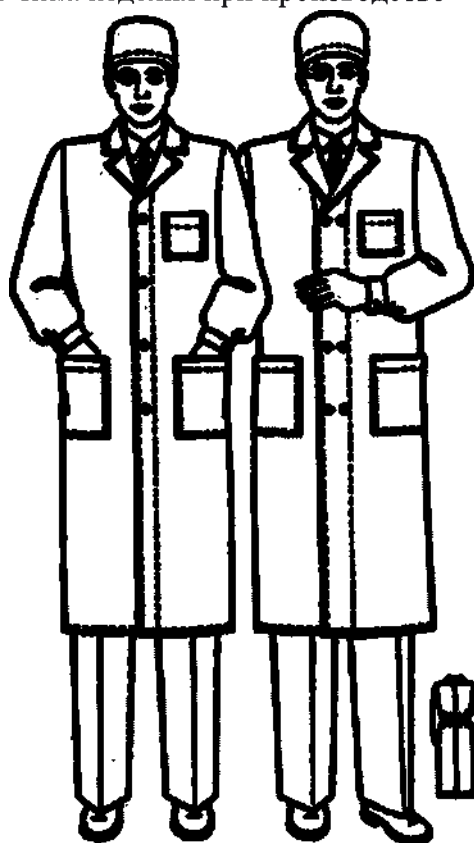

Тип А

Применение изделия не требует специального обучения персонала, кроме изучения руководства по эксплуатации. Эксплуатация изделия в соответствии с эксплуатационной документацией.

Рекомендуемые климатические условия для комфортной эксплуатации изделия - температура не ниже 5 и не выше 35°C, относительная влажность воздуха 50-70%.

Размеры готовых изделий по росту и обхвату груди типовой фигуры человека соответствуют указанным в табл. 2 и 3 ГОСТ 25194-82:

Размер	
Рост типовой фигуры человека	Интервал роста человека
158	155-160,9
164	161,0-166,9
170	167,0-172,9
176	173,0-178,9
182	179,0-184,9
188	185,0-191

Размер	
Обхват груди типовой фигуры человека	Интервал обхвата груди человека
88	86-89,9
92	90,0-93,9
96	94,0-97,9
100	98,0-101,9
104	102,0-105,9
108	106,0-109,9
112	110,0-113,9
116	114,0-117,9
120	118,0-123

Размерный ряд готовых изделий - по ГОСТ 25194-82, соответствует Российской системе измерения размеров и ростов. Измерения готовых изделий в зависимости от размеров соответствуют таблице 4 и черт. 3-4 ГОСТ 25194-82:

Номер изм. на черт.	Наименование измерения	Тип	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека									Допус- каемое откло- нение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	
				Обхват талии типовой фигуры человека									
				70	76	82	88	94	100	106	112	118	
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	А	158	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	±1,0
164			102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0		
170			105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0		
176			108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0		
182			-	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0		
2	Ширина спинки в самом узком месте	А	188	-	-	-	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	-	±0,5
			-	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	47,0	48,0	49,0	50,0	
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа	А	-	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	26,5	27,0	27,5	28,0	±1,0
			158	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	
			164	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5	
			170	105,5	106,0	106,5	107,0	107,5	108,0	108,5	109,0	109,5	
			176	108,5	109,0	109,5	110,0	110,5	111,0	111,5	112,0	112,5	


4	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	A	182 188 158 188	- - 22,7	112,0 - 23,3	112,5 - 23,9	113,0 116,0 24,5	113,5 116,5 25,1	114,0 117,0 25,9	114,5 117,5 26,5	115,0 118,0 27,1	115,5 - 27,7	±0,5
5	Ширина халата на уровне глубины проймы	A	158 188	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	67,0	69,0	71,0	73,0	±1,0
6	Ширина халата внизу	A	158 188	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	±1,0
7	Длина рукава от высшей точки оката до низа	A	158	60,4	60,6	60,8	61,0	61,2	61,8	62,0	62,2	62,4	±1,0
8	Ширина рукава под проймой	A	164	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,8	64,0	64,2	64,4	±0,5
			170	64,4	64,6	64,8	65,0	65,2	65,8	66,0	66,2	66,4	
			176	66,4	66,6	66,8	67,0	67,2	67,8	68,0	68,2	68,4	
			182	-	68,6	68,8	69,0	69,2	69,8	70,0	70,2	70,4	
			188	-	-	-	71,0	71,2	71,8	72,0	72,2	-	
			188	19,0	19,7	20,5	21,2	22,0	22,2	23,0	23,7	24,5	

Готовые изделия в соответствии с показателями роста и обхвата груди имеют следующий **размерный ряд:**

Размер	Рост
40-42	158-164 см
	170-176 см
	182-188 см
	196-200 см
44-46	158-164 см
	170-176 см
	182-188 см
	196-200 см
48-50	158-164 см
	170-176 см
	182-188 см
	196-200 см
52-54	158-164 см
	170-176 см
	182-188 см
	196-200 см
56-58	158-164 см
	170-176 см
	182-188 см
	196-200 см
60-62	158-164 см
	170-176 см
	182-188 см
	196-200 см
64-66	158-164 см
	170-176 см
	182-188 см
	196-200 см
68-70	158-164 см

	170-176 см 182-188 см 196-200 см
--	--

Представленный размерный ряд является основным при производстве изделий, изменение указанного размерного ряда при производстве – не предусмотрено.

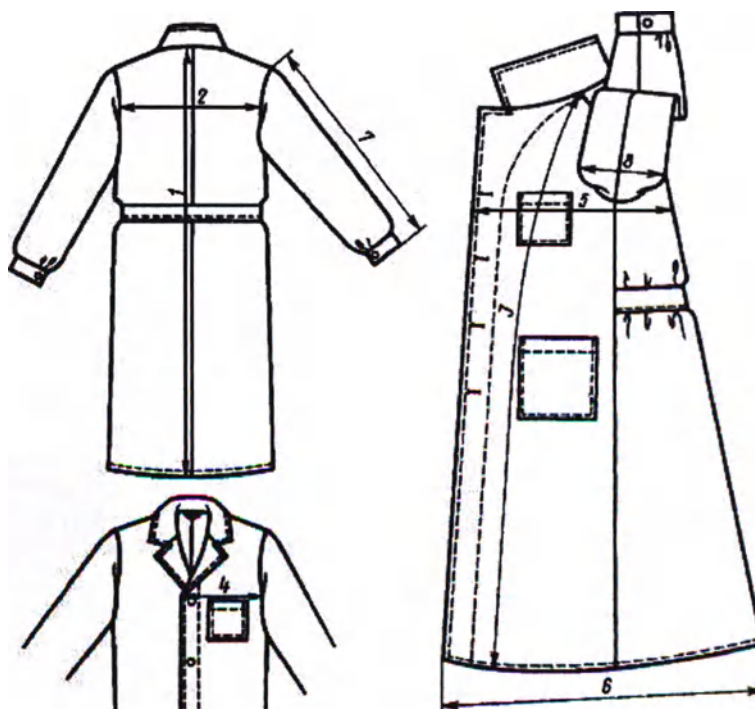

Тип А

Материал изготовления изделий:

При изготовлении изделий применяется **Ткань сорочечная отбеленная по ГОСТ 11518-88**, состав – 35% хлопок, 65% полиэстер;

Торговое наименование «ТиСи», производства Китай;

Поверхностная плотность – 120 гр/м²;

Изменение размеров тканей после мокрой обработки (%), по основе и утку – по ГОСТ 11518-88;

Показатели разрывной нагрузки, стойкости к истиранию (мм Н(кгс)) - по ГОСТ 11518-88;

Воздухопроницаемость, гигроскопичность, белизна, удельное поверхностное электрическое сопротивление - по ГОСТ 11518-88.

В связи с тем, что изделия изготавливаются из отбеленной ткани - красители в указанном материале не используются.

Использование при производстве изделий иных материалов – не предусмотрено.

С учетом используемой ткани, результаты токсикологического исследования, клинических испытаний и технической экспертизы получены по изделиям из ткани «ТиСи» (декларация о соответствии ТС № RU Д-СН.АУ14.В.04705 (Приложение В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ), сертификат соответствия № РОСС RU.ПЩ01.Н04253 (Приложение Г ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)).

Раскрой деталей изделий - по ГОСТ 21219-75.

Классификация стежков, строчек и швов, применяемых в изделии - по ГОСТ 12807-2003.

Соответствие стежков, швов и технологических строчек изделия требованиям ОСТ 17-835, ГОСТ 12807-2003.

Определение сортности готовых изделий - по ГОСТ 11259-79.

Правила приемки изделий - по ГОСТ 23948-80.

Объем и последовательность приемо-сдаточных и периодических испытаний – по ГОСТ 15.309-98.

Методы контроля качества готовых изделий - по ГОСТ 4103-82.

Масса готового изделия - 304 гр.

Комплектация готового изделия: халат медицинский мужской по ГОСТ 25194-82 – 1 единица, упаковка производителя – 1 единица.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение готовых изделий по ГОСТ 10581-91.

Упаковка изделия - индивидуальная потребительская тара - пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 12302-2013;

Транспортирование в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование рекомендуется при температуре не ниже 5 и не выше 35°C, относительной влажности воздуха 50-70%.

Транспортные средства или универсальные контейнеры должны быть защищены от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий, источников огня, токсичных и опасных для жизни и здоровья материалов. Изделия требуется транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя.

Масса изделия в упаковке – 319 гр.

Рекомендации по хранению изделий:

Изделия рекомендуется хранить в крытых складских помещениях при температуре не ниже 5 и не выше 35°C, относительной влажности воздуха 50-70%, защищенных от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий, вдали от источников тепла, огня, токсичных и опасных для жизни и здоровья материалов. Изделия рекомендуется хранить в упаковке предприятия-изготовителя.

Способы ухода за изделием по ГОСТ 25652-83. Указания по способам ухода оформлены символами по ГОСТ 16958-71. Символы по уходу за изделием указаны на ярлыке готового изделия (Приложение Б ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ).

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента реализации. Гарантия сохранения товарного внешнего вида изделия в процессе ухода в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с момента производства.

Утилизация изделий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы).

После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться,

транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Готовые изделия соответствуют следующим параметрам:

- Ровные, симметричные строчки;
- Отсутствие пропуска стежков;
- Равномерное натяжение верхней и нижней нити в стежках;
- Двойная закрепка концов строчек;
- Обрезанные концы нитей;
- Симметричное расположение пуговиц и петель;
- Обработка срезов - обметыванием под оверлок;
- Технологическое совмещение деталей в швах изделия;
- Влажно-тепловая обработка всех швов изделия;
- Отсутствие складок, заломов и сборок в швах, не предусмотренных конструкцией изделия;
- Симметричность швов и деталей изделия;
- Отсутствие следов технической разметки и следов после обработки утюгом на лицевой стороне изделия.

Эскиз вшиваемого ярлыка



Знаки ухода за изделием	Значение знаков ухода
	Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 30 °С. Механическое воздействие, полоскание и центрифугирование соответствуют умеренной программе машины
	Изделие может подвергаться сушке в барабанной сушилке (тумблере). Сушить при низкой температуре
	Изделие не должно подвергаться отбеливанию средствами, выделяющими хлор
	Изделие может подвергаться сухой чистке (химчистка)
	Изделие может подвергаться глажению при температуре нижней плиты утюга не более 150 °С

Всего прочитано и скреплено печатью

_____ листа (ов)

Директор

_____ Андреев Э.Н.

