

ОКП 94 5210

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Торговый дом
«Профессионал Сервис»



М. Я. Абрамова

2014 г.



КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ
KM800.01.000

ПАСПОРТ
KM800.01.000 ПС

2014 г.

Содержание

1 Основные технические данные	3
2 Комплектность	5
3 Гарантии изготовителя (поставщика)	6
4 Сведения об упаковке	7
5 Свидетельство о приёме	8
6 Порядок сборки и регулировки	10
7 Утилизация	11
8 Транспортирование и хранение	12

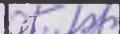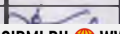				KM800.01.000 ПС			
Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ KM800.01.000			
аб.	Гончаров		08.12.19				
в.	Хоничев		08.12.2014г.	ПАСПОРТ			
онтр.	Хоничев		08.12.2014г.				
 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU				ООО «Торговый дом «Профессионал Сервис»			
Абрамова				Лит. А Лист 2 Листов 13			

1 Основные технические данные

1.1 Кровать медицинская исполнения KM800.01.000 (далее – кровать) предназначена для размещения больных и ухода за ними в лечебных медицинских учреждениях различного профиля.

Кровати предназначены для стационарных и хирургических отделений лечебных учреждений.

1.2 Кровать KM800.01.000 состоит из двух боковых спинок и каркаса с металлической сеткой. Соединение спинок и каркаса выполняется запрессовкой крючков каркаса в кронштейны-петли на спинках.

1.3 Кровать поставляется в разобранном виде. Детали и сборочные единицы изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку и разборку без дополнительной подгонки.

1.4 Основные параметры кровати приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение кровати
	KM800.01.000
Прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами	
Нагрузка грузом, даН	100
Цикл	1000
Габаритные размеры, мм	
Длина, l	2060
Ширина, B	812
Высота, H	840
Расстояние от пола до верхней опорки каркаса, мм	385
Масса, кг	25,7

1.5 Сведения о дезинфекции

1.5.1 Наружные поверхности кровати должны быть устойчивы к многократной дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющих средств по ТУ 9144-003-49337122-99 или другим дезинфицирующим раствором.

1.6 Средний срок службы - 10 лет.

Наименование	Единица измерения	Количество
Матрас	шт.	1
Кровать	шт.	1
Кровать-матрас	шт.	1
Кровать-матрас	шт.	1
Кровать-матрас	шт.	1
Кровать-матрас	шт.	1
Кровать-матрас	шт.	1
Кровать-матрас	шт.	1

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 При продаже изделий в разобранном виде необходимо в присутствии покупателя проверить комплектность, внешний вид деталей и фурнитуры.

3.2 Претензии по некомплектности, качеству изделий, а также об обнаруженных отклонениях, в результате которых сборка не представляется возможной, должны направляться потребителем в магазин, где приобретена мебель, при внерыночном распределении-изготовителю.

3.3 Общий гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи. В случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи, заверенной печатью торгующей организации и подписью продавца, гарантийный срок исчисляется с даты приемки изделия ОТК предприятия-изготовителя.

3.4 При внерыночном распределении гарантийный срок исчисляется со дня получения изделия потребителем.

3.5 Срок службы изделия - 10 лет.

3.6 Форма гарантийного талона приведена в обязательном приложении А.

4 Сведения об упаковке

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кровать медицинская	KM800.01.000	Nº
Наименование изделия	Обозначение	Заводской номер

Упакован ООО «Торговый дом «Профессионал Сервис»
Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Должность	Личная подпись	Расшифровка подписи
-----------	----------------	---------------------

Год, месяц, число

5 Свидетельство о приемке

5.1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать медицинская	KM800.01.000	Nº
Наименование изделия	Обозначение	Заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий ТУ 9452-001-66749900-2014, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП		
	Личная подпись	Расшифровка подписи

Год, месяц, число

Линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель предприятия

Обозначение документа,
по которому производится поставка

МП		
	Личная подпись	Расшифровка подписи

Год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

МП		
	Личная подпись	Расшифровка подписи

Год, месяц, число

5.2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ГАРАНТИИ

Кровать медицинская	КМ800.01.000	№
Наименование изделия	Обозначение	Заводской номер
согласно		
Вид ремонта	Наименование предприятия, условное обозначение	Вид документа

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий ТУ 9452-001-66749900-2014 и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____

Параметр, определяющий _____

_____ в течение срока службы _____

ресурс _____ лет _____

(года), в том числе срок хранения _____

условия хранения, лет (года) _____

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК _____

МП _____

Личная подпись _____


Расшифровка подписи _____

Год, месяц, число _____

6 Порядок сборки и регулировки

6.1 Порядок сборки кровати КМ800.01.000 показан на рисунке 1.

6.2 Соединение спинок поз.2, поз.3 и основания поз.1 выполняется запрессовкой крючков основания в кронштейны-петли на спинках.

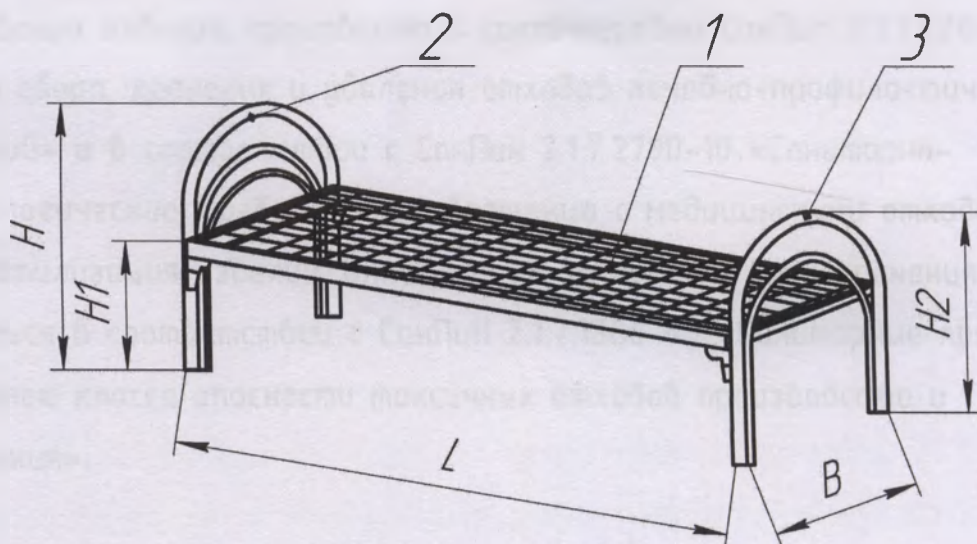

- 1. Основание
- 2. Спинка передняя
- 3. Спинка задняя

Рисунок 1
Кровать медицинская КМ800.01.000

7 Утилизация

7.1 Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

7.2 Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» и в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

7.3 Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование

8.1.1 Транспортирование кроватей производится всеми видами транспортных средств (воздушным транспортом в герметизированном отсеке) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.1.2 Условия транспортирования кроватей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

В пределах одного населённого пункта изделия допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. Условия транспортирования изделий на открытых транспортных средствах должны соответствовать условиям хранения 8 по ГОСТ 15150.

8.2 Хранение

8.2.1 Изделие должно храниться в закрытых помещениях при температуре от +5° до +40°С и относительной влажности воздуха до 80%.

Лист регистрации изменений

[illegible]

Ген. директор

Всего прошито, и скреплено
печатью 13 (Тринадцать)



М.Я. Абрамова

ОКП 94 5210

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Торговый дом
«Профессионал Сервис»



М. Я. Абрамова

2014г.

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ

КМ800.02.000

ПАСПОРТ

КМ800.02.000 ПС

2014 г.

Содержание

1 Основные технические данные	3
2 Комплектность	5
3 Гарантии изготовителя (поставщика)	6
4 Сведения об упаковке	7
5 Свидетельство о приёмке	8
6 Порядок сборки и регулировки	10
7 Утилизация	11
8 Транспортирование и хранение	12

[illegible]

1 Основные технические данные

1.1 Кровать медицинская исполнения KM800.02.000 (далее — кровать) предназначена для размещения больных и ухода за ними в лечебных медицинских учреждениях различного профиля.

Кровати предназначены для стационарных и хирургических отделений лечебных учреждений.

1.2 Кровати KM800.02.000 состоят из двух боковых спинок, основания с подголовником и металлической сеткой. Соединение спинок и основания выполняется запрессовкой крючков каркаса в кронштейны-петли на спинках. Подголовник установлен в основание и с помощью ручки поднимается на разную высоту с фиксацией в определенном положении.

1.3 Кровать поставляется в разобранном виде. Детали и сборочные единицы изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку и разборку без дополнительной подгонки.

1.4 Основные параметры кровати приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение кровати
	KM800.02.000
1 Прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами	
- Нагружение грузом, даН	100
- Цикл	1000
2 Габаритные размеры, мм	
- Длина, l	2040
- Ширина, B	800
- Высота, H	806
- Высота, H2	706
3 Расстояние от пола до верхней кромки каркаса, мм	385
4 Масса, кг	25,7

1.5 Сведения о дезинфекции

1.5.1 Наружные поверхности кровати должны быть устойчивы к многократной дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющих средств по ТУ 9144-003-49337122-99 или другим дезинфицирующим раствором.

1.6 Средний срок службы - 10 лет.

Наименование	Единица измерения	Количество
Кровать медицинская КМ800.02.000	шт.	1
Колесики	шт.	4
Спинка регулируемая	шт.	1
Подлокотник регулируемый	шт.	1
Душевой лоток	шт.	1
Ванна	шт.	1

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки кровати медицинской KM800.01.000 должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение документа	Количество, шт.
Кровать медицинская KM800.02.000:	KM800.02.000	1
Основание	KM800.02.100	1
Спинка передняя	KM800.02.200	1
Спинка задняя	KM800.02.300	1
Эксплуатационная документация		
Этикетка	KM800.02.000 ЭТ	1
Паспорт	KM800.02.000 ПС	1

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 При продаже изделий в разобранном виде необходимо в присутствии покупателя проверить комплектность, внешний вид деталей и фурнитуры.

3.2 Претензии по некомплектности, качеству изделий, а также об обнаруженных отклонениях, в результате которых сборка не представляется возможной, должны направляться потребителем в магазин, где приобретена мебель, при внерыночном распределении-изготовителю.

3.3 Общий гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи. В случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи, заверенной печатью торгующей организации и подписью продавца, гарантийный срок исчисляется с даты приемки изделия ОТК предприятия-изготовителя.

3.4 При внерыночном распределении гарантийный срок исчисляется со дня получения изделия потребителем.

3.5 Срок службы изделия — 10 лет.

3.6 Форма гарантийного талона приведена в обязательном приложении А.

4 Сведения об упаковке

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кровать медицинская	KM800.02.000	Nº
Наименование изделия	Обозначение	Заводской номер

Упакован ООО «Торговый дом «Профессионал Сервис»
Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической до-
кументации.

Должность	Личная подпись	Расшифровка подписи
-----------	----------------	---------------------

Год, месяц, число

5 Свидетельство о приемке

5.1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать медицинская	KM800.02.000	№
Наименование изделия	Обозначение	Заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий ТУ 9452-001-66749900-2014, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП		
	Личная подпись	Расшифровка подписи
	Год, месяц, число	

Линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель предприятия	
	Обозначение документа, по которому производится поставка
МП	
	Расшифровка подписи
	Год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

МП		
	Личная подпись	Расшифровка подписи
	Год, месяц, число	

5.2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ГАРАНТИИ

Кровать медицинская	KM800.02.000	№
Наименование изделия	Обозначение	Заводской номер
согласно		
Вид ремонта	Наименование предприятия, условное обозначение	Вид документа

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий ТУ 9452-001-66749900-2014 и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____

Параметр, определяющий _____

_____ в течение срока службы _____

ресурс _____ лет

(года), в том числе срок хранения _____

условия хранения, лет (года) _____

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП _____

Личная подпись _____

Расшифровка подписи _____

Год, месяц, число _____

6 Порядок сборки и регулировки

6.1 Порядок сборки кровати КМ800.02.000 показан на рисунке 1.

6.2 Соединение спинок поз.2 и основания с подголовником поз.1

выполняется запрессовкой крючков основания в кронштейны-петли на спинках.

6.3 Для установки подголовника в рабочее положение:

- поднять подголовник в верхнее положение;
- направить упор ручки подголовника в паз между трубами основания, приподняв его с помощью ручки поз. 5; отпустить подголовник.

6.4 Для регулировки угла подъема подголовника необходимо направить упор ручки подголовника в другой паз между трубами основания.

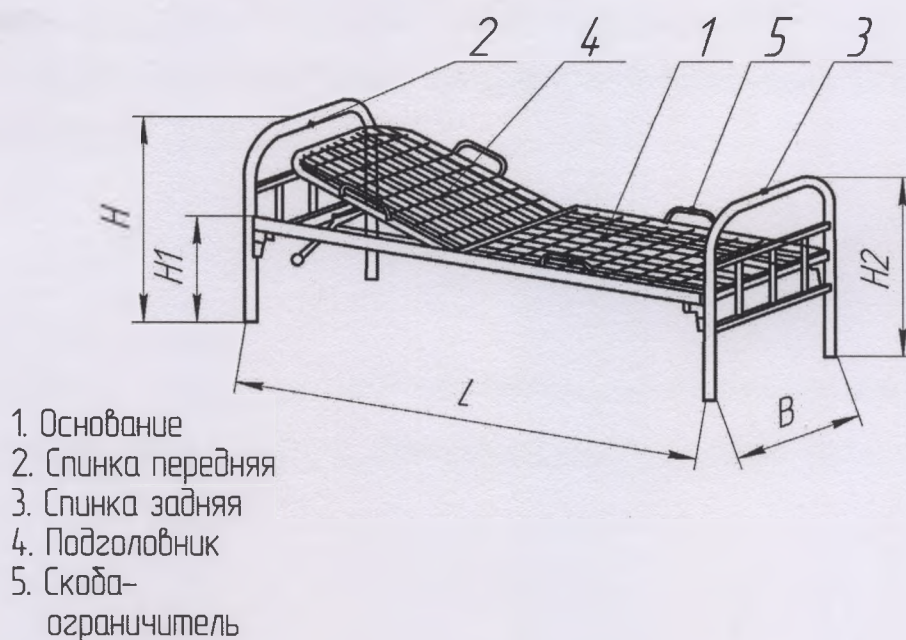


Рисунок 1

Кровать медицинская КМ800.02.000

7 Утилизация

7.1 Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

7.2 Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» и в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

7.3 Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование

8.1.1 Транспортирование кроватей производится всеми видами транспортных средств (воздушным транспортом в герметизированном отсеке) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.1.2 Условия транспортирования кроватей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

В пределах одного населённого пункта изделия допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. Условия транспортирования изделий на открытых транспортных средствах должны соответствовать условиям хранения 8 по ГОСТ 15150.

8.2 Хранение

8.2.1 Изделие должно храниться в закрытых помещениях при температуре от +5° до +40°С и относительной влажности воздуха до 80%.

Лист регистрации изменений

[illegible]

Ген. директор

М. И. Абрамова

Всего прошито, и скреплено
печатью 13 (тринадцать)



ОКП 94 5210

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Торговый дом
«Профессионал Сервис»



М. Я. Абрамова

2014 г.

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ

КМ900.00.000

ПАСПОРТ

КМ900.00.000 ПС

2014 г.

М	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
зrab.		Гончаров	<i>Седухин</i>	08.12.14
ов.		Хоничев	<i>Хоничев</i>	08.12.2014
ког			<i>Хоничев</i>	08.12.2014
в.		Абрамова	<i>Абрамова</i>	08.12.2014

1 Основные технические данные

1.1 Кровать медицинская исполнения КМ900.00.000 (далее – кровать) предназначена для размещения больных и ухода за ними в лечебных медицинских учреждениях различного профиля.

Кровати предназначены для стационарных и хирургических отделений лечебных учреждений.

1.2 Кровать КМ900.00.000 состоит из двух боковых спинок и каркаса, с приваренными металлическими листами.

Соединение спинок и каркаса выполняется запрессовкой крючков каркаса в кронштейны-петли на спинке и дополнительной фиксацией их болтовым креплением. Сверху к каркасу привариваются две пары П-образных кронштейнов для крепления медицинских ремней.

1.3 Кровать поставляется в разобранном виде. Детали и сборочные единицы изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку и разборку без дополнительной подгонки.

1.4 Основные параметры кровати приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение кровати
	КМ900.00.000
1 Прочность соединения опорных спинок кровати с царгами	
- Нагружение грузом, даН	100
- Цикл	1000
2 Габаритные размеры, мм	
- Длина, l	2070
- Ширина, B	900
- Высота, H	840
3 Расстояние от пола до верхней кромки каркаса, мм	485
4 Масса, кг	49

1.5 Сведения о дезинфекции

1.5.1 Наружные поверхности кровати должны быть устойчивы к многократной дезинфекции по МЧ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющих средств по ТУ 9144-003-49337122-99 или другим дезинфицирующим раствором.

1.6 Средний срок службы - 10 лет.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки кровати медицинской КМ900.00.000 должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение документа	Количество, шт.
Кровать медицинская КМ900.00.000:	КМ900.00.000	1
Основание	КМ900.01.000	1
Спинка	КМ900.02.000	2
Болт М6х20 ГОСТ 7805-70	ГОСТ 7805-70	4
Гайка М6 ГОСТ 5927-70	ГОСТ 5927-70	4
Эксплуатационная документация		
Этикетка	КМ900.00.000 ЭТ	1
Паспорт	КМ900.00.000 ПС	1

КМ900.00.000 ПС

Лист

5

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 При продаже изделий в разобранном виде необходимо в присутствии покупателя проверить комплектность, внешний вид деталей и фурнитуры.

3.2 Претензии по некомплектности, качеству изделий, а также об обнаруженных отклонениях, в результате которых сборка не представляется возможной, должны направляться потребителем в магазин, где приобретена мебель, при внерыночном распределении-изготовителю.

3.3 Общий гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи. В случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи, заверенной печатью торгующей организации и подписью продавца, гарантийный срок исчисляется с даты приемки изделия ОТК предприятия-изготовителя.

3.4 При внерыночном распределении гарантийный срок исчисляется со дня получения изделия потребителем.

3.5 Срок службы изделия – 10 лет.

3.6 Форма гарантийного талона приведена в обязательном приложении А.

4 Сведения об упаковке

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кровать медицинская	KM900.00.000	Nº
Наименование изделия	Обозначение	Заводской номер

Упакован ООО «Торговый дом «Профессионал Сервис»
Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Должность	Личная подпись	Расшифровка подписи
-----------	----------------	---------------------

Год, месяц, число

5 Свидетельство о приемке

5.1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать медицинская	KM900.00.000	№
Наименование изделия	Обозначение	Заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий ТУ 9452-001-66749900-2014, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП		
	Личная подпись	Расшифровка подписи
	Год, месяц, число	

Линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель предприятия	Обозначение документа, по которому производится поставка
--------------------------	---

МП		
	Личная подпись	Расшифровка подписи
	Год, месяц, число	

Заказчик
(при наличии)

МП		
	Личная подпись	Расшифровка подписи
	Год, месяц, число	

5.2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ГАРАНТИИ

Кровать медицинская	КМ900.00.000	№
Наименование изделия	Обозначение	Заводской номер
согласно		
Вид ремонта	Наименование предприятия, условное обозначение	Вид документа

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий ТУ 9452-001-66749900-2014 и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____

_____ в течение срока службы _____

_____ ресурс _____ лет

(года), в том числе срок хранения _____

_____ условия хранения, лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП _____

_____ Личная подпись _____ Расшифровка подписи

_____ Год, месяц, число

6 Порядок сборки и регулировки

6.1 Порядок сборки кровати КМ900.00.000 показан на рисунке 1.

6.2 Соединение спинок поз.2 и основания поз.1 выполняется запрессовкой крючков основания в кронштейны-петли на спинках.

6.3 Установите болтовое соединение поз.5 в отверстия крючков и петель и затяните гайками.

6.4 При необходимости закрепите кровать к полу винтами через отверстия в кронштейнах спинок.

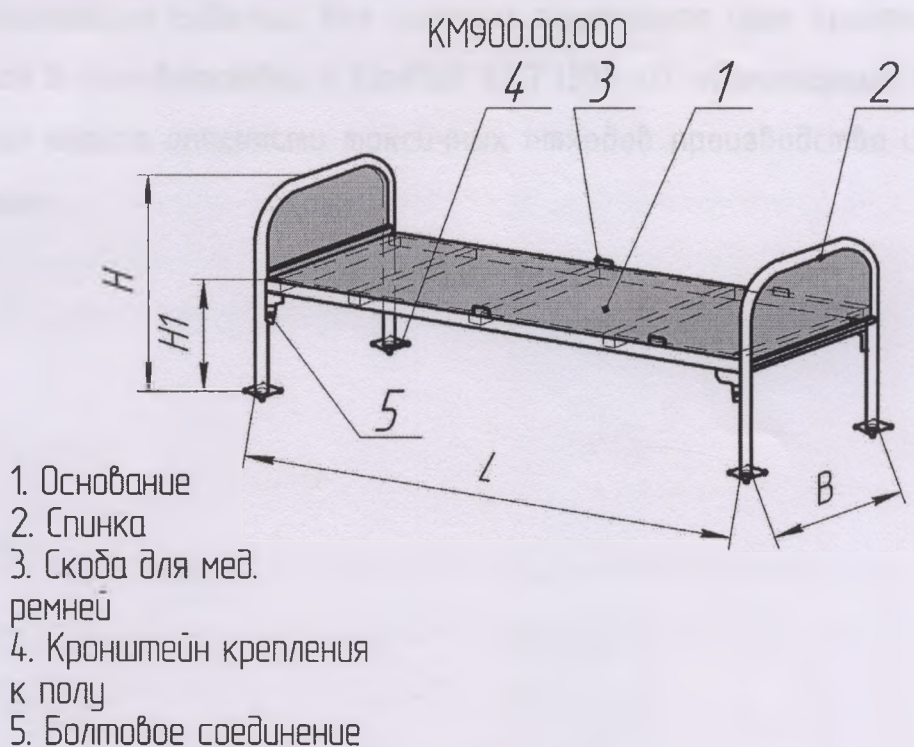


Рисунок 1

Кровать медицинская КМ900.00.000

7 Утилизация

7.1 Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

7.2 Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» и в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

7.3 Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование

8.1.1 Транспортирование кроватей производится всеми видами транспортных средств (воздушным транспортом в герметизированном отсеке) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.1.2 Условия транспортирования кроватей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

В пределах одного населённого пункта изделия допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. Условия транспортирования изделий на открытых транспортных средствах должны соответствовать условиям хранения 8 по ГОСТ 15150.

8.2 Хранение

8.2.1 Изделие должно храниться в закрытых помещениях при температуре от +5° до +40°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Лист регистрации изменений

[illegible]

Ген. директор

М. Э. Абрамова

Всего прошито, и скреплено
печатью 13 (Тринадцать)

лист

