

59¹

«УТВЕРЖДЕНО»
приказом Росздравнадзора
от _____ 200__ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «СИМС-2»
«СИМС-2»
«СИМС-2»
Карапетян Л.М.
« _____ 200__ г.



**Инструкция по эксплуатации
Анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестера)
Alcoscan AL-1100**

Alcoscan AL-1100 это высокочувствительный индикатор алкоголя, особенно удобный для быстрого обнаружения небольших концентраций алкоголя в выдыхаемом воздухе. Прибор может применяться как для самоконтроля так и для проверки сторонних лиц. Работа алкотестера Alcoscan AL-1100 полностью автоматизирована, все этапы подготовки и проведения тестирования сопровождаются звуковой и световой сигнализацией. Кнопка включения/выключения и основные индикаторы расположены на лицевой стороне алкотестера и, в зависимости от поступившей в прибор концентрации алкоголя загораются зеленым, желтым или красным цветом. Левый светодиод помимо этого отображает текущее состояние прибора и аккумуляторной батареи. Светодиод в торце алкотестера дублирует показания основных индикаторов и предназначен для облегчения работы проверяющего. С тыльной стороны прибора расположена крышка аккумуляторного блока. Особенностью работы прибора является то, что продувание производится свободным вдохом, без применения мундштукѡв.

Порядок работы

1. Включение

Нажмите на кнопку включения. Кнопка зафиксируется в положении «включено» и начнется процесс подготовки, включающий автоматическую стабилизацию алкогольного сенсора и самоконтроль. Левый светодиодный индикатор горит при этом желтым цветом, соответствующим состоянию ожидания WAIT. Этот процесс занимает около 30 секунд, хотя в некоторых случаях может продолжаться до 2-х минут. Включение сопровождается одиночным звуковым сигналом. По окончании подготовки прозвучит двойной звуковой сигнал и светодиод начнет моргать зеленым светом, соответствующим состоянию READY. Это означает, что прибор готов к работе.

2. Продувание

Поднесите прибор к губам испытуемого на расстояние 5-7 см и попросите продуть в течение двух секунд в углубление в верхней части прибора. Одиночный звуковой сигнал означает, что проба воздуха поступила в прибор.

3. Считывание

Результат измерения отражается свечением одного из светодиодных индикаторов. Ниже дана таблица соответствия между содержанием алкоголя в крови испытуемого и индикацией светодиодной шкалы.

Уровень (результат)	Индикация
0,00 – 0,20 промилле	Одиночный звуковой сигнал, зеленый светодиод
0,20 – 0,50 промилле	Прерывистый звуковой сигнал, желтый светодиод
0,50 промилле и выше	Протяжный звуковой сигнал, красный светодиод

1. **Внимание!** Показания прибора являются оценочными и не могут рассматриваться как количественные.

4. Выключение

Для выключения прибора нажмите и отпустите кнопку на лицевой панели.

5. Повторный тест

Если не выключать прибор после очередного тестирования он сам вернется в состояние готовности. Либо можно выключить и снова включить прибор для проведения следующего теста.

6. Индикатор разряда аккумуляторных батарей

Алкотестер Alcoscan Al-1100 сигнализирует о недостаточности заряда батареи. Если в процессе работы или подготовки к тестированию левый светодиод загорается красным светом, прибор необходимо поставить на подзарядку перед дальнейшим использованием. При полной разрядке аккумуляторной батареи прибор может не включаться вообще.

7. Зарядка аккумуляторов

Для подзарядки необходимо подсоединить один из адаптеров из комплекта поставки к прибору через гнездо в правом торце алкотестера и подключить адаптер в сеть или в гнездо прикуривателя автомобиля. Загорится красным светом левый светодиод. Если свечение индикатора сменяется на зеленое, значит аккумулятор зарядился. Полная зарядка может занять до 3 часов. Во время подзарядки аккумуляторов проводить тестирование невозможно.

Важные предупреждения

- Проверку следует производить не ранее, чем через 15 минут после употребления спиртных напитков проверяемым.
- Длительность подготовки прибора в промежутках между проверками может увеличиться, если тестирование производится в закрытом помещении с плохой вентиляцией.
- Попадание капель слюны или алкоголя на сенсор также могут замедлить стадию очистки. В этом случае для ускорения подготовки к следующему тестированию прибор следует слегка потрясти или продуть чистым воздухом.
- Сигаретный дым может повредить сенсор. Начинайте тестирование не ранее чем через 1 минуту после курения.
- Alcoscan Al-1100 не предназначен для применения в сфере распространения Государственного метрологического контроля.

Технические характеристики

Сенсор	Полупроводниковый сенсор на алкоголь
Продувание	Без мундштуков
Время прогрева перед тестом	Менее 30 секунд
Время анализа	Менее 2 секунд
Индикация алкоголя в крови	Три уровня концентрации: Низкая – менее 0,20 промилле Средняя - 0,21 – 0,50 промилле Высокая – более 0,51 промилле
Максимальное число тестов в минуту	20 тестов
Подготовка к повторному тесту	Менее 20 секунд
Продолжительность работы	Около 6 часов без подзарядки
Рабочая температура	0°C – 50°C
Вес	180 г с аккумулятором
Размеры	150x75x24 мм
Питание	Перезаряжаемые аккумуляторы AA – 3 шт.
Время подзарядки аккумуляторов	В течение 3 часов от источника 12В

Хранение и транспортировка

Во избежание повреждений рекомендуется хранить прибор в специальном чехле-сумке из комплекта поставки при следующих условиях:

Температура: -40°C - + 70°C

Относительная влажность: 10 - 90 % (без конденсации)

Атмосферное давление: 600 - 1400 гПа

Внимание: храните прибор вдали от алкогольсодержащих жидкостей (например, лекарственные настойки, автомобильные жидкости, духи и т.п.).

Alcoscan AL-1100 можно транспортировать любыми видами транспорта.

Утилизация прибора

по завершению срока службы прибора утилизируйте прибор согласно национальным нормам по утилизации отходов, или договоритесь с компанией по утилизации отходов об утилизации прибора. Подробную информацию можно получить в местных органах по охране окружающей среды.

Важное предупреждение

Неисправные аккумуляторы

- не бросайте в огонь,
- не подзаряжайте,
- не разбирайте!

Утилизируются только как специальные отходы, согласно государственным нормам утилизации отходов. Информацию можно получить в местных экологических учреждениях, а также в компаниях, занимающихся утилизацией отходов.

Техническое обслуживание и ремонт

Алкотестер Alcoscan AI-1100 снабжается фирменным полупроводниковым сенсором - датчиком, чувствительным к парам этанола в выдыхаемом воздухе. По мере эксплуатации сенсор постепенно изнашивается, что приводит к росту погрешности измерений. Для сохранения точности показаний требуется приблизительно ежеквартальная диагностика. При необходимости, настройка алкотестера.

Обслуживание должно ремонтироваться только обученным сервисным персоналом. Проведение всех видов технического обслуживания и ремонта алкотестера Alcoscan AI-1100 производится сервисным центром фирмы производителя либо по согласованию с ним.

Адрес: 125459, Москва, ул. Новопоселковая, д.6, корп.7, офис 706. Тел. 792-31-90,
e-mail: support@alcotester.ru; info@alcotester.ru

Гарантийные обязательства

ООО «СИМС-2», являясь официальным представителем компании-производителя, гарантирует, что приобретенный Вами алкотестер не имеет производственных дефектов в части материалов и комплектующих на момент продажи и обязуется произвести бесплатный ремонт вышедших из строя элементов в течение всего срока действия гарантии.

Срок гарантии - 6 месяцев.

Внимание! Гарантия не распространяется на химические источники питания.

Прибор принимается к гарантийному обслуживанию **только** при наличии паспорта (руководства по эксплуатации) с указанием серийного номера, даты продажи и с печатью торгующей организации.

ООО «СИМС-2» оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1. Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, либо Руководство по эксплуатации, из-за чего невозможно установить дату продажи аппарата
2. Аппарат подвергался несанкционированному вскрытию
3. Аппарат использовался с нарушением правил эксплуатации
4. Аппарат имеет следы механических повреждений, вызванных ударами, падением либо попытками вскрытия
5. Аппарат имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей или насекомых
6. Аппарат имеет повреждения, вызванные применением нестандартных комплектующих и аксессуаров

В случае отказа от гарантийного обслуживания покупателю выдается акт технической экспертизы с обоснованием причины отказа.