

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «Мега-Оптим»

Ю.А. Горшков



«08» июня 2012 г.

М.П.

**Руководство по эксплуатации
изделия медицинского назначения**

Кресла-коляски инвалидные механические

Артикул:

511A, 511A-41, 511A-46, 511A-51, 511A-56
511AC - 41, 511AC - 46, 511AC - 51, 511AC - 56
511B, 511B-1, 511B-1-41, 511B-1-46, 511B-1-51, 511B-1-56
511B - 41, 511B - 46, 511B - 51, 511B - 56
511N, 511N - 41, 511N - 46, 511N - 51, 511N - 56
512B-1, 512B-1-41, 512B-1-46, 512B-1-51, 512B-1-56
512B-3, 512B-3 - 41, 512B-3 - 46, 512B-3-51, 512B-3-56
512B, 512B-41, 512B-46, 512B-51, 512B-56
512N, 512N-41, 512N-46, 512N-51, 512N-56
512Q-41, 512Q-46, 512Q-51, 512Q-56
512AE-41, 512AE-46, 512AE-51, 512AE-56
514A, 514A-41, 514A-46, 514A-51, 514A-56
514A-1, 514A-1-41, 514A-1-46, 514A-1-51, 514A-1-56
514A-2-41, 514A-2-46, 514A-2-51, 514A-2-56
514A-3-41, 514A-3-46, 514A-3-51, 514A-3-56
514A-4, 514A-4-41, 514A-4-46, 514A-4-51, 514A-4-56
514A-LX, 514A-LX-41, 514A-LX-46, 514A-LX-51, 514A-LX-56
514AC, 514AC-41, 514AC-46, 514AC-51, 514AC-56
514B, 514B-41, 514B-46, 514B-51, 514B-56
514B-1-41, 514B-1-46, 514B-1-51, 514B-1-56
514B-2, 514B-2-41, 514B-2-46, 514B-2-51, 514B-2-56
Mega-Track 514B-3-41, 514B-3-46, 514B-3-51, 514B-3-56
Mega-Drive 514B-3D-41, 514B-3D-46, 514B-3D-51, 514B-3D-56
514N, 514N-41, 514N-46, 514N-51, 514N-56
711AE, 711AE-41, 711AE-46, 711AE-51, 711AE-56
H-712N, H-712N-41, H-712N-46, H-712N-51, H-712N-56
712N-1, 712N-1-41, 712N-1-46, 712N-1-51, 712N-1-56
H-712N-Q, H-712N-Q-41, H-712N-Q-46, H-712N-Q-51, H-712N-Q-56
712AE, 712AE-41, 712AE-46, 712AE-51, 712AE-56
H-714N, H-714N-41, H-714N-46, H-714N-51, H-714N-56
H-714N-Q, H-714N-Q-41, H-714N-Q-46, H-714N-Q-51, H-714N-Q-56

171

Кресла-коляски инвалидные механические предназначены для больных и инвалидов-спинальников с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в домашних условиях, а также по дорогам с твердым покрытием.

Основные технические характеристики кресел-колясок инвалидных механических

Артикул: 511А

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски,см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
60	43	100	92	29	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.

Фото №1 Кресло-коляска инвалидная механическая 511А



Артикул: 511А-41

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски,см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
64	41	85	87	30	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.

Фото №2 Кресло-коляска инвалидная механическая 511А-41



Артикул: **511А-46**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
64	46	85	87	30	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.

Фото №3 Кресло-коляска инвалидная механическая 511А-46



Артикул:511А-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
64	51	85	87	30	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.

Фото №4 Кресло-коляска инвалидная механическая 511А-51



Артикул: 511А-56

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
64	56	85	87	30	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не

174
имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.

Фото №5 Кресло-коляска инвалидная механическая 511А-56



Артикул: 511АС-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
62	41	100	93	29	104	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Задние колеса - пневматические, передние - полиуретановые.

Фото №6 Кресло-коляска инвалидная механическая 511АС-41



Артикул: 511АС - 46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
63	46	100	93	29	104	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Задние колеса - пневматические, передние - полиуретановые

Фото №7 Кресло-коляска инвалидная механическая 511АС-46



Артикул: 511АС - 51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
63	51	100	93	29	104	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники

176
фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Задние колеса - пневматические, передние - полиуретановые.

Фото №8 Кресло-коляска инвалидная механическая 511АС-51



Артикул: 511АС - 56

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
63	56	100	93	29	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Задние колеса - пневматические, передние - полиуретановые.

Фото №9 Кресло-коляска инвалидная механическая 511АС-56



Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски,см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	46	100	91	29	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - полиуретан, переднее - пластмасса.

Фото №10 Кресло-коляска инвалидная механическая 511В



Артикул: 511В-1

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски,см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
64	43	100	92	29	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники

172
 фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Фото №11 Кресло-коляска инвалидная механическая 511В-1



Артикул: 511В-1-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	41	100	92	29	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Фото №12 Кресло-коляска инвалидная механическая 511В-1-41



фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Фото №13 Кресло-коляска инвалидная механическая 511В-1-51



Артикул: **511В-1-56**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	56	100	92	29	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Фото №14 Кресло-коляска инвалидная механическая 511В-1-56



Артикул: **511В-41**

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски,см	Максим. масса пользова-теля, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
66	41	105	100	30	104	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Фото №15 Кресло-коляска инвалиднамеханическая я 511В-41



Артикул: 511В-46

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски,см	Максим. масса пользова-теля, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
66	46	105	100	30	104	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.



Артикул: **511В-51**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
66	51	105	100	30	104	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Фото №17 Кресло-коляска инвалидная механическая 511В-51



Артикул: **511В-56**

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски,см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
66	51	105	100	30	104	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Фото №18 Кресло-коляска инвалидная механическая 511В-56



Артикул: 511N

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски,см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
56	40	100	91	28	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска оснащена стояночными тормозами. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки стационарные. Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на

кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Фото №19 Кресло-коляска инвалидная механическая 511N



Артикул: **511N-41**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	41	100	92	28	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска имеет стояночными тормозами. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки стационарные. Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Фото №20 Кресло-коляска инвалидная механическая 511N-41



Артикул: **511N-46**

125

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	46	100	92	28	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска имеет стояночными тормозами. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки стационарные.

Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Фото №21 Кресло-коляска инвалидная механическая 511N-46



Артикул: **511N-51**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	51	100	92	28	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска имеет стояночными тормозами. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной

обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки стационарные. Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Фото №22 Кресло-коляска инвалидная механическая 511N-51



Артикул: **511N-56**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	56	100	92	28	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска имеет стояночными тормозами. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки стационарные. Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Фото №23 Кресло-коляска инвалидная механическая 511N-56



Артикул: **512В-1**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
64	43	100	92	29	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Заднее колесо - пневматическое, переднее - пластмасса.

Фото №24 Кресло-коляска инвалидная механическая 512В-1



Артикул: **512В-1-41**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
64	41	100	92	29	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Заднее колесо - пневматическое, переднее - пластмасса.

Фото №25 Кресло-коляска инвалидная механическая 512В-1-41



Артикул: **512В-1-46**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
64	46	100	92	29	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники

129
 фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.Заднее колесо - пневматическое, переднее - пластмасса.

Фото №26 Кресло-коляска инвалиднаямеханическая512В-1-46



Артикул: 512В-1-51

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользова-теля, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
64	51	100	92	29	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоитиз: рамы, спинки, мягкогосидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева).Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.Заднее колесо - пневматическое, переднее - пластмасса.

Фото №27 Кресло-коляска инвалидная механическая512В-1-51



Артикул: 512В-1-56

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
64	56	100	92	29	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Заднее колесо - пневматическое, переднее - пластмасса.

Фото №27 Кресло-коляска инвалидная 512В-1-56



Артикул: 512В-3

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
64	46	102	94	30	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной

обод для самостоятельного передвижения пользователя. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Фото №28 Кресло-коляска инвалидная механическая 512В-3, 512В-3-41, 512В-3-46, 512В-3-51, 512В-3-56



Артикул: 512В-3-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	41	102	94	30	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Артикул: 512В-3-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	46	102	94	30	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя.Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Артикул: 512В-3-51

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользова-теля, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	51	102	94	30	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя.Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Артикул: 512В-3-56

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользова-теля, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	56	102	94	30	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя.Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Артикул: 512В

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	46	100	91	26	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Обод с рифлёной поверхностью для удобства передвижения. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Фото №29 Кресло-коляска инвалидная механическая 512В



Артикул: 512В-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
66	41	100	92	28	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Обод с рифлёной поверхностью для удобства передвижения. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Фото №30 Кресло-коляска инвалидная механическая 512В-41



Артикул: 512В-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
66	46	100	92	28	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Обод с рифлёной поверхностью для удобства передвижения. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Фото №30 Кресло-коляска инвалидная механическая 512В-46



Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
66	51	100	92	28	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Обод с рифлёной поверхностью для удобства передвижения. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Фото №31 Кресло-коляска инвалидная механическая 512В-51



Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
66	56	100	92	28	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Обод с рифлёной поверхностью для удобства передвижения. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Артикул: 512В-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
66	51	100	92	28	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Обод с рифлёной поверхностью для удобства передвижения. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.

Фото №31 Кресло-коляска инвалидная механическая 512В-51



Артикул: 512В-56

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
66	56	100	92	28	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Обод с рифлёной поверхностью для удобства передвижения. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан.



Артикул: 512N

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	46	100	91	26	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска имеет стояночными тормозами. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки стационарные.

Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Фото №33 Кресло-коляска инвалидная механическая 512N



Артикул: 512N-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	41	100	91	26	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска имеет стояночными тормозами. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки стационарные.

Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах.. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Фото №34 Кресло-коляска инвалидная механическая 512N-41



Артикул: 512N-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	46	100	91	26	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска имеет стояночными тормозами. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной

обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки стационарные.

Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах.. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Фото №35 Кресло-коляска инвалидная механическая 512N-46



Артикул: 512N-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	51	100	91	26	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска имеет стояночными тормозами. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки стационарные.

Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах.. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Фото №36 Кресло-коляска инвалидная механическая 512N-51



Артикул: 512N-56

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	56	100	91	26	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска имеет стояночные тормоза. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Для безопасности пользователя около заднего колеса, на раме находится атиопркидыватель. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя.

Подлокотники и подножки стационарные. Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством.. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан.

Фото №37 Кресло-коляска инвалидная механическая 512N-56



Артикул: 512Q-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
60	41	100	92	29	104	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Легкая, маневренная коляска. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №38 Кресло-коляска инвалидная механическая 512Q-41



Артикул: 512Q-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
60	46	100	92	29	104	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Легкая, маневренная коляска. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №39 Кресло-коляска инвалидная механическая 512Q-46



Артикул: 512Q-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
60	51	100	92	29	104	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Легкая, маневренная коляска. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №40 Кресло-коляска инвалидная механическая 512Q-51



Артикул: **512Q-56**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
60	56	100	92	29	104	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Легкая, маневренная коляска. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №41 Кресло-коляска инвалидная механическая 512Q-56



Артикул: **512AE-41**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	41	100	92	30	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Легкая, маневренная



Артикул: **514А**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
63	46	100	91	29	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Легкая, маневренная коляска. Заднее колесо - полиуретан, переднее - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. За спинкой крепится корзина для личных вещей, стойка для трости.

Фото №46 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А



Артикул: **514А-41**

106

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	41	102	90	28	103	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники - съёмные, Подножки регулируются под рост пользователя. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №47 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А-41



Артикул: 514А-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	46	102	90	28	103	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя.. Подлокотники - съёмные, Подножки регулируются под рост пользователя. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №48 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А-46



Артикул: 514А-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	51	102	90	28	103	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя.. Подлокотники - съёмные, Подножки регулируются под рост пользователя. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №49 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А-51



Артикул: 514А-56

Ширина	Ширина	Максим.	Высота	Ширина	Длина	Материал
--------	--------	---------	--------	--------	-------	----------

кресла- коляски, см	сидения кресла- коляски, см	масса пользо- вателя, кг	кресла- коляски, см	кресла- коляски в сложен. виде	кресла- коляски, см	изготовления рамы
65	56	102	90	28	103	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя.. Подлокотники - съёмные, Подножки регулируются под рост пользователя. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №50 Кресло-коляска инвалиднаямеханическая514А-56



Артикул: 514А-1

Ширина кресла- коляски, см	Ширина сидения кресла- коляски, см	Максим. масса пользо- вателя, кг	Высота кресла- коляски, см	Ширина кресла- коляски в сложен. виде	Длина кресла- коляски, см	Материал изготовления рамы
57	44	85	87	26	89	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоитиз: рамы, спинки, мягкогосидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева).Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Складная спинка. Заднее, переднее колесо - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №51 Кресло-коляска инвалиднаямеханическая514А-1



Артикул: 514А-1-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
57	41	85	87	26	89	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Складная спинка. Заднее, переднее колесо - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №52 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А-1-41



Артикул: 514А-1-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
57	46	85	87	26	89	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Складная спинка. Заднее, переднее колесо - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №53 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А-1-46



Артикул: 514А-1-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
57	51	85	87	26	89	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно.

Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Складная спинка. Заднее, переднее колесо - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №54 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А-1-51



Артикул: 514А-1-56

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
57	56	85	87	26	89	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Складная спинка. Заднее, переднее колесо - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №55 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А-1-56



Артикул: 514А-2-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
67	41	95	92	28	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Складная спинка. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №56 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А-2-41



Артикул: 514А-2-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
67	46	95	92	28	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Складная спинка. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №57 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А-2-46



Артикул: 514А-2-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
67	51	95	92	28	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Складная спинка. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №58 Кресло-коляска инвалидная механическая514А-2-51



Артикул: **514А-2-56**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
67	56	95	92	28	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Складная спинка. Заднее колесо - пневматическое, переднее - полиуретан. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №59 Кресло-коляска инвалидная механическая514А-2-56



Артикул: 514А-3-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
70	41	100	95	30	101	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица.

Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно.

Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Заднее колесо - пневматическое, переднее - потлиуретан.

Фото №60 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А-3-41



2/6

Артикул: 514А-3-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
70	46	100	95	30	101	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Заднее колесо - пневматическое, переднее - потлиуретан.

Фото №61 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А-3-46



Артикул: 514А-3-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
70	51	100	95	30	101	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица.

Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева).Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.Заднее колесо - пневматическое, переднее - потлиуретан.

Фото №62 Кресло-коляска инвалиднаямеханическая514А-3-51



Артикул: 514А-3-56

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользова-теля, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
70	56	100	95	30	101	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоитиз: рамы, спинки, мягкогосидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресла-коляска укомплектована двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева).Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.Заднее колесо - пневматическое, переднее - потлиуретан.

Фото №63 Кресло-коляска инвалиднаямеханическая514А-3-56



Артикул: 514А-4

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
60	43	85	88	29	111	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя.

Фото №64 Кресло-коляскаинвалиднаямеханическая514А-4



Артикул: 514А-4-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	41	100	90	28	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя.

Фото №65 Кресло-коляскаинвалиднаямеханическая514А-4-41



Артикул: 514А-4-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	46	100	90	28	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя.

Фото №66 Кресло-коляскаинвалиднаямеханическая514А-4-46



Артикул: 514А-4-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	51	100	90	28	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя.

Фото №67 Кресло-коляскаинвалиднаямеханическая514А-4-51



Артикул: 514А-4-56

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
65	56	100	90	28	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя.

Фото №68 Кресло-коляскаинвалиднаямеханическая514А-4-56



Артикул: 514А-LX

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
55	40	100	87	26	85	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Облегченная конструкция.

Кресла-коляски укомплектованы двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормозная система располагается на раме. Блокирует задние колеса. Передние и задние колеса не имеют ручного обода для самостоятельного передвижения. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.

Фото №69 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А-LX



Артикул: 514А-LX-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
55	41	100	87	26	85	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Облегченная конструкция.

Кресла-коляски укомплектованы двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормозная система располагается на раме. Блокирует задние колеса. Передние и задние колеса не имеют ручного обода для самостоятельного передвижения. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.

Фото №70 Кресло-коляска инвалидная механическая 514A-LX-41



Артикул: 514A-LX-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
55	46	100	87	26	85	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Облегченная конструкция.

Кресла-коляски укомплектованы двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормозная система располагается на раме. Блокирует задние колеса. Передние и задние колеса не имеют ручного обода для самостоятельного передвижения. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.

Фото №71 Кресло-коляска инвалидная механическая 514А-LX-46



Артикул: 514А-LX-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
55	51	100	87	26	85	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Облегченная конструкция.

Кресла-коляски укомплектованы двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормозная система располагается на раме. Блокирует задние колеса. Передние и задние колеса не имеют ручного обода для самостоятельного передвижения. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.

Фото №86 Кресло-коляска инвалидная механическая 514В-1-



51

Артикул: 514В-1-56

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
72	56	95	88	28	100	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя типами стояночных тормозов. Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица, тормоза блокирующие задние колеса (справа и слева). Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп. Задние колеса - пневматические. Передние - пластиковые.

Фото №87 Кресло-коляска инвалидная механическая 514В-1-56



Артикул: 514В-2

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	44	85	87	30	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Задние и передние колёса изготовлены из полиуритана. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Фото №88 Кресло-коляска инвалидная механическая 514В-2



Артикул: 514В-2-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	41	85	87	30	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Задние и передние колёса изготовлены из полиуритана. Сидение - нейлоновая тканьс водоотталкивающей пропиткой.

Фото №89 Кресло-коляска инвалидная механическая 514В-2-41



Артикул: 514В-2-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	46	85	87	30	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Задние и передние колёса изготовлены из полиуритана. Сидение - нейлоновая тканьс водоотталкивающей пропиткой.

Фото №90 Кресло-коляска инвалидная механическая 514В-2-46



Артикул: 514В-2-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	51	85	87	30	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Задние и передние колёса изготовлены из полиуритана. Сидение - нейлоновая тканьс водоотталкивающей пропиткой.

Фото №90 Кресло-коляска инвалидная механическая 514В-2-51



Артикул: 514В-2-56

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	56	85	87	30	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Задние и передние колёса изготовлены из полиуритана. Сидение - нейлоновая тканьс водоотталкивающей пропиткой.

Фото №91 Кресло-коляска инвалидная механическая 514В-2-56



Артикул: **Mega-Track 514B-3-41**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
74	41	85	91	40	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Коляску приводит в движение велопривод на одной цепи. Задние колёса - пневматические. Передние - полиуритан. Сидение - нейлоновая ткань.

Фото №92 Кресло-коляска инвалидная механическая Mega-Track 514B-3-41



Артикул: **Mega-Track 514B-3-46**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
74	46	85	91	40	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Коляску приводит в движение велопривод на одной цепи. Задние колёса - пневматические. Передние - полиуритан. Сидение - нейлоновая ткань.

Фото №93 Кресло-коляскаинвалиднаямеханическая Mega-Track 514B-3-46



Артикул: Mega-Track 514B-3-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
74	51	85	91	40	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Коляску приводит в движение велопривод на одной цепи. Задние колёса - пневматические. Передние - полиуритан. Сидение - нейлоновая ткань.

Фото №94 Кресло-коляскаинвалиднаямеханическая Mega-Track 514B-3-51



Артикул: **Mega-Track 514B-3-56**

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
74	56	85	91	40	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Коляску приводит в движение велопривод на одной цепи. Задние колёса - пневматические. Передние - полиуритан. Сидение - нейлоновая ткань.

Фото №95 Кресло-коляскаинвалиднаямеханическая Mega-Track 514B-3-56



Артикул: **Mega-Drive 514B-3D-41**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
75	41	85	91	40	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Коляску приводит в движение велопривод с двумя цепями. Задние колёса - пневматические. Передние - полиуритан. Сидение - нейлоновая ткань.

Фото №96 Кресло-коляска инвалидная механическая Mega-Drive 514B-3D-41



291

Артикул: **Mega-Drive 514B-3D-46**

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
75	46	85	91	40	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Коляску приводит в движение велопривод с двумя цепями. Задние колёса - пневматические. Передние - полиуритан. Сидение - нейлоновая ткань.

Фото №97 Кресло-коляска инвалидная механическая Mega-Drive 514B-3D-46



Артикул: **Mega-Drive 514B-3D-51**

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
75	51	85	91	40	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Коляску приводит в

движение велопривод с двумя цепями. Задние колёса - пневматические. Передние - полиуритан. Сидение - нейлоновая ткань.

Фото №98 Кресло-коляска инвалидная механическая Mega-Drive 514B-3D-51



Артикул: **Mega-Drive 514B-3D-56**

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
75	56	85	91	40	105	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Коляску приводит в движение велопривод с двумя цепями. Задние колёса - пневматические. Передние - полиуритан. Сидение - нейлоновая ткань.

Фото №99 Кресло-коляска инвалидная механическая Mega-Drive 514B-3D-56



Артикул:514N

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользова-теля, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	40	100	90	29	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска имеет стояночные тормоза. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Для безопасности пользователя около заднего колеса, на раме находится атиопркидыватель. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки стационарные. Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством.

Фото №100 Кресло-коляска инвалидная механическая 514N



Артикул: 514N-41

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользова-теля, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	41	100	90	29	102	сталь с порошковым покрытием

Фото №102 Кресло-коляска инвалидная механическая 514N-46



Артикул: 514N-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	51	100	90	29	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска имеет стояночные тормоза. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Для безопасности пользователя около заднего колеса, на раме находится атиопркидыватель. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки стационарные. Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством.

Фото №103 Кресло-коляска инвалидная механическая 514N-51



Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользова-теля, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	56	100	90	29	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска имеет стояночные тормоза. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Для безопасности пользователя около заднего колеса, на раме находится антипрокидыватель. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки стационарные. Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством.

Фото №104 Кресло-коляска инвалидная механическая 514N-56



Артикул: 711AE

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользова-теля, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
63	46	100	91	29	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Обод с рифлёной поверхностью для удобства толкания кресла-коляски. Задние и передние колёса- пневматические. Мягкие и бесшумные. Сидение - искусственная кожа.

Фото №105 Кресло-коляска инвалидная механическая 711AE



Артикул: 711AE-41

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользова-теля, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
63	41	102	91	29	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Обод с рифлёной поверхностью для удобства толкания кресла-коляски. Задние и передние колёса полиуретановые. Сидение - искусственная кожа. Подлокотники и подножки съёмные.

Фото №106 Кресло-коляска инвалидная механическая 711AE-41



142

Артикул: 711AE-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
63	46	102	91	29	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Обод с рифлёной поверхностью для удобства толкания кресла-коляски. Задние и передние колёса полиуретановые. Сидение - искусственная кожа. Подлокотники и подножки съёмные.

Фото №107 Кресло-коляска инвалидная механическая 711AE-46



Артикул: 711AE-51

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
63	51	102	91	29	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной

обод для самостоятельного передвижения пользователя. Обод с рифлёной поверхностью для удобства толкания кресла-коляски. Задние и передние колёса полиуретановые. Сидение - искусственная кожа. Подлокотники и подножки съёмные.

Фото №108 Кресло-коляска инвалидная механическая 711AE-51



Артикул: 711AE-56

Ширина кресла-коляски,см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользова-теля, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
63	56	102	91	29	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Тип рамы - складная. Кресло-коляска укомплектована стояночными тормозами. Тормоза крепятся к раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Обод с рифлёной поверхностью для удобства толкания кресла-коляски. Задние и передние колёса полиуретановые. Сидение - искусственная кожа. Подлокотники и подножки съёмные.

Фото №109 Кресло-коляска инвалидная механическая 711AE-56



250

Артикул: Н-712N

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
68	46	100	106	30	125	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска изготовлена из стали с порошковым покрытием. Состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя типами стояночных тормозов. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева), и на ручках для сопровождающего лица. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки съёмные. Спинка кресла-коляски откидывается до положения "лежа". Подлокотники регулируются под руку пользователя. Для безопасности установлен антипрокидываль. Имеется санитарное устройство, в виде съёмного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством. Задние колёса - пневматические, передние - полиуретановые.

Фото №110 Кресло-коляска инвалидная механическая Н-712N



Артикул: Н-712N-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
75	41	100	95	28	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска изготовлена из стали с порошковым покрытием. Состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя типами стояночных тормозов. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева), и на ручках для сопровождающего лица. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки съёмные. Спинка кресла-коляски откидывается до положения "лежа". Подлокотники регулируются под руку пользователя. Для безопасности установлен антипрокидываль. Имеется санитарное устройство, в виде съёмного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством. Задние и передние колёса - полиуретан.

Фото №111 Кресло-коляска инвалидная механическая Н-712N-41



Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
75	41	100	95	28	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска изготовлена из стали с порошковым покрытием. Состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя типами стояночных тормозов. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева), и на ручках для сопровождающего лица. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки съёмные. Спинка кресла-коляски откидывается до положения "лежа". Подлокотники регулируются под руку пользователя. Для безопасности установлен антипрокидываль. Имеется санитарное устройство, в виде съёмного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством. Задние и передние колёса - полиуретан.

Фото №111 Кресло-коляска инвалидная механическая Н-712N-41



Артикул: Н-712N-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
75	41	100	95	28	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска изготовлена из стали с порошковым покрытием. Состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя типами стояночных тормозов. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева), и на ручках для сопровождающего лица. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки съёмные. Спинка кресла-коляски откидывается до положения "лежа". Подлокотники регулируются под руку пользователя. Для безопасности установлен антипрокидываль. Имеется санитарное устройство, в виде съёмного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством. Задние и передние колёса - полиуретан.

Фото №111 Кресло-коляска инвалидная механическая Н-712N-41



Артикул: Н-712N-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
75	41	100	95	28	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска изготовлена из стали с порошковым покрытием. Состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя типами стояночных тормозов. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева), и на ручках для сопровождающего лица. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки съёмные. Спинка кресла-коляски откидывается до положения "лежа". Подлокотники регулируются под руку пользователя. Для безопасности установлен антипрокидываль. Имеется санитарное устройство, в виде съёмного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством. Задние и передние колёса - полиуретан.

Фото №111 Кресло-коляска инвалидная механическая Н-712N-41



Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
75	46	100	95	28	106	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска изготовлена из стали с порошковым покрытием. Состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя типами стояночных тормозов. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева), и на ручках для сопровождающего лица. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки съёмные. Спинка кресла-коляски откидывается до положения "лежа". Подлокотники регулируются под руку пользователя. Для безопасности установлен антипрокидыватель. Имеется санитарное устройство, в виде съёмного пластикового горшка.

Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством. Задние и передние колёса - полиуретан.

Фото №112 Кресло-коляска инвалидная механическая Н-712N-46



Кресло-коляска изготовлена из стали с порошковым покрытием. Состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Артикулы кресел-колясок укомплектованы двумя типами стояночных тормозов. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева), и на ручках для сопровождающего лица. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки съёмные. Спинка кресла-коляски откидывается до положения "лежа". Подлокотники регулируются под руку пользователя. Для безопасности установлен антипрокидываль. Имеется санитарное устройство, в виде съёмного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством. Задние и передние колеса - полиуретановые.

Фото №114 Кресло-коляска инвалидная механическая Н-712N-56



Артикул: 712N-1

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
72	39	95	87	30	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска изготовлена из стали с порошковым покрытием. Состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя типами стояночных тормозов. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева), и на ручках для сопровождающего лица. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Привод с рифлёной поверхностью для удобства передвижения. Подлокотники и подножки съёмные. Спинка кресла-коляски откидывается до положения "лежа". Мягкая подушка обеспечивает комфорт. Спинка с подголовником складная.

Подлокотники регулируются под руку пользователя. Для безопасности установлен антипрокидываль. Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством. Задние колеса - пневматические, передние - полиуретановые.

Фото №111 Кресло-коляска инвалидная механическая 712N-1



Артикул: 712N-1-41

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
72	41	95	87	30	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска изготовлена из стали с порошковым покрытием. Состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя типами стояночных тормозов. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева), и на ручках для сопровождающего лица. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Привод с рифлёной поверхностью для удобства передвижения. Подлокотники и подножки съёмные. Спинка кресла-коляски откидывается до положения "лежа". Мягкая подушка обеспечивает комфорт. Спинка с подголовником складная. Подлокотники регулируются под руку пользователя. Для безопасности установлен антипрокидываль. Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством.
Задние колеса - пневматические, передние - полиуретановые.

Фото №112 Кресло-коляска инвалидная механическая 712N-1-41



Артикул: 712N-1-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
72	46	95	87	30	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска изготовлена из стали с порошковым покрытием. Состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя типами стояночных тормозов. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева), и на ручках для сопровождающего лица. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Привод с рифлёной поверхностью для удобства передвижения. Подлокотники и подножки съёмные. Спинка кресла-коляски откидывается до положения "лежа". Мягкая подушка обеспечивает комфорт. Спинка с подголовником складная. Подлокотники регулируются под руку пользователя. Для безопасности установлен антипрокидываль. Имеется санитарное устройство, в виде съёмного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством. Задние колеса - пневматические, передние - полиуретановые.

Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством.
Задние колеса - пневматические, передние - полиуретановые.

Фото №112 Кресло-коляска инвалидная механическая 712N-1-41



Артикул: 712N-1-46

Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см	Материал изготовления рамы
72	46	95	87	30	102	сталь с порошковым покрытием

Кресло-коляска изготовлена из стали с порошковым покрытием. Состоит из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Тип рамы - складная.

Кресло-коляска укомплектована двумя типами стояночных тормозов. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева), и на ручках для сопровождающего лица. Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Привод с рифлёной поверхностью для удобства передвижения. Подлокотники и подножки съёмные. Спинка кресла-коляски откидывается до положения "лежа". Мягкая подушка обеспечивает комфорт. Спинка с подголовником складная. Подлокотники регулируются под руку пользователя. Для безопасности установлен антипрокидываль. Имеется санитарное устройство, в виде съёмного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах. Сидение - нейлоновая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Средняя часть сидения снимается для пользования санитарным устройством. Задние колеса - пневматические, передние - полиуретановые.

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «Мега-Оптим»

Ю.А. Горшков

«5» марта 2012 г.

М.П.



**Руководство по эксплуатации
изделия медицинского назначения**

Кресла-коляски инвалидные механические

Артикул:

511A, 511A-41, 511A-46, 511A-51, 511A-56
511AC - 41, 511AC - 46, 511AC - 51, 511AC - 56
511B, 511B-1, 511B-1- 41, 511B-1- 46, 511B-1-51, 511B-1- 56
511B - 41, 511B - 46, 511B - 51, 511B - 56
511N, 511N - 41, 511N - 46, 511N - 51, 511N - 56
512B-1, 512B-1-41, 512B-1-46, 512B-1-51, 512B-1-56
512B-3, 512B-3 - 41, 512B-3 - 46, 512B-3-51, 512B-3-56
512B, 512B-41, 512B-46, 512B-51, 512B-56
512N, 512N-41, 512N-46, 512N-51, 512N-56
512Q-41, 512Q-46, 512Q-51, 512Q-56
512AE-41, 512AE-46, 512AE-51, 512AE-56
514A, 514A-41, 514A-46, 514A-51, 514A-56
514A-1, 514A-1-41, 514A-1-46, 514A-1-51, 514A-1-56
514A-2-41, 514A-2-46, 514A-2-51, 514A-2-56
514A-3-41, 514A-3-46, 514A-3-51, 514A-3-56
514A-4, 514A-4-41, 514A-4-46, 514A-4-51, 514A-4-56
514A-LX, 514A-LX-41, 514A-LX-46, 514A-LX-51, 514A-LX-56
514AC, 514AC-41, 514AC-46, 514AC-51, 514AC-56
514B, 514B-41, 514B-46, 514B-51, 514B-56
514B-1-41, 514B-1-46, 514B-1-51, 514B-1-56
514B-2, 514B-2-41, 514B-2-46, 514B-2-51, 514B-2-56
Mega-Track 514B-3-41, 514B-3-46, 514B-3-51, 514B-3-56
Mega-Drive 514B-3D-41, 514B-3D-46, 514B-3D-51, 514B-3D-56
514N, 514N-41, 514N-46, 514N-51, 514N-56
711AE, 711AE-41, 711AE-46, 711AE-51, 711AE-56
H-712N, H-712N-41, H-712N-46, H-712N-51, H-712N-56
712N-1, 712N-1-41, 712N-1-46, 712N-1-51, 712N-1-56
H-712N-Q, H-712N-Q-41, H-712N-Q-46, H-712N-Q-51, H-712N-Q-56
712AE, 712AE-41, 712AE-46, 712AE-51, 712AE-56
H-714N, H-714N-41, H-714N-46, H-714N-51, H-714N-56
H-714N-Q, H-714N-Q-41, H-714N-Q-46, H-714N-Q-51, H-714N-Q-56

Кресла-коляски инвалидные механические предназначены для больных и инвалидов-спинальников с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в домашних условиях, а также по дорогам с твердым покрытием.

1. Основные технические характеристики

Наименование	Ширина кресла-коляски, см	Ширина сидения кресла-коляски, см	Максим. масса пользователя, кг	Высота кресла-коляски, см	Ширина кресла-коляски в сложен. виде	Длина кресла-коляски, см
1A	60	43	100	92	29	105
1A-41	64	40	85	87	30	102
1A-46	64	46	85	87	30	102
1A-51	64	51	85	87	30	102
1A-56	64	56	85	87	30	102
1AC-41	62	41	100	93	29	104
1AC-46	63	46	100	93	29	104
1AC-51	63	51	100	93	29	104
1AC-56	63	56	100	93	29	105
1B	65	46	100	91	29	106
1B-1	64	43	100	92	29	106
1B-1 - 41	65	41	100	92	29	105
1B-1 - 46	65	46	100	92	29	105
1B-1 - 51	65	51	100	92	29	105
1B-1 - 56	65	56	100	92	29	105
1B - 41	66	41	105	100	30	104
1B - 46	66	46	105	100	30	104
1B - 51	66	51	105	100	30	104
1B - 56	66	56	105	100	30	104
1N	56	40	100	91	28	102
1N - 41	65	41	100	92	28	105
1N - 46	65	46	100	92	28	105
1N - 51	65	51	100	92	28	105
1N - 56	65	56	100	92	28	105
12B-1	64	43	100	92	29	106
12B-1 - 41	64	41	100	92	29	106
12B-1 - 46	64	46	100	92	29	106

B-1 - 51	64	51	100	92	29	106
B-1 - 56	64	56	100	92	29	106
B-3	63	46	102	94	30	105
B-3 - 41	65	41	102	94	30	105
B-3 - 46	63	46	102	94	30	105
B-3 - 51	63	51	102	94	30	105
B-3 - 56	63	56	102	94	30	105
B	65	46	100	91	26	106
B-41	66	41	100	92	28	105
B-46	66	46	100	92	28	105
B-51	66	51	100	92	28	105
B-56	66	56	100	92	28	105
2N	65	46	100	91	26	106
2N-41	68	41	102	93	29	105
2N-46	68	46	102	93	29	105
2N-51	68	51	102	93	29	105
2N-56	68	56	102	93	29	105
2Q-41	60	41	100	92	29	104
2Q-46	60	46	100	92	29	104
2Q-51	60	51	100	92	29	104
2Q-56	60	56	102	92	29	104
2AE-41	65	41	100	92	30	102
2AE-46	65	46	100	92	30	102
2AE-51	65	51	100	92	30	102
2AE-56	65	56	100	92	30	102
14A	63	46	100	91	29	106
14A-41	65	41	102	90	28	103
14A-46	65	46	102	90	28	103
14A-51	65	51	102	90	28	103
14A-56	65	56	102	90	28	103
14A-1	57	44	85	87	26	89
14A-1 - 41	57	41	85	87	26	89
14A-1 - 46	57	46	85	87	26	89
14A-1 - 51	57	51	85	87	26	89
14A-1 - 56	57	56	85	87	26	89
14A-2 - 41	67	41	95	92	28	102
14A-2 - 46	67	46	95	92	28	102
14A-2 - 51	67	51	95	92	28	102
14A-2 56	67	56	95	92	28	102
14A-3 - 41	70	41	100	95	30	101
14A-3 - 46	70	46	100	95	30	101

4A-3 - 51	70	51	100	95	30	101
4A-3 - 56	70	56	100	95	30	101
4A-4	60	43	85	88	29	111
4A-4 - 41	65	41	100	90	28	102
4A-4 - 46	65	46	100	90	28	102
4A-4 - 51	65	51	100	90	28	102
4A-4 - 56	65	56	100	90	28	102
4A-LX	55	40	100	87	26	85
4A-LX - 41	55	41	100	87	26	85
4A-LX - 46	55	46	100	87	26	85
4A-LX - 51	55	51	100	87	26	85
4A-LX - 56	55	56	100	87	26	85
4AC	53	36	75	86	28	90
4AC-41	53	41	75	86	28	90
4AC-46	53	46	75	86	28	90
4AC-51	53	51	75	86	28	90
4AC-56	53	56	75	86	28	90
4B	68	40	100	95	30	102
4B-41	68	41	100	95	30	102
4B-46	68	46	100	95	30	102
4B-51	68	51	100	95	30	102
4B-56	68	56	100	95	30	102
4B-1 - 41	72	41	95	88	28	100
4B-1 - 46	72	46	95	88	28	100
4B-1 - 51	72	51	95	88	28	100
4B-1 - 56	72	56	95	88	28	100
4B-2	68	44	85	87	30	102
4B-2 - 41	68	41	85	87	30	102
4B-2 - 46	68	46	85	87	30	102
4B-2 - 51	68	51	85	87	30	102
4B-2 - 56	68	56	85	87	30	102
ega-Track 4B-3 - 41	74	41	85	91	40	106
ega-Track 4B-3 - 46	74	46	85	91	40	106
ega-Track 4B-3 - 51	74	51	85	91	40	106
ega-Track 4B-3 - 56	74	56	85	91	40	106
ega-Drive 4B-3D - 41	75	41	85	91	40	105
ega-Drive	75	46	85	91	40	105

B-3D - 46						
ga-Drive B-3D - 51	75	51	85	91	40	105
ga-Drive B-3D - 56	75	56	85	91	40	105
IN	68	40	100	90	29	102
IN - 41	68	41	100	90	29	102
IN - 46	68	46	100	90	29	102
IN - 51	68	51	100	90	29	102
IN - 56	68	56	100	90	29	102
IAE	63	46	100	91	29	102
IAE - 41	65	41	102	91	29	102
IAE - 46	65	46	102	91	29	102
IAE - 51	65	51	102	91	29	102
IAE - 56	65	56	102	91	29	102
712N	68	46	100	106	30	125
712N - 41	75	41	100	95	28	106
712N - 46	75	46	100	95	28	106
712N - 51	75	51	100	95	28	106
712N - 56	75	56	100	95	28	106
2N-1	72	39	95	87	30	102
2N-1 - 41	72	41	95	87	30	102
2N-1 - 46	72	46	95	87	30	102
2N-1 - 51	75	51	95	87	30	102
2N-1 - 56	75	56	95	87	30	102
712N-Q	68	45	100	125	32	124
712N-Q - 41	68	41	100	125	32	124
712N-Q - 46	68	46	100	125	32	124
712N-Q - 51	68	51	100	125	32	124
712N-Q - 56	68	56	100	125	32	124
2AE	63	46	100	91	29	102
2AE - 41	70	41	102	90	30	104
2AE - 46	70	46	102	90	30	104
2AE - 51	70	51	102	90	30	104
2AE - 56	70	56	102	90	30	104
-714N	68	46	100	106	30	125
-714N - 41	75	41	100	95	28	102
-714N - 46	75	46	100	95	28	102
-714N - 51	75	51	100	95	28	102
-714N - 56	75	56	100	95	28	102
-714N-Q	68	45	100	125	32	124

714N-Q - 41	68	41	100	125	32	124
714N-Q - 46	68	46	100	125	32	124
714N-Q - 51	68	51	100	125	32	124
714N-Q - 56	68	56	100	125	32	124

Кресла-коляски артикулы: 511A, 511A-41, 511A-46, 511A-51, 511A-56, 511AC-41, 511AC-46, 511AC-51, 511AC-56, 511B-1, 511B-1-41, 511B-1-46, 511B-1-51, 511B-1-56, 512B-1, 512B-1-41, 512B-1-46, 512B-1-51, 512B-1-56, 514A-1, 514A-1-41, 514A-1-46, 514A-1-51, 514A-1-56, 514A-2- 41, 514A-2-46, 514A-2-51, 514A-2-56, 514A-3-41, 514A-3-46, 514A-3-51, 514A-3- 56.

Все кресла-коляски изготовлены из стали с порошковым покрытием. Состоят из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Все кресла-коляски складные.

Кресла-коляски укомплектованы двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Задние колеса блокируются тормозными рычагами (справа и слева).Заднее колесо не имеет ручного обода для передвижения самостоятельно. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.

Кресла-коляски артикулы: 511B, 511B-41, 511B-46, 511B-51, 511B-56, 512B-3, 512B-3-41, 512B-3-46, 512B-3-51, 512B-3-56, 512B, 512B-41, 512B-46, 512B-51, 512B-56, 512Q-41, 512Q-46, 512Q-51, 512Q-56, 512AE-41, 512AE-46, 512AE-51, 512AE-56, 514A, 514A-41, 514A-46, 514A-51, 514A-56, 514A-4, 514A-4- 41, 514A-4-46, 514A-4-51, 514A-4-56, 514AC, 514AC- 41, 514AC-46, 514AC-51, 514AC-56, 514B, 514B-41, 514B-46, 514B-51, 514B-56, 514B-1-41, 514B-1-46, 514B-1-51, 514B-1-56, 514B-2, 514B-2-41, 514B-2-46, 514B-2-51, 514B-2-56, Mega-Track 514B-3-41, 514B-3-46, 514B-3-51, 514B-3-56, Mega-Drive 514B-3D-41, 514B-3D-46, 514B-3D-51, 514B-3D-56, 711AE, 711AE- 41, 711AE-46, 711AE-51, 711AE-56, 712AE, 712AE-41, 712AE-46, 712AE-51, 712AE-56.

Все модели изготовлены из стали с порошковым покрытием. Состоят из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Все кресла-коляски складные.

Модели кресел-колясок укомплектованы стояночными тормозами. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. В моделях 711AE, 711AE-41, 711AE-46, 711AE-51, 711AE-56, 712AE, 712AE-41, 712AE-46, 712AE-51, 712AE-56, 514A-4, 514A-4-41, 514A-4-46, 514A-4-51, 514A-4-56 подлокотники и подножки съемные. В остальных моделях подлокотники подножки стационарные.

Кресла-коляски модели: H-712N, H-712N-41, H-712N-46, H-712N-51, H-712N-56, 712N-1, 712N-1-41, 712N-1-46, 712N-1-51, 712N-1-56, H-712N-Q, H-712N-Q-41, H-712N-Q-46, H-712N-Q-51, H-712N-Q-56, H-714N, H-714N-41, H-714N-46, H-714N-51, H-714N-56, H-714N-Q, H-714N-Q-41, H-714N-Q-46, H-714N-Q-51, H-714N-Q-56, 511N, 511N-41, 511N-46, 511N-51, 511N-56, 512N, 512N-41, 512N-46, 512N-51, 512N-56, 514N, 514N-41, 514N-46, 514N-51, 514N-56.

285

Все кресла-коляски изготовлены из стали с порошковым покрытием. Состоят из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес, санитарного устройства. Все кресла-коляски складные.

Артикулы кресел-колясок укомплектованы стояночными тормозами. Тормоза располагаются на раме и блокируют задние колеса (справа и слева). Заднее колесо имеет ручной обод для самостоятельного передвижения пользователя. Подлокотники и подножки стационарные. Имеется санитарное устройство, в виде съемного пластикового горшка. Санитарное устройство крепится под сидение на кронштейнах.

Кресла-коляски артикулы: 514A-LX, 514A-LX-41, 514A-LX-46, 514A-LX-51, 514A-LX-56.

Все артикулы изготовлены из стали с порошковым покрытием. Состоят из: рамы, спинки, мягкого сидения, подлокотников, подножек, ремня безопасности, передних и задних колес. Все кресла-коляски складные.

Кресла-коляски укомплектованы двумя стояночными тормозами (слева и справа). Тормоза на специальных ручках для сопровождающего лица. Передние и задние колеса не имеют ручного обода для самостоятельного передвижения. Подлокотники фиксированные. Подножки фиксированные, укомплектованы опорами для голени и стоп.

У кресел-колясок артикулы: 511A, 511A-41, 511A-46, 511A-51, 511A-56, 511AC - 41, 511AC - 46, 511AC - 51, 511AC - 56, 511B, 511B-1, 511B-1-41, 511B-1-46, 511B-1-51, 511B-1-56, 511B - 41, 511B - 46, 511B - 51, 511B - 56, 511N, 511N - 41, 511N - 46, 511N - 51, 511N - 56, 512B-1, 512B-1-41, 512B-1-46, 512B-1-51, 512B-1-56, 512B-3, 512B-3 - 41, 512B-3 - 46, 512B-3-51, 512B-3-56, 512B, 512B-41, 512B-46, 512B-51, 512B-56, 512N, 512N-41, 512N-46, 512N-51, 512N-56, 512Q-41, 512Q-46, 512Q-51, 512Q-56, 512AE-41, 512AE-46, 512AE-51, 512AE-56, 514A, 514A-41, 514A-46, 514A-51, 514A-56, 514A-1, 514A-1-41, 514A-1-46, 514A-1-51, 514A-1-56, 514A-2-41, 514A-2-46, 514A-2-51, 514A-2-56, 514A-3-41, 514A-3-46, 514A-3-51, 514A-3-56, 514A-4, 514A-4-41, 514A-4-46, 514A-4-51, 514A-4-56, 514A-LX, 514A-LX-41, 514A-LX-46, 514A-LX-51, 514A-LX-56, 514AC, 514AC-41, 514AC-46, 514AC-51, 514AC-56, 514B, 514B-41, 514B-46, 514B-51, 514B-56, 514B-1-41, 514B-1-46, 514B-1-51, 514B-1-56, 514B-2, 514B-2-41, 514B-2-46, 514B-2-51, 514B-2-56, Mega-Track 514B-3-41, 514B-3-46, 514B-3-51, 514B-3-56, Mega-Drive 514B-3D-41, 514B-3D-46, 514B-3D-51, 514B-3D-56, 514N, 514N-41, 514N-46, 514N-51, 514N-56, H-712N, H-712N-41, H-712N-46, H-712N-51, H-712N-56, 712N-1, 712N-1-41, 712N-1-46, 712N-1-51, 712N-1-56, 712AE, 712AE-41, 712AE-46, 712AE-51, 712AE-56, H-714N, H-714N-41, H-714N-46, H-714N-51, H-714N-56 сидения изготовлены из нейлоновой ткани с водоотталкивающей пропиткой.

2. Указание мер безопасности.

При посадке пользователя в кресло-коляску, и высадке из него, колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешатся вставать на подножки, которые при посадке и высадке пользователя должна быть поднята в вертикальное положение.

186

Категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

3. Подготовка изделия к работе.

Кресла-коляски складываются и раскладываются без инструмента.

Сборка рамы:

- Раздвинуть подлокотники в стороны, и нажать по бокам сидения вниз от себя до полного раскладывания.
- Установить подставку для ног. Для этого нужно установить ее в гнездо, предварительно повернув всю подставку для ног в сторону. Затем следует повернуть подставку в нормальное положение, пока она не закрепится на раме прочно.
- Необходимо настроить высоту сидения, наклон спинки и подножек.
- Для складывания кресел-колясок необходимо потянуть за середину сидения и поднять вверх.

4. Обслуживание и уход при эксплуатации.

При эксплуатации кресла-коляски не требуют определенного ухода. При ежедневном использовании необходимо периодически смазывать машинным маслом шарниры, механизм раскладывания и подшипниковые узлы. Периодичность смазки не реже одного раза в месяц. При необходимости ткань сидения, спинки и подлокотника протирать влажной тряпкой смоченной в моющем растворе.

Рекомендуется предохранять кресла-коляски от ударов твердыми и острыми предметами. Особое внимание следует обратить на шины колес. Частые поездки с низким давлением воздуха в камере колеса вызывают их преждевременный износ.

5. Правила хранения.

Не допускается хранение кресел-колясок в сыром помещении, а также в помещении с активными агрессивными и пылящимися веществами.

6. Гарантийные сроки.

Срок эксплуатации не менее 4-х лет. Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или со дня получения ее потребителем.

Гарантийный срок хранения – 2 года.

категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

3. Подготовка изделия к работе.

Кресла-коляски складываются и раскладываются без инструмента.

Сборка рамы:

- Раздвинуть подлокотники в стороны, и нажать по бокам сидения вниз от себя до полного раскладывания.
- Установить подставку для ног. Для этого нужно установить ее в гнездо, предварительно повернув всю подставку для ног в сторону. Затем следует повернуть подставку в нормальное положение, пока она не закрепится на раме прочно.
- Необходимо настроить высоту сидения, наклон спинки и подножек.
- Для складывания кресел-колясок необходимо потянуть за середину сидения и поднять вверх.

4. Обслуживание и уход при эксплуатации.

При эксплуатации кресла-коляски не требуют определенного ухода. При ежедневном использовании необходимо периодически смазывать машинным маслом шарниры, механизм раскладывания и подшипниковые узлы. Периодичность смазки не реже одного раза в месяц. При необходимости ткань сидения, спинки и подлокотника протирать влажной тряпкой смоченной в моющем растворе.

Рекомендуется предохранять кресла-коляски от ударов твердыми и острыми предметами. Особое внимание следует обратить на шины колес. Частые поездки с низким давлением воздуха в камере колеса вызывают их преждевременный износ.

5. Правила хранения.

Не допускается хранение кресел-колясок в сыром помещении, а также в помещении с активными агрессивными и пылящимися веществами.

6. Гарантийные сроки.

Срок эксплуатации не менее 4-х лет. Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или со дня получения ее потребителем.

Гарантийный срок хранения – 2 года.

категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными
элементами.

3. Подготовка изделия к работе.

Кресла-коляски складываются и раскладываются без инструмента.

Сборка рамы:

- Раздвинуть подлокотники в стороны, и нажать по бокам сидения вниз от себя до полного раскладывания.
- Установить подставку для ног. Для этого нужно установить ее в гнездо, предварительно повернув всю подставку для ног в сторону. Затем следует повернуть подставку в нормальное положение, пока она не закрепится на раме прочно.
- Необходимо настроить высоту сидения, наклон спинки и подножек.
- Для складывания кресел-колясок необходимо потянуть за середину сидения и поднять вверх.

4. Обслуживание и уход при эксплуатации.

При эксплуатации кресла-коляски не требуют определенного ухода. При ежедневном использовании необходимо периодически смазывать машинным маслом шарниры, механизм раскладывания и подшипниковые узлы. Периодичность смазки не реже одного раза в месяц. При необходимости ткань сидения, спинки и подлокотника протирать влажной тряпкой смоченной в моющем растворе.

Рекомендуется предохранять кресла-коляски от ударов твердыми и острыми предметами. Особое внимание следует обратить на шины колес. Частые поездки с низким давлением воздуха в камере колеса вызывают их преждевременный износ.

5. Правила хранения.

Не допускается хранение кресел-колясок в сыром помещении, а также в помещении с активными агрессивными и пылящимися веществами.

6. Гарантийные сроки.

Срок эксплуатации не менее 4-х лет. Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или со дня получения ее потребителем.

Гарантийный срок хранения – 2 года.