

# ИНСТРУКЦИЯ

Система одноразовая для внутривенного введения растворов со встроенным барьером вентиляции против бактерий «Евродрип» - нетоксична, апиrogenная, стерильная. Стерильность гарантирована если упаковка не повреждена.

1. Закройте контрольный зажим.
2. Снимите защитное приспособление с пластмассового конуса и вставьте конус в выпускное отверстие контейнера с раствором. Осторожно откройте крышку вентиляционного приспособления.
3. Закрепите контейнер, заполните капельную камеру наполовину путем ее однократного сжатия и разжатия. Не заполняйте камеру полностью!
4. Держа иглу вверх, откройте зажим и пустите раствор, чтобы он полностью вытеснил воздух из трубочки и иглки; закройте зажим.
5. Произведите прокол вены и отрегулируйте поток раствора медленным открытием зажима.
6. Масса 20 капель воды очищенной эквивалентно  $1 \pm 0,1$  г.

## Предостережение:

- Не использовать для крови и ее производных;
- Не использовать, если упаковка открыта или повреждена;
- Не хранить при высоких температурах и влажности; хранить в прохладном и сухом месте;
- Выбрасывать сразу же после одноразового использования.

