

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «НЬЮФАРМ»

А.Ю.Судаков

14.04.2018 2018 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
(РЕДАКЦИЯ №3)
БИНТЫ ЭЛАСТИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ**

Наименование медицинского изделия:

«Бинты эластичные медицинские»

Варианты исполнения медицинского изделия:

Бинты эластичные медицинские выпускаются: длиной 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 20 м и шириной 2,5; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 15,0 и 20 см в 4-х исполнениях.

Исполнение 1. Бинт эластичный медицинский высокой растяжимости

Исполнение 2. Бинт эластичный медицинский средней растяжимости

Исполнение 3. Бинт эластичный медицинский малой растяжимости

Исполнение 4. Бинт эластичный медицинский спортивный

Назначение:

Для проведения компрессионной терапии в различных областях хирургии (сердечно-сосудистой, абдоминальной, торакальной, пластической и др.), травматологии, ортопедии, спортивной медицине и других областях практического здравоохранения, а именно для лечения и профилактики варикозного расширения вен, для фиксации травмированных суставов, для профилактики венозной недостаточности, для профилактики тромбоэмболии в до и послеоперационном периоде, для лечения воспалительных и дистрофических заболеваний суставов, для профилактики и лечения при проведении склеротерапии, для профилактики и лечения спортивной травмы.

Область применения:

Бинты могут быть использованы в клинических, поликлинических, полевых условиях, при оказании первой медицинской помощи и в домашних условиях.

Показания к применению:

Бинты медицинские эластичные высокой растяжимости предназначены:

- для лечения варикоза или фиксации суставов при хирургических процедурах и в послеоперационном периоде (для защиты от гематом);
- для профилактики симптомов хронической венозной недостаточности при физической нагрузке
- для фиксации суставов верхних и нижних конечностей при разных вывихах и растяжениях;
- для профилактики тромбоза глубоких вен, после различных операций на венах нижних конечностей.

Бинты медицинские эластичные средней растяжимости предназначены:

- для лечения и профилактики варикозного расширения вен верхних и нижних конечностей, в период до и после операций;
- для профилактики тромбоэмболии в до и послеоперационном периоде;
- для лечения воспалительных и дистрофических заболеваний суставов;
- при травматических поражениях.

Бинты медицинские эластичные малой растяжимости предназначены:

- для профилактики и лечения при проведении склеротерапии;
- для профилактики предотвращения образования тромбов в венах, в послеоперационный период для нормализации циркуляции крови и лимфы;
- в качестве вспомогательного средства в травматологии для наложения повязки после снятия гипса.

Бинты эластичные медицинские спортивные предназначены:

- для профилактики и лечения спортивной травмы (вывихи, растяжения, ушибы) в качестве средства для создания защитной повязки на суставы;

- для фиксации суставов верхних и нижних конечностей при разных вывихах и растяжениях.

Противопоказания к применению:

Аллергические реакции на компоненты изделия

Основные технические характеристики:

Бинты должны соответствовать размерам, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

Бинт медицинский эластичный высокой растяжимости											
Длина, м	Ширина, см										
0,6±0,1	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
1,0 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
1,5 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
2,0 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
2,5 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
3,0 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
3,5 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
4,0 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
4,5 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
5,0± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
6,0± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
7,0± 0,3	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
20,0± 0,5	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
Бинт медицинский эластичный средней растяжимости											
Длина, м	Ширина, см										
0,6±0,1	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
1,0 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
1,5 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
2,0 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
2,5 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
3,0 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
3,5 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
4,0 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
4,5 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
5,0± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
6,0± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
7,0± 0,3	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
20,0± 0,5	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
Бинт медицинский эластичный малой растяжимости											
Длина, м	Ширина, см										
0,6±0,1	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
1,0 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
1,5 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
2,0 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
2,5 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
3,0 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
3,5 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
4,0 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
4,5 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
5,0± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
6,0± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
7,0± 0,3	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	
20,0± 0,5	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5	

Продолжение таблицы 1.

Бинт медицинский эластичный спортивный										
Длина, м	Ширина, см									
0,6±0,1	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5
1,0 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5
1,5 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5
2,0 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5
2,5 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5
3,0 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5
3,5 ±0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5
4,0 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5
4,5 ± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5
5,0± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5
6,0± 0,2	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5
7,0± 0,3	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5
20,0± 0,5	2,5±0,3	4,0±0,3	5,0±0,3	6,0±0,3	8,0 ± 0,5	10,0 ±0,5	12,0 ±0,5	14,0 ±0,5	15,0 ±0,5	20,0 ±0,5

Бинты должны изготавливаться из материалов, разрешенных к применению в медицинской практике.

Для изготовления бинтов должны быть использованы:

- хлопчатобумажная трикотажная пряжа отбеленная и окрашенная по ГОСТ 9092;
- нить полиэфирная текстурированная по ТУ РБ 00204056-129-96;
- высокообъемная полиакрильная пряжа по ТУ 9082-009-00322206-95;
- нить латексная по ТУ РБ 001494338-078-96 ;
- эластомерное волокно «Лайкра», производства фирмы «Invista», США.
- нити швейные по ГОСТ 6309.

Подготовка изделия к использованию:

1. Подбор необходимого бинта производится в соответствии с назначением врача:

Исполнение 1. "Бинт медицинский эластичный высокой растяжимости

лечение варикозного расширения вен III-IV степени, комплексная терапия тромбозов и после операций склерозирования и флебэктомии, для лечения травматических повреждений суставов (растяжений, вывихов, ушибов).

Исполнение 2. "Бинт медицинский эластичный средней растяжимости

профилактика и лечение начальных стадий варикозного расширения вен и тромбозов.

Исполнение 3. "Бинт медицинский эластичный малой растяжимости

для проведения склеротерапии, в качестве вспомогательного средства в травматологии для наложения повязки после снятия гипса.

Исполнение 4. "Бинт медицинский эластичный спортивный

профилактика и лечение спортивной травмы (вывихи, растяжения, ушибы) в качестве средства для создания защитной повязки на суставы.

2. В зависимости от места применения на теле пациента подбирается ширина и длина бинта:

- суставы ног и рук – ширина 8 см длина от 0,6 м до 2 м;
- ноги от основания пальцев до и выше колена – ширина 8-20 см длина 3-5 м.

3. Перед использованием бинта, его необходимо перематывать в обратном направлении, так чтобы застежка оказалась внутри мотка. Для этого нужно взяться за край бинта, на котором пришита крючковая часть застежки, при этом застежка должна находиться на внутренней стороне бинта, отогнуть застежку на внешнюю сторону и в этом направлении продолжать намотку.

Порядок применения:

1. Бинтование следует осуществлять растягивая бинт на 50-60% нисходящими и восходящими турами, по типу восьмерки.

2. По окончании наложения повязки бинт фиксируется с помощью регулируемой текстильной застежки типа «вилькро».

3. По мере необходимости бинты подвергаются стиркам в теплой воде при температуре 40-45°C с использованием слабощелочных моющих средств. Бинты не выкручивают и сушат в расправленном состоянии.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие бинтов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленными настоящими ТУ.

Гарантийный срок годности бинта – 5 лет с даты его изготовления.

Условия хранения:

Бинты должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Утилизация:

Использованные изделия относят к отходам класса А и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

Претензии направлять по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ»

ИНН 3703015180

155800, Россия, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1

т/ф (49331) 2-00-63

E-mail: info@n-farm.ru

КОПИЯ
ВЕРНА

Пронумеровано и прошнуровано

5 (лет) 11 месяцев

Директор ООО «НЬЮФАРМ»

Панцуркина Л.С.

